



Vejledning til


ZigZag-lampen

Opladning


Lampen leveres med et USB-kabel, men **ikke** med en lysnetadapter til opladning – benyt en almindelig USB-lysnetadapter med USB A-stik, f.eks. en oplader til mobiltelefoner.

Det *mindste* stik på det medfølgende kabel sættes i det aflange stikhul i den ene ende af zigzag-lampen, mens det andet stik skal sættes i stikhullet på den benyttede USB-lysnetadapter. Sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt, og husk at tænde for strømmen på kontakten.

Indikatorlampen lyser rødt, mens lampen lades op, og slukker når opladningen er fuldført. Når det sker, bør kablet trækkes ud af lampen, og lysnetadapteren tages ud af stikkontakten.

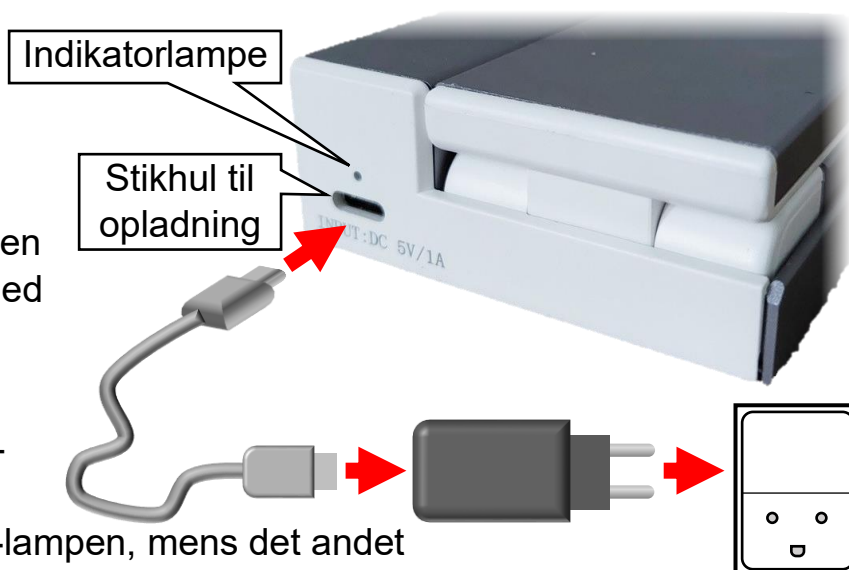

Folde lampen ud og sammen

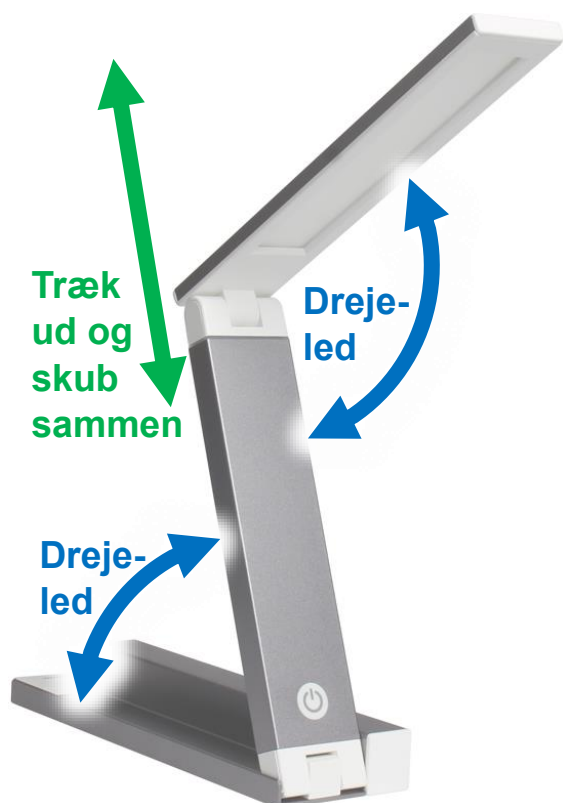

Lampearmen har to drejeled, hvor den kan foldes ud (vist med blå på illustrationen til venstre), og dertil kan det lampearmer trækkes ud og skubbes sammen (vist med grønt på illustrationen). Benyt dette til at placere lampehovedet, så dens lys falder der, hvor De har brug for det.

Tænde, slukke og tilpasse lysstyrken

Knappen til at tænde og slukke lampen sidder nederst på lampearmen, som vist på illustrationen: **Berør den kort-variant for at tænde for lyset.**

Ved at berøre knappen flere gange kan De vælge mellem tre forskellige lysstyrker. Bemærk at valget af lysstyrke har indflydelse på, hvor længe lampen kan lyse på en opladning; svagere lys giver længere drifttid på en opladning.

For at **slukke lyset** skal De sætte en finger på knappen, og **holde fingeren der i cirka 2 sekunder.**

Specifikationer

Mål og vægt: 19,8 × 6,3 × 2,4 cm; 330 gram
Drifttid: Op til 5 timer på en fuld opladning (fabriksnyt batteri)
Elforbrug: 3,5 watt (ved maksimal lysstyrke)
Farvetemperatur: 5500 K

Varenummer: LV3181
HMI-nummer: 129379

