



PT 196

Forstærkertelefon

(med punktskrift på taltaster)



Produceres Ikke med dansk sprogmenu

Brugervejledning



Betjeningsvejledning

Læs venligst denne vejledning før ibrugtagning.

Fastnettelefon til privat brug.

Uautoriserede ændringer eller konverteringer er ikke tilladt.

Undgå udsættelse for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, høj varme eller direkte sollys. Anbefalet driftstemperatur mellem + 5 ° C og + 40 ° C.

Høreapparat kompatibel



Telefonen er perfekt indstillet til personer med telespole i høreapparater.

Kompatibel med de fleste høreapparater på markedet.

PT196 er en komplet DUPLEX-telefon, hvor du kan føre en 2-vejs samtale uden akustisk feedback i røret under normal samtale såvel som i håndfri samtale.


Kontroller indholdet af pakken

- 1 Telefon
- 1 Telefonrør
- 1 Spiralledning
- 1 Telefonkabel
- 1 Brugervejledning

Telefoninstallation

- Din telefon skal installeres mindst 1 meter fra radioudstyr som fjernsyn, mobiltelefon osv.
- Placer telefonen på en plan overflade for at få mere stabilitet. Monter spiralledning i røret (A) og i stikket på venstre side af telefonen (B).
- Sæt den lille ende af strømadapteren i strømstikket på basen (D)
- Sæt den store ende af strømadapteren i en stikkontakt (E)
- Sæt telefonledningen i stikket bag på telefonen og i telefonstikket i væggen (C), eller i internetmodemmets telefonport. Løft de to fødder under bunden (F), for bordstilling.




Brug kun den 6,0 V AC/DC strømadapter, der følger med til telefonen.

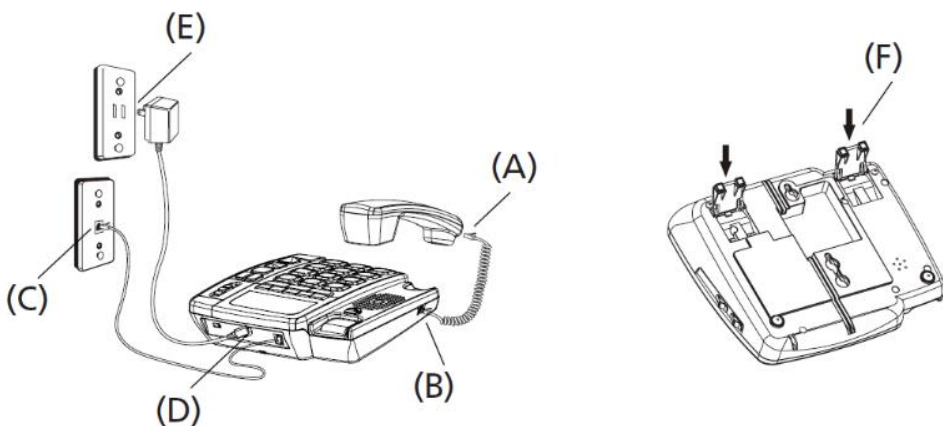







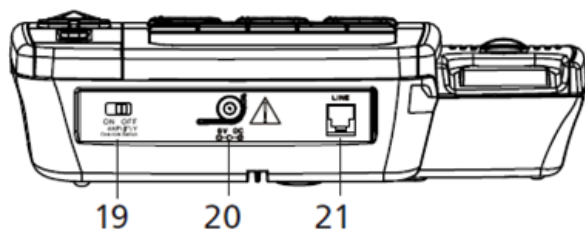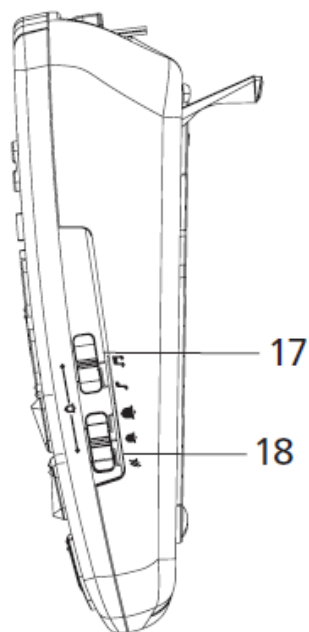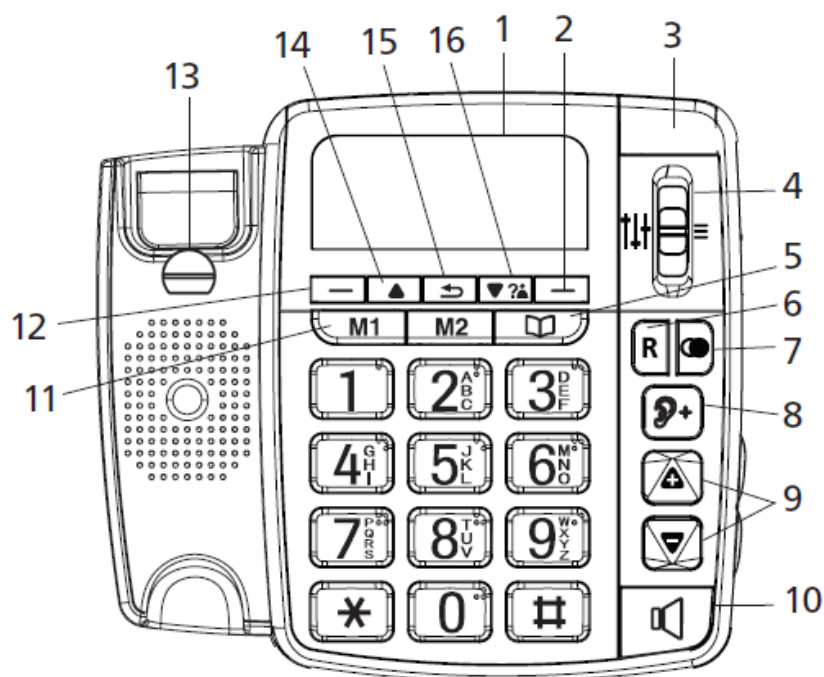







Vægmontering

- Vip det lille plaststykke på bunden (Pkt. 13 i telefonbeskrivelsen).
- Bor to huller på 6 mm, 100 mm fra hinanden. Indsæt 2 rawlplugs og skru 2 skruer i (3,5 mm i diameter og 30 mm lange).
- Monter basen på de 2 skruer ved at trække den nedad.

Telefonbeskrivelse

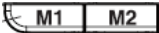

Telefonbeskrivelse

1. LCD-skærm
2. Højre softkey 
3. Indikator (lyser ved indgående opkald) 
4. Tonekontrol (equalizer) 
5. Telefonbog 
6. Hurtig-tast
7. Genopkaldstast 
8. Lydforstærkning (håndsættets lydstyrke forstærkes) 
9. Håndfri eller håndsæt lydstyrke øges / mindskes 
10. Håndfri tast 
11. Direkte Hukommelse - taster (M1 og M2) 
12. Venstre softkey (MENU) 
13. Ophængning 
14. Op 
15. Returtast 
16. Ned / CID (vis nummer) - gennemgang 
17. Justering af ringetone
18. Justering af ringevolumen
19. Fast lydforstærkning til/fra
20. DC 6V-indgang
21. Liniestik (telefon)


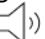
Equalizer

Vælg den lydprofil, der passer dig bedst. Skub kontakten (pkt. 3) for at justere modtagerens lydprofil (lys eller mørk klang) i røret (3 valg)


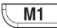





Telefonindstillinger

Foretag opkald:

Løft røret, eller tryk på . Indtast telefonnummeret og afvent forbindelse. Afslut opkaldet: Læg røret tilbage på basen, eller tryk på .


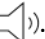
Foretag opringning fra gemte kontakter:

Løft røret, eller tryk på tasten . Tryk på  ,  eller  , og tryk pil op eller ned (øverste række) for at udvælge en kontakt. For at afslutte opkald: Læg røret på eller tryk på .

Foretag genopkald fra opkaldslisten:

Tryk på tasten . Tryk pil op eller ned for at vælge nummeret. Løft røret, eller tryk på tasten .

Besvar et opkald

For at svare: Løft røret eller tryk på tasten  (håndfri tilstand).
For at lægge på: Læg røret på basen eller tryk på tasten .

Indstil håndfri lydstyrke

Tryk pil op eller ned for at ændre lydstyrken. Der kan vælges 8 niveauer.


Indstil ringevolumen

Skub kontakten for at justere ringevolumen.   

Bemærk: Når ringetonen er slukket, blinker opkaldslyset stadig for at indikere et indgående opkald.

Indstil lydstyrke (og lydforstærkning)

Standardtilstand: Tryk pil op og ned for at øge eller mindske (8 niveauer)

Audio boost-tilstand (ekstra stærk op til +60db): Under samtalen, tryk på  tasten. Tryk på denne knap igen for at stoppe forstærkning.

En skydeknap på bagsiden af telefonen (Pkt. 19) (AMPLIFY) bruges til at aktivere lydforstærkningsfunktionen permanent. Som standard er positionen "OFF". Hvis den er i "ON" position, aktiveres lydforstærkning automatisk ved hvert opkald.

Alle indstillinger starter med tryk på menu-tasten



(*Brug piletasterne)

Vælg sprog (Select Language)

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge sprog (**Language**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge det ønskede sprog. Tryk på **OK** og ↵

Vælg skærmskontrast (Select contrast)

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Vis kontrast (**Display contrast**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge det ønskede niveau. Tryk på **OK** og ↵

Indstil flashtid (Select Flash Time)

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge flashtid (**Recall time**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge den ønskede flashtid. Tryk på **OK** og ↵

Ringetone (Select Tone)

Vælg mellem 20 forskellige ringetoner.

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Ringetone (**Ringertone**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge den ønskede ringetone. Tryk på **OK** og ↵

Tastetoner (Select keytone)

Tilvælg/fravælg lyd ved tryk på en knap på tastaturet

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Tastetoner (**Keypad tones**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Toner til (**On**) eller Toner fra (**Off**). Tryk på **OK** og ↵


Bekræftelsestoner (Confirmation tones)

Til- eller fravælg lyd ved valg af indstillinger:


1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **Confirmation tones**. Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Tone til (**On**) eller fra (**Off**). Tryk på **OK** og




Softwareversion (Software version)

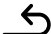1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **Software version**. Tryk på **OK**.
3. Softwareversionen vises. Tryk  for at vende tilbage til standby tilstand.


Opkaldstilstand (Dial mode)

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge opkaldstilstand (**Dial mode**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **Tone** eller Pulse (**Puls**). Tryk på **OK** og 

Nulstil (Reset)

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Indstillinger (**Settings**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Nulstil (**Reset**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Nulstil indstillinger (**Reset settings**) eller Slet brugerdata (**Delete user data**). Tryk på **OK**.
4. Tryk Ja (**Yes**) for at bekræfte og tryk herefter 

Indstil hukommelser til direkte adgang M1 / M2 / KEY1 (tast "1")

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Direkte Hukommelse (**Direct memory**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **M1, M1 eller KEY1**.
3. Tryk på Tilføj (**Add**) eller Valg/Rediger/OK (**Options/Edit/OK**).
4. Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Tryk på Gem (**Save**) og 

Slet et tlf. nr. i hukommelsen

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Direkte hukommelse (**Direct memory**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned til det nummer, du vil slette. Tryk på Valg (**Options**).

3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Slet (**Delete**). Tryk på **OK**.
4. Displayet viser "Er du sikker?" (**Are you sure?**) Tryk på Ja (**Yes**) og ↩

Kopier et kontakt- eller opkaldslistennummer til M1 / M2 / KEY1 (tast "1")

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **Direct memory**. Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **M1, M2 eller KEY1**. Tryk på Tilføj (**Add**)
3. Tryk på Valg (**Options**).
4. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **From contacts or from call list**. Tryk på **OK**.
5. Tryk pil op eller pil ned for at vælge nummeret. Tryk på Vælg (**Select**) og ↩

Telefonbog (Phonebook). Vælg "Phonebook" :

Når telefonbogen er tom:

- Tryk på Tilføj (**Add**). Indtast navnet ved hjælp af tastaturet. Tryk på Næste (**Next**)

1. Når telefonbogen har poster:

- Tryk på Valg (**Options**). - Tryk pil op eller pil ned for at vælge Tilføj ny kontakt (**Add new contact**). Tryk på **OK**.

2. Indtast navnet ved hjælp af tastaturet. Tryk på Næste (**Next**).

3. Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Tryk på Gem (**Save**) og ↩

Indtastning af navne

Brug tastaturets bogstaver til at indtaste navne, f.eks. at oprette "Ole":

Tryk på **6**, een gang for at indtaste O.

Tryk på **5** tre gange for at indtaste L.

Tryk på **3** to gange for at indtaste E.

Tips til skrivning:


Tryk på Slet (**Clear**) for at slette det sidste tegn eller ciffer.

Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum.

Tryk på **#** for at skifte fra store til små bogstaver og fra tegn til cifre.

Vis eller ring op til en kontakt. Vælg "Phonebook":

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge den ønskede post, eller Indtast første bogstav i navnet for at søge alfabetisk.

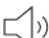2. Løft røret for at ringe op, eller  for at ringe nummeret over håndfri.

Rediger et navn og nummer

1. Tryk på . Den første post vises.

2. Tryk pil op eller pil ned til den kontakt, du vil redigere. Tryk på Valg (**Options**).

3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge rediger kontakt. Tryk på **OK**.

4. Navnet vises. Slet navnet, hvis det kræves. Indtast det nye navn. Tryk **Next**.
5. Eksisterende nummer vises. Slet nummeret. Indtast nyt nummer. Tryk Gem (Save) og ↩

Slet en kontakt

1. Tryk pil op eller pil ned til den kontakt, du vil slette. Tryk på Valg (**Options**).
2. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Slet kontakt (**Delete contact**). Tryk på **OK**.
3. Displayet viser Er du sikker? (**Are you sure?**). Tryk på Ja (**Yes**) og ↩

Hukommelsesstatus (Memory status). Vælg "Phonebook":

1. Tryk pil op eller pil ned for at vælge **Memory status**. Tryk på **OK**.
2. Antallet af gemte kontakter vises. Tryk herefter ↩

Nummerviser og opkaldsliste

Vigtig: For at bruge opkalds-ID skal du først abonnere på tjenesten hos din telefon- eller netværksudbyder.

For at sikre, at opkalderens navn vises, skal du sørge for at have gemt det fulde telefonnummer inklusive landekoden i telefonbogen.



Nummerviser

Hvis du abonnerer på nummerviser, vises opkaldsnummeret (forudsat at det ikke er ukendt- eller anonymt nr.), inden opkaldet besvares.


Opkaldsliste

Opkaldslisten gemmer detaljer om de sidste 30 ind-/udgående og ubesvarede opkald, med telefonnummer og dato for opkaldet.

Ring til et nummer på opkaldslisten

1. Tryk pil ned  for at åbne opkaldslisten.
2. Tryk pil op eller pil ned til den ønskede kontakt.
3. Løft røret for at ringe op, eller tryk  på for at ringe via håndfri.



Kopier et opkaldslistennummer til telefonbogen

1. Tryk på pil ned  for at åbne opkaldslisten.
2. Tryk pil op eller pil ned til den ønskede kontakt. Tryk på Valg (**Options**).
3. Tryk pil op eller pil ned for at vælge Gem nummer (**Save number**). Tryk på **OK**.
4. Indtast navnet. Tryk på Næste (**Next**).

5. Rediger nummeret, hvis det kræves. Tryk på Gem (**Save**) og ↩

Se afsnit 'Indtastning af navne'.

Slet en kontakt


1. Tryk på pil ned  for at åbne opkaldslisten. Tryk på Valg (**Options**).
2. Tryk pil op eller ned til den ønskede kontakt.
3. Tryk pil op eller ned for at slette valgte kontakt. Tryk på **OK**. 

Dato og tid


Hvis du abonnerer på en nummervisningstjeneste, indstilles dato og klokkeslæt automatisk, når du modtager dit første opkald. Hvis du ikke har nummervisningstjeneste, kan du indstille dato og klokkeslæt manuelt.

Indstil tidsformatet

Du kan bruge et 24- eller 12-timersformat til at vise klokkeslættet på din telefon. For at indstille din præference i **menu**:

1. Tryk pil op eller ned for at vælge Tid og dato (**Time & date**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller ned for at vælge tidsformat (**Time format**). Tryk på **OK**.
3. Tryk pil op eller ned for at vælge enten 12 timer eller 24 timer. Tryk på **OK**.
4. Tryk  for at vende tilbage til standby.

Indstil dato og klokkeslæt

1. Tryk pil op eller ned for at vælge Tid og dato (**Time & date**). Tryk på **OK**.
2. Tryk pil op eller ned for at vælge Indstil tid og dato (**Set time & date**). Tryk på **OK**.
3. Indtast klokkeslættet ved hjælp af tastaturet (f.eks. 6:20). Tryk på Næste (**Next**).
4. Brug tastaturet til at indtaste dato (DD/MM/ÅÅÅÅ). Tryk på **Save** og .

Fejlsøgning

- | | |
|----------------------------------|--|
| Ingen ringetone: | Brug kun den medfølgende telefonledning og kontroller, at telefonledningen er tilsluttet korrekt |
| Ingen ringetone: | Ringetonen er deaktiveret eller forøg lydstyrken. |
| Vis nummer fungerer ikke: | Tjek dit abonnement hos din teleudbyder. |
| Kontakt kan ikke gemmes: | Telefonbogen er fuld. Slet en post for at frigøre hukommelse. |
| Intet display: | Prøv at afbryde og tilslutte strømforsyningen. |

Bortskaffelse

Elektronikaffald må ikke destrueres under daglig renovation. Udtjente elektriske produkter, skal deponeres på kommunernes genbrugspladser under ”Elektronikaffald” Batterier skal deponeres separat under anviste beholder i henhold til gældende regler på området.



Garanti

AMPLICOMMS udstyr er produceret og testet i henhold til de seneste produktionsmetoder. Gennemførelsen af nøje udvalgte materialer og stærkt udviklede teknologier sikrer problemfri funktion og lang levetid.

Garantien er 2 år. Gælder ikke for de genopladelige batterier eller strømfor-
syninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af forkert håndtering,
drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation,
force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for
garanti. I tilfælde af reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller
udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Indsend dit Amplicomms
udstyr sammen med købsfaktura.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk