



# Brugermanual

V-KS350  
Rejse el-kørestol





# Forholdsregler

Denne brugermanual skal gennemlæses inden din el-kørestol tages i brug.

Manualen indeholder en række vigtige informationer herunder Opladning, betjening og vedligeholdelse m.m.

**Kør aldrig** hvis du er påvirket af alkohol eller andre stoffer, som kan påvirke kørslen.

**Undgå forhindringer** med en stejl stigning, høje kanter eller ujævnheder, som kan gøre kørslen usikker.

Der tages forbehold for trykfejl.

Manualens oplysninger var gældende på trykstidspunktet. Afvigelser og opdateringer i forhold til produktet kan forekomme. Ved afvigelser anbefaler vi at kontakte Varsø's kundeservice.

Tlf.

**70 60 56 26**

Mail

**kundeservice@varsoe.dk**





# Specifikationer

## V-KS350



- V-KS350 er vores smarte sammenklappelige el-kørestol. Den er nem at folde sammen, og tage med på tur eller ud at rejse.
- Begge baghjul inkl. motor samt batterier kan nemt afmonteres, så kørestolen bliver endnu lettere at pakke i bilen.
- **GODKENDT** til fly.
- Kørestolen har massive gummihjul, som ikke kan punktere.
- Den kører op til 6 km/t og op til 25 km på én opladning.
- Alle Varsø's el-kørestole betjenes via et joystick, og kan køres med både højre og venstre hånd.

### VÆGT

**Baghjul** (2) 11 kg

**Batterier** (2) 3 kg

**Stel** 16 kg

Total vægt

**30 kg**

<b>Rækkevidde</b>	Op til 25 km
<b>Hastighed</b>	Op til 6 km/t
<b>Maks Brugervægt</b>	140 kg
<b>Max Stigning</b>	12 grader
<b>Mål (LxBxH)</b>	110 cm x 60 cm x 99 cm
<b>Mål foldet (LxBxH)</b>	33 cm x 60 cm x 82 cm
<b>Vægt</b>	30 kg
<b>Batteri</b>	12V6Ah x2
<b>Oplader</b>	24V/5.0A

<b>Bremsetype</b>	Elektrisk bremse
<b>Hastighedsjustering</b>	5 Trin
<b>Venderadius</b>	0.8 meter
<b>Bremselængde</b>	1.2 meter (tør overflade)
<b>Motoreffekt</b>	250W*2
<b>Hjulstørrelse</b>	For 8"   Bag 12.5"

**Farve**



# Specifikationer



# Funktioner



# Funktioner


Armlænen kan foldes op til lodret position

1. Træk i clipsen ud imod siden.
2. Armlænet kan nu løftes op i lodret position.



Justering af fodstøtten

1. Træk i clipsene på hver sin side af fodstøtten.
2. Fodstøtten kan nu trækkes, og fastgøres i en af hullerne.

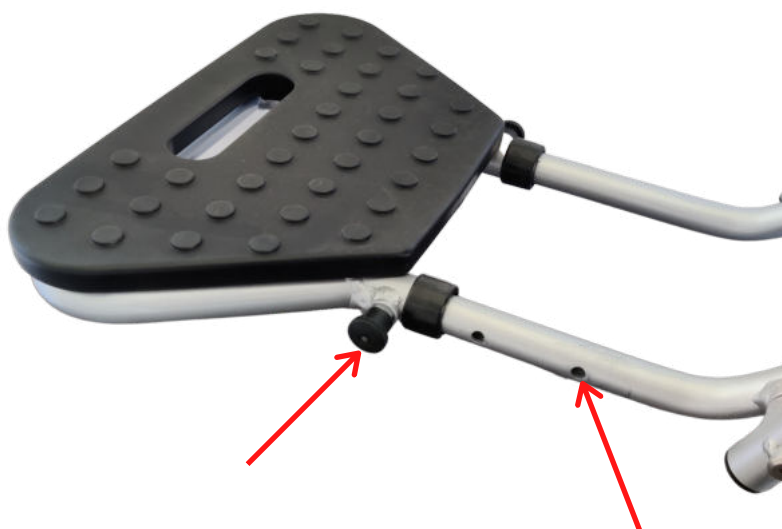




## Foldbar

For at folde kørestolen sammen skal du gøre følgende:

1. Sluk kørestolen.
2. Løs den **RØDE** clips ved at trykke ned på øvre del af clipsen.


Den findes på bagsiden af kørestolen, under sædet.

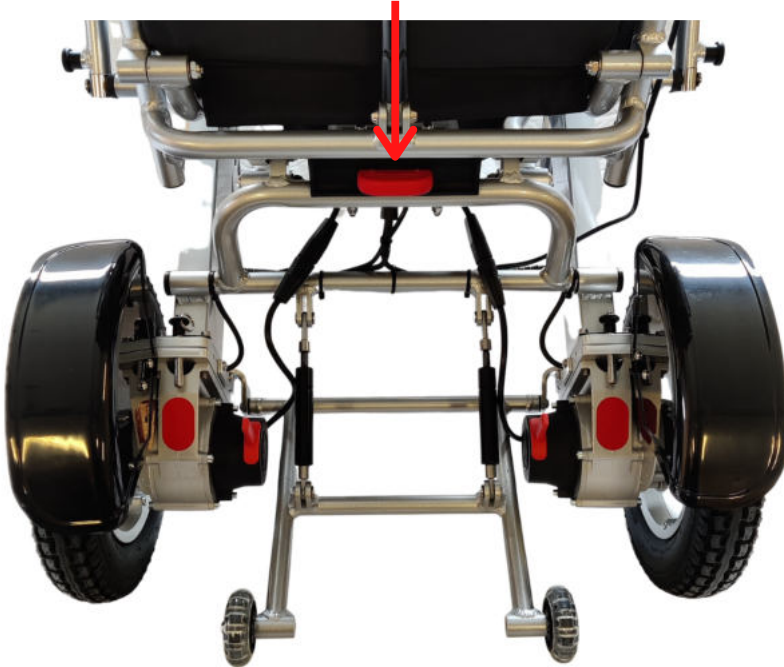


Fold derefter kørestolen sammen, ved at skubbe øvre del af stolen ryg imod sædet.  
Slå derefter fodstøtten op.



# Afmontering af baghjul

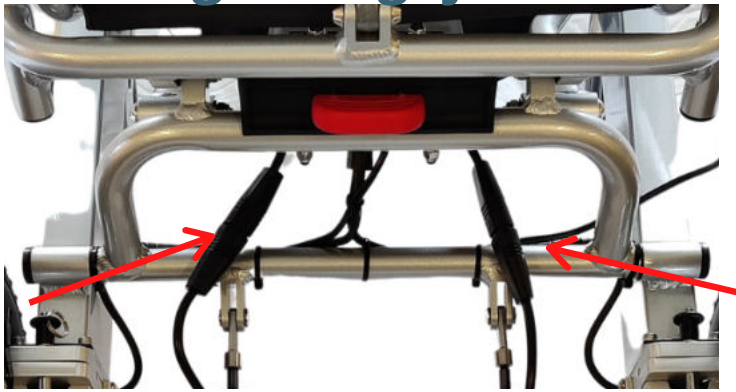


1. Træk forsigtigt stikkene ved hver motor fra hinanden.

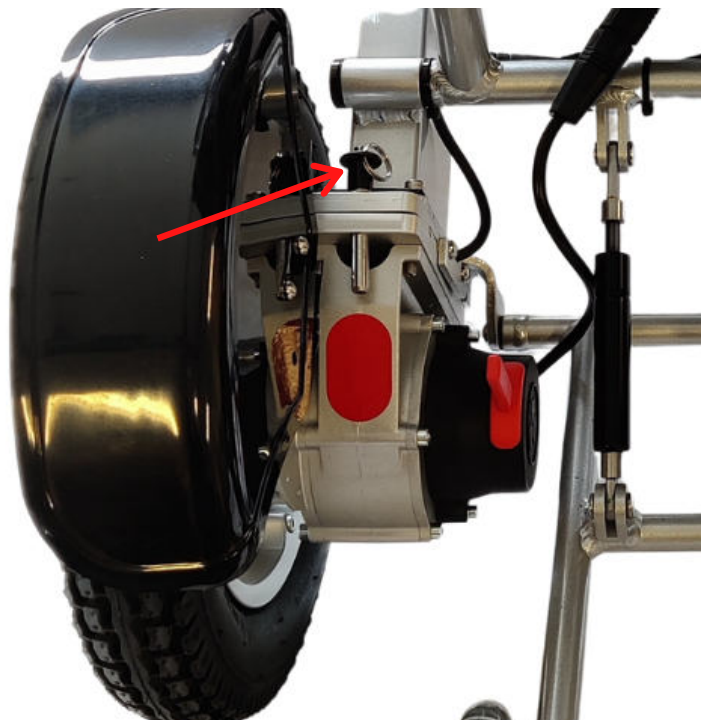

Tryk toppen af splitten ned, for at kunne fjerne den.

2. Fjern splitten ved motoren, ved at trække den lodret op

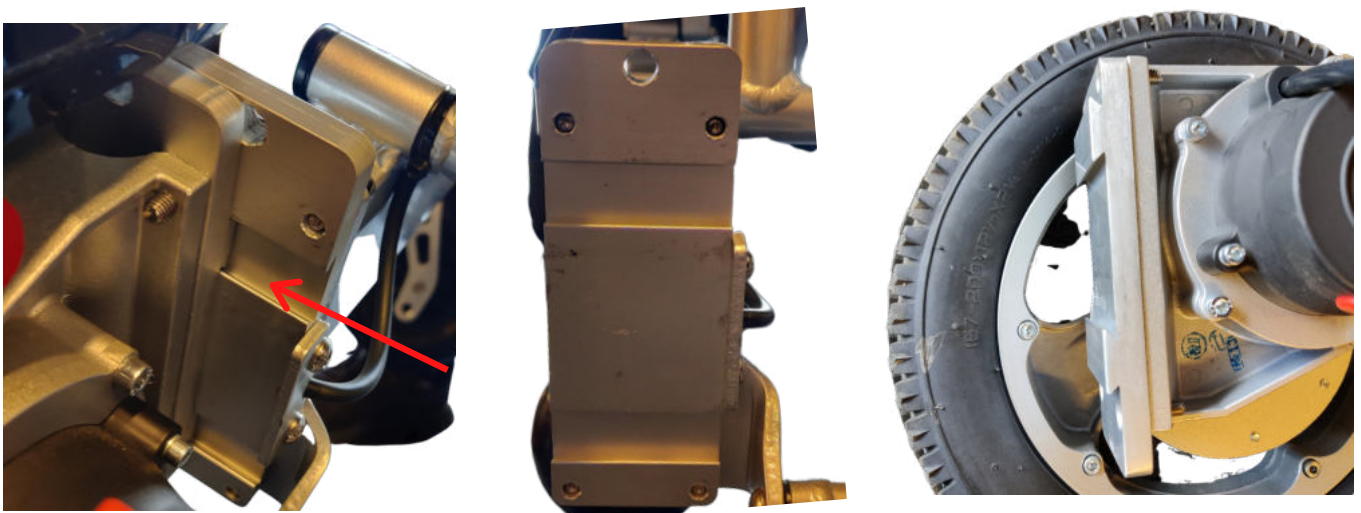

3. Baghjulet kan nu trækkes til siden (væk fra kørestolen) og afmonteres.

**HUSK!** Ved montering skal **RØDT** frikoblingshåndtag vende ind imod kørestolen.

# Parkeringsbremse og frikobling

Kørestolen bremses automatisk, når joysticket slippes.

Ved stop aktiveres parkeringsbremsen, og kørestolen står helt fast. Den kan ikke skubbes, eller trille.


Kommer du i en situation, hvor det er nødvendigt at flytte kørestolen manuelt, skal du først slukke kørestolen, og derefter frigøre dens motorer ved at trække frikoblingshåndtagene **OP**.↑

**Frikoblingshåndtagene har farven RØD, og findes ved hvert bagdæk i højre og venstre side.**

Husk altid at slå frikoblingshåndtagene **NED**↓, ellers kan kørestolen ikke køre.

Er disse håndtag **ikke** slået ned (aktiveret), vil der lyde en hyletone, og kørestolen kan ikke køre.


Slå håndtagene ned, og kørestolen kan nu køre igen.

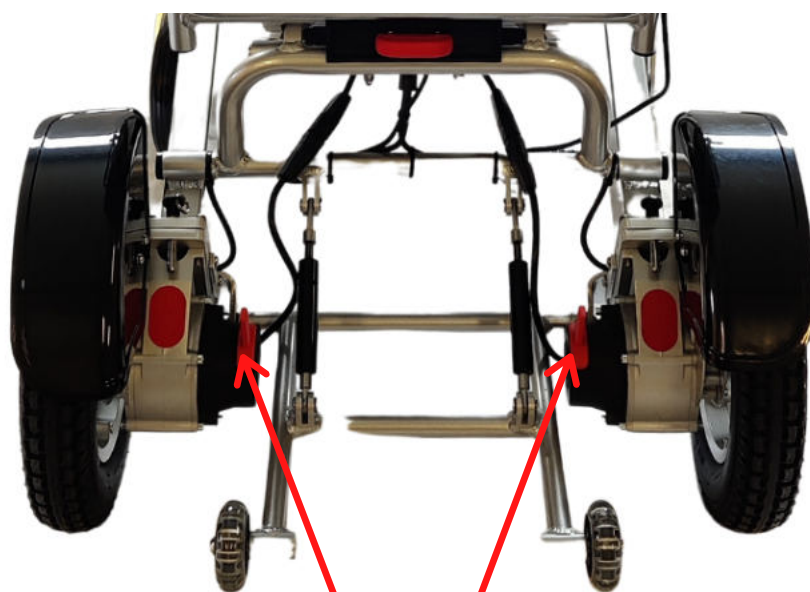

**Frikoblingshåndtag**

# Opladning

For at oplade din Varsø kørestol skal du bruge den medfølgende oplader.

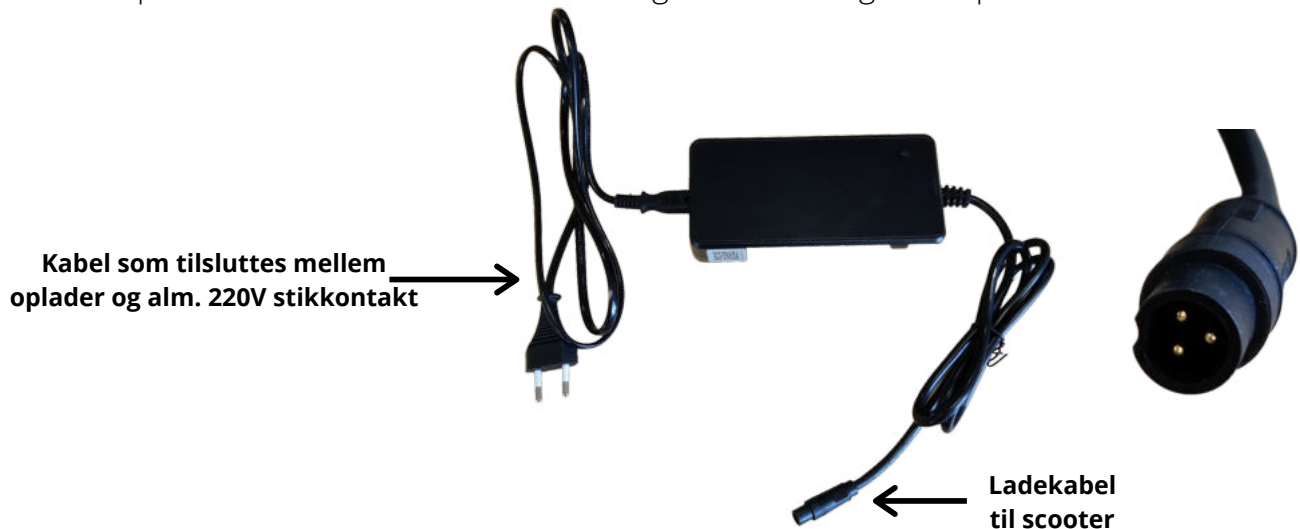

**HUSK!** Sluk kørestolen inden den tilsluttes opladning



**Kørestolens ladestik er placeret på undersiden af instrumentbordet.**

## Tilslut oplader:

Sæt opladerens runde stik i kørestolens ladestik.

Opladerens andet stik tilsluttes en almindelig 220V stikkontakt.

Husk at skub ladesticket helt i bund.

Opladerens farveindikatorer:

1. Ved tilslutning af opladeren til kørestolen, vil opladeren kortvarigt lyse **GRØN**
2. Under opladningen af kørestolen, vil opladeren skifte farve til **RØD**
3. Når kørestolen er fuldt opladt, vil opladeren igen lyse **GRØN**

**Vi anbefaler at oplade kørestolen efter hver køretur, uanset hvor langt du har kørt.**

Bruges kørestolen ikke i længere tid, anbefaler vi, at den tilsluttes oplader hver 14. dag, for at batterierne ikke tager skade.

1. Lad kørestolen stå tændt i 24 timer.
2. Kørestolen sættes til opladning, indtil den er fuldt opladet.

# Opladning

Kørestolens batteriindikator viser strømniveauet for batterierne. Når alle felterne er tændt er kørestolen fuldt opladet.

Som strømmen bruges vil felterne slukkes én streg af gangen.

Først slukker de de **GRØNNE** (3 streger), derefter de **GULE** (3 streger) og til sidst de **RØDE** (1 streg)



## Se strømniveauet på hvert enkelt batteri:

Hold den **BLÅ** knap inde

De fem dioder vil lyse i forhold til hvor meget strøm der er på hvert enkelt batteri.

E= tom (empty)

F= fuld (full)

Som strømmen bruges vil felterne slukkes én streg af gangen.


Der sidder et batteri i hver side.



## Opladning af batteri enkeltvis:

Batterierne kan både oplades enkeltvis, når de er monteret på kørestolen, eller når de er afmonteret.

1. Åben det lille gummidæksel
2. Sæt opladerens runde stik i kørestolens ladestik.
3. Opladerens andet stik tilsluttes en almindelig 220V stikkontakt.  
Husk at skub ladestikket helt i bund.

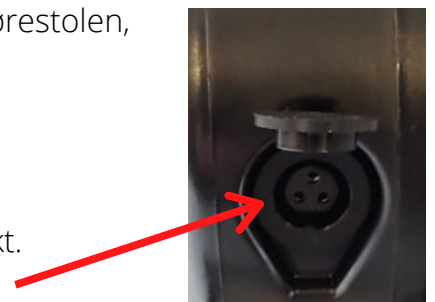

## Afmontering af batterier:

Skulle du have brug for at flytte batterierne, afmonteres de let.

1. Træk clipsen lodret op
2. Træk batteriet ud imod kørestolens forside.



# Batteri information

Dit køretøj er udstyret med 2 x 12V6Ah batterier, der er vedligeholdelsesfri.

Batteriet er en sliddel, og det slides fra den dag, du tager kørestolen i brug. Dermed nedsættes din maksimale kørselsdistance efterhånden, indtil batterierne skal udskiftes.

Deres levetid kan variere, alt efter hvor meget kørestolen bruges, og om den bliver sat til opladning efter hver køretur.

Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørestil.

Faktorer som kulde, vind, vejr og kørselsunderlag, herunder græs, grus og asfalt, kan også påvirke kørestolens rækkevidde.

**Vi anbefaler altid at tilslutte kørestolen til opladning efter hver køretur. Uanset distance.**

**VIGTIGT!** Undgå at aflade batterierne helt, da det reducerer levetiden kraftigt.

Er batterierne slidt, er det vigtigt, at de udskiftes med det rigtige type batteri.

**Kontakt Varsø kundeservice på tlf. 70 60 56 26  
for yderligere information og udskiftning.**

## Batterier og kulde

- Opbevareres kørestolen ved 10 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 20% reduceret rækkevidde.
- Opbevareres kørestolen ved 5 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 40% reduceret rækkevidde.

# Vedligehold

- **Rengøring.**

Rengør kørestolen med en fugtig klud eller brug alm. Glasrens på spray og tør efter med klud. Undgå at sprøjte vand direkte på kørestolen.

**Du bør årligt få udført:**

Serviceeftersyn af en Varsø-servicetekniker, for at sikre dit køretøj er i god stand, og derved sikre en problemfri drift.

**HUSK!** Er din kørestol ny, skal den serviceres 1. gang efter 9 måneder og efterfølgende med 12 måneders intervaller for at opretholde 3 års garanti inklusiv nedbrudsgaranti.

