

Handi One+ G2

Håndbog

Art. Nr: 706491

Software version 5.4.0.4 eller nyere

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Indledning	3
1.1 Om Handi One+.....	3
1.2 Erklæret formål.....	3
1.3 Om dette dokument.....	3
1.4 Vigtig information.....	4
1.5 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene.....	5
1.6 Terminologi.....	8
1.7 myAbilia.....	9
1.8 Billedarkiv.....	10
1.9 Support.....	10
1.10 Licens.....	10
2. Oversigt over Handi One	11
3. Start op Handi One	12
3.1 Kontroller indholdet i æsken.....	12
3.2 Indsæt SIM-kort.....	12
3.3 Oplad batteriet.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Starte Handi One+.....	13
3.5 Tilslut enheden til internettet.....	13
3.6 Indstil dato og tid.....	13
4. Kom i gang med Handi One	14
4.1 Tilpas Handi One.....	14
4.2 Start op myAbilia.....	14
4.3 Vælg tastatur.....	14
4.4 Indstil skærmlås.....	14
4.5 Kopier kontakter til Handi One+.....	14
5. Håndtering af Handi One+	15
5.1 Tænd og sluk.....	15
5.2 Opladning og batterihåndtering.....	15
5.3 Dato og tid.....	16
5.4 Lyd.....	16
5.5 Skærmlås og sikkerhedslås.....	17
5.6 Internetforbindelse.....	18
5.7 Trådløst hovedsæt (Bluetooth).....	19
5.8 Skærmindstillinger.....	19
5.9 Tastatur.....	19
5.10 Telefonindstillinger.....	19
5.11 Enhedens hukommelse og hukommelseskort.....	20
5.12 Apps.....	20

6. Startmenuen	22
6.1 Startmenu med Handi-layout.....	22
6.2 Startmenu med Standard-layout.....	22
7. Hurtigindstillinger	24
7.1 Wi-Fi.....	24
7.2 Bluetooth.....	24
7.3 Lydstyrke.....	25
7.4 Vibration.....	25
7.5 Kliklyd.....	25
7.6 Roter skærm.....	25
7.7 Skærmens tidsgrænse.....	26
7.8 Ringetone.....	26
7.9 Baggrundsbillede.....	26
7.10 Batteri.....	26
8. Kamera	27
8.1 Standardkamera.....	27
8.2 Handi-kamera.....	27
9. Indstillinger	28
9.1 Indstillingstilstand.....	28
9.2 Startmenuen.....	29
9.3 System.....	32
9.4 Billedarkiv.....	39
9.5 Hurtigindstillinger.....	40
9.6 Kamera.....	41
9.7 Lommeregner.....	41
9.8 MyAbilia.....	42
10. Opdater Handi One+	43
11. Total genstart af Handi One+	44
11.1 Enkel genstart.....	44
11.2 Total genstart.....	44
12. Grundindstillinger	47
13. Produktspecifikationer	54
13.1 Rengøring.....	54
13.2 Automatisk crash-rapportering.....	54
13.3 Genbrug af elektronisk affald.....	54
13.4 Medfølgende artikler.....	54
13.5 Tekniske data.....	54

1. Indledning

1.1 Om Handi One+

Handi One+ er et medisinsteknisk hjælpemiddel, der fungerer som en kognitiv støtte i hverdagen. Produktet er en håndholdt digital kalender med flere supplerende funktioner.

Handi One+ har følgende funktioner:

- Afspiller
- Album
- Diktafon
- Hurtigindstillinger
- Kalender
- Kamera
- Kontakter
- Kriseplan
- Lommeregner
- Min Status og Statussvar
- Notater
- Prisberegner
- SMS
- Tjekliste
- Telefon

Handi One+ kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Man kan bruge sine egne billeder eller dem, der findes i **Handi One**. Man kan vælge hvilke funktioner og apps, brugeren skal have adgang til. For at lære mere om, hvordan du tilpasser Handi – se *Tilpasningsguide Handi5*.

Via webservicen **myAbilia** kan støttepersoner hjælpe til med **Handi One+** på afstand. Fra computer eller tablet kan støttepersonerne administrere brugerens kalender, tjeklister, billedarkiv, notater og diktafon-notat.

For at håndtere skemaer og overføre musik skal man bruge pc-programmet **HandiTools**. **HandiTools** kan downloades fra www.abilia.com.

Vil du vide mere om Handi, se www.abilia.com.

1.2 Erklæret formål

Handi One+ er en digital kalender udviklet til folk, der har brug for hjælp med tid og planlægning og har brug for grafisk klarhed. **Handi One+** kan bruges både indendørs og udendørs.


1.3 Om dette dokument


Dette dokument beskriver, hvordan du kommer i gang med at bruge **Handi One**. Denne håndbog er beregnet til ergoterapeuter, nære slægtinge eller andre støttepersoner.

Dette dokument indeholder ikke detaljerede instruktioner til de indbyggede funktioner. Hver funktion har sin egen brugervejledning, som kan downloades på www.abilia.com.

1.4 Vigtig information

1.4.1 Sikkerhedsdefinitioner

 **ADVARSEL:** Risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.

 **FORSIGTIGHED:** Risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

1.4.2 Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger Handi One

 **ADVARSEL:** Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

- Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne håndbog.
- Må ikke anvendes **Handi One+** som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.
- Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med Handi One. (artikel 706357 USB-C-lader).
- Brug kun CE-mærkede eksternt tilbehør.
- Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan indeholde brandfarlige stoffer.

1.4.3 Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

1.4.4 Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske specifikationer er lavet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved anvendelse af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for skade eller manipulation med produktet bortfalder garantien og fraskriver sig producentens ansvar. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.

1.5 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene

I dette kapitel gives en oversigt over alle Handi-apps. For mere detaljeret beskrivelse, se de respektive manualer til Handi-apps, der kan downloades fra www.aabentoft.dk.

1.5.1 Afspiller

I *Afspiller* kan du lytte til musik, lydbøger og film.

Mediafilerne kan kun sorteres "fysisk" i mapper, men ikke på nogen anden måde (fx efter albumtitel, komponist).

Afspiller har automatiske afspilningslister. Alle musiknumre, som ligger i samme mappe, indgår i en afspilningsliste. Musiknumrene i mappen bliver automatisk afspillet i den rækkefølge, de ligger i mappen.

Det er muligt at gemme et "bogmærke". På den måde kan du nemt finde tilbage til dét sted, hvor du sluttede i fx en lydbog.

Mediafilerne lægges ind via HandiTools.

1.5.2 Album

Med funktionen *Album* kan du lave diasshow med billeder og indspillet lyd. Det kan være sociale diasshow af typen "Min familie" eller diasshow, der fortæller en historie, fx. "Ferie 2020".

Funktionen *Album* kan også anvendes til mere praktisk betonedede diasshow som opskrifter og arbejdsinstruktioner.

1.5.3 Diktafon

Med *Diktafon* indtaler du information. Det er enkelt at gemme og åbne Diktafon-notater.

Du skal ikke kunne skrive for at benytte *Diktafon*, men funktionen kan også anvendes som en meget enkel og hurtig måde at lægge informationer ind på, selv om du kan skrive.

1.5.4 Hurtigindstillinger

I *Hurtigindstillinger* kommer man til de mest grundlæggende indstillinger som lydstyrke, kliklyd og lign på en letforståelig måde. Man kan slukke for lyden og indstille det tidspunkt, hvor den skal sættes til igen. Se også kapitel 7. *Hurtigindstillinger*.

1.5.5 Kalender



ADVARSEL: Brug ikke Kalender som den eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

Med *Kalender* får man et overblik over sin dag, uge og måned. Man får tydelige alarmer, når aktiviteter begynder og slutter. Det er nemt at tilføje aktiviteter. Du kan bruge billeder og få teksten oplæst med talesyntese.

Man kan knytte ting sammen med aktiviteten, der passer til, som fx en indkøbsliste eller et telefonnummer. På den måde får man oplysningerne straks, når aktiviteten begynder i stedet for, at man skal lede efter den.

Kalenderen er en central funktion i Handi og hjælper brugeren at holde styr på sit liv.

1.5.6 Kamera

Med enhedens standard-kamera kan man tage sine egne billeder, for eksempel at symbolisere forskellige aktiviteter. (Ingen Handi-app)

Et enklere Handi-kamera med begrænset funktionalitet kan vælges, se kapitel 8. *Kamera* for mere information.

1.5.7 Kontakter

I funktionen *Kontakter* kan du gemme information om forskellige personer. Informationen gemmes som en "kontakt" og kan indeholde navn, billede, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse og ekstra information. Via kontaktvinduet kan man ringe op og sende sms/e-mail direkte til kontaktpersonen.

Kontaktlisten kan vises på to måder. Enten sorteret efter bogstav eller sorteret i mapper (fx "Familien" og "Venner") Hvilket gør det mere overskueligt at finde rundt i, hvis man har mange kontakter. Der findes desuden en søgefunktion, der gør det hurtigt og nemt at finde den ønskede kontakt.

1.5.8 Kriseplan

Kriseplan er en tryghedsfunktion for brugere, der risikerer at blive akut syge eller havne i en alvorlig krisesituation.

Kriseplanen er en side med en handleplan ved akut krise. Informationen vises som tekst, der kan læses op med talesyntese.

Det er muligt at oprette en knap som direkte ringer op til 1-3 foruddefinerede telefonnumre samt en knap som gør det muligt at sende en færdigskrevet sms-tekst til 1-3 mobilnumre.

1.5.9 Lommeregner

Lommeregner er en simpel regnemaskine, at man kan lægge sammen, trække fra, gange og dividere med. Alle indtastede tal og regnetegn vises i indtastningsvinduet, selv efter at du har trykket på "er lig med" -tegnet.

Hvis et til har været forkert, kan du ændre det uden at skulle starte igen. Du trykker derefter på indtastningsvinduet for at placere markøren der. Så kan du rydde og ændre som du vil.

Lommeregner kan indstilles i tre niveauer; enkel, valutaformat og avanceret.

1.5.10 Min Status og Statussvar

Min Status og Statussvar er værktøjer til selvhjælp. Måske vil du finde ud af, om du har stresssymptomer og få råd om, hvordan du reducerer stress. Det kan også handle om at ønske at lære at spise regelmæssigt og være motiveret til at se, hvordan det går. Måske har du brug for hjælp til at tage initiativ til at få flere sociale kontakter.

Ved hjælp af en formular kan du oprette dit eget spørgeskema og få en tilpasset beslutningsstøtte. Bagefter kan du se på de svar, du har givet via formularbesvarelsen.

Skemaer oprettes og håndteres via HandiTools.

1.5.11 Notater

Med *Notater* kan du skrive informationer med det indbyggede tastatur (på skærmen). Det er enkelt at gemme og åbne notater. Informationen kan læses op med talesyntese.

1.5.12 Prisberegneren

Funktionen *Prisberegneren* er beregnet til at give støtte, når du handler. Brugeren skal selvstændigt kunne vælge varer og kontrollere, om han har tilstrækkeligt med penge, samt kunne kontrollere, hvor meget han bør få tilbage.

Prisberegneren indeholder også en valgfri støttefunktion, som hjælper brugeren med at vælge passende sedler og mønter (valører) ved at vise grøn baggrund ved valøren.

Prisberegneren forudsætter, at brugeren selv kan aflæse og indskrive prisen på de forskellige varer.

1.5.13 SMS

Via SMS-funktionen kan du skrive og modtage beskeder. Den store fordel i forhold til en almindelig mobiltelefon er, at du kan få talestøtte både når du skriver din egen tekst og når du læser modtagne beskeder. Derudover kan du få hjælp til at skrive ved hjælp af ordnede såkaldte grundlæggende beskeder.

Det er muligt at foretage indstillinger for Picture SMS: Du kan indstille, om du vil skrive og/eller læse SMS med billeder. Du kan således skrive SMS med billeder, men modtage SMS med tekst og derefter få dem læst ud ved hjælp af talesyntese.

1.5.14 Tjekliste

Med *Tjekliste* kan du lave afkrydsningslister fx indkøbslister eller "to-do"-lister.

Tjeklisterne kan være tekstbaserede, billedbaserede eller en blanding af tekst og billede.

Tjeklisterne anvendes enkeltvis, men også knyttes til en aktivitet i Kalenderen. Du kan lave enkeltstående aktiviteter og tilbagevendende aktiviteter med Tjekliste.

Der findes to måder at oprette Tjeklister: En "hurtig" for personer, der skriver uhindret og en hvor du trin for trin opretter en Tjekliste med billede og tekst.

1.5.15 Telefon

Telefonfunktionen er en forenklet telefonapp. Via Telefon kan du foretage og modtage opkald, og fra den brugervenlige telefonmenu kan du blandt andet se ubesvarede opkald og kontrollere saldi (hvis du har et genopfyldningskort). Du kan se, hvem der ringer, eller hvem du ringer til.

Den indbyggede telefon bruges til opkald.

1.6 Terminologi

I denne håndbog bruges følgende begreber.

Enhed	Hardwaren, der er Handi One+ installeret.
Brugere	Personer, der benytter sig af Handi One+ som hjælpemiddel.
myAbilia	Webtjeneste til Handi One+ og andre produkter fra Abilia. Der findes forskellige kontotyper: brugere, støttepersoner og administratorer.
Startopsætning	Billedarkiv, standardaktiviteter og standardtimere der findes i Handi One+ fra start.
Brugertilstand	Den tilstand Handi One+ er i, når man anvender den som hjælpemiddel.
Indstillingstilstand	Den tilstand, hvor man indstiller, hvordan Handi One+ skal virke. Henvisninger til indstillingsfunktioner er beskrevet som eksempel: Handi Indstillinger Startmenu .
Hjemskærm/ Startskærm	Enhedens startmenu. Hertil kommer man altid når man trykker på <i>Hjem</i> -knappen. Handi One+ har sin egen Startmenu med to forskellige layouts.
Statusfelt	Et felt øverst på skærmen i Startmenuen (standard-layout), som viser fx. batteriniveau og klokken.
<i>Hjem</i> -knap	En funktionsknap, se kapitel 2. <i>Oversigt over Handi One</i> , som altid fører til Startmenuen.
<i>Tilbage</i> -knap	En funktionsknap, se kapitel 2. <i>Oversigt over Handi One</i> , som altid fører til forrige billede.
Stryge	En måde hvorpå man kan navigere i forskellige lister ved at holde fingeren på skærmen og herefter trække opad/nedad eller højre/venstre. Erstatte ofte knapperne <i>Næste/Forrige</i>
Zoom	Hvor billederne vises i fuld skærm kan du zoome, forstørre billedet, ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden.
Wi-Fi	Teknik til trådløst netværk. Gør det muligt at tilslutte trådløst til internettet via fx en router. Gratis Wi-Fi kan forekomme i offentlige miljøer.

1.7 myAbilia

MyAbilia er en webservice til Handi og andre produkter fra Abilia.

Med *myAbilia* kan du:

- Administrere kalender, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon fra datoer og/eller tablets eller lignende.
- Vælge støttepersoner, som fx kan tilføje eller ændre påmindelser via internettet

For at kunne bruge *myAbilia* skal man have en brugerkonto.

1.7.1 Roller i myAbilia

I *myAbilia* har man forskellige typer konti afhængigt af formålet. **Brugeren** er altid i centrum, altså den person, der bruger hjælpemidlet. Brugeren kan have behov for hjælp fra en **støtteperson**, fx med sin kalender etc. Afhængigt af aktiviteten kan der være behov for en **administrator**, der er en person, som administrerer konti og licenser uden at have adgang til brugerens personoplysninger.

Afhængigt af rollen får man forskellige login i *myAbilia* og kan gøre forskellige ting i webservicen:

Rolle	Beskrivelse	Funktioner
Brugere	Den person, der bruger hjælpemidlet. Behøver ikke at være aktiv på webservicen, men har bare en konto, der er forbundet med hjælpemidlet.	Kalender, Standardtimere, Standardaktiviteter, Billedarkiv, Tjekliste, Notater, Diktafon, Profil, Licenser, Støttepersoner, Administratorer
Støtteperson	En eller flere personer, der hjælper brugeren med hjælpemidlet.	Samme som ovenfor
Administrator	Den person, der opretter og/eller administrerer brugerkonti og licenser. Kan også være en støtteperson.	Brugerkontoen: Profil, Støttepersoner, Administratorer

1.7.2 Tilpas myAbilia

Under **Min profil|Moduler** i *myAbilia* kan man vælge hvilke moduler, der skal vises i *myAbilia*. Hvis du bruger den samme *MyAbilia*-konto til forskellige enheder (som både MEMOplanner og Handi), kan du vælge hvilken kalender, der skal vises.

1.7.3 Del myAbilia-kalender

Ved at oprette et abonnementslink (ICS) til *myAbilia*-kalenderen, kan den vises i andre kalenderprogrammer som Outlook og Google. Instruktioner er tilgængelige på *myAbilia*.

1.8 Billedarkiv

Med **Handi One+** leveres følgende billeder:

- **Handi-billeder.** Ca. 160 stk. billeder som oprindeligt blev fremtaget af resursenheden AIR på Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under 2014 kompletteredes billedbasen ved hjælp af illustrator Andreas Högberg.
- **Rolltalk-billeder.** Ca. 60 stk. billeder fra den billedbase der hører med til kommunikationshjælpe midlet Rolltalk.
- **Smileys.** 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi.
- **Standardbilleder.** 83 piktogram- og pcs-billeder.
- **Baggrunde.** 8 stk. forskellige baggrunde, som kan bruges i Startmenuen. (Man kan anvende valgfrit billede som baggrund).

Billederne er som udgangspunkt organiseret i mapperne *Handi*, *Tøj*, *Badeværelse*, *Skole*, *Standardbilleder*, *Smileys*, *Personer* (tom) og *Baggrundsbilleder*.

For at tilpasse billedarkivet kan man nemt bruge myAbilia eller **HandiTools**.

1.9 Support

Aabentoft kan give support til Handi-funktionerne. Aabentoft kan ikke påtage sig service og support til alle de applikationer, som tilbydes på markedet. Der kan Aabentoft kun være rådgivende og vejledende.

1.10 Licens

Der er præinstalleret en licens på **Handi One**. Licensen er også angivet på kuponen, der leveres sammen med produktet.

Software kan opdateres i løbet af licensperioden.


En advarsel om, at licensen er ved at udløbe, vises i Handi i god tid i forvejen (3 måneder, 3 uger og 3 dage).

Se slutdatoen på licensen i **Handi Indstillinger|System|Licenshåndtering**.



Forlængelse af licensen kan bestilles fra Abilia. Ved bestilling skal du indtaste licensnøglen og e-mailadressen, som en ny voucher skal sendes til.

For at aktivere forlængelse af licensen skal man efterfølgende gå til **Handi Indstillinger|System|Licenshåndtering** og trykke på *Søg licensforlængelse*. Sørg for at der er internetadgang.

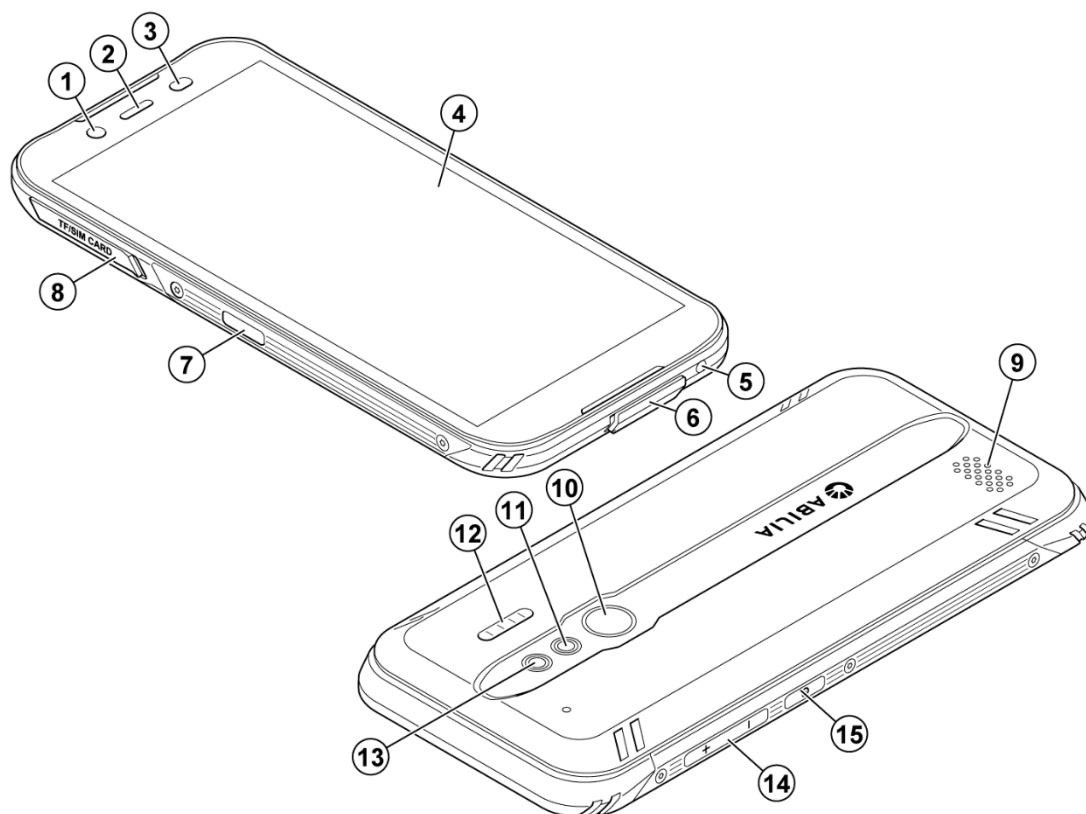2. Oversigt over Handi One



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Kamera (forside) | 9. Højtaler |
| 2. Ørehøjtaler | 10. Fingeraftrykslæser |
| 3. Nærhedssensor | 11. Kamera (bagside) |
| 4. Touchskærm | 12. Fotolyse |
| 5. Mikrofon | 13. Sekundær mikrofon |
| 6. USB-port | 14. Lydstyrke-knap |
| 7. Kamera-knap | 15. Tænd/sluk-knap |
| 8. SIM-kortholder | |

Mange henvisninger i denne håndbog har formatet "(X)", hvor X refererer til et punkt i listen ovenfor. Funktionsknappen *Hjem*  og *Tilbage*  er ikke fysiske knapper, men de er integreret i skærmen.

3. Start op Handi One

3.1 Kontroller indholdet i æsken


Æsken skal indeholde følgende:

1. Handi One+ G2
2. Netadapter – USB C
3. Hovedsæt
4. Udkastningsværktøj
5. OTG-kabel
6. Blød taske
7. Dokumentation:
 - a. Start op Handi
 - b. Håndbog Handi One+ G2 (dette dokument)
 - c. Brugervejledning Kalender
 - d. Tilpasningsguide, Bruger-tilpasse Handi 5
8. Værdibevis med licensnøgle

3.2 Indsæt SIM-kort

For at kunne ringe og sende SMS skal du indsætte et SIM-kort i Handi One +. Du kan bruge andre Handi-apps uden et SIM-kort.


Micro-SIM eller 3FF-SIM-kort kan bruges i denne enhed. Brug af inkompatible SIM-kort kan beskadige kortet og enheden samt data gemt på kortet.

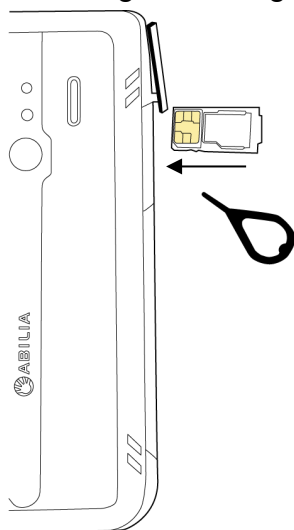

1. Åbn låget til SIM-kortholderen (8).
2. Indsæt udkastningsværktøjet i hullet på SIM-kortholderen for at frigøre holderen.
3. Træk forsigtigt holderen ud af sin plads ved hjælp af udkastningsværktøjet.
4. Læg SIM-kortet i holderen med de guldfarvede kontakter nedad.
5. Skub SIM-kortet ind i åbningen.
6. Sæt holderen på plads igen.
7. Luk låget.

3.3 Oplad batteriet

⚠ ADVARSEL: Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med Handi One.

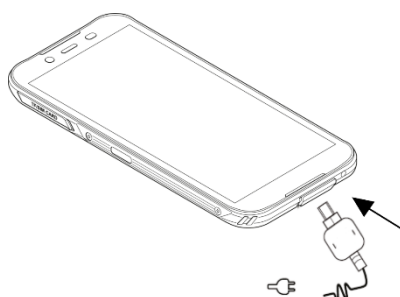

1. Åbn dækslet over USB-porten.

BEMÆRK: Dækslet over USB-porten kan være svært at fjerne, hvis du lukker det. Brug et ikke-skarpt værktøj, såsom en pincet, til at åbne låget.

2. Sæt det lille stik på USB-kablet i USB-porten (6) på Handi One.

3. Sæt det store stik på USB-kablet i opladeren, som du derefter sætter i en stikkontakt.

Sluk enheden eller skærmen, hvis du vil have, at batteriet oplades hurtigere. Tryk på *tænd-/sluk-knappen* (15) for at få vist opladningsstatus.

Spar strøm!

Træk opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet, og du har frakoblet opladeren fra enheden.

3.4 Starte Handi One+

Tryk på *tænd-/sluk-knappen* (15) til enheden vibrerer og skærmen lyser. **Handi One+** starter og efter lidt tid vises Startmenuen.

Visningen "Indtast PIN" vises, hvis den indsættes i et SIM-kort, der er indstillet til kontrol af PIN-kode. Indtast den aktuelle PIN-kode, og tryk på *OK*.

3.5 Tilslut enheden til internettet

Når du bruger webservicen myAbilia, skal **Handi One+** være forbundet til internettet. Der må da være et tilgængeligt trådløst netværk

For at oprette forbindelse til et trådløst netværk skal du starte appen *Hurtigindstillinger* og krydse af *Wi-Fi*. Tryk på pilen, og vælg det ønskede trådløse netværk.


For at oprette forbindelse til mobilt bredbånd, se kapitel 5.6.2 *Mobilt bredbånd*.

3.6 Indstil dato og tid

Handi One+ er oprindeligt indstillet til at vise den korrekte dato og tid, men klokkeslættet skal nulstilles, hvis enhedens backupbatteri er fuldstændigt afladet. Hvis du ikke tilslutter enheden til internettet (se ovenfor), skal dato og klokkeslæt indstilles manuelt:

Det kan også være nødvendigt at indstille klokkeslættet manuelt, hvis telefonoperatøren ikke sender tidsoplysninger i sit netværk.

1. Gå til **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|System|Dato og tid**.
2. Sluk *Automatisk dato og tid*.
3. Tryk på *Vælg tidszone* og vælg "Amsterdam".
4. Tryk på *Angiv dato*.
5. Rul gennem kalendervisningen, og tryk på den aktuelle dato.
6. Tryk på *OK* for at gemme dato.
7. Tryk på *Angiv tid*.
8. Tryk på det aktuelle klokkeslæt.
9. Tryk på *OK* for at gemme tid.

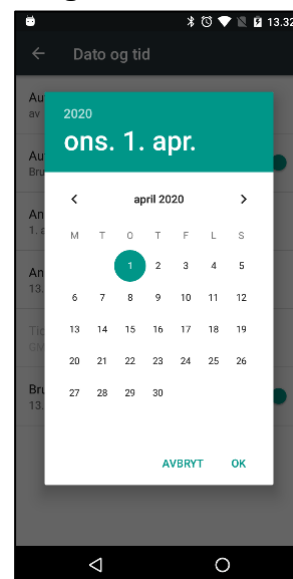

4. Kom i gang med Handi One

Nedenfor gives tips til, hvad man kan gøre for nemmere at komme i gang med **Handi One**.

Alle indstillinger foretages via indstillingstilstanden. Dette opnås ved at vælge *Handi Indstillinger* i Startmenuen eller via "knapkombinationen" (se kapitel 9.1 *Indstillingstilstand*).

4.1 Tilpas Handi One

Handi kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner

Brug **Tilpasningsguide Handi5** for at se, hvilke der er de vigtigste indstillinger, og hvordan de skal udføres. Her finder du oplysninger om startmenuen, talesyntese, billedunderstøttelse, tastatur, kalenderfunktionalitet og -udseende, hvordan man kan beskytte indstillingstilstanden med adgangskode osv.

4.2 Start op myAbilia

Hvis **Handi One+** skal sluttes til myAbilia, skal følgende gøres:

Gå til **Handi Indstillinger|myAbilia** og indtast brugernavnet og adgangskoden til brugerens myAbilia-konto.

Læs mere i kapitel 9.8 *MyAbilia*.

4.3 Vælg tastatur

Du kan vælge mellem forskellige tastaturer i **Handi One**:

- **Handi**. ABC-layout af bogstaverne, store taster og talesyntese.
- **Standard**. QWERTY-tastatur, mindre taster og ordprædiktion.

Standard er forvalgt. Læs mere i kapitel 5.9 *Tastatur* om hvordan du vælger Handi-tastaturet.

4.4 Indstil skærmlås

Ved levering er **Handi One+** indstillet uden skærmlås. Dette betyder, at skærmen ikke låses automatisk efter tryk på *tænd/sluk*-knappen. For at forhindre, at du ved et uheld trykker på skærmen, kan du vælge at aktivere skærmlåsen.

Se kapitel 5.5 *Skærmlås og sikkerhedslås*, hvordan du indstiller skærmlås.

4.5 Kopier kontakter til Handi One+

Hvis brugeren ønsker at overføre deres kontaktiliste fra en gammel telefon til **Handi One+**, kan dette gøres via indstillingstilstanden.

Fordelen ved at bruge Handi-kontakter er, at du derefter kan gruppere og sortere dine kontakter.

Gå til **Handi Indstillinger|Kontakter|Kopier kontakter**. En guide startes:

1. Vælg den konto, hvorfra kontakterne skal kopieres (SIM-kort).
2. Kontroller de kontakter, der skal kopieres. Tryk på *Næste*, når du er færdig.
3. Vælg den konto, som kontakterne skal kopieres til (Handi), og tryk på *OK*.

Nu er kontakterne fra SIM-kortet i Handi-kontakter, og du kan fx Sortere dem i grupper, tilføje billeder og information. Læs mere i *Brugervejledning Kontakter*.


5. Håndtering af Handi One+

5.1 Tænd og sluk

Handi One+ tændes og slukkes ved, at du trykker på *Tænd/sluk*-knappen. Det der egentlig sker, når du slukker med *Tænd/sluk*-knappen, er at skærmen slukkes og maskinen går i standby.

Hvis du ikke anvender Handi i 10 minutter går den automatisk i standby. (Denne tid kan ændres, se kapitel 5.8.1 *Skærmens tidsgrænse*.)

Når apparatet er på standby, 'vågner' det automatisk ved for eksempel en alarm.

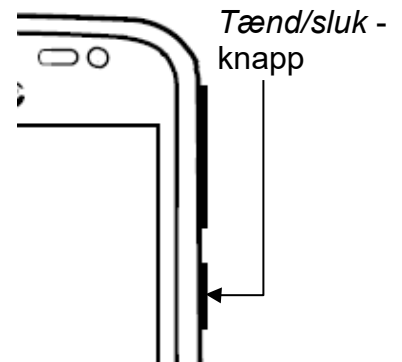

For at **slukke apparatet helt** skal du holde *Tænd/sluk*-knappen nede til alternativmenuen vises og så vælg **Sluk**.

Når du trykker på **Sluk** slukkes apparatet helt.

BEMÆRK: Derefter vågner Handi One+ ikke automatisk i tilfælde for eksempel en alarm.

For at starte **Handi One+** igen trykker du en gang på *Tænd/sluk*-knappen i omkring 3 sekunder, hvor efter enheden genstarter.


5.2 Opladning og batterihåndtering

ADVARSEL: Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med Handi One.

Handi One+ oplades ved at slutte det lille stik på USB-kablet til USB-porten i henhold til billedet og det store stik på USB-kablet til opladeren, der er tilsluttet en stikkontakt.

Man kan se batteriniveauet i statusfeltet øverst på skærmen (Standard-layout) eller i Hurtigindstillinger, se 5.2.3 *Kontrollér batteriniveau*.

Hvor længe batteriet rækker, afhænger naturligvis af, hvor meget du anvender **Handi One**. En god rutine er at **oplade Handi hver nat**

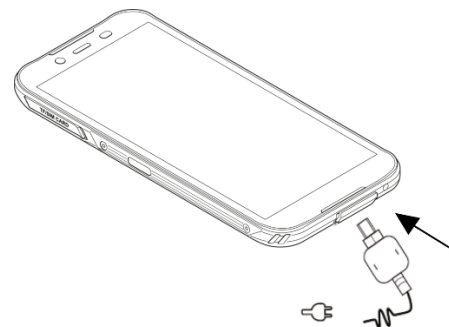

5.2.1 Handi One+ er fuldstændig afladet

Hvis **Handi One+** er helt afladet (der sker ikke noget, når du trykker på *Tænd/sluk*-knappen), skal du begynde med at lade den op med strømadapteren som beskrevet ovenfor. Det tager et par timer at oplade en helt afladet **Handi One**.

5.2.2 Advarselsmeddelelse "Forbind oplader"

Når batteriet er afladet til ca. 15 % af sin fulde kapacitet, vises en advarsel om, at batteriet trænger til opladning. Når du klikker på OK, kan **Handi One+** fortsat anvendes. Dog bliver advarslen vist med jævne mellemrum.

5.2.3 Kontrollér batteriniveau


Det er nemt at se batteriniveauet i statusfeltet (Standard-layout).

5. Håndtering af Handi One+

Hvis statusfeltet ikke er tilgængeligt, eller hvis man ønsker at se batteriniveauet mere detaljeret, kan man kigge i Hurtigindstillinger, se [7.10 Batteri](#).

5.3 Dato og tid

Indstilling af dato, tid og tidszone indstilles via **Handi-indstillinger|Android-indstillinger|System|Dato og tid**.

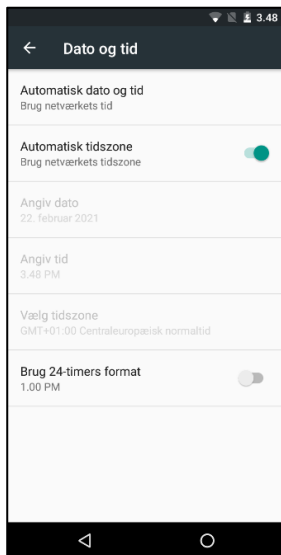

Det er bedst, hvis du kan have indstillingen *Automatisk dato og tid*, hvilket betyder, at oplysninger om dato, tid og tidszone automatisk hentes via telefonnettet/det trådløse netværk. Derefter viser uret altid det nøjagtige tidspunkt, og du ved, at det at skifte til sommer/vintertid fungerer. Desværre tilbyder ikke alle operatører disse oplysninger i deres netværk.

Normalt er indstillingen *Automatisk dato og tid*, men hvis det ikke fungerer tilfredsstillende, skal du slå det fra. Derefter kan dato og tid indstilles manuelt.

For at ændre tidszonen skal du slå *Automatisk dato og tid*, og vælg derefter den ønskede tidszone.

5.4 Lyd

Lydstyrken kan indstilles på flere måder.

5.4.1 Lydregulering

Mens man fx lytter til musik eller en lydbog, kan man nemt ændre på lydstyrken (medievolumen) ved at trykke på *Lydstyrke*-knappen.

5.4.2 Lydstyrke indstillinger

Via *Hurtigindstillinger* kan man nemt ændre de forskellige styrker, se [7.3 Lydstyrke](#).


5.4.3 Alarmlyd

Hvis Alarmlyd er indstillet, så den vises i Kalendermenuen i Kalender, kan man indstille de alarmlyde, som de forskellige aktiviteter, timere og påmindelser skal have der. Ellers foretages indstilling af alarmlyde i **Handi-Indstillinger|Kalender|Alarmlyd**.



Man kan indstille separate lyde til *Aktiviteter uden kvittering*, *Aktiviteter med kvittering*, *Timere* og *Påmindelser*.

Man vælger alarmlyd ved at trykke på alarmlydens navn. Der vil så blive vist en liste med de tilgængelige alarmlyde. Ved at trykke på

Play-knappen  kan man afspille den valgte alarmlyd.

For påmindelsesalarm findes også muligheden *–Ingen lyd–* i listen samt afkrydsningsfeltet *Vibration ved påmindelse*. Hvis man vælger dette, vil alle påmindelser være lydløse, men med vibration.

Alarmtiden, dvs. den tid som alarm og påmindelser skal lyde/vibrere kan indstilles på *Alarmsignal*, *15 sekunder*, *30 sekunder*, *1 minut*, *2 minutter* og *5 minutter*. ("Alarmsignal" afspiller lyden et øjeblik.)

5.4.3.1 Egne alarmlyder

Du kan indtaste dine egne alarmlyde. Disse skal være i mp3- eller m4a-format. Forbind Handi til pc, og placer lydfileerne i mappen *alarms*.

5.4.4 Kliklyd

Via *Hurtigindstillinger* kan man indstille om man vil have en kliklyd som bekræftelse, når man trykker på knapper osv. i apps, se 7.5 *Kliklyd*.

5.4.5 Ringetoner

Via *Hurtigindstillinger* kan du indstille, hvilken ringetone du ønsker, se 7.8 *Ringetone*.

5.4.5.1 Egne ringetoner

Egne ringetoner skal være i mp3- eller m4a-format. Tilslut Handi til pc, og placer lydfileerne i *ringtones*-mappen.

5.4.6 Vibration

Via *Hurtigindstillinger* kan du vælge vibration til/fra, se 7.4 *Vibration*. Hvis du markerer Vibration, vibrerer Handi under indgående opkald og underretninger (for eksempel SMS/MMS). Denne indstilling påvirker ikke, hvordan Handi-kalenderen advarer om aktiviteter, timere eller påmindelser (for disse alarmer gælder indstillingen i kalenderen for hver alarm).

5.5 Skærmlås og sikkerhedslås

Skærmlås betyder, at skærmen og knapperne er låst og ikke kan trykkes ved en fejltagelse.

Hvis skærmlås er valgt, aktiveres den, så snart skærmen slukkes. Hvis der er alarm, opkald eller SMS/MMS, åbnes skærmlåsen, så du kan kvittere, svare eller læse som normalt.

Åbn skærmlåsen:

Tryk på *tænd/sluk*-knappen (15), når skærmen er slukket. Placer din finger på skærmen, og træk i en hvilken som helst retning for at låse den op.

Tænd skærmlåsen:

For at slukke for skærmen skal du trykke på *tænd/sluk*-knappen (15).

Via **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Skærmlås** indstiller du, om skærmlås skal bruges. Vælg "Træk" for at indstille skærmlåsen eller "Ingen" for ikke at bruge skærmlåsen.

For øget sikkerhed kan du vælge at have en **sikkerhedslås**, som du skal indstille, før enheden åbnes helt, og du kan bruge Handi. De anbefalede muligheder for skærmlås er Grafisk adgangskode eller PIN-kode.

5.5.1 Grafisk adgangskode

Du indstiller den grafiske adgangskode i **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Grafisk adgangskode**. Følg instruktionerne på skærmen.

5.5.2 PIN-kode

Du indstiller PIN-koden i **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Skærmlås|PIN**. Følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Brug af sikkerhedslåse sker på egen risiko. Abilia kan ikke hjælpe, hvis en grafisk adgangskode eller pinkode er glemt.

5.6 Internetforbindelse


Brug af webservicen myAbilia kræver en internetforbindelse.

5.6.1 Wi-Fi

Via *Hurtigindstillinger* kan man tilslutte til Wi-Fi (trådløst netværk), se 7.1 *Wi-Fi*.

Når man krydser af i Wi-Fi i *Hurtigindstillinger* kan **Handi One+** tilsluttes et trådløst netværk. Når man er inden for rækkevidde af det trådløse netværk, vil **Handi One+** automatisk vælge denne tilslutning til internettet, ikke mobilt bredbånd. Det er normalt både billigere og hurtigere at være forbundet til et trådløst netværk end at være forbundet med mobilt bredbånd.

I nogle situationer kan det dog være hensigtsmæssigt at slukke for det trådløse netværk, hvis det ikke fungerer korrekt.

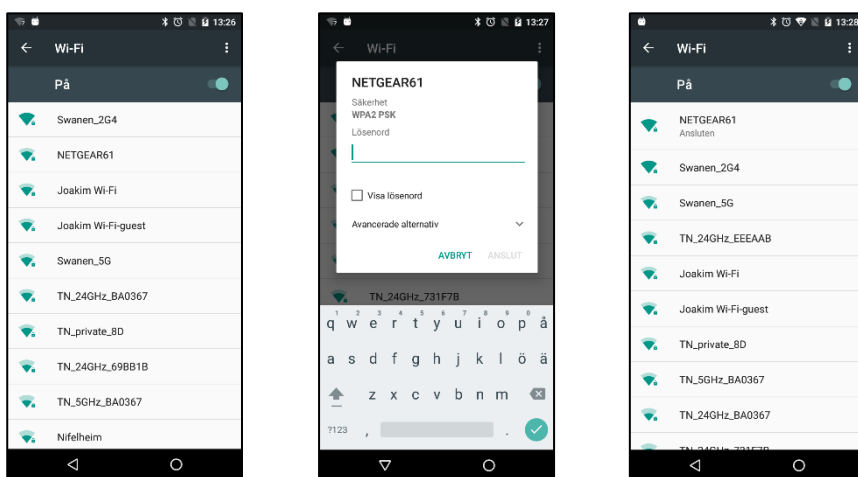

Når man trykker på Wi-Fi i *Hurtigindstillinger* vises det første billede.

Her ser man hvilke trådløse netværk, der er tilgængelige. Når man peger på det netværk, man vil tilslutte sig, vises det andet billede.

Man angiver adgangskode og trykker på *Tilslut*. Herefter vises det tredje billede med information om, at man er tilsluttet til det valgte netværk.

5.6.2 Mobilt bredbånd

For at kunne oprette forbindelse til internettet via mobilt bredbånd skal **Handi One+** have et SIM-kort med surfing.

Forbindelsen foretages via **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Dataforbrug|<Netværksoperatørens navn, fx “Tele2”>**.

Aktivér *mobildata*.

BEMÆRK: Du skal have gratis surfing på dit telefonabonnement, ellers kan denne indstilling medføre betydelige omkostninger.

5.6.3 Flytilstand

Flytilstand betyder, at al radiokommunikation er slået fra, dvs. hverken Wi-Fi eller Bluetooth fungerer. I øvrigt fungerer Handi som den plejer. Denne tilstand forlanges i forbindelse med flyrejser og besøg i en del bygninger, fx sygehuse.

For at indstille flytilstand skal du holde *Tænd/sluk*-knappen nede, indtil indstillingsmenuen vises. Tryk på flytilstand for at aktivere (tænde) eller deaktivere (slå fra) funktionen.

5.7 Trådløst hovedsæt (Bluetooth)

⚠ ADVARSEL: Brug kun CE-mærkede eksternt tilbehør.

Via *Hurtigindstillinger* kan man tilslutte Bluetooth (og højttaler), se *7.2 Bluetooth*.

5.8 Skærmindstillinger

5.8.1 Skærmens tidsgrænse

Via *Skærmens tidsgrænse* kan man sætte tiden, inden skærmen slukkes, og telefonen går i dvale (gælder kun, når telefonen går på batteristrøm). Se *7.7 Skærmens tidsgrænse*.

5.8.2 Roter skærm

Via *Hurtigindstillinger* kan du indstille, om skærmen roteres, når du drejer enheden. Se kapitel *7.6 Roter skærm*.

5.9 Tastatur


Man kan vælge mellem forskellige tastaturer i **Handi One**.

Fordelen ved Handi-tastaturet er, at det har store taster og talestøtte.

Standardtastaturet har små taster, men giver ordprædiktion.

Man vælger tastatur i **Handi-Indstillinger|Android Indstillinger|System|Sprog og input|Tastatur og inputmetoder**.

BEMÆRK: Handi Tastatur skal være afkrydset, for at man kan vælge det under Aktuelt tastatur (tryk på Vælg tastaturer).

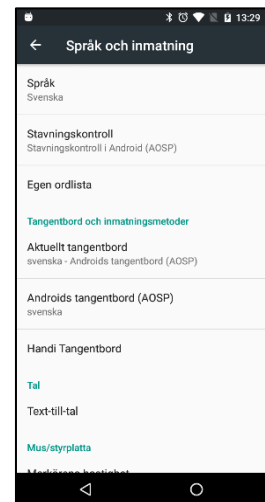

5.9.1 Handi-tastaturets funktion

Handi-tastaturet ændrer automatisk skifttilstand. Ved punkt eller på en ny linje bliver det første bogstav automatisk stort.

Handi-tastaturet viser et ABC-tastatur ved stående skærm og et QWERTY-tastatur ved liggende.

5.10 Telefonindstillinger

5.10.1 Administration af PIN-kode

Når du køber et telefonabonnement, enten et såkaldt genopfyldningskort eller et almindeligt abonnement, får du et SIM-kort. SIM-kortet indeholder en PIN-kode og en PUK-kode.

PIN-koden skal indtastes for at starte telefonen, men også når du genstarter telefonen. Hvis du indtaster den forkerte kode tre gange, låses SIM-kortet, og du skal bruge PUK-koden for at åbne den. For mange **Handi One+**-brugere kan dette være uheldigt, og det anbefales derfor at slå PIN-koden fra i **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Indstil SIM-kortlås|Lås SIM-kort**. Her kan du også ændre PIN-koden.

PIN-kodekontrollen er kun en tyveribeskyttelse for selve SIM-kortet (du kan ikke bruge SIM-kortet i en anden telefon, hvis du ikke kender PIN-koden).

5. Håndtering af Handi One+

Hvis brugeren vil beskytte indholdet af deres **Handi One+** af hensyn til fortrolighed, anbefales det at have en skærmlås i stedet, se [4.4 Indstil skærmlås](#).

5.10.2 Forbindelsesindstillinger

For at kunne sende og modtage SMS og MMS skal beskedserveren muligvis konfigureres. Dette gøres automatisk med de store operatører. Hvis du har brug for hjælp til opsætning af tjenesten, skal du kontakte din operatør.

5.11 Enhedens hukommelse og hukommelseskort

Handi One+ har to minder: den indbyggede enhedshukommelse og et eksternt micro-SD-hukommelseskort. Hukommelseskortet leveres ikke med enheden, men kan købes separat.

Enhedshukommelsen indeholder alle brugerdata for Handi og alle fotos, du tager med mobilkameraet.

5.11.1 Kamerabilleder på hukommelseskort

Hvis du tager mange billeder med mobilkameraet og ikke ønsker at fylde enhedens hukommelse med billeder, kan du vælge at gemme kamerabillederne på hukommelseskortet.


Dette lægger dog nogle begrænsninger i håndteringen af fotos: Billeder kan ikke ryddes fra *Album|Fotos*. Så overvej følgende, inden du vælger at gemme kamerabilleder på hukommelseskort:

- Tager du så mange billeder eller har så mange apps, at der er risiko for, at enhedens hukommelse ikke er nok?
- Kan du gøre uden at være i stand til at rydde kamerabilleder via *Fotos*? (De kan ryddes fra standard-appen *Galleri*.)

Hvis du svarer ja på disse spørgsmål, anbefales det at gemme fotos på hukommelseskortet, se nedenfor, hvordan du foretager indstillinger.

5.12 Apps

Apps, forkortelse for "applikationer" er de programmer, der er installeret i enheden. Du kan skelne mellem følgende apps i **Handi One+**:

- **Handi-apps**. De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Kalender, formularer, kontakter, kriseplan, Hurtigindstillinger og mere. De har alle det samme lille valg nederst til højre på ikonet: 
- **Standard-apps**. De apps, der ofte er indbygget i smartphones og derefter også inkluderet i Handi One+, for eksempel Telefon, SMS/MMS og Lommeregner.
- **Tredjeparts-apps**. Apps downloadet via *Google Play Butik*. For eksempel rejseplanlæggere, læsebøger, nyheder, Spotify og Facebook.

Handi-apps'ene er kort beskrevet i kapitel [1.5 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene](#).

5.12.1 Google-konto og Play Butik

5.12.1.1 Play Butik

Via *Google Play Butik* downloader du tredjepartsapps. For at kunne downloade apps skal en Google-konto være linket til enheden, se kapitel [5.12.1.2 Google-konto](#).

Du kan have *Play Butik* som en genvej i Start-menuen. Hvis du ikke ønsker, at brugeren selv skal kunne downloade apps, kan du i stedet starte Play Butik via indstillingstilstanden.

5.12.1.2 Google-konto

For at kunne downloade apps skal du have en *Google-konto* ("*Gmail*"). Følg disse trin for at oprette forbindelse til en Google-konto i **Handi One+**:

1. Åbn Google Play Butik-appen fra indstillingstilstand eller Start-menuen.
2. Opdater applikationen, når du bliver bedt om det.
Log ind på din Google-konto, når du bliver bedt om det.
Hvis du har en eksisterende konto, kan du udfylde dine kontooplysninger. Google synkroniserer derefter din konto med din Handi. Det kan tage et par minutter.
Hvis du ikke har en eksisterende konto, skal du vælge *Opret konto*, så kan du udfylde en formular med navn og den ønskede e-mail. Endelig skal du vælge en adgangskode til din konto.

5.12.2 Kort beskrivelse af standard-apps

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste standard-apps'ene, da de ser ud og fungerer i **Handi One+**.

5.12.2.1 Telefon

Telefon er standardappen til at foretage og modtage telefonopkald. Det anbefales, at du bruger Handi-appen *Telefon* i stedet for at få stemmestøtte, enklere opkaldslistor og muligheden for at gemme et nyt nummer til Handi-kontakterne. Handi-appen *Kontakter* kan også bruges til at foretage opkald. I begge tilfælde bruges den indbyggede telefon til selve opkaldet.

5.12.2.2 SMS/MMS

Beskeder er den indbyggede app til afsendelse og modtagelse af SMS og MMS. Til tekstbeskeder bruges med fordel Handi-apps'ene *Kontakter* og *SMS*, hvilket giver stemmestøtte og mulighed for at skrive med ordnede såkaldte grundlæggende beskeder.

5.12.2.3 Galleri

I Galleri vises alle billeder, der er taget med kameraet, modtagne billeder og optagede film.

5.12.2.4 Webbrowser

Med *Internet/Google* kan du surfe på nettet med **Handi One+**.

5.12.3 Om download af apps

Der er meget at tænke på, før du downloader en app:

Hvordan finder jeg den rigtige app?

Brug passende nøgleord. Hvis du vil have et bedre overblik, når du søger efter apps, kan du surfe til en computer via <https://play.google.com/store>.

Rækken af apps er næsten uendelig. For at finde apps, der er egnede til mennesker med kognitive handicap, kan du se på forskellige diskussionsfora og søgesider.

Koster appen noget?

Selvom der står, at appen er gratis, kan der nogle gange være ekstra omkostninger, såkaldte "i app-køb", hvor du bliver tilbudt at betale for forskellige opgraderinger inde i appen.

Er appen god og sikker?

Læs anmeldelserne til appen.

Er der plads nok til appen?

Det er ikke muligt at tilføje så mange apps, som du vil, i sidste ende er hukommelsen ikke nok. Slet alle ubrugte apps.

6. Startmenuen

Hvordan slettes en app?

For at slette apps skal du gå til **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Apps**. En liste over downloadede apps vises. Du trykker på den app, der skal slettes.

6. Startmenuen


Startmenuen er en enkel og tydelig hovedmenu, som alle apps starter fra: "Handi-skallen".

Startmenuen kan have forskellige layouts; Standard, Handi Rudenet eller Handi Rækker. Startmenu med Handi-layout er enklere og renere med mindre information og med mulighed for talestøtte. Startmenuen kan vises med rækker eller som rudenet. Startmenu med standard-layout ser ud som en almindelig startskærm i Android og viser ud over tilgængelige apps også statusfeltet.

Det er muligt at indlægge genveje til funktioner i Handi-apps'ene, fx Kalenderens "Ugevisning" eller Kontakters "Søg kontakt". Man kan også have en genvej direkte til fx en kontakt eller et skema.

De forskellige layouts og hvordan man tilpasser Startmenuen beskrives herunder.

6.1 Startmenu med Handi-layout

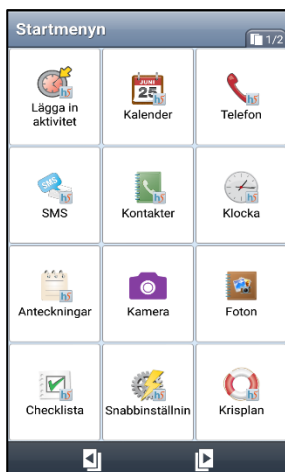

Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man markerer et ikon og trykker på **Næste** ▶ starter den valgte app. (Næste vises først, når et ikon er markeret.) Man kan også dobbeltklikke for at starte appen.

Man kan have flere sider med apps. I rubrikken 1/2 vises, hvor mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. Man skal trykke på **Bladre**-knapperne ◀ ▶ for at skifte side.

Handi-layout kan vises i rudenet eller rækker.

Ved at trykke på Oplæsnings-knappen 👤 læses det op, som man har markeret (forudsat at der er valgt talestøtte i menuer).

Hvis der er modtaget beskeder eller ubesvarede telefonopkald, er det angivet med et symbol ⚠ på ikonet for Handi-apps'ene **SMS** og **Telefon**.

6.2 Startmenu med Standard-layout



I Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man trykker på et ikon, starter den valgte app.

Man kan have flere sider med apps. Symbolet med hvide prikker ●● viser hvor mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. For at skifte side skal man anbringe fingeren på skærmen og trække til siden.

Den første side har et stort ur med dato. Øverst vises Androids statusfelt.

Nederst er en favoritliste, hvor man kan lægge 1-3 apps, som man altid ønsker at have let adgang til uanset hvilken side, der vises.


Det er muligt at skifte baggrundsbillede.

Der gives ingen talestøtte i dette layout.

7. Hurtigindstillinger

Handi-appen *Hurtigindstillinger* er et udvalg af de indstillinger, der findes. De indstillinger, som man kan have brug for at have til rådighed i den daglige anvendelse.

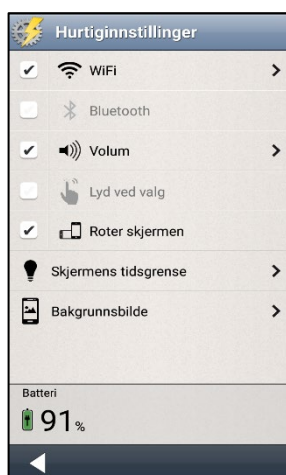

Det er muligt at indstille, hvilke indstillinger der skal vises, se 9.5 *Hurtigindstillinger*.



Når du starter *Hurtigindstillinger* vises de indstillinger, man har valgt at have til rådighed.

De valg, der er aktiverede (*Wi-Fi*, *Volume*, *Vibration*, *Roter skærm*, *Skærmes tidsgrense* og *Ringetone*), er markeret med et flueben, de, der ikke er aktiverede (*Bluetooth* og *Kliklyd*), er gråmarkerede.

Nogle af indstillingerne har en pil længst ude til højre, som viser, at man skal trykke på linjen for at komme videre til Android-indstillingerne, fx for at logge ind på et Wi-Fi-netværk.

Hvis der findes flere indstillinger end der er plads til på skærmen vises *Vis mere*-symbolerne   øverst/nederst for at vise at listen fortsætter i den retning.

7.1 Wi-Fi

Når man markerer *WiFi* kan enheden tilsluttes et trådløst netværk. Når man er inden for rækkevidde af det trådløse netværk, vil enheden automatisk vælge denne tilslutning til internettet, ikke mobilt bredbånd. Det er normalt både billigere og hurtigere at være forbundet til et trådløst netværk end at være forbundet med mobilt bredbånd. I nogle situationer kan det dog være hensigtsmæssigt at slukke for det trådløse netværk (*Wi-Fi*), hvis det ikke fungerer korrekt.

Når man trykker på pilen til højre, kommer man til Androids *Wi-Fi*-indstillinger, se kapitel 5.6.1 *Wi-Fi*.

7.2 Bluetooth

Hvis man vil tilslutte et Bluetooth-hovedsæt eller en højttaler, skal man markere i ruden *Bluetooth* og herefter trykke på pilen til højre. Man vil så komme til Androids *Bluetooth*-indstillinger.

1. Still Bluetooth-hovedsættet/højttaleren i "parringstilstand" (se brugsanvisningen for Bluetooth-enheden) Tilgængelige enheder vises på listen.
2. Tryk på navnet på den enhed, du vil tilslutte, enheden og Handi kobles sammen.

Bluetooth bruger en del strøm.

7.3 Lydstyrke

Når man trykker på pilen til højre for Volume vises billedet "Lydstyrke-indstillinger". Her kan man indstille alle lydstyrker individuelt:

- Lydstyrke ved indkommende samtale
- Samtale-lydstyrke
- Lydstyrke for media (fx. talesyntese)
- Lydstyrke ved beskeder (fx. sms)
- Lydstyrke ved alarm


Ved at trykke på ønsket niveau, kan du regulere lydstyrken til hver funktion.

For at afprøve lydstyrken, trykker man på Play-knappen .




7.3.1 Tid til at nulstille

Hvis man markerer Volume i billedet Hurtigindstillinger, bliver lyden slået fra, hvilket også vises i statusfeltet. Knappen *Slå lyd til kl.* vises.

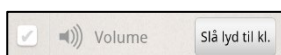

Når man trykker på knappen *Slå lyd til kl.* kan man angive hvilken tid lyden skal slås til igen.

Hvis man angiver et klokkeslæt, som er før den aktuelle tid, vil lyden blive slået til på dette tidspunkt næste døgn. (Fx klokken er nu 20:30 og man sætter tiden til 08:00, hvilket bliver i morgen). Det angivne klokkeslæt vises på knappen.

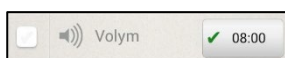

7.4 Vibration

Hvis du markerer Vibration, vibrerer Handi under indgående opkald og underretninger (for eksempel SMS/MMS). Denne indstilling påvirker ikke, hvordan Handi-kalenderen advarer om aktiviteter, timere eller påmindelser (for disse alarmer gælder indstillingen i kalenderen for hver alarm).

7.5 Kliklyd

Hvis man markerer Kliklyd vil man få en kliklyd som bekræftelse, når man trykker på knapper osv. i apps.

7.6 Roter skærm

Hvis *Roter skærm* er valgt, og man vipper enheden, drejer billedet og vises på den anden led. (Dette gælder ikke alle apps). Fx vil Handi-tastaturet så vise et liggende QWERTY-tastatur.

At læse tekst i "landskabsformat" i stedet for "portrætformat" er ofte lettere. Man kan dog indimellem ønske at afbryde rotationsfunktionen. Når enheden fx ligger på et bord, kan den rotere vilkårligt, hvilket kan være forstyrrende.

7.7 Skærmens tidsgrænse

Via *Skærmens tidsgrænse* kan man sætte tiden, inden skærmen slukkes, og enheden går i dvale (gælder kun, når enheden går på batteristrøm). Følgende billede vises.


Her indstiller man, hvor længe skærmen skal være tændt, efter at man har brugt enheden.

Det kan opleves som besværligt, hvis den slukker for hurtigt, men på den anden side bruger den mere strøm, hvis den er tændt længe.

Normalt er denne tid sat til 1 minut, men den kan sættes til *30 sekunder, 1, 2, 10, 30 minutter* eller *Brug aldrig tidsgrænse*.

BEMÆRK: Jo længere tidsgrænse desto højere strømforbrug.

Den nye indstilling bliver gemt, når man trykker på *OK*.

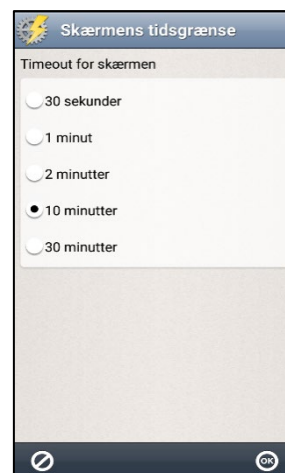


7.8 Ringetone

Via *Ringetone* indstiller du, hvilken ringetone du vil have. Følgende visning vises.

Du placerer din finger på skærmen og trækker op/ned for at se hele listen. Når du trykker på navnet på ringetonen, hører du, hvordan det lyder.

Den nye indstilling gemmes, når du trykker på *OK*.

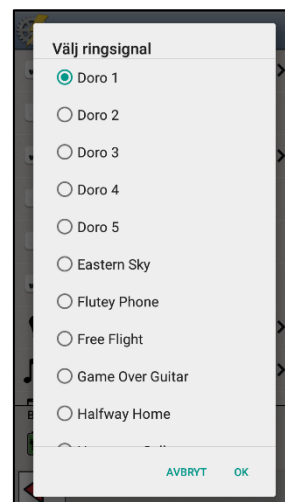

7.9 Baggrundsbillede

Via *Baggrundsbillede* vælger man det baggrundsbillede, der skal bruges som Standard-layout.

Man kan vælge de eksisterende billeder eller tage et nyt billede med kameraet.

Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-layout.

7.10 Batteri

Her vises hvor meget batterikapacitet, der er tilbage. Når opladeren er tilsluttet vises det med et symbol i batteriet.

Grøn betyder, at batteriet har en god ladning (71-100%), orange betyder, at snart er behov for opladning (21-70%), rød betyder, at det er i akut behov for opladning (0-20%).


8. Kamera

I **Handi One+** kan du enten bruge enhedens standardkamera eller det forenkledede Handi-kamera.

8.1 Standardkamera

Med enhedens standardkamera kan du tage dine egne billeder. Billederne gemmes på hukommelseskortet. Billederne kan derefter overføres til en computer via **HandiTools**. Hvis billederne bruges i en aktivitet eller en tjekliste, synkroniseres de automatisk med myAbilia.



Når du starter Kamera, vises søgervisningen. Det kan holdes stående eller liggende. For at tage et kort skal du trykke på  eller *Kamera*-knappen (7). Du zoomer ind med *Lydstyrke*-knappen (14) eller ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen.



Du kan starte kameraet ved at trykke på *Kamera*-knappen.


8.2 Handi-kamera

Med Handi kameraet kan du tage dine egne billeder. Billederne gemmes i enhedens hukommelse. Hvis billederne bruges i en aktivitet eller tjekliste, synkroniseres de automatisk med PC-programmet **HandiTools**.


Hvis billederne bruges i en aktivitet eller en tjekliste, synkroniseres de automatisk med myAbilia.


Når du starter *Kamera*, vises søgevinduet.

Du kan vælge mellem auto blitz/altid blitz/aldrig blitz ved at trykke på . Du kan vælge frem- eller bagkamera ved at trykke på .

For at tage et kort skal du trykke på . Du kan også tage et billede ved at holde *Kamera*-knappen (7) nede, mens kameraet er tændt.

Hvis du er tilfreds med kortet, skal du trykke på *OK*.

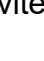Hvis du ikke er tilfreds, skal du trykke på  og derefter tage et nyt billede.

Tryk derefter på *Tilbage* .



9. Indstillinger

I dette kapitel beskrives indstillinger for *Startmenuen*, *System*, *Billedarkiv*, *Hurtigindstillinger*, *Kamera*, *Lommeregner* og *myAbilia*.

Indstillinger for de specifikke Handi-apps beskrives i de respektive brugervejledninger.

9.1 Indstillingstilstand

Man kan komme til indstillinger på to måder:

9.1.1 Ikon i Startmenu


I grundindstillingen findes en ikon for *Handi Indstillinger* i Startmenuen: . Ved at trykke på den kommer man til indstillinger.

Hvis brugeren ikke skal have adgang til Indstillinger er det passende at fjerne ikonen. Dette gøres ved at afkrydse ikonet i **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps**, se 9.2 *Startmenuen*.

BEMÆRK: Derefter kan du kun komme til indstillingstilstand via knapkombinationen, se nedenfor.

9.1.2 Knapkombinationen

Når du står i Startmenuen eller i nogen Handi-app, kan du trykke en specifik knapkombination for at komme over i indstillingstilstand.

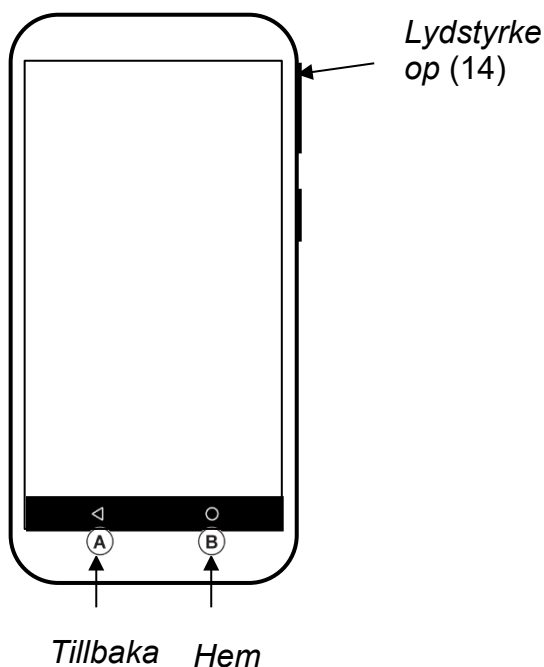

Hold funktionsknappen Tilbage (A) inde og tryk derefter to gange på Volumn op (14).

For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på funktionsknappen Hem (B).

9.2 Startmenuen

For at tilpasse Startmenuen skal du gå til **Handi Indstillinger|Startmenu**. Her kommer man til en menu, hvor man kan foretage følgende justeringer:

- Organisere apps
- Vælg startmenu
- Vælg baggrundsbillede

9.2.1 Organisere apps

Via **Handi Indstillinger|Startmenu|Organisere apps** vælger man hvilke ikoner, der skal vises i Startmenuen, og i hvilken rækkefølge, de skal vises.

På billedet vises ikonerne og en knap række foroven med redigeringsfunktionerne *Ny*, *Favorit* (kun Standard-layout) og *Flytte*. (Hvis intet ikon er markeret, vises kun knappen *Ny*.)


Organisere apps med Handi-layout valgt:



Organisere apps med Standard-layout valgt:



9.2.1.1 Ny genvej/app

 Via knappen *Ny* kan man oprette genveje i Startmenuen til visse funktioner i Handi-apps. Man kan downloade og installere ny apps fra *Play Butik*, oprette en genvej til *Handi Indstillinger* og *Opdater Handi*.



For at oprette en ny genvej til en Handi-app skal man vælge funktion i det første billede, fx "Kalender".

I "Vælg genvej" vises en liste over funktionens mulige genveje.


Når du trykker på *OK* oprettes genvejen sidst efter de markerede ikoner.

Genveje, der allerede findes i Startmenuen, vises ikke i listen.

9.2.1.2 Vælg/fjern app

Alle installerede apps er med i Handi **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps**, men ikke alle er forvalgte.

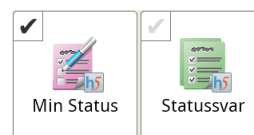

Hvis du ønsker, at en app skal vises i Startmenuen, trykker du på fluebenet i ikonets tjekboks, så det bliver sort, og vælger hermed funktionen.



For at fravælge en app, fjerner du blot markeringen i tjekboksen ved at trykke på den, så den bliver grå.

Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.

9.2.1.3 Flyt ikon med *Flyt-knapper*

  For at flytte et ikon markerer du det og trykker herefter på knappen *Flyt til venstre/højre* eller *Flyt op/ned*. Herefter ændres ikonernes placering i Startmenuen. (Hvis layoutet for Startmenuen er Handi Rækker, vises knapperne op/ned, ellers vises venstre/højre.)

Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.


9.2.1.4 Flyt ikon med "drag & drop"

Man kan ændre rækkefølgen af ikoner ved hjælp af "drag & drop".


Man trykker og holder på det ikon, der skal flyttes, og herefter trækker man ikonet til dets nye placering og slipper.

Man kan flytte ikonet til en anden skærmside ved at trække det til venstre eller højre.

9.2.1.5 Favorit (kun *Standard-layout*)


 For at tilføje en ny favorit i favoritlisten nederst på skærmen, skal man markere det ønskede ikon og trykke på knappen *Favorit*. Hvis der allerede er 3 ikoner i favoritlisten, vil ikonet længst til højre i favoritlisten bytte plads med det markerede ikon.

9.2.1.6 Slet genvej

 For at slette en genvej fra listen, markerer du den og trykker herefter på *Slet*-knappen. Du skal bekræfte, at du ønsker at slette ikonet. Ikonet slettes herefter fra listen. Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.

BEMÆRK: Man kan kun fjerne genveje, ikke apps.

9.2.1.7 Opdater

 Med *Opdater*-knappen flyttes alle forvalgte ikoner, så de ligger først, og det er dermed muligt at organisere rækkefølgen.

9.2.2 Vælge startmenu



Via **Handi Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu** vælger du hvilken layout startmenuen skal have.

- Standard
- Handi Rudenet
- Handi Rækker

De tre varianter beskrives i kapitel 6. *Startmenuen*.



9.2.3 Vælg baggrundsbillede

Via **Handi Indstillinger|Startmenu|Vælg baggrundsbillede** vælger man det baggrundsbillede, der skal bruges ved Standard-layout.

Man kan vælge de eksisterende billeder eller tage et nyt billede med kameraet.

Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-layout.

Baggrundsbillede kan også vælges via *Hurtigindstillinger*, se 7.9 *Baggrundsbillede*.

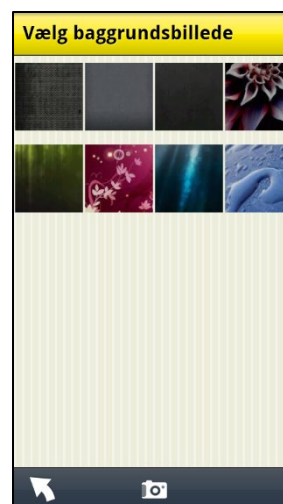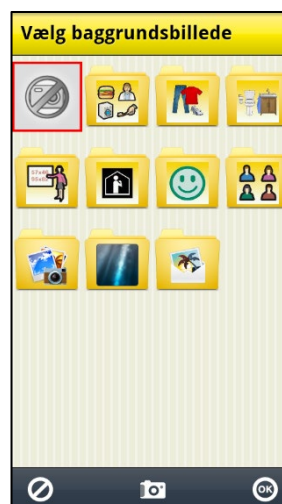


9.3 System

Via **Handi Indstillinger|System** kan du foretage systemindstillinger, backup, genindstilling samt få diverse oplysninger om **Handi One+**. Følgende funktioner vises i menuen:

- Kodebeskyt indstillinger
- Tema
- Talesyntese
- Lister
- Backup
- Genindstilling
- Om Handi
- Log
- Synkroniseringsstatus
- Licenshåndtering

9.3.1 Kodebeskyt indstillinger

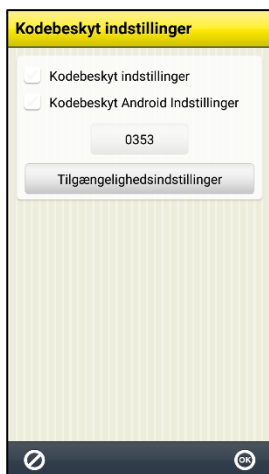


Via **Handi Indstillinger|System|Kodebeskyt indstillinger** kan du indstille, så der skal indtastes en kode for at få adgang til indstillingsmenuen i Handi og/eller indstillingerne i Android.

Det betyder, at når du trykker på ikonet *Indstillinger*, så vises siden til højre og du skal nu indtaste en angivet kode for at komme til Indstillinger.

Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne.


For at vælge kodebeskyttelse vælger du "Kodebeskyt indstillinger" og/eller "Kodebeskyt Android Indstillinger".

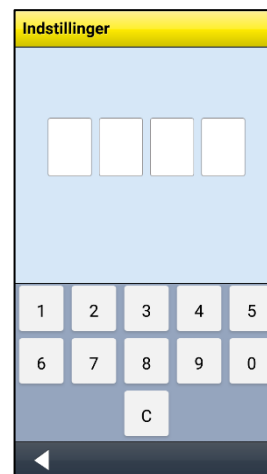

Hvis du ønsker en anden kode end den oprindelige **0353**, så tryk på knappen med koden og angiv en ny kode.

For at kunne kodebeskytte Androids indstillinger i **Handi One+** skal du trykke på knappen *Tilgængelighedsindstillinger* og aktivere tjenesten Handi.

9.3.2 Tema

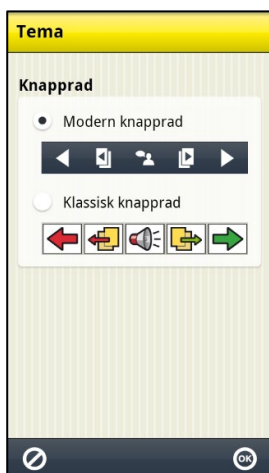

Via **Handi Indstillinger|System|Tema** bestemmer du hvordan knaprækken skal se ud i alle Handi-apps. Du kan vælge mellem:

- Moderne Værktøjslinje
- Klassisk Værktøjslinje

Klassisk Værktøjslinje har farvede knapper med tydeligere kontraster og konturer. Moderne Værktøjslinje ligner mere en "almindelig" smartphone.

Eksempel på de to temaer på Kalendersiden:

*Moderne
Værktøjslinje*



*Klassisk
Værktøjslinje*




9.3.3 Talesyntese

Når du vælger **Handi Indstillinger|System|Talesyntese** vises en menu med følgende indstillingsfunktioner:

- Talesyntese indstillinger
- Vælg stemme
- Download stemmer

9.3.3.1 Talesynteseindstillinger

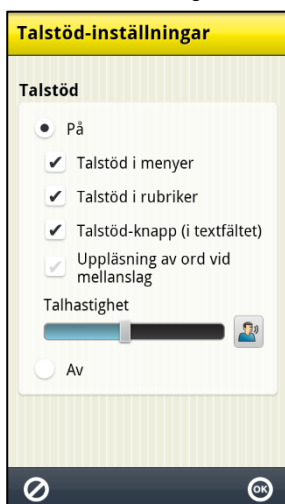


Via **Handi Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger** vælges hvornår og hvordan talestøtte skal bruges i tastaturet og i menuer. Når talesyntese er valgt kan man foretage følgende indstillinger:

- Talestøtte i menuer
- Talestøtte i rubrikker
- Opplæsnings-knap (i tekstfeltet)
- Opplæs ord ved mellemrum
- Talehastighed

Indstillingerne beskrives nedenfor.

BEMÆRK: Når indstillingen er sat til "Talesyntese Af" gives ingen talestøtte overhoved.

Talestøtte i menuer

Når **Talestøtte i menuer** er valgt vises *Oplæsnings-*knappen  i alle Handi-menuer og lister, se eksemplet til højre.

For at *Oplæsnings-*knappen kan vises skal et ikon eller en række være markeret. Når du trykker på *Oplæsnings-*knappen læses ikonet/linjen op af talesyntesen.

(Talestøtte på Kalendersiden fungerer anderledes, se *funktionsvejledning Kalender*.)



Talestøtte i rubrikker

Når **Talestøtte i rubrikker** er valgt læses det der står i rubrikfeltet op af talesyntesen, fx navn, dato og tid.

Oplæsnings-knap i tekstfeltet

Når **Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)** er markeret, vises en *Oplæsnings-*knap ved siden af tekstfeltet som vist i venstre billede.

Når **Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)** ikke er markeret, vises ingen *Oplæsnings-*knap. Se billedet til højre.

Når du trykker på *Oplæsnings-*knappen læses hele teksten op.




Oplæsning af ord ved mellemrum

Når **Oplæsning ord ved mellemrum** er valgt, læses ordet op samtidig med, at du skriver på tastaturet. Foregående ord læses op, når du taster mellemrum.

Talehastighed

Du kan ændre talehastigheden ved at trække i regulatoren. Sætningen "Test af talehastighed" læses op, så du kan teste hastigheden.

9.3.3.2 Vælg stemme

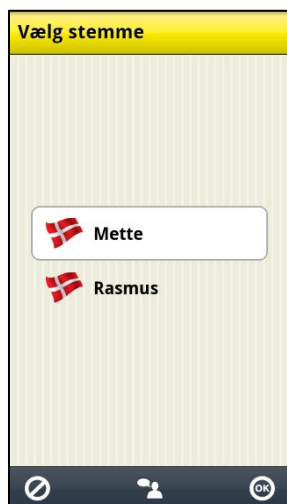

Via **Handid Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme** vælger du hvilken talesyntese stemme som skal anvendes.


Du kan vælge mellem stemmerne Mette (kvindestemme) og Rasmus (mandsstemme).

Når du trykker **OK** installeres den markerede stemmen.

9.3.3.3 Download stemmer

Via **Handi Indstillinger**|**Talesyntese**|**Download stemmer** du kan hente stemmer, der ikke indgik i installationen.

9.3.4 Lister

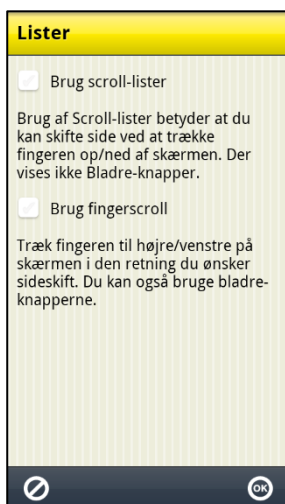


Via **Handi Indstillinger**|**System**|**Lister** vælges hvordan man skal bladre sider i Handi.

Man kan vælge mellem:


- Brug scroll-lister
- Brug fingerscroll

Indstillingerne beskrives foruden.

9.3.4.1 Brug scroll-lister

Når "Brug scroll-lister" er valgt vises *Vis mere*-symboler  øverst/nederst i en liste, hvis hele listen ikke kan være på skærmen, for at vise, at listen fortsætter i den retning.

Man placerer fingeren på skærmen og trækker den i den retning, listen skal rulle.

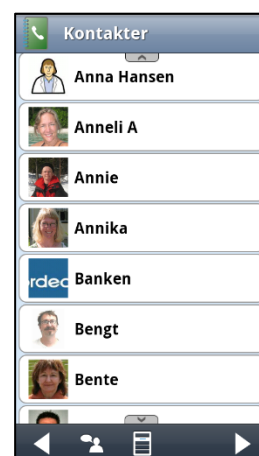

9.3.4.2 Brug fingerscroll

Når "Brug fingerscroll" er valgt kan man bladre til næste side ved at placere fingret på skærmen og trække til venstre/højre. Det går også at bladre med *Bladre*-knapperne



Fingerscroll er endnu ikke indført i alle Handi-funktioner.

9.3.5 Backup



Ved Backup kopieres indstillinger og data for Handi-funktionerne Kalender og Kontakter til enhedens hukommelse. Systemindstillinger som lydstyrke og baggrundsbillede følger ikke med.

Det anbefales, at du en gang imellem foretager en sikkerhedskopiering. Det vil betyde, at du kan genskabe det meste, selv om du helt skulle miste din **Handi One**.

I forbindelse med backup laves en gennemsøgning af kalenderdatabasen for at fjerne aktiviteter, som er indstillet til "slet bagefter".

Med knappen *Se logfil* kan du se information om den sidste backup, og om den var vellykket.

Automatisk backup sker hver nat klokken 03:15.

Du kan manuelt foretage backup ved at trykke på knappen *Lav en backup nu!* i **Handi Indstillinger|System|Backup**.

BEMÆRK: Hvis man anvender **Handi5 SW** med myAbilia, fungerer myAbilia som backup, fordi brugerens kalenderdata, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon-notater også er gemt der.

9.3.6 Genindstilling



Via **Handi Indstillinger|System|Genindstilling** kan du foretage genindstilling til følgende tilstand:

- Seneste backup
- Til grundindstilling


De forskellige genindstillinger beskrives nedenfor.

9.3.6.1 Genindstilling fra backup

Total genstart betyder at alle databaser og indstillinger fra sidste backup lægges ind igen. Tryk på knappen *Genindstil nu!* for at starte genindstilling.

Hvis du trykker på knappen *Tilpasset genindstilling* kan du vælge hvilke funktioner der skal genindstilles fra backup, *Sms*, *Kalender*, eller *Kontakter*, se billedet til højre.

Genindstilling fra backup er kun tænkt til at skulle foretages, hvis der har været problemer med en eller flere af databaserne.

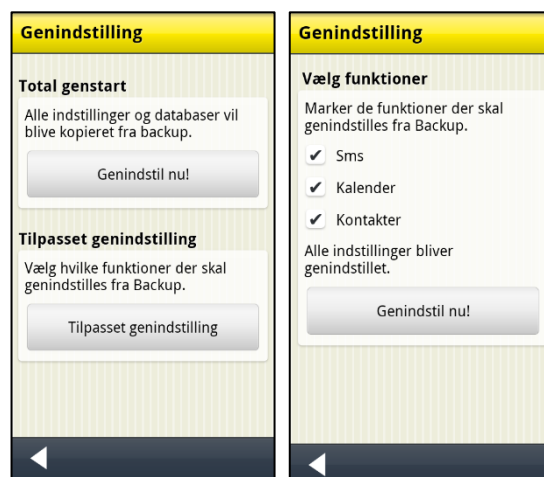

9.3.6.2 Genindstilling til grundindstilling

Genindstilling til grundindstilling betyder at Handi går tilbage til de indstillinger, som den havde til at starte med, mht. hvilke apps, der skal vises. Ingen databaser, dvs. billeder, kontakter, meddelelser osv. fjernes.

Genindstilling til grundindstilling bruges gerne til at komme tilbage til et udgangspunkt, når man har prøvet sig lidt frem.

Man må vælge mellem Niveau 1-2 (Handi-layout), og Niveau 3 (Standard-layout).

Grundindstillingen er defineret i kapitel 12. *Grundindstillinger*.



9.3.7 Om Handi



Via **Handi Indstillinger**|**System**|**Om Handi** kan du se hvilken version du har i din Handi, enhedens id og information om enheden.

Via knappen *Søg opdatering* kan man finde ud af, om der findes en nyere version af softwaren.

BEMÆRK: Funktionen kræver internet.

Hvis "Søg opdatering" giver besked om, at der er en nyere version tilgængelig, startes funktionen "Opdater Handi" automatisk, se kapitel 10. *Opdater Handi One+*.



Hvis der findes en nyere version vises det på ikonen for system  i Indstillinger. Hvis man har en genvej til "Opdater Handi" på startmenuen får den et symbol . En besked "Der er en ny version af Handi tilgængelig" bliver vist. Du kan derefter opdatere Handi som beskrevet i kapitel 10. *Opdater Handi One+*.

9.3.8 Log




Via **Handi Indstillinger|System|Log** kan du håndtere logfiler i Handy. Logfiler oprettes i baggrunden af Handy og bruges først og fremmest ved fejlsøgning.

Logfilerne gemmes automatisk i enhedens interne hukommelse, hvor de er utilgængelige.

Vælger du **Upload til server** så uploades logfilerne til Abilias supportserver via mobilnettet eller Wi-Fi. Tryk på knappen *Upload* for at starte.

Handi har indbygget automatisk crash-rapportering, se kapitel 13.2 *Automatisk crash-rapportering*.

9.3.9 Synkroniseringsstatus

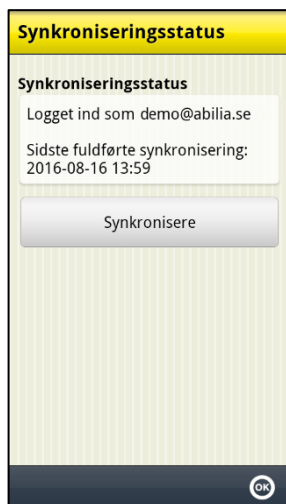


Via **Handi Indstillinger|System|Synkroniseringsstatus** kan man se information om hvad der er synkroniseret med myAbilia. Information om synkroniseringsstatus anvendes primært ved fejlfinding.

Via knappen *Synkronisere* kan man tvinge synkronisering mellem Handy og myAbilia.

9.4 Billedarkiv

Via **Handi Indstillinger|Billedarkiv** laver du indstillinger for billedarkivet direkte i Handi. En redigeringside for Billedarkiv vises.

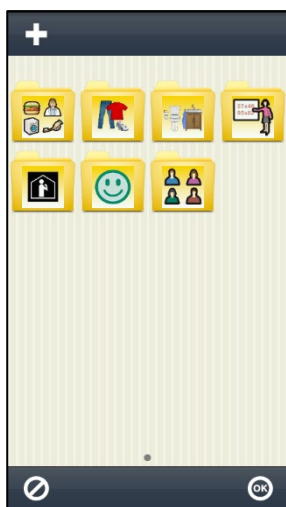

For at redigere billedarkivet anvender du redigeringsknapperne i den øverste knap-række: *Ny*, *Ændre*, *Slet*, *Flyt til venstre* og *Flyt til højre*. (Hvis du ikke har markeret et ikon vises blot knappen *Ny*).



Via *Ny*-knappen kan du lægge nye mapper ind.

Hvis Handi er knyttet til myAbilia kan du også tilføje billeder taget med mobilkameraet til billedarkivet.

Hvordan du redigerer billedarkivet beskrives nedenfor.

9.4.1 Opret en mappe

 For at oprette en ny mappe trykker du på knappen *Ny*.

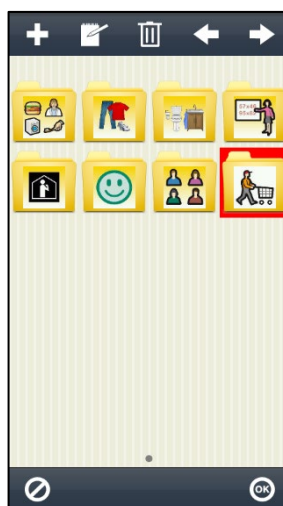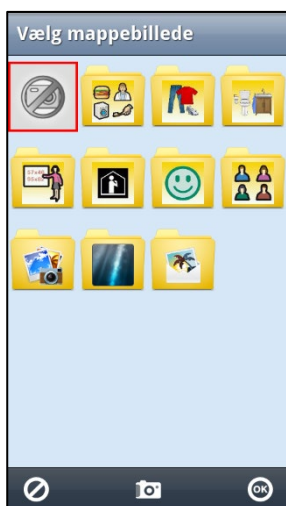


På den første side vælger du et billede for mappen (eller tager et nyt billede med det indbyggede kamera). På den næste side navngiver du mappen.


Mappen lægges ind sidst i billedarkivet. (Hvis et ikon er markeret, når du opretter en ny mappe, lægges mappen ind efter det markerede ikon.)

Billedarkivet gemmes, når du trykker på *OK*.

9.4.2 Ændre mappe

 For at ændre en mappe markerer du den og trykker på knappen *Ændre*. Samme procedure som i 9.4.1 *Opret en mappe* vises.

9.4.3 Ændre navn på billede

 For at omdøbe et billede markerer du det og trykker på knappen *Rediger*. Tastaturet vises og du kan nu indtaste et nyt navn.

9.4.4 Slet mappe/billede



For at slette en mappe/billede markerer du det og trykker på knappen *Slet*. Når du har bekræftet sletningen fjernes mappen/billedet.

9.4.5 Flyt mappe/billede



For at flytte mappe/billede til venstre eller højre markerer du den og trykker på knappen *Flyt til venstre* eller *Flyt til højre*. Mappen/billedet flyttes.

Hvis du flytter et billede/mappe, så det kommer til at ligge før/efter en mappe, får du spørgsmålet: "Vil du flytte billede/mappen x til mappen x?"

Hvis du svarer *JA* flyttes billedet til mappen x. Hvis du svarer *NEJ* lægges billedet før/efter mappen i det nuværende niveau.



9.5 Hurtigindstillinger


Via **Handi Indstillinger|Hurtigindstillinger** vælger man, hvad der vises i appen *Hurtigindstillinger*. Følgende funktioner kan vælges:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Volume
- Kliklyd
- Roter skærm
- Skærmens tidsgrænse
- Vælg baggrundsbillede
- Batteri
- USB-tilslutning



9.6 Kamera

Via **Handi Indstillinger|Kamera** kan du slukke kameraet i Handi-funktionerne og standardappen Kamera.

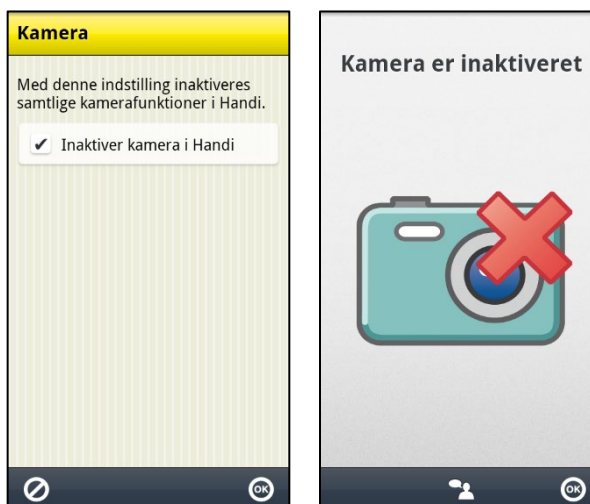

9.7 Lommeregner



Via **Handi Indstillinger|Lommeregner** laver du indstillinger for lommeregneren i Handi. Man kan foretage følgende indstillinger:

- Heltal og decimaler (Enkel, Valutaformat, Avanceret)
- Tastatur

Når "Enkel" er valgt, kan du højst skrive 5 heltal. Ingen decimaler kan skrives eller vises. Summen præsenteres heller ikke med decimaler, men afrundes. Decimalknappen vises ikke i tastaturet.

Når "Valutaformat" er valgt, kan du højst skrive 5 heltal og 2 decimaler.

Når "Avanceret" er valgt, kan du højst skrive 10 heltal og 5 decimaler.

Man kan vælge, om tastaturet skal se ud som på en telefon (123) eller som på en almindelig lommeregner (789).

9.8 MyAbilia

Via **Handi Indstillinger|myAbilia** tilslutter man Handi til myAbilia.

For at kunne gøre dette, kræves der først en **brugerkonto** i myAbilia, der oprettes på myAbilia.com.

9.8.1 Logge ind

For at Handi skal synkronisere med *myAbilia* skal enheden være logget ind. Indlogging gøres ved **Handi Indstillinger|myAbilia**. Følgende side vises:

Her skal man skrive brugernavn og adgangskode og derefter trykke på *Log ind*.

Hvis indlogging til *myAbilia* mislykkes får du fejlbesked om årsagen.

Når Handi er indlogget vises siden til højre. Sørg for at "Synkronisering" er afkrydset og tryk på *OK* for at lukke siden.

Det kræves internettilslutning for at Handi skal kunne synkronisere med webserveren. Synkroniseringen gøres kun ved behov – ved ændringer i Handi eller på *myAbilia*.

Hvis der ikke er internettilslutning kan man bruge Handi uden problemer alligevel, da laves synkroniseringen bare senere.

9.8.2 Logge ud

Handi forbliver logget ind på *myAbilia* til man selv aktivt logger ud. Selv om enheden genstartes fortsætter den at være logget ind.

For at logge ud skal man gå til **Handi Indstillinger|myAbilia** og trykke på knappen *Log ud*.

En besked "Du er logget ud" vises og indlogningssiden vises.

10. Opdater Handi One+

Softwaren i Handi udvikles kontinuerligt. Det angår både retning af småfejl, fx bugs, og nye og forbedrede funktioner. Det er derfor en god idé at opdatere softwaren med jævne mellemrum.

Funktionen "Opdater Handi" kan startes via **Handi Indstillinger|System|Om Handi** eller via en genvej på Startmenuen. Hvordan man indsætter en genvej beskrives i 9.2 *Startmenuen*.

Mængden af data for softwaren er omkring 20 MB og lastes ned via Wi-Fi.

Nedenfor beskrives, hvordan man opdaterer.

1. Tryk på knappen *Søg opdatering*.
2. Vent på besked om, hvorvidt der findes en nyere version af softwaren.
3. Tryk på *Hent*.
4. Tryk på *Installer*, når opdateringen downloades.
5. Meddelelsen "Erstat programmet" vises, tryk på OK.
6. Tryk på *Installer* i billedet "Ønsker du at installere dette program?"
7. Tryk på *Hjem*-knappen når det står "Program installeret".

11. Total genstart af Handi One+

11.1 Enkel genstart

Enkel genstart er tilstrækkelig, når du kun har brug for at rense Handi-funktionen for brugerdata og foretage indstillinger for en ny bruger. Eventuelle kamerabilleder forbliver, hvis du ikke vælger at fjerne dem. Android-indstillinger slettes heller ikke.

Følg disse trin for at fjerne filer, der tilhører den tidligere bruger:

1. Tilslut enheden til en pc.
2. Ryd de mapper, der kan indeholde data fra en tidligere bruger. Den eneste mappe, du skal beholde, er Handi-mappen. Resten gendannes, hvis det er nødvendigt.
3. Åbn Handi-mappen, og åbn System.
4. Gå til Voices og slet de unødvendige stemmer.
5. Gå til Backup og slet alle filer, der ikke skal bruges.

Følg disse trin for at fjerne data fra Handi-funktionen:

1. Gå til **Handi-indstillinger|System|Genindstilling|Ryd Handi data**, og tryk på **Næste** for at gå til *Lagerplads* for at fjerne data fra Handi. (Hvis Ryd data er deaktiveret, skal du deaktivere Handi som enhedsadministrator). Tryk på Ryd data.
2. Tryk på knappen **Hjem**.
3. En Handi-konfigurationsguide starter nu. Følg instruktionerne, og vælg "Ny Handi-bruger".
4. Klar.

Følg disse trin for at slette en Google-konto:

1. Gå til **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Konti**. Vælg den konto, der skal slettes.
2. Tryk på *Kontoindstillinger* og tryk derefter på *Slet en Google-konto*.
3. Hvis ikke, skal du tilføje en ny Google-konto, før du sletter den gamle konto.

Følg disse trin for at afinstallere downloadede apps:

1. Gå til **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Apps**. Slet alle apps undtagen Handi ved at åbne dem og trykke på *Afinstaller*.

Husk, at der kan være andre personlige oplysninger tilbage, for eksempel i andre apps, og hvis du er usikker, kan du gå ind i disse apps og vælge at rydde data.

11.2 Total genstart

Total genstart involverer nulstilling til fabriksindstillinger og geninstallation af Handi.

Det kan fx blive aktuelt, hvis **Handi One+** skal overtages af en ny bruger, og enheden først skal renses fuldstændigt for kamerabilleder, Android-indstillinger og mere

I en **Total genstart** indgår **Systemgendannelse** og **Handi konfiguration**.

Systemgendannelse indebærer at alle apps afinstalleres og enheden gendannes som den var da den kom fra fabrikken.

For at udføre en total genstart kræves **Værdibevis** med licensnøgle og tilgængelig *Wi-Fi* for at forbinde **Handi One+** til Internettet.

1. Gå til **Handi Indstillinger|System|Licenshåndtering** og tryk på knappen *Deaktiver licens*.
2. Tryk på *Open Settings*.


3. Gå til **Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Backup og nulstilling** og tryk på *Gendannelse af fabriksdata*. Tryk på knappen *Nulstil telefon* og derefter på *Slet alt*.


Fjernelse af data foregår i løbet af nogle minutter, enheden genstarter.

4. Tryk på knappen *Open Settings*.
5. Gå til **Wi-Fi** og log ind på tilgængelig trådløst netværk.
6. Gå til **Language & input**, tryk på *Language* og vælg *Dansk*.
7. Gå til **Indstillinger|Forbindelse|Wi-Fi**. Tænd for Wi-Fi, og opret forbindelse til et netværk.

Internetforbindelse er påkrævet her.

1. Tryk på *Indtast licensnøgle* for at indskrive den licensnøgle som findes på værdibeviset.
2. Når licensen er aktiveret vises en meddelelse. Tryk på *OK*.

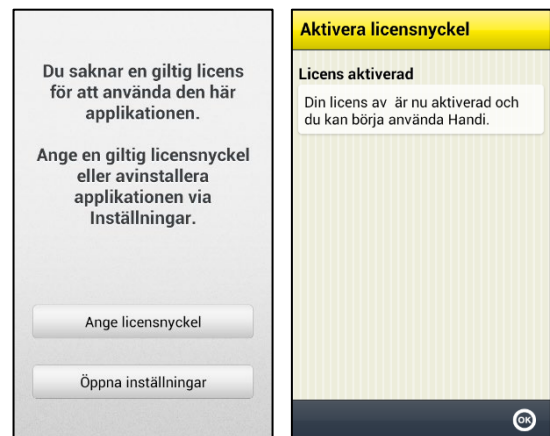

3. Skærbilledet "Hent systemfiler" vises for at downloade installationsfiler og stemmer. Vælg den ønskede stemme, og tryk på *Næste*.
4. Tryk på funktionsknappen *Hjem*. Følgende visning vises.
5. Vælg konfigurationstypen, og tryk på *Næste* .

For alternativet *Nye Handi-brugere*: Vælg grundindstilling, *Niveau 1*, *Niveau 2* eller *Niveau 3* og tryk på *Næste*. (Se kapitel 12. *Grundindstillinger* til beskrivelse af de forskellige niveauer. Niveauet kan let ændres senere.) Tryk på *JA* for at bekræfte den valgte konfiguration.

(Hvis du vælger *Eksisterende bruger* gendannes Handi-brugerdata fra sikkerhedskopifilen for den eksisterende bruger til Handi-apps'ene.)



6. Skærbilledet "Velkommen til Handi5!" vises. Tryk på *Næste*.
7. Skærbilledet "Indstil dato og tid" vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk på *Næste*.
8. Vælg, om Handi skal være standardappen til SMS.

11. Total genstart af Handi One+

9. Skærmbilledet "Færdig!" vises. Tryk på OK. Startmenuen vises:



10. Gennemgå indstillingerne for skærmlås, se kapitel 5.5 *Skærmlås og sikkerhedslys*.

11. Det kan også være godt at gå til Android-indstillinger og vælge at Androids indstillinger kan kodebeskyttes. Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig Hjælpefunktioner|Tjenester|Handi** og aktiver Handi (indstil til "Til").

12. Grundindstillinger

Når Handi startes for første gang, og når du foretager en Genindstilling eller Total genstart, omstilles Handi i henhold til en grundindstilling. Dette for at give rimelige udgangspunkter til den individuelle tilpasning, som altid bør finde sted. Nedenfor beskrives, hvad disse indstillingsniveauer indebærer.

				Nivå		
				1	2	3
Startmenu	Indsæt aktivitet			X	X	X
	Kalender			X	X	X
	Telefon				X	X
	Sms				X	X
	Kontakter				X	X
	Ur (genvej)			X	X	X
	Notater			X	X	X
	Kamera				X	X
	Foton (genvej)				X	X
	Diktafon			X	X	X
	Tjekliste			X	X	X
	Hurtigindstillinger			X	X	X
	Kriseplan				X	X
	Album				X	X
	Afspiller				X	X
	Prisberegneren			X	X	X
	Min Status				X	X
	Statussvar				X	X
	Lommerregner				X	X
	Batteri			X	X	X
Handi indstillinger			X	X	X	
		Startmenu	Standard			X
			Handi Rudenet	X	X	
			Handi Rækker			
		Baggrundsbillede				Standard
System	Tema	Værktøjslinje	Moderne		X	X
			Klassisk	X		
	Talesyntese	På/Af		På	På	På
			Talestøtte i menuer	X	X	
			Talestøtte i rubrikker	X	X	
			Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)	X	X	X
			Oplæs ved mellemrum			
			Talehastighed	55%	55%	55%
	Lister	Brug scroll-lister				X
		Brug fingerscroll				X
Kalender	Kalendersiden	Visning	Liste		X	X
			Tidssøjle	X		
		Bladre bagud den samme dag			X	X
		Bladre fremad i dage	Ikke tilladt			
			Maks 6 dage			
			Ubegrænset	X	X	X
		Bladre bagud i dage		X	X	X

12. Grundindstillinger

		Vis digital tid for aktiviteten		X	X	X
		Vis tekst for aktiviteten		X	X	X
		Vis Ur ved tryk på uret		X		
	Aktivitetssiden	Vis/Skjul i værktøjslinje	Vis Slet-knap		X	X
			Vis Redigér-knap		X	X
			Vælg alarm-knap	X	X	X
		Vis/Skjul i kvartursvisning	Kvartursvisning	X	X	X
			Vis sidste kvarter som fem punkter		X	X
			Digital nedtælling		X	X
	Indsæt aktivitet	Tillad passeret starttid			X	X
		Forvalgt alarm	Alarm+vibration	X	X	X
			Alarm			
			Vibration			
			Stille alarm			
			Ingen alarm			
		Forvalgte påmindelser	Ingen	X	X	X
		Indsæt aktivitet via Redigér-siden	Valgt		X	X
			Vælg aktivitetstype		X	X
			Standardaktivitet-knap		X	X
		Indsæt aktivitet via sekvens	Valgt	X		
			Vælg dato	X	X	X
			Vælg aktivitetstype		X	X
			Vælg Standardaktivitet	X	X	X
			Vælg billede	X	X	X
			Navngiv aktiviteten	X	X	X
			Info-menu	X	X	X
			Slet bagefter		X	X
			Vælg Kvittering og Alarm	X	X	X
			Vælg kategori	X	X	X
			Vælg påmindelse	X	X	X
			Vælg tidslængde			
			Indstil sluttid			
	Redigér-siden		Dato	X	X	X
			Navn	X	X	X
			Starttid	X	X	X
			Sluttid	X	X	X
			Tidslængde			
			Hele dagen	X	X	X
			Kvittering	X	X	X
			Vælg alarm	X	X	X
			Billede	X	X	X
			Info-menu	X	X	X
			Påmindelse	X	X	X
			Slet bagefter	X	X	X
			Kategori	X	X	X
	Info-menuen	Notater		X	X	X
		Diktafon		X	X	X
		Tjekliste		X	X	X
		Min Status			X	X

12. Grundindstillinger

		Kontakter			X	X
		Billede		X	X	X
		Timer		X	X	X
		Hurtigindstillinger				
		Adresse				
		Link				
		Album				
		Afspiller				
		Prisberegneren				
		SMS				
		Telefonnummer				
	Kalendermenuen		Indsæt aktivitet	X	X	X
			Månedsoversigt	X	X	X
			Ugevisning	X	X	X
			Start timer	X	X	X
			Tidsmåler	X	X	X
			Tidsbog	X	X	
			Ur	X	X	
			Søg aktivitet		X	X
			Standardaktiviteter			X
			Standardtimere			X
			Alarmlyd			X
	Tidvisning	Ur	Analog	X	X	
			Digital			X
		Månedssymbol/Ugenummer	Handisymbol	X	X	
			Piktogram			
			Ugenummer			X
			Intet			
		Vis ugedagsfarver		X	X	
		Vis helligdage		X	X	X
	Tidsindtastning	Metode til at vælge tid	Digital (med tal)			
			Analog (med urskiver)			
			Digital m. Analog-knap	X	X	X
			Analog m. Digital-knap			
		Analog døgninddeling	formiddag og eftermiddag			
			dag og nat	X	X	X
	Klokken	Vis dato		X	X	X
		Vis tid på døgnet		X	X	X
		Vis knap for oplæsning hvert kvarter (chime)				
		Ur	Analog	X	X	X
			Digital			
			Både analog og digital			
	Månedsoversigt	Vis markering for gentagede aktiviteter				
	Ugevisning	Antal dage i ugevisning	7 dage	X	X	X
			5 dage			
		Vis aktivitetens:	Tid			
			Billede	X	X	X
		Vis gentagede aktiviteter		X	X	X
		Vis knap for Timevisning		X	X	X

12. Grundindstillinger

		Vis knap for Ny aktivitet		X	X	X
	Start timer	Vælg standardtimer		X	X	X
		Vælg billede		X	X	X
		Navngiv timeren		X	X	X
		Timertid	1-99 minutter	X	X	X
			1-999 minutter			
			Timer og minutter			
	Tidsmåler	Sekund-visere		X	X	X
		Vis Pause-knap		X	X	X
	Tidsbog	Ny tidsmåling		X	X	X
		Vis Tidsbog i Standardaktiviteter				
		Vis Tidsbog i Standardtimere				
	Standardaktiviteter	Stå op		X	X	X
		Gå på toilettet		X	X	X
		Tage brusebad		X	X	X
		Kaffe		X	X	X
		Mad		X	X	X
		Handle		X	X	X
		Oplad Handi		X	X	X
	Standardtimere	Børste tænder	3 minutter	X	X	X
		Spille	30 minutter	X	X	X
		Vaskemaskinen færdig	60 minutter	X	X	X
		5 minutter (blå punkt)	5 minutter			
		10 minutter (rødt punkt)	10 minutter			
		15 minutter (gult punkt)	15 minutter			
		20 minutter (grønt punkt)	20 minutter			
	Alarmslyd	Aktiviteter uden kvittering	Alarm Classic	X	X	X
		Aktiviteter med kvittering	Osmium	X	X	X
		Timere	Alarm Beep 2	X	X	X
		Påmindelser	Fomalhaut	X	X	X
		Vibration ved påmindelse		X	X	X
		Alarmtid		30sek	30sek	30sek
	Alarmsiden	Vis snooze-knap		X	X	X
	Rejsetilstand	Aktiver rejsetilstand				
	Kategorier	Blå		X	X	X
		Lilla		X	X	X
		Rød		X	X	X
		Orange		X	X	X
		Grøn		X	X	X
		Turkis		X	X	X
Kontakter	Kontaktliste	Liste-type	Handi Rækker	X	X	X
			Handi Rudenet 4x3			
			Handi Rudenet 3x2			
		Vis konto	Handi	X	X	X
		Sortering	Mapper og egen rækkefølge			
			Mapper og alfabetisk rækkefølge	X	X	X
			Kun alfabetisk			
	Vis i Kontakter	Adresse		X	X	X
		Billede		X	X	X

12. Grundindstillinger

		Telefonnummer		X	X	X
		Mobilnummer		X	X	X
		E-postadresse		X	X	X
		Info		X	X	X
		Slet		X	X	X
		Redigér		X	X	X
		Bekræfte udgående opkald		X	X	X
	Kontaktmenu	Ny kontakt		X	X	X
		Søg kontakt		X	X	X
		Sorter kontakter				
		Vælg konto				
		Kopier kontakter				
Telefon	Telefonindstillinger	Vis i kontaktlisten	Nyt nummer	X	X	X
			Savnet			
			Modtaget			
			Opkaldt			
		Vis i "Nyt nummer"	Sidste opkaldte numre	X	X	X
	Telefonmenuen	Savnet			X	X
		Modtaget			X	X
		Opkaldt			X	X
		Net			X	X
		Saldo				
		Ryd opkaldslistre				
Hurtig-indstillinger	Wi-Fi			X	X	X
	Bluetooth			X	X	X
	Volume			X	X	X
	Vibration			X	X	X
	Kliklyd			X	X	X
	Roter skærm			X	X	X
	Skærmens tidsgrænse			X	X	X
	Ringetone			X	X	X
	Vælg baggrundsbillede			X	X	X
	Batteri			X	X	X
	USB-tilslutning			X	X	X
Album	Albumliste	Vis i listen	Fotos	X	X	X
			Videoklip	X	X	X
			Modtaget	X	X	X
		Vis i menu	Nyt album	X	X	X
			Rediger album			
	Billedmenu	Slet		X	X	X
		Oversigt		X	X	X
		Ændre navn		X	X	X
		Ændre album		X	X	X
		Dele				X
Tjekliste	Opgavesiden	Indtastning	Hurtig			
			Tilpasset	X	X	X
		Redigér-knap		X	X	X
		Slet-knap		X	X	X

12. Grundindstillinger

		Talesyntese	Opgave færdig/ ikke færdig	X	X	X
			Kun opgave			
	Tjeklistemenu	Ny tjekliste		X	X	X
		Ordne tjeklister				
	Listeindstillinger	Liste-type	Rækker	X	X	X
			Handi Rudenet			
		Sortering	Mapper og egen rækkefølge			
			Egen rækkefølge	X	X	X
			Alfabetisk rækkefølge			
Diktafon		Vælg billede				
		Navngiv diktafon-notat				X
		Navneforslag	Diktafon-notat	X	X	X
		Maks indspilningstid	30 sekund			
			5 minut	X	X	
			30 minut			
			90 minut			X
		Lyt direkte fra listen				X
Afspiller		Vis/Skjul	Kunstnerinformation i afspilningslisten	X	X	X
			Medieinformation på afspilningssiden	X	X	X
			Mappe til øvrige medier			X
		Afspillermenuen	Vis knap for blandet			X
			Vis knap for gentagelse	X	X	X
Lomme- regner		Heltal og decimaler	Enkel		X	X
			Valutaformat			
			Avanceret			
		Tastatur	Telefon (123)		X	X
			Lommeregner (789)			
Pris- beregneren		Kvitteringsliste ved indtastning		X	X	X
		Antal-knap		X	X	X
		Foreslå nærmeste valør		X	X	X
Kamera		Inaktiver kamera i Handi				
SMS	Beskedindstillinger	Visning	Samtale	X	X	X
			Mapper			
		Standardapp for SMS				
		Notifikation	Lydsignal, Standardsignal	X	X	X
			Vibration			
			Vis indholdet af beskeden i notifikationsvisningen			
		MMS	Visa MMS-knap	X	X	X
	Skriv besked	Brug grundlæggende beskeder		X	X	X
		Skriv med billeder (Billede-SMS)				
		Lang SMS		X	X	X
		Ekstra bekræftelse inden besked sendes		X	X	X
		Nyt nummer		X	X	X

12. Grundindstillinger

	Læs besked	Vis links		X	X	X
		Læs med billeder (BilledesMS)				
	Grundlæggende beske	Ring til mig!		X	X	X
		Vil du gå i biograf med mig?		X	X	X
		Jeg har brug for hjælp til at shoppe.		X	X	X
		Tillykke med fødselsdagen!		X	X	X
		Jag er kommet hjem.		X	X	X
		Knus!		X	X	X
		Kan du hjælpe mig?		X	X	X
		Tak for hjælpen!		X	X	X
		Hvornår kommer du?		X	X	X
		Hvor er du?		X	X	X
		Glædelig navnedag!		X	X	X
		Skal vi gøre noget sammen?		X	X	X

13. Produktspecifikationer

13.1 Rengøring

Før rengøring skal du fjerne alle kabler og slukke for Handi. Rengør med en blød klud, der er fugtet med vand.




ADVARSEL: Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan indeholde brandfarlige stoffer.

13.2 Automatisk crash-rapportering

Handi One+ er indbygget automatisk crash-rapportering. Hvis der går noget galt i Handi-appene, vises en fejlmeddelelse og samtidig sendes information om fejlen automatisk til udviklingsafdelingen. Der sendes ingen personlige oplysninger. Dette er til stor hjælp i arbejdet med at udvikle et stabilt og velfungerende program.

13.3 Genbrug af elektronisk affald

Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf produktet på et egnet bortskaffelsessted.

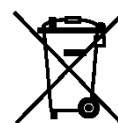

13.4 Medfølgende artikler

Art.nr	Navn	Beskrivelse	Antal
	Handi One	Android-baseret maskinvare	1 stk.
706496	Beskyttelsesetui Handi One	Beskytter enheden	1 stk.
706493	Batterilader - USB C	Batterioplader inkl. USB-kabel	1 stk.
706356	Hovedsæt 3,5 mm	Hovedsæt inkl. USB C-3.5mm adapter	1 stk.
	Værdibeviset	Med licensnøgle	1 stk.
	Manualer	Start op Handi, Håndbog (dette dokument), Brugervejledning Kalender, Tilpasningsguide	4 stk.

13.5 Tekniske data

Batteri	Genopladeligt batteri, Højspændingsbatteri 3950 mAh Litium-Jon
Gennemsnitlig opladningstid	1 time
Kamera	Bagside: 8 Megapixel Forside: 5 Megapixel
Skærm	5,5 tommer
Androidversion	6.0
IP-klasse	IP68
Anvendelsesområde	0°C til 40°C
Størrelse (H x B x D)	156 x 75 x 14 mm
Vægt	227 g
Dataforbindelse	USB C
Anslåede levetid	3 år

CE

