

BRUGSANVISNING

KØREVEJLEDNING

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne vejledning, før du tager din Eloflex elscooter i brug, for at sikre at den bruges forsvarligt, også i forhold til dig selv og omgivelserne

Eloflex S1



EL&FLEX

# Tak og held og lykke!

---

Tak fordi du valgte en Eloflex som Dit hjælpemiddel. Det betyder meget for os, fordi vores vision er at gøre folks hverdag nemmere og give bevægelseshæmmede større frihed. Vi håber du bliver glad for Eloflex.

Vi håber på, du vil nyde din nye hybrid-scooter meget. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og pleje. Vi opfordrer dig til at læse hele denne manual før du bruger din Eloflex for første gang. Vi foreslår også, at du øver dig i at køre din Eloflex på et afsides, åbent og plant underlag, inden du bruger den i andre sammenhænge.

Beslutninger om, hvorvidt Eloflex scooteren er egnet til pågældende bruger, træffes altid i samråd med brugeren selv. Eloflex påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor scooteren ikke er tilpasset brugerens behov.

En Eloflex bør primært anvendes i sin standardversion. Hvis scooteren skal tilpasses eller ændres på nogen måde, må det kun udføres af dit hjælpemiddelcenter eller af Eloflex. Vær opmærksom på, at skader og defekter, der opstår på grund af forkert brug eller pga. misligholdelse, ikke er dækket af garantien.

*Held og lykke med din Eloflex.*

**Kør forsigtigt!**



Indhold	Side
Anvendelse	3
Fold op og fold ned	4
Juster sædelængde og sædehøjde	5
Løft armlænene	6
Vippe-beskyttelse	6
Manuel kørsel	6
Fjernbetjening	7
Belysning	7
Opladnings vejledning	7
Betjeningspanel og kørselsvejledning	8
Justering af sædebredde	9
Transport og opbevaring	9
Fejlkoder	10
Sikkerhedsinstruktioner under kørsel	11
Generelle sikkerhedsinstruktioner	13
Teknisk data	15
Kontakt	16

# Anvendelse

## Typeklassificering og tilsigtet anvendelse

Eloflex elscooter er udviklet til personer med fysisk funktionsnedsættelse, men som er i besiddelse af fysisk og mental evne til at styre en elscooter.

Eloflex elscooter er designet til udendørs brug, men er kompakt og fleksibel nok til indendørs brug. Kapitlet "Tekniske data" bagerst i dette dokument indeholder information om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal køreevne, maksimal vægt for brugeren osv. Vi opfordrer dig til at læse alle sikkerhedsoplysninger i kapitlet "Sikkerhedsinstruktioner" i dette dokument.

Eloflex er testet og godkendt i henhold til EN12184: 2014 - klasse B (indendørs og udendørs brug). Eloflex er også godkendt i henhold til ISO-7176, IEC60601 og batterierne er godkendt i henhold til UN38.3.

Eloflex scootere opfylder gældende krav i lov (1993: 584) om medicinsk udstyr og i reglerne (LVFS 2003: 11 og LVFS 222009: 18) om medicinsk udstyr. Produktet opfylder dermed kravene i EU-direktiverne om medicinsk udstyr, 93/42 / EEC og 22007/47 / EC.

Klasse 1 overensstemmelsesvurdering / CE-mærkning er udstedt i overensstemmelse med Medical Devices Directive 93/42 EEC / MPG (Medical Devices Act) og gælder kun for hele produktet. CE-mærkningen bliver ugyldig, hvis du bruger udskiftningskomponenter eller tilbehør, der ikke er godkendt til dette produkt.

## Behov

Formålet med en Eloflex er at kompensere for en skade eller funktionsnedsættelse, hvorfor det anbefales under følgende omstændigheder:

- Hvis brugeren har en manglende evne til at gå eller en stærkt begrænset evne til at gå, hvilket gør det vanskeligt at bevæge sig både længere og/eller kortere strækninger udendørs.
- Hvis der er behov for at forlade hjemmet for at komme ud i den friske luft
- Når brugeren har svært ved at komme til eller udføre arbejde eller aktiviteter på grund af deres bevægeshandicap.

## Tilbehør

Oplader og værktøj kan opbevares i medfølgende sidetaske.

## Utility

Brug kun Eloflex scooteren, når den er i fuldt funktionsdygtig tilstand, ellers udsætter du dig selv og andre for fare.

Den følgende liste viser ikke alle mulige situationer, men beskriver visse situationer, som kan påvirke scooterens anvendelighed.

- Brug ikke scooteren, hvis motoren støjer
- Brug ikke scooteren, hvis batterierne er defekte
- Brug ikke scooteren, hvis bremsefunktionen ser ud til at være defekt
- Kontakt servicecenter eller forhandler, når dæk er slidt
- Kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandler, hvis du opdager skader på armlæn, sæde, ryglæn, styr eller anden del af scooteren
- Kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandler, hvis du opdager skader på det elektriske dele som kabler, batterier, opladere osv.

## Garanti

Du har altid to års garanti på din scooter fra Eloflex.

Garantibetingelserne er i overensstemmelse med de gældende nationale og generelle forretningsbetingelser og love. De detaljerede garantibetingelser kan downloades på [www.eloflex.dk](http://www.eloflex.dk). Bemærk, at du bør gemme den originale æske til din Eloflex i garantiperioden (æskan kan foldes sammen og lægges væk).

## Levetid

Den beregnede levetid for en Eloflex er 5 år. Produktets levetid er dog afhængig af, hvordan det bruges og vedligeholdes. En Eloflex kan have en meget længere levetid, hvis du vedligeholder og bruger den i henhold til producentens vejledning beskrevet i dette dokument.

## Sikkerhedsregler og risici

LÆS KØREVEJLEDNINGEN OG SIKKERHEDSVEJLEDNINGEN, FRA SIDE 11, OMHYGGELIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DIN ELOFLEX SCOOTER.



# Fold op og fold ned

## Fold op

### Trin 1

Læg den sammenfoldede scooter på jorden som vist på billedet til højre. Fold styret op ved at løfte det op og frem.

Herefter låses styret ved hjælp af håndtaget der sidder i hængslet i bunden af styret. For at fastgøre håndtaget skal du dreje den sorte plastiksikring over håndtaget.




### Trin 2

Tag fat i ryglænet og træk opad for at åbne stolen. Hold med den ene hånd på styret.

### Trin 3

Luk låsekrogen på bagsiden af scooteren - det er meget vigtigt! Sørg for, at låsekrogen klikker ind.

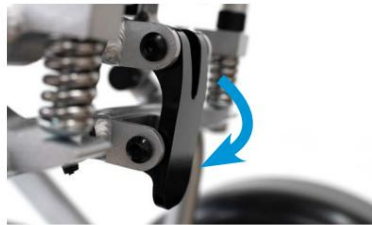

Det er meget vigtigt, at du lukker låsekrogen, inden du bruger scooteren.

## Fold ned

### Trin 1

Åbn låsekrogen som vist på billedet til højre.

### Trin 2

Læg den ene hånd på forkanten af styret. Tag fat i toppen af ryglænet med den anden hånd og fold det fremad. Tryk stolen sammen i henhold til billederne til højre.

### Trin 3

Åbn låseklemmen i bunden af styret ved at dreje sikkerhedskrogen af og åbne krogen.

Fold derefter styret ned og placer det oven på det foldede sæde.



# Justerer sædeafstand og sædehøjde

## Øg sædeafstand

Sørg for, at stolen er i køreklar stilling og tændt. Tryk og hold nede "pil op" for at udvide scooteren.



## Reducer sædeafstand

Sørg for, at stolen er i køreklar stilling og tændt. Tryk og hold nede "pil ned" for at reducere afstanden.



## Juster sædehøjden

Sørg for, at stolen er i opslået position. Fjern derefter scooterens sædehynde. Træk den sorte wire under forkanten af stolen.

Samtidig med at wiren holdes i spændt stilling, justeres sædets bagkant nu til den ønskede position (tre forskellige positioner). Når sædet er i den ønskede position, placeres sædets forkant i samme niveau som bagkanten. Slip kablet for at låse sædet i hullet, der er på samme niveau som bagkanten.



# Løfte armlæn

## Trin 1

For at løfte armlænene ved ind- og udstigning skal du først løsne låsen ved at dreje låsegrebet en halv omgang.

Løft derefter armlænene.




Det er vigtigt, at du låser armlænene, når du

sænker dem igen, ved at dreje låsegrebet en halv omgang tilbage.

## Anti -Tip sikring

Anti-tip sikring har to positioner. En til kørestilling og en til, når scooteren er sat i bero under f.eks. opbevaring.


Du kan nemt ændre positionen ved manuelt at justere anti-tip sikringerne.

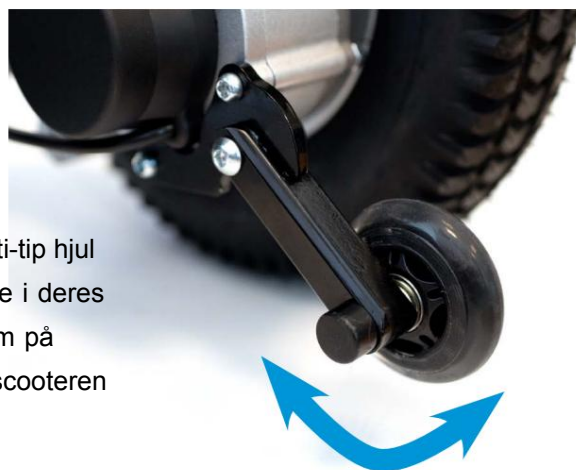

BEMÆRK! Anti-tip hjul skal altid være i deres kørestilling (som på billedet), når scooteren bruges.

## Manuel kørsel

Sluk for el-scooteren. Skub derefter de røde håndtag på motorene (se billede) for at frakoble magnetbremserne. I denne position kan scooteren rulles frit manuelt. **Bemærk!** magnetlåsene skal altid være slukket, hvis scooteren skal skubbes i fri gear.

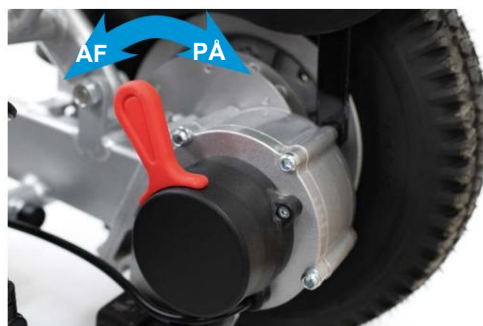

**VIGTIG!**

Spark **ALDRIG** til de røde håndtag. Brug kun håndkraft.

# Fjernbetjening

Din Eloflex scooter kommer med en fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan bruges til at låse din elscooter. Når scooteren er i låst position, er det ikke muligt at køre den.



# Lys

Din Eloflex scooter har for- og baglygter for øget sikkerhed. For at tænde lygterne skal du trykke på lampeikonet i venstre side af styret. Der er også bremselys og blinklys. Du bruger blinklys med de to pile på venstre side af styret. Bremselyset aktiveres når scooteren holder stille, når du slipper gashåndtaget og når du bremser med bremseknappen.



# Opladningsinstruktion

Start med at slukke for din Eloflex. Tilslut opladeren til stikket på forsiden af styret. Bemærk! Drej låget til siden, træk ikke i det! Sørg for, at placeringen af kontakterne passer

Opladning indikeres af en lampe på opladeren. Rødt lys betyder, at opladning er i gang. Efter cirka tre timer er batterierne 90 procent opladet. Stolen kan nu bruges igen. Efter ca. 5-8 timer bliver lampen på opladeren grøn, og batterierne er fuldt opladet. Under opladningen bliver selve opladeren varm, og det er helt normalt.



For maksimal batterilevetid bør opladningen finde sted i cirka fem timer, når bjælken på batteriindikatoren er faldet til en tredjedel. Batterierne er ikke beskadiget af vedligeholdelsesopladning, men for maksimal levetid, skal du huske at slukke for opladeren, når batterierne er fuldt opladet.

Ved opladning ved lave temperaturer vil batterierne ikke blive fuldt opladet. Hvis din Eloflex bruges i minus grader, er kilometertallet påvirket. Ved -10 grader kan kilometertallet eksempelvis reduceres med op til 50%. Mere info på [www.eloflex.dk](http://www.eloflex.dk)



**VIGTIGT!**

Fjern opladeren fra stikket, efter opladningen er fuldført!

# Kontrolpanel

---

Øg hastigheden

Tænd og sluk knap

Reducer hastigheden



Øg sædeafstand

Neutral sædelængde

Reducer sædeafstand

Lys

Blink til venstre

Bremse



Blink til højre

Horn

**Informationsdisplay:** Displayet på scooteren har 2 forskellige visningstilstande. Den ene viser information om aktuell hastighed, gearvalg, forlygter og blinklys. Den anden visningstilstand lyser ved fejl på scooteren. Der vises den aktuelle fejlkode, batterispænding og aktuelle gear.

Bakgear

speeder



**Batteri indikator:** Angiver, hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Når batterierne er fuldt opladede, er alle lamper tændt. Efterhånden som batterierne aflades, slukkes lysene ned. Oplad, når to tredjedele af lyset går ud.

# Kørselsvejledning

---

## Køre frem

Når du starter scooteren (tænd og sluk-knap), er den i parkeringstilstand. Tryk derefter på den røde bremseknap og så kan du begynde at køre ved hjælp af speeder. **D** ses på displayet.

## At bakke


For at bakken scooteren skal du trykke på den grå knap under batteriindikatoren. Der høres en biplyd når scooter er i bakgear og en **"R"** ses på displayet. Du bakker så ved at trykke på speeder. Når du vil køre fremad igen, skal du klikke på den grå knap igen - **D** ses på displayet.



# Justering af sædebredde

Sædebredden kan øges ved at montere et breddekit på armlænen.

Man kan vælge at øge sædebredden med 5 eller 10 cm.

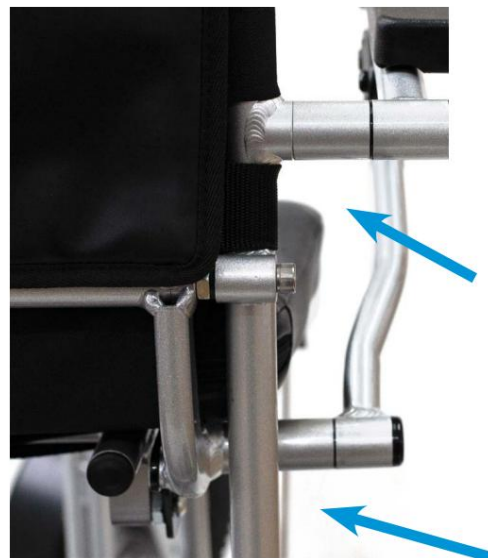

## Trin 1

Løsn armlænene på hver side ved at skrue de to beslag af.

## Trin 2

Monter udvidelsesmuffen mellem stolen og armlænet. Sæt armlænene på igen.

Du bestiller breddekit hos Eloflex eller en af vores forhandlere.

# Transport og opbevaring

- Hvis scooteren ikke skal bruges i et stykke tid, anbefaler vi, at batterierne oplades helt inden den sættes til side.
- Scooteren bør opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Hvis du skal have din Eloflex med på flyrejsen, anbefaler vi, at du læser den information, vi har samlet på vores hjemmeside vedrørende IATAs regler [www.eloflex.dk/faq](http://www.eloflex.dk/faq)
- Ved transport med Flextrafik eller Handicaptransport skal Eloflex fastgøres til de fastgørelsespunkter, der er vist på billederne nederst. Bemærk venligst, at Eloflex ikke er testet som autostol. Vi anbefaler derfor altid, at brugeren sidder i bilens egne sæder.



# Fejlkoder

## Fejlkoder, der kan vises på displayet

FEJLKODE	ÅRSAG	MÅLE
Venstre / Højre solenoide fejl	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Den magnetiske bremse på venstre/højre motor er åben.</li><li>2. Tilslutningsfejl på venstre motors magnetbremse.</li><li>3. Den venstre motors magnetiske bremse er ødelagt, eller styreenheden kan være beskadiget.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luk magnetbremsen ved at trække det røde håndtag til lukket position.</li><li>2. Kontroller, at motorstikket er korrekt tilsluttet.</li></ol> <p>Kontakt din forhandler for at få hjælp.</p>
Venstre højre Overstrøm	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Overspænding på grund af for høj modstand.</li><li>2. Motor- eller styreenhedsfejl.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Systemet nulstilles, når modstanden er væk.</li><li>2. Kontakt din forhandler for at få hjælp.</li></ol>
Acceleration ikke nul	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gashåndtaget er ikke i "nulposition", når stolen udfører en starttest.</li><li>2. Fejl i styreenhed.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Slip gashåndtaget og genstart scooteren.</li><li>2. Kontakt din forhandler for at få hjælp.</li></ol>
Accelerationsfejl	Fejl i gashåndtag eller styreenhed.	Kontakt din forhandler for at få hjælp.
MController understøtter ikke	Fejl i styreenhed eller forkert type styreenhed.	Udskift styreenheden.
Com fejl Dis til MC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Løse eller forkert tilsluttede forbindelser.</li><li>2. Fejl i styreenhed.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller, at alle forbindelser er korrekt installeret.</li><li>2. Kontakt din forhandler for at få hjælp.</li></ol>
Venstre/Højre driverfejl	Kontrollerer enhed for fejl.	Kontakt din forhandler for at få hjælp.
Skubstangsfejl	Kortslutning i længdejusteringsmotoren, ødelagt længdejusteringsmotor eller fejl i styreenhed.	Kontroller forbindelsen til længdejusteringsmotoren, eller kontakt din forhandler for at få hjælp.
Batterivolumen er for høj	Forkert batteritype eller ødelagt batteri.	Udskift 24V-batteriet.
Batterivolumen er for lav	Batteriet er gammelt eller uopladet.	Oplad batteriet, eller udskift det, hvis det er gammelt.
Vinkelsensorfejl Vinkelsensoren	er brudt eller forbindelsesfejl.	Kontakt din forhandler for at få hjælp.

## Sikkerhedsinstruktioner under kørsel

---

Der er risiko for personskade, hvis scooteren vælter.

- *Kør kun på skråninger, der ikke overstiger den maksimalt tilladte hældning*
- *Brug altid tip-sikringer, når du kører en Eloflex*
- *Kørsel ned ad bakke skal altid foregå med lavere hastighed*  
*Hold afstand, hvor der er risiko for glatte overflader*
- *Forsøg aldrig at køre op eller ned af trapper*
- *Kør aldrig over forhindringer, der er højere end den anbefalede maksimale højde*
- *Undgå hurtige eller rykkende bevægelser med styret og pludselige ændringer i køreretningen under kørslen*

Risiko for at blive efterladt fjerntliggende steder.

Risiko for skader, hvis en fod glider af fodstøtten og ender under el-scooteren under kørslen.

- *En bruger med stærkt nedsat mobilitet bør ikke køre lange strækninger udendørs alene*
- *Placer altid dine fødder i midten af fodpladen under kørslen.*

Risiko for kvæstelser, hvis du kolliderer med andre genstande under trange forhold .

- *Kør gennem smalle passager med den laveste hastighed*

Der er risiko for, at scooteren vælter, hvis vippekningerne fjernes, beskadiges eller monteres i en position, der afviger fra standardmonteringen.

- *Vippesikringerne skal altid være monteret, når el-kørestolen bruges*
- *Vippesikringerne fungerer kun på fast underlag. På bløde overflader som græsplæner og sne kan vippesikringen miste sin virkning. Kør derfor ekstremt forsigtigt på bløde overflade*

# Kørsel

---

## Vigtigt!

**Brugeren skal læse disse sikkerheds - og kørevejledninger, før elscooteren tages i brug. Vi anbefaler, at du øver dig i at køre Eloflex med en assistent. Start at øve dig på en åben, flad terræn, inden du bruger din scooter blandt andre mennesker, i butikker osv.**

- **Kør** fremad ved at holde gashåndtaget nede.
- **Stop** ved at slippe gashåndtaget.
- **Bak** ved at trykke på tilbage-knappen, kør derefter baglæns ved at holde gashåndtaget nede. Tryk på tilbage-knappen igen for at køre fremad igen.
- **Husk** altid at se tilbage, før du begynder at bakke op for at sikre dig, at ingen personer eller ting er i vejen.
- **Drej** under kørsel ved forsigtigt at dreje styret i samme retning, som du vil dreje. Sæt altid farten ned, når du drejer.
- **Øv** dig i at undgå og passere forhindringer. Styr samtidig let til siden for at undgå forhindringer. Husk at sætte farten ned, når du nærmer dig forhindringer.

### Hurtig kørsel

Øg hastigheden vha. knapperne på styret. Husk at sætte farten ned, så snart du føler dig utryk, eller hvis du nærmer dig en forhindring samt når du skal dreje og vende.

### Kørsel over forhindringer

Kør langsomt hen til forhindringen og sørg for, at forhjulet er i den rigtige retning. Kør derefter langsomt fremad, mens du læner dig bagud for at køre over forhindringen. Eloflex er testet og godkendt til forhindringer op til max. 6 cm.

### Kørsel på stejl terræn

Prøv at køre lige op eller lige ned på en stejl overflade. Læn dig lidt frem, når du kører op ad bakke, og lidt bagud, når du kører ned ad bakke, for at bevare dit tyngdepunkt. Undgå at køre sidelæns, hvis det er muligt, og kompenser for enhver sidehældning ved at læne dig i den modsatte retning. Kør altid langsomt på skrånende overflader. Undgå overflader, der hælder mere end 9 grader.

### Tag elevatoren

Husk at tjekke elevator dørens bredde og hvor hurtigt døren lukker inden du kører ind i elevatoren. Husk, at du muligvis skal bakke ud af elevatoren, hvis den ikke er stor nok til, at du kan vende.

### Kryds kørebanen

Vælg, så vidt muligt altid at krydse vejen ved et fodgængerfelt. Vær opmærksom på krydsende biler. Brug eventuelt den skrå del af fortovet.

Undgå kantsten, der er højere end 6 cm.

### Kørsel på vejen

Kør din Eloflex primært på fortove og cykelstier og i sidste ende på befærdede veje.

## Generelle sikkerhedsinstruktioner

Der er risiko for personskade, hvis scooteren bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i dette dokument.

- *Brug kun scooteren i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual*

Der er risiko for personskade, hvis scooteren bruges af personer med nedsat køreevne.

- *Brug ikke scooteren, når din køreevne er nedsat på grund af for eksempel sygdom, medicin eller alkohol.*

Der er risiko for personskade, hvis scooteren sættes i gang ufrivilligt.

- *Sluk for scooteren, før du stiger af og på, eller hvis der er risiko for, at du, en anden person eller en genstand kan komme i kontakt med styret.*
- *Når motorene er frakoblet, virker bremsene ikke. Derfor må kørestolen kun skubbes på fladt underlag, aldrig på skråninger. Efterlad aldrig scooteren på eller i nærheden af skråninger med afbrudt forbindelse motorer.*

Der er risiko for personskade, hvis el-scooteren slukkes under kørsel med fx tænd/sluk-knappen eller ved at et kabel rives af, da det stopper med et hårdt ryk.

- *Slip gassen ved opbremsning i nødstilfælde. Derefter kørestolen stopper automatisk.*

Der er risiko for personskade ved fald fra scooteren

- *Bevæg dig ikke fremad, bøj dig frem mellem dine knæ og læn dig ikke ud over kanten af scooteren, for eksempel for at nå genstande.*
- *Bær altid en sikkerhedssele og juster den igen før hver tur.*
- *Når du flytter til et andet sæde, skal du køre så tæt på det nye sæde som muligt.*

Der er risiko for personskade, hvis den maksimalt tilladte belastning overskrides.

- *Overhold den maksimalt tilladte belastning (se kapitlet "Tekniske data" bagerst i dette dokument).*
- *Scooteren må kun bruges af en enkelt person*
- *Brug aldrig scooteren til at transportere mere end én person ad gangen.*

Der er risiko for personskade og beskadigelse af scooteren, hvis

låsekrogen, der løsnes under sammenfoldning, ikke er ordentligt fastspændt, når scooteren bruges.

- *Hvis scooterens låsekrog ikke er klikket på plads korrekt, kan scooteren pludselig falde sammen, når den bruges, hvilket kan få dig til at falde ud af den.*
- *Sørg altid for, at låsekrogen er i den rigtige position, før du bruger scooteren.*

Der er risiko for personskade og klemskader under sammenklappning af scooteren.

- *Fold og udfold altid scooteren som beskrevet i brugsanvisningen*
- *Pas på ikke at klemme nogen eller noget under foldning .*

Der er risiko for personskade og beskadigelse af scooteren, hvis den bruges i fugtige områder.

- *Scooteren må ikke bruges under badning.*
- *Scooteren må ikke bruges under brusebad.*

# Sikkerhed

---

## Kryds togsporet

- Kryds altid jernbanesporet lige forfra, aldrig skråt fra siden.
- Kryds aldrig jernbanespor alene, have altid nogen med dig, der kan hjælpe dig.

## Stejle skråninger

- Vær forsigtig, hvis du kører på en stejl skråning, da scooteren risikerer at vælte. Eloflex er testet og godkendt til at køre på en hældning på maks. 9 grader. Hav altid en med dig, der kan hjælpe dig. Kør altid langsomt på stejle overflader. Undgå overflader, der hælder mere end 9 grader.

## Høje kanter

- Vær forsigtig, når du kører op eller ud for en kant. Eloflex er testet og godkendt til kanter op til max 6 cm. Hav altid en med dig, der kan hjælpe dig.

## Forflytning

- Vi anbefaler, at du altid har nogen, der kan hjælpe dig med forflytninger til og fra din Eloflex. Sluk altid for strømmen, før du starter flytningen. Løft altid armlæn op, for at nemmere komme ind og ud af scooteren.

## Reparation

- Forsøg aldrig at reparere en ødelagt scooter på egen hånd. Hvis du selv skruer eller forsøger at fikse scooteren, gælder garantien ikke. Kontakt altid Eloflex eller den butik eller hjælpemiddelcentral, der har solgt/bevilget stolen. Modificer aldrig din scooter på egen hånd.

## Intet legetøj

- Lad aldrig børn sidde i eller bruge en Eloflex scooter, uden at der er en voksen til stede.

## Pas på varme

- Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde, da batterierne kan blive beskadiget. Vær aldrig i nærheden af åben ild med din Eloflex.
- Du kan bruge din Eloflex fra -10 grader op til +45 grader. Ved minusgrader kan rækkevidden påvirkes.

## Opbevaring

- Opbevar din Eloflex utilgængeligt for børn, når den ikke bruges.
- Scooteren skal opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.

## Opladeren

- Opladeren må aldrig tildækkes, når den bruges til at oplade din Eloflex. Opladeren bliver varm og der er fare for uheld eller skade.

## Batterier

- Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys, og helle rikke et sted, der kan nå minusgrader.
- Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted.

## Rengøring

- Rengør aldrig in Eloflex med rindende vand. Tør det kun af med en fugtig klud.
- Er din Eloflex langsom til at folde op og sammen, kan du med fordel smøre leddene med W-40 eller silikon spray.

# Teknisk data

---

## FAKTA ELOFLEX S1

VÆGT	41 kg inkl. 2 batterier
HASTIGHED	max. 12 km/t
RÆKKEVIDE	30 km
MOTOR	2 x børsteløse højeffekt motor
MOTORKRAFT	2 x 250 watt
BATTERI	2 x Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
BATTERIVÆGT	1,6 kg/stk
LADE TID	3 timer
VENDERADIUS	200 cm
MAKS HÆLDNING	9 grader
HJUL	3 stk 12" luftfyldt
SIDDEHØJDE	55-60 cm
SÆDEBREDDE	45/50/55 cm
SIDDEDYBDE	40 cm
BRUGERVÆGT	Max 120 kg
SÆDE	Kunsthæder
MÅL OPSLÅET	105-120 cm (L) x 63 cm (B) x 91 cm (H)
MÅL SAMMENKL.	105 cm (L) x 63 cm x 55 cm (H)
GARANTI	2 år

Anbefalet lufttryk for baghjul = 2,5 kg.



## **Kontakt Eloflex**

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, bedes du i første omgang kontakte dit hjælpemiddeldepot eller forhandler. Ønsker du direkte kontakt til os, finder du kontaktoplysninger på vores hjemmeside, [www.eloflex.dk](http://www.eloflex.dk). På hjemmesiden er der også en specifik supportside, hvor du finder almindelige spørgsmål og svar. Adressen er [www.eloflex.dk/faq](http://www.eloflex.dk/faq)

## **© Copyright Eloflex**

Dette dokument indeholder ophavsretligt beskyttet information og må ikke helt eller delvist kopieres eller gengives uden skriftlig tilladelse fra Eloflex.

Eloflex forbeholder sig retten til at lave trykfejl i dette dokument og vi forbeholder os retten til at foretage produktændringer.