

Brugervejledning

CAPOVARIO SOFT / CAPOVARIO SOFT+

Læs disse brugsanvisninger omhyggeligt, inden du bruger hovedbeskyttelsehjelm!

CAPOVARIO SOFT og CAPOVARIO SOFT+ hovedbeskyttelseshjelme er designet til at beskytte mod hovedskader under ukontrollerede og usikre bevægelser, der kan føre til et stort potentiale for skade. De to modeller er lavet af bomuldsstof og polstret med et specielt integreret skum. Derudover er der indbygget en folie, som forbedrer sikkerhedshjelmens slagfasthed betydeligt.

Montering og isætning af hovedbeskyttelsehjelm

Velcro pande- og nakkebeskyttelsen gør det muligt at tilpasse hovedbeskyttelsen optimalt til de individuelle behov. Med CAPOVARIO SOFT kan hovedets omkreds justeres med ca. 3 - 4 cm for hver størrelse, toppunktet kan justeres efter omstændighederne. Med CAPOVARIO SOFT+ kan hovedets omkreds justeres med ca. 6-8 cm. Hjelmen kan justeres perfekt med de velcrojusterbare polstringsstrimler. Den lette vægt og gode pasform sikrer optimal bærekraft.

1. Før brug skal du sørge for, at hjelmen er i perfekt stand, og at størrelsen og farven svarer til din ordre.
2. Hvis det er muligt, skal hjelmen justeres og monteres af en specialist første gang.
3. Juster hovedets omkreds ved hjælp af velcro-stropperne, så hjelmen sidder tæt.
4. Juster derefter pasformen til kronen med velcrofastgørelsen eller snøringen.
5. Hvis det er muligt, skal du fastgøre beskyttelse af panden/halsen.
6. Hovedbeskyttelsehjelm er udstyret med en hagerem, der holder hjelmen på plads og beskytter den mod skift.

Sikkerhedsinstruktioner:

7. Hovedbeskyttelsehjelm bør kun bruges af én person.
8. Kontroller hjelmens position og pasform, når du har taget den på.
9. Hav altid hjelmen ved hånden.
10. Afklar med vejlederne, hvornår hjelmen skal bruges.
11. Hjelmen er ikke egnet som beskyttelsehjelm til cykler, knallerter, motorcykler osv.

Pleje og opbevaring

1. Hjelmen kan vaskes i vaskemaskinen ved 40 grader på den blide cyklus (uld).
2. Vask uden centrifugering eller kun ved lav omdrejningshastighed.
3. Luk velcro-fastgørelseselementerne inden vask, da krogbandet kan beskadige hjelmstoffet.
4. Opbevar hjelmen på et tørt sted og undgå høje temperaturer.

Garanti 12 måneder

1. Hvis du mod forventning har grund til at klage, bedes du kontakte os.
2. Krav under vores garanti er underlagt den betingelse, at hjelmen er blevet brugt og plejet korrekt i overensstemmelse med brugsanvisningen.
3. Yderligere krav, uanset retsgrundlaget, navnlig for erstatning for indirekte eller direkte skade, er udelukket.

***Brug kun hovedbeskyttelsehjelm, hvis den er i perfekt stand.
I tilfælde af mangler skal du altid kontakte din leverandør (medicinsk forsyningsbutik)***

