



Bima komfort



Målgruppe, kombinationer og præstationer

Komfortabel og trykfordelende kørestolspude. Til brugere, der er følsomme over for tryk og/eller smerte. I de fleste tilfælde kan brugeren ændre sin stilling/position mens han sidder.

Puden har en afrundet bagkant med udskæringer til rygrørene. Passer til bl.a. kørestolsmodellerne: Cross, Azalea, Bellis og REA.



Sædepuden er et medicinsk udstyr. CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745..

Eudamed registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678

ISO-kode: 181006 Forebyggelse af tryksår. Pudevægt: 1,3g - 44x53cm.

Puden er mærket med en EAN-13 stregkode i henhold til 73 400473 AAAA K

To års garanti gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Puden overholder brandstandarden ISO 7176-16. Udviklet og fremstillet i Sverige af BIMA PLASTTEKNIK AB. Mere info fåes gennem Zibocares kunderservice på 76 900 407



Håndtering



Tjek, at emballagen er komplet og fri for skader.

Fjern plastikposen og bemærk den hvide etiket på undersiden af puden. Denne side skal være nedad, og pilen viser, hvad der er bagved.

Den sorte etiket med gul tekst "BAK" viser, hvad der er bag puden.



Rengøring og pleje

Bima komfort kræver ingen justering eller service. Rengøring for god hygiejne er det eneste, der skal til. Pudebunden rengøres ved aftørring med overfladedesinfektion alt. med vand og sæbeopløsning.

Den kan også damprens. Pudebunden tørres i et varmt, godt ventileret område (tørreskab). Betrækket kan maskinvaskes ved 80°C med lukket lynlås. Derefter centrifugering og tørretumbler eller dryptørring i tørreskab. Sørg for at installere dækslet i henhold til markeringerne.

Sørg for at "stikke ud" alle hjørner, og at betrækket sidder godt på pudens bund.

Puden opbevares på et tørt, gerne stuetempereret område. Undgå at klemme eller folde puden.



Kvalitetssikring

For at sikre, at puden fungerer korrekt og sikkert i dens tilsigtede levetid (5 år). Tjek overfladen, som skal være fri for revner og sætninger. Betrækket skal være intakt. fordybning under sædebenene indikerer, at puden er slidt og bør udskiftes. Levetiden kan variere afhængigt af brug og pleje.



Ekstra/alternativ betræk

For at bestille ekstra betræk skal du indtaste Ö+ varenummeret, for eksempel Ö22-4453. Og for at bestille en inkontinenshætte skal du indtaste INKO+ varenummeret, for eksempel INKO22-4453. For at bestille Bima combi med heldækkende inkontinensbetræk indtastes vare nr. 2, f.eks. 22-4453-2.



Affaldssortering

Pudebund og betræk sorteres som brændbart affald og går til energigenvinding.



Forholdsregler

1. Pudene er beregnet til brug i kørestole.
2. Størrelsen på hynden skal passe til kørestolens sæde.
3. Når pudene ikke er i brug, skal de opbevares på et tørt sted, helst ved stuetemperatur.
4. Undgå at klemme eller bøje pudene under opbevaring.
5. Brug ikke pudene i en autostol, da der er risiko for at glide ved hurtig opbremsning.
6. Pudene opfylder de opstillede brandkrav, men kan blive beskadiget af brand, cigaretgløder eller andre brandkilder.
7. Undgå at udsætte pudene for regn og dug. Skarpe genstande og stærke kemikalier kan også beskadige pudene.
8. Mindre ændringer såsom afrunding af kanter, justering af pudene for benlængdeforskel kan normalt foretages uden at det påvirker egenskaberne negativt. Der skal dog altid laves dokumentation.
9. Via vores afvigelsesrapport i vores ledelsessystem opdages mangler, så der kan træffes passende foranstaltninger. Meld eventuelle uheld og hændelser, der sker i forbindelse med brugen af produkterne, til Bima Plastteknik AB. Alvorlige ulykker og hændelser skal også indberettes til den relevante myndighed via en MIR - formular www.lakemedelsverket.se