

Rollator PANTHER
Art. 318001 & 318002

Montage- und Gebrauchsanleitung
Montage- og brugervejledning
User Manual
Manuale d'uso e manutenzione
Installations- och bruksanvisning



Panther lightweight rollator has a blue aluminium frame
For both indoor and outdoor use
Available in 2 sizes
Standard (62 cm)
Small (55 cm)
Tested for 150 kg

Height adjustable
Push handles.
No tools needed
Integrated tilt
pedal and 2
lockable brakes



Removable bag with
two handles that can also
be used for shopping



The rollator folds easily
sideways Takes up very
little space when folded,
for easy transport



1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt en kvalitetsrollator fra Mobilex. Denne montage- og brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt anvendelse af produktet. Derfor bedes du læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i brug. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

Formålsbeskrivelse

Rollatoren er beregnet til personer, som grundet bevægelsesproblemer har brug for stabil støtte ved gang, men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden risiko for selv at komme til skade eller øve skade på andre. Rollatoren afhjælper nedsat gangfunktion og balanceevne. Takket være sædet og parkeringsbremserne kan brugeren til enhver tid sætte sig for at få en pause. Rollatoren må kun bruges til at komme frem med og til kortvarigt at sidde på.

Indikation

Rollatoren er et medicinsk udstyr, der er beregnet til at hjælpe handicappede personer med at gå. Indikationerne for anvendelse er sygdomme, der forårsager bevægelsesbegrænsninger og handicap, som hindrer selvstændigt at sidde, stå og gå. Der er derfor behov for en ekstra stabil støtte, når de ovennævnte aktiviteter udføres.

Indikationerne kan ikke relateres til et bestemt sygdomsbillede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand af en professionel læge eller fysioterapeut, men de vigtigste målgrupper er ældre mennesker, personer med parese, reumatiske sygdomme og andre personer med begrænset mobilitet i lænderyggen, knæ eller hofter. Det er forbudt at bruge produktet til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Kontraindikation

Rollatorer er ikke beregnet til personer, der ikke kan opretholde en korrekt kropsbalance i siddende og stående stilling. Hjælpe midlet må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med nedsat opfattelsesevne. Kontraindikationer kan ikke relateres til et bestemt klinisk billede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand. Valget af ortopædisk hjælpemiddel, der passer til et givet sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut. Derudover skal du overholde sikkerhedsoplysningerne i kapitel 2.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
--	---

2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Tjek at begge bremsere fungerer inden ibrugtagning.
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag indendørs og udendørs.
- Alle hjul skal være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance og derved undgås evt. uheld.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på, skal parkeringsbremsere aktiveres.
- Begge bremsehåndtag skal aktiveres og blokeres på én gang.
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktionen.
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 150 kg.
- Indkøbstasken er testet til 5 kg.


3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Panther rollatoren har en letvægtsramme af pulverlakeret aluminium og er udstyret med 4 hjul. Aluminiumsrammen gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er meget stabil. Skubbehåndtagene kan nemt og uden brug af værktøj indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken udstyret med et monteret sæde, stokkeholder, rygbælte samt en indkøbstaske.

Leverancen omfatter

- ✓ 1 Panther rollator sammenfoldet inkl. sæde, stokkeholder, rygbælte og indkøbstaske
- ✓ 1 montage - og brugervejledning

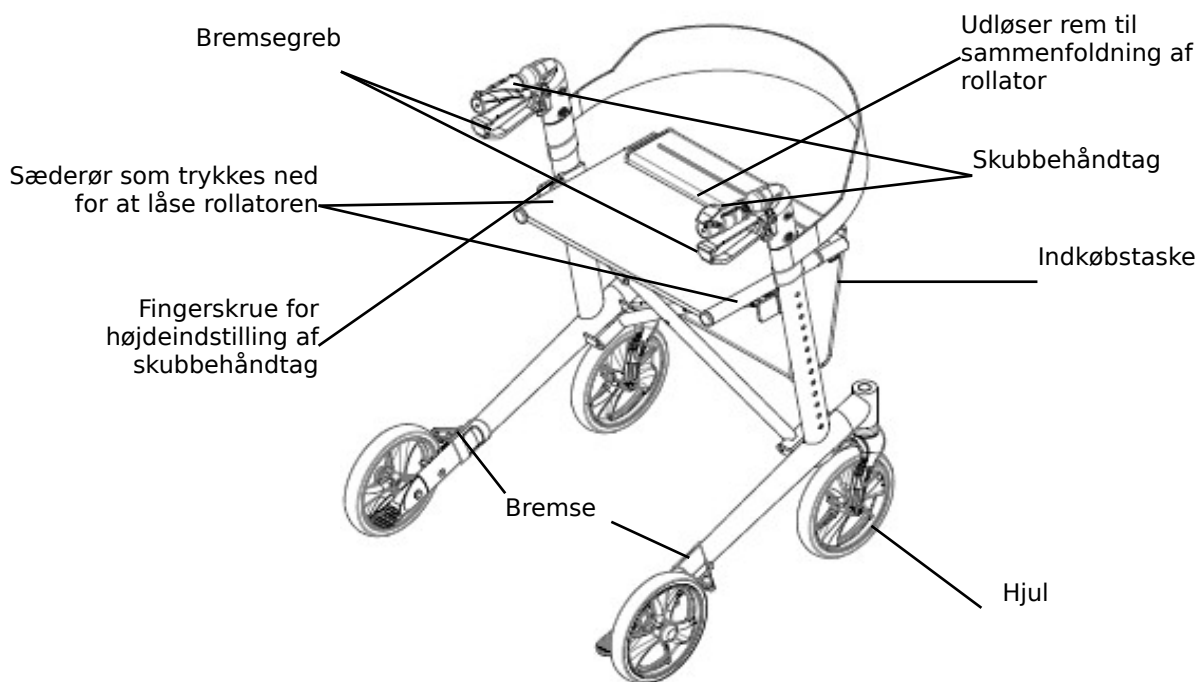

Kontrol

Kontroller ved hjælp af ovenstående at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte forhandleren af produktet.

Klargøring

- Tag rollatoren op af kassen og sæt den med hjulene på gulvet. For at kunne folde rollatoren ud, skal den sorte låse sikring afsikres, ved at vippe den af det ene rør. Tag herefter fat om rørene ved sædet og tryk disse nedad, indtil der høres et let klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod sammenklapning.
- Kontroller inden brug at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, således at ingen dele kan bevæges.
- Kontroller endvidere bremsens funktion, før rollatoren anvendes.



Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan nemt foldes sammen. Den låses herefter med låse sikringen.

Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene trykkes trykknappen ind.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, tjek at trykknappen igen er sprunget ud.



Juster højden på skubbehåndtagene, så håndtagene er i håndledshøjde, når brugeren står ved siden af rollatoren med armene strakt lodret nedad. Det betyder, at armene har en vinkel på 20°- 30°, når rollatoren anvendes.

Brug af håndbremsen

- For at bremse skal begge bremsehåndtag trækkes opad.
- Jo hårdere bremsegrebene aktiveres, jo stærkere er bremsevirkningen.
- For at forblive STOPPET skal bremsegrebene holdes trukket ind for at holde dem i bund.
- For at bevæge rollatoren igen, skal bremsegrebene slippes. De frigives automatisk.



*Aktiver altid parkeringsbremsene, når du ikke bruger rollatoren!
Løsn aldrig parkeringsbremsene, når du sidder på rollatoren!
Hvis du parkerer rollatoren på ujævne overflader, skal parkeringsbremsene altid aktiveres!*

Låse/frigørelse af bremsen

- For at standse rollatoren skal du trække bremsehåndtagene opad for at få den til at standse.
- For at parkere skal du trykke bremsegrebene ned, indtil du hører et "klik".
- Rollatoren må kun bruges til at sidde på, når bremsene er låst.
- Før du kører af sted igen, skal du stille dig i kørselsretningen og frigøre



*Når der parkeres, skal bremsene altid være låst. Brug aldrig sædet, uden at bremsene er låst! Læn dig aldrig bagover, når du sidder.
Det anbefales kun at bruge forsædet og ikke at sidde på tasken eller læne sig bagover.*

Funktionsbeskrivelse

På grund af den foldbare baghjulsramme kan rollatoren foldes sammen for at spare plads. Skubbestængerne (styret) kan justeres til din kropsstørrelse takket være den trinløse højdejustering. Sædet giver dig mulighed for at holde hvilepauser.

Tilbehør

Der findes en bakke som tilbehør til rollatoren. Kontakt din forhandler for yderligere informationer.

Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion og lave vægt gør det muligt på en nem måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke beskadiges.

Anvendelse

Stil dig midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremsene. Bremsene er specialudviklet, således at de nemt kan aktiveres uden håndgrebet skal slippes.

4. Tekniske data

Rollator Panther	Standard 318001	Small 318002
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	78 - 101 cm	71 - 93 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 195 cm	140 - 187 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22 cm	62 / 22 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	43 cm	43 cm
Længde (dybde)	75,5 cm	75,5 cm
Vægt (+ taske 380 g)	6,73 kg	6,25 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 låsbare med parkeringsfunktion	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Typeskilt

Findes på den nederste rammedel



Billede af typeskilt for 318001

	QR-søge link til hjemmesiden		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruger-vejledningen		Max bredde
	Til indendørs/ude-dørs brug		serienr.
	CE mærket produkt		Varenr
	Max belastning kurv		Medicinsk udstyr
	Kun til indendørs brug		

Oversigt ikon betydning

5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende efterses: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbehåndtag og greb
- ✓ Bremsegreb og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremser
- ✓ Sæde og låseanordning
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Tjek om der mangler nogle montage dele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand

Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen.

Opbevaring

Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

Genanvendelse

Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller brækket må rollatoren ikke genanvendes før hele rammen/rollatoren udskiftes.

6. Generel problemløsning

<i>Problembeskrivelse</i>	<i>Mulige årsager</i>	<i>Løsning</i>
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gafflerne	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smørelolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden.	Bremseskoene er slidte eller bremserne er ikke justeret korrekt.	Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bremseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.
Sædet låser ikke i korrekt position.	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt.	Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.