

## Koala shopping trolley


Item no. 319001

**Montage- und Gebrauchsanleitung**  
**Montage- og brugervejledning**  
**User Manual**  
**Manuale d'uso e manutenzione**



Koala shopping trolley made of aluminum and nylon with a practical fabric shopping bag. Available in grey with blue or orange details

The handle can be swiveled and easily converted into a seat.

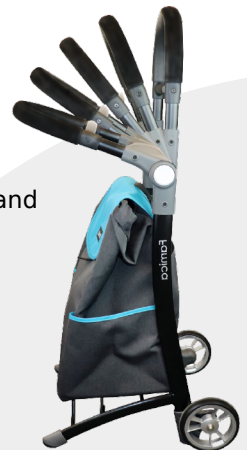

The handle converted into a seat



Product weight: 2.5kg  
Weight capacity bag: 30 kg  
Weight capacity trolley: 110 kg



## 1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex. Denne montage- og brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt anvendelse af produktet. Derfor bedes du læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i brug. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20


Telefax: +45 87 93 17 77

E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 110 kg for sædet og 30 kg for tasken.

## 3. Beskrivelse

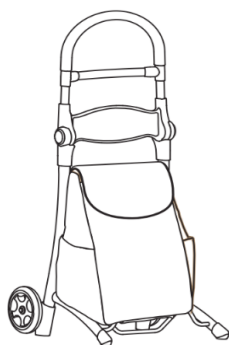

### Produktbeskrivelse

Produkt højde: 960mm

Sæde højde : 650mm

Produkt vægt: 2.5kg

Max vægt i taske : 30 kg

Max vægt sæde : 110 kg

Matriale : Aluminum + Nylon (Trolley), Stof (taske)

Farve: Blå


### Leverancen omfatter

- ✓ 1 Koala Shopping trolley
- ✓ 1 montage - og brugervejledning


### Kontrol

Kontroller ved hjælp af ovenstående at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte forhandleren af produktet.

## Klargøring

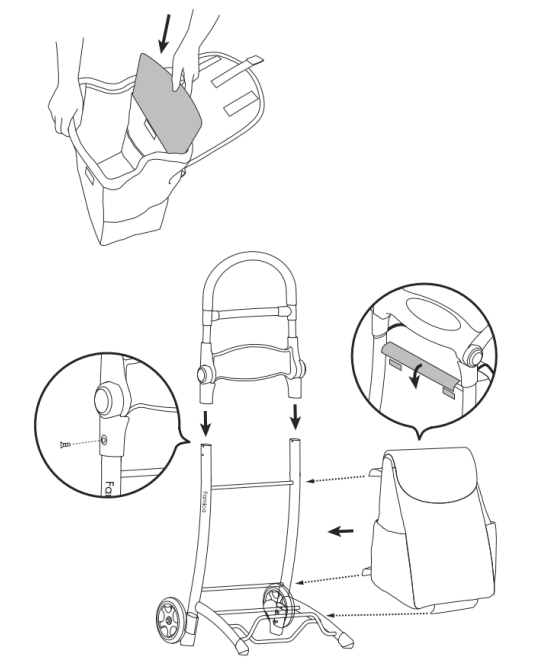


## Anvendelse

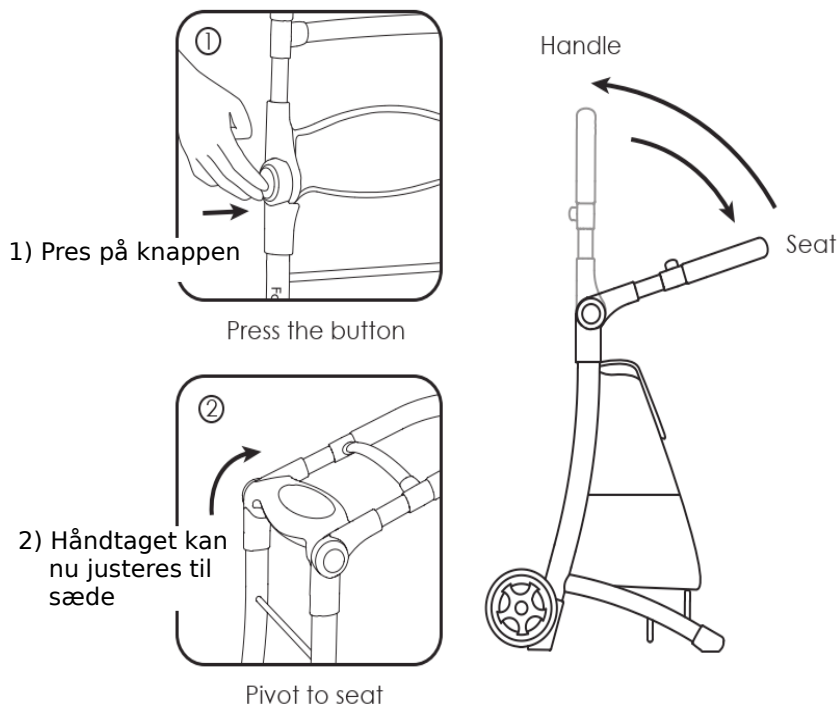

## 4. Sikkerhedsanvisninger

- ✓ Brug ikke trolleyen som sæde på glatte overflader
- ✓ Stå ikke på sædet
- ✓ Stå ikke på håndtaget når den er låst i siddeposition
- ✓ Sikre at alle skruer spændte før trolleyen bruges første gang
- ✓ Når man sætter sig på trolleyen er det vigtigt at man har begge fødder solidt på jorden
- ✓ Max belastning af tasken: 30 kg.

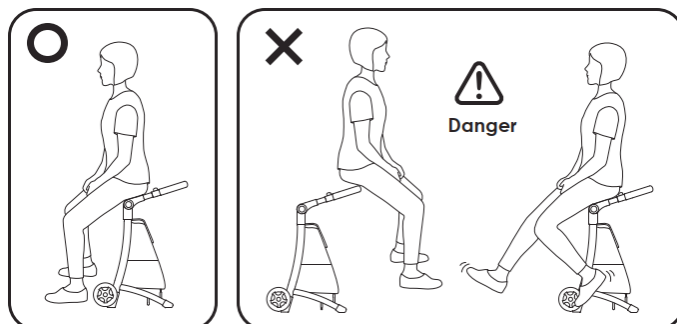

## 5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil trolleyen blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at tjekke den jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende efterses: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- ✓ stellet
- ✓ Skubbe håndtag
- ✓ Baghjul
- ✓ Sæde og låseanordning
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Tjek om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand.

### **Rensning af hjulene**

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

### **6. Bortskaffelse af produktet**

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

### **7. Garanti**

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.