

Indholdsfortegnelse

SmartVision 3 Brugervejledning (10573) - Dansk oversættelse af Instrulog A/S	1
Gennemgå følgende før du begynder at bruge din SmartVision 3	8
Sådan læses denne brugervejledning	8
Kassens indhold	8
Beskrivelse af produktet	9
Fronten af SmartVision 3	9
Toppen af SmartVision 3	9
Højre side af SmartVision 3	9
Bunden af SmartVision 3	9
Venstre side	10
Bagsiden	10
Aktivering af SmartVision 3	10
Introduktion	10
Få SIM bakken ud	10
Opladning af batteriet	11
Opladning ved brug af kabel	11
Trådløs opladning	11
Tænd og Sluk for din SmartVision 3	12
Genstart din SmartVision 3	12
Standby tilstand	12
Hurtige Indstillinger ved opstart	12
Lås op for SIM kort med din PIN kode	12
Kom godt i gang	12
Naviger ved brug af tastaturet	12
Naviger på din SmartVision 3 ved brug af touchskærmen	14
Juster lydstyrken	14
Indskriv med din SmartVision 3	15
Indskriv ved brug af talegenkendelse	16
Slet tekst	16
Redigér tekst	16
Tastaturgenveje	16
Tilgængelighed	18
Introduktion	18
Talkback Tilgængelighed	18
KAPSYS Tilgængelighed	19

Notifikationspanel	19
Introduktion	19
Tjek en notifikation	20
Fjern en notifikation	20
Håndter notifikationer	20
Hurtige Indstillinger	20
Introduktion	20
Seneste applikationer	20
Introduktion	20
Åben en senest benyttet applikation	20
Stop en af de seneste applikationer	20
Hjemmeskærm	21
Introduktion	21
Tilføj en applikation til Hjemmeskærm	21
Fjern en applikation fra Hjemmeskærm	21
Flyt en applikation i Hjemmeskærm	21
Hurtig Start.....	21
Applikationer.....	22
Introduktion	22
Åben en applikation	22
Find an applikation.....	22
Download en applikation.....	22
Slet en applikation	22
Indstil Tilladelser for applikation.....	22
Planlægning	22
Introduktion	22
Tilføj en begivenhed	23
Stop en påmindelse	23
Rediger en begivenhed.....	24
Fjern en begivenhed	24
Fjern samtlige begivenheder.....	24
Søg efter en begivenhed.....	24
Google Assistent	24
Genkend Pengesedler.....	25
Introduktion	25
Opdatering af data	25
Identificer en pengeseddel.....	25
BogLæser.....	25
Introduktion	25

Overfør et dokument	25
Hovedskærm	25
Læs et dokument	26
Slet et dokument	26
Tilføj et dokument til listen over favoritter	26
Fjern et dokument fra listen over favoritter	27
Optag en DAISY bog	27
Tilføj en optagelse til en allerede eksisterende lydbog	27
Lommeregner	27
Introduktion	27
Gennemfør en udregning	27
Kalender	27
Introduktion	27
Kamera	27
Introduktion	28
Tag et billede	28
Optag en video	28
Chrome	28
Introduktion	28
Ur	28
Introduktion	28
Tilføj en alarm	28
Stop en alarm	28
Rediger en alarm	28
Aktiver / Deaktiver en alarm	29
Slet en alarm	29
Farvetester	29
Introduktion	29
Annoncer farver	29
Find en farve	29
Kontaktpersoner	29
Introduktion	29
Importer dine kontaktpersoner	29
Opret kontaktperson	30
Rediger en kontaktperson	30
Slet en kontaktperson	30
Slet alle kontaktpersoner	30
Find en kontaktperson	30
Tilføj Kontaktperson som Favorit	30

Ring til en kontaktperson	30
Send en besked til en kontaktperson	30
Del en kontaktperson	31
Eksporter dine kontaktpersoner	31
Drev	31
Introduktion	31
Meet	31
Introduktion	31
Filer	31
Introduktion	31
FM Radio	31
Introduktion	31
Lyt til radio	31
Gmail	32
Introduktion	32
Konfiguration af din konto	32
Læs en e-mail	32
Åben en vedhæftet fil	32
Skriv en e-mail	32
Besvar en e-mail	32
Slet en e-mail	32
Google	33
Introduktion	33
Google TV	33
Introduktion	33
KAPTEN GPS	33
Introduktion	33
Ansvarsfraskrivelse	33
Download af kort	33
Navigations Tilstande	34
Fodgænger og bil navigation	34
Under navigation	35
Direkte navigation	35
Udforskning af kort	36
Fodgænger ruteoptagelse	36
K-Tags	37
Fri navigation	38
Flere indstillinger	38
Lysdetektering	40

Introduktion	40
Detekter lysniveau	40
Lookout.....	40
Introduktion	40
Forstørrelse	40
Introduktion	40
Forstør tekst.....	40
Maps	40
Introduktion	40
Beskeder	40
Introduktion	40
Send en ny besked	41
Læs og besvar en besked.....	41
Videresend en besked	41
Slet en besked fra en samtale	41
Slet en samtale	41
NFC	41
Introduktion	41
Skriv til et NFC tag.....	41
Læs et NFC tag	42
Noter	42
Introduktion	42
Opret en note.....	42
Læs en note.....	42
Rediger en note	43
Slet en note.....	43
Slet alle noter.....	43
Søg efter en note	43
Fotos	43
Introduktion	43
Play Butik	43
Introduktion	43
QuickSupport.....	43
SOS.....	44
Introduktion	44
Aktivering / Deaktivering af SOS Funktionen	44
Indstilling af SOS Funktionen.....	44
Indstillinger	45
Introduktion	45

Beskrivelse af kategorierne.....	45
Forbind til et Wi-Fi Netværk	45
Forbind til en Bluetooth enhed	46
Aktivering af fingeraftryk	46
Opdatering af systemet.....	46
Lydoptager	47
Introduktion	47
Optag en lyd	47
Afspil en optagelse	47
Omdøb en optagelse	47
Slet en optagelse	47
Telefon	47
Introduktion	47
Besvar et opkald	47
Afslut et opkald	48
Afvis et opkald	48
Foretag et opkald.....	48
Funktioner ved igangværende opkald.....	49
Brugervejledning	49
Introduktion	49
Gennemgå brugervejledningen.....	49
Internet Radio.....	49
Introduktion	49
Lyt til en radiostation	49
Youtube	50
YouTube Music	50
Tekniske specifikationer	50
FAQ.....	51
Skal jeg betale for software opdateringer?.....	51
Hvornår og hvordan ved jeg om en opdatering er tilgængelig?	51
Jeg kan ikke downloade opdateringen - Hvad gør jeg?	51
Hvordan skaffer jeg adgang til KAPTEN GPS samt BogLæser applikationen på min SmartVision 3?	51
Min SmartVision 3 går i standby tilstand (skærm slået fra) alt for hurtigt - Kan jeg ændre på intervallet for hvornår den skal gøre det?.....	51
Hvordan får jeg information omkring batteristatus, trådløst netværk, dato og klokkeslæt og også modtaget beskeder?	51
Jeg kan ikke indskrive tekst med tastaturet - Hvad gør jeg?.....	51
Kan jeg deaktivere touchskærmen fuldstændigt?	52

Hvordan forøger jeg størrelsen på informationen som jeg får på den visuelle skærm?	52
Fungerer Stemmekommando uden en internet forbindelse?	52
Hvordan kan jeg overføre filer (musik, tekst...) til min SmartVision 3 fra min computer?	52
Er det muligt at øge hukommelsen på min SmartVision 3?	52
Kan jeg forbinde Bluetooth hovedtelefoner til min SmartVision 3?	52
I tilfælde af problemer.....	52
Introduktion	52
Min SmartVision 3 vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:.....	53
Min SmartVision 3 slukker af sig selv:.....	53
Min SmartVision 3 bliver varm under opladning:.....	53
Min SmartVision 3 bliver varm under brug:	53
Batterilevetiden i min SmartVision 3 er ret kort:	53
Min SmartVision 3 vil ikke oplade korrekt:	53
Min SmartVision 3 vil ikke forbinde til et netværk:.....	54
SIM kort fejl / Ingen telefon funktioner kan benyttes:	54
Jeg kan ikke foretage eller modtage opkald:.....	54
Kan ikke få kontakt til min voicemail:	54
SmartVision 3 beder mig om at angive en kode når jeg tænder for den:	54
Jeg har ændret på Talkback indstillinger og nu reagerer min SmartVision 3 anderledes:	54
Min SmartVision 3 fungerer ikke længere ordentligt, hvordan gendanner jeg den?.....	55
Juridisk information og reklamation	55
Forholdsregler og Anbefalinger.....	55
Sikkerhed og Sundhed.....	56
Warranty (ENGELSK)	56
About specific energy absorption rate (ENGELSK)	57
Restrictions in 5GHz band (ENGELSK).....	57
Kundeservice	57
Trademarks (ENGELSK)	57

Gennemgå følgende før du begynder at bruge din SmartVision 3

- Gennemgå venligst omhyggeligt denne brugervejledning manual således at du kan bruge din SmartVision 3 korrekt og sikkert.
- Samtlige beskrivelser givet i dette dokument er baseret på standard indstillingerne i din enhed.
- Alt efter din placering, netværksudbyder og software kan indhold differentiere fra din enhed.
- Høj kvalitets indhold der kræver intensiv brug af hukommelsen og hardwaren kan påvirke det samlede resultat af din enhed. Applikationer der relaterer til sådant indhold vil muligvis ikke fungerer korrekt alt efter din enheds egenskaber og betingelserne for brugen.
- KAPSYS, producenten, samt distributører og leverandører af produktet kan ikke holdes ansvarlige for problemer og mangler relateret til tredjepartsapplikationer udgivet af tredjepart.
- En forbindelse til et Wi-Fi netværk eller mobilnetværk kan være nødvendigt for at kunne benytte bestemte applikationer eller funktioner.
- Data tjenester såsom at sende og modtage beskeder, download og upload af data, automatisk synkronisering og brug af lokalitetstjenester kan resultere i ekstra omkostninger, afhængigt af din tjenesteudbyder og dit abonnement. Ved overførsel af større mængder data anbefaler vi at gøre brug af Wi-Fi.
- Applikationer der leveres sammen med dit produkt kan ændres eller fjernes uden varsel.
- Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler herved - ej heller for skade der sker tilfældigt eller som følge af brugen af dette dokument.
- KAPSYS stræber efter konstant at forbedre kvalitet og funktionalitet for din enhed. KAPSYS opfordrer derfor til regelmæssigt at besøge hjemmesiden (www.kapsys.com) for at hente de seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne.
- SmartVision 3 lever op til CE reglementet for både husholdnings- og kommerciel brug.

Sådan læses denne brugervejledning

Denne brugervejledning vil gennemgå og beskrive hovedfunktionerne i din SmartVision 3 - brugervejledningen vil udelukkende omhandle SmartVision 3 Plus udgaven (udgaven som giver adgang til alle applikationerne samt al tilbehør). Beskrivelsen af funktionerne er generiske og tager ikke hensyn til de særlige relationer til avancerede handicapvenlige faciliteter. Denne vejledning vil altså udelukkende fokusere på funktionaliteterne udviklet af KAPSYS. Standard Android og Google Indstillinger samt applikationer vil kun kort blive berørt og beskrevet, hvorefter det vil være op til den enkelte bruger at gennemgå brugervejledninger for disse tredjepartsapplikationer og indstillinger, såfremt yderligere information er nødvendig.

Kassens indhold

Med SmartVision 3 Plus følger dette:

- En 220 / 110 Volts til 5 Volts USB Strømforsyning
- Et USB C kabel
- Et sæt stereo hovedtelefoner med en mikrofon
- Fem NFC tags
- Et redskab til SIM porten
- En trådløs oplader (induktiv opladning)
- Et beskyttelses etui
- Skærmbeskyttelse
- En Halsrem
- En mikrofiberklud som kan bruges til at rengøre skærmen

- En Hurtig Start Guide

Listen over tilbehør kan variere afhængigt af dit land, konfigurationen af enheden og model version.

Designet og specifikationerne i produktet og tilbehør kan ændres uden varsel.

Benyt kun tilbehør godkendt af KAPSYS. Brugen af tilbehør der ikke er godkendt til brug med produktet kan forårsage nedsat ydeevne samt / eller funktionsfejl som ikke dækkes af reklamation.

Beskrivelse af produktet

Fronten af SmartVision 3

Fronten af din SmartVision 3 er opdelt i to særskilte områder.

Den store 3,5 tommer touchskærm finder du i det øverst område af telefonen. I skærbilledet vil det visuelle indhold blive præsenteret og du kan interagere med det via touch. Oven over touchskærmen befinder ørehøjtaleren sig, samt et 5 millioner pixelkamera til eksempelvis videoopkald.

Neden under touchskærmen befinder sig et fysisk tastatur som er opdelt i to sektioner.

Den første del, tættet på midten, indeholder navigationstasterne. Det er nemt at lokalisere takket være joysticket som har form som en afrundet firkant. I hver side af joysticket finder du fire forhøjede knapper som gør det muligt for dig at udføre navigationshandlinger. I dette dokument vil vi referere til disse ved brug af termene: "**Op**", "**Ned**", "**Venstre**" samt "**Højre**" som derved vil betyde at du skal benytte pågældende navigations knap. Knappen i midten af disse navigations knapper kaldes for OK knappen og vil derved aktivere / vælge det pågældende element du er placeret på. Du bemærker måske at OK knappen er rug og derved potentielt nemmere at genkende.

Til venstre for joysticket finder du "**Hjem**" samt "**Menu**" knapperne, henholdsvis oppe og nede.

Til højre for joysticket finder du "**Tilbage**" samt "**Slet**" knapperne, også henholdsvis oppe og nede.

Den anden del af det fysiske tastatur består af et alfanumerisk tastatur med i alt 12 knapper (4 linjer med 3 knapper).

- Første linje - Tasterne 1, 2 og 3
- Anden linje - Tasterne 4, 5 og 6
- Tredje linje - Tasterne 7, 8 og 9
- Fjerde linje: Stjerne, 0 samt Firkant (Bemærk venligst at talesyntesen siger "Pund")

For at hjælpe med lokaliseringen og til hurtigt at finde frem til den ønskede knap har knap 5 en ergonomisk taktil prik.

Du kan få en detaljeret beskrivelse af funktionerne på de tilhørende knapper i afsnittet "Kom godt i gang".

Toppen af SmartVision 3

På toppen af din SmartVision 3 i venstre side finder du en 3,5 JACK Hovedtelefon port til tilslutning af hovedtelefoner. Til højre for porten, og i højre side, finder du Tænd / Sluk knappen som du benytter til at tænde og slukke for telefonen, samt aktivere standby tilstand.

Højre side af SmartVision 3

Start øverst i højre side og den første knap du lander på ned langs siden er Talekommando knappen. Den er rillet og derved måske nemmere at genkende. Lige neden under finder du Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned som begge justerer på lydstyrken.

Bunden af SmartVision 3

I venstre side, nede i bunden, finder du USB C porten som benyttes til opladning af din SmartVision 3 samt også tilslutning til en computer. Lige i centrum befinder mikrofonen sig, som benyttes ved opkald og til kommandoer. Til højre for mikrofonen finder du et rillet området hvor højtaleren befinder sig.

Venstre side

I den øverste del af venstre side befinder SIM porten sig, skjult som en del af selve kabinettet, hvor der skal benyttes et redskab for at få SIM porten ud.

Bagsiden

Øverst oppe i venstre side, tæt på kanten, befinder sig to kameraet på henholdsvis 16 og 2 millioner pixels.

I centrum, lidt længere nede, befinder sig en fingeraftrykssensor som kan benyttes til at låse din SmartVision 3 op og gennemføre betalinger.

Aktivering af SmartVision 3

Introduktion

SmartVision 3 er udstyret med dual SIM og SD kort læser. Du har mulighed for at indsætte to SIM kort eller et SIM kort og et SD kort. Du kan ikke have både to NANO SIM kort samt også et micro SD hukommelseskort installeret på samme tid. SmartVision 3 understøtter udelukkende SIM kort i NANO SIM formatet. Et modificeret SIM kort som er tykkere end et standard NANO SIM kort vil ikke passe ordentligt til bakken og kan beskadige SIM forbindelsen. Et micro SD hukommelseskort er tilbehør og følger ikke med ved køb af SmartVision 3. SmartVision 3 understøtter SD kort med en hukommelse på op til 128 GB. Det kan være en god idé at få assistance fra en seende person til indsættelse af SIM kort og eventuelt SD kort.

Få SIM bakken ud

Placer din SmartVision 3 telefon på en plan overflade foran dig med skærmen opad. Indsæt nu spidsen af SIM port redskabet som medfølger ind i hullet ved siden af SIM bakken, som du finder på venstre side. Vær sikker på at du holder redskabet vinkelret i forhold til hullet til bakken. Vær forsigtig, du kan beskadige enheden hvis ikke redskabet er vinkelret. Når du indsætter SIM port redskabet skal du sørge for ikke at holde for eller dække selve SIM porten, som er placeret lige til højre for hullet, for derved at undgå at beskadige fjedermekanismen. Skub roligt redskabet ind i hullet indtil du registrerer at SIM bakken skubbes ud, og du kan nu trække bakken helt ud med dine fingre.

SIM bakken består af to beholdere. I den første beholder kan du indsætte et SIM kort eller et SD kort. I den anden beholder kan der kun indsættes et SIM kort.

- **Indsæt et enkelt SIM kort:** Placer dit SD kort i den første beholder, som er længst ude mod kanten af din SmartVision 3, når bakken er installeret, med metalsiden nedad og det afskårne hjørne vender ind mod siden af din telefon. Herefter kan du forsigtigt indsætte SIM kort bakken ind i din SmartVision 3 igen. Når du indsætter SIM bakken skal du være sikker på at du holder bakken horisontalt således at dine SIM kort ikke falder ud. Bakken skal kunne skubbes forsigtigt helt ind i din SmartVision 3 telefon og ikke stikke en smule ud eller falde ud. Såfremt kortet ikke er korrekt placeret i sin bakke kan det resultere i at SIM kortet skubbes ud igen, bøjes eller falder væk.
- **Indsæt to SIM kort:** Placer det SIM kort du ønsker skal være SIM 1 i den første beholder, metal siden nedad og det afskårne hjørne skal vende ned mod bunden af telefonen. Udfør samme handling på samme måde for det SIM kort du ønsker skal være SIM 2. Herefter kan du forsigtigt indsætte SIM kort bakken ind i din SmartVision 3 igen. Når du indsætter SIM bakken skal du være sikker på at du holder bakken horisontalt således at dine SIM kort ikke falder ud. Bakken skal kunne skubbes forsigtigt helt ind i din SmartVision 3 telefon og ikke stikke en smule ud eller falde ud.

Godt at vide: Det er ikke afgørende hvilket SIM kort du benytter som SIM 1 og som SIM 2. Du kan senere hen konfigurere dine SIM kort som du ønsker det via din SmartVision 3's "Indstillinger" i sektionen "Netværk og Internet".

- **Monter SIM kort og et SD kort:** Placer dit SD kort i den første beholder, som er længst ude mod kanten af din SmartVision 3, når bakken er installeret, med metalsiden nedad og det afskårne hjørne vender ind mod siden af din telefon. Herefter kan du montere dit SIM kort i den anden beholder i bakken, metal siden nedad igen og det afskårne hjørne ned mod bunden af din telefon. Herefter kan du forsigtigt indsætte SIM kortet i din SmartVision 3 igen. Når du indsætter SIM kortet skal du være sikker på at du holder bakken horisontalt således at hverken SD kortet eller SIM kortet falder ud. Bakken skal kunne skubbes forsigtigt helt ind i din SmartVision 3 telefon og ikke stikke en smule ud.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet i din SmartVision 3 før du begynder at bruge den for første gang, samt også når du ikke har benyttet den i længere tid. Benyt altid kun en kompatibel strømforsyning og kabel til din enhed. Gør du brug af en inkompatibel strømforsyning og kabel kan beskadige din SmartVision 3.

- Forkert tilslutning til adapteren kan resultere i skader på og i enheden. Skader der er opstået som et resultat af forkert brug er ikke dækket af reklamation.
- Benyt kun det USB C kabel som var vedlagt sammen med din enhed. Du risikerer at beskadige enheden hvis du benytter et micro USB kabel.
- For at spare på energi anbefaler vi at fjerne strømforsyningen fra din enhed og dit vægstik når det ikke skal benyttes. Da der ikke befinder sig en Tænd / Sluk knap på din adapter er du nødt til at fjerne den fra dit vægstik for at afbryde forbruget. Din enhed skal befinde sig tæt på strømforsyningen

Godt at vide: Autonomien for din SmartVision 3 defineres af hvordan du gør brug af den. Jo mere du benytter den jo hurtigere vil batteriet løbe tør for energi. Du kan optimere dit batteriforbrug ved at justere på bestemte indstillinger såsom skærmens lysstyrke, tidsperiode før standby, aktivering af batterisparefunktionen, lukke applikationer som unødvendigt kører i baggrunden samt også eksempelvis deaktivering af Bluetooth og Wi-Fi, såfremt du ikke benytter det.

Opladning ved brug af kabel

Du kan oplade batteriet ved at tilslutte USB C kablet til din SmartVision 3 USB port og til strømforsyningen. Indsæt selve strømforsyningen til et strømstik. Når opladningen af batteriet er færdigt skal du afbryde forbindelsen mellem strømstik og SmartVision 3.

Trådløs opladning

SmartVision 3 kan lades op ved brug af trådløs teknologi. Du kan derved oplade batteriet ved at benytte den medfølgende opladningsplade (Plus udgaven). Tilslut USB C kablet mellem din USB strømforsyning og den trådløse oplader og indsæt strømforsyningen i et strømstik. Placer nu bagsiden af din SmartVision 3 i centrum af den trådløse opladningsplade. Når opladningen af batteriet er udført kan du blot tage din SmartVision 3 op - du bør slukke for strømmen, eller tage USB strømforsyningen ud af strømstikket.

Forholdsregler ved trådløs opladning:

Hvis ikke nedenstående forholdsregler overholdes kan det resultere i at enheden ikke oplader korrekt eller bliver varmere, og i sidste ende beskadige enheden og / eller det komponenter.

- Placer aldrig din enhed på den trådløse opladningsplade såfremt et betalingskort eller et Radio Frequency Identification Card (RFID kort), såsom Rejsekortet eller lignende, sidder ved også.
- Placer aldrig din enhed på den trådløse opladningsplade når ledende materialer, såsom metalobjekter, magneter og lignende, er placeret mellem enheden og din opladningsplade.

Anbefalinger og forholdsregler ved opladning af batteri:

- Hvis batteriet er helt tomt for energi vil du ikke være i stand til at tænde for din enhed, selv hvis du allerede har tilsluttet en strømforsyning. Oplad batteriet i mindst en time før du tænder for den.
- Hvis du benytter flere applikationer samtidigt, applikationer der benytter netværk eller applikationer der har en aktiv forbindelse til andre elektroniske enheder, så vil batteriet hurtigere løbe tør. For at undgå at din SmartVision 3 går ud mens data overføres anbefales det at benytte disse applikationer når batteriet er fuldt ladet op.
- Gør du brug af en anden strømkilde end strømforsyningen, eksempelvis en computer, vil ladehastigheden være reduceret.
- Du kan benytte enheden under opladning, dog vil ladetiden blive forlænget.
- Du kan opleve af din enhed samt strømforsyningen blive varme under opladning. Når du gør brug af den trådløse opladningsmulighed eller hurtig opladnings funktionen vil din enhed føles varm når du berører den. Dette har ingen betydning for enhedens tilstand eller dens ydeevne, og det er helt forventeligt. Hvis batteriets temperatur bliver for varm kan det resultere i nedsat opladningshastighed eller opladningen kan afbrydes.

Tænd og Sluk for din SmartVision 3

For at tænde for din SmartVision 3 skal du trykke og holde på Tænd / Sluk knappen som du finder øverst oppe på kanten. Så snart din SmartVision Såfremt den ikke starter op skal du tjekke om batteriet er monteret korrekt. Skal du slukke for din SmartVision 3 skal du først sørge for at den er aktiveret ved at trykke hurtigt på Tænd / Sluk knappen, efterfølgende skal du trykke og holde på Tænd / Sluk knappen. Naviger nu til elementet "Afbryderknop" ved brug af PIL NED, benyt OK tasten og vælg elementet "Sluk".

Genstart din SmartVision 3

Ønsker du at genstarte din enhed skal du sørge for at den er aktiveret og efterfølgende trykke og holde på Tænd / Sluk knappen. Naviger nu til elementet Afbryderknop, tryk på OK knappen og vælg elementet "Genstart". Skulle det ske at din enhed fryser eller ikke responderer på dine handlinger, tryk og hold da på Tænd / Sluk knappen i mindst ti sekunder for at tvinge en genstart igennem.

Standby tilstand

Når din SmartVision 3 er tændt kan du trykke på Tænd / Sluk knappen en gang hurtigt for at sætte den i standby tilstand. I standby tilstand vil din skærm være slået fra og tastaturet vil være deaktiveret, mens alle andre funktioner stadig er aktive. Du kan altså stadig modtage opkald, beskeder, e-mails og så videre.

Godt at vide: Som standard vil din enhed gå i standby tilstand automatisk efter et minuts inaktivitet for derved at spare på batteriet.

Hurtige Indstillinger ved opstart

Når du tænder for din SmartVision 3 for første gang, eller efter udførelsen af en gendannelse, skal du følge vejledningen som du præsenteres for, for at indstille den.

Lås op for SIM kort med din PIN kode

Dit SIM kort leveres til dig direkte fra din udbyder med en identifikationskode der består af fire cifre som kaldes for en PIN kode. Denne kode er beregnet til at beskytte dit SIM kort og dit abonnement mod misbrug. For at låse op for dit SIM kort og tilgå alle funktioner i din SmartVision 3 skal du angive PIN koden via tastaturet efterfulgt af OK.

Kom godt i gang

Naviger ved brug af tastaturet

Tastatur Metoden er den primære måde at benytte sin SmartVision 3 på. Metoden gør dig i stand til at navigere og starte bestemte funktioner og understøtter en kombination af både hurtige tryk på de enkelte knapper og trykke og holde på de enkelte knapper. For at blive bekendt med placeringen af tasterne kan det anbefales at gennemgå afsnittet "Produktbeskrivelse". Herunder finder du en liste over de forskellige handlinger du kan udføre ved brug af det fysiske tastatur:

Navigation :

- Et **hurtigt** tryk på **Op** tasten navigerer til det forrige element i skærbilledet.
- Et **hurtigt** tryk på **Ned** tasten navigerer til det næste element i skærbilledet.
- Et **hurtigt** tryk på **OK** tasten benyttes til at bekræfte et aktuelt valg - det aktiverer det pågældende element som du har fokus på. Aktivering / valg af et element vil generelt præsentere dig for et nyt skærbillede eller bekræfte din handling.
- Tryk og **hold** på **Op** tasten springer til det første element i skærbilledet.
- Tryk og **hold** på **Ned** tasten springer til det sidste element i skærbilledet.
- Tryk og **hold** på **OK** tasten åbner op for kontekst menuen for det aktuelle element. Dette vil normalt præsentere dig for yderligere muligheder som relaterer sig til det valgte element (Eksempelvis Rediger, Slet, Fremad, Flyt, Del og lignende).

Talkback Tilgængeligheds Tjenesten, installeret på din SmartVision 3 som standard, understøtter også en konfigurationsmulig navigationstilstand kaldet "Læsestyring". Denne Læsestyring funktion giver dig mulighed for at konfigurere din navigation når du benytter Op og Ned tasterne. Helt konkret betyder det at du kan navigere ved: Tegn, Ord, Linjer, Afsnit, Titler, Links, Vinduer og meget mere:

- Et **hurtigt** tryk på **Venstre** tasten lader dig navigere til det forrige element der relaterer sig til det aktuelt valgte læsestyringsniveau.
- Et **hurtigt** tryk på **Højre** tasten lader dig navigere til det næste element der relaterer sig til det aktuelt valgte læsestyringsniveau.
- Tryk og **hold** på **Venstre** tasten aktiverer det forrige mulige læseniveau.
- Tryk og **hold** på **Højre** tasten aktiverer det næste mulige læseniveau.

Godt at vide: Du kan konfigurere listen over dine tilgængelige læsestyringsniveauer som er til rådighed under Talkback Tilgængeligheds Indstillinger, under "Tilpas menuer" efterfulgt af "Tilpas læsestyring". Som standard er det kun "Tegn" samt "Ord" niveauerne der er til rådighed under tryk og hold Venstre eller Højre.

Funktioner:

- Et **hurtigt** tryk på **Hjem** tasten, som er placeret øverst til venstre, vil springe direkte til din Hjemmeskærm.
- Et **hurtigt** tryk på **Menu** tasten, placeret neden under Hjem tasten, giver dig adgang til flere forskellige muligheder for det pågældende skærbilledet. Vær gerne opmærksom på at du kan have skærbilleder som ikke har en tilknyttet menu, og i så fald vil et hurtigt tryk på Menu tasten ikke resultere i noget.
- Et **hurtigt** tryk på **Tilbage** tasten, som er placeret øverst til højre, springer til det forrige skærbillede, eller lukker et virtuelt tastatur (gennemgå gerne afsnittet omkring indskrivning ved brug af det fysiske tastatur).
- Et **hurtigt** tryk på **Slet** tasten, som er placeret nedenunder Tilbage tasten, kan du benytte til at slette et tegn som er indskrevet i et redigeringsfelt.
- Tryk og **hold** på **Hjem** tasten præsenterer dig for alle dine seneste applikationer (gennemgå venligst "Seneste applikationer" afsnittet for yderligere information).

- Tryk og **hold** på **Menu** tasten åbner op for Talkback Tilgængeligheds Menuen (afsnittet Talkback Tilgængelighed indeholder mere information).
- Tryk og **hold** på **Tilbage** tasten åbner op for Notifikationspanelet (gennemgå afsnittet "Notifikationspanel")
- Tryk og **hold** på **Slet** tasten, som er placeret nedenunder Tilbage tasten, vil slette alle tegnene indskrevet i et redigeringsfelt.

Naviger på din SmartVision 3 ved brug af touchskærmen

Touch funktionen er en sekundær måde at håndtere din SmartVision 3 på. Det gør det muligt for dig at navigere gennem de forskellige menuer ved hjælp af din fingerspids.

Med Talkback Tilgængeligheds Tjenesten aktiveret som standard i din SmartVision 3 er den normale touchhåndtering modificeret, og giver derved en mere optimal fremgangsmåde for mennesker med nedsat syn.

Nedenfor finder du de mest relevante handlinger som du kan udføre direkte på touchskærmen når Talkback Tilgængeligheds Tjenesten er aktiveret:

Funktion	Bevægelsesmetode
Udforsk aktuelle skærbilleder og find et element	Berør skærmen med en af dine fingre
Naviger til forrige element	Svirp med en fingre over skærmen til venstre
Naviger til næste element	Svirp med en fingre over skærmen til højre
Spring til det første element i skærbilledet	Svirp med en fingre over skærmen først fra højre til venstre og tilbage til højre
Spring til det sidste element i skærbilledet	Svirp med en fingre over skærmen først fra venstre til højre og tilbage til venstre
Aktiver / Bekræft et valgt element	Berør skærmen to gange hurtigt
Åben en kontekst menu liste	Berør skærmen to gange hurtigt og behold din finger på skærmen
Spring direkte til Hjemmeskærmen	Glid din finger opad og til venstre på skærmen
Gennemse kørende baggrundsapplikationer	Glid din finger fra højre til venstre og så opad
Spring til forrige skærbillede	Glid din finger nedad og til venstre på skærmen
Åben Notifikationspanelet	Glid to fingre fra toppen og ned
Åben Talkback Tilgængeligheds Menuen	Glid din finger nedad og til højre
Rul i skærbilledet	Berør skærbilledet med to fingre og glid dem op eller ned

Den komplette liste over handlinger som du kan udføre ved brug af touchskærmen er tilgængelig under Talkback Tilgængeligheds Indstillingerne i "Tilpas bevægelser" elementet.

Juster lydstyrken

De to lydstyrke knapper som du finder ude på højre kant af din SmartVision 3 giver dig adgang til nemt og hurtigt at justere på lydstyrken for de forskellige lydprofiler. Der er i alt fem forskellige lydprofiler: Lydstyrken på multimedie indhold (musik, videoer og lignende), lydstyrken af et opkald, lydstyrken på ringetoner og notifikationer, lydstyrken på alarm samt lydstyrken på talesyntesen.

Med Lydstyrke Op knappen vil du øge lydstyrken for den aktuelle lydprofil.

Med Lydstyrke Ned knappen vil du mindske lydstyrken for den aktuelle lydprofil.

Siden Talkback Tilgængeligheds Tjenesten er aktiveret som standard vil justeringen ved brug af lydstyrke knapperne oftest relaterer sig til talesyntesen.

Du kan også justere på dine lydprofiler gennem din SmartVision 3 Indstillinger under elementet Lyd. I Indstillingerne skal du navigere til den såkaldte skyder for den profil som du ønsker at justere på, og benytter Venstre og Højre for at justere lydstyrken henholdsvis op eller ned. Bemærk venligst at når Talkback benyttes og er aktiveret, vil justering af skyderne fungerer omvendt! Et hurtigt tryk på Venstre tast øger altså lydstyrken / værdien, mens et hurtigt tryk på Højre tast mindsker lydstyrken.

Indskriv med din SmartVision 3

Når din SmartVision 3 annoncerer "Redigeringsfelt" betyder det at du nu befinder dig i et felt hvori du kan indskrive tekst ved brug af det fysiske tastatur, eller ved brug af det virtuelle tastatur som præsenteres i skærbilledet. Du kan med det samme begynde at indskrive tekst. Når du har indskrevet det eller de ønskede ord kan du trykke på OK tasten for at bekræfte og udføre handlingen som er relateret til redigeringsfeltet (Opkald, Søg og lignende).

Godt at vide: Enkelte redigeringsfelter vil give dig forslag samtidigt med at du skriver (når du eksempelvis søger efter en person i dine Kontakter, når du søger efter en applikation i Google Play Butik, indskriver en e-mail adresse i Gmail og så videre). Du kan tilgå forslagene ved at benytte Pil Ned når du har indskrevet et eller flere bogstaver for at gennemgå listen over forslag. Finder du et forslag du gerne vil benytte kan du trykke på OK tasten.

Det fysiske tastatur

Det alfanumeriske tastatur (Tast 1 til Firkant) benyttes til at indskrive tekst, tal eller tegn defineret ud fra den aktuelle situation. Hver tast i tastaturet giver adgang til flere forskellige tegn. Trykker du på den samme tast flere gange hurtigt efter hinanden kan du indskrive følgende tegn i samme rækkefølge som nedenfor:

- **Tast 1:** 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¢ \ [] { } \ ~ ^ ` | §
- **Tast 2:** a b c 2 à â æ ç A B C À Â Æ Ç
- **Tast 3:** d e f 3 é è ê ë D E F É È Ê Ë
- **Tast 4:** g h i 4 î ï G H I Î Ï
- **Tast 5:** j k l 5 J K L
- **Tast 6:** m n o 6 ñ ò ö œ M N O Ñ Ô Ö Æ
- **Tast 7:** p q r s 7 P Q R S
- **Tast 8:** t u v 8 û T U V Û
- **Tast 9:** w x y z 9 ŵ ŷ W X Y Z Ŵ Ŷ
- **Tast 0:** Mellemrum, 0, Ny linje
- **Tast Stjerne:** Cirkulerer mellem Normal, Store bogstaver eller Numerisk.
- **Tast Firkant:** Indsætter Pund tegn (Firkant).

Det Virtuelle Tastatur

Din SmartVision 3 tilbyder to forskellige tastaturer. Et virtuelt Android tastatur samt et virtuelt KAPSYS tastatur. Det er det virtuelle KAPSYS tastatur som er aktiveret som standard. Det virtuelle tastatur frembringes automatisk i skærbilledet når du landet i et redigeringsfelt og er klar til at indskrive tegn. Du kan lukke det virtuelle tastatur ved at trykke på Tilbage tasten.

- **Det Virtuelle Android Tastatur:** Dette er det tastatur du som standard ville blive præsenteret for på en almindelig Android smartphone Det vises visuelt i den nederst del af skærbilledet og layoutet er som på et computertastatur (QWERTY). Placer din finger et sted i skærbilledet nederst og hold den, og du vil få annonceret det tegn du berører - bevæg din finger rundt indtil du lander på tegnet du ønsker at indsætte og fjern din finger.
- **Det Virtuelle KAPSYS Tastatur:** Dette virtuelle tastatur er specialdesignet til mennesker med en synsnedsættelse. Til forskel fra det virtuelle Android tastatur præsenterer KAPSYS

tastaturet ingen tegn eller ikoner, det viser udelukkende det senest indskrevne tegn i et stort format. Når du benytter det virtuelle KAPSYS tastatur får du også glæde af den hurtige adgang til de forskellige indskrivningsmuligheder via Menu tasten:

- **Tegn indskrevet:** Denne metode er standard, den præsenterer de senest indskrevne tegn.
- **Emojis:** Giver dig adgang til listen over de emojis / smileys du har tilgængelig på din SmartVision 3
- **Symboler:** Giver direkte adgang til specialtegn og tegnsætning.
- **Rediger:** Med dette element får du adgang til følgende muligheder: Slet alle (Slet alt), Kopier, Klip, Indsæt, Starten (På teksten) samt Slut (På teksten).
- **Indstillinger:** Herunder finder du adgang til følgende: Vibrer efter angivelse af tegn, Lydsignal efter angivelse af tegn, Forsinkelse på angivelse af tegn samt Skriv automatisk med stort.
- **Skift tastatur:** Herved kan du skifte til det virtuelle Android tastatur.

Godt at vide: Du kan benytte genvejene Stjerne med Tast 7 eller Stjerne med Tast 8 for at aktivere enten det virtuelle KAPSYS Tastatur eller det virtuelle Android tastatur.

Indskriv ved brug af talegenkendelse

SmartVision 3 er udstyret med en Dikterings funktion. Med denne funktion bliver du i stand til at diktere tekst ind i redigeringsfelter ved blot at bruge tale. For at indskrive tekst med talegenkendelse skal du trykke på Talekommando tasten placeret på den højre kant af din SmartVision 3, oven over Lydstyrke Op. Efter du har trykket hører du et lydsignal hvorefter du skal begynde at udtale den tekst du ønsker skal indskrives, i et tydeligt og roligt niveau.

Talegenkendelsen stopper så snart enheden registrer at du er stoppet med at sige noget (eller hvis dine pauser bliver for lange). Efter få sekunder vil din tale blive konverteret til tekst som automatisk indsættes i dit redigeringsfelt og som vil blive læst for dig. Du kan herefter selv manuelt redigere i teksten ved at benytte det fysiske tastatur eller ved at udføre en ny diktering. Her følger nogle anbefalinger til når du benytter talegenkendelse til at indskrive tekst:

- Afvent lydsignalet før du begynder at starte med at tale.
- Stille og rolige omgivelser vil forbedre resultatet af din talegenkendelse markant.
- Du kan tilføje tegnsætning når du taler, eksempelvis komma, spørgsmålstegn, udråbstegn og lignende, du skal blot sige navnet på tegnet. Eksempel: "Kommer du hjem og spiser på søndag spørgsmålstegn".
- Talegenkendelse vil benytte konteksten af sætningen. Det er derfor mere relevant at benytte længere sætninger end små grupper af ord.

Godt at vide: Det er ikke muligt at starte Dikterings funktionen når du ikke befinder dig i et redigeringsfelt. Trykker du på Talekommando tasten mens du befinder dig uden for en redigeringsboks starter du Assistent funktionen. Gennemgå venligst afsnittet omkring "Assisten".

Slet tekst

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte "Slet" tasten til at slette det seneste tegn du har indskrevet.

Redigér tekst

I et redigeringsfelt kan du benytte Venstre og Højre tasterne til at flytte din markør til steder hvor du kunne tænke dig at indsætte et nyt tegn, slette et tegn eller indskrive mere tekst. Som standard vil din markør flytte sig et tegn ad gangen. Du kan ændre på markørens navigations indstilling ved at trykke og holde på enten Venstre eller Højre tast.

Tastaturgenveje

Du har mulighed for via KAPSYS Tilgængeligheds Tjenesten af oprette op til 20 tastaturgenveje som kan udføre forskellige handlinger. Tastaturgenveje vil være en kombination af "Stjerne" eller "Firkant" (Pund) tasterne som du holder nede sammen med en af tasterne fra nul til ni. Herunder præsenteres du for listen over handlingerne som du kan tildele en specifik tastaturgenvej:

- Få annonceret status for din SmartVision 3 (Klokkeslæt, Batteriniveau, Wi-Fi status, Bluetooth status, GPS status, Netværk status)
- Øg hastigheden på talesyntese
- Mindsk hastigheden på talesyntese
- Skift lyd mellem ørehøjtaler og højtaler
- Vælg alle
- Klip
- Kopier
- Indsæt
- Flyt markøren til start på redigeringsfeltet
- Flyt markøren til slut på redigeringsfeltet
- Skift til virtuelle KAPSYS tastatur
- Skift til virtuelle Android tastatur
- Aktiver / Deaktiver "MagniText" tilstand
- Aktiver / Deaktiver Touchskærmen
- Aktiver / Deaktiver Bluetooth
- Aktiver / Deaktiver Wi-Fi
- Aktiver / Deaktiver GPS Lokalitet
- Aktiver / Deaktiver mobildata
- Aktiver / Deaktiver flytilstand
- Aktiver / Deaktiver lommelygte
- Skift lydprofil til Lydløs
- Åben Hurtige Indstillinger
- Åben Lydsindstillinger
- Nedjusterer lydstyrke for medier
- Opjusterer lydstyrke for medier

Som standard er enkelte tastaturgenveje allerede blevet oprettet i din SmartVision 3. Disse tastatur genveje er sorteret i to kategorier: Generiske "Firkant" genveje som vil fungere i alle situationer og "Stjerne" genveje som kun vil fungere når du befinder dig i et redigeringsfelt.

Allerede definerede generiske genveje med "Firkant" tasten:

- Firkant med 1: Få annonceret SmartVision 3 status
- Firkant med 2: Skift lydprofil til Lydløs
- Firkant med 3: Åben Hurtige Indstillinger
- Firkant med 4: Mindsk hastigheden på talesyntese
- Firkant med 5: Øg hastigheden på talesyntese
- Firkant med 6: Aktiver / Deaktiver "MagniText" tilstand
- Firkant med 7: Aktiver / Deaktiver Touchskærmen
- Firkant med 8: Genvej ikke tildelt
- Firkant med 9: Genvej ikke tildelt
- Firkant med 0: Genvej ikke tildelt

Allerede definerede genveje med "Stjerne" tasten:

- Stjerne knap 1: Flyt markøren til start på redigeringsfeltet
- Stjerne knap 2: Flyt markøren til slut på redigeringsfeltet

- Stjerne knap 3: Klip
- Stjerne knap 4: Genvej ikke tildelt
- Stjerne knap 5: Genvej ikke tildelt
- Stjerne knap 6: Kopier
- Stjerne knap 7: Skift til virtuelle KAPSYS tastatur
- Stjerne knap 8: Skift til virtuelle Android tastatur
- Stjerne knap 9: Indsæt
- Stjerne knap 0: Vælg alle

Disse tastaturgenveje kan du ændre på så de tilpasses dig, via KAPSYS Tilgængeligheds Indstillinger. For yderligere information kan du gennemgå "KAPSYS Tilgængelig" kapitlet.

Tilgængelighed

Introduktion

SmartVision 3 baseres på to forskellige tilgængeligheds tjenester, Talkback Tilgængelighed samt KAPSYS Tilgængelighed. Disse to tilgængeligheds tjenester er aktiveret som standard på din SmartVision 3 og skal forblive permanent aktiveret for at sikre dig den mest optimale tilgængelighed. Når disse to tilgængeligheds tjenester er aktiveret vil din SmartVision 3 give dig auditive annonceringer så du bliver i stand til at benytte det fysiske tastatur og / eller touchskærmen. Yderligere tilgængeligheds indstillinger (Størrelser, Farveforbedringer, Lydindstillinger med mere) kan du tilgå fra Indstillinger efterfulgt af sektionen "Tilgængelighed".

Talkback Tilgængelighed

Talkback Tilgængelighed er den såkaldt almindelig tilgængeligheds tjeneste for alle Android smartphones. Når den aktiveres ændrer den hvordan smartphone enheden håndteres, hvilket betyder at mennesker med en synsnedsættelse kan håndtere og benytte den. Talkback har mange forskellige tilgængeligheds indstillinger som gør det muligt at konfigurere hvordan smartphone enheden reagerer og kommunikere med og til dig. Du kan tilgå Talkback tilgængeligheds indstillingerne gennem Indstillinger og i sektionen "Tilgængelighed". Du kan også springe direkte til den fra Hjemmeskærm ved at benytte Menu tasten, hvor elementet du leder efter hedder Hurtige Indstillinger. De Talkback Tilgængeligheds indstillinger du kan justere på er følgende:

- **Indstillinger for oplæsning:** Giver dig mulighed for at ændre på tekst-til-tale funktionen (som standard er det Google), hente nye talesynteser, ændre på hastighed samt toneleje.
- **Detaljer:** Herunder kan du ændre på antallet og typen på de auditive annonceringer som kommer fra Talkback.
- **Lyd og Vibration:** Justere på de sensoriske forhold ved brug af Talkback.
- **Tilpas bevægelser:** Dette element gør det muligt for dig at ændre på funktionerne bag de bevægelseshandlinger som du måtte udføre på touchskærmen, stadig med Talkback.
- **Tilpas menuer:** Giver dig mulighed for at konfigurere Talkback Tilgængeligheds menuen (tryk og hold på Menu tasten) samt også læsestyringen (tryk og hold Venstre eller Højre).
- **Dæk nærhedssensoren til for at stoppe oplæsningen:** Med denne indstilling kan du vælge om talen skal stoppe når du bevæger din hånd ind foran nærhedssensor som er placeret øverst i venstre side af skærmen.
- **Beskriv automatisk ikoner:** Gør det muligt for dig at høre en beskrivelse af et unavngivet ikon som ikke har en etiket tilknyttet.
- **Braille tastatur:** Med denne funktion kan du benytte touchskærmen som et punktastatur.
- **Braille display:** Herunder kan du forbinde et punktdisplay med din smartphone.
- **Selvstudie og hjælp:** Her får du direkte adgang til Talkback Hjælpen.

- **Avancerede indstillinger:** Med dette element kommer du til de mere avancerede Talkback Indstillinger (Oplæs adgangskoder, Tilpassede etiketter, Rækkefølge for beskrivelse af elementer, Præference for indtastning med mere).

Du kan finde meget mere information ved at gennemgå Googles brugervejledning som du finder herunder: [Google Talkback link](#)

Godt at vide: Såfremt du ønsker eller har brug for assistance fra en seende har du mulighed for midlertidigt at deaktivere Talkback Tilgængeligheden hvorved din assistent kan benytte touchskærmen akkurat som normalt. Du kan deaktivere Talkback Tilgængelighed ved at trykke og holde på både Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned samtidigt, i mindst tre sekunder. Du kan deaktivere Talkback Tilgængelighed ved at trykke og holde på både Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned samtidigt, i mindst tre sekunder.

KAPSYS Tilgængelighed

KAPSYS Tilgængelighed er den anden tilgængeligheds tjeneste indlejret i din SmartVision 3. Med den bliver du i stand til at håndtere yderligere funktioner som ikke er mulige med og under Talkback Tilgængelighed, såsom justering af tastatur og Vågn Op Annoncering. Du kan tilgå KAPSYS Tilgængeligheds indstillingerne via Indstillinger og i sektionen "Tilgængelighed". Du kan også springe direkte til den fra Hjemmeskærm ved at benytte Menu tasten, hvor elementet du leder efter hedder Hurtige Indstillinger.

De KAPSYS Tilgængeligheds indstillinger du kan justere på er følgende:

- **MagniText:** Når denne er aktiveret vil du få vist et stort banner på skærmen med den aktuelle tekst fra menuen. Størrelsen, kontrast, hastighed og positionen kan alle indstilles efter lige netop dit behov.
- **Deaktiver touch skærmen:** Din SmartVision 3 reagerer ikke hvis du berører skærmen.
- **Tastaturgenveje:** Giver dig mulighed for at gennemgå og redigere de definerede tastaturgenveje i din SmartVision 3.
- **Hurtig Start:** Herunder kan du allokere en specifik handling, såsom at ringe til en kontaktperson eller åbne en applikation, når du fra Hjemmeskærmen trykker og holde på en tast.
- **Besvar opkald ved brug af numerisk tastatur:** Giver dig mulighed for at besvare indgående opkald ved blot at trykke på en af knapperne fra 0 til 9.
- **Vågn op annoncering:** Vågn Op Annoncering: Du kan konfigurere typen og mængden af information som du ønsker at få når du aktiverer telefonen fra standby tilstand (aktuelle klokkelæst, aktuelle dato, batteri niveau, netværks status, ubesvaret opkald, ny besked, ny software opdatering).

Notifikationspanel

Introduktion

Notifikationer er kortere beskeder der fremkommer på din smartphone og indeholder information om nye aktiviteter. Disse beskeder / informationer gives til dig med et lydsignal og / eller en vibration efterfulgt af en kort besked. De kommer fra specifikke applikationer som er installeret på din SmartVision 3 og informere dig om, eksempelvis, at du har modtaget en ny e-mail, en ny SMS besked, et ubesvaret opkald, en påmindelse om aftaler og så videre. Alle notifikationerne vil blive grupperet sammen i Notifikationspanelet og vil blive præsenteret i kronologisk rækkefølge. Notifikationspanelet er en hurtig og nem måde til at gennemgå alle nye aktiviteter. Du kan tilgå Notifikationspanelet ved at trykke og holde på Tilbage tasten. Du kan også springe direkte til den fra Hjemmeskærm ved at benytte Menu tasten, hvor elementet du leder efter hedder Hurtige Indstillinger. Du kan lukke Notifikationspanelet igen ved at trykke på Tilbage tasten.

Du kan finde meget mere information ved at gennemgå Googles brugervejledning som du finder herunder: [Android Notifikationspanel Link](#)

Tjek en notifikation

For at gennemgå dine notifikationer skal du tilgå dit Notifikationspanel og benytte dine navigationstaster til at navigere i listen. Tryk på OK tasten for at tilgå den ønskede notifikation hvorved du automatisk bliver dirigeret til pågældende applikation som har leveret notifikationen. Et eksempel: Finder du en notifikation for et ubesvaret opkald vil du automatisk blive dirigeret til Telefon applikationen og placeres i din historik. Når du har aktiveret en notifikation vil den automatisk forsvinde fra Notifikationspanelet. Bemærk venligst at enkelte notifikationer vil forblive aktive indtil du har gennemført en specifik handling.

Fjern en notifikation

Åben Notifikationspanelet og naviger til notifikationen som du ønsker at fjerne, hvorefter du blot skal benytte Slet tasten. Du har også mulighed for at fjerne alle notifikationerne ved at navigere til og vælge det sidste element i listen, "Ryd alle notifikationer".

Håndter notifikationer

Tilgå Notifikationspanelet og benyt dine navigationstaster indtil du lander på "Administrer" elementet. Gennemgå nu de forskellige muligheder for at justere hvordan dine notifikationer skal håndteres.

Hurtige Indstillinger

Introduktion

Under Hurtige Indstillinger får du direkte adgang til hovedfunktioner uden at skulle gennem Indstillinger applikationen. Det er en forlængelse af Notifikationspanelet som giver dig direkte adgang til Wi-Fi Aktivering, Bluetooth, Mobildata, Flytilstand med mere. For at tilgå Hurtige Indstillinger området kan du benytte tastaturgenvejen Firkant med Tast 3. Du kan også springe direkte til den fra Hjemmeskærm ved at benytte Menu tasten, hvor elementet du leder efter hedder Hurtige Indstillinger. Du har mulighed for at konfigurere Hurtige Indstillinger området ved at benytte elementet "Rediger rækkefølgen af indstillinger".

Seneste applikationer

Introduktion

Seneste applikationer skærmbilledet giver dig mulighed for hurtigt at vende tilbage til de applikationer du senest har benyttet på din SmartVision 3. Du har ydermere mulighed for at frigøre hukommelse på din smartphone samt spare på batteriet. I praksis, når du trykker på enten Hjem tasten eller Tilbage tasten på din SmartVision 3 efter du har benyttet en applikation, vil den pågældende applikation fortsætte med at arbejde i baggrunden. Det kan derfor være relevant at lukke / afbryde disse applikationer for at give systemet frirum til at øge hastigheden, frigøre hukommelse og på den måde øge stabiliteten.

Tilgå Seneste Applikationer ved at trykke og holde på Hjem tasten. Du kan også springe direkte til området fra Hjemmeskærm ved at benytte Menu tasten.

Åben en senest benyttet applikation

Tilgå dine seneste applikationer og benyt nu dine navigationstaster til at gennemgå listen over applikationerne. Som standard vil den senest benyttede applikation blive præsenteret først. Benyt Op tasten for at gå tilbage i din historik af tidligere benyttede applikationer. Tryk på OK tasten hvis du lander på en applikation som du ønsker at tilgå igen.

Stop en af de seneste applikationer

Tilgå dine seneste applikationer og benyt nu dine navigationstaster til at gennemgå listen over applikationerne. Som standard vil den senest benyttede applikation blive præsenteret først. Benyt Op tasten for at gå tilbage i din historik af tidligere benyttede applikationer. Tryk på Slet tasten når du har markeret en applikation du ønsker at afbryde.

Ved at lukke en applikation forhindrer du den ikke i at fungere. Applikationen vil stadig være dig til rådighed i din SmartVision 3 og vil blot genstarte næste gang i åbner den.

Godt at vide: Navigerer du helt tilbage i historikken, ved at benytte Op tasten, vil du finde et "Ryd alle" element som du kan bruge til at lukke samtlige applikationer på en gang.

Hjemmeskærm

Introduktion

Hjemmeskærmen er dit udgangspunkt for din SmartVision 3, det er her du starter og hvorfra du navigerer videre til alle andre funktioner. For at vende tilbage til Hjemmeskærmen kan du til enhver tid trykke på "Hjem" tasten på tastaturet på din SmartVision 3.

Som standard er der fire applikationer tilgængelige i SmartVision 3 Hjemmeskærm:

- **Applikationer:** Giver dig adgang til alle dine installeret applikationer i din SmartVision 3.
- **Kontakter :** Administrer og opret kontaktpersoner.
- **Telefon:** Her kan du foretage opkald, gennemse historik og tilgå din telefonsvarer.
- **Beskeder:** Gør det muligt for dig at afsende og modtage SMS samt MMS beskeder (korte beskeder med et vedhæftet billede eller video eller lignende).

Yderligere funktioner kan findes direkte på Hjemmeskærmen ved brug af "Menu" tasten:

- **Hurtige Indstillinger:** Giver dig direkte adgang til dine Hurtige Indstillinger i din SmartVision 3.
- **Notifikationer:** Spring direkte til dit Notifikationspanel.
- **Seneste applikationer:** Vil du tilgå dine seneste applikationer kan du gøre det herfra.
- **Indstillinger:** Gør dig i stand til at komme direkte til Indstillinger området hvor du kan konfigurere din SmartVision 3.
- **KAPSYS Tilgængelighed:** Kom direkte til alle KAPSYS Tilgængeligheds Indstillingerne.
- **TalkBack Tilgængelighed:** Kom direkte til alle TalkBack Tilgængeligheds Indstillingerne.

Hjemmeskærmen på din SmartVision 3 kan tilpasses som du ønsker det. Du kan tilføje applikationer til listen, omrokere rækkefølgen eller fjerne applikationer fra listen.

Tilføj en applikation til Hjemmeskærm

Naviger til og vælg "Applikationer" fra Hjemmeskærmen og naviger efterfølgende til den applikation du ønsker skal fremkomme ude på Hjemmeskærmen, og tryk og hold så på OK tasten. Vælg elementet "Tilføj til hjemmeskærm" fra kontekst menuen som du præsenteres for. Applikationen vil nu være tilgængelig direkte ude fra Hjemmeskærmen, og vil være at finde til sidst i listen.

Fjern en applikation fra Hjemmeskærm

Naviger til den applikation du ønsker at slette fra listen og tryk og hold på OK tasten. Vælg elementet "Fjern fra hjemmeskærm" ved at trykke OK. Applikationen fjernes nu fra Hjemmeskærmens liste, men vil stadig være tilgængelig under "Applikationer".

Flyt en applikation i Hjemmeskærm

Fra Hjemmeskærmen skal du navigere til den applikation som du ønsker at flytte og nu trykke og holde på OK tasten. Vælg herefter et af Flyt elementerne: Flyt længere op i listen, Flyt længere ned i listen, Flyt til toppen af listen eller Flyt til bunden af listen.

Hurtig Start

KAPSYS Tilgængelighed har designet en "Hurtig Start" funktion som giver dig muligheden for at associere en applikation eller et opkald til en kontaktperson, direkte ved brug af en af tasterne fra 2 til 9. Når du har tilegnet en applikation eller en kontaktperson kan du, direkte fra Hjemmeskærmen, trykke og holde på den tilskrevne tast for enten at starte den pågældende applikation eller påbegynde et opkald. Konfigurationen af Hurtig Start kan udføres gennem KAPSYS Tilgængeligheds Indstillinger, via "Hurtig Start" elementet. Bemærk venligst at tast 1 som standard er tilegnet din telefonsvarer.

Godt at vide: Du kan også associere en tast til en applikation eller en kontaktperson direkte fra Hjemmeskærm. Gør dette ved at trykke og holde på en af tasterne fra 2 til 9, som endnu ikke er konfigureret, mens du befinder dig i Hjemmeskærmen. "Hurtig Start Menu" åbner op og du kan nu tilskrive enten en kontaktperson eller en applikation til pågældende tast.

Applikationer

Introduktion

Alle applikationer som er installeret på din SmartVision 3 kan tilgås fra Hjemmeskærmens "Applikationer" elementet. Dine applikationer præsenteres i en liste som opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Åben en applikation

Naviger til den applikation du ønsker at åbne i listen og tryk på OK tasten.

Find en applikation

Benyt det fysiske tastatur til at angive det første bogstav i applikationens navn. Oversigten over applikationer filtreres nu i forhold til de bogstaver du angiver. Du kan gennemgå listen over mulige kandidater ved at benytte Ned og Op tasterne. For at slette et tegn som du har indskrevet skal du blot benytte "Slet" tasten.

Download en applikation

SmartVision 3 leveres til dig med allerede installerede applikationer. Du har dog mulighed for at hente nye applikationer ved at benytte "Play Butik" applikationen fra Google.

Slet en applikation

Naviger til den applikation du ønsker at slette og tryk og hold på OK tasten. Naviger til og vælg elementet "Afinstaller" og vælg efterfølgende elementet OK for at bekræfte sletningen.

Godt at vide: Din SmartVision 3 har præinstallerede applikationer som ikke kan blive afinstalleret.

Indstil Tilladelser for applikation

For at de fleste applikationer kan fungere korrekt har de brug for tilladelse til at tilgå eller udnytte forskellige information som befinder sig på din enhed. Når du starter en applikation for første gang vil din SmartVision 3 præsentere dig for de nødvendige tilladelser som gør, at applikationen fungerer efter hensigten. Naviger til og vælg "Tillad" når du bliver bedt om at give autorisation. Såfremt du afslår at give fuld eller enkelte tilladelser kan det resultere i at applikationen ikke fungerer optimalt, eller slet ikke.

Du kan ændre på dine tilladelser og dine afslag ved at navigere til applikationen Indstillinger efterfulgt af elementet "Apps og notifikationer". Vælg den applikation du har behov for at ændre og vælg elementet "Tilladelser".

Planlægning

Introduktion

Med applikationen Planlægning bliver du i stand til at håndtere og administrere begivenheder, aftaler og mærkedage. Det er en simplificeret udgave af Googles egen Kalender applikation. Hovedskærmen af Planlægnings applikationen giver dig et overblik over alle dine tilføjede begivenheder på din SmartVision 3. Dine begivenheder er sorteret i kronologisk rækkefølge. Hver af dine oprettede begivenheder bliver præsenteret på følgende måde: Navn på begivenhed, dato efterfulgt af tidspunkt. Den førstkomende begivenhed præsenteres øverst i listen over oprettede begivenheder. Benyt Op tasten for at navigere opad i listen og gennemse tidligere begivenheder eller benyt Ned tasten for at gennemse dine kommende begivenheder. Som standard vil du ikke have nogen oprettede begivenheder i Planlægnings applikationen.

Tilføj en begivenhed

Fra hovedskærmen af Planlægning applikationen skal du vælge elementet "Opret begivenhed". Du får nu mulighed for at oprette en begivenhed. Udfyld følgende felter:

- **Titel:** Giv din begivenhed et navn eller beskrivelse. Tryk på OK tasten for at blive placeret i et redigeringsfelt og indskriv din tekst. Tryk på OK knappen for at bekræfte.
- **Dato:** Her angiver du datoen for begivenheden. Som standard vil den aktuelle dato være angivet. Tryk på OK tasten for at ændre den. (Angiv først årstal, så måned efterfulgt af dag og dato)
- **Klokkeslæt:** Her specificerer du tidspunktet for begivenheden. Som standard er klokkeslættet i feltet allerede udfyldt, med det aktuelle tidspunkt, rundet op med 5 minutter. Tryk på OK tasten for at ændre på tiden (Angiv først timer og så minutter)
- **Gentagelse:** Rediger gentagelsessekvensen for din begivenhed. Som standard er "en gang" valgt. Dette betyder at begivenheden kun vil forekomme en gang, på den angivne dato og tidspunkt. Tryk på OK tasten for at ændre gentagelsen til et af følgende: En gang, Hver dag, Hver uge, Hver måned, Hvert år.
- **Påmindelse:** Her kan du definere en påmindelse om begivenheden. Som standard er "På tidspunktet" valgt. Tryk på OK tasten for at ændre påmindelsen til et af følgende: "På tidspunktet", "5 minutter før", "10 minutter før", "30 minutter før", "1 time før", "Dagen før", "2 dage før", "Ingen".
- **Ringetone:** Du kan angive en specifik ringetone hvis du ønsker det.
- **Gem:** Vil gemme din begivenhed.

Godt at vide: Trykker du på Tilbage tasten vil din begivenhed også blive gemt, i det tilfælde at du har ændret på mindst ét felt.

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne ringetone-lyde til brug ved begivenheder på din SmartVision 3. For at gøre dette skal du tilslutte din SmartVision 3 til din computer ved brug af USB C kablet der fulgte med. Din SmartVision 3 genkendes som et flytbart medie på din Windows maskine. Åben mappen "SmartVision 3" efterfulgt af "Internal Storage Memory" for at tilgå telefonens interne hukommelse. Kopier de ønskede ringetoner - i formatet MP3 - fra din computer og til mappen "Ringtones". De nye ringetoner vil nu være at finde i oversigten over tilgængelige ringetoner, og titlen vil være den samme som på din computer.

Stop en påmindelse

Når påmindelsen, og derved alarmer, for en begivenhed lyder, vil du blive præsenteret for et skærmbillede med følgende muligheder:

- **Titel:** Annoncerer titlen for pågældende begivenheden.
- **Stop:** Her kan du afbryde alarmer.
- **Udsæt:** Med denne funktion udsætter du alarmer i 10 minutter, som herefter vil gentage sig.

Benyt dine navigations taster til at navigere til "Stop" eller "Udsæt", og aktiver elementet ved brug af OK tasten. Du kan også benytte Tilbage tasten som også vil stoppe påmindelsen.

Godt at vide: Din SmartVision 3 er nødt til at være tændt eller i standby tilstand før at en alarm for en begivenhed kan lyde. Er din SmartVision 3 slukket på pågældende tidspunkt vil du ikke få en påmindelse af begivenheden i form af en alarm.

Rediger en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Planlægnings applikation kan du benytte dine navigations taster til at navigere til den pågældende begivenhed som du ønsker at redigere og trykke på OK tasten for at vælge den. Pågældende begivenhed vil blive præsenteret for dig i redigeringstilstand hvorved du igen kan benytte dine navigations taster til at navigere til det felt / den information du ønsker at ændre på, ud fra denne rækkefølge: Titel, Dato, tidspunkt, Gentagelse, Påmindelse, Ringetone. Følg herved samme procedure som ved « Tilføj en begivenhed ». Efter redigering, vælg elementet "Gem" til sidst i listen.

Godt at vide: Trykker du på "Tilbage" knappen vil din begivenhed også blive gemt, i det tilfælde at du har redigeret mindst ét felt.

Fjern en begivenhed

Fra Hovedmenuen af Planlægnings applikationen, brug navigations tasterne til at vælge den specifikke begivenhed som du ønsker at slette, og tryk på Slet knappen. Du vil blive bedt om at bekræfte dit ønske. Naviger til elementet "Ja" og bekræft med OK tasten.

Godt at vide: Du kan også slette en begivenhed ved at åbne den op og vælge elementet "Slet begivenhed" som du finder i slutningen af listen.

Fjern samtlige begivenheder

For at slette samtlige begivenheder skal du trykke på Menu tasten direkte fra Hovedskærmen, og herefter navigere til og vælge elementet "Slet alle". Du vil blive bedt om at bekræfte dit ønske. Naviger til elementet "Ja" og bekræft med OK tasten.

Søg efter en begivenhed

Fra Hovedskærmen af Planlægnings applikationen kan du blot benytte dit alfanumeriske tastatur for at begynde at søge efter en eller flere begivenheder. Oversigten over applikationer filtreres nu i forhold til de bogstaver du angiver. Du kan herefter navigere ned gennem listen over de indekserede begivenheder med dine navigations knapper. For at slette et tegn som du har indskrevet skal du blot benytte "Tilbage" knappen (slet knappen). Såfremt du finder den ønskede begivenhed kan du trykke på "OK" tasten for at se yderligere detaljer.

Google Assistent

Med Assistent applikationen, en standard applikation produceret af Google, bliver du i stand til at finde information på internettet og gennemføre en lang række opgaver. Gennemgå venligst den følgende brugervejledning for at lære mere om Google Assistenten: [Google Assistent link](#)

SmartVision 3 er oprettet med en direkte adgang til Assistent funktionen under Talekommando knappen, som du finder ude på kanten, på højre side. En fungerende internet forbindelse er nødvendig for at kunne udnytte denne service. Ydermere påkræves det at bruge en Gmail konto for at gøre brug af alle tilgængelige Talekommando funktioner. Så snart du har konfigureret din Google Assistent kan du med et hurtigt tryk på Talekommando knappen aktivere funktionen. Sig din kommando tydeligt og roligt efter lydsignalet og lad din Assistent gøre resten.

Godt at vide: Det er ikke muligt at starte Assistent funktionen når du befinder dig i et redigeringsfelt. Trykker du en gang hurtigt på Talekommando knappen mens du befinder dig i et

redigeringsfelt vil du aktivere Dikterings funktionen. Gennemgå venligst afsnittet omkring "Indskriv ved brug af talegenkendelse".

Genkend Pengesedler

Introduktion

Med Genkend Pengesedler applikationen kan du nu gøre brug af din SmartVision 3's kamera og LED belysning til at identificere værdien på en given pengeseddel.

Opdatering af data

KAPSYS opdaterer regelmæssigt databasen som applikationen benytter. Når du starter applikationen på din SmartVision2 vil du muligvis blive præsenteret for et opdaterings vindue. Vælg knappen "OK" ved brug af dine navigations taster og bekræft venligst at opdateringen må gennemføres for at installere de seneste identifikations data. Dette vil hver gang forbedre identificeringen.

Identificer en pengeseddel

For at optimere identifikationen anbefales det at placere den udfoldede pengeseddel på en plan overflade og holde din SmartVision 3 mellem 20 og 30 centimeter væk fra pengesedlen i et godt belyst miljø.

Så snart kameraet i din SmartVision 3 opdager pengesedlen, og identificerer den, vil dens værdi automatisk blive annonceret og præsenteret på skærmen. Det er nu muligt at aflæse flere pengesedler efter hinanden.

BogLæser

Introduktion

BogLæser er en applikation du kan benytte til at læse dokumenter i DAISY 2.02, DAISY 3.0, ePUB, ePUB3, Doc, Docx, PDF, TXT samt HTML formater.

Overfør et dokument

For at overføre et dokument til din SmartVision 3 skal du blot tilslutte den til din computer via et USB kabel. Når du har tilsluttet din telefon skal du overføre filen eller filerne til "books" mappen på den interne hukommelse. Du kan også indsætte et micro SD hukommelseskort i din SmartVision 3 for at udvide den tilgængelige hukommelse. I dette tilfælde skal du sørge for at oprette en mappe på dit micro SD kort med navnet "books" og placere dine filer her.

Godt at vide: Mappen "Download" kan også benyttes til at lagre dine filer.

Hovedskærm

Når du starter applikationen præsenteres du for følgende muligheder:

- **Genoptag:** Giver dig mulighed for at genoptage den seneste læsning, fra hvor du forlod den.
- **Min bogreol:** Her får du mulighed for at lede efter og starte læsningen af en bog (dokument) som du har placeret på din SmartVision 3.
- **Mine favoritter:** Gør det muligt for dig at lokalisere en bog (dokument) hurtigt hvis du har tilføjet den som favorit.
- **Læst for nylig:** Her finder du det seneste dokument som du har læst.
- **Optag en DAISY bog:** Forvandler en lydoptagelse til DAISY format.

Yderligere funktioner kan findes direkte på Hovedskærmen ved brug af "Menu" tasten:

- **Aktiver lydløs ved lukning:** Stopper med at læse bogen / dokumentet når du forlader applikationen med "Hjem" knappen.
- **Farver:** Giver dig mulighed for at ændre på tekst- og baggrundsfarven i et tekst dokument.
- **Hastighed:** Gør det muligt for dig at ændre på læsehastigheden.

- **Toneleje:** Her kan du ændre på tonelejet (kun muligt ved brug af MP3).
- **Tidshop:** Angiv længden på tidshoppet.
- **Afspil med sløjfe:** Giver mulighed for afspilning med sløjfe (gentag).

Læs et dokument

Fra Hovedskærmen af applikationen skal du vælge elementet "Min bogreol". De følgende muligheder præsenteres for dig:

- **Bøger med titel:** Søg efter et dokument / en bog efter dens titel.
- **Bøger af forfatter:** Søg efter et dokument / bog efter dens forfatter.
- **Vælg ud fra format:** Søg efter et dokument / bog efter dets format.
- **Undersøg træliste:** Gennemgå frit "books" mappen for at lokalisere det ønskede dokument eller bog.

Godt at vide: For at læse filer der befinder sig i en ZIP komprimeret mappe med BogLæser applikationen er du nødsaget til først at pakke filerne ud ved brug af "Undersøg træliste" funktionen. For at udføre dette skal du vælge ZIP filen fra trælisten og bekræfte med "OK" knappen. Et vindue til udpakningen af filen præsenteres. Vælg "OK" ved brug af navigations knappen og bekræft med "OK" knappen. Filen vil herefter blive pakket ud og placeret i "Books" mappen på den interne hukommelse (dette kan tage et par minutter alt efter størrelsen). Når processen er udført vil du blive anbefalet at slette ZIP filen og såfremt du ønsker det, bekræft. Det udpakkede resultat vil nu være tilgængeligt i "Min bogreol".

Når du har aktivere det ønskede dokument eller bogen vil afspilningen starte automatisk. Under afspilningen er følgende tastatur genveje tilgængelige:

- **Tast 0:** Afspil / Pause
- **Tast 1:** Forrige sektion
- **Tast 2:** Næste sektion
- **Tast 4:** Juster navigations niveau ned (side, titel, kapitel, linje, ord, karakter og tidshop)
- **Tast 5:** Juster navigations niveau op (side, titel, kapitel, linje, ord, karakter og tidshop)
- **Tast 7:** Spol hurtigt tilbage (kun ved MP3)
- **Tast 8:** Spol hurtigt fremad (kun ved MP3)

Yderligere funktioner som er tilgængelige direkte fra hovedskærmen ved brug af "Menu" knappen:

- **Navigations tilstand:** Giver dig mulighed for at ændre på navigations niveauet (side, titel, kapitel, linje, ord, karakter og tidshop). Mulighederne under denne menu afhænger af den aktuelle bog du læser.
- **Opret bogmærke:** Giver dig mulighed for at oprette et bogmærke ved den aktuelle placering i bogen.
- **Flyt til...:** Gør det muligt at navigere ned gennem et dokument (Start, titel, bogmærke, procent).
- **Hvor er jeg?:** Giver dig information omkring den aktuelle bog og læsepositionen.
- **Lydtilstand:** Gør det muligt for dig at læse en MP3 fil med talesyntesen på din SmartVision 3.
- **Indstillinger:** Tager dig tilbage til de generelle indstillinger for applikationen.

Slet et dokument

Naviger til og vælg det dokument som du ønsker at slette fra "Min bogreol " og tryk og hold så på OK tasten for at få adgang til kontekst menuen. Naviger til elementet "Slet" og vælg med OK tasten. Bekræft at du ønsker at slette ved at navigere til og vælge "OK" elementet.

Tilføj et dokument til listen over favoritter

Naviger til og vælg dokumentet i "Min bogreol" og tryk og hold så på OK tasten. En kontekst menu relateret til den aktuelle angivende fil præsenteres for dig - vælg her "Favorit" for at tilføje den til favorit listen.

Fjern et dokument fra listen over favoritter

Naviger til og vælg dokumentet i "Mine favoritter" og tryk og hold så på OK tasten. En kontekst menu relateret til det valgte element dukker op. Vælg "Favorit" for at fjerne denne fra listen over dine favoritter.

Optag en DAISY bog

Fra hovedmenuen i applikationen, vælg "Optag en DAISY bog" og herefter "Ny bog". Angiv hvor bogen skal placeres henne (Telefon eller SD Kort). Udfyld derefter titel på bogen samt navnet på forfatter. Vælg så "Lav en ny" efterfulgt af "Optag" knappen for at starte optagelsen. Du kan pause en optagelse ved at vælge "Pause" knappen. Så snart optagelsen er færdig, vælg da "Stop" for at gemme din nye DAISY lydbog og vende tilbage til hovedmenuen i applikationen.

Godt at vide: Såfremt du ønsker at tilføje en lydfil til en tidligere optaget bog i din SmartVision 3 skal du blot vælge "Tilføj en eksisterende optagelse".

Tilføj en optagelse til en allerede eksisterende lydbog

Fra hovedmenuen i applikationen, vælg "Optag en DAISY bog" og herefter "Tilføj til en bog". Angiv den lydbog som du ønsker at tilføje en optagelse til. Vælg så "Lav en ny" efterfulgt af "Optag" knappen for at starte optagelsen. Du kan pause en optagelse ved at vælge "Pause" knappen. Så snart optagelsen er færdig, vælg da "Stop" for at gemme din nye DAISY lydbog og vende tilbage til hovedmenuen i applikationen.

Lommeregner

Introduktion

Lommeregner applikationen lader dig udføre basale matematiske operationer såsom addition, subtraktion, multiplikation og division.

Gennemfør en udregning

Herunder følger funktionerne under de forskellige taster in din Lommeregner applikation:

- Tasterne fra 0 til 9 benyttes til at indskrive tal der skal udregnes.
- Stjerne tasten benyttes til at angive operator (gange, dividere, plus, minus, punkt samt komma).
- Med Firkant tasten valideres beregningen og resultatet læses for dig.
- Slet tasten benyttes til at slette det seneste tegn du har indskrevet eller slette en udregning.
- Navigations tasterne benytter du til at navigere gennem alle cifre og operatorer som præsenteres visuelt i skærbilledet.

Godt at vide: For mere avancerede operationer såsom sinus og cosinus udregninger, logaritmer og så videre, tryk da på "Menu" tasten og vælg herefter "Avanceret panel". Benyt så dine navigations taster til at vælge mellem de mere benyttede avancerede operationer (sinus, cosinus, tangens, kvadratrods, potens...) og så videre.

Kalender

Introduktion

Kalender applikationen er en standard Google applikation som giver dig mulighed for at oprette begivenheder og tilføje påmindelser. Følg venligst linket herunder for at lære mere om Google Kalenderen: [Google Kalender Link](#).

Kamera

Introduktion

Med kamera applikationen bliver du med din SmartVision 3 i stand til at tage billeder og optage videoer. Du kan hurtigt tilgå Kamera applikationen fra ethvert sted i din SmartVision 3 ved at trykke to gange hurtigt på Tænd / Sluk knappen.

Tag et billede

Naviger til og vælg "Lukker" elementet som befinder sig nederst i skærmbilledet af Kamera applikationen, og tryk på OK tasten. Du vil hører en lukkelyd når billedet tages.

For at gennemse det seneste billede du har taget, naviger til og vælg elementet "Slå filmstrimmel til eller fra". Benyt Google's applikation "Fotos" for at gennemse alle de billeder du har taget.

Optag en video

Naviger til og vælg "Slå tilstandslisten til eller fra" elementet efterfulgt af "Skift til video kamera".

Naviger til og vælg "Lukker" elementet som befinder sig nederst i skærmbilledet, og din SmartVision 3 starter en optagelse. Tryk på OK tasten igen når du ønsker at stoppe videooptagelsen. For at gennemse den seneste video, naviger til og vælg elementet "Slå filmstrimmel til eller fra". Dine videoer kan du også finde og se ved at besøge Google's applikation "Fotos" .

Godt at vide: Benyt tast 0 til at skifte hurtigt og nemt mellem de to tilstande (billede eller video).

Chrome

Introduktion

Chrome applikationen er en standard Google applikation der giver dig adgang til internettet. Følg venligst linket herunder for at komme til brugervejledningen for Google Chrome: [Link til Google Chrome Brugervejledning.](#)

Ur

Introduktion

Ur applikationen er en standard Google applikation som giver dig mulighed for at oprette alarmer og tjekke aktuelle klokkeslættet. Applikationen inkluderer også et stopur og et kronometer.

Følg venligst linket herunder for at komme til brugervejledningen for urapplikationen: [Google Ur Link](#)

Tilføj en alarm

Naviger til og vælg "Alarm" elementet når du har åbnet Ur applikationen, og naviger efterfølgende til knappen "Tilføj alarm" og tryk på OK tasten. Det anbefales nu at navigere til og vælge "Skift til teksttilstand for at angive klokkeslæt" elementet (tryk og hold Pil Ned for at springe direkte til OK elementet, tryk nu Pil op to gange). Udfyld nu timer og minutter i de pågældende redigeringsfelter og benyt "OK" elementet som du finder til sidst i listen for at oprette og gemme din nye alarm.

Stop en alarm

Når en alarm går i gang vil et nyt skærmbillede blive præsenteret. Naviger til og vælg "Stop" elementet for at afbryde alarmeren, eller "Snooze" for at udskyde alarmeren i ti minutter.

Rediger en alarm

Aktiver igen "Alarm" elementet direkte fra Hovedskærmen af Ur applikationen og naviger til og vælg herefter tidspunktet for den alarm som du ønsker at ændre på. Følg samme vejledning som under oprettelse af en alarm for på samme måde at justere på tidspunktet.

Yderligere justeringer kan du få adgang til via knappen "Udvid alarm" (Definer en pause for alarmeren, angiv specifik ringetone, vibration, en etiket med mere).

Aktiver / Deaktiver en alarm

For at aktivere eller deaktivere en alarm skal du vælge "Alarm" elementet i Ur applikationen og efterfølgende navigere til kontakten "Til" eller "Fra", og trykke på OK for at ændre den pågældende alarms tilstand.

Slet en alarm

Aktiver "Alarm" området i Ur applikationen, naviger til og vælg "Udvid alarm" for den pågældende alarm som du ønsker at slette. Naviger til og vælg "Slet" elementet for at slette alarmen.

Farvetester

Introduktion

Med Farvetester applikationen har du mulighed for at benytte din SmartVision 3 til at lede efter eller opdage farver.

Annoncer farver

Med denne funktion kan du med kameraet i din SmartVision 3 få annonceret den farve som du peger på. Annonceringen af en farve bliver gentaget hvert tredje sekund eller når farven ændre sig. For at opnå det bedste resultat anbefales det at placere din SmartVision 3 mellem ti og femten centimeter over farven og sikre at området er godt belyst.

Resultatet er meget afhængigt af det omgivende lys. En farve vil ikke blive annonceret på samme måde hvis objektet er dårligt belyst, eller sågar hvis der er for meget lys. Information omkring skygge kan i enkelte tilfælde blive annonceret efter angivelse af farven: Svag, Lys, Mørk, Meget mørk.

Listen over de farver som din SmartVision 3 kan opdage er som følger: Rød, Bourgogne, Brun, Orange, Gul, Gul grøn, Grøn, Smaragdgrøn, Turkis, Blå, Marineblå, Lilla, Magenta, Lyserød, Hvid, Grå og Sort.

Find en farve

Denne funktion kan du bruge til at finde en specifik farve. Det gør dig i stand til eksempelvis at finde et specifikt objekt hurtigt, såfremt du kender dets farve i forvejen. Vælg den farve som du ønsker at finde i listen over de tilgængelige farver og placer det bagudvente kamera over objektet. Et lydssignal afspilles når farven er fundet.

Kontaktpersoner

Introduktion

Kontaktpersoner applikationen er en standard applikation fra Google som lader dig håndtere din telefonbog. Besøg venligst følgende link hos Google for at få mere information: [Google Kontakter Link](#)

Importer dine kontaktpersoner

For at få mest glæde af alle funktionaliteter som din SmartVision 3 tilbyder dig, samt også Google Assistenten, anbefales det at sørge for backup af alle dine kontaktpersoner til din Google konto. Din Google Kontakter applikation giver dig mulighed for automatisk at synkronisere dine kontaktpersoner fra et SIM kort eller en VCF fil.

- **Fra et SIM kort:** I Kontakter applikationen skal du navigere til og vælge "Ret og administrer" fanen som befinder sig til sidst i applikationens hovedskærm, og efterfølgende navigere til og vælge "Importer fra SIM". Har du flere forskellige konti oprettet i din SmartVision 3 skal du nu vælge hvilken konto du ønsker dine kontaktpersoner skal knyttes til.
- **Fra en VCF fil:** Såfremt du har gemte kontaktpersoner placeret i en VCF fil kan du også importere dem til din Google konto. I Kontakter applikationen skal du navigere til og vælge

"Ret og administrer" fanen som befinder sig til sidst i applikationens hovedskærm, og efterfølgende navigere til og vælge "Importer fra fil". Har du flere forskellige konti oprettet i din SmartVision 3 skal du nu vælge hvilken konto du ønsker dine kontaktpersoner skal knyttes til. Find og vælg den VCF fil du ønsker at importere.

Opret kontaktperson

I Kontakt applikationen skal du navigere til og vælge knappen "Opret kontakt". Indskriv kontaktpersonens ønskede navn, telefonnummer, e-mail adresse eller hvad du ønsker skal knyttes til.

Du kan ved at aktivere elementet "Flere felter" få adgang til yderligere parametre om kontaktpersonen. Når du har udfyldt de ønskede felter skal du navigere til og vælge "Gem" knappen som befinder sig øverst i skærmbilledet.

Rediger en kontaktperson

I oversigten over dine kontaktpersoner i Kontakter applikationen, naviger til og vælg pågældende kontaktperson som du ønsker at redigere. Naviger nu til og vælg elementet "Rediger kontakt". Gennemfør de ønskede ændringer som var du i gang med at oprette en ny kontaktperson. Når du har udfyldt de ønskede felter skal du navigere til og vælge "Gem" knappen som befinder sig øverst i skærmbilledet.

Slet en kontaktperson

I oversigten over dine kontaktpersoner i Kontakter applikationen, naviger til og vælg pågældende kontaktperson som du ønsker at slette. Naviger til og vælg knappen "Flere valgmuligheder", efterfulgt af "Slet". Bekræft at du ønsker at slette ved at navigere til og vælge "Flyt til papirkurven". Slettede kontaktpersoner flyttes til papirkurven hvor de vil befinde sig i 30 dage før de automatisk slettes helt. For at slette en kontaktperson permanent skal du navigere til og vælge "Papirkurv", som du funder under "Ret og Administrer", og efterfølgende vælge "Slet permanent".

Slet alle kontaktpersoner

I Kontakter applikationen skal du navigere til og vælge knappen "Flere valgmuligheder" efterfulgt af "Vælg alle". Naviger til og vælg nu efterfølgende knappen "Slet", og bekræft ønsket ved at vælge "Flyt til papirkurven" elementet. Slettede kontaktpersoner flyttes til papirkurven hvor de vil befinde sig i 30 dage før de automatisk slettes helt.

Find en kontaktperson

I Kontakter applikationen har du et redigeringsfelt kaldet "Søg efter kontakter" hvor du kan indskrive et søgeterm. Listen over kontaktpersoner som du præsenteres for ændres i forhold til din indskrivning. Så snart den ønskede kontaktperson er fundet kan du trykke på OK tasten for at se yderligere detaljer.

Tilføj Kontaktperson som Favorit

Naviger til og vælg den kontaktperson du ønsker at tilføje som favorit. Når du har åbnet kontaktpersonen skal du navigere til og aktivere "Føj til favoritter" elementet.

Ring til en kontaktperson

Naviger til og vælg den kontaktperson du ønsker at ringe til. Når kontaktpersonens detaljer præsenteres for dig skal du navigere til og vælge "Opkald" elementet for at påbegynde opkaldet til kontaktpersonen.

Send en besked til en kontaktperson

Naviger til og vælg den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Når kontaktpersonens detaljer præsenteres for dig skal du navigere til og vælge "SMS" elementet for

at påbegynde en ny SMS besked, og du placeres automatisk i Beskeder applikationen i et redigeringsfelt.

Del en kontaktperson

I oversigten over dine kontaktpersoner i Kontakter applikationen, naviger til og vælg pågældende kontaktperson som du ønsker at dele. Når du har valgt en kontaktperson skal du navigere til og vælge elementet "Flere valgmuligheder", efterfulgt af Del - du kan nu ændre på hvilken information om den pågældende kontaktperson som du ønsker at dele, ligeledes vælge hvilken delingsmetode du ønsker at benytte (Beskeder, Bluetooth, Gmail og så videre).

Eksporter dine kontaktpersoner

I Kontakter applikationen skal du navigere til og vælge "Ret og administrer" fanen som befinder sig til sidst i applikationens hovedskærm, og efterfølgende navigere til og vælge "Eksporter til fil". Vælg en eller flere konti som du ønsker at eksportere kontaktpersoner fra. Bekræft eksporteringen ved at vælge elementet "Gem".

Drev

Introduktion

Drev applikationen er en standard applikation fra Google som giver dig mulighed for at opbevare og dele filer i din egen cloud. Gennemgå venligst vejledningen du finder ved at besøge linket herunder, for at lære mere om Google Drev applikationen: [Google Drev Link](#)

Meet

Introduktion

Standard applikationen Meet fra Google gør dig i stand til at foretage lyd- eller videoopkald over en internet forbindelse. Se venligst følgende Google Meet brugervejledning for mere information: [Google Meet Link](#)

Filer

Introduktion

Filer applikationen er en standard applikation fra Google som giver dig muligheden for at håndtere og optimere din SmartVision 3's hukommelse. Se venligst følgende Google Filer brugervejledning for mere information: [Google Filer Link](#)

FM Radio

Introduktion

FM Radio applikationen giver dig mulighed for at lytte til radiostationer på FM radiofrekvenser. For at lytte til radio ved brug af denne applikation skal du tilslutte kablede hovedtelefoner (der benyttes som antenne).

Lyt til radio

Benyt dine navigations taster for at navigere gennem de forskellige elementer som du har til rådighed:

- **Forrige station:** Lyt til en forrige radiostation.
- **Formidsk frekvens:** Justerer frekvensværdien nedad.
- **Føj til favorit:** Tilføjer den aktuelle radiostation som en Favorit station.
- **Forøg frekvens:** Justerer frekvensværdien opad.
- **Næste station:** Lyt til en næste radiostation.
- **Radiostationer:** Præsenterer dig for listen over tilgængelige radiostationer omkring dig.
- **Høretelefoner/Højttaler:** Skifter mellem at benytte hovedtelefoner og højttaleren.

- **Flere valgmuligheder:** Præsenterer dig for optagemuligheder.
- **Afspil / Stop FM Radio:** Her kan du sætte en afspilning på pause eller genoptage.

Du kan også gøre brug af følgende genveje:

- **Tast 1:** Førrige station.
- **Tast 2:** Åben / Luk vinduet med radiostationer i nærheden af dig.
- **Tast 3:** Næste station.
- **Tast 4:** Førrige frekvens.
- **Tast 5:** Indskriv manuelt en radiofrekvens.
- **Tast 6:** Næste frekvens.
- **Tast 7:** Førrige Favorit Radiostation.
- **Tast 8:** Start / Stop Radiooptagelse.
- **Tast 9:** Næste Favorit Radiostation.
- **Tast 0:** Afspil / Pause.
- **Stjerne Tast:** Tilføj aktuelle radiostation som Favorit.

Gmail

Introduktion

Gmail applikationen er en standard Google applikation som gør dig i stand til at sende og modtage e-mails. Gennemgå venligst den følgende Google brugervejledning for at håndtere Gmail applikationen fuldt ud: [Google Gmail Link](#)

Konfiguration af din konto

E-mail applikationen understøtter stort set alle e-mail tjenester. Du vil under alle omstændigheder have behov for en internet forbindelse (Wi-Fi, 3G eller 4G). Når du starter "Gmail" applikationen for første gang er du nødsaget til at tilføje en e-mail konto. Vælg elementet "Tilføj en e-mail adresse" og angiv typen af kontoen, og følg herefter vejledningen som du præsenteres for.

Læs en e-mail

Når du har konfigureret din e-mail konto og den er forbundet kan du bruge navigations tasterne til at gennemgå din indbakke. Tryk på OK tasten for at åbne en valgt e-mail og du vil have mulighed for at gennemgå dens indhold.

Åben en vedhæftet fil

Vælg den e-mail i din indbakke med en vedhæftet fil som du ønsker at læse, ved at benytte OK tasten. Naviger nedad i selve e-mailen indtil du lander på den vedhæftede fil. Tryk på OK tasten for at tilgå den vedhæftede fil eller "Gem" for at hente filen ned og gemme den på din SmartVision 3 enhed.

(Bemærk venligst at nogen vedhæftede filer kan kræve installation af tredjepartsapplikationer før du kan gennemse den / de på din SmartVision 3).

Skriv en e-mail

Når du er placeret i din indbakke skal du navigere til og vælge knappen "Skriv" og herefter indskrive tekst i de enkelte felter (Modtager, Emnefelt, Beskedens indhold). Så snart du har skrevet din e-mail skal du navigere til toppen af skærbilledet til du lander på "Send" knappen.

Besvar en e-mail

Naviger til og vælg den e-mail i indbakken som du ønsker at besvare. Vælg nu elementet "Svar" som du finder i skærbilledet. Så snart du har skrevet din e-mail skal du navigere til toppen af skærbilledet til du lander på "Send" knappen.

Slet en e-mail

Naviger til og vælg den e-mail i indbakken som du ønsker skal slettes. Naviger til og vælg nu "Slet" som du finder i skærmbilledet.

Google

Introduktion

Google applikationen gør det muligt for dig at benytte Googles egen søgemaskine til at søge efter information på internettet. En brugervejledning til applikationen Google kan du finde under følgende link: [Google Link](#)

Google TV

Introduktion

Google TV applikationen er en standard applikation fra Google som tilbyder dig at købe og leje film. Gennemgå venligst følgende link for at lære mere om Google TV: [Google TV Link](#)

KAPTEN GPS

Introduktion

KAPTEN GPS applikationen er primært et navigations system designet specifikt til personer med et synshandicap. Det er afhængig af satellit-positions systemet (GPS) til at gøre din rejse nemmere og styrker din mobilitet takket være dens indholdsrigge funktioner såsom geo lokalisering, navigation og kort udforskning. Ydermere gør KAPTEN GPS det muligt for dig at gemme dine foretrukne interessepunkter og guide dig til dem når som helst. Disse interessepunkter kaldes K-Tags. En unik funktion med KAPTEN GPS er at så snart du har downloadet et kort til din SmartVision 3 kan du benytte det helt uden brug af en dataforbindelse, hvilket er en fordel når du eksempelvis er på ferie i udlandet.

Ansvarsfraskrivelse

KAPTEN GPS applikationen er et navigerings assisterende system baseret på SmartVision 3's positions system beregnet til fodgængere, der også kan benyttes i eksempelvis bil. Under en navigerings session, respekter venligst alle advarsler beskrevet herunder. Uanset hvordan du rejser bør navigationsanvisningerne givet af KAPTEN GPS applikationen være sekundære og ikke frigøre dig fra at overholde alle færdselsregler samt opføre dig ansvarligt i trafikken. Din fokus skal primært ligge hos dine omgivelser. Vær beredt og opmærksom på hele din rejse og respekter andre trafikanter, hvad end det er fodgængere, cyklister, motorcyklister eller bilister. Slutligt, brug din sunde fornuft før du adlyder og følger en navigerings instruktion fra KAPTEN GPS applikationen. Vær opmærksom på alle skilte og anvisninger samt fortove og gadernes geometri. Såfremt du er ude af stand til at udføre den direction du har modtaget fra KAPTEN GPS applikationen vil den automatisk lave en ny rutevejledning fra din nye position. Bemærk venligst at dette produkt er afhængigt af positions systemet på din smartphone. Den præcise bestemmelse af din position bygger på GPS signalet og dets styrke, hvilket er yderst afhængigt af dine omgivelser, hvor du befinder dig, hvordan du opbevarer din smartphone samt også detaljegraden af data i de digitale kort. Som et resultat herom kan KAPSYS ikke garantere at instruktioner du modtager fra navigations systemet er præcise.

KAPTEN GPS applikationen er ikke tilgængelig førend GPS funktionen er aktiveret. Såfremt GPS ikke er aktiveret vil du blive bedt om at aktivere denne ved opstart af applikationen.

Download af kort

Som standard er der ikke installeret kort på din SmartVision 3 og du er derfor nødsaget til at downloade et eller flere ønskede kort ved brug af en internet forbindelse. Vælg det land / kort som du ønsker at installere fra oversigten og tryk på "OK" knappen for at påbegynde download

processen. Så snart download processen er fuldført vil KAPTEN GPS kræve en genstart af applikationen for at kunne installere det nye kort.

Godt at vide: Dine downloadede kort gemmes som standard i den interne hukommelse på din SmartVision 3. Du kan dog ændre denne placering af dine downloadede kort ved at navigere til "Kort håndtering" elementet under applikationens indstillinger.

Navigations Tilstande

Hovedskærmen af din KAPTEN GPS applikation består af forskellige navigations tilstande:

- **Navigation for fodgænger:** Resulterer i at du får den mest optimerede information i forhold til at være fodgænger.
- **Bil Navigation:** Giver dig den mest optimerede information i forhold til at være i et køretøj.
- **Direkte Navigation:** Benyttes til at guide dig mod en destination uden brug af det faktiske vejnet ved at give dig afstands- og retningsinformationer relateret til bestemmelsespunktet.
- **Udforskning af kort:** Benyttes til at aflæse kortet og navigere dig fra kryds til kryds samt give dig en beskrivelse af disse.
- **K-tags:** Her kan du oprette, ændre og slette dine egne K-Tags.
- **Fodgænger Ruteoptagelse:** Med denne funktion kan du optage dine egne ruter og gentage dem senere hen.
- **Fri Navigation:** Med fri navigation aktiveret kan du få øjeblikkelige beskrivelser af dine omgivelser.

Fodgænger og bil navigation

Uanset hvilken navigationstilstand du har angivet skal du nu vælge en destination ud fra nedenstående valgmuligheder:

- **Ny adresse:** Herunder får du mulighed for at angive en specifik adresse som du ønsker direktioner til. To forskellige muligheder for at indskrive data tilbydes:
 - **Stemmeinput:** Med Stemmeinput kan du angive adressen ved at gøre brug af indtaling. Når du lander på adressefeltet skal du blot trykke og holde på Stemmekommando knappen for at indtale adressen. (En internet forbindelse er nødvendig). KAPTEN GPS vil herefter frembringe en liste over sandsynlige adressekandidater som er tilsvarende den indtalte, vælg den der matcher og en rutevejledning vil starte for den angivende destination.
 - **Tekstinput:** Her kan du indskrive den specifikke adresse ved at gøre brug af SmartVision 3's alfanumeriske tastatur, og har følgende format: Land, bynavn, vejnavn og husnummer. Når du har udfyldt de forskellige felter for din ønskede destination skal du trykke op "OK" knappen for at bekræfte. Du kan benytte navigations tasterne når du ønsker det til at navigere gennem listen over forslag som passer til din indskrivning. Naviger til en af adresserne på din SmartVision 3 og ruteberegningen vil starte automatisk.
- **Ny adresse via postnummer:** Angiv byen på din destination ved at indskrive postnummeret efterfulgt af vejnavn og husnummer.
- **Seneste destinationer:** Vælg destinations adressen fra listen over "Seneste destinationer". Du kan også rydde hele listen over dine seneste destinationer, hvilket gøres under Indstillinger - se venligst afsnittet "Indstillinger" i denne vejledning.
- **K-Tag:** Vælg denne kategori og efterfølgende det ønskede K-Tag som du ønsker at navigere til. For yderligere information omkring K-Tags og hvordan du administrerer disse, se venligst under afsnittet "K-Tags".
- **Interessepunkt:** Denne funktion giver dig adgang til at vælge et interessepunkt (POI):
 - Under kategorien i nærheden af din "aktuelle beliggenhed".
 - Under kategorien i nærheden af en "ny adresse".
 - Under kategorien i nærheden af en "ny adresse".

- **Rejseplan:** Angiv en start adresse og destinations adresse og KAPTEN GPS vil generere den bedste rute ud fra dine angivelse og valgte navigerings metode. Den beregnede rute vil blive beskrevet som en vejbog. Gennemse din rejseplan ved brug af dine navigerings taster og lyt til navigerings instruktionerne for netop din rejse.

Under navigation

Navigationsinformation præsenteres visuelt i skærbilledet og annonceres samtidigt for dig. Benyt de fysiske taster på dit tastatur for at få yderligere information når du er i gang med en rute:

- **Tast 0:** Pause / Genoptag vejledning.
- **Tast 1:** Hvor er jeg?
- **Tast 2:** Seneste rejseinstruktion.
- **Tast 3:** Næste rejseinstruktion.
- **Tast 4:** Aktuel hastighed.
- **Tast 5:** Hastighedsbegrænsning.
- **Tast 6:** Afstand tilbage.
- **Tast 7:** Interessepunkter i nærheden.
- **Tast 8:** Aktivering / Deaktivering af fri navigation.
- **Tast 9:** GPS signal status.

Yderligere funktioner er tilgængelig under "Menu" tasten, og de er som følger:

- **Næste rejseinstruktion:** Annoncerer den næste instruktion.
- **Seneste rejseinstruktion:** Gentager den forrige instruktion.
- **Aktuelle destination :** Annoncerer den angivende destination.
- **Tilbageværende distance:** Annoncerer den afstand der er tilbage til din destination.
- **Ankomsttid:** Annoncerer ankomsttidspunktet.
- **Aktuelle navigations tilstand:** Giver dig den aktuelle tilstand du rejser i.
- **Skift til fodgænger tilstand:** Her kan du nemt skifte til fodgænger tilstand uden at skulle starte navigationen forfra.
- **Skift til Tag bilen tilstand:** Her kan du nemt skifte til biltilstand uden at skulle starte navigationen forfra.
- **Rejseplan:** Aktiver og få overblik over din rejseplan mens du navigerer.
- **Stop navigation:** Stop din aktuelle navigation.
- **Flere indstillinger:** Aktiverer menuen med forskellige parametre.
- **K-Tag:** Tilgår K-Tag menuen.
- **GPS Signal:** Giver dig signalstyrken for GPS signalet.
- **Hvor er jeg?:** Annoncerer din aktuelle position.
- **Aktuelle position:** Annoncerer henholdsvis længde- og breddegrader i minutter og sekunder samt højdeinformation i meter.
- **Aktiver Fri Navigation:** Funktionen Fri Navigation aktiveres.
- **Deaktiver Fri Navigation:** Funktionen Fri Navigation deaktiveres.
- **Hastighedsbegrænsning:** Annoncerer den aktuelle hastighedsbegrænsning på vejen.
- **Aktuelle hastighed :** Annoncerer din aktuelle rejsehastighed.
- **Interessepunkter:** Vil præsentere dig for alle de interessepunkter under alle kategorier der er i nærheden af dig.
- **K-Tags tæt på mig:** Giver dig alle K-Tags som befinder sig i dit nærområde.
- **Lydløs Talesyntese:** Pause og / eller genoptag talende vejledning

Direkte navigation

Med "Direkte navigation" funktionen får du real-time information omkring afstanden og retningen til den ønskede destination. Disse informationer er genereret ud fra den absolut korteste afstand

mellem de to punkter og tager ikke højde for det eksisterende vejnet. Denne navigerings funktion er specielt brugbar når du skal navigere til et punkt der ikke er placeret på en vej.

Advarsel: Den information du modtager er udelukkende for din bekvemmeligheds skyld og der bliver IKKE taget højde for stedets topografi (stedbeskrivelse) og eventuelle farer som du kan komme ud for på ruten, såsom vandløb, broer, barrierer eller lignende forhindringer. KAPSYS fraskriver sig ethvert ansvar og vil ikke være erstatningspligtige for direkte eller indirekte skader ved følge af brug af denne funktion.

"Direkte navigation" tilstanden vil give dig information om følgende:

- Kardinalretning fra destinationen fra din aktuelle position, for eksempel Nord, Nord-Øst, Øst, Syd-Øst, Syd, Syd-Vest, Vest og Nord-Vest.
- Afstanden fra din aktuelle position til destinationen, i meter eller kilometer.
- Direktioner du skal udføre for at komme til din destinationer. Denne information angives i timer ved at benytte positionen på et klokkeslæt, fra 1 til 12 timer og baseres på din sidst kendte position..

Når "Direkte navigation" funktionen er aktiveret vil kardinal retning og kurs blive annonceret regelmæssigt.

Eksempel på en "Direkte navigations" informations frase: "Ankomststed, Nordvest om 250 meter, venligst gå til højre: dit ankomststed er om 250 meter i en Nordvestlig retning, du skal til højre.

Advarsel: Bemærk venligst at KAPTEN GPS applikationen kun vil beregne din rute yderligere hvis du er i bevægelse. Hvis du ikke er i bevægelse vil KAPTEN annoncere den forrige og næste direktion. Applikationen vil endvidere give beskeden "Ingen navigations oplysninger" når den ikke har mulighed for at anvis pålidelige informationer om retningen der skal følges. Bemærk venligst at "Direkte navigation" ikke stopper automatisk efter du er ankommet til din endelig destination; du skal benytte "Tilbage" knappen for at stoppe anvisninger.

Godt at vide: "Direkte navigation" indstillingerne (se Parametre) kan bruges til at definere gentagelses frekvensen af anvisningerne eller til at aktivere eller deaktivere "Direkte navigation" funktionen efter selve navigationen.

Udforskning af kort

Denne Udforskning af kort funktion gør dig i stand til at aflæse og lære omgivelser ved virtuelt at navigere og springe i et kort og fra vejkryds til vejkryds og samtidigt på information herom. Vælg hvorfra du ønsker at starte og tage udgangspunkt:

- **Aktuelle position:** Starter aflæsningen på kortet ud fra din aktuelle lokalisation.
- **Ny adresse:** Starter aflæsningen og derved udforskningen fra en ny adresse.
- **Ny adresse via postnummer:** Samme, starter ud fra en adresse ud fra postnummer.
- **Seneste destinationer:** Start aflæsningen fra en af dine seneste destinationer.
- **K-Tag:** Starter aflæsningen ud fra et af dine egne K-Tags.
- **Interessepunkt:** Eller udforsk ud fra et interessepunkt.

Så snart du har angivet et udgangspunkt kan du vælge i hvilken retning du ønsker at starte fra ud fra oversigten, benyt "OK" tasten. Din KAPTEN GPS applikation vil herefter annoncere navnet på vejen og det næste vejkryds. Vælg igen retning og det næste vejkryds med dine fysiske knapper og tryk på OK tasten for at bekræfte retningen. På denne måde kan du altså udforske området rundt om den angivne adresse og følge veje så du kan lære deres placering at kende i forhold til hinanden.

Fodgænger ruteoptagelse

Med Fodgænger ruteoptagelse funktionen bliver du i stand til at optage en rute eller en rejse som du kan følge igen senere.

Aktiverer du elementet bliver du præsenteret for følgende:

- Start ruteoptagelse
- Afspil ruteoptagelse
- Rediger ruteoptagelse.
- Slet ruteoptagelse.

Start ruteoptagelse

Vælg elementet "Start ruteoptagelse" og tryk på OK tasten for at starte en optagelse af din rute. Din GPS position registreres regelmæssigt i intervaller og på den måde lagre din rejse. Tryk på Tilbage tasten for at stoppe optagelsen. Når din optagelse er fuldført kan du altid ændre navnet på ruteoptagelsen for senere hen nemmere at kunne finde den igen. Som standard vil navnet på din ruteoptagelse blive prædefineret som: rute + dato + tidspunkt.

Godt at vide: Det er ikke muligt at foretage ruteoptagelser udenfor lokaliserede kort. Det betyder altså at du skal følge registrerede veje og stier - går du udenfor kortet vil KAPTEN GPS stadig følge vejen der ligger tættest på din position.

Advarsel: Optagelse af en rute betragtes som en navigations tilstand og det er ikke muligt at udføre en anden navigation på samme tid.

Afspil ruteoptagelse

Vælg elementet "Afspil ruteoptagelse" og aktiver den rute du ønsker at følge. Dine ruter præsenteres i kronologisk rækkefølge. Så snart du har aktiveret en rute kan du følge den specifikke rejsen enten på samme måde som da du optog den eller i den modsatte retning.

Rediger ruteoptagelse

Naviger til og vælg elementet "Rediger ruteoptagelse" og vælg den rute som du ønsker at redigere.

Angiv et navn på din ruteoptagelse og bekræft med OK tasten.

Slet ruteoptagelse

Naviger til og vælg "Slet ruteoptagelse" og slet den rejse du ønsker.

K-Tags

Din KAPTEN GPS applikation har en K-Tag funktion som gør dig i stand til at sætte knappenåle på en specifik lokalisation og tildele relevant information så du nemt kan finde den igen. K-Tags er som udgangspunkt beregnet til at være destinationer som du navigerer til. Ydermere kan du få annonceret K-Tags i nærheden mens du er i fri navigation.

Et K-Tag er en geografisk knappenål der består af følgende elementer:

- En geografisk lokalisation eller en adresse
- Et navn
- En kategori

Aktiverer du elementet bliver du præsenteret for følgende:

- Opret et K-Tag
- Rediger et K-Tag
- Slet et K-Tag

Opret et K-Tag

Fra "Administrer K-Tags" skærmbilledet skal du navigere til og vælge "Opret K-Tag" og efterfølgende vælge en af følgende elementer ud fra listen:

- **Aktuelle lokalisering:** Giver dig mulighed for at oprette et nyt K-Tag ud fra din aktuelle placering.
- **Ny adresse:** Opret et K-Tag på en specifik adresse.
- **Koordinater:** Her opretter du K-Tags ud fra geografiske koordinater for længde- og breddegrader (med grader i decimaltal).

Når du har angivet en af ovenstående får du mulighed for at give dit K-Tag et specifikt navn. Som standard vil adressen på K-Tag'et blive angivet som navnet også. Når du har angivet dit eget navn på K-tag'et eller accepteret det prædefinerede skal du navigere til Bekræft elementet og trykke på OK tasten og du kan fortsætte. Du kan nu tildele dit K-tag til en kategori. Her følger en liste over de forskellige kategorier:

- Favoritter.
- Kontaktpersoner.
- Hoteller og Restauranter.
- Transport.
- Sundhed.
- Service.
- Shopping.
- Fritid.
- Turisme.
- Sport.
- Biler og Motorcykler.
- Diverse.

Ændring af K-Tag

Fra "Administrer K-Tag" hovedskærmen skal du navigere til og vælge "Ændre K-Tag" og herefter gå til den K-Tag kategori som du ønsker skal ændres. Vælg dit K-Tag og du kan ændre på "Kategori" eller "Omdøb K-Tag".

Vælg en af mulighederne ud fra den ændring du ønsker at udføre.

Slet et K-Tag

Igen skal du fra "Administrer K-Tag" skærbilledet navigere til og vælge "Slet K-Tag" og herefter aktivere den kategori hvori det K-Tag du ønsker at slette befinder sig.

Fri navigation

Med fri navigation kan du få information om dine omgivelser i real-time. Når funktionen er aktiveret vil KAPTEN GPS applikationen annoncere aktuelle vejnavn og beskrive det næste kryds for dig. Når du nærmer dig et vejkryds, beskriver din KAPTEN GPS applikationen det ved at give navne på vejene i krydset. Når du kommer forbi krydset får du information om den næste vej som du har retning i mod. Som standard aktiveres fri navigation hver gang du starter en ny rutevejledning. Du kan dog aktivere eller deaktivere indstillingen som du ønsker det fra KAPTEN GPS applikationens skærbillede eller ved at benytte Menu tasten.

Du kan eksempelvis indstille:

- Annonceringen af brugbare K-Tags eller interessepunkter i nærheden
- Automatiske gentagelse af Fri navigation annonceringer

Se venligst yderligere informationer herom under afsnittet "Indstillinger" i denne vejledning for KAPTEN GPS applikationen.

Flere indstillinger

Denne sektion beskriver hvordan du kan konfigurere din KAPTEN GPS applikation. For at få adgang til de forskellige muligheder skal du trykke på Menu tasten og vælge "Indstillinger"

elementet. De forskellige indstillinger og elementer i din KAPTEN GPS applikation er placeret i forskellige kategorier.

- **System:** Her kan du ændre på system indstillinger.
- **Kort:** Download, opdater og slet kort og vælg placering i hukommelsen.
- **Navigation for fodgænger:** Herunder kan du ændre indstillinger som er relateret til navigation i fodgænger tilstand.
- **Navigation for bil:** Herunder kan du ændre indstillinger som er relateret til navigation ved rejse i bil.
- **Fri navigation:** Ændre på dine indstillinger relateret til fri navigation.
- **Direkte Navigation:** Ændre på dine indstillinger relateret til direkte navigation.

Systemindstillinger

- **Måleenhed:** Enhed for afstand og hastighed under navigation (metrisk eller miles).
- **Slet dine seneste destinationer:** Fjerner alle adresserne under de seneste destinationer.
- **Gendan indstillinger til standard:** Her kan du vælge at gendanne indstillinger og vende tilbage til den oprindelige konfiguration af KAPTEN GPS applikationen.

Kortadministrering

- **Download kort:** Her kan du hente nye kort ned til din KAPTEN GPS applikation.
- **Opdater kort:** Herunder opdateret du kort som du allerede har installeret.
- **Hukommelse:** Her kan du selv angive hvor du ønsker at dine kort skal placeres (intern hukommelse eller SD kort).

Navigation for fodgænger Indstillinger

- **Gentag automatisk instruktioner:** Definer gentagelsessekvensen mellem annonceringer ved navigation (Aldrig, 30 sekunder, 1 minutter, 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter).
- **Angivelse ved urskive metode:** Aktiverer eller deaktiverer klokkeslæt angivelser relateret til manøvrer.

Bil Navigation Indstillinger

- **Indstillinger for ruten:** Juster på hvordan ruter skal beregnes (hurtigst eller kortest).
- **Benyt motorveje:** Specificerer anvendelsen af motorveje ved beregning af rute.
- **Tillad betalingsveje:** Specificerer brugen af betalingsveje ved beregning af rute.
- **Gentag automatisk instruktioner:** Definer gentagelsessekvensen mellem annonceringer ved navigation (Aldrig, 30 sekunder, 1 minutter, 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter).

Fri Navigation Indstillinger

- **Annonceringer af interessepunkter:** Her kan du vælge og filtrere kategorier som du ønsker annonceret under Interessepunkter ved brug af fri navigation, når du befinder dig i nærheden.
- **Annoncering af K-Tags:** Gør det muligt for dig at vælge og filtrere dine K-Tag kategorier som skal annonceres når du benytter fri navigation funktionen og når disse er i nærheden.
- **Annonceringstyper:** Her kan du definere annonceringsmetoden som vil blive benyttet så snart et interessepunkt eller et K-Tag registreres i nærheden af din aktuelle position (Lydindikationer, Lydannonceringer eller Ingen annonceringer).
- **Retningsbestemt information:** Aktiverer eller deaktiverer den retningsbestemte (kardinal) annoncering af den aktuelle vej.
- **Gentag instruktioner:** Definer gentagelsessekvensen mellem annonceringer ved navigation (Aldrig, 30 sekunder, 1 minutter, 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter).

Direkte Navigation Indstillinger

- **Gentag automatisk instruktioner:** Definer gentagelsessekvensen mellem annonceringer ved navigation (Aldrig, 30 sekunder, 1 minutter, 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter).

- **Direkte anvisninger når ankomststedet er nået:** Aktivering og deaktivering af automatisk skifte til Direkte anvisning ved slutningen af fodgænger- eller bilnavigation.

Lysdetektering

Introduktion

Med Lysdetektering applikationen kan du benytte din SmartVision 3's kamera til at afgøre hvor meget belysning der er omkring dig.

Detekter lysniveau

Peg med bagsiden af din telefon hen mod et område som du ønsker detekteret. Din SmartVision 3 vil annoncere lysniveauet i procent. Jo højere et procenttal jo mere intenst et lyssniveau. Derimod, er procentniveauet lavt, jo lavere belysning.

Godt at vide: Du kan ændre på hvordan du ønsker lyssniveauet annonceret ved at benytte Menu tasten (Procent eller Lyd). Du kan også skifte mellem de to metoder ved at trykke på tast 1.

Lookout

Introduktion

Lookout applikationen er en standard Google applikation som giver dig mulighed for at genkendelse af objekter og tekst gennem kameraet i din SmartVision 3. For at lære meget mere om Google Lookout, besøg venligst følgende link: [Google Lookout Link](#)

Forstørrelse

Introduktion

Forstørrelse applikationen gør dig i stand til at forstørre tekst og dokumenter og derved tilpasse sig til dit visuelle behov. Applikationen tilbyder dig forskellige forstørrelses niveauer og kontraster via det bagud vendte kamera.

Forstør tekst

Placer din SmartVision 3 over den tekst du ønsker at forstørre og juster højden af telefonen indtil teksten står skarpt. Benyt tasterne 2 eller 3 på det fysiske tastatur til at forøge eller mindske forstørrelses niveauet.

Andre tilgængelige funktioner:

- **OK Tast:** Giver dig mulighed for at fokusere kameraet.
- **Tast 1:** Forøg eller mindst niveauet af lys.
- **Stjerne Tast:** Fryser skærbilledet.
- **Tast 0:** Tager et screenshot (skærbillede) og gemmer det i galleriet.
- **Firkant Tast:** Vælg mellem ni forskellige kontraster.

Ovenstående muligheder er også tilgængelige ved at benytte Menu tasten.

Godt at vide: Dine valg og indstillinger som du gennemfører vil automatisk blive gemt når du lukker applikationen.

Maps

Introduktion

Maps applikationen er en standard Google applikation som giver dig mulighed for at navigere ved brug af GPS. Gennemgå venligst følgende link for at komme til Googles Maps vejledning: [Google Maps Link](#)

Beskeder

Introduktion

Applikationen Beskeder er en standard applikation fra Google som gør dig i stand til at modtage og afsende SMS eller MMS beskeder. Du finder en udførlig vejledning til Google Beskeder applikationen ved at følge dette link: [Google Beskeder Link](#)

Send en ny besked

Naviger til og vælg "Start chat" direkte fra Hovedskærmen af applikationen. I redigeringsfeltet "Til" skal du angive navnet, telefonnummer eller e-mail adresse på den eller de mennesker som du ønsker skal modtage din besked. Efterfølgende skal du indskrive din besked og dernæst navigere til og vælge knappen "Send SMS" som du finder ved at navigere nedad.

Læs og besvar en besked

Direkte fra Hovedskærmen af din Beskeder applikation skal du benytte dine navigations taster til at navigere gennem dine beskeder. Når du navigerer ned gennem de forskellige tråde er det kun den seneste besked der vil blive læst for dig. Tryk på OK tasten for at åbne en samtale og få mulighed for at besvare din samtalepartner. I en samtaletråd kan du også benytte dine navigations taster til at gennemse historikken og finde ud af hvad I tidligere har skrevet om.

Videresend en besked

Fra Hovedskærmen af Beskeder applikationen skal du benytte navigations tasterne til at navigere til den samtaletråd som indeholder beskeden som du ønsker at videresende. Naviger til beskeden i samtalen og tryk og hold på OK tasten så du hører annonceringen "Beskeden valgt". Du får nu flere muligheder, naviger til elementet "Flere samtalemuligheder" efterfulgt af "Videresend". Vælg den kontaktperson der skal modtage beskeden og vælg "Send".

Slet en besked fra en samtale

Fra Hovedskærmen af Beskeder applikationen skal du benytte navigations tasterne til at navigere til den samtaletråd som indeholder beskeden som du ønsker at slette. Naviger til beskeden i samtalen og tryk og hold på OK tasten så du hører annonceringen "Beskeden valgt". Spring til elementet Slet.

Slet en samtale

Fra Hovedskærmen af Beskeder applikationen skal du navigere til den samtale du ønsker at slette og så trykke og holde på OK tasten. Naviger til og vælg "Slet" elementet.

NFC

Introduktion

NFC teknologien, som står for Near Field Communication, er en simpel og intuitiv teknologi der gør dig i stand til at benytte din SmartVision 3 til trådløst kommunikation med andre enheder. Din SmartVision 3 NFC applikation fungerer med NFC kompatible tags. Der medfølger fem NFC tags sammen med din SmartVision 3. Disse NFC tags kan programmeres til at indeholde personlige informationer såsom en tekststreng, en stemmeoptagelse, telefonnummer eller en indstilling. Dette gør det eksempelvis muligt for dig at genkende objekter, finde en mappe, blive husket på den rette dosering for medicin, ringe automatisk til en kontaktperson, aktivere eller deaktivere Bluetooth og mange flere ting.

NFC applikationen giver dig mulighed for at gemme information placeret i disse tags direkte via din SmartVision 3 telefon, nemt og hurtigt. Så snart du har programmeret et NFC Tag er det eneste du skal gøre næste gang at placere din telefon over NFC tag'et for at få annonceret informationen tilskrevet NFC tag'et eller starte den handling som er blevet tilskrevet. Du skal altså derfor først tilskrive den ønskede information til et NFC tag via din SmartVision 3, med NFC applikationen.

Skriv til et NFC tag

Vælg den information du ønsker for at programmere et NFC tag. De forskellige muligheder er:
SmartVision 3 - Brugervejledning

- **Opkald:** Med denne funktion kan du tilskrive et telefonnummer med en kontaktperson til at påbegynde et opkald.
- **Profilindstillinger:** Giver dig mulighed for at associere et NFC tag til forskellige indstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, Flytilstand, Ringetone), hvor disse aktiveres eller deaktiveres.
- **Applikation:** Her kan du tilskrive et tag til en applikation og starte denne automatisk.
- **Internet bogmærke:** Med denne funktion kan du associere et NFT tag med et internet link so derved vil åbne din browser og gå til linket direkte.
- **Tekst:** Giver dig mulighed for at tilegne et NFT tag til en tekststreng og få den læst.
- **Indstil Wi-Fi:** Du kan tilegne et NFC tag til et Wi-Fi Netværks indstilling (Navnet (SSID) samt adgangskode) for at forbinde til det.
- **Stemmeoptagelse:** Giver dig mulighed for at tilskrive en stemmeoptagelse og ved scanning af NFC tag'et få den afspillet.

Så snart informationen er blevet angivet skal du navigere til og vælge "Skriv tag". Tag herefter din SmartVision 3 og placer den over tagget for at skrive den pågældende information. Et lydssignal vil fortælle dig at informationen er skrevet til tagget.

Så snart tagget er blevet skrevet med information kan du tage NFC tagget og klister det på en overflade som passer til handlingen / informationen (mappen, medicinboksen, på undersiden af spisebordet og så videre - kun fantasien sætter grænserne).

Godt at vide: NFC Tags kan genbruges. Programmerer du ny information eller en ny handling til et NFC tag vil du blot overskrive den eksisterende information / handling.

Godt at vide: SmartVision 3 er kompatibel med enhver type NFC Tag. Der findes forskellige tag størrelser med varierende mængde hukommelse. De NFC Tags der følger med din SmartVision 3 er NTAG 216 på i alt 888 bytes. Det svarer til omkring 400 tegn for tekst meddelelser.

Læs et NFC tag

Det er ikke nødvendigt at åbne NFC applikationen på din SmartVision2 telefon for at aflæse et NFC tag. Du skal sørge for at den er aktiveret, så placerer du blot bagsiden af din SmartVisio2 telefon oven over et NFC tag. Din telefon vil automatisk påbegynde kommunikationen med selve tagget og udføre den bagvedliggende handling som beskrevet ovenfor.

Noter

Introduktion

Noter applikationen giver dig mulighed for at oprette, læse, redigere og slette egne noter i tekstformat.

Opret en note

Vælg elementet "Opret ny note" i toppen af skærbilledet efter du har startet applikationen. Indskriv din ønskede tekst og benyt Pil Ned til du lander på Bekræft elementet, efterfulgt af OK tasten. Den gemte note er nu tilgængelig ude i oversigten og kan læses fra hovedskærmen i applikationen. Dine noter vil blive præsenteret i kronologisk rækkefølge, med den seneste note øverst i listen.

Læs en note

Fra Hovedskærmen af applikationen skal du navigere til den note du ønsker at læse. Dine noter er opstillet med den nyeste note placeret øverst. Tryk på OK tasten for at tilgå den mere avancerede læsemulighed. Avanceret tilstand giver dig mulighed for at benytte tasterne på dit fysiske tastatur til at gennemgå din note:

- **Tast 0:** Sæt læsningen på pause og genoptag igen.
- **Tast 1:** Med denne tast kan du læse tegnet til venstre for din markørs position.

- **Tast 2:** Læs tegnet til højre for din markørs aktuelle position.
- **Tast 4:** Læs ordet til venstre for din markørs placering.
- **Tast 5:** Læs ordet til højre for din markørs placering.
- **Tast 7:** Giver dig mulighed for at læse sætningen til venstre for din markørs placering.
- **Tast 8:** Læs sætningen til højre for din markørs placering.
- **Stjerne Tast:** Med denne tast springer du direkte til begyndelsen af en note.
- **Firkant Tast:** Her springer du direkte til slutningen af en note.

De muligheder du ellers har finder du under Menu tasten:

- **Rediger:** Med denne kan du begynde at redigere din note.
- **Kopier alt:** Kopier hele indholdet af din note.
- **Slet:** Med dette element sletter du din note.
- **Eksporter:** Giver dig mulighed for at lave en kopi af din note som placeres i den interne hukommelse i din SmartVision 3, i mappen "Note".

Rediger en note

Fra Hovedskærmen af applikationen skal du navigere til den note du ønsker at ændre. Tryk og hold på OK tasten for at åbne kontekst menuen og naviger til og vælg "Rediger" elementet. Du kan nu redigere indholdet af din note. Indskriv din ønskede tekst og benyt Pil Ned til du lander på Bekræft elementet, efterfulgt af OK tasten.

Slet en note

Fra Hovedskærmen af applikationen skal du navigere til den note du ønsker at slette. Tryk og hold på OK tasten for at åbne kontekst menuen og naviger til og vælg "Slet" elementet. Bekræft at du ønsker at slette noten ved at navigere til "Bekræft" elementet og tryk OK. Du kan også navigere til noten du ønsker at slette og så trykke på Slet tasten.

Slet alle noter

Fra Hovedskærmen af din Noter applikation skal du trykke på Menu tasten og efterfølgende navigere til "Slet alle" elementet, og så trykke OK. Bekræft at du ønsker at slette alle dine noter ved at navigere til "Bekræft" elementet og tryk OK.

Søg efter en note

Fra Hovedskærmen af din Noter applikation skal du trykke på Menu tasten og efterfølgende navigere til "Søg" elementet, og så trykke OK. Indskriv tegn og / eller ord i redigeringsfeltet og tryk på OK tasten for at påbegynde søgningen. Benyt dine navigations taster for at gennemse resultaterne.

Fotos

Introduktion

Fotos er en standard applikation fra Google som du kan bruge til at gennemse dine egne billeder og videoer, som du har taget med din SmartVision 3. Vil du lære mere om Fotos applikationen kan du besøge følgende link: [Google Fotos Link](#)

Play Butik

Introduktion

Med Play Butik applikationen, som er en standard applikation fra Google, kan du downloade nye tredjeparts applikationer og opdatere dem der allerede er installeret i din SmartVision 3. Du kan lære mere om Googles Play Butik applikation ved at gennemgå brugervejledningen som du finder ved at besøge følgende link: [Play Butik Link](#)

QuickSupport

QuickSupport applikationen er en applikation produceret af TeamViewer. Med denne applikation kan du i en midlertidig periode lade andre håndtere og styre din SmartVision 3, som måtte have TeamViewer på deres computer. Gennemgå venligst supportområdet hos TeamViewer for at lære mere om hvordan det fungerer: [TeamViewer/QuickSupport link](#)

SOS

Introduktion

SmartVision 3 er udstyret med en SOS funktion som giver dig muligheden for at udføre geolokaliserede nødopkald eller beskeder til prædefinerede kontaktpersoner (Maksimalt 10).

Advarsel: KAPSYS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af manglende funktionalitet af alarm (SOS) funktionen, hvad enten det skyldes et teknisk problem i apparatet eller som følge af at der ikke er noget mobilt netværk tilgængeligt.

Aktivering / Deaktivering af SOS Funktionen

Takker være SOS applikationen kan du opsætte en automatisk informerings funktionalitet ved nødsituationer, eksempelvis via opkald, SMS beskeder eller begge, til personer du selv har angivet.

Bliver det nødvendigt for dig at aktivere SOS funktionen skal du trykke og holde på Tænd / Sluk knappen som du finder øverst oppe på din SmartVision 3, og efterfølgende navigere til og vælge "SOS" elementet i skærbilledet. Tryk og hold Tilbage knappen hvis / når du ønsker at afbryde SOS funktionen.

Godt at vide: Et advarsels vindue præsenteres i skærbilledet så snart SOS funktionen sættes i gang vil være der indtil den manuelt afbrydes.

Advarsel: SOS funktionen er som standard deaktiveret. Du skal sørge for aktivering og konfiguration førend du kan tage SOS funktionen i brug.

Indstilling af SOS Funktionen

Før du kan bruge SOS funktionen er det nødvendigt at opsætte de følgende parametre:

- **SOS Knap:** Aktiverer eller Deaktiverer SOS funktionen som du får adgang til via Tænd / Sluk knappen.
- **Afspil en alarm:** Betyder at en højt lydsignal vil blive afspillet ved aktivering af SOS funktionen.
- **Blinkende LED'er:** Her vil SmartVision 3's LED belysning blinke som et SOS signal.
- **Indstil telefonnumre:** Her kan du definere hvem der skal være på din nødopkaldsliste. Så snart du aktivere SOS knappen vil disse numre / kontaktpersoner blive kontaktet via opkald eller med en prædefineret SMS.
- **Telefon opkald:** Aktiverer om der skal ringes til de definerede numre / kontaktpersoner. I tilfælde af en nødsituation vil der blive igangsat opkald en efter en indtil opkaldet besvares.
 - **Forsinkelse af svar:** Her kan du ændre på hvor lang en periode der skal gå fra et opkald ikke besvares til din SmartVision 3 ringer til den næste kontaktperson i listen (standard er 30 sekunder).
- **Send besked:** Aktivering af om hvorvidt der skal afsendes en SMS besked til din opkaldsliste.
 - **Send placering:** Med denne indstilling vil du inkludere din aktuelle GPS koordinat, såfremt det er til rådighed, på det tidspunkt hvor SOS funktionen blev aktiveret, i SMS beskeden.
 - **Besked tekst:** Her kan du redigere i den prædefinerede SMS besked som skal afsendes ved aktivering af SOS knappen.

Indstillinger

Introduktion

Denne applikation sætter dig i stand til at aktivere og deaktivere bestemte funktioner samt muligheden for at ændre på eksisterende indstillinger. SmartVision 3 leveres til dig med et antal prædefinerede indstillinger som alle kan ændres, eksempelvis tid, sprog, skærmindstillinger, tilgængelighedsindstillinger og meget mere.

SmartVision 3 indstillingerne er en fortsættelse af de generelle Android 11 indstillinger.

Indstillingerne er inddelt i kategorier:

Beskrivelse af kategorierne

- **Netværk og internet:** Herunder kan du tilgå Wi-Fi Indstillinger, Mobile netværk, SIM kort administration, Flytilstand, Dataforbrug, hotspot og lignende.
- **Forbundne enheder:** Aktivering og håndtering af forbindelser med og til tilbehør samt eksterne enheder, via Bluetooth, NFC, Android Auto og lignende.
- **Apps og notifikationer:** Her kan du tilgå indstillinger og notifikationer for dine forskellige applikationer som er installeret på din SmartVision 3 (applikationernes tilladelser, deres hukommelsesforbrug, standard applikationer og lignende).
- **Batteri:** Overvåg dit batteriforbrug.
- **Skærm:** Her kan du konfigurere det visuelle skærbillede (tema, lysstyrke niveau, baggrundsbillede, standby funktion, skriftstørrelse med mere).
- **Lyd:** Konfigurering af lyde og lydstyrke på din enhed (ringetone, besked notifikationer, lydstyrke, forstyr ikke og så videre).
- **Lagerplads:** Håndter de forskellige hukommelsesområder i din SmartVision 3.
- **Privatliv:** Her kan du kontrollere og ændre på adgangen til dine personlige data.
- **Placering:** Her kan du justere og ændre på tilgangen til dine lokalitetsdata.
- **Sikkerheds:** Giver dig mulighed for at foretage sikkerhedsmæssige indstillinger (PIN kode, låseskærm, fingeraftryk og lignende).
- **Konti:** Her kan du håndtere dine e-mail konti og konti til synkronisering.
- **Tilgængelighed:** Justering og tilpasning af tilgængelighedsindstillinger i og for din SmartVision 3 (Talkback Tilgængelighed, KAPSYS Tilgængelighed, Talesynteser og lignende).
- **Digital balance og børnesikring:** Her kan du overvåge og kontrollere brugen af din SmartVision 3
- **Google:** Håndter indstillinger for Google applikationer og tjenester.
- **DuraSpeed:** Giver dig mulighed for at prioritere brugen af bestemte applikationer over andre, som er installeret på din SmartVision 3.
- **System:** Her kan du tilgå systemindstillingerne (Sprog, dato og klokkeslæt, backup, nulstil og så videre).
- **Om telefonen:** Gennemgå din SmartVision 3's tekniske specifikationer, status på din telefon og installere systemopdateringer.

Forbind til et Wi-Fi Netværk

Naviger til og vælg "Netværk og internet" i listen over indstillinger, efterfulgt af "Wi-Fi", og tryk OK. Aktiver nu kontakten "Brug Wi-Fi" ved at navigere til elementet og tryk på OK. Din SmartVision 3 søger nu efter tilgængelige netværk tæt på dig og præsenterer dem i en liste nedenfor. Naviger til det Wi-Fi netværk du ønsker at forbinde til ved at benytte dine navigations taster, og tryk så på "OK" tasten. Forsøger du at forbinde til et sikkert Wi-Fi netværk bliver du bedt om at angive en adgangskode. Når du har indskrevet denne skal du navigere til og vælge "Forbind", som du finder nederst i det aktuelle skærbillede. Tilbage i din liste over tilgængelig Wi-Fi netværk vil ordet "Tilsluttet" blive præsenteret for dig, under navnet på det Wi-Fi som du oprettede forbindelse til, såfremt at det lykkedes. Er adgangskoden til Wi-Fi netværket ikke korrekt, vil du få annonceret

SmartVision 3 - Brugervejledning

"Tjek adgangskoden, og prøv igen". I dette tilfælde skal du vælge Wi-Fi netværket igen og indskrive den korrekte adgangskode.

Godt at vide: Adgangskoden samt også typen af sikkerhed (WEP / WPA2) er bestemt af din tjenesteudbyder eller din router. Husk at en adgangskode er sensitiv overfor store og små bogstaver.

Forbind til en Bluetooth enhed

Fra Indstillinger oversigten skal du navigere til og vælge "Forbundne enheder", efterfulgt af "Par ny enhed", for at få præsenteret en liste over tilgængelige Bluetooth enheder som befinder sig omkring dig. Naviger til den Bluetooth enheden som du ønsker at forbinde til din SmartVision 3, i oversigten, og tryk på OK for at oprette forbindelse.. For at oprette forbindelse skal du følge vejledningen som du præsenteres for. Såfremt du bliver bedt om at angive en adgangskoden, forsøg gerne med 0000 eller 1234 (disse er de mest benyttede prædefinerede koder) eller tjek dokumentationen for den enhed du forsøger at oprette forbindelse til. Hvis forbindelsen lykkedes vil din SmartVision 3 forbinde til den valgte enhed.

Godt at vide: For at spare på batteriet anbefales det at slukke for Bluetooth teknologien når du ikke bruger det.

Aktivering af fingeraftryk

Din fingeraftrykssensor vil kun fungere hvis du har aktiveret "Skærmlås" fra Sikkerhed indstillingerne. Dette skyldes at du har brug for en sekundær metode til at låse din SmartVision 3 op, i tilfælde af at fingeraftrykssensoren fejler.

Naviger til og vælg "Sikkerhed" efterfulgt af "Fingeraftryk". Vælg herefter elementet "Fingeraftryk og pinkode" som sikkerhedsmetode. Opret din egen firecifrede PIN kode ved brug af det fysiske tastatur, og bekræft med OK tasten. Indskriv den samme PIN kode igen for at bekræfte og aktiver så "Skærmlås" funktionen. Så snart "Skærmlås" funktionen er aktiveret kan du følge konfigurationen til oprettelse af fingeraftryk metoden ved at følge vejledningen som du præsenteres for. Det er nødvendigt at registrere dit fingeraftryk ved at du placerer og løfter din finger femten gange på sensoren indtil din SmartVision 3 annoncerer "Fingeraftryk tilføjet". Du kan gentage proceduren og tilføje op til fem forskellige fingeraftryk.

Når dit fingeraftryk er registreret kan du låse din SmartVision 3 op på sikker vis ved at placere din finger på sensoren, i stedet for at indskrive en Telefonkode. Du har også mulighed for at nyde godt af den biometriske identifikation i eksempelvis bankapplikationer.

Når du skal benytte sensoren til at aflæse dit fingeraftryk skal du være opmærksom på de følgende forhold som potentielt kan påvirke funktionen:

- For at forbedre genkendelsen af dit fingeraftryk bør du registrere et fingeraftryk på den hånd du benytter oftest til at holde din SmartVision 3.
- Vær sikker på at du benytter hele overfladen af din finger for at opnå det bedste resultat.
- Vær sikker på at området omkring selve fingersensoren og din finger er rent og tørt.
- SmartVision 3 kan muligvis ikke registrere fingeraftryk som har ar.
- SmartVision 3 kan potentielt ikke registrere fingeraftryk på meget små eller tynde fingre.
- Vær sikker på at sensoren ikke har ridser eller er beskadiget af eksterne objekter, eksempelvis mønter, nøgler og lignende.

Opdatering af systemet

Du er nødsaget til at have en fungerende internet forbindelse for at være i stand til at downloade og installere opdateringer til din SmartVision 3. For at opdatere din enhed skal du navigere til og vælge "Om telefon" i Indstillinger listen, efterfulgt af "Systemopdateringer". Hvis en opdatering er

tilgængelig, vælg elementet "Download og installer" i bunden af skærmbilledet og tryk på OK tasten for at påbegynde download processen.

Download af en opdatering vil tage tid og blandt andet afhænge af din internetforbindelse - din SmartVision 3 vil regelmæssigt annoncere processens forløb. Når din SmartVision 3 har hentet den nye version skal du navigere til og vælge "Installer", for at påbegynde installationen. SmartVision 3 vil også her give dig løbende information om processen. Så snart installationen er gennemført vil din SmartVision 3 genstarte for at færdiggøre installationen.

Lydoptager

Introduktion

Lydoptager applikationen tilbyder dig muligheden for at optage lyde såsom talemæddelser og afspille dem senere hen.

Optag en lyd

Du kan starte en optagelse ved at navigere til og vælge "Optag" i hovedskærmen af applikationen. Vælg "Pause" for at sætte optagelsen på pause og vælg "Optag" igen for at genoptage optagelsen. Du kan afslutte en optagelse ved at vælge "Stop".

Når du har afbrudt en optagelse kan du gøre følgende:

- **Afspil:** Lyt til din optagelse.
- **Slet:** Slet din optagelse.
- **Gem:** Her kan du vælge at gemme den afsluttede optagelse. Din optagelse vil automatisk få tilegnet datoen hvor optagelsen blev foretaget (dato samt klokkeslæt).

Afspil en optagelse

Vælg "Liste" fra hovedskærmen i applikationen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig. Dine lydoptagelser vil blive opstillet i en liste, med den nyeste øverst.

Naviger til den optagelse du ønsker at lytte til i oversigten og tryk på OK tasten. Under en afspilning kan du gøre brug af følgende funktioner:

- **Pause:** Sæt afspilningen på pause.
- **Afspil:** Lyt til din optagelse.
- **Liste:** Vend tilbage til listen over alle optagelser.
- **Slet:** Vælg denne hvis du ønsker at slette optagelsen.

Omdøb en optagelse

Vælg "Liste" fra hovedskærmen i applikationen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig. Naviger til den optagelse du ønsker at redigere, i oversigten, og tryk og hold på OK tasten. Vælg elementet "Omdøb optagelsen" og slet indholdet af redigeringsfeltet. Indskriv det ønskede nye navn for optagelsen og naviger til og vælg OK elementet som du finder i skærmbilledet for at gemme.

Slet en optagelse

Vælg "Liste" fra hovedskærmen i applikationen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig. Naviger til den optagelse i listen som du ønsker at slette og tryk og hold på OK tasten. Vælg elementet "Slet optagelsen" og bekræft ønsket ved at vælge OK tasten.

Telefon

Introduktion

Telefon applikationen giver dig muligheden for at foretage opkald og gennemse din opkalds historik.

Besvar et opkald

Når din telefon ringer skal du blot trykke på OK tasten for at besvare det indkommende opkald.

Godt at vide: KAPSYS Tilgængelighed betyder at du også kan besvare opkald ved at trykke på en vilkårlig tast mellem nul og ni.

Godt at vide: Når din telefon ringer kan du med et hurtigt tryk på en af lydstyrke knapperne stoppe ringetonen så du nemmere kan høre navnet og nummeret på opkalderen.

Afslut er opkald

Du kan afslutte et igangværende opkald ved at trykke på Slet tasten.

Godt at vide: Du kan også afslutte et igangværende opkald ved at trykke hurtigt på Tænd / Sluk knappen.

Afvis et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du blot trykke på Slet tasten når din telefon ringer.

Foretag et opkald

De følgende opkalds muligheder er tilgængelige fra hovedskærmen af applikationen:

- **Kontaktpersoner:** Giver dig direkte adgang til din telefonbog med dine kontaktpersoner. Benyt navigations tasterne til at gennemgå listen over dine kontaktpersoner og vælg den person som du ønsker at ringe op, ved at trykke på OK tasten. Naviger nu til elementet "Opkald" såfremt du ønsker at foretaget opkaldet, og tryk OK for at sætte opkaldet i gang.

Godt at vide: Du kan benytte det fysiske tastatur når du befinder dig i listen over dine kontaktpersoner for at søge efter en kontaktperson.

- **Favoritter:** Giver dig en hurtig adgang til de kontaktpersoner som du har angivet som Favorit. For at indstille en kontaktperson som en favoritkontaktperson kan du navigere til og vælge den specifikke kontaktperson. Naviger nu til knappen "Føj til favoritter" og bekræft med OK tasten.
- **Opkaldshistorik:** Her kan du gennemse opkald du har modtaget og foretaget. Disse opkald er opstillet efter seneste til ældste. Naviger til en kontaktperson eller et telefonnummer i listen som du ønsker at lære mere om, tryk på OK tasten og du præsenteres for mere historik. Benyt nu dine navigationstaster for at tilgå følgende muligheder: Ring op, Opret ny kontaktperson, Føj til en kontaktperson, Send en SMS besked, Bloker nummer samt Opkaldsinfo. Du kan også navigere til en kontaktperson eller et telefonnummer i listen og trykke og holde på OK tasten for at tilgå disse følgende muligheder: Kopier nummeret, Rediger nummeret før opkald, Bloker nummer, Slet.

Godt at vide: Du kan slette hele din opkaldshistorik under knappen "Flere valgmuligheder" i toppen af skærbilledet. Du kan også vælge at slette de individuelle opkald ved at navigere til dét du ønsker at slette og trykke på "Slet" tasten.

- **Ring til nummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer. Bekræft din indskrivelse og start opkaldt ved at trykke på OK tasten.
- **Voicemail:** Her får du en hurtig adgang til din visuelle voicemail tjeneste.

Bemærk venligst: Denne funktion som giver dig mulighed for at lytte til beskeder på din telefonsvarer uden at skulle ringe til nummeret er muligvis ikke tilgængeligt hos alle udbydere i alle lande. Du kan dog konfigurere en almindelig opsætning under Indstillinger (om muligt implementeres disse automatisk via din udbyder). Talebeskeder kan også konfigureres til og associeres med knap "1" for hurtig adgang.

- **Indstillinger:** Her kan du tilgå forskellige indstillinger i relation til telefon applikationen.

- **Valgmuligheder for visning:** Giver dig mulighed for at modificere sorteringen samt formatet på dine kontaktpersoner.
- **Lyde og vibration:** Giver dig en direkte adgang til "Lyde" indstillingerne i din SmartVision 3 Indstillinger applikationen.
- **Hurtige svar:** Her kan du redigere teksten i de fire standard besvarelser.
- **Opkaldskonti:** Tilgå dine SIM kort indstillinger.
- **Blokerede numre:** Giver dig mulighed for at styre de telefonnumre du måtte have blokeret gennem opkaldshistorikken eller via Google Kontakter applikationen.
- **Voicemail:** Tilgå indstillinger for din voicemail.
- **Hjælpefunktioner:** Her kan du tilgå tilgængelighedsindstillinger med reference til kommunikation (TTY tilstand samt Høreapparat funktion).

Funktioner ved igangværende opkald

Under et opkald kan du gøre brug af følgende funktioner:

- **Mute:** Giver dig mulighed for at deaktivere din mikrofon så personen i den anden ende ikke kan høre dig.
- **Højtaler:** Aktiver denne for at sende lyden ud gennem den indbyggede højtaler i din SmartVision 3 (håndfrit opkald).

Godt at vide: Et hurtigt tryk på Talekommando knappen vil også aktivere højtaleren.

- **Tilføj opkald:** Du sætter det aktuelle opkald på hold og kan foretage et andet opkald. Du kan herefter fusionere de to opkald eller skifte mellem dem.
- **Hold:** Sæt din samtalepartner i venteposition. Aktiver elementet igen for at genoptage kommunikationen.

Brugervejledning

Introduktion

I denne applikation på din SmartVision 3 kan du komme direkte til brugervejledningen. Det er nødvendigt at have en fungerende internet forbindelse for at hente den seneste udgave af brugervejledningen.

Gennemgå brugervejledningen

Når du tilgår applikationen vil du blive præsenteret for de forskellige kapitler som er i brugervejledningen. Benyt Pil Op og Pil Ned for at navigere gennem dem. Benyt OK tasten for at åbne et kapitel op, som du ønsker at gennemgå. Benyt igen Pil Op og Pil Ned for at navigere gennem indholdet af kapitlet. Benyt Tilbage tasten for at springe tilbage til din oversigt over kapitler.

Internet Radio

Introduktion

Denne Internet Radio applikation tilbyder dig at lytte til dine favorit radio stationer og opdage nye radio stationer via en internet forbindelse.

Lyt til en radiostation

For at lytte til en radio station kan du indskrive navnet på den i redigeringsfeltet og tryk på OK tasten for at få præsenteret søgeresultatet.

Brug herefter dine navigationstaster til at navigere til radio stationen som du ønsker at lytte til og tryk da på OK tasten. Afspilningen vil starte automatisk. For at slukke for radioen igen skal du benytte dine navigationstaster til at navigere til elementet "Stop" og så trykke på OK tasten.

Godt at vide: Under afspilning af en radio station kan du vælge elementet "Tilføj til favoritter" for at gemme den pågældende radiostation til din liste over favoritstationer.

Andre muligheder du har fra Hovedskærmen af Internet Radio applikationen er som følger:

- **Spillet for nyligt:** Giver dig en hurtig liste over de senest afspillede radiostationer.
- **Favoritter:** Her kan du finde alle dine favoritstationer.
- **Alle:** Gennemse alle tilgængelige internet radiostationer (Ud fra genre, land, podcast og så videre).

Youtube

Med YouTube applikationen, som er en standard Google applikation, kan du se videoer direkte på din SmartVision 3. Du kan lære mere om Googles YouTube applikation ved at gennemgå brugervejledningen som du finder ved at besøge følgende link: [Google YouTube Link](#)

YouTube Music

YouTube Music applikationen, en standard Google applikation, giver dig mulighed for at lytte til musik på din SmartVision 3. Besøg venligst følgende link hos Google for at få mere information: [YouTube Music Google Link](#)

Tekniske specifikationer

Operativsystem:

- Android 11

Design

- Fysiske mål: 159 gange 68 gange 10.4 millimeter
- Vægt: 160 gram
- Touchskærm: 3.5 tommer
- Opløsning: 640 gange 960 pixels

Hardware

- Processor: Octo Core: 4 gange A53 @2.0GHz + 4 x A53 @1.5GHz
- Intern hukommelse: 4GB RAM, 64GB Flash
- Ekstern hukommelse: Op til 128 GB
- Cellulære forbindelser:
 - 4G LTE
 - 3G+/ 3G
 - 2G
- Trådløse forbindelser:
 - Bluetooth: 4.2 BLE
 - Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
- Satellitmoduler: GPS / GALILEO / GLONASS
- Yderligere sensorer: Accelerometer, Nærhedssensor, Lyssensor, Digitalt kompas samt NFC.
- SIM kort: Dual NANO SIM eller NANO SIM kort plus Micro SD kort
- Porte: 3.5 millimeter Hovedtelefon port, USB Type C (OTG)
- Hurtig Opladning: 5V / 1.5A
- Trådløs Opladning: 5W
- Forbrug og Autonomi:
 - Autonomi (Standby): 150 timer
 - Autonomi ved kommunikation (Tale): 12 timer
 - Autonomi ved video (Streaming): 8 timer
- Specific Absorption Rate (SAR):
 - Head: 0.498 W/Kg
 - Body: 0.765 W/Kg
 - Limbs: 1.485 W/Kg

Kamera

- Dobbelt bagvendt kamera: 16 Megapixel + 2 Megapixel

- Frontkamera: 5 Megapixel

FAQ

Skal jeg betale for software opdateringer?

Nej, alle opdateringer til din SmartVision 3 er gratis.

Hvornår og hvordan ved jeg om en opdatering er tilgængelig?

Din SmartVision 3 vil regelmæssigt tjekke for opdateringer og du vil automatisk blive informeret om en opdatering gennem Notifikationspanelet. Du kan også selv tjekke for tilgængelige opdateringer under "Indstillinger", "Om telefon" og "Systemopdateringer".

Jeg kan ikke downloade opdateringen - Hvad gør jeg?

Vær sikker på at din SmartVision2 har adgang til internettet da det er nødvendigt for at kunne downloade opdateringer. Det kan anbefales at gøre brug af en WiFi forbindelse for at optimere hastigheden på download. Såfremt der sker en fejl under download af opdateringen skal du venligst forsøge igen fra "Indstillinger", "Om telefon" og "Systemopdateringer". Hvis du har indsat et hukommelseskort i din SmartVision 3 enhed skal du forsøge at fjerne det før du forsøger at installere opdateringen igen. Det kan være en hjælp at have seende assistance hvis et Micro SD kort skal fjernes.

Hvordan skaffer jeg adgang til KAPTEN GPS samt BogLæser applikationen på min SmartVision 3?

Som standard leveres SmartVision 3 med applikationerne KAPTEN GPS og BogLæser med en 15 dages prøveversion. Aktivering af prøveperioden på 15 dage starter når du åbner den enkelte applikation første gang (Bemærk venligst at det kræver en internet forbindelse at starte applikationerne under prøveperioden). Så snart prøveperioden er udløbet vil applikationen ikke længere være funktionel. Du skal herfra kontakte din forhandler for at bestille en eller flere af disse applikationer for at få adgang til dem igen.

Min SmartVision 3 går i standby tilstand (skærm slået fra) alt for hurtigt - Kan jeg ændre på intervallet for hvornår den skal gøre det?

Ja, du kan faktisk vælge mellem hele syv forskellige niveauer. Når du starter din SmartVision 3 for første gang vil du som standard have "1 minut" intervallet aktiveret. Du kan justere på tidsperioden fra Indstillinger applikationen. Naviger til "Skærm" efterfulgt af "Avanceret", derefter "Timeout for skærmen" og vælg nu hvilken tidsperiode du ønsker: 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter eller 30 minutter.

Hvordan får jeg information omkring batteristatus, trådløst netværk, dato og klokkeslæt og også modtaget beskeder?

For at få en status for din SmartVision 3 kan du benytte genvejen Firkant (Pund) tasten samtidigt med tast 1.

Du kan også få læst denne information automatisk når du aktivere din SmartVision 3 fra standby tilstand. Som standard vil du få annonceret batteriniveau hver gang du aktiverer din SmartVision 3. For at tilføje yderligere annonceringer skal du tilgå "KAPSYS Tilgængeligheds Indstillinger". Naviger til og vælg elementet "Vågn op tale" i listen. Marker den information du ønsker at høre når du aktiverer din SmartVision 3. Her følger de muligheder du har: Aktuelle dato, Batteriniveau, Netværksstatus, Ubesvarede opkald, Ny besked. Ny software opdatering.

Jeg kan ikke indskrive tekst med tastaturet - Hvad gør jeg?

I enkelte tilfælde vil applikationer fra Play Butik ikke være kompatible med brugen af et fysiske alfanumerisk tastatur. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at benytte det virtuelle Android tastatur. For at få frembragt det virtuelle Android tastatur skal du aktivere et redigeringsfelt og trykke og holde på OK tasten. Benyt genvejen Stjerne med tast 8 for at skifte til virtuelle Android tastatur.

Det virtuelle tastatur vil blive præsenteret i den nederste del af skærmbilledet. Herefter skal du placere en finger på skærmen og beholde den der, mens du trækker den rundt for at finde bogstaverne. Når du har fundet det bogstav du skal benytte skal du løfte fingeren væk fra skærmen for at acceptere valget. Når du er færdig kan du benytte Stjerne med tast 7 genvejen for at vende tilbage til det virtuelle KAPSYS tastatur.

Kan jeg deaktivere touchskærmen fuldstændigt?

Det kan du sagtens, tilgå "KAPSYS Tilgængeligheds Indstillinger". Herefter skal du aktivere elementet "Deaktiver touch skærmen" som du finder i listen.

Hvordan forøger jeg størrelsen på informationen som jeg får på den visuelle skærm?

Du kan øge størrelsen på skriften ved at tilgå Indstillinger efterfulgt af Tilgængelighed. Du kan også gøre brug af MagniText funktionen som du kan aktivere gennem tastaturgenvejen Firkant med tast 6, som gør dig i stand til at få præsenteret en linje i skærmbilledet som indeholder den seneste information som du har fået annonceret. Placer din SmartVision 3 i landskabstilstand (vend den på siden), for at få præsenteret teksten i fuldskærm.

Fungerer Stemmekommando uden en internet forbindelse?

Nej desværre ikke, en internet forbindelse er nødvendigt for at gøre brug af Talekommando funktionen.

Hvordan kan jeg overføre filer (musik, tekst...) til min SmartVision 3 fra min computer?

Tilslut din SmartVision 3 til din computer ved brug af USB C kablet der fulgte med. SmartVision 3 vil herefter blive genkendt som et almindeligt eksternt drev og du kan nu frit overføre filer frem og tilbage. Såfremt du har en Mac computer er det nødvendigt for dig at download kompatibelt software til Android enheder, eksempelvis "Android File Transfer".

Så snart din SmartVision 3 er blevet genkendt af din computer kan du påbegynde kopieringen af filer fra din computer til din SmartVision 3's hukommelse i den mappe du ønsker:

- **Books eller Download:** Til lydbøger, .pdf filer, Word filer, .txt eller html filer.
- **Music:** Til alle dine MP3 filer.
- **DCIM:** Til billeder og videoer.
- **Alarms:** En mappe til ønskede alarmtoner.
- **Ringtones:** Hvis du ønsker at tilføje ringetoner.
- **Notifications:** Til notifikationstoner.

Er det muligt at øge hukommelsen på min SmartVision 3?

Ja det kan du godt - Du kan øge hukommelsen på din SmartVision 3 ved at indsætte et micro SD kort på op til 128 GB.

Kan jeg forbinde Bluetooth hovedtelefoner til min SmartVision 3?

Ja, det er muligt at forbinde et par Bluetooth hovedtelefoner til din SmartVision 3 til blandt andet at foretage opkald.

Advarsel: Hvis du også ønsker at lytte til musik, radio eller blot benytte talesyntesen indbygget i din SmartVision 3 er det vigtigt at du har hovedtelefoner der understøtter "A2DP" (Advanced Audio Distribution Profile).

I tilfælde af problemer

Introduktion

Før du tager kontakt til kundeservice kan det være en hjælp at gennemgå de følgende anbefalinger:

- For at optimere din SmartVision 3's ydeevne anbefales det at slukke den engang i mellem.
- Det anbefales at oplade batteriet fuldt ud for optimal drift.

Min SmartVision 3 vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:

- Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen indtil skærmen lyser op.
- Forsøg at lade batteriet op.
- Benyt et andet USB kabel eller en anden strømforsyning (som skal være godkendt af din forhandler eller producenten).

Min SmartVision 3 slukker af sig selv:

- Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen for at tænde for den.
- Forsøg at lade batteriet op.

Min SmartVision 3 bliver varm under opladning:

- Afbryd forbindelsen til din strømforsyning og luk alle applikationer. Vent indtil din enhed har fået en normal temperatur, og tilslut den herefter til strømforsyningen igen.
- Såfremt den nederste del af enheden bliver unormal varm kan det betyde at USB kablet er beskadiget. Forsøg gerne med et andet USB kabel end det du fik udleveret sammen med din SmartVision 3.
- Når du benytte den trådløse opladestation skal du være sikker på at der ikke er placeret fremmede genstande, såsom metalobjekter, magneter, betalingskort eller lignende, mellem enheden og den trådløse opladestation.

Min SmartVision 3 bliver varm under brug:

Gør du brug af funktioner eller applikationer som kræver meget effekt, eller benytter du disse i en længere periode, kan det resultere i at din enhed midlertidigt bliver varmer, fordi batteriet udsender et højere forbrug. Luk kørende applikationer og stop brugen af din SmartVision 3 indtil den er kølet ned igen.

- Vær også sikker på at din enhed er opdateret, ligeledes alle dine applikationer.
- Konflikter mellem applikationer som kører i baggrunden kan resultere i at din SmartVision 3 bliver varm. Genstart er også en god idé.
- Deaktiver Wi-Fi, GPS samt Bluetooth funktionerne hvis du ikke benytter disse.
- Stop applikationer som øger batteriforbruget eller som opererer i baggrunden, hvis du ikke benytter dem.
- Slet unødvendige filer og ubrugte applikationer.
- Reducer lysstyrken i skærbilledet.
- Hvis din enhed overophedes eller føles varm i en længere periode skal du stoppe brugen med det samme og slukke for den. Gentager det sig igen, kontakt din forhandler.

Batterilevetiden i min SmartVision 3 er ret kort:

- Vær sikker på at du har haft din SmartVision 3 til opladning i mindste to timer.
- Sluk for Wi-Fi, Bluetooth samt GPS funktionerne såfremt du ikke benytter disse.
- Afbryd applikationer som kører i baggrunden.
- Begræns brugen af applikationer som har et højt batteriforbrug.
- Fjern applikationer som du ikke benytter.
- Sørg for at dine applikationer er opdateret.
- Sørg for at din SmartVision 3 er opdateret.
- Slet ubrugte e-mail konti.
- Sluk for tastaturlyde og vibrations indstillinger samt for notifikationer.
- Reducer lysstyrken i skærbilledet.
- Genstart din SmartVision 3.

Min SmartVision 3 vil ikke oplade korrekt:

- Sørg for at opladningen foretages under normale forhold i et normalt miljø (5°C til 35°C)

- Vær ligeledes sikker på at du benytter batteriet og strømforsyningen der er leveret af KAPSYS.
- Når du er i udlandet, sørg for at den elektriske forsyning er kompatibel.

Min SmartVision 3 vil ikke forbinde til et netværk:

- Forsøg at forbinde til et andet netværk.
- Verificer netværksdækningen, enten med din tjenesteudbyder eller en anden enhed.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
- Spørg din tjenesteudbyder om det benyttede SIM kort er gyldigt.
- Forsøg eventuelt på et andet tidspunkt hvis netværket kan være overbelastet.
- Fjern SIM kortet og sæt det i igen.
- Forsøg gerne med et andet SIM kort.
- Genstart din SmartVision 3.

SIM kort fejl / Ingen telefon funktioner kan benyttes:

- Vær sikker på at SIM kortet er placeret korrekt.
- Sørg for at selve chippen i SIM kortet ikke er beskadiget eller ridset.
- Forsøg gerne med et andet SIM kort.
- Genstart din SmartVision 3.

Jeg kan ikke foretage eller modtage opkald:

- Vær sikker på at du har angivet et korrekt og gyldigt telefonnummer.
- For internationale opkald, tjek lande- og områdekoder.
- Vær sikker på at din telefon er forbundet til et netværk og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Hvis du er udenlands, forhør dig hos din tjenesteudbyder om du har adgang til internationale telefon opkald.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
- Genstart din SmartVision 3.

Kan ikke få kontakt til min voicemail:

- Tjek om du har angivet din tjenesteudbyders voicemails korrekte telefonnummer.
- Forsøg senere hvis netværket er overbelastet.

SmartVision 3 beder mig om at angive en kode når jeg tænder for den:

- Telefonkode: Når Skærmlås funktionen er aktiveret skal der angives en adgangskode som blev oprettet da funktionen blev aktiveret.
- PIN kode: Når du benytter din enhed for første gang eller når du har aktiveret PIN kode lås, skal der angives en PIN kode som du fik oplyst af din udbyder, da du modtog dit SIM kort.
- PUK kode: Såfremt du indskriver en forkert PIN kode tre gange vil dit SIM kort blive blokeret. Det er nødvendigt at indskrive din PUK kode som du fik oplyst af din udbyder, da du modtog dit SIM kort.
- PIN 2 kode: Når du tilgår en menu som kræver indskrivning af PIN 2 kode skal du angive den - den blev udleveret til dig af din udbyder, da du modtog dit SIM kort.. For yderligere assistance anbefales det at kontakte din udbyder.

Jeg har ændret på Talkback indstillinger og nu reagerer min SmartVision 3 anderledes:

I denne situation kan det være en hjælp at nulstille dine Talkback indstillinger. Dette kan du gøre ved at ringe op til følgende kode - du skal blot indskrive koden direkte fra Hjemmeskærm. ***#111#**

Min SmartVision 3 fungerer ikke længere ordentligt, hvordan gendanner jeg den?

En gendannelse af din SmartVision 3 vil slette alle personlige data og vende tilbage til fabriksstand. Det vil gendanne det oprindelige system af din SmartVision 3, og er normalt en god idé hvis du oplever uregelmæssigheder.

Før du påbegynder en gendannelse anbefales det at sørge for at tage backup og sikre at din backup fungerer. Du kan udnytte at du har en Google konto og tage backup af vigtige data til den. For at tage backup skal du følge denne sti: Applikationer > Indstillinger > System > Backup > Backup nu.

Når du har gennemført backup processen, enten via ovenstående eller på manuel vis, kan du fortsætte med en gendannelse ved at indskrive følgende kode, som du indskrives direkte fra Hjemmeskærmen via det fysiske tastatur: ***#333#**

Du bliver bedt om at bekræfte ønsket om gendannelse - Denne handling vil slette alle al data placeret på den interne hukommelse, inklusive:

- Din Google konto
- System- og applikationsdata samt indstillinger.
- Hentede applikationer
- Musikfiler
- Fotos
- Andre brugerdata.

Juridisk information og reklamation

Forholdsregler og Anbefalinger

Gennemgå venligst alle informationer før du begynder at bruge din enhed, det vil sikre korrekt og sikker brug.

- Håndter din KAPSYS enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke
- Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkeligt ophør af garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
- Benyt kun producentens godkendte strømforsyninger, datakabler og andet tilbehør for på den måde at undgå potentielle farlige situationer, eksempelvis elektrisk stød, brand, eksplosion og andet.
- Forsøg ikke på at reparere eller skille din enhed ad da dette vil resultere i at reklamationen bliver ugyldig Bagcoveret hverken kan eller skal fjernes.
- Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler eller slibemidler.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Beskyt det fra damp og stænk af væsker.
- Opbevar aldrig din enhed i ekstrem varme eller kolde miljøer. Opbevaringstemperaturen er minus 20°C til plus 45°.
- Udsæt ikke din enhed for direkte sollys i længere tid. Brugstemperaturen går fra minus 5°C til plus 40°C.
- Når enheden lader op skal den placeres i et tilpas ventileret område. Oplad kun enheden i et temperaturmiljø op mellem plus 5°C og plus 35°C.
- Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
- Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader. Såfremt en del af din enhed knækker eller bliver beskadiget skal du kontakte din forhandler.
- Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder

- Under længerevarende aktiv brug af din enhed kan det forventes at den bliver varm. Hvis din enhed overopheder og rammer en bestemt temperatur vil dens funktioner og ydeevne blive begrænset, og din enhed kan slukke for at køle ned.
- Vær forsigtig ikke at udsætte kameranlinen for stærkt lys, eksempelvis direkte sollys. Hvis linsen udsættes for stærkt lys, eksempelvis direkte sollys eller en laserstråle, kan det resultere i at kameras billedsensor beskadiges. Skader til billedsensoren kan resultere prikker og pletter i billeder.
- Hvis støv eller fremmedlegemer kommer ind i mikrofonen, i højttaleren eller ørehøjttaleren kan det resultere i at lyden i din enhed bliver forringet og enkelte funktioner vil potentielt ikke virke. Forsøger du at fjerne støv eller fremmedlegemer med et skarpt objekt kan du beskadige enheden og det kan påvirke dens funktionalitet.
- Forbindelsesproblemer og problemer med afladning af batteriet kan opstå i følgende situationer:
 - Hvis du monterer metalklistermærker i nærheden af den indbyggede antenne.
 - Hvis du monterer et beskyttelsescover lavet af metalliske materialer.
 - Hvis du dækker området med antenner med dine hænder eller andre objekter mens du benytter bestemte funktioner såsom opkald eller data.

For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet.

Anvendelse af en godkendt KAPSYS Skærmbeskyttelse anbefales. Uautoriseret skærmbeskyttelse kan resultere i at sensorer fejler.

Benyt aldrig blottede eller beskadigede kabler, ej heller beskadiget eller defekte strømforsyninger.

Sikkerhed og Sundhed

- Hold produktet væk fra små børn.
- Benyt aldrig din smartphone og forhold dig altid til alle sikkerhedsforeskrifter når du kører bil.
- Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lydniveauer når du benytter hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
- Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær medicinsk udstyr.
- Mennesker med elektroniske implantater (eksempelvis pacemaker, insulinpumper, neurostimulatorer og lignende) bør placere deres smartphone mindst 15 centimeter væk fra implantatet.

Warranty (ENGELSK)

Your warranty is only valid under normal use of the device. All man-made damages and any of the following conditions are not covered by the warranty:

- The warranty period has expired.
- Normal wear and tear of the product (such as casing, keypad, display screen, antenna and other accessories).
- Damage resulting from improper use, exposure to humidity or liquid, or proximity to a heat source.
- Cracked or broken devices, or devices with visible signs of shocks
- Failure to respect the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use inconsistent with the instructions provided with the device, or commercial use of the product.
- Use of accessories or connectors not recommended by the manufacturer.
- The customer disassembles, repairs or modifies the device without the KAPSYS' authorization or has it repaired at a repair shop that is not included in the KAPSYS' approved repair network.
- Damage caused by a force majeure such as floods, fires, earthquakes, and lightning.

- Faults or malfunctions caused by the internet or wireless service providers (operators) are not covered by the warranty. In this case service provider will need to be contacted directly for assistance.
- A reduction in the battery charge holding capacity. During the period of warranty only a minor decrease in its capacity should occur. After this period any decrease in its capacity or loss of function is considered to be caused by a common wear.

In some out of warranty failure cases, a repair can be implemented at your own cost. In case of breakdown, please contact your dealer.

It is recommended that you perform one or more backups of the data saved in your product. KAPSYS cannot be held responsible for the loss of this data because of a malfunction, repair or replacement of the product.

About specific energy absorption rate (ENGELSK)

Your SmartVision 3 by KAPSYS is a radio transmitter/receiver. It is designed and manufactured to comply with the radiofrequency (RF) exposure thresholds recommended by the European Union. This device meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and European Standard for mobile radio devices.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2.0W/kg when tested at the head or worn on the body, 4.0W/kg when worn on the limbs.

For body-worn operation, this phone has been tested use with accessories that contain no metal and that position the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when phone is switched on. During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value. In general, the closer you are to the base station, the lower the transmission output of your mobile telephone. To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep the device away from your head and your body.

The highest SAR average value over 10g of body tissue of this device is listed below:

- Head: 0,498 W/kg
- Body: 0,765 W/kg
- Limbs: 1,485 W/kg

Restrictions in 5GHz band (ENGELSK)

According to Article 10 of directive 2104/53/EU, the WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5.15 to 5.35 GHz frequency range in the following countries: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

Kundeservice

For yderligere information, kontakt venligst din forhandler eller importøren Instrulog A/S: Instrulog A/S, Bjerringbrovej 116 – 2610 Rødovre. Telefonnummer: 44 97 94 77. Du kan også besøge vores hjemmeside: www.instrulog.dk.

Trademarks (ENGELSK)

Company and product brands referred to in this document, are trademarks, either registered or not, and owned by the respective holder as follows:

KAPSYS words, brands and logos are registered trademarks of KAPSYS SAS.

Android, Google, Google Play, Chromecast built-in, YouTube and other marks and logos are trademarks of Google LLC.

Bluetooth names, brands and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc.

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.