


# Brugsanvisning

## Joystick Musesimulator

### AMSJOYBT

Rev.MW09062022 / FW:2g

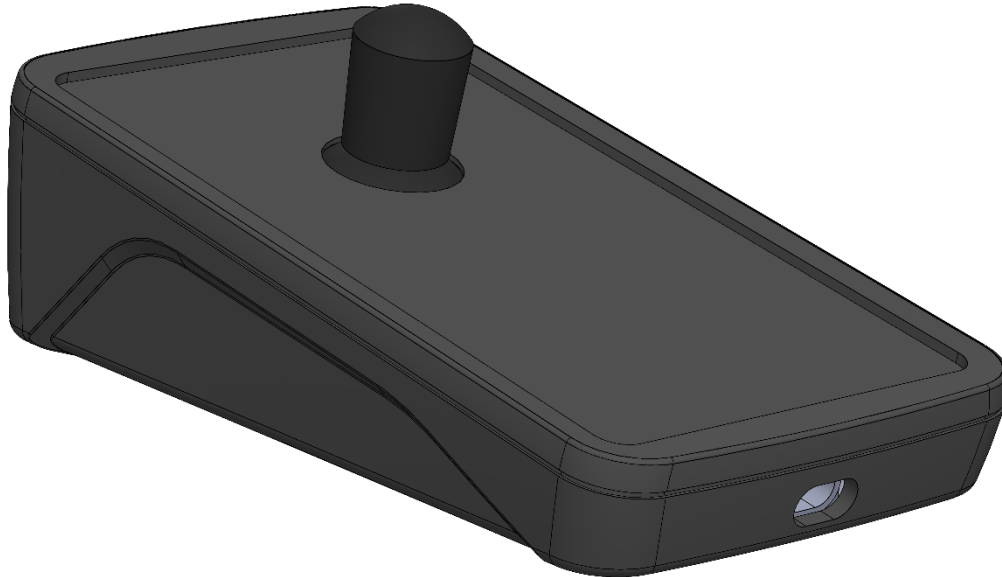

## Funktionsbeskrivelse

AMSJOYBT er en musesimulator, som gør det muligt at betjene en markør på en computer, iOS eller Android enhed fra joysticket og betjene musens klikfunktioner fra en eller flere 0/1-kontakter. Modulet indeholder to musesimulator, én kablet og én trådløs (Bluetooth) enhed. Dette gør det f.eks. muligt at udføre et hurtigt skifte mellem betjeningen af to enheder, f.eks. en PC og en iPhone.

Det er muligt at tilslutte op til fire 0/1-kontakter og bestemme hvilke funktioner, der skal være til rådighed fra kontakterne. Alle funktioner kan betjenes alene fra joysticket og én 0/1-kontakt, men det kan i nogle tilfælde være en hjælp at funktionerne kan betjenes fra flere kontakter.

Joysticket indeholder et batteri, der gør det muligt at bruge Bluetooth musesimulatoren alene og derved helt uden kabelforbindelse. Batteriet kan levere strøm til ca. 7 timers brug, men da musesimulatoren går i standby efter 10 minutter inaktivitet vil batteriet kunne forsyne musesimulatoren meget længere tid.

AMSJOYBT findes i flere udgaver med forskellige typer joystick, heriblandt i særligt let betjent joystick kaldet ALPINE. I ALPINE joysticket er der desuden implementeret en kontaktfunktion, der aktiveres når der trykkes ned på joysticket. Kontakten indeholder nøjagtig samme funktioner som Jack 1 indgangen.

Eftersom der skal anvendes lidt kræfter til at aktivere denne kontakt, vil det ikke være alle der vil have glæde af denne funktion.

Kontakt os evt. hvis der er særlige krav til joystick eller evt. til joystick-knoppen størrelse, materiale eller form.

Det er muligt at ændre en lang række funktioner i musesimulatoren for at imødekomme helt særlige krav fra brugeren. Herunder er det også muligt at køre med forskellige opsætninger for de to musesimulatorer.

## Hurtigt i gang med musesimulatoren...


AMSJOYBT tændes fra en kontakt i jack 1 indgangen. Er AMSJOYBT monteret med det lille ALPINE joystick, kan kontaktfunktionen også aktiveres ved at trykke joysticket nedad.

Hvis musesimulatoren ikke er koblet til en USB-enhed, starter musesimulatoren automatisk op på Bluetooth ellers startes den af de to musesimulatore der sidst blev anvendt.

Tilsluttes musesimulatoren til en USB-enhed skiftes der som standard mellem USB og Bluetooth musen på det 9. bip.

Der er som udgangspunkt ingen behov for installation af yderligere drivere til USB musesimulatoren.

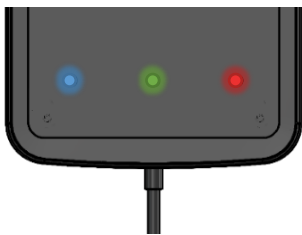

Bluetooth parringen er beskrevet lidt længere inde i denne manual. AMSJOYBT sættes i parringsmode på de 12. bip, hvorefter musen er synlig til parring.



Nederst på AMSJOYBT findes en række dioder. Disse indikerer status på batteri, Bluetooth, samt hvilken musesimulator der er aktiv.

Fast rød diode, betyder at AMSJOYBT er færdigopladet, hvor en blinkende rød diode betyder lavt batteriniveau.

Som standard er rækkefølgen på funktionerne der styres af fra kontakterne sat op jf. dette skema:

Jack indgang	Bip	 USB	 Bluetooth
1	1	Venstreklik	Venstreklik (Tap)
	2	Dobbelt venstreklik	Hold venstreklik (Swipe)
	3	Højreklik	Højreklik
	4	Midterklik	Midterklik
	5	Hold venstreklik	Scrollfunktion
	6	Hold højreklik	Dobbelt venstreklik
	7	Hold midterklik	Hold højreklik
	8	Scrollfunktion	Hold midterklik
	9	Skift til Bluetooth mus	Skift til USB-mus
	10	Sluk for mus	
	11	Reserveret	
	12	Bluetooth parringsmode	
2	1	Venstreklik	Venstreklik
	2	Hold venstreklik	Hold venstreklik
3	1	Højreklik	Højreklik
	2	Hold højreklik	Hold højreklik
4	1	Midterklik	Midterklik
	2	Skift til Bluetooth mus	Skift til USB-mus

Ligeledes er der også valgt en standard lydindstilling, markøropsætning og joystickindstilling for AMSJOYBT. Disse indstillinger gennemgås senere i denne manual.

## Opsætning


Opsætning af modulet sker ved at tilslutte AMSJOYBT til en PC via USB-C porten i bunden af AMSJOYBT. USB-C stikket sidder et stykke inde i boksen, da dette giver en god beskyttelse af stikket. Det er derfor et krav at der skal anvendes et særligt USB-C kabel, hvor stikket netop passer ind i kanalen i bunden af AMSJOYBT.

Til opsætning kan der anvendes en vilkårlig serial terminal, men det anbefales at anvende "Arduino Serial Monitor", da denne terminal kræver yderligere opsætning udover at vælge den korrekte COM-port.


Arduino Serial Monitor er en del af Arduino IDE softwaren og kan hentes gratis fra:

<https://www.arduino.cc/en/software>

Efter installation af Arduino vælges den korrekte COM-port under "Værktøjer" -> "Port"

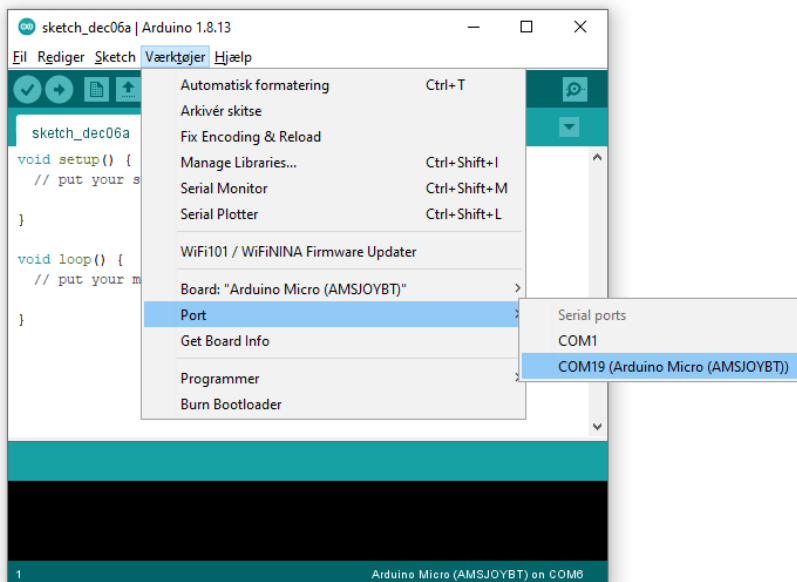

Åbn terminalvinduet "Serial Monitor" på ikonet i øverste højre hjørne (markeret med den røde cirkel).

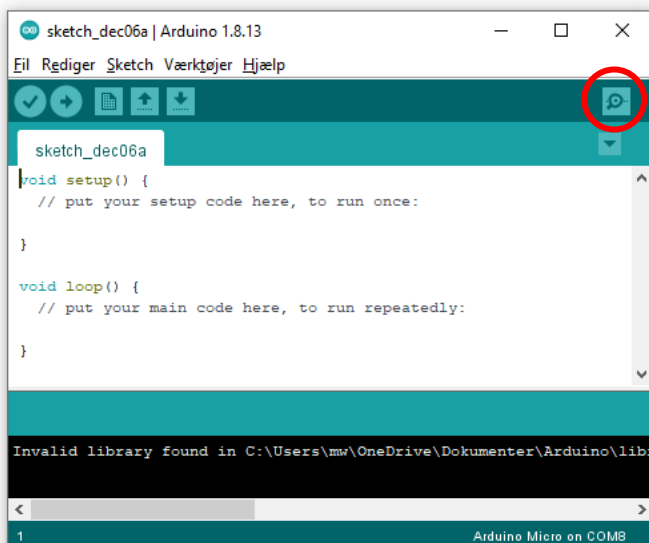

I det tilfælde det foretrækkes at anvende en anden serial terminal opsættes denne til følgende:

*Status for device COM-port:*

```
-----  
Baud:          115200  
Parity:        None  
Data Bits:     8  
Stop Bits:    1  
Timeout:      OFF  
XON/XOFF:     OFF  
CTS handshaking: OFF  
DSR handshaking: OFF  
DSR sensitivity: OFF  
DTR circuit:  ON  
RTS circuit:  ON
```

## Vis opsætning


For at udlæse AMSJOYBT nuværende opsætning, sendes en vilkårlig tast til AMSJOYBT.

I nedenstående eksempel sendes 'a' til AMSJOYBT, hvorefter den aktuelle opsætning vises.



Eksempel: a

AMSJOYBT svarer tilbage med en oversigt over opsætningsparametrene. Ved ændring af parametrene gemmes disse i modulets EEPROM og ændres derfor ikke, hvis forsyningen fjernes fra AMSJOYBT modulet.

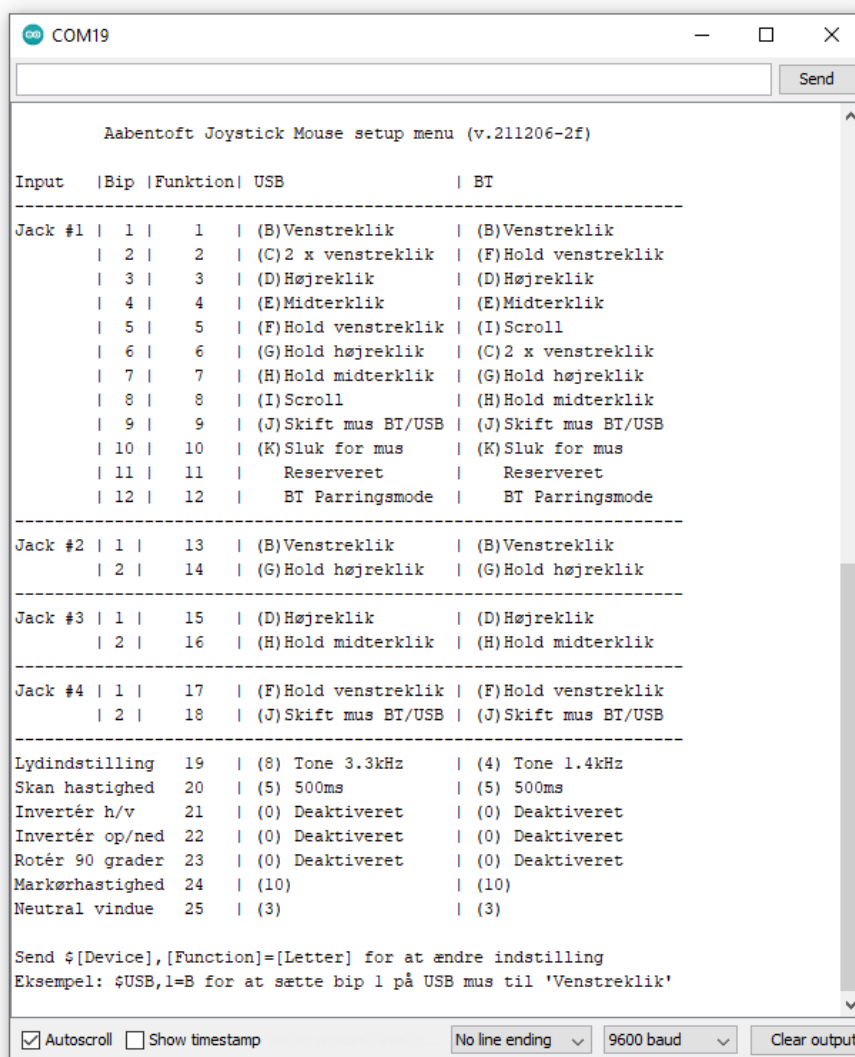

For at ændre opsætningen sendes kommandoer via terminalen. Alle kommandoer starter med "\$" (dollartegn) efterfulgt af enten "USB" eller "BT" afhængig af, hvilken af de to musesimulatorer der skal skrives til.

Herefter ", " (komma) og funktionsnummeret efterfulgt af "=" (lighedstegn), hvorefter der skrives, hvad funktionen skal være.

Funktionerne for jack indgangene er tildelt et bogstav som anvendes til opsætningen.

Funktion	Bogstav
Ingen funktion	A
Venstreklik	B
2 x venstreklik	C
Højreklik	D
Midterklik	E
Hold venstreklik	F
Hold højreklik	G
Hold midterklik	H
Scroll	I
Skift mus BT/USB	J
Sluk for mus	K


Kolonnen "Funktion" i oversigten angiver en nummerering, der ligeledes anvendes ved opsætning af funktionerne i jack indgangene, samt for ændring af de øvrige indstillinger for musesimulatorerne.

Funktion	Nummer
Jack #1	1 - 12
Jack #2	13 - 14
Jack #3	15 - 16
Jack #4	17 - 18
Lydindstilling	19
Skan hastighed	20
Invertér h/v	21
Invertér op/ned	22
Rotér 90 grader	23
Markørhastighed	24
Neutral vindue	25

I de efterfølgende afsnit beskrives dette yderligere og der kan findes eksempler på kommandoerne. Ved ændring af indstillinger kvitterer AMSJOYBT med et kort dobbeltbip. Er den indtastede værdi ikke indenfor grænserne fejlmelder AMSJOYBT og afgiver et lidt længere lavfrekvent bip.

### Funktion 1 – 18 / Jack inputs


På AMSJOYBT findes fire 3,5mm jack mono indgange for tilslutning af eksterne 0/1-kontakter. Det er muligt at ændre, hvilke funktioner der skal være tilgængelige, samt i hvilken rækkefølge funktionerne skal ligge i skanningssekvensen.

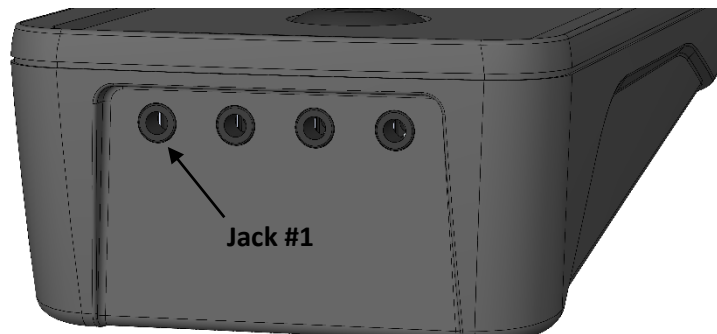

Jack #1 er forskellig fra de tre øvrige jack indgange, idet den indeholder op til 12 funktioner, som aktiveres gennem en skanningssekvens. De øvrige tre jack indgange indeholder hver 2 funktioner, som aktiveres gennem enten et kort eller langt tryk på den tilsluttede kontakt.

De tilgængelige funktioner og rækkefølgen kan være forskellig for de to musesimulatorer, hhv. USB og BT.

I nedenstående eksempel sættes bip 2 (funktion 2) i Jack #1 for den kablede USB musesimulator op til at aktivere og holde et venstreklik. Anvendes f.eks. til at markere eller trække et objekt.

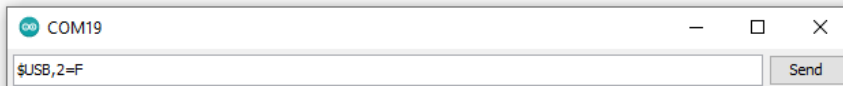


Eksempel: `$USB,2=F`

I nedenstående eksempel sættes "Bip 2" i Jack #4 (funktion 18) til at skifte mellem de to mus. Det vil sige at et langt tryk på kontakten, der er tilsluttet Jack indgang 4 skiftevis vil aktivere den kablede (USB) mus og den trådløse (BT) mus. Denne funktion kræver at funktionen opsættes både i BT og i USB musen.



Eksempel: `$USB,18=J`

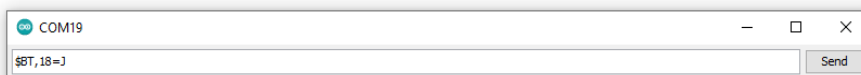


Eksempel: `$BT,18=J`



### Funktion 19 / Lydindstilling [0 - 9] – (OFF / 460Hz – 3.7kHz)

Brug denne kommando for at ændre karakteren på biplyden, der anvendes ved gennemskanning af funktionerne, når kontakterne aktiveres. Dette kan blandt andet være nødvendigt i de tilfælde, hvor en bestemt biplyd enten kan være svær at høre eller en bestemt frekvens er for markant. Funktionen kan også anvendes til at skelne mellem, hvilken mus der er aktiv, da det er muligt at vælge forskellig lyd for de to musesimulatorer.


Der er 9 forskellige lyde at vælge imellem og frekvensen for biplydene varierer i step fra ca. 460Hz – 3.7kHz. For at slukke for biplyden sættes parameteren til '0'. I nedenstående eksempel slukkes lyden for Bluetooth musesimulatoren.

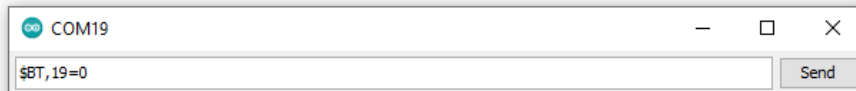

Eksempel: `$BT,19=0`

### Funktion 20 / Skan hastighed [1 – 50] – (100ms – 5s)


Hvis gennemskanningen når kontakten aktiveres går for hurtig eller langsomt er det muligt at ændre hastigheden. Hastigheden angives som pausen mellem bip'ene og sættes som x antal 100ms. I nedenstående eksempel sættes skanningshastigheden for USB musesimulatoren til 1s.

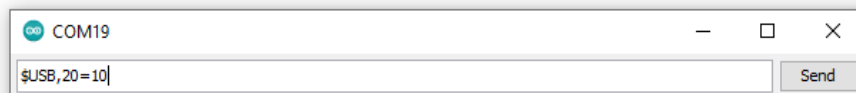

Eksempel: `$USB,20=10`

### Funktion 21 / Invertér h/v [0 - 1] – (OFF / ON)

Er det mere praktisk at AMSJOYBT vendes anderledes er det muligt at bytte om på højre og venstre retning. I nedenstående eksempel inverteres højre og venstre retning for den trådløse Bluetooth musesimulator.

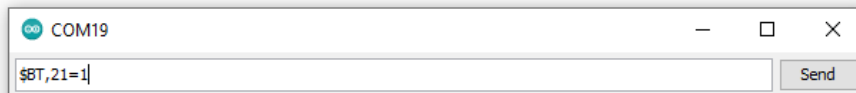


Eksempel: `$BT,21=1`

### Funktion 22 / Invertér op/ned [0 - 1] – (OFF / ON)

Ligeledes er det muligt at bytte op på retningerne op og ned.


I nedenstående eksempel vendes retningen på joysticket på USB musesimulatoren, således markøren bevæger sig nedad på skærmen, når joysticket bevæges fremad.

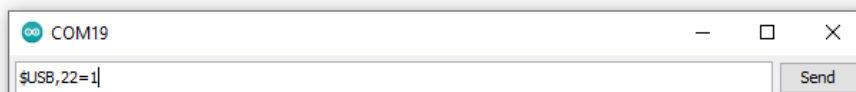

Eksempel: `$USB,22=1`

### Funktion 23 / Rotér 90 grader [0 - 1] – (OFF / ON)


Denne funktion roterer retningen på joysticket. I eksemplet nedenunder drejes retningerne på Bluetooth musesimulatoren 90 grader.

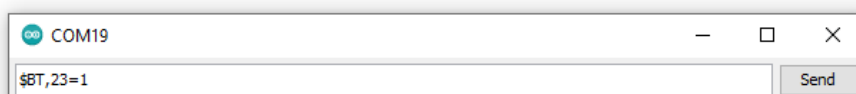

Eksempel: `$BT,23=1`

### Funktion 24 / Markørhastighed [1 – 20]

Markørens maksimale hastighed kan justeres i denne funktion. I nedenstående eksempel sættes hastigheden for USB musesimulatoren til den højeste hastighed.

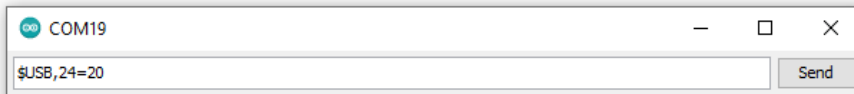

A screenshot of a Windows-style window titled 'COM19'. The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a text input field containing the command '\$USB,24=20'. To the right of the input field is a 'Send' button.

Eksempel: `$USB,24=20`

### Funktion 25 / Neutral vindue [1 – 20]

Det er muligt at justere det område, som joysticket skal bevæges udenfor, før markøren begynder at bevæge sig. Jo større dette vindue angives, desto mere bevægelse er nødvendigt fra joysticket for at få markøren til at flytte sig. I nedenstående eksempel sættes det neutrale vindue for Bluetooth musesimulatoren til mindst mulig bevægelse før markøren bevæger sig. Det kan være nødvendigt at kalibrere joysticket for at undgå at markøren kører af sig selv, uden joysticket berøres. Se afsnittet for kalibrering af joysticket for nærmere beskrivelse af dette.



A screenshot of a Windows-style window titled 'COM19'. The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a text input field containing the command '\$BT,25=1'. To the right of the input field is a 'Send' button.


Eksempel: `$BT,25=1`

## '\$RESET' – Reset til fabriksindstillinger

Begge musesimulatorer indeholder en standard opsætning som kan genkaldes ved en RESET kommando. Ved anvendelse af denne kommando sættes indstillingerne jf. nedenstående:

Input	Bip	Funktion	USB	BT
Jack #1	1	1	(B)Venstreklik	(B)Venstreklik
	2	2	(C)2 x venstreklik	(F)Hold venstreklik
	3	3	(D)Højreklik	(D)Højreklik
	4	4	(E)Midterklik	(E)Midterklik
	5	5	(F)Hold venstreklik	(I)Scroll
	6	6	(G)Hold højreklik	(C)2 x venstreklik
	7	7	(H)Hold midterklik	(G)Hold højreklik
	8	8	(I)Scroll	(H)Hold midterklik
	9	9	(J)Skift mus BT/USB	(J)Skift mus BT/USB
	10	10	(K)Sluk for mus	(K)Sluk for mus
	11	11	Reserveret	Reserveret
	12	12	BT Parringsmode	BT Parringsmode
Jack #2	1	13	(B)Venstreklik	(B)Venstreklik
	2	14	(G)Hold højreklik	(G)Hold højreklik
Jack #3	1	15	(D)Højreklik	(D)Højreklik
	2	16	(H)Hold midterklik	(H)Hold midterklik
Jack #4	1	17	(F)Hold venstreklik	(F)Hold venstreklik
	2	18	(J)Skift mus BT/USB	(J)Skift mus BT/USB
Lydindstilling	19	(8) Tone 3.3kHz	(4) Tone 1.4kHz	
Skanningshastighed	20	(5) 500ms	(5) 500ms	
Invertér h/v	21	(0) Deaktiveret	(0) Deaktiveret	
Invertér op/ned	22	(0) Deaktiveret	(0) Deaktiveret	
Rotér 90 grader	23	(0) Deaktiveret	(0) Deaktiveret	
Markørhastighed	24	(10)	(10)	
Neutral vindue	25	(3)	(3)	

I nedenstående eksempel udføres et reset af indstillingerne.

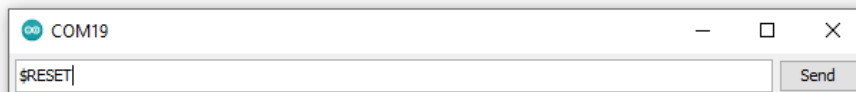


Eksempel: \$RESET

### '\$CAL' – Kalibrering af joystick

Hvis det opleves at markøren kan have tendens til at vandre selvom joysticket er sluppet eller hvis det opleves som om at joysticket skal flyttes længere til den ene side en til den anden side før markøren flytter sig, kan det være nødvendigt at udføre en kalibrering af joysticket.

Før kalibreringen udføres, skal joysticket midterstilles og undgå at flytte det mens kalibreringen foretages. I nedenstående eksempel udføres en kalibrering af joysticket.

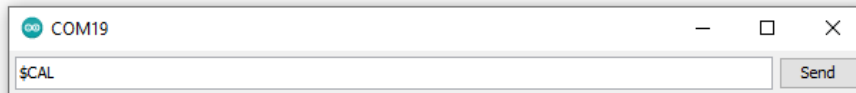

Eksempel: \$CAL

## USB forbindelse

For at anvende den kablede USB musesimulator forbindes musesimulatoren blot med computeren med det medfølgende USB-C kabel. Kanalen i bunden af AMSJOYBT der giver adgang til USB-C stikket er tilpasset et helt specielt USB-C kabel fra fabrikanten Brodit. Reservekabel kan evt. bestilles på varenr.: TC941014.

Hvis der er behov for drivere, sørger Windows automatisk for at hente og installere disse.

## Bluetooth forbindelse

Følgende procedure anvendes til parring af Bluetooth musesimulator.

1. Tænd AMSJOYBT ved at aktivere kontakten, der er tilsluttet Jack 1 indgangen.
2. Aktivér kontakten igen og hold den nede og slip den efter de 12 bip.
3. Kontrollér at den blå diode blinker i fast rytme, ca. 1 blink pr. sekund.
4. Igangssæt en Bluetooth søgning fra den enhed der skal parres med musesimulatoren.  
*Søgningen og parringen skal ske indenfor 2 minutter, hvorefter musesimulatoren automatisk forlader parringsmode og forsøger at genskabe forbindelse til den sidst kendte enhed.*
5. Når musesimulatoren findes på listen over fundne enheder, fuldføres parringen.  
*AMSJOYBT vises som "Aabentoft -XXXX", hvor de 4 X'er de sidste numre i enhedens serienummer.*
6. Enheden indikerer med en kort fanfare at forbindelse er opnået.

*OBS: Det er nødvendigt at sætte AMSJOYBT i Bluetooth parringsmode for at foretage korrekt parring. Udføres parring uden først at sætte AMSJOYBT i parringsmode vil musesimulatoren ikke automatisk forbinde til enheden efter at forbindelsen er blevet afbrudt.*

*Hvis musesimulatoren tidligere har været forbundet med enheden er det nødvendigt at slette AMSJOYBT fra listen over kendte enheder, før der foretages en ny søgning.*


## Opladning

AMSJOYBT indeholder et batteri, der oplades gennem USB-C stikket i kassens front. Ved lav batteristand, blinker den røde lampe hurtigt.

Under opladning pulserer den røde diode og ved fuld opladning lyser den røde konstant. En fuld opladning tager ca. 7 timer.

Dimensioner

AMSJOYBT (type ALPINE joystick)

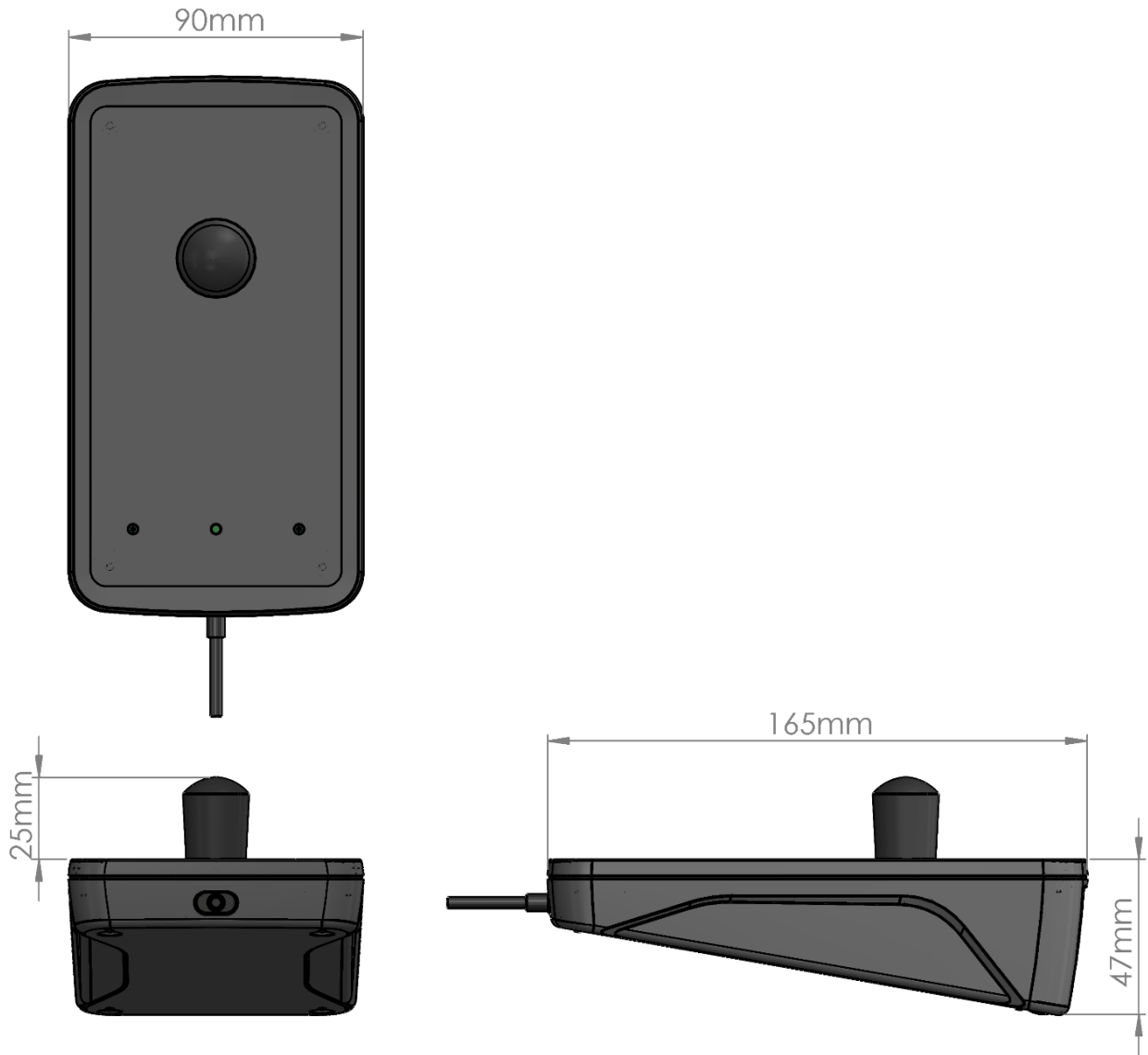

**AMSJOYBT (type PG joystick)**

