

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

38_20230601_DK

Master Comfort Heel



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1

CE

ISO 09 07 06 06

The Original Nordic
Human Handling Concept



Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/> MC 001-8090	136638	Master Comfort Heel - S	5744001974780
<input type="radio"/> MC 001-8095	136639	Master Comfort Heel - L	5744001974797
<input type="radio"/> MC 001-8091	136858	Master Comfort Heel Cover - S	5744001974803
<input type="radio"/> MC 001-8096	136859	Master Comfort Heel Cover - L	5744001974810

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges til understøttelse og aflastning af væv ved lejrning. Formålet er at give en stabil afgrænset positionering/- lejrning i forbindelse med forflytning eller langtidspositionering. Kiler med nonslip kan benyttes direkte på glatte flader.

Anvendelse af produktet:

Produktet kan placeres under underbenet for at lette trykket på hælen og vævet.

Vælg korrekt størrelse pude alt efter om der ønskes trykaflastning af den ene eller begge hæle.

Advarsel:

Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejrning og tilsyn med hud og væv.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet rengøres/vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig vævsaflastning bør kasseres. Giver produktet ikke tilstrækkelig vævsaflastning bør andre løsninger afprøves. Produkter bør efterses jævnligt og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes eller hvis skummet ikke længere yder aflastning, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Comfort Heel

Trykafastning af hæl/-e i rygleje:



1. Placeres Master Comfort Heel med den store kanal ved achillessenen opnås fuld vægtaflætning af hælen. Samtidig modvirkes overstrængning af knæene. Tilpas kuglerne, så puden ligger optimalt under benet.



2. Placeres Master Comfort Heel med den lille kanal ved achillessenen opnås delvis vægtaflætning af hælen, så foden stadig har let kontakt med lagnet. Ideel vægtaflætning for brugere med sansedfordringer eller demens.



3. Er der kun behov for trykafastning af den ene hæl, kan Master Comfort Heel - S med fordel benyttes.

Side- og maveleje:



4. Master Comfort Heel kan med fordel anvendes hos brugere, der lejres med parallelle ben. Placeres med den lille kanal ved fødderne.



5. Placeres puden let forskudt bagud giver dette øget følelse af stabilitet i lejringen.



6. Ved maveleje foldes Master Heel og placeres så den støtter foden og skinnebenet. Dette kan minimere risikoen for fejlstilling i fodledet hos brugere.

Cover og indhold:



7. Der kan tilkøbes et lækket bomuldsbetræk, så Master Comfort Heel bliver ekstra blød og behagelig at ligge op ad.



8. Master Comfort Heel indeholder ægte krøyerkugler, som fordeler sig stabilt mod kroppen og giver både omverden samt en god vægtfordeling mod vævet.

Brugervejledning - Master Comfort Heel

Tekniske specifikationer

Materialer:

Yderside: Flammehæmmende, elastisk og vandtæt polyester.

Indhold: Originale, flammehæmmende Krøyerkugler.

Cover: Recycled Bomuld, Polyester, Elasten

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

DS/EN ISO 12952-2:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 2: Antændelseskilde: tændstikflamme.

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Max. Brugervægt:
MC 001-8090 Master Comfort Heel - S	L 65 x B 40 cm	200 kg
MC 001-8095 Master Comfort Heel - L	L 65 x B 70 cm	200 kg
MC 001-8091 Master Comfort Heel Cover - S	L 65 x B 40 cm	-
MC 001-8091 Master Comfort Heel Cover - L	L 65 x B 70 cm	-

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og tilsyn med hud og væv.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C, men aftørring med sprit/alkohol anbefales for at forlænge holdbarheden. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling: Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Stryging:

Tåler ikke stryging



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at inkontinensoverfladen stadig er intakt ift. brug, og at alle syninger er intakte



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

