

MADE IN
EUROPE




Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

32_20230731_DK


Master Stretcher

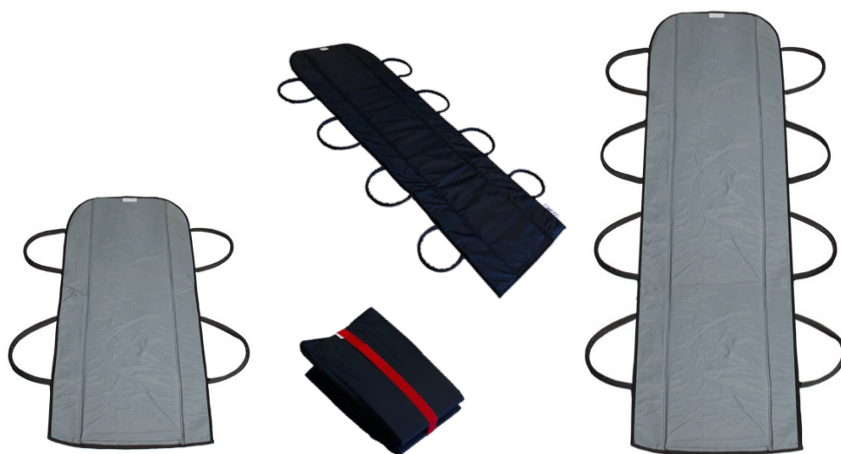

MC 002-1360

MC 002-1386

MC 002-1370

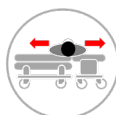

Varenr.

MC 002-1360
MC 002-1370
MC 002-1386

HMI nr.

34295
34294
136860

Navn - Størrelse

Master Stretcher - M
Master Stretcher - L
Master Stretcher Foldbar

UDI-DI/GTIN

5744001973516
5744001971444
5744001973356

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 18

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



master-care.dk



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan bruges som glidematte under en bruger med nedsat fysisk funktion, hvor denne akut skal forflyttes efter fald fra områder, hvor fx lift ikke er tilgængelig.
Er friktionen mod underlaget for høj bør glidestof anvendes.

Anvendelse af produktet:

Produktet rulles under bruger. Med greb i de påsyede håndtag trækkes bruger ud til et mere tilgængeligt område, hvorfra videre forflytning kan foregå. Trækstropper kan monteres i håndtagene for at opnå en bedre ergonomisk arbejdsstilling.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

Brugervejledning - Master Stretcher

Indholdsfortegnelse

Brug af Master Stretcher ved fald på gulv:	side 2
Forflytning mellem 2 senge:	side 3
Fjernelse af Master Stretcher:	side 3
Tekniske specifikationer	side 4



Brugervejledning - Master Stretcher

Brug af Master Stretcher ved fald på gulv:



1. Master Stretcher er ideel ved fald på steder med sparsom plads.



2. Rul bruger om på siden. Fold nederste kant og håndtagene og placer Master Stretcher med håndtagene mod gulvet og ind under brugeren.



3. Rul bruger om på Master Stretcher.



4. Tip brugeren en smule til modsatte side og ret Master Stretcher helt ud.



5. Master Turner - Trækstropper kan monteres i Master Stretchers greb for at forbedre hjælperens arbejdsstilling.



6. Træk bruger til et sted, hvor der er bedre plads til fx gulvlift. Brug vægtoverføring.



7. Hvis der kun er én hjælper, kan Trækstropperne monteres på hver sin side af Master Stretcher.

Brugervejledning - Master Stretcher

Forflytning mellem 2 senge:



8. Rul brugeren om på siden. Placer Master Stretcher under brugeren med håndtagene nedad. Fold kanten og håndtagene ind under brugeren.



9. Rul brugeren retur på Master Stretcher og tip en smule til modsatte side for at rette Master Stretcher helt ud.



10. Monter Master Turner - Trækstropper og placer et glidestykke let under Master Stretcher og over til modtagersengen.

Fjernelse af Master Stretcher:



11. Vend brugeren en smule mod sideleje og fold kanten og håndtag nedaf, ind under Master Stretcher.



12. Tip brugeren til modsatte side og træk Master Stretcher ud.



13. Master Stretcher - L bruges til brugere uden funktion af benene. Monteres og benyttes som Master Stretcher - M.

Brugervejledning - Master Stretcher

Tekniske specifikationer

Materialer:

Polyamid, Polyurethan, Polyester, Silikone

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

DS/EN ISO 12952-2:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 2: Antændelseskilde: tændstikflamme.

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 002-1360 Master Stretcher - M	L 120 x B 50 cm	4	250 kg
MC 002-1370 Master Stretcher - L	L 180 x B 50 cm	8	250 kg
MC 002-1386 Master Stretcher Foldbar	L 180 x B 60 cm	8	250 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Efterlad aldrig en bruger liggende på produktet, mens dette er er koblet på en lift.



Må ikke bruges som liftsejl – kan med fordel kombineres med lift til fx. vendinger i seng.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: L 250 kg.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Skylemiddel:

Der må ikke anvendes skylemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm.
Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Find os på:

