

BRUGERVEJLEDNING FOR TEQLER FOLDBAR KØRESTOL



VARENUMMER T129141

Tak for at have valgt en Teqler Foldbar Kørestol. Denne manual vil give dig vigtig information om produktet og dets korrekte brug.

PRODUKTBEKRIVELSE:

Den foldbare letvægtskørestol fra Teqler er sikker, robust og pålidelig – og du kan anvende den i dit hjem, på plejehjem, på offentlige steder mv. Den er egnet til daglig brug - både indendørs og udendørs. Benstøtterne kan let foldes til siden eller fjernes, og hjulene kan låses med en parkeringsbremse for at forhindre, at den foldbare rullestol ruller væk. Derudover kan den også bruges som en aktiv rullestol takket være dens håndrim. Kørestolen leveres med passiv belysning (reflektorer) og en dokumentlomme på bagsiden. Den har en maksimal belastningskapacitet på 120 kg og er lavet i overensstemmelse med CE-standarder.

PRODUKTANVENDELSE:

Det er meget let at folde kørestolen ud - du presser blot sædet nedad, og så er stolen klar til brug. Når du skal folde kørestolen sammen, så løfter du blot op i sædet. Benstøtterne er nemme at tage af/på. Når kørestolen er sammenklappet, så er den nem at opbevare i din bolig, og den er nem at have med på tur, f.eks. i bilen eller i bussen. Kørestolen er således velegnet til rejser, da den er foldbar. Den fylder ikke meget i dit hjem, når den er foldet sammen, og den er nem at opbevare.

PRODUKTDETALJER:

- Der medfølger skubbehåndtag til ledsageren.
- Benstøtter kan let fjernes, vippe og dreje.
- Der er 2 robuste gummihjul med bremse bagpå (ca. 3 cm brede) og 2 små hjul foran.
- Der er Parkeringsbremse.
- Armlæn foldes let op
- Tekstilmaterialet på sæde og ryglæn kan let vaskes og desinficeres
- Sædebredde: 46 cm
- Sædehøjde: 49 cm
- Dimensioner: 92 x 79 x 63 cm (H x D x B)
- Brede foldet: 28,5 cm
- Vægt: 18,4 kg

MONTERING OG

VEDLIGEHOLDELSE:

Den foldbare kørestol leveres fuldt samlet. For at sikre din kørestols holdbarhed anbefaler vi, at du regelmæssigt kontrollerer tegn på slid og udskifter eventuelle beskadigede dele efter behov. For at rengøre kørestolen skal du blot tørre den af med en fugtig klud og mild sæbe. Brug ikke skuremidler eller nedsænk kørestolen i vand. Vi håber, at denne manual har været nyttig i at give dig den nødvendige information om Teqlers foldbare kørestol. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så er du velkommen til at kontakte os.

