

Mobilex toilet- og badestol med tiltfunktion "Kakadu"

Varenr. 302024 og 302025

Montage- og brugervejledning

og med montering af 24" hjul som ekstra tilbehør (varenr. 302023)



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde

Denne montage- og brugervejledning indeholder en beskrivelse af produktet samt vigtige sikkerhedsanvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse vejledningen grundigt igennem. Det er særlig vigtigt at læse sikkerhedsanvisningerne og følge disse. Vi videreudvikler løbende vores produkter og forbeholder os derfor ret til uden varsel at foretage ændringer af produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre og handicappede personer, der har brug for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg. Produktet må kun anvendes indendørs og med den angivne max. belastning (jf. tekniske data). Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De rette henvende til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning mv. er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes indendørs på et plant og stabilt underlag.
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.
- Alle hjul **SKAL** hele tiden være i kontakt med underlaget under brug. Dette sikrer at produktet er i balance hvorved uheld forebygges.
- Når produktet anvendes i stationære situationer skal hjulene låses.
- Sørg altid for at sidde i stolen i korrekt siddeposition og flyt kun toiletudskæringen ved toiletbesøg. Kan brugeren ikke opretholde en stabil siddeposition bør stolen ikke andendes.

Advarsel

Hvis brugerne læner sig langt fremover, fx for at nå et objekt, eller rykker frem på sædet, fx i forbindelse med en forflytning, **SKAL** fødderne placeres på gulvet for derved at fjerne noget af vægten fra stolen.

Fødderne må **IKKE** placeres på fodstøtterne når man ikke sidder i stolen, idet der derved opstår en risiko for at stolen tipper forover.

I forbindelse med forflytninger skal bremserne altid aktiveres.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Toilet- og badestolen "Kakadu" har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har behov for siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor

korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle. Stolen kan tiltes så der kan opnås en aflastende og stabil siddestilling, og der er monteret en hovedstøtte. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig.

Stolen leveres i en kasse, delvis adskilt, for at spare plads under transport. Indholdet af kassen er:

- 1 ramme med sæde
- 1 ryg
- 1 hovedstøtte
- 2 fodstøtter
- 4 hjul med bremse
- 4 bolte og møtrikker for montering af hjul
- 1 spand med lås
- 1 PU lås for at dække sædets udskæring
- 1 montage - og brugervejledning



Montagebeskrivelse

Toilet- og badestolen "Kakadu" monteres som på billedet overfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:

Start kontrol

- Tag alle dele ud af kassen og tjek at alle dele er der. Hvis der mangler noget skal der tages kontakt til forhandleren med det samme inden videre montage.

Hovedramme

- Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet. Nu ses de 4 huller til montering af hjul.

Hjul

- Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rørende.
- Der er boret 2 huller (A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan monteres i 3 forskellige højder.
- Sørg for at alle hjul er monteret til samme højde. Fastspænd



- bolten forsvarligt.
- Nu vendes rammen om.

Bremser

- Lås hjulenes bremser før der forsættes. Bremserne aktiveres ved at træde ned på trædepladen på den forreste del af hjulet.
- For senere at låse bremsen op løftes trædepladen igen med foden.

- ▲ - Lås altid hjulenes bremser når stolen ikke benyttes.
- Lås altid hjulenes bremser ved ind- og udstigning af stolen.

Ryglæn

- Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen.
- Fastgør ryggen ved at dreje på grebene.

Hovedstøtte


- Monter hovedstøttens vertikale rør med beslaget på skubbe-bøjlen.
- Juster hovedstøtten til den ønskede højde og skru grebet fast.

Toiletspand


- Monter låget på spanden (billede 1)
- Skub det ind i skinnerne monteret under sædet. Gøres fra bagsiden af stolen (billede 2)
- Læg det sorte PU afdækningslag på plads (billede 3)



Billede 1

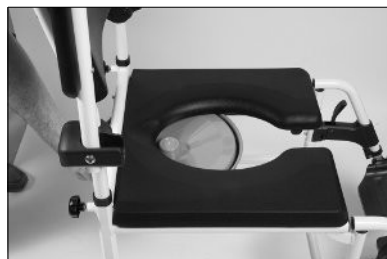

Billede 2

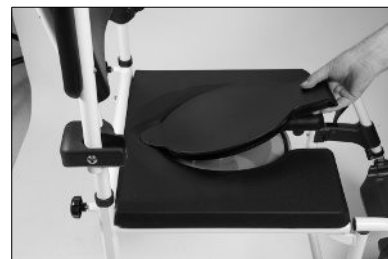

Billede 3

Benstøtter

- Monter fodstøtterne ved at isætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i rørenderne i rammefronten
- Drej derefter fodstøtten til den låser
- For at afmontere fodstøtten igen drejes den 90° udad og løftes opad.

Armlæn

- Armlænene kan let klappes op til lodret position.
- For at få dem tilbage, trykkes de let nedad igen.

Tippefunktionen

- Stolen er udstyret med en tippefunktion der gør det muligt at tippe sædet -5 til +25°.
- Sidde vinklen kan reguleres ved at betjene grebet på kørebøjlen. Når grebet er aktiveret kan stolen bevæges op og ned. Se billede til højre.
- Brugeren må ikke sidde i stolen ved maksimal vinkelindstilling frem eller tilbage uden opsyn.



Transport af toilet- og badestolen

Toilet- og badestolen er ikke beregnet til hyppig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den og der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed til at transportere den i samlet tilstand, anbefales det at adskille den (jf. montagebeskrivelsen).

Tilbehør (ekstra udstyr)

Montering af sikkerhedssele (ekstra tilbehør)

Det er muligt at montere en sikkerhedssele på stolen.
Det er vigtigt at sikkerhedssele har løkker i enderne, som eksempelvis sikkerhedssele fra Mobilex (varenr. 233012).
Løkkerne anbringes på rammen af stolen ved at løfte ryglænet op som vist på billede 6.

Vær opmærksom på at vende selet så spændet vender fremad inden ryglænet igen påsættes og selet er monteret som på billede 7.



Billede 6: Åbent ryglæn




Billede 7: Sele monteret


Montering af 24" baghjul (ekstra udstyr)

Det er muligt at udskifte de 2 bageste 5" hjul med 24" hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremses, findes i tilbehørssættet (varenr. 302023).

- Aftag de 2 bageste 5" hjul ved at løsne boltene.
- Placer monteringsbeslagene som vist på billede 8.
- Der er boret flere huller i rammen for at muliggøre højdejustering. Vælg en højde og isæt og fastgør monteringsboltene med de tilhørende bolte og skiver.
- Tryk på quick release akslen der er placeret i midten af hjulene. Isæt akslen i beslagene så langt ind den kan komme og slip trykknappen (billede 9).
- Tag fat i hjulene og kontroller at de sidder helt fast.
- For at aftage hjulene trykkes på trykknappen samtidig med at der rykkes i hjulet med den anden hånd.
- Efter montage af 24" hjul kan det være nødvendigt at justere de forreste hjul så stolen står vandret.
- Når 24" hjul monteres er det nødvendigt at montere normale kørestols bremses.
- Bremsesne består af montageklammer, selve bremsen og 2 fikseringsbolte.
- Indsæt bremsens justeringsprofil i bremseklammens mindste åbning.
- Placer montageklammen på stolen horisontale rør som vist på billede 11.
- Flyt bremsen indtil friktionsbolten næsten rører dækket.
- Fastgør boltene så bremsen sidder stabilt.
- For at aktivere bremsesne skubbes bremsehåndtaget fremad. For at slippe bremsen trækkes håndtaget bagud.

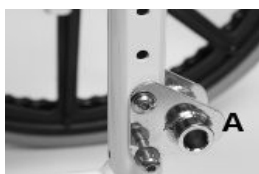

Billede 8: Hjulophæng monteret på rammen

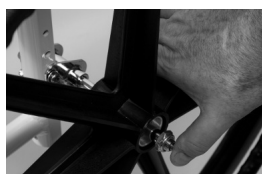

Billede 9: 24" hjulet med quick release aksel



Billede 10: Afdækningskappe på 24" hjul.



Billede 11: Montering af bremses på rammen.




Billede 12: Kontroller om bremsesne griber fat i dækket på hjulet.

4. Tekniske data

Teknisk data	Kakadu Tilt Art. 302024	Kakadu Tilt bred Art.302025	Forskel med 24"
Sæddebredde	45 cm	50 cm	---
Sæddedybde	43 cm	43 cm	---
Sæddehøjde (indstillelig)	50 - 60 cm	50 - 60 cm	---
Frihøjdeindstillelig	---	---	---
Totalbredde	56 cm	61 cm	+ 8 cm
Totaldybde	110 - 120 cm	110-120 cm	+ 5 cm
Totalhøjde (indstillelig)	97 - 141 cm	97 - 141 cm	---
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	---
Vægt	15,60 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Kipvinkel (kun "tilt")	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

Typeskilt

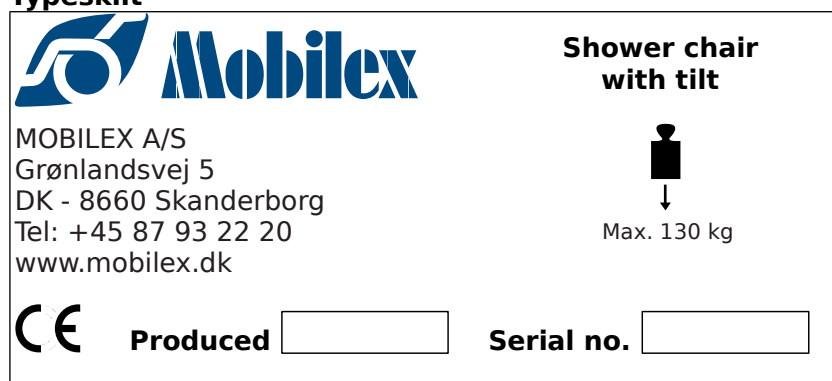

Eksempel på typeskilt som er placeret nederst på rammen

5. Vedligeholdelse og pleje

Pleje:

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

Advarsel

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en binding og ophobning af kalk på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smørreolie.

Advarsel

Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme og garantien vil bortfalde.

6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Badestolen er ikke stabil	Hjulene er justeret til forskellige højder	Juster alle hjulene til samme højde
Hjulene drejer ikke let	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksler	Rengør hjulenes aksler for skidt
Tilt funktionen virker ikke	Mulig fejl i gascylinderen	Kontakt forhandleren

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at



Mobilex toilet- og badestol med tilt "Kakadu"

Varenr. 302024 og 302025

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S

Skanderborg, den 3-11-2015

.....
Underskrift