


# Hyper Foam 2 clinic

## Brugsanvisning

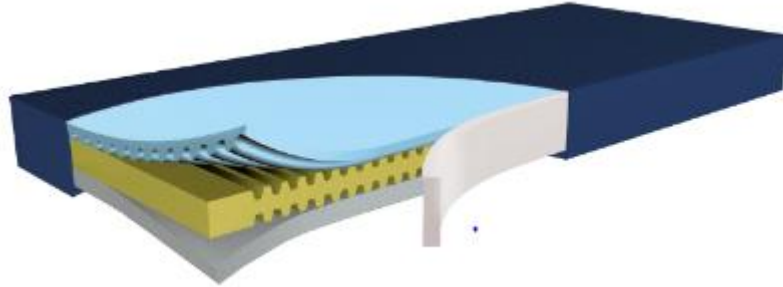

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager madrassen i brug, og overhold **advarslerne!**

Model	Mål	HMI-nr.	Varenr.	Produktvægt	Patientvægt
Hyper Foam 2 clinic	85 x 200 x 15 cm	103526	998015	11 kg	20-150 kg
Hyper Foam 2 clinic	90 x 200 x 15 cm	103530	998016	11 kg	20-150 kg
Hyper Foam 2 clinic	105 x 200 x 15 cm	113326	998017	11 kg	20-150 kg
Hyper Foam 2 clinic	120 x 220 x 15 cm		998018	11 kg	20-150 kg

### Tiltænkt anvendelse

Hyper Foam 2 clinic er velegnet til brug i private hjem, plejecentre, sygehuse, institutioner og klinikker.

- Madras til forebyggelse og behandling af tryksår op til grad 4 (Seiler/EPUAP)
- Smertebehandling
- Til patienter med meget høj risiko for tryksår.

### Begrænsninger

Ingen kendte kontraindikationer.

### Produktspecifikation:

- Madrassen består af en 3-lags højelastisk skum med både langs og tværgående skæringer, og med faste sider som giver bedre stabilitet
- Supersoft zone til lindring og aflastning af hoved og hæl.
- Exceptionelt ventilationssystem sørger for et ideelt mikroklima.
- Udskifteligt brandhæmmende, ånd- og strækbart inkontinensbetræk i polyurethan med beskyttet lynlås. Betrækket har ultralydsvejsede syninger.

### Advarsler

Før madrassen tages i brug første gang, skal den være klargjort ifølge nedenstående og brugsanvisningen gennemlæst.

Madrassen er velegnet til indstillelige liggeflader.

Tjek at der minimum er 22 cm fra overfladen af madrassen til overkanten af sengehesten, når denne er slået op.

### Inden brug

1. Fjern madrassen fra kassen straks efter modtagelsen.
2. Læg madrassen på sengen.
3. Bemærk "THIS SIDE UP", der er trykt på toppen af madrassen sammen med fodsymbol.

### Rengøring

Skum:

- Kan rengøres med almindeligt tilgængelige desinficeringsmidler. Dette gøres ved at wipe eller sprøjte et desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB Incidin OxyWipe S). Desinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (rent vand). Kemotermisk rengøring er mulig. Derefter skal skummet lufttørres.
- Skummet kan autoklaveres ved 105° (RKI-guidelines, vakuumproces 55 min). Herefter er skummet klar til brug igen.

**BEMÆRK:** Hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller hvis der er synlige skader, skal skummet bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

#### Inkontinensbetræk:

- Kan rengøres med almindeligt tilgængelige desinficeringsmidler. Dette gøres ved at wipe eller sprøjte et desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB Incidin OxyWipe S). Desinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (rent vand). Kemotermisk rengøring er mulig. Derefter skal lufttørres.
- Inkontinensbetrækket kan autoklaveres ved 105° (RKI-guidelines, vakuumproces 55 min). Herefter er betrækket klar til brug igen.
- Inkontinensbetrækket på både madras og madrasforlænger er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 95 ° C.

**BEMÆRK:** Hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller der er synlige skader, skal betrækket bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

## Teknisk data

<b>Medicinsk udstyr</b>	Klasse 1, MDR 2017/745 
	<b>CE</b>
<b>Produktet indeholder:</b>	Decubitus terapimadras med skum PU-inkontinensbetræk (aftageligt med lynlås) Brugsanvisning
<b>Materiale</b>	Skum i PU-skum 43kg/m <sup>3</sup> Betræk: PU-belagt PES-materiale
<b>Teknisk sikkerhed</b>	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
<b>Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Garanti</b>	5 år på de funktionelle egenskaber
<b>Vedligeholdelse</b>	Ingen



Åndbart, åben-cellet



Autoklaverbar



Virus- og bakteriebestandigt betræk



Vandtæt, men gennemtrængelig for vanddamp



Optimeret tryklindring



Bi-elastisk betræk til minimering af forskydningskraft



Vedligeholdelsesfri



Brandhæmmende DIN 597 (I+II) CRIB 5



Patientvægt: 20 – 150 kg.

#### Fremstillet af



Funke Medical GmbH  
Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld  
Germany  
Tlf: +49 (0)2865 – 266 93 50  
Fax: +49 (0)2865 – 81 33  
Mail: [info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)  
[www.funke-medical.de](http://www.funke-medical.de)

#### Forhandles af



able nordic a/s  
Mågevej 16, 8370 Hadsten  
Danmark  
Tlf: (+45) 86982499  
E-mail: [kr@ablenordic.dk](mailto:kr@ablenordic.dk)  
[www.ablenordic](http://www.ablenordic)