






Når alt udstyret er sat til vognen, så sættes der strøm til. Sørg for at ledningen ikke ligger i vejen for Borgerne så dette giver faldskader. Her efter tændes der for alt udstyret ved at trykke på de røde knapper. Sluk alt lyset i rummet og oplev en verden af lys, duft og farve.

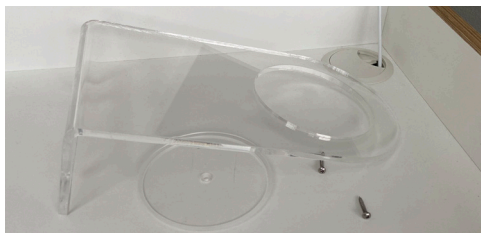

Hvis vandbeholderen skal tømmes for vand er det vigtigt at følge denne vejledning. Find passende værktøj der passer til skrueerne. Sluk for strøm! Løsn den øverste plade i toppen af vognen, fjern låget på røret. Løsn de 3 skrue i bunden ved sølv pladen, og løft pladen ovenud af røret. Smid ikke med de løse dele da dette kan give skader.



Når strøm er sat til, kan du skifte lys i vandsøjlen, med medfølgende fjernbetjening, hvor du kan vælge hvilken stemning du ønsker i rummet, ud fra de farver der er på fjernbetjeningen.



Vær 2 personer dette! Én løfte og holder røret, og én kobler den gennemsigtige slange fra (den som kommer inde fra vognen af, der tilfører luftbobler). Når denne er løsnet, så kan røret løftes væk og tømmes for vand. Efterfølgende klippes der 5mm af den gennemsigtige slange, for at luftboblerne slutter tæt igen og giver luft i røret. Saml herefter vognen igen.



**Snoezel vogn til sansestimulering!**  
- Til børnehaver/ skoler  
- Specialinstitutioner  
- Plejecentre

Læs altid denne brochure igennem før brugen af Snoezelvognen!  
Gem til senere brug.

Produced i EU

Oliz/Koko-Nora Aps - Orionvej 2A- 7430 Ikast  
+45 60383700 / 20787954 - th@oliz.dk / mh@oliz.dk

Brug aldrig vognen uden opsyn, da der er ledninger, vand og strøm der kan give faremomenter for Borgerne.



Inden du går i gang med at fylde destileret vand i røret, og tilføjer udstyr, så sørg for at strømmen er afbrudt. Fyld herefter destileret vand i. Max fyldning er dog 5 cm fra øverste kant. (Destileret vand anbefales for at undgå kalk aflejringer i røret, dette kan give uklart rør med tiden.



Påfør slange til pumpe så der kan komme luftbobler i røret når strøm tilføres til sidst. Er røret med vand utæt, kontakt da Oliz Koko-Nora.

**Tilføj aldrig strøm til et utæt rør!**



Projektør der kan vise blomster på væggen. Har ligeså en rund skive med flydende væske der kan give et blåt mønster på væggen, når den drejer rundt. Påføres i siden af projektoren ved at skubbe den ind i den lange rille. De firkantede farver skal i den lille ramme der også er i siden af projektoren.




Laser, der kan skifte farve. Laser kan bruges både med og uden kuppel, dette giver forskelligt lys, når den er tændt. Sæt først strøm til til sidst når det sidste udstyr er sat til vognen.



Vibrations puden med imiteret læder betræk sættes til i siden af vognen. Før stik ind og drej den mod højre til den klikker på plads. Når den skal fjernes, trækker man i den grå knap og drejer mod venstre og trækker den ud af stikket.



LED lys der kan oplades med medfølgende stander, der kræver strøm for at oplade lysene. Lysene kan puttes i plastik beholder og placeres i rummet eller på vognen efter behov. Hav dog altid lysene uden for rækkevidde for at undgå skader på Borger og lys.

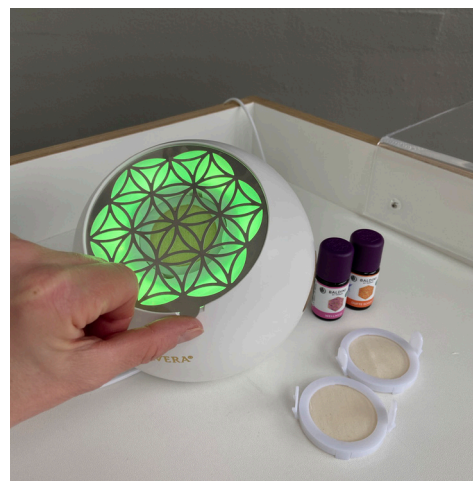

Denne projektor, har lys der skifter farve og via en lille blæser sørger den for, at der kommer en dejlig beroligende duft ud i rummet. Brug kun duft egnet til dette formål. Brug kun den samme duft på den samme duft ring. Mærk evt. ringen med navnet på duften.



Du tilføjer duft ved at løfte gitter, og klemme på de små tapper der er på ringen og løft ringen op. Påfør kun få dråber (3) ad gangen. Når duften bliver svag så tilføjer du igen 3 dråber. Herefter ligger du ringen tilbage og klikker den fast og placerer gitteret ovenpå projektoren. Alt tilbehør skal holdes uden for Borgers område.