


GRIP SOCK

Til personlig brug i forskellige plejemiljøer. De minimerer risikoen for at glide, mens man går på gulve og våde overflader, og gør det lettere at skifte position i sengen. Det pålidelige greb sænker tærsklen for at bevæge sig og fremskynder rehabiliteringen

Brug af Grip Sock.

Grip Sock er nem at bruge, fleksibel og åndbar. Den forhindrer at glide på tørre og fugtige overflader og gør det let at skifte position i sengen. Lavet af miljøvenligt, genanvendeligt materiale. Tag den på ved at rulle den på, ikke trække fra skaftet. Må ikke bruges udendørs.

Valg af sok. Vælg en sok i henhold til brugerens fodstørrelse (XXS-XXL). Til et ben med hævelse, sting eller sår, vælg en større størrelse. Om nødvendigt kan du løsne sokken ved at klippe åbningerne i meshstrukturen større uden at trævle. Beskyt sår hud med sårbandager inden brug af sokken. Sokken kan trænge igennem stoffer, der øger glatheden af gulvfladen (f.eks. silikone i en sårbandage). Ikke anbefalet til personer med alvorlige gummi allergi.

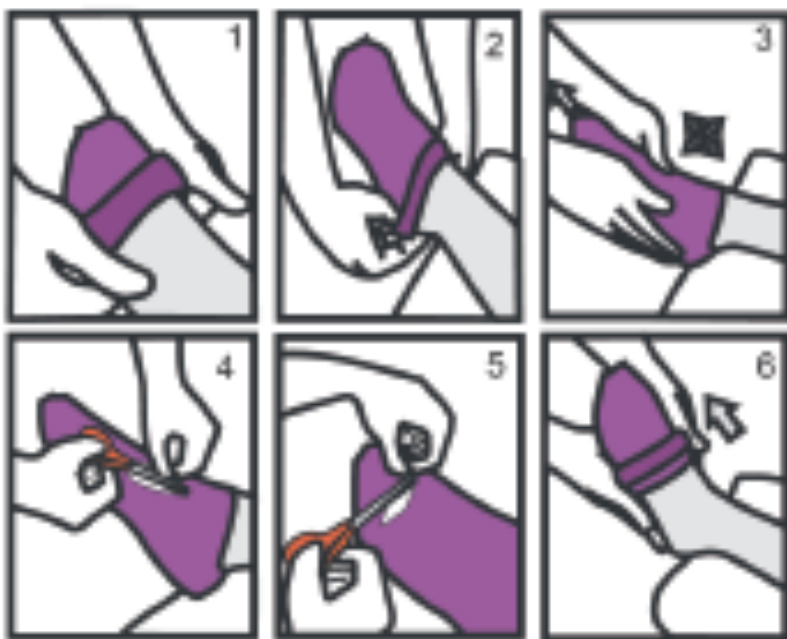

1. Start med at placere spidsen af den oprullede sok ved tæerne og fortsæt med at rulle sokken ud mod hælen - træk ikke.

2. Rul sokken op mod og over anklen ved forsigtigt at strække sokken med dine tommelfingre.

3. Jævn sokkens meshstruktur ved at "gnide" den på foden, og kontroller samtidig, at sokken ikke er for stram ved tæerne eller slæbende fødder.

NB! Undgå at belaste meshstrukturen ved hælen og undgå stramme lag ved fodballen og anklen.

Klipning:

4. Hvis brugerens fødder er hævede, eller der er sår eller sting, kan sokken udvides ved at klippe. Løft meshstrukturen væk fra huden og klip på de valgte steder.

5. For at vaske tæerne i brusebadet kan du klippe cirka 5 cm af sokken vandret ved den nederste del af fodballen. Vend sokkens spids ind under foden, og efter vask vendes den tilbage på plads.

NB! Efterlad altid mindst 2 cm intakt materiale ved sokkeskaftet for at holde sokken på plads.

Afklædning

6. Fjern sokkerne ved at rulle fra sokkekanten ned mod tåspidsen.

Efter at have brugt Grip Socks i 24 timer på bare fødder, skal sokkerne skylles eller vaskes ved 40 grader med mildt vaskemiddel.



Tekniske oplysninger

Skridsikker Grip Sock

Størrelse: XXS, S, M, L, XL, XXL

Materiale: SEBS

Affaldshåndtering:

Medicinsk udstyr

Producent: CareCare Oy

FI-MF-000017782

Kirkkokatu 1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Dansk distributør:

K.C. Pedersen

Helgeshøj Alle 10

2630 Tåstrup

www.kcpedersen.dk

e-mail: info@kcpedersen.dk

tif. 46562968