

Vigtigt

Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug.
Brug kun den medfølgende strømforsyning.


Advarsel

- For at mindske risiko for brand eller stød bør vækkeuret ikke udsættes for regn eller fugt.
- Vækkeuret er udstyret med åbninger til ventilation, disse åbninger må ikke tildækkes.
- Stearinlys eller andre former for åben ild må ikke placeres på vækkeuret.
- Vaser, vandglas eller andre beholdere med vand må ikke placeres på vækkeuret.
- Vækkeuret må ligeledes ikke udsættes for dryppende vand, vandsprøjt eller lignende.
- Undlad at placere vækkeuret i et lukket skab eller andre steder med utilstrækkelig luftgennemstrømning.
- Elektromagnetisk interferens kan forstyrre vækkeuret. Hvis dette sker, skal du blot fjerne strømmen fra vækkeuret og sætte den tilbage i. Hvis dette ikke hjælper, prøv da at flytte vækkeuret.

Indholdsfortegnelse

Produktoversigt	4
Indstillinger	5
Testtilstand	5
Indstilling af klokkeslæt	5
Indstilling af alarmtidspunkt	5
Indstilling af 12 eller 24 timers ur	6
At blive vækket af vækkeuret.....	6
Indstilling af alarmens varighed	6
Slå alarmen fra	7
Snooze alarmen	7
Indstilling af snooze-varighed	7
Indstilling af lydstyrke	7
Indstilling af tone.....	7
Indstilling af lysstyrken i displayet.....	8
Vibrator til sengebund/pude.....	8
Opladning af mobiltelefon etc. med USB	8
Reservebatteri	8
Strømforsyning	8
Tekniske informationer	9

Produktoversigt

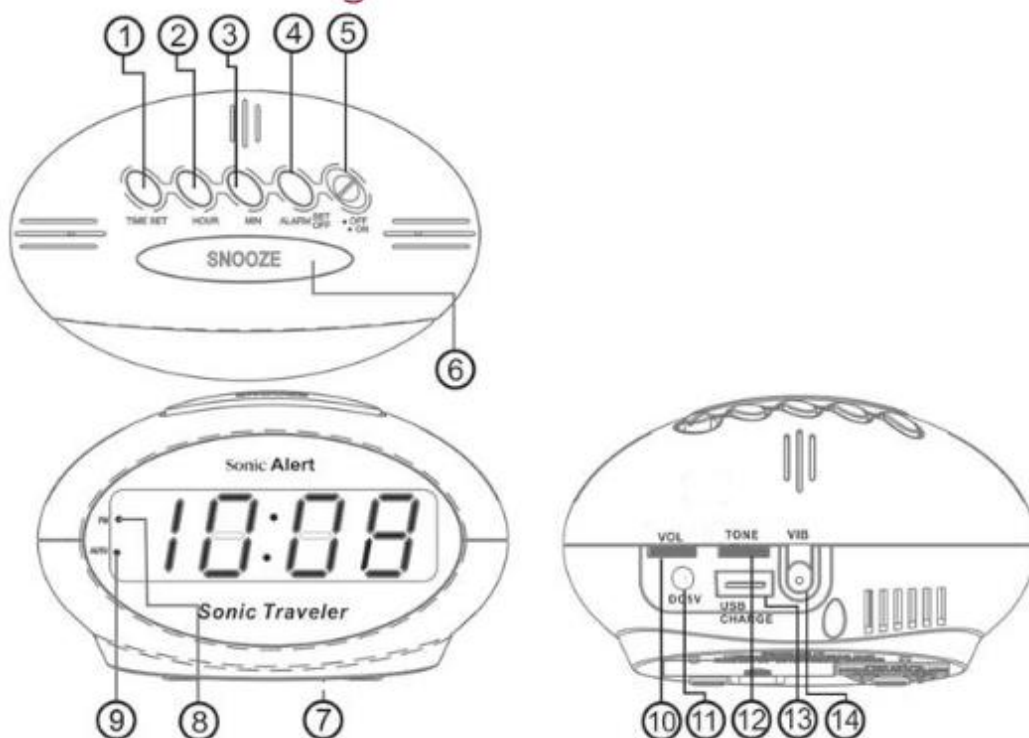

1. Tidsindstilling	8. Indikator for 12 timers ur (AM/PM)
2. Timer	9. Auto, indikator for tændt alarm
3. Minutter	10. Justering af lydstyrke
4. Indstilling af alarmtidspunkt	11. DC 5V strømstik
5. Alarm tænd/sluk	12. Toneindstilling
6. Snooze	13. Mikro-USB-stik til opladning
7. Batteridæksel	14. Stik til vibrator

Indstillinger

Testtilstand

1. Tryk og hold *snooze* (6) og *tidsindstilling* (1) inde i 3 sekunder for at aktivere testtilstand. Displayet vil herefter vise "7ES7" for at indikere, at vækkeuret er i testtilstand.
2. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i et minut, så vil vækkeuret gå tilbage til sin normale tilstand.
3. Tryk en valgfri knap (undtagen *snooze* (6) og *tidsindstilling* (1)) for at afslutte testtilstanden.
4. Når vækkeuret er i testtilstand vil det demonstrere sine funktioner, heriblandt vibrator (hvis den er sluttet til), blinkende lys og alarm.
5. Efter at vækkeuret er færdig med demonstrationen kan du blot trykke på en valgfri knap (undtagen *snooze* (6) og *tidsindstilling* (1)) for at gå tilbage til normal tilstand.

Indstilling af klokkeslæt

1. Tryk og hold *tidsindstilling* (1) nede, samtidig med at du trykker på *timer* (2) for at indstille timetallet.
2. Tryk og hold *tidsindstilling* (4) nede, samtidig med at du trykker på *minutter* (3) for at indstille minuttallet.

Der lyser et lille LED lys (8), hvis klokkeslættet er indstillet til 12:00 PM – 11:59 PM.

Indstilling af alarmtidspunkt

1. Tryk og hold *alarmindstilling* (4) nede samtidig med at du trykker på *timer* (2) for at indstille timetallet.
2. Tryk og hold *alarmindstilling* (4) nede, samtidig med at du trykker på *minutter* (3) for at indstille minuttallet.

Bemærk: hvis uret er sat til 12 timer (AM/PM) skal du være opmærksom på, hvilket tidspunkt alarmen er sat til. Den lille indikator (8) lyser hvis du er ved at indstille alarmen i PM tidsrummet.

Indstilling af 12 eller 24 timers ur

1. Tryk og hold *timer*(2) nede i 6 sekunder for at vælge mellem 12 og 24 timers ur.
Displayet skriver henholdsvis 12H og 24H alt efter hvad der vælges.
2. Slip *timer*(2) knappen, når den ønskede indstilling vises på displayet.
Hvis der ikke foretages et valg inden for 4 sekunder, vil vækkeuret gå tilbage til den sidst valgte indstilling.

At blive vækket af vækkeuret

1. Hvis du kun ønsker at blive vækket af alarmlyden, sæt da ikke vibratoren til.
 - a. Indstil *lydstyrken* (12), så alarmen har den ønskede volumen.
2. Hvis du kun ønsker at blive vækket af vibratoren, forbind da vibratoren til vækkeuret (14) og skru helt ned for *lydstyrken* (12).
3. Hvis både ønsker at blive vækket af både alarmlyden og vibratoren skal du forbinde vibratoren til vækkeuret (14) og indstil *lydstyrken* (12) til det ønskede niveau.
4. Du kan indstille alarmtidspunktet som beskrevet ovenfor.

Indstilling af alarmens varighed

Alarmens varighed er som udgangspunkt 30 minutter. Du kan indstille varigheden til et sted mellem 1 minut og 59 minutter. For at indstille varigheden skal du gøre følgende:

1. Tryk og hold *indstilling af alarmtidspunkt*(4) nede i 6 sekunder. Displayet vil nu vise alarmens nuværende varighed som "30".
2. Slip herefter knappen (4).
3. Du kan nu indstille varigheden, ved at trykke på *minutter*(3).
4. Når du har fundet den ønskede varighed skal du blot vente 3 sekunder, så vil vækkeuret indstille varigheden og vende tilbage til normal tilstand.

Slå alarmen fra

Du kan slukke for alarmen, så den først starter igen i morgen, eller slå den helt fra.

1. Når alarmen lyder skal du blot trykke på *indstilling af alarmtidspunkt* (4), for at slukke midlertidigt for alarmen. Alarmen vil nu starte igen dagen efter, på samme tidspunkt.
2. For at slukke helt for alarmen skubber du blot *alarm tænd/sluk* (5) til sin OFF-position. Alarmen vil nu ikke lyde før du skubber knappen (5) tilbage til ON-position.

Snooze alarmen

Du kan snooze, eller udsætte, alarmen når den lyder ved at trykke på *snooze* (6). Som udgangspunkt vil alarmen nu blive udsat i 9 minutter. Du kan gentage dette, op til en samlet udsættelse på 119 minutter.

Indstilling af snooze-varighed

Snooze er som standard sat til at udsætte alarmen i 9 minutter, men du kan sætte varigheden til et sted mellem 1 og 30 minutter. For at ændre varigheden skal du gøre følgende:

1. Tryk og hold *snooze* (6) nede i 4 sekunder. Displayet vil nu vise den nuværende snooze-varighed "9".
2. Slip nu *snooze* (6).
3. Tryk på *minutter* (3) for at vælge den ønskede varighed.
4. Når du har fundet den ønskede varighed skal du blot vente 3 sekunder, så vil vækkeuret indstille varigheden og vende tilbage til normal tilstand.

Indstilling af lydstyrke

Du kan indstille vækkeurets lydstyrke på *lydstyrkehjulet* (10).

Indstilling af tone

Du kan indstille vækkeurets tone på hjulet til *toneindstilling* (12).

Indstilling af lysstyrken i displayet

Der er muligt at indstille displayets lysstyrke i fem trin. For at ændre lysstyrken skal du trykke på *snooze* (6) indtil displayet har den ønskede lysstyrke.

Lysstyrken går igennem de fem trin som følger: 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (fra kraftigst til svagest og tilbage til kraftigt).

Bemærk: Du kan ikke ændre lysstyrken, hvis alarmen er aktiveret og du har udsat den med *snooze* (6).

Vibrator til sengebund/pude

Du kan forbinde en vibrationsenhed til vækkeuret, ved at sætte stikket i vækkeurets *stik til vibrator* (14).

Opladning af mobiltelefon etc. med USB

Vækkeuret er udstyret med et *mikro-USB-stik* (13) på bagsiden, der kan bruges til at oplade mange forskellige mobiltelefoner, musikafspillere og andre former for elektronik. USB-stikkets output er på 500mA.

For at lade din enhed op skal du blot forbinde din enhed med vækkeuret med dit mikro-USB-kabel.

Reservebatteri

Du kan sætte et 9V batteri i vækkeuret, hvis du ønsker at have et reservebatteri. Du sætter batteriet i under *batteridækslet* (7).


Bemærk: displayet vil ikke vise klokken under en strømafbrydelse, men vækkeuret vil stadig fungere, og holder stadig tiden indtil strømmen kan genetableres.

Bemærk: det anbefales at batteriet udskiftes hver 6-8 måned. Hvis vækkeuret ikke skal bruges i en længere periode, så anbefales det yderligere at batteriet tages ud for at undgå at batteriet lækker.

Strømforsyning

Vækkeuret bruger en DC 5V strømforsyning, der skal forbindes til vækkeurets på bagsiden, ved *strømostikket* (11).

Tekniske informationer

- Strømforsyning: AC100-240V~, 50/60Hz til DC5V , 800mA
- USB opladningsoutput: 500mA

Genanvendelse

WEEE er oprettet for at sikre at produkter genanvendes bedst muligt. Hvis dit produkt går i stykker, eller ikke skal bruges mere, smid det da ikke i skraldespanden. Brug venligst en af de følgende muligheder:

- Fjern batterierne og aflever dem til genbrug, herefter kan du aflevere produktet til genbrug på den måde som din kommune foreskriver.
- Aflever produktet til forhandleren. Hvis du samtidig køber et nyt produkt bør de tage i mod det gamle.



Du tager hånd om vores fælles miljø og andre menneskers helbred ved at følge disse instruktioner.

CE-erklæring: Sonic Alert erklærer hermed at dette produkt overholder alle essentielle krav og provisioner i Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC, og Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, hvis dette er gældende for produktet. Du kan se den fulde erklæring på www.geemarc.com

