

BÆKKENSTOL MED/UDEN RYGLÆN OG ARMLÆN LM

UM-KING-CMDBA-00

TILSIGTET BRUG:

Bækkenstolen med mulighed for Ryglæn og Armlæn LM, gør det muligt for brugeren at opnå større autonomi og uafhængighed ved brug af toilettet og bruseren, hvilket reducerer muskeltræthed på grund af stående position samt glid- og skaderisici. Toiletstolen kan indstilles i tre forskellige konfigurationer:

- Placeret over toilettet som et alternativ til direkte brug af toilettet, hvilket giver brugeren et højere og mere behageligt sæde end dem de typiske toiletsæder.
- Bruges i kombination med spand, tilgængelig separat som tilbehør, gør bækkenstolen egnet til brug som toilet, selv uden for badeværelset.
- Ved at udstyre med den stive pude, tilgængelig separat som tilbehør, kan bækkenstolen bruges som badebænk.
Benene er højdejusterbare, så brugeren kan vælge den specifikke længde efter deres behov. Benene kan også konfigureres, så de forreste ben er kortere end de bageste. Dette fremmer en sundere kropsholdning og reducerer bøjning af knæ og hofter. Sædet kan udstyres med skridsikre puder, som giver fleksibilitet, opretholder stabilitet også på ujævne gulve, som er typisk for mange brusekabiner. Tilvalg af ryglæn og armlæn fuldender produktet og gør det sikrere og mere behageligt. Bækkenstolen kan nemt flyttes takket være dens reducerede vægt.

INDIKATIONER OG KONTRAINDIKATIONER:

Bækkestolen med Ryglæn og Armlæn LM er beregnet til ældre mennesker, kørestolsbrugere, personer med nedsat mobilitet i lænden, knæene eller hoften, og til alle, der har svært ved at opretholde den stående position under brusebadets stadier af daglig personlig hygiejne eller som er i nød for mere stabilitet under brug af toilettet. Brugeren skal have tilstrækkelig autonomi i balance under siddende og stående procedurer samt have tilstrækkelig evne til at sidde. Bækkenstolen må ikke bruges, hvis brugeren har problemer relateret til balance eller perceptionsforstyrrelser.

SIKKERHEDSADVARSLER OG INDIKATIONER:

- Den maksimale bruger vægt angivet i monteringsvejledningen må ikke overskrides (120kg)
- Før hver brug, sikre at bækkenstolen er korrekt samlet og stabilt placeret.
- Bækkenstolen kan kun bruges på overflader, der er fri for forhindringer.
- Under montering, nøje følge det, der er vist i brugervejledningen.
- Før du placerer dig på bækkenstolen, kontrollere at spandstøtterne er i lukket position.
- Risikoen for fingerskader kan øges under monteringsprocessen.
- Undgå at kaste dig ned på bækkenstolen, dette kan føre til glidning, væltning eller nedsynkning af benene. Sørg altid for at bækkenstolen står på sine 4 ben.

- Ændre ikke bækkenstolen og dens komponenter på nogen måde.
- Brug ikke bækkenstolen, hvis den er beskadiget eller ændret på nogen måde. Revner og deformationer kan kraftigt påvirke enhedens ydeevne og sikkerhed.
- Efter brug af produktet som bækkenstol, sættes den til side, for at undgå enhver forhindring.
- Brug ikke bækkenstolen til et andet formål end det tilsigtede.
- Bækkenstolen må ikke opbevares udendørs.

VEDLIGEHOLDELSEINFO:

Produktets vedligeholdelse består af rengørings- og sanitetsprocedurer. For at sikre en sikker brug og passende hygiejnestandard skal brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig den strukturelle integritet af enheden og dens komponenter og tæthed af skruerne skal kontrolleres. For rengørings- og sanitetsprocedurer, følg trinene nedenfor:

1. Handsker skal bæres.
2. Fjern enheden efter brug for at sikre den mest præcise desinfektion.
3. Brug vand eller et ikke-aggressivt rengøringsmiddel til rengøringsproceduren.
4. Tør med en tør og ren klud.

Alternativt kan enheden rengøres i opvaskemaskine ved maksimum temperatur.

GENBRUGSKRAV:


Produktet er egnet til genbrug af andre brugere. Før genbrug af andre skal produktet rengøres og desinficeres korrekt. Ved overdragelse af produktet til andre, skal produktet kontrolleres af kvalificerede forhandlere.








KORREKT BORTSKAFFELSESPROCEDURE:

Bortskaf ikke produktet i almindeligt husholdningsaffald. Spørg din lokale myndighed på forhånd for korrekt og miljøvenlig måde at bortskaffe det på.

HÆNDELSESRAPPORTERING:

Hvis der var en alvorlig hændelse, der involverer denne enhed, kontakt producenten af dette produkt på info@botved.dk og den ansvarlige myndighed i dit land.

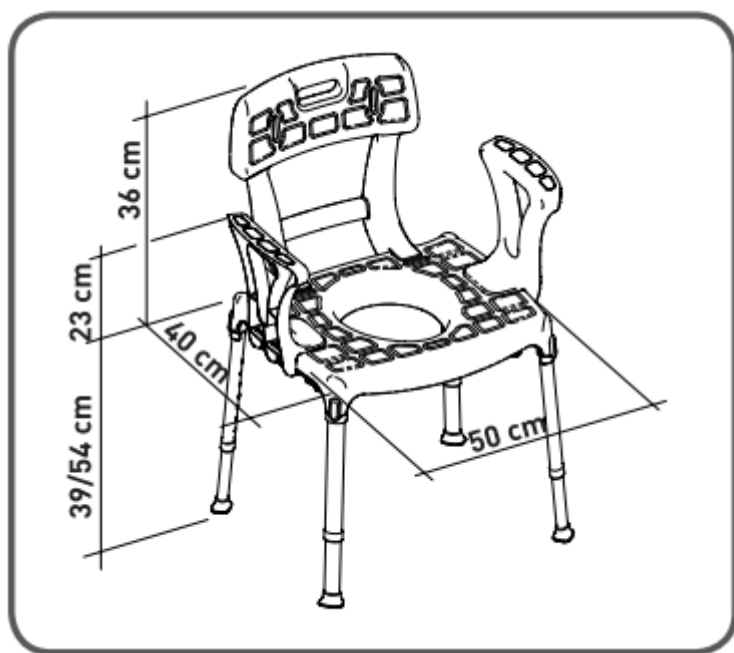

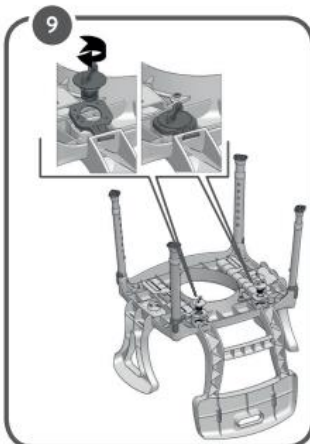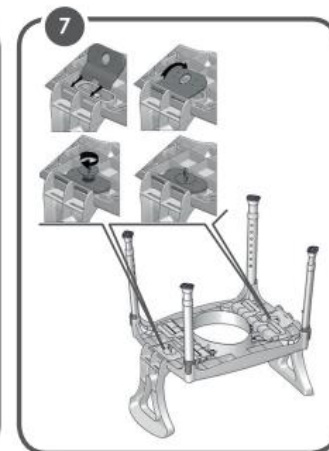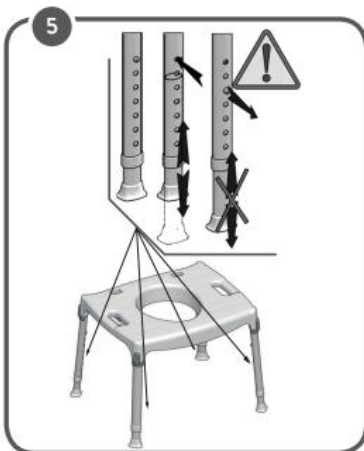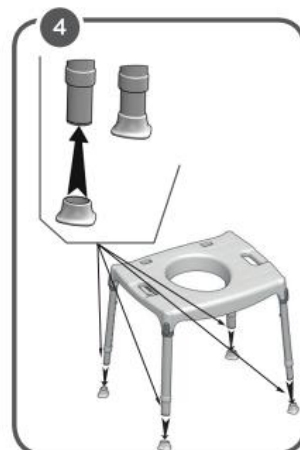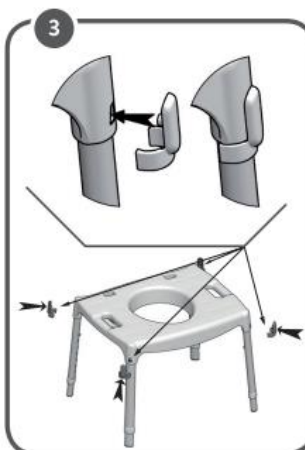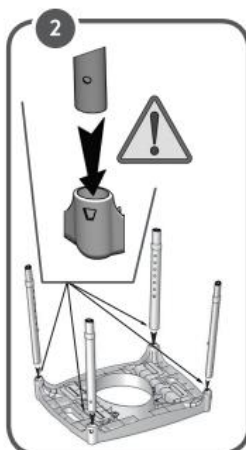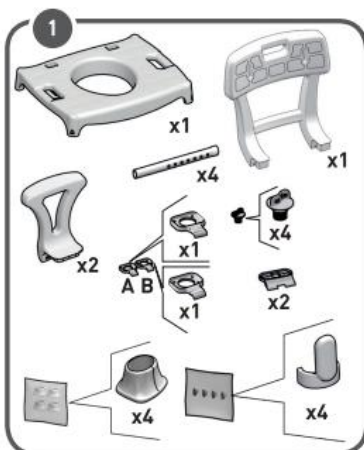

OTHER PRODUCT CONFIGURATIONS:



Not included in the box



Not included in the box