



Brugermanual

CompressionAid

Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

CompressionAid – Effektiv og skånsom hjælp til påsætning af kompressionsstrømper

CompressionAid er et innovativt hjælpemiddel udviklet til at lette arbejdet med påsætning af kompressionsstrømper og fodpleje.

Med CompressionAid kan kompressionsstrømper påsættes en liggende borger uden at skulle løfte benet og med en kort rækkeafstand. Det ergonomiske design sikrer en optimal arbejdsstilling, der mindsker belastningen på ryg, skuldre, arme og fingre og gør arbejdsprocessen både nemmere og mere skånsom.

Nem at anvende og Justere

CompressionAid er udstyret med universelle håndteringsgreb, som gør det nemt og behageligt for plejeren at anvende hjælpemidlet i forskellige arbejdssituationer.

CompressionAid tilpasses nemt til den enkelte brugers behov ved at justere højden og afstanden mellem de sorte komfortruller. Fremstillet i holdbare materialer kan CompressionAid bruges dagligt, anvendes af flere brugere og tåler autoklave, hvilket sikrer en lang levetid og høj hygiejnstandard.

Varenr: 360030
HMI nr.: 136861



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



1. Placer en hånd om knæhasen og en hånd omkring borgerens fod.




2. Bøj benet i ca. 90 gr. med en let glidende bevægelse af foden.



3. Før CompressionAid ind under benet.



4. Den højeste rulle skal placeres under knæet og den laveste rulle ved anklen.

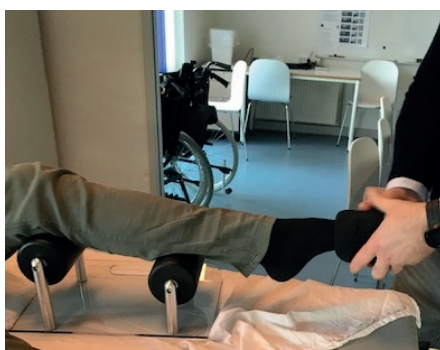


5. Strømpen påført Doff N' Donner muffen placeres ved borgerens fod.



6. Muffen med støttestrømpen på rulles stille og roligt op ad benet.



7. Strømpen føres let hen over rullerne.
Kan gøres uden at borgeren skal løfte benet.

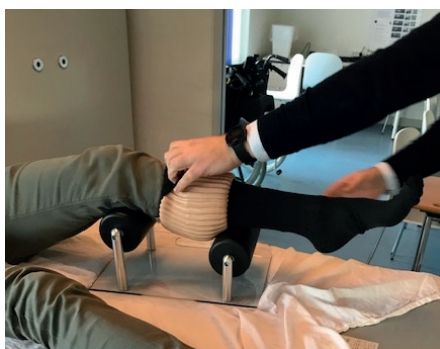

8. Doff N' Donner muffe rulles nu af borgerens ben – igen uden at løfte benet.



9. Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.



10. CompressionAid beholder kan nu trækkes forsigtigt ud.





Specifikationer	
Længde på plade	37,5 cm
Bredde på plade	30 cm
Højde på plade	1 cm
Diameter på komfortruller	29 cm
Afstand ml. sorte stænger, længde	20 cm
Afstand ml. sorte stænger, bredde	18 cm
Vægt	2,66 kg.
Materiale	Den hvide plade er lavet i kompaktlaminat. De sorte ruller er lavet i PUR. De sorte rør der holder rullerne er lavet i POM.



Se instruktionsvideo af CompressionAid på youtube ved brug af QR kode.



Find CompressionAid og manual på HMI-basen ved brug af QR kode.



Tilbehør: CompressionsAid opbevaringsholder

Du kan tilkøbe en holder til CompressionsAid, så du kan hænge den op på væggen. Oven på holderen er der en plade med en ring i, som passer til Doff N' Donner keglen.

Varenr: 360031



Danish CARE Supply A/S
Alsikevej 8
8920 Randers NV
Telefon: +45 2211 8616
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk

 Følg os på
facebook
facebook.com/danishcaresupply