



SENIOR WORLD

EN BEDRE HVERDAG

Brugsanvisning

1. Vask dine hænder.
2. Placer flasken i det mest passende hul i brillen.
3. Sæt brillen på.
4. Læn dig tilbage, indtil flasken i det valgte hul er over dit øje.
5. Dryp øjet.
6. Om nødvendigt placér flasken også på den anden side for at dryppe det andet øje.



Bemærk: Brug kun EyeDrop-brillen, når flasken sidder godt fast i brillen og ikke sidder for dybt, så den kommer i kontakt med dit øje. Brillen er heller ikke egnet til Minims-pipetter.

Kontakt Senior World for yderligere information

Mail: info@seniorworld.dk Telefon: 70 60 50 25