

spex



Pude
Installations- og brugervejledning

EU	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Tyskland Tel: +49-30-318045-30	

Spex Ltd
Telefon +64 3 307 9790
solutions@spexseating.com
spexseating.com

Brugernavn:

Serienummer:



VIGTIG KUNDEINFORMATION:

Denne manual indeholder vigtige instruktioner, der skal gives til brugeren af produktet. Fjern ikke denne brugermanual før levering til slutbrugeren.


LEVERANDØR: Denne manual skal gives til brugeren af produktet.

BRUGER/PLEJEPERSON: Læs venligst hele denne manual før brug, og gem den til senere brug. Afsnittet om transportsikkerhed SKAL læses, før ryglænet bruges i et køretøj.

MD: Dette produkt er medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Indhold:

Introduktion	2	Justering af bækkenets skævhed	6
Tilsigtet anvendelse	3	Konfiguration af Spex-puden	7
Kontraindikationer	3	Andre tips til konfiguration	8
Sikkerhedsinstruktioner	3	Montering af pude	8
Vægtkapacitet	3	Vedligeholdelse og rengøring	9
Miljø	4	Pude med strategisk basisdiagram	10
Kompatibilitet	4	Transitsikkerhed - montering, brug, vedligeholdelse og begrænsninger	11
Advarsler	4	Sikkerhed i trafikken - korrekt placering af sikkerhedsseler	12
Pudernes indhold	5	Advarsler	13
Genudstedelse til en anden bruger	5	Garanti	16
Bortskaffelse og genbrug	5		
Justering af den strategiske positioneringsbase	6		

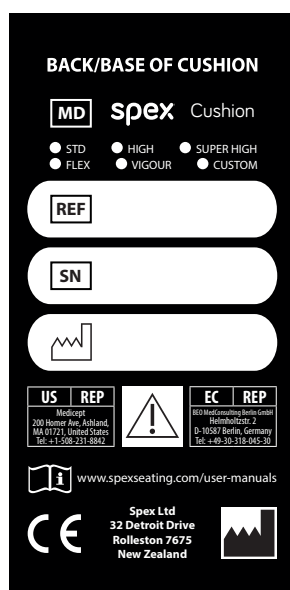

Symboler for medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (MDR) og ISO 15223-1

	Advarsel, se vedhæftede dokumenter	US REP	Autoriseret repræsentant i det amerikanske samfund
REF	Katalognummer	EU REP	Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
SN	Serienummer		Vaskemaskinens temperatur
	Fremstillingsdato		Må ikke falme
	Fabrikant		Tørretumbles ved lav temperatur
CE	Overensstemmelseserklæring, forordning om medicinsk udstyr, EU 2017/745		Må ikke stryges
MD	Medicinsk udstyr indsæt in vitro-diagnostik		Må ikke renses

Indledning

Spex-puden er en kontureret/modulær og justerbar pude til både symmetriske og asymmetriske siddestillinger. Den er designet til at støtte bækkenet og benene korrekt og til at beskytte huden. Det strategiske positioneringssystem på undersiden gør det nemt at justere på stedet. Bemærk: Kontroller, at alle dele er fri for transportskader. Kontakt Spex eller din leverandør for yderligere instruktioner, hvis det er nødvendigt. Spex anbefaler, at en fagperson som f.eks. en ergoterapeut eller fysioterapeut, der har kompetence inden for tilpasning af kørestolssæder og -positionering, konsulteres for at afgøre, om Spex-puden er egnet til brugeren.

Denne brugermanual indeholder vigtige oplysninger om brugen af dette Spex-produkt og målgruppen. Den indeholder også specifikationer. Den seneste version af denne brugermanual er tilgængelig på vores hjemmeside. Kontroller venligst, om den version, du læser, er den seneste. Hvis du har brug for en brugermanual skrevet i en større skriftstørrelse, er produktarket tilgængeligt i PDF-format på spexseating.com, som kan skaleres op til den ønskede skriftstørrelse.

Tilsigtet anvendelse

Spex-puden er beregnet til mennesker med handicap (fysisk eller psykisk), der har brug for specifik støtte til kropsholdning og kroppens funktion i siddende stilling i kørestole under daglige aktiviteter og til transport i køretøjer. Den er designet med ergonomiske justeringer for at give forbedrede personaliserede kropsstillinger og/eller hjælpe med at forebygge/reducere fysiske problemer forbundet med stillesiddende arbejde eller aktiviteter.

Kontraindikationer

1. Brug af Spex-kørestolssædeprodukter kan påvirke tyngdepunktet og få kørestolen til at tippe, hvilket potentielt kan forårsage skade. Vurder altid behovet for, at der føjes anti-vippebeslag eller amputationsaksel-adapterbeslag til kørestolen for at øge stabiliteten.
2. Tjek jævnligt for rødme i huden, og at der ikke udvikles tryksår. Hvis din hud udvikler rødme, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge eller behandler.

Sikkerhedsanvisninger

For at undgå personskade skal du læse, forstå og følge alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, før du installerer og bruger Spex-puden. Der er farer forbundet med brugen af kørestole og adaptivt udstyr. Hvis du bruger din kørestol eller din pude forkert, kan du komme alvorligt til skade. Hvis din pude holder op med at fungere efter hensigten, skal du kontakte din autoriserede leverandør af Spex-sædesystem øjeblikkeligt, før du fortsætter brugen af puden. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal rapporteres til Spex Ltd.

Spex-puden opfylder kravene i ISO 7176-16; kørestole – modstandsdygtighed over for antændelse af posturale støtteanordninger. Betrækket og skummet opfylder brændbarhedskravene i California Technical Bulletin 117. I sjældne tilfælde kan de stoffer, der bruges i dette produkt, forårsage hudirritation for personer med følsom hud. Kontakt din læge, hvis du oplever rødmen eller kløe i huden.

Ansvarsfraskrivelse: *Spex påtager sig intet ansvar for de terapeutiske virkninger af vores produkter. Vores krav er begrænset til produktets evne til at give sikker og pålidelig positionering og siddeplads på det udstyr, det er installeret på. I tilfælde af alvorlige hændelser med denne enhed skal brugere og/eller patienter etableret i EU rapportere hændelsen til producenten, Spex Ltd (solutions@spexseating.com), og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret. Informer også din lokale distributør, hvis oplysninger findes på bagsiden af denne brugermanual.*

Vægtkapacitet

- | | |
|--|-------------------|
| • 10-15" (25,4 - 38 cm) Pudens maksimale brugervægt: | 200 lbs. (90 kg) |
| • 16-21" (41 - 53 cm) Pudens maksimale brugervægt: | 350 lbs. (160 kg) |
| • 22" + (56 cm) Pudens maksimale brugervægt: | 495 lbs. (225 kg) |



ADVARSEL

Overskrid aldrig vægtkapaciteten af din pude eller kørestolen som angivet af kørestolsproducenten. Udfør aldrig motionsvægttræning, der får brugeren til at overskride kørestolens vægtkapacitet.

Miljø

Fugt: Hold hele tiden din pude tør, da kontakt med vand eller overskydende fugt kan forårsage korrosion, forringelse af funktionaliteten af din pude eller potentielt fejl. Hvis din pude bliver fugtig eller våd, skal du tørre grundigt af med en tør klud så hurtigt som muligt. Brug ikke din pude i et brusebad eller poolanlæg.

Temperatur: Din pude fungerer muligvis ikke efter hensigten, når den bruges ved ekstreme temperaturer. Hold puden væk fra kilder med ekstrem varme eller ekstrem kulde for at undgå, at skummet ændrer funktion.

Snavs: Små partikler som støv, snavs og sand kan begrænse den optimale funktionalitet. Vask dit pudebetræk regelmæssigt for at sikre, at der ikke opstår ophobninger.

Kompatibilitet

- Spex-puden er designet til at være kompatibel med de fleste kørestole.
- Spex-puden skal have et solidt underlag at blive monteret på, f.eks. et solidt sædeunderlag, som giver mere stabilitet til brugeren.



ADVARSEL

RISIKO FOR ULYKKE, SKADE, SMERTE ELLER DØD, HVIS ADVARSLER IKKE OVERHOLDES

Søg hjælp, hvis du er usikker på nogen af følgende punkter


1. Montering af en pude på en kørestol kan forrykke kørestolens tyngdepunkt og få kørestolen til at tippe bagover, hvilket kan medføre personskade eller død. Undersøg, om der skal monteres anti-vippere eller andre tilpasninger på kørestolen for at øge stabiliteten.
2. Installation og justering af din Spex-pude må kun udføres af a) en autoriseret Spex-distributør eller -tekniker b) en kvalificeret sundhedsperson, der har gennemgået en passende biomekanisk uddannelse
3. Spexpuden skal have et solidt underlag at blive installeret på. Et solidt sædeunderlag giver brugeren mere stabilitet (Puden synker ikke sammen).
4. Denne pude skal først afprøves for at afgøre, hvor effektiv den er til at opfylde brugerens behov. Klinikerens skal inspicere brugerens hud for at sikre, at der ikke udvikles røde trykpunkter.
5. Brugeren og/eller plejepersonalet skal regelmæssigt kontrollere, om huden er rød eller vævet nedbrudt. Hvis der opstår rødme, skal du straks ophøre med at bruge puden og kontakte din læge eller terapeut. Puden kan omkonfigureres for bedre positionering
6. Med korrekt opsætning og løbende vedligeholdelse er Spex puden en fremragende kandidat til personer, der har risiko for tryksår, men ingen pude kan helt fjerne siddetryk eller forhindre tryksår.
7. Hold puden tør. Fugt er en medvirkende årsag til tryksår.
8. Vi anbefaler, at brugeren spiser en god kost og har regelmæssige trykaflastende øvelser/terapi for at forebygge tryksår.
9. Lad ikke Spex-puden ligge udenfor natten over eller ved temperaturer under 5° C/41° F. Spex-puden skal have stuetemperatur, før du sætter dig på den.
10. Undgå skarpe genstande eller udsættelse for kraftig varme eller åben ild.

11. Spex-puden er specielt designet som en pude til brugere i mobilitetskørestole. Brug ikke puden på en måde, der ikke er beskrevet, og modificer aldrig puden.
12. Brug aldrig puden uden betræk. Vær forsigtig i nærheden af åben ild eller brændende cigaretter. Brug af puden uden betræk øger risikoen for brandfare og hudskader.
13. Brug aldrig puden uden inkontinensbetrækket. Hvis du ikke gør det, vil det reducere pudens levetid.

Pudernes indhold

Din pude indeholder følgende:

	Beskrivelse	Mængde
A	Udvendigt betræk	1
B	Inkontinensbetræk	1
C	Skum-enhed	1
D	Basis for strategisk positionering	1

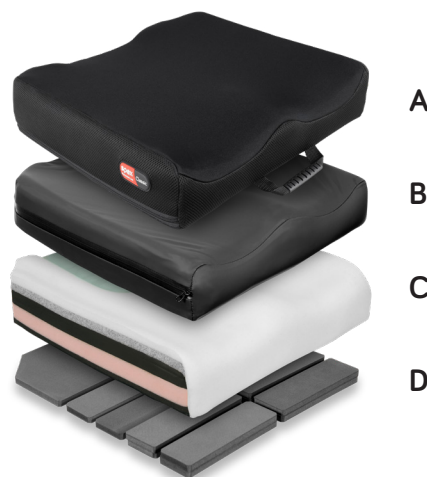

Genudstedelse til en anden bruger

Når brugeren er færdig med at bruge Spex-puden, skal den renoveres og rengøres grundigt, hvis den udleveres til en anden bruger. Nedenfor er de strenge retningslinjer for renovering af Spex-puden. Spex påtager sig intet ansvar for, krydsinfektion eller skade. Spex anbefaler at bruge brintoverilte desinfektionsserviet. Desinfektionsproduktet skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Spex påtager sig intet ansvar for effektiviteten af desinfektionsprocessen.

Del	Procedure
Sikkerhedstjek	Alle komponenter skal kontrolleres for tegn på tryk eller revner.
Betræk	Både inkontinensbetrækket og det ydre betræk skal udskiftes uanset tilstand.
Basis for strategisk positionering	Sørg for, at hver konturlomme har de korrekte lag af skumpuder.
Skum	Skummet skal kontrolleres for nedbrydning og renhed.



Bortskaffelse og genanvendelse

Dit Spex-sædesystem er fremstillet af en række forskellige materialer, hvoraf de fleste kan genbruges. Når det når slutningen af dets levetid, hvis du er den juridiske ejer, skal du ikke bortskaffe det som almindeligt husholdningsaffald, men aflevere dit Spex-system til et godkendt genbrugs- eller indsamlingssted for at bortskaffe det i henhold til lokale love og regler.

Separat opsamling og genbrug af Spex-systemet ved bortskaffelse sikrer beskyttelse af miljøet og hjælper med bevarelse af naturressourcer.

Justering af den strategiske positioneringsbase


Spex-puden kan konfigureres, så den passer til mange forskellige arbejdsstillinger hos personer med handicap eller siddeproblemer. Ved at justere den strategiske positioneringsbase formes pudens overflade for at forbedre den generelle kropsholdning, bækkenjustering, siddeevne, komfort og trykreduktion. Hvis der er brug for mere konturering eller støtte til asymmetrier, kan 5°-pudekilen (tilbehør) være nødvendig.

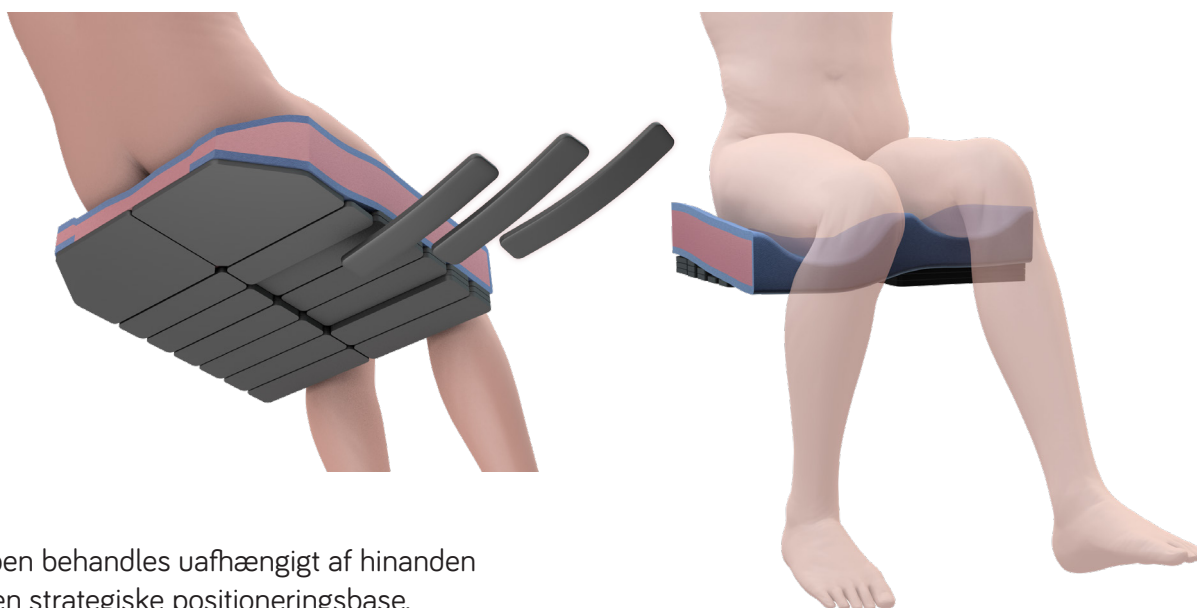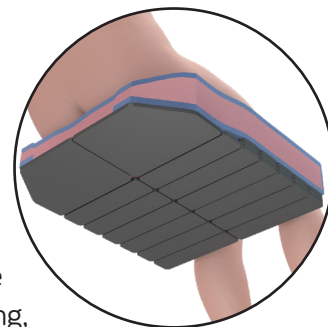

Hvert ben behandles uafhængigt af hinanden med den strategiske positioneringsbase.

Justering af bækkenskævhed

Bagerste hjørneceller kan tilføjes eller fjernes på begge sider for at korrigere eller imødekomme skævhed. De øvre trykreducerende lag er upåvirkede.

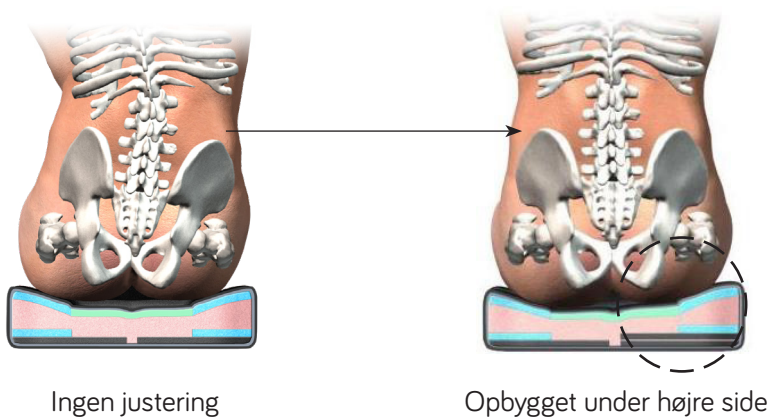

Ingen justering




Opbygget under højre side



ADVARSEL

Justeringer skal foretages af en certificeret og erfaren sundhedsperson, f.eks. en læge, terapeut eller fysioterapeut, som er fortrolig med siddestilling og positionering. Justeringer skal foretages efter en korrekt vurdering af brugerens biomekaniske behov.

Konfiguration af Spex-puden

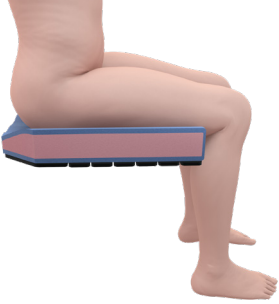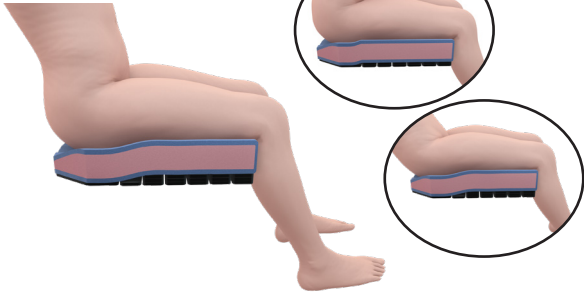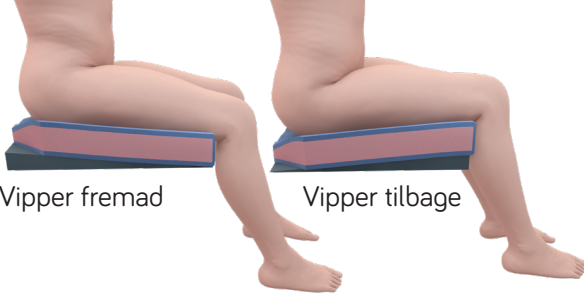Billederne er kun til illustrative formål	Ansvarsfraskrivelse: Den kliniske evaluering vil afgøre, hvilke pude-muligheder der vælges for at opfylde den enkelte kundes behov.
	Moderat positionering og kontrol Puden kan konfigureres på begge sider eller på hver side for sig. Puden kan forblive flad, hvis det er nødvendigt.
	Forkrampede lårmuskler/indskrænket hoftebøjning/posterior bækkenkip Puden kan kiles fast, så den skråner mod fronten, med celler tilføjet bagtil og fjernet foran.
	Ledelse og positionering Opbyg celler under lårene for at forbedre støtten og kontrollen foran siddeknoglerne.
	Bækkenrotation For at kontrollere bækkenets rotation skal du sætte en støtte op under det berørte ben (foran ischium).
 Vipper fremad Vipper tilbage	Brug for mere støtte/konturering? Brug vores 5° (grad) pudekile til mere støtte, hvis det er nødvendigt. Man kan bruge én, eller hvis der er brug for begge ben, så brug to. Kilen kan placeres enten skråt bagud eller fremad afhængigt af brugerens krav til placering.

Andre tips til konfiguration

Konfigurationer skal afhænge af biomekanisk evaluering og vurdering.

1. Anterior bækkenhældning: Lad puden være flad, eller hævn pudens forside en smule for at opnå en neutral justering af bækkenet og/eller fremme vægtbæring på ischial tuberositas.
2. Strækøvelser: Øg hofte- og knæbøjningen ved at opbygge mere støtte under forsiden af lårene.
3. Skævt bækken: Opbygning under den lave side til korrektion, under den høje side til justering.

Montering af pude

1. Placer hynden ca. ½" (12.7mm) foran forkanten af sædets bundplade for at beskytte brugerens ben.
2. Forsiden af puden skal altid vende fremad.
3. Tjek størrelsen på puden. Puden skal støtte brugerens base fuldt ud. Hvis en pude er for lang, kan den tvinge brugeren til at sidde med et bagudhældende bækken.
4. Pudens sider skal altid være parallelle med kørestolsrammens sædeskiner.
5. Korrekt justering af fodstøtten kan forbedre siddekomforten. Juster fodstøtterne, så brugerens ben hviler fast, men behageligt på puden.

Vedligeholdelse & rengøring

Månedlig rengøring og regelmæssig vedligeholdelse er med til at forlænge pudens levetid. Den forventede levetid for puden er 5 år, men puden skal kontrolleres regelmæssigt for ydeevne.

Spex anbefaler at bruge brintoverilte desinfektionsservietter. Desinfektionsproduktet skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Spex påtager sig intet ansvar for effektiviteten af desinfektionsprocessen.

**ADVARSEL**

- Udskiftning af betrækket efter vask skal ske korrekt. Sørg for, at bagsiden af betrækket passer til bagsiden af skumbasen.
- Hvis de bruges på en institution, skal du skrive beboerens navn med en permanent tusch på omslagets indholdsetiket. Det er med til at sikre, at betrækket kommer tilbage efter vask.
- Brug kun Spex-betræk på Spex-puder. Ændring af betrækket eller brug af andre materialer vil ændre designet og kan forårsage skade eller trykproblemer for brugeren.

Skum


- Opbevares tørt.
- Kontrollér regelmæssigt skumbasen for at sikre en god skumkonsistens.
- Hvis det ved et uheld bliver vådt, skal du tørre det grundigt, før du sætter betrækket på igen.

Inkontinensbetræk

- Må kun vaskes i hånden.
- Brug ikke blegemiddel eller andre stærke rengøringsmidler.
- Må ikke tørretumbles.
- Hvis du ikke bruger dette betræk, kan det reducere pudens levetid.

Udvendigt betræk

- Fjern betrækket fra skumbasen, og vend vrangen ud.
- Maskinvask i varmt vand (40° C / 104° F)
- Dryptørres eller tørretumbles ved lav varme.
- Må ikke stryges. Må ikke renses. Må ikke bleges.
- Hvis der bruges kemiske rengøringsmidler, skal betrækket skylles grundigt med vand for at fjerne alle kemikalierester og lade tørre helt før anvendelse igen.
- Tjek betrækket for revner og overdreven slitage, og udskift det, hvis det er revnet eller på anden måde ikke fungerer fuldt ud.

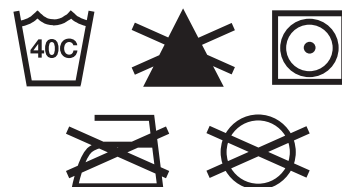

Hvis du har spørgsmål om rengøringsprocedurer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler af Spex sædesystemer.

Rapportering af alvorlige hændelser

I tilfælde af alvorlige hændelser med denne enhed bedes du straks rapportere dette til producenten: Spex Ltd på solutions@spexseating.com

Informér også din lokale distributør, som er angivet bag i denne brugermanual.

Pudernes strategiske basisdiagram


Når din Spex-pude er sat op i en optimal position, skal du bruge skemaet nedenfor til at registrere antallet af kontureringsterninger i hver celle. Marker ubrugte/utilgængelige celler nedenfor med et 'X'.

Dato for vurdering	
Klinikerens navn	
Kundens navn	
Bemærkninger	

Forsiden af puden - set fra undersiden

Brugerens højre ben

Brugerens venstre ben

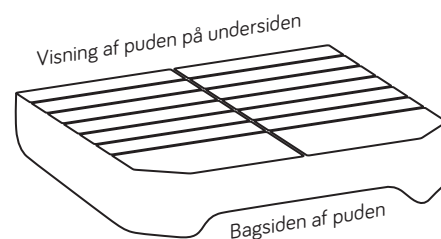

Bagsiden af puden - set fra undersiden

Transportsikkerhed

Spex-sædesystemet er blevet kollisionstestet og overholder RESNA WC-4:2012, afsnit 20 (WC20). Spex-sædesystemet opfylder kravene i ISO 16840-4:2009 og er velegnet til brug som et motorkøretøjssæde, når det bruges med en passende kørestolsbase. Følg alle installations-, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning samt følgende transportinstruktioner. Hvis det er muligt, bør kørestolsbrugeren flytte til køretøjets sæde og bruge køretøjets monterede fastholdelsesanordninger.

Spex-sædesystemet er designet til at imødekomme korrekt brug af køretøjsforankrede seler. Spex opnåede vurderingen Fremragende (16 ud af 16) i form af nem, korrekt positionering af fastspændingssele og den grad, i hvilken korrekt selefastholdelse kan opnås, baseret på metoderne i bilag D. Følgende punkter i Spex-sædesystemet er testet og er egnet til brug i et motorkøretøj:

- Rygstøttemodeller i fuld højde
- Sædebase
- Pudemodeller
- Arm- og lårstøtter
- Tværgående overkrop-støtter
- Hovedstøtter

Bemærk: Rygstøtter, der er lavere end brugerens skulderhøjde, er ikke certificerede og anbefales ikke til transport i et køretøj. F.eks. Zygo Lo rygstøtte.

Montering, brug, vedligeholdelse og begrænsninger

- Justering af kørestolens opsætning må kun udføres af en kvalificeret behandler, fagperson eller forflytningsvejleder. Specialdesignede/skræddersyede systemer kan kræve en fagperson til at konfigurere og installere sædesystemet.
- Efter udførelse af eventuelle justeringer skal du sikre dig, at alle bolte, skruer og møtrikker er sikkert fastgjort igen for at sikre sikkerheden, når du kører i et køretøj.
- Sørg for, at de øverste og nederste beslag på ryglænet og de forreste og bageste beslag på sædeskålen er installeret så langt fra hinanden som muligt for at give en stærkere 4-punkts fastgørelse til kørestolsstellet. Sørg for, at hurtigudløser-låsene er i indgreb.
- Brug ikke Spex-sædesystemet som køretøjssæde, hvis sædekomponenter, der ikke er blevet vellykket kollisionstestet, bruges noget som helst sted i sædesystemet. Spex-sædesystem er designet og certificeret udelukkende ved brug af Spex-komponenter. Spex er ikke ansvarlig i tilfælde af, at der anvendes andre fremstillede siddesystemer sammen med Spex-sæder.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alle fastgørelsesanordninger på Spex-sædesystemet ikke har løsnet sig under daglig brug, og efterspænd om nødvendigt.
- Sørg for, at de svingbare sider er i deres låste position, før du bruger sædet som køretøjssæde i et motorkøretøj.

Transportsikkerhed


Korrekt positionering af seler

Når du bruger Spex-sædesystemet som køretøjssæde, skal der altid bruges både bækkens- og skuldersele. For at placere selerne korrekt på kørestolens passager, skal følgende sikres:

- Bækkenselen skal bæres lavt hen over bækkenets front nær samlepunktet mellem bækken og lår.
- Vinklen på bækkenselen skal være mellem 30° og 75° ift. vandret og ideelt set mellem 45° og 75° ift. vandret (som vist i figur 2).
- Bæltespændet på trepunktsselen skal placeres i kontakt med passagerens krop og væk fra kørestolskomponenter.
- Forbindelsen mellem skulderselen og bækkenselen på trepunktsselerne skal være placeret nær hoften modsat den skulder, som diagonalselen krydser over, og ikke nær midterlinjen af passageren.
- Seler bør ikke føres uden for kørestolens hjul eller over kørestolens armlæn og må ikke holdes væk fra kroppen af kørestolskomponenter eller dele.
- Seler til overkrop skal passe direkte over og i kontakt med midten af skulderen.
- Seler bør justeres, så de sidder så tæt som muligt, i overensstemmelse med brugerkomforten.
- Seler bør ikke bæres snoet på en måde, der reducerer selens kontaktområde med passageren.



Figur 1

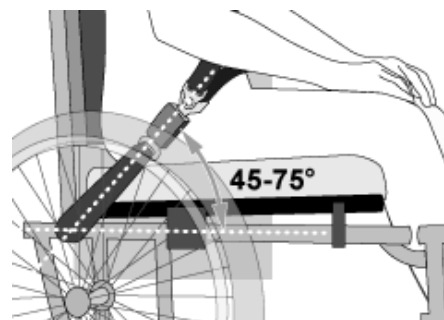

Figur 2



Figur 3a – Forkert positionering af bækkenseler over kørestolsstøtter.



Figur 3b – Korrekt føring og positionering af seler på kørestolspassageren.

**ADVARSEL**

1. Afstanden mellem toppen af brugerens skulder og toppen af ryggen bør ikke overstige 16,5 cm.
2. Spex-sædesystemet må kun bruges med kørestolsbaser, der er testet som en del af et kørestolssystem, der overholder ydeevnekravene i ISO 7176-19 og RESNA WC-4:2012, afsnit 19.
3. Spex-sædesystemet bør kun bruges på kørestolsstel, der har fire fastgørelsespunkter og bækkensele-forankringspunkter, der overholder kravene i RESNA WC-4: 2012, afsnit 19.
4. Kørestolen skal mærkes som passende til brug som sæde i et motorkøretøj, dynamisk testet i henhold til ydeevnekravene i ISO 7176-19 og installeret, brugt og vedligeholdt i henhold til producentens instruktioner.
5. Spex-sædesystemet må kun bruges som angivet i denne brugervejledning.
6. Både bækken- og skulderseler som del af et komplet kørestolsbindings- og fastholdelsessystem (WTORS), som opfylder ISO 10542-1, skal bruges til at opnå effektiv fastholdelse af passagerer og optimal beskyttelse ved et køretøjs kollision; selerne skal være kompatible med den specifikke kørestol og monteret på brugeren i overensstemmelse med WTORS-producentens instruktioner.
7. Rygstøtter med justerbare hældningsvinkler bør ikke vippe tilbage mere end 30° lodret under kørsel i køretøjer, medmindre det er nødvendigt af hensyn til passagerens medicinske og kropsholdningsbehov.
8. Hvis rygstøtten skal justeres til en vinkel, der er større end 30° lodret under kørsel, skal det øverste skuldersele-forankringspunkt justeres bagud for at opretholde selens kontakt med kørestolspassagerens skulder og bryst

**ADVARSEL**


9. Spex-sædesystemet må kun bruges til fremadvendte siddepladser i motorkøretøjer.
10. For at reducere risikoen for skader på passagerer i køretøjer skal kørestolsmonterede bakkeborde, der ikke er specifikt beregnet til brug under kørsel i motorkøretøjer, følgende:
 - a. Fjernes og fastgøres separat i køretøjet eller
 - b. Fastgøres til kørestolen, så de ikke bryder løs i tilfælde af et biluheld og
 - Være placeret med et mellemrum på mindst 75 mm mellem bagkanten af bakkebord og kørestolspassagerens mave og/eller bryst for ikke at forstyrre den korrekte brug af sele, og
 - Have energiabsorberende polstring placeret mellem bagkanten af bakkebord og kørestolens passager.
11. Ændringer eller udskiftninger må ikke foretages i sædesystemets struktur, dele eller komponenter uden først at konsultere Spex.
12. Brugen af en postural bækkensele, der er fastgjort til kørestolens base eller sædestellet, anbefales under rejsen, men disse seler skal placeres, så de ikke forstyrrer den korrekte placering af kollisionssikre seler, og de er ikke beregnet til passagerbeskyttelse i kollisionssituationer, medmindre den posturale sele er designet til at overholde og opfylde kravene i WC19.
13. Holdningsstøtteanordninger, der ikke er mærket som værende i overensstemmelse med ISO 16840-4, kan bruges i et køretøj, men er ikke beregnet til fastholdelse af passagerer.

**ADVARSEL**

14. Både bækken- og skulderseler, der er i overensstemmelse med WC18 og/eller WC19, bør bruges til at begrænse passagerernes bevægelser ved et biluheld og reducere sandsynligheden for, at passageren slynges ud af køretøjet og/eller at passageren kommer til skade med køretøjets interiør.
15. Seler skal placeres på kørestolspassageren i overensstemmelse med WTORS-producentens instruktioner.
16. Ryglænets monteringsudstyr skal installeres korrekt. Se det relevante afsnit for korrekt montering af ryglænsudstyr.
17. Hvis kørestolen transporteres, mens den er i brug, skal kørestolen stadig være fastgjort til WTORS.
18. Børn, hvis vægt er mindre end 22 kg skal overføres fra deres sædesystem til passende barneselesystemer beregnet til brug i motorkøretøjer.


Der skal sørges for tilstrækkelig fri plads foran og bagud omkring kørestolens passager. Frizonen foran (FZ) skal være større, når der ikke bruges en skuldersele.

MANGLLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE PÅ KØRESTOLSBRUGEREN ELLER ANDRE.

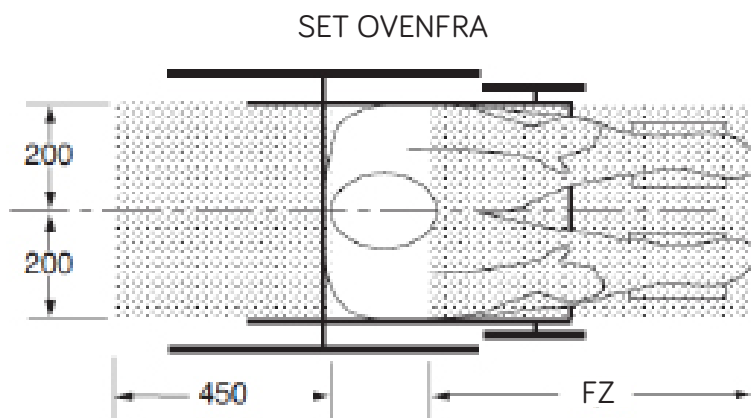

BEMÆRK: Frizonen bagtil måles fra det bagerste punkt på en passagers hoved. Frizonen foran måles fra det forreste punkt på en passagers hoved.

Siddende hovedhøjde (HHT) varierer fra omkring 47" (120 cm) for en lille voksen kvinde til omkring 61" (155 cm) for en høj voksen mand.

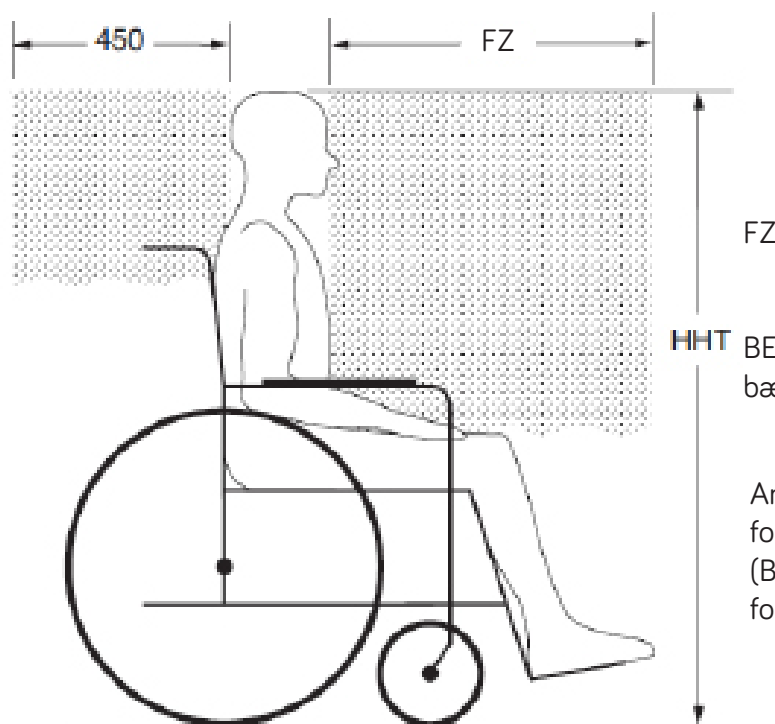**ADVARSEL**

FZ = 25.5" (65 cm) med overkropssæle
= 37" (95 cm) med bækkensæle udelukkende

HHT BEMÆRK: Det anbefales kraftigt, at både
bækken- og overkropssæler bruges.

Anbefalede frie zoner foran og bagtil
for kørestolssiddende passagerer.
(Bemærk: FZ er muligvis ikke opnåelig
for kørestolssiddende chauffører).

SET FRA SIDEN

Garanti

Hver Spex-bind inspiceres omhyggeligt for at sikre optimal ydeevne og garanteres at være fri for defekter i materialer og udførelse i 24 måneder fra købsdatoen under normal brug. Hvis der opstår en defekt i materialer eller udførelse inden for 24 måneder fra den oprindelige købsdato, vil Spex efter eget valg reparere eller udskifte produktet gratis. Denne garanti gælder for bindets komponenter, herunder den ydre skal, inkontinensbetrækket, skumenheden og den strategiske positioneringsbase. Denne garanti gælder ikke for generel slitage, herunder huller, revner eller brandsår, eller kundens misbrug af nogen af bindets komponenter.

Krav og reparationer skal håndteres gennem den nærmeste autoriserede Spex-forhandler, der er angivet på bagsiden. Med undtagelse af de udtrykkelige garantier, der er angivet heri, er alle andre garantier, herunder implicite garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, udelukket. Der er ingen garantier, der går ud over beskrivelsen i dette dokument. Beføjelser for brud på udtrykkelige garantier heri er begrænset til reparation eller udskiftning af varerne. Erstatning for brud på nogen garanti skal under ingen omstændigheder omfatte følgeskader eller overstige prisen på de solgte varer, der ikke overholder kravene. Serienummeret på din pude kan findes på bagsiden af pudehuset.

Distribueras av:



32 Detroit Drive
Rolleston 7614
New Zealand



spex

Spex Ltd
Telefon +64 3 307 9790
solutions@spexseating.com
spexseating.com

US	REP
Medicept 200 Homer Ave, Ashland, MA 01721 United States Tel: +1-508-231-8842	

EU	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Tyskland Tel: +49-30-318045-30	