

COMPRESSANA MASTER



An- und Ausziehhilfe
Donning and doffing aid
Aide à l'enfilage et au retrait
På- og aftagnings hjælp



www.compressana.de

Formålsbestemmelse

For at give effektiv hjælp til muskel-venepumpen er det nødvendigt, at COMPRESSANA kompressionsstrømper yder et stort, men korrekt tryk mod benet. I sær i ankelområdet, hvor benene er smallest er strømperne specielt stramme. En særlig påtagningsteknik er nødvendig for at få strømpen over fod og hæl. For at nå hæl og fod med hænderne, er det nødvendigt med god bevægelighed og gode kræfter.

COMPRESSANA MASTER er en på- og aftagningshjælp til medicinske kompressionsstrømper. På- og aftagningshjælpen er først og fremmest velegnet, hvis din bevægelighed er begrænset. Den gør det ikke kun lettere at tage dine medicinske kompressionsstrømper på og af, men giver dig også ekstra sikkerhed: Du undgår den fysiske anstrengelse ved at bukke dig, og faren for at falde reduceres. Samtidig skåner på- og aftagningshjælpen din hud samt det strikmateriale, som din kompressionsstrømpe er lavet af. Ved at strække strømpen ud på forhånd bliver det lettere at tage den på. Strømpeholderelementet gør det lettere at tage den af.

Målgruppen af brugere og patienter

Potentielle brugere er patienter og sundhedspersonale.

Målgruppen på patientsiden omfatter voksne, der behandles af sundhedspersonale på eget ansvar – altid i overensstemmelse med producentens anvisninger.

COMPRESSANA MASTER

På- og aftagningshjælp til kompressions-strømper

COMPRESSANA MASTER gør på- og aftagning betydelig lettere.

- Ved påtagning: Strømpen udvides og strækkes, så den let kommer på foden.
- Ved aftagning: Strømpen fastholdes af en bøjle, som sammen med håndtagene gør det let at tage strømpen af.
- Kan også anvendes til buksestrømper.

Ubesværet På- og aftagning

Med lidt øvelse gør Compressana Master det let at tage kompressionsstrømper på og af.

Ubesværet og let - i siddende stilling - uden anstrengende foroverbøjning - uden at bruge kraft.

Compressana Master gør det tilmed lettere at få strømpen korrekt placeret på foden.

Særligt velegnet til

COMPRESSANA MASTER er specielt velegnet til mennesker med nedsat bevægelighed og/eller nedsat muskelstyrke. COMPRESSANA MASTER sikrer at strømperne bliver korrekt placeret på benene.

Endvidere anbefales COMPRESSANA MASTER til mennesker med forskellige dysfunktioner:

- Gigt sygdomme i leddene • Misdannelser i hænderne
- Skader efter håndlæsioner • Stive led • Ryglidelser • Adipositas.

COMPRESSANA Master er især velegnet til rundstrikkede medicinske kompressionsstrømper og støttestrømper.

Grundig rådgivning og instruktion!

Det uddannede personale hos vores partnere i apoteker og medicinske specialforretninger rådgiver dig gerne og viser dig, hvordan COMPRESSANA MASTER skal bruges, og står til rådighed for den første instruktion.

Øvelse gør mester!

Træn på at tage COMPRESSANA MASTER på og af flere gange i begyndelsen. Den følgende illustrerede vejledning hjælper dig med at perfektionere håndteringen. Med lidt rutine vil håndteringen efter kort tid gå som en leg.

Advarsel

På- og aftagningshjælpen bør kun udleveres af dertil uddannet personale i relevant specialbutik. Kontakt venligst forhandleren, hvis produktet er blevet beskadiget. Undlad selv at foretage reparationer – det kan påvirke kvaliteten og den medicinske effekt negativt. Brug kun på- og aftagningshjælpen, når du sidder ned. Læs hele brugsanvisningen grundigt, og følg anvisningerne. Gem brugsanvis-

ningen omhyggeligt. Opbevar COMPRESSANA MASTER utilgængeligt for børn. Brug kun COMPRESSANA MASTER, hvis stellet og holdelement er i fejlfri stand.

Opbevaring



Opbevares tørt under hygiejniske forhold. Undgå varme, direkte sollys og fugt.

Gode råd

- Træk aldrig strømpen opad ved at holde i grip-toppen
- Vend grip-toppen udad før påtagningen
- Vigtigt: Brug COMPRESSANA Specialhandske for at beskytte det fine strikmateriale mod skader fra fingerne, ringe og lignende. Tånegle og hård hud kan ligesom defekt inderfor i sko medføre skader.
- I tilfælde af åbne sår i anvendelsesområdet kan det være nødvendigt at yde professionel sårbehandling og dækning.

Rengøring

Tør af med en fugtig klud og almindelig rengøringsmiddel til husholdningen.

Desinfektion

Ved brug af forskellige personer / brugere, f.eks. i praksis, terapi eller pleje, kan der udføres en aftørningsdesinfektion med et overfladedesinfektionsmiddel. Følg anvisningerne på desinfektionsmidlet.

Indikationer

- Lammelse
- Aldersbetinget styrkenedsættelse
- Artrose / gig
- Svær overvægt
- Vidtgående hvirvelsøjle- / hofte- / knæstivhed
- Degenerative sygdomme i hænder / håndområdet
- Følger af tilskadekomst / amputation

Kontraindikationer

Absolute immobilitet

COMPRESSANA GmbH hæfter ikke, hvis denne kontraindikation ikke overholdes.

Bivirkninger

Ved korrekt anvendelse er der ingen kendte bivirkninger. Hvis der alligevel sker negative forandringer under den ordinerede anvendelse, skal du straks kontakte din læge eller forhandler. Ved reklamationer i forbindelse med produktet bedes du henvende dig direkte til det sted, hvor du købte produktet. Kun alvorlige hændelser, som kan resultere i en væsentlig forværring af sundhedstilstanden eller kan have døden til følge, skal meddeles producenten og den ansvarshavende myndighed i medlemslandet. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Erstatningsansvar


Ved u hensigtsmæssig brug (inkl. reparationer udført selv eller af ekstern serviceudbyder) kan producenten ikke garantere produktets overensstemmelse med de gældende krav. Retten til garanti og erstatningsansvar ophører.

Bortskaffelse




Rekvirer venligst regionale regler.


Påtagning med COMPRESSANA MASTER

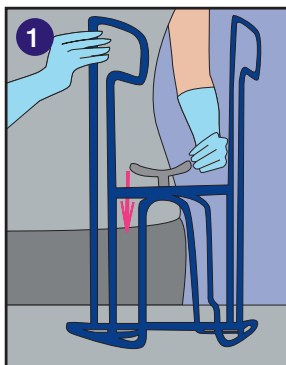

Vend fasholdelsesbøjlen bagud. Bøjlen skal kun anvendes ved aftagning. Vend COMPRESSANA MASTER sådan at håndtagene vender opad mod dig selv.

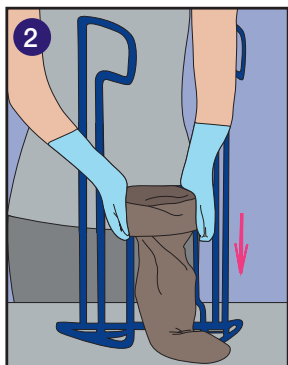


Brug begge hænder (med gummi-handsker på) og skub strømpen ned over stativets midterdel, således at tådelen vender nedad og fremad.

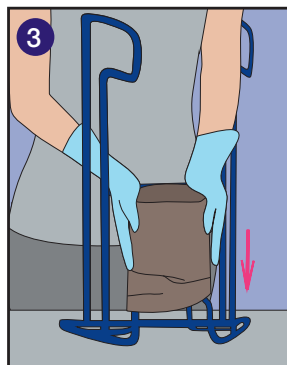


Glid strømpen ned over midterdelen, indtil strømpens hæl er helt oppe ved den øverste kant.


Henvielse til støttestrømper: Skub strømpen så langt op over indgangsskaftet, indtil fodspidsen kan ses i skaftet.

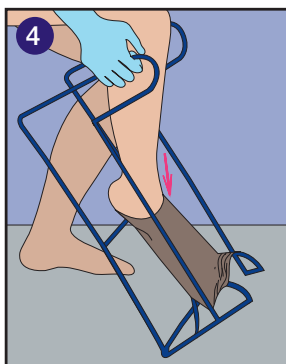


Sæt dig ned og hold strømpepåtageren i en let vinklet position. Stik tæerne ind i strømpen og fortsæt indtil hælen er dækket.

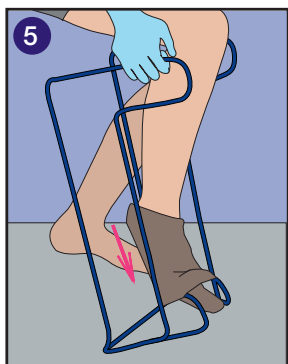


Før benet ind i strømpen så langt som muligt, indtil foden kan ses under stativets midterdel. Placer COMPRESSANA MASTER næsten lodret. Bøj, hvis mulig, tæerne opad og skub benet ind i strømpen.

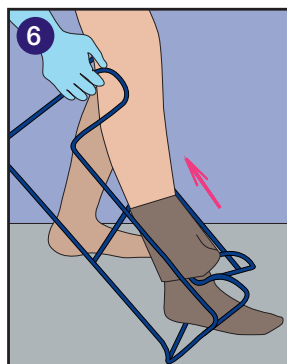


Sæt nu foden fast på gulvet og træk ved hjælp af COMPRESSANA MASTER strømpen op til knæet.

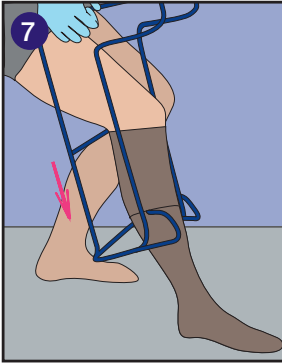

Før herefter strømpepåtageren nedad og ud af strømpen.

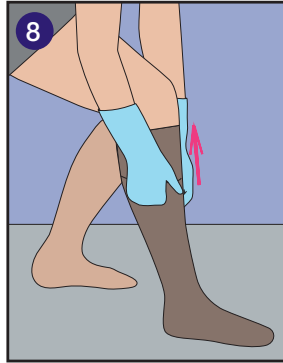

Tag fat i strømpen med handsker på og placer den korrekt på benet.

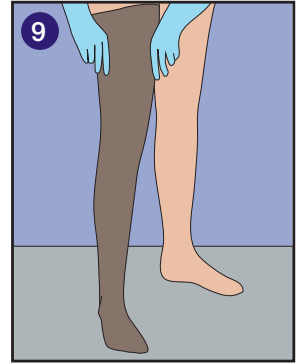


Det er vigtigt at anvende gummi-handsker ved påtagningen, både for at placere strømpen korrekt og behageligt - og for at undgå at lave skader på den.




Videoer om på- og aftagning med COMPRESSANA MASTER finder du på www.compressana.de eller ved at scanne ovenstående QR-kode med din smartphone / tablet.


Aftagning med COMPRESSANA MASTER

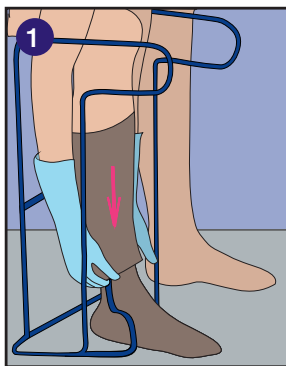


Tag fat i strømpens øverste kant med begge hænder og træk den nedad. Sæt dig ned og sæt benet ind i COMPRESSANA MASTER sådan at læggen rører ved stativets midterdel. Træk strømpens øverste del ud over midterdelen ned mod gulvet.

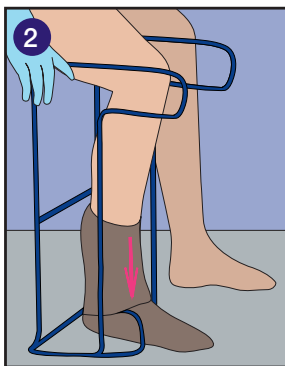


Træk strømpen nedad indtil den ikke kan komme længere på grund af midterdelen.

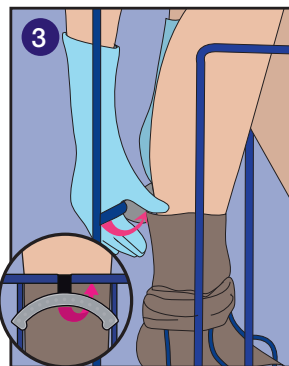


Skub nu fasholdelsesbøjlen opad mod midterdelen indtil den "klikker" fast. Strømpen er nu fikseret på stativet.

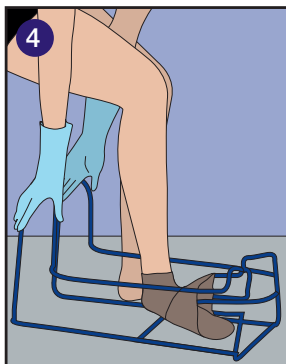


Stræk benet fremad og læg COMPRESSANA MASTER bagud ned på gulvet. Tag fat på den øverste del af stativet med begge hænder og sæt den anden fod på stativet mod gulvet. Løft benet med strømpen på op, så det er i niveau med midterdelen. Hælen er nu over fastholdelsesbøjlen.

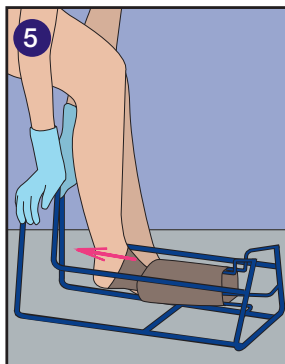

Træk foden vandret ud af strømpen, parallelt med gulvet, mens du skubber COMPRESSANA MASTER fremad. Undgå at løfte foden opad.

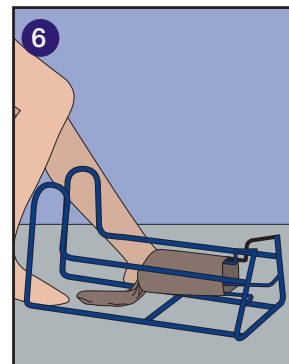

Fold til sidst fastholdelsesbøjlen nedad, således at strømpen let kan fjernes fra COMPRESSANA MASTER.

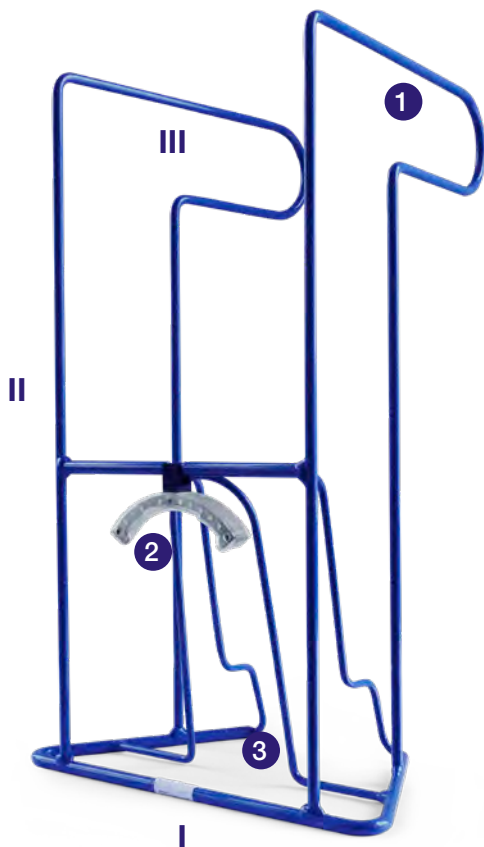

Materiale:

Stell: beklædt metal • Fasholdelsesbøjlen: PVC

Tekniske data:

Mål	I	32,0 x 18,0 cm	1	Gribehåndtag
	II	52,0 cm	2	Fasholdelsesbøjle til udtrækning
	III	28,5 cm	3	Midterdel til forstrækning

Tip til lettere håndtering

Brug af specialhandsker gør det betydeligt nemmere at tage strømper og strømpebukser af og på.


COMPRESSANA GRIP



COMPRESSANA SUPER-GRIP



B måles over anklen, på det smalleste sted på benet (foden).

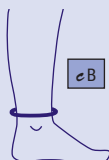

Produkt	HMV-Nr.	PZN	Art.Nr.
Compressana MASTER Ankelomkredsen cB ≤ 26 cm	02.40.01.3028	09717627	0560
Compressana MASTER XL Ankelomkredsen cB > 26 cm	02.40.01.3028	07140218	0565

	D Bedeutung der Symbole	GB Meaning of the signs
	Hersteller	Manufacturer
	Medizinprodukt	Medical device
	Herstellungsdatum	Date of manufacture
	Charge	Batch
	Art. Nr.	Item No.
	Eindeutige Produktidentifizierung	Unique Device Identification
 www.compressana.de	Gebrauchsanweisung beachten Elektr. Gebrauchsanweisung	Take note of the instructions for use / Electr. instructions for use
	Vor Sonnenlicht schützen	Protect against direct sunlight
	Trocken aufbewahren	Store in a dry place
	Zweckbestimmung: Kompression	Intended purpose: Compression
	Zweckbestimmung: Zubehör	Intended purpose: Accessories



Signification des symboles



Betydning af symbolerne

Fabricant

Producent

Dispositif médical

Medicinsk udstyr

Date de fabrication

Fremstillingsdato

Lot

Parti

Réf. art.

Art. Nr.

Identification unique du produit

Entydig produktidentificering

Veuillez suivre le mode d'emploi

Læs brugsanvisningen
(der foreligger i elektronisk form)

Protéger de la lumière solaire

Skal beskyttes mod sollys

Garder au sec

Opbevares tørt

Usage prévu : Compression

Formålsbestemmelse:
Kompression

Usage prévu : Composants associés

Formålsbestemmelse:
Tilbehør



www.compressana.de

Gültig für / Valid for:
COMPRESSANA MASTER

Made in Germany



Art.Nr. 0546/03 CC 11/2025



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstraße 3 · 93073 Neutraubling · Germany
Telefon: +49 (0) 94 01 / 9 22 60 · Fax: +49 (0) 94 01 / 92 26 20
info@compressana.de · www.compressana.de



4 028393 158371