


upriser[®]

BY VITAL FJORD

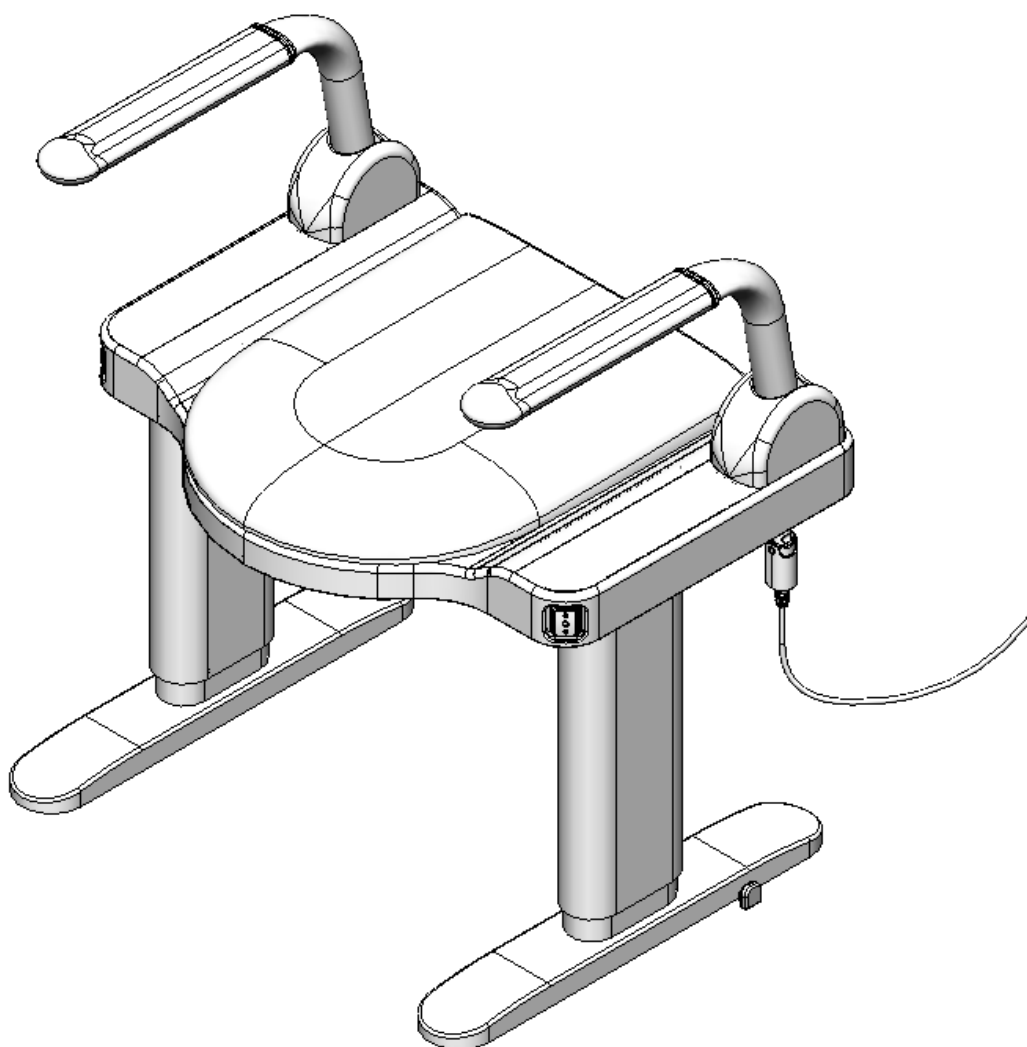

Samlevejledning

C02-01-A001-DK



PRODUCENT:

VITAL FJORD

Prinsengracht 353A

1016HK Amsterdam, Holland

Momsnr.: NL867262771B01

Websted: <https://www.vitalfjord.com/>

LOVGIVNINGS- OG PRODUCENTOPLYSNINGER

Enhedsnavn: UpRiser

Model: C02-01-A001

Tilsigtet anvendelse: Se afsnit 1

ADVARSEL

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR SAMLING, INSTALLATION ELLER BRUG

Hvis UpRiser samles, installeres eller serviceres af en professionel serviceudbyder, installatør eller anden tredjepart, skal denne part sikre, at alle slutbrugere instrueres grundigt i sikker brug af produktet, herunder alle sikkerhedsfunktioner, risici og begrænsninger, før produktet tages i brug.

Manglende overholdelse af alle advarsler og instruktioner kan medføre alvorlig personskade eller fald.

ANSVARSBEGRÆNSNING OG JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

I det videst mulige omfang tilladt efter gældende lovgivning kan Vital Fjord, dets tilknyttede selskaber, distributører, sælgere og agenter ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige, særlige, afledte, pønalt begrundede eller følgeskader, der opstår som følge af samling, installation, brug, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse af eller manglende evne til at anvende denne enhed. Dette omfatter, uden begrænsning, erstatning for personskade, dødsfald, tingsskade, lægeudgifter eller andre tab, uanset om kravet er baseret på kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivet ansvar eller andet.

BRUGEREN OG/ELLER OMSORGSPERSONEN PÅTAGER SIG ALLE RISICI forbundet med brugen af denne elektriske enhed. Producenten leverer denne enhed "SOM DEN ER OG FOREFINDES" og afgiver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, ud over den udtrykkelige begrænsede garanti, der er angivet andetsteds i denne vejledning. Brug af dette produkt sker udelukkende på brugerens eget ansvar.

Ingen hjælpemidler kan eliminere risikoen for personskade eller fald. Producenten er ikke ansvarlig for personskade eller skade, der skyldes manglende overholdelse af denne vejledning, normal slitage, misbrug, forsømmelse, uautoriseret ændring eller brug uden for det angivne tilsigtede formål.

INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING: Denne vejledning udgør ikke medicinsk rådgivning. Rådfør dig altid med en læge eller anden kvalificeret sundhedsfaglig person før brug.

LOVVALG: For salg i USA: underlagt lovgivningen i USA og staten [Californien eller Delaware]. For salg i EU: underlagt lovgivningen i Den Europæiske Union og den medlemsstat, hvor salget finder sted.

Dette produkt overholder IEC 60601-1 og IEC 62366-1 og følger FDA's retningslinjer for patientmærkning af medicinsk udstyr.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING:

Error! Bookmark not defined.

LOVGIVNINGS- OG PRODUCENTOPLYSNINGER	2
1. INDIKATIONER FOR BRUG	5
2. BESKRIVELSE AF ENHEDEN	5
3. KONTRAINDIKATIONER	5
4. FORDELE OG RISICI	5
5. NØDVENDIGT VÆRKTØJ (MEDFØLGER IKKE)	5
6. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER	6
7. DELE OG TILBEHØR	8
8. OPSÆTNING OG SAMLING	10
9. BETJENINGSVEJLEDNING	27
10. FJERN UPRISER	28
11. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	28
12. FEJLFINDING: ÅRSAGER OG LØSNINGER	29
13. FJERNBETJENING	32
14. UPRISER - MÅL OG SPECIFIKATIONER	33
15. ANVENDELSESBETINGELSER	36
16. BRUGERSUPPORT	37

1. INDIKATIONER FOR BRUG

UpRiser er designet til at hjælpe ældre brugere og personer med nedsat mobilitet med sikkert at skifte mellem siddende og stående stilling i forbindelse med toiletbrug.

(Kun til indendørs brug i hjemmets badeværelse.)

2. BESKRIVELSE AF ENHEDEN

UpRiser er en motordrevet løftehjælp med en stålramme og korrosionsbeskyttende belægning.

Den består af en bundplade, to løftesøjler samt armlæn.

Enheden betjenes med en håndbetjent styreenhed med knapperne ▲ Op og ▼ Ned. Drevet af en litiumbatteripakke.

3. KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes, hvis brugerens vægt overstiger 150 kg (330 lbs).

Ikke beregnet til børn. Lad ikke børn betjene eller lege med enheden.

4. FORDELE OG RISICI

FORDEL : Hjælper ved at sætte sig og rejse sig og reducerer belastning og risiko for fald.

RISIKO : Klemningsfare, hvis hænderne placeres forkert.

: Elektrisk fare ved udsættelse for vand.

5. NØDVENDIGT VÆRKTØJ (MEDFØLGER IKKE)



Boremaskine
(Valgfrit)



Hammer
(Valgfrit)



Markør/blyant (der kan viskes
ud)



Rengøringsklud


6. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

6,1 GENERELT




① KLEMNINGSFARE

Anbring ikke hænderne under sædepuden under brug. Der er en klemzone mellem det nedadgående sæde og metalrammen, som kan medføre alvorlig personskaade.

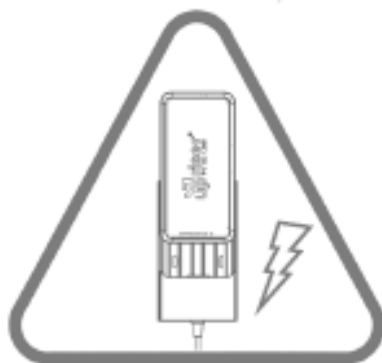

② ELEKTRISK FARE

Hold enheden væk fra vand: Brug ikke enheden i nærheden af badekar eller i områder med høj fugtighed/stående vand.
Netledning: Kontroller netledningen for revner eller slidt isolering før hver brug. Hvis den er beskadiget, må den ikke tilsluttes. Våde hænder: Tilslut eller frakobl aldrig enheden med våde hænder.

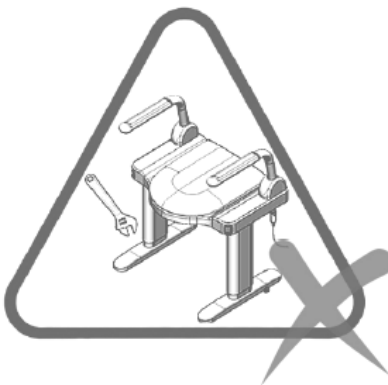

③ STABILITET OG REPARATION

Ingen uautoriserede reparationer: Forsøg ikke selv at reparere eller ændre produktet. Vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale for at undgå farer.

Enheden vipper: Brug ikke produktet, hvis det er ustabilt. Sørg for, at alle fødder berører gulvet og er låst fast i fodbeslagene.

6.2 TILSIGTET BRUG / MISBRUG

⚠ ADVARSEL:

- i. Ikke beregnet til brug som trinskammel eller til at stå på.
- ii. Stå ikke på sædet.
- iii. Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- iv. Brug ikke håndtagene til motion eller træning med kropsvægt.
- v. Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Må kun rengøres med et mildt husholdningsrengøringsmiddel.

BEMÆRK: Må kun bruges til det tilsigtede formål.

6.3 SIKKERHEDSADVARSEL

ADVARSEL:

- I. Risiko for fald. Sørg for, at sædet er korrekt monteret før brug.
- II. Brug ikke produktet, hvis det er løst, beskadiget eller ustabilt.
- III. Sæt dig langsomt, og bliv siddende midt på sædet.
- IV. Forkert installation kan medføre personskade. Følg anvisningerne nøje.
- V. Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele under justering for at undgå klemning eller personskade.

FORSIGTIG:

- I. Sørg for, at batterikablet ikke kommer i klemme, bliver fanget eller blokeres under installation eller brug.
- II. Spænd alle fastgørelseselementer før første brug, og kontrollér dem regelmæssigt.
- III. Sørg for, at fodlåsemekanismen er helt aktiveret.
- IV. Kontrollér for hældning eller bevægelse. Juster fodgliderne med den medfølgende nøgle om nødvendigt

BEMÆRK:


Maksimal brugervægt: 150 kg (330 lbs). Overskridelse af denne grænse kan medføre funktionsfejl.

Må kun installeres på kompatible toiletkummer.


7. DELE OG TILBEHØR

7.1 INDHOLD I KASSE 1


Ⓐ 2x

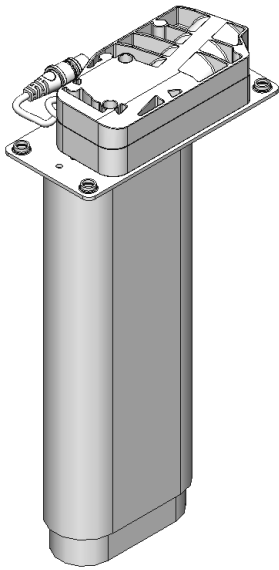


Ⓑ 2x

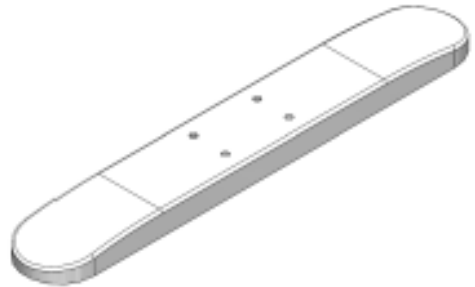


Ⓒ 1x

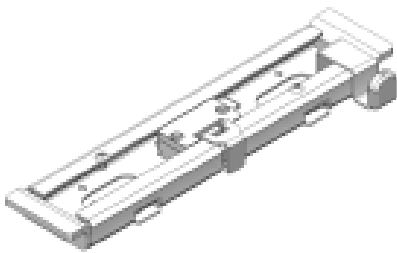


Ⓓ 1x

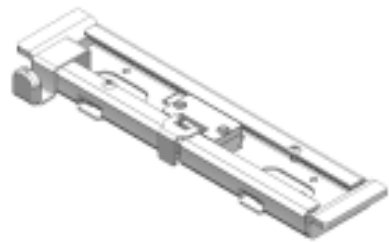

Ⓔ 1x

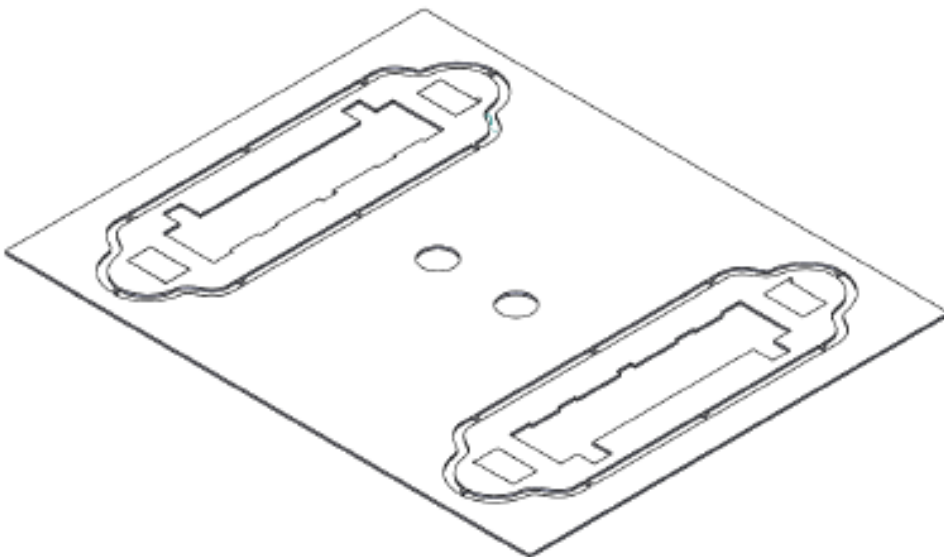


7.2 INDHOLD I KASSE 2

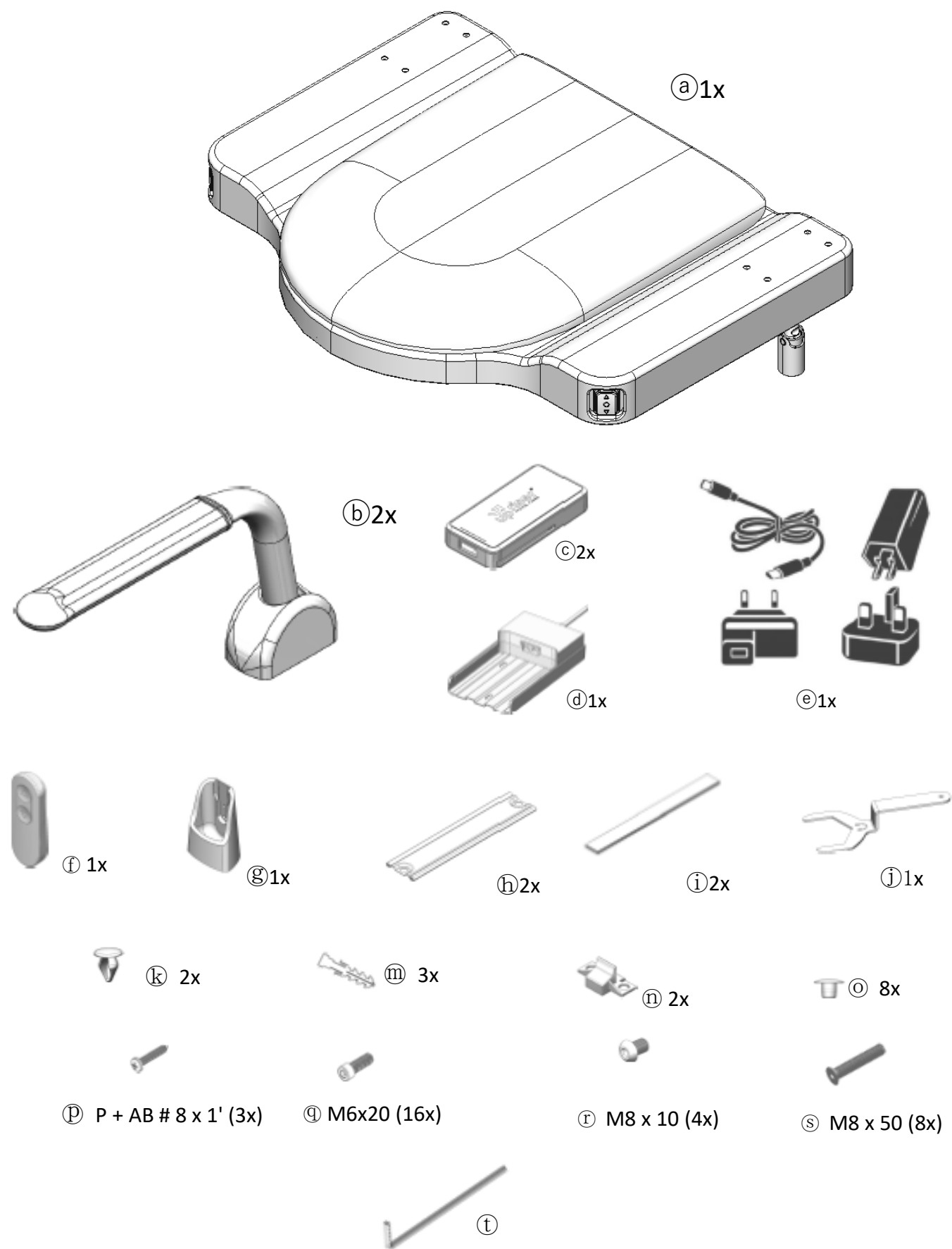


8. OPSÆTNING OG SAMLING

8.1. MONTÉR BENENHEDER

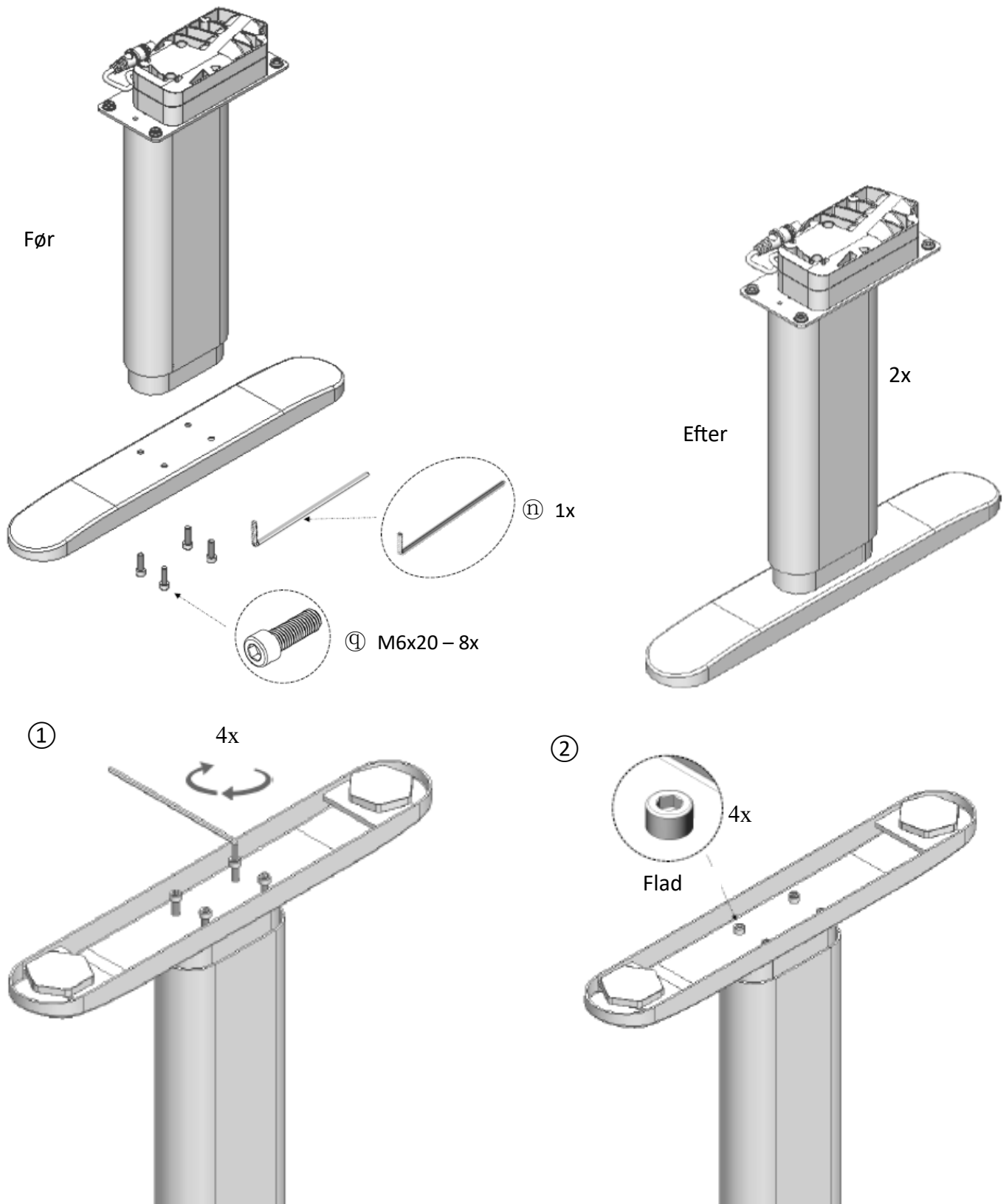


8.2. PLACÉR BENENHEDERNE PÅ BUNDPLADEN

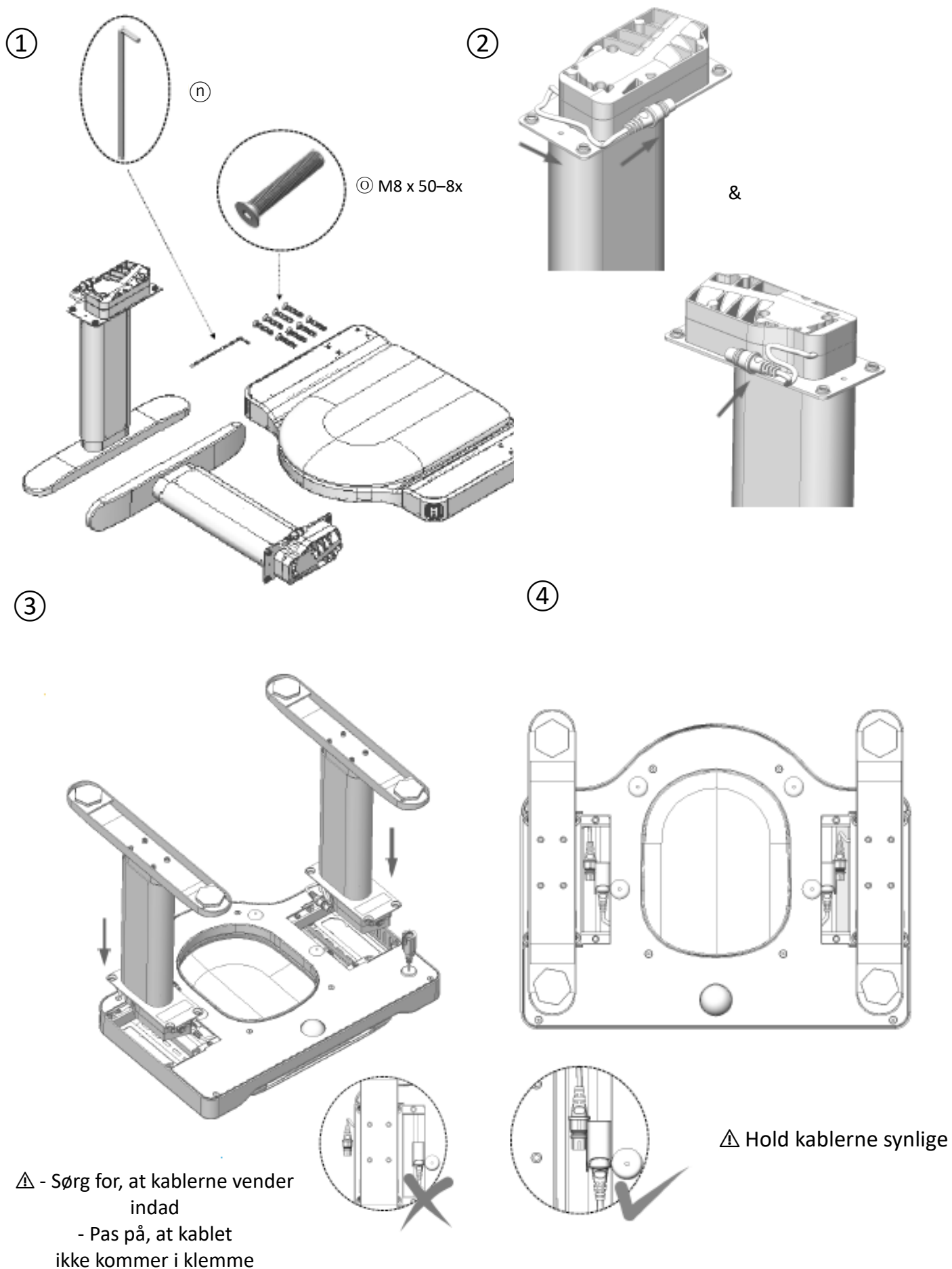


8.3. LÅS BENENHEDERNE OG TILSLUT KABLET

①


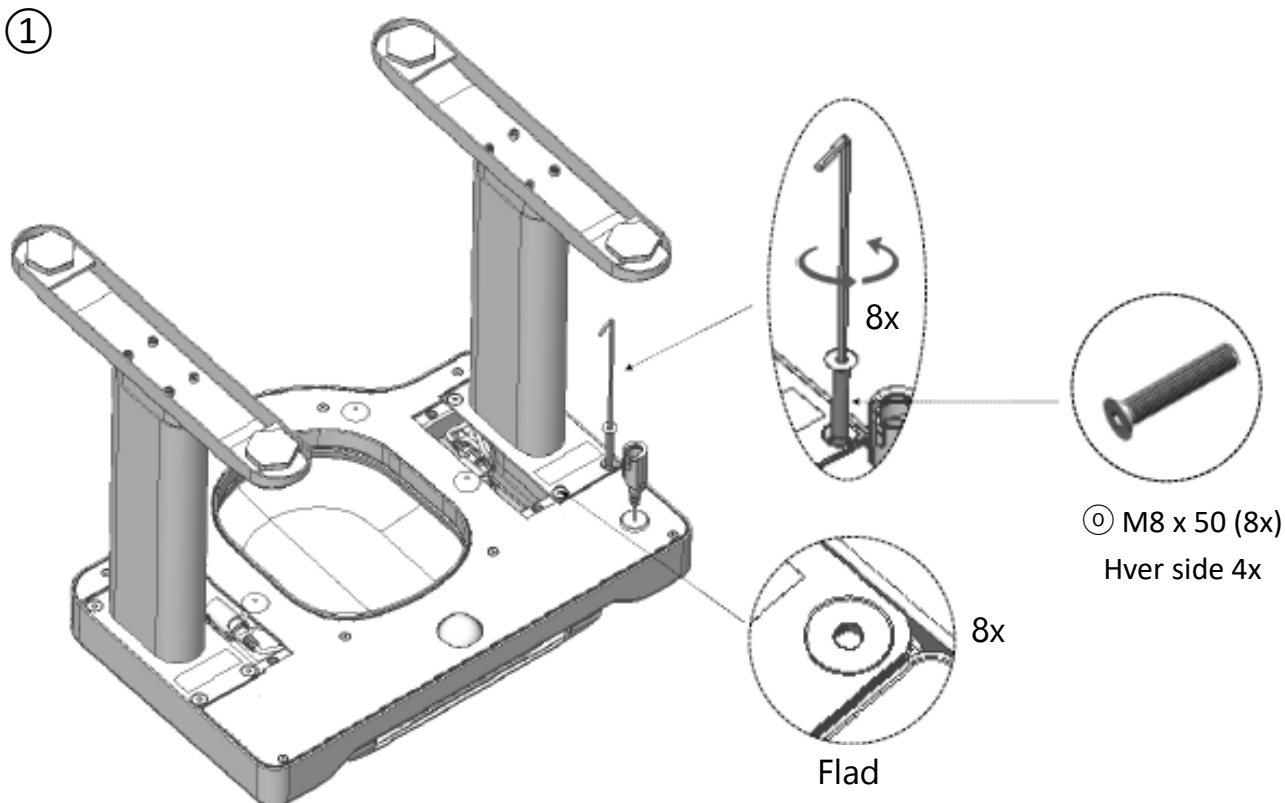


②

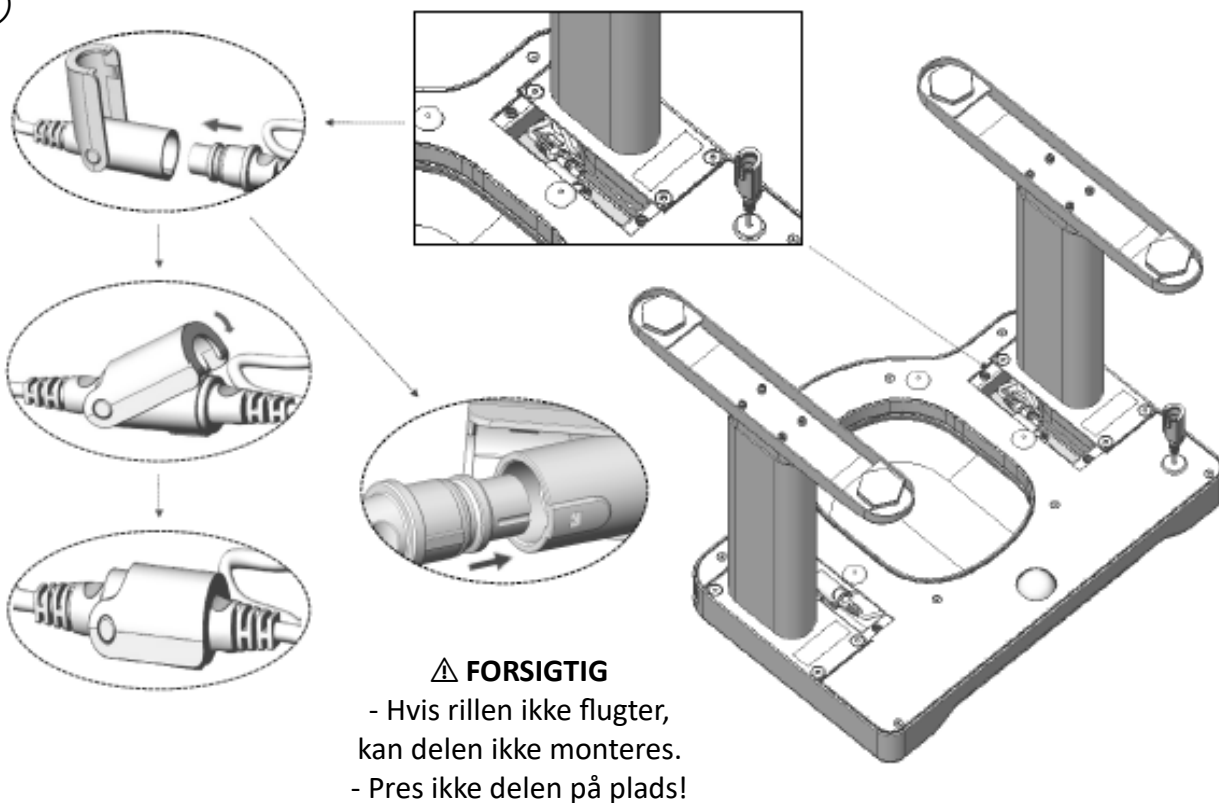


8.4. MONTÉR KABELAFDÆKNINGER

①

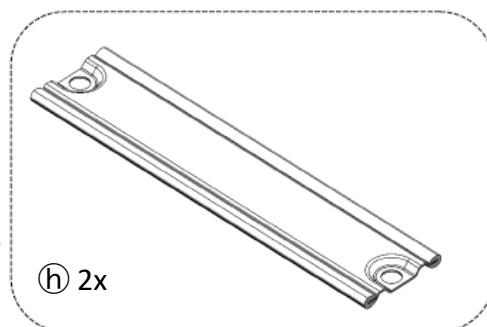
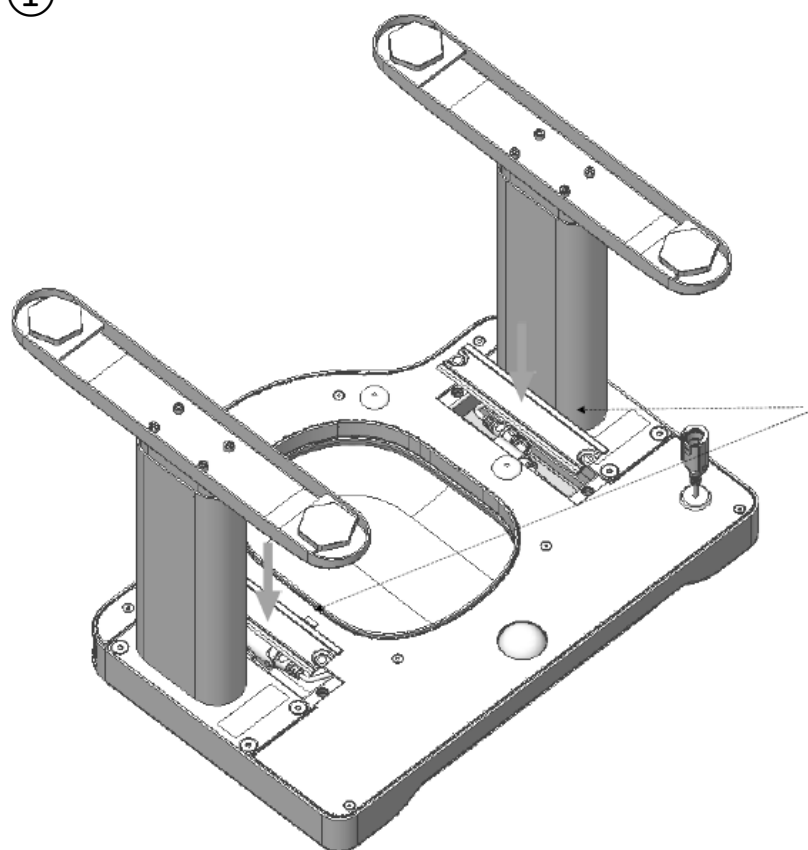


⚠ Sørg for, at de vender korrekt
(denne side opad)

②

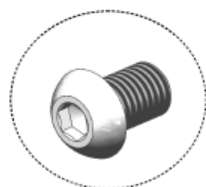


Ⓡ M8 x 10 — 4x

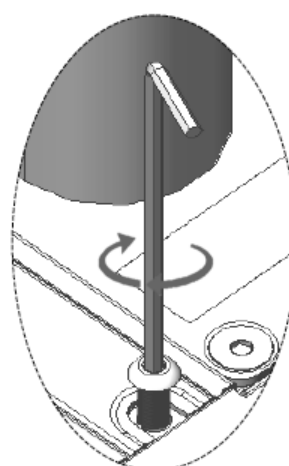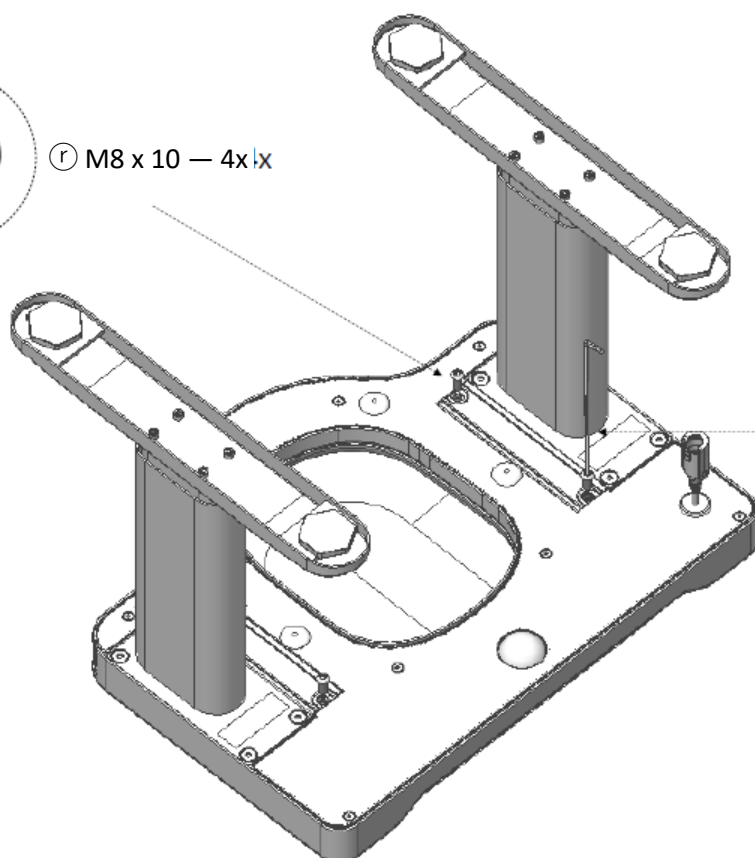


4x

8.5. MONTERING AF ARMHÅNDTAG (VALGFRIT)

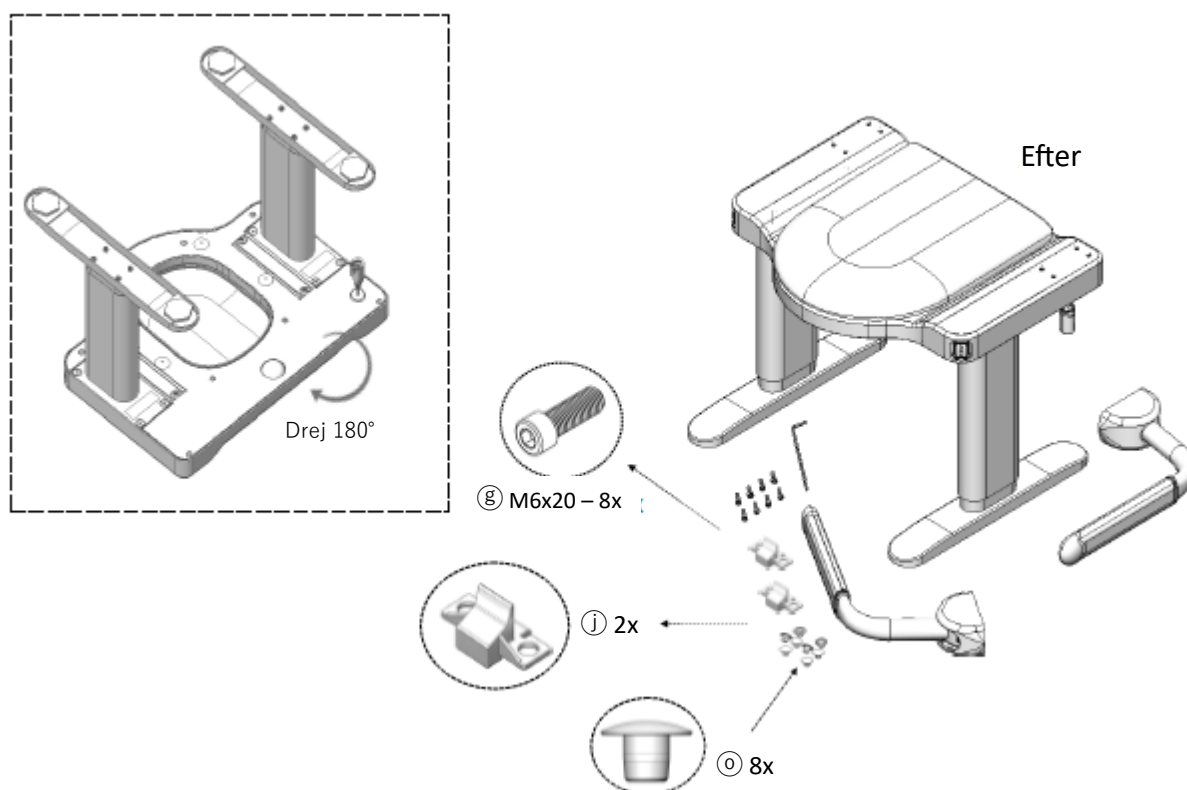



8.5.1. UDEN ARMHÅNDTAG

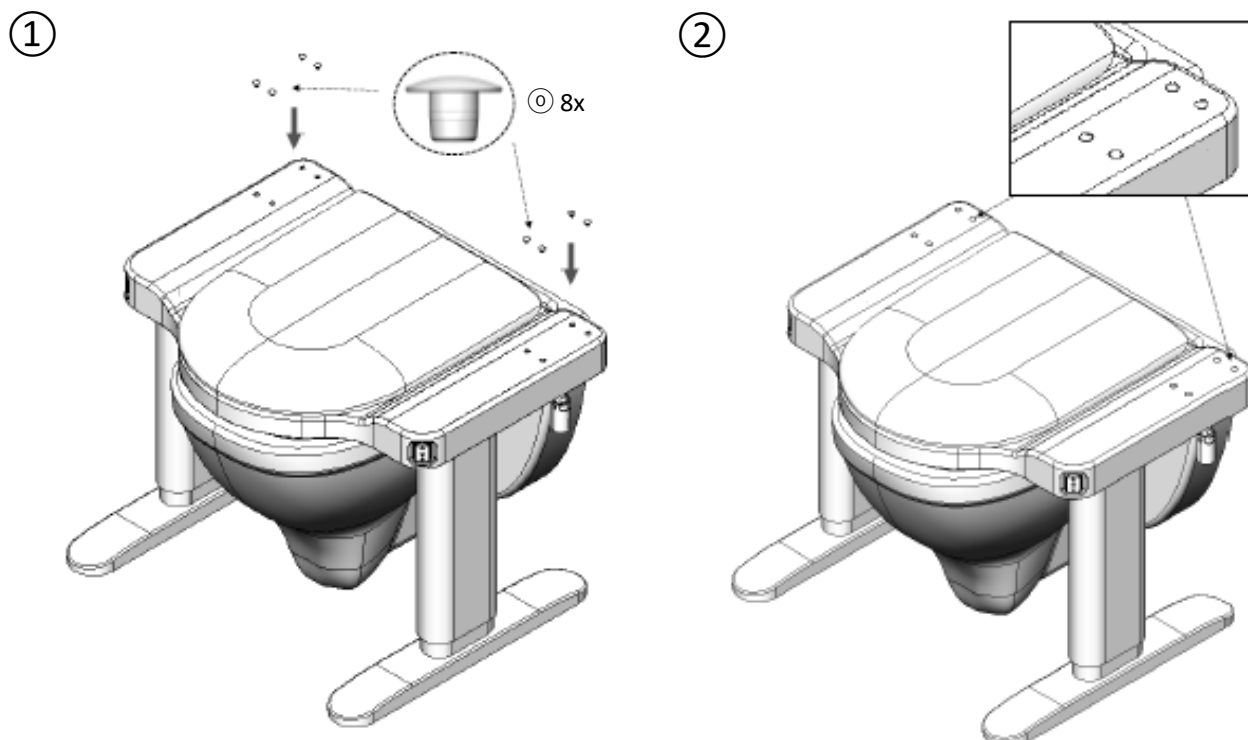


⚠ Monter hulpropper, hvis håndtagene ikke bruges.

⚠ Indsæt hulproppen, så den flugter.

8.5.2. INSTALLATION TIL FORSKELLIGE TOILETTYPER

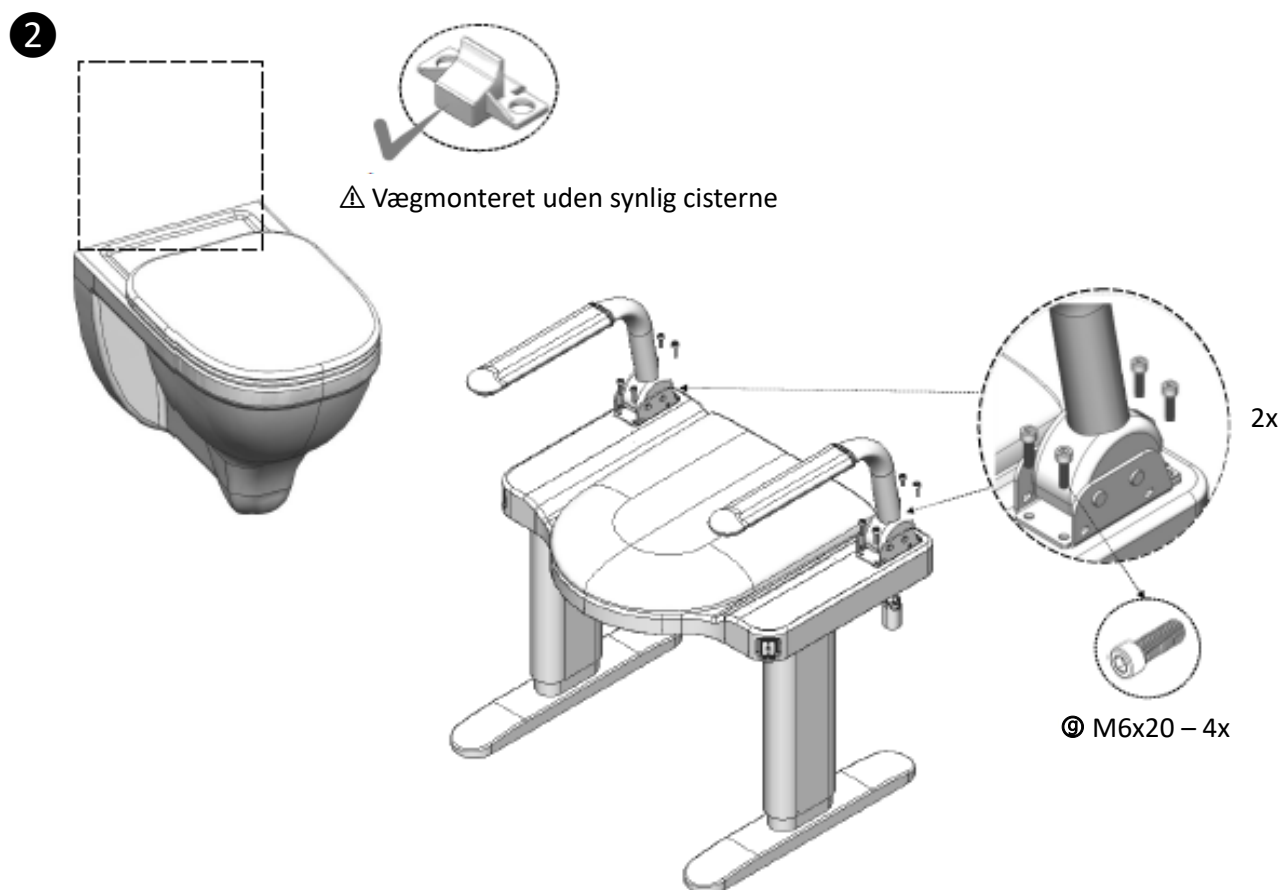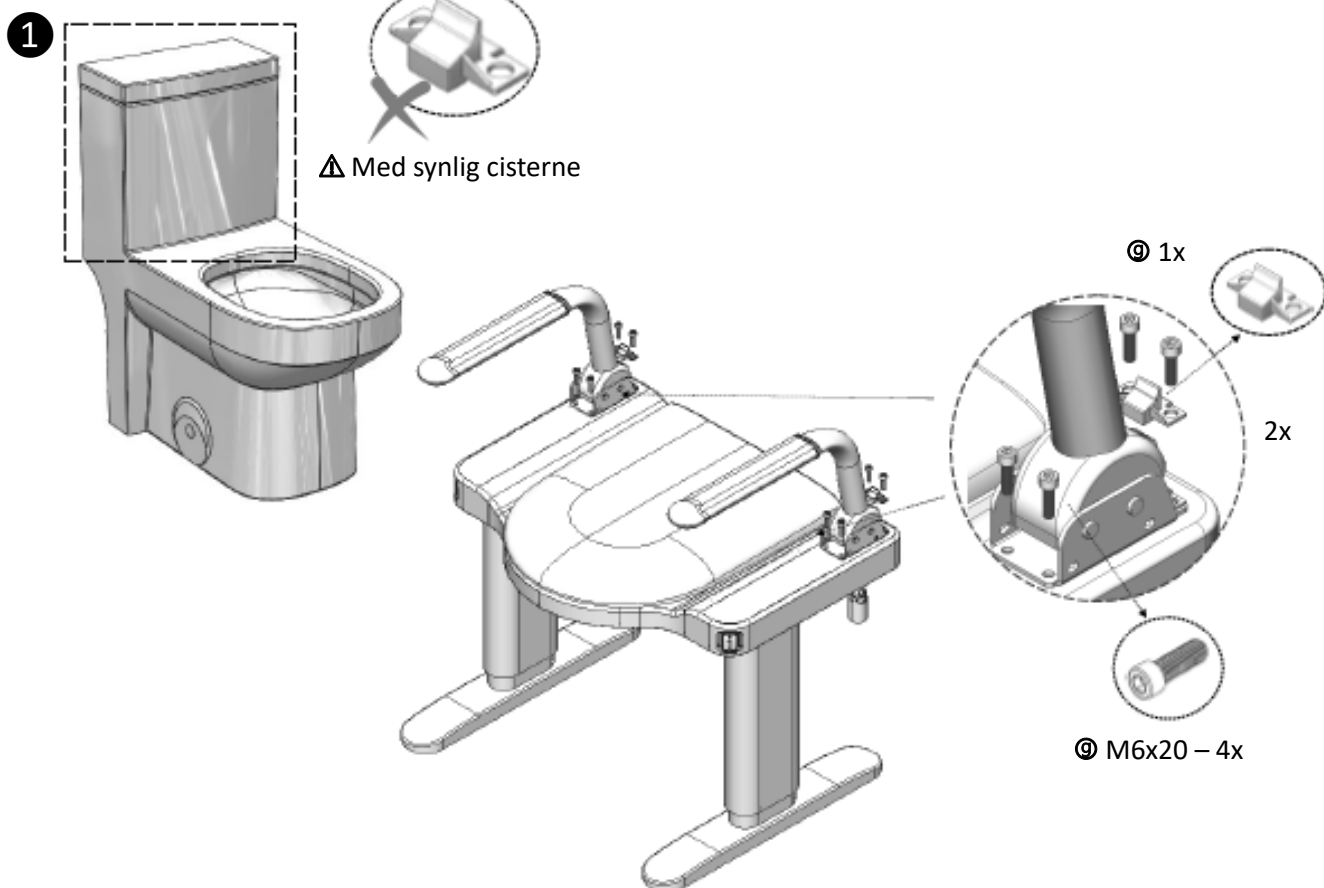


8.5.3. TRYK NED, INDTIL DEN LÅSER

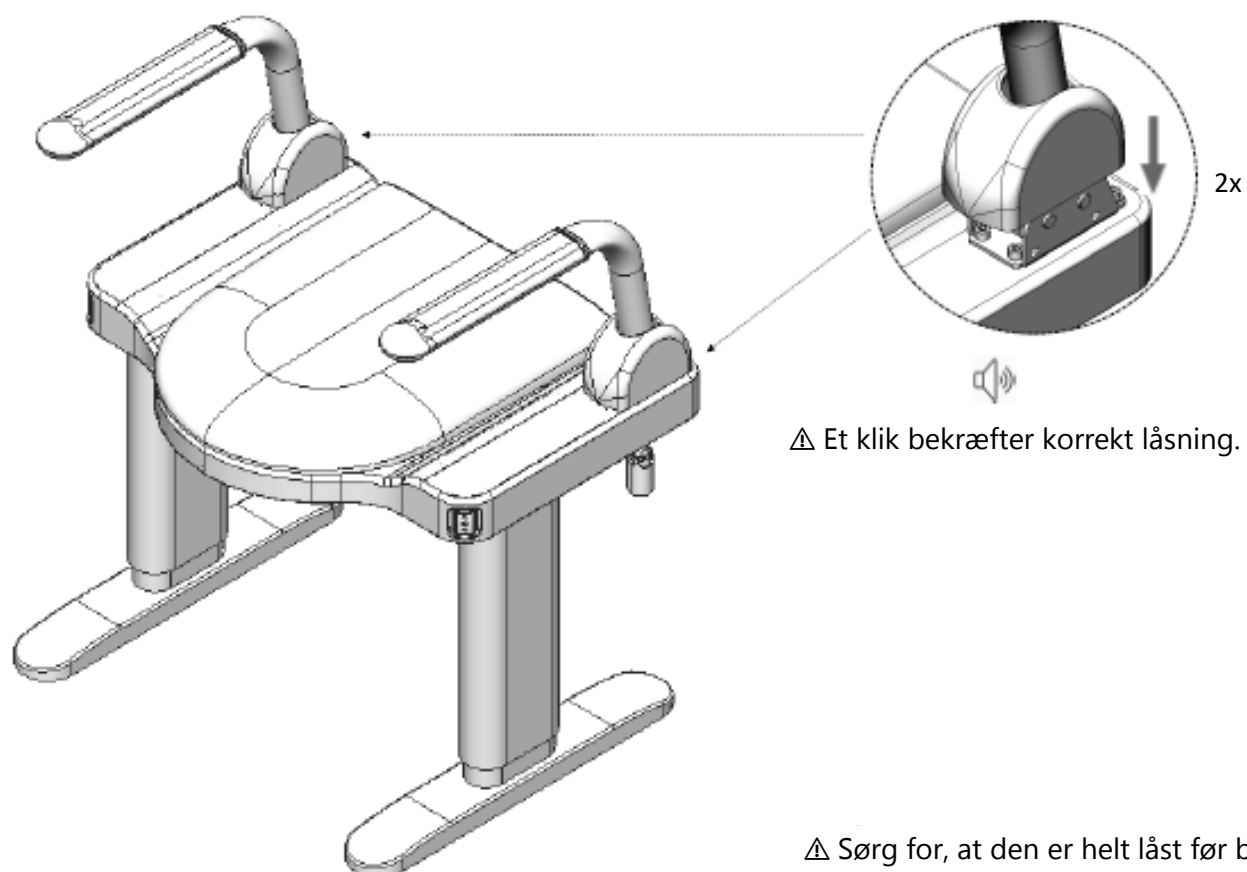


8.7. TILSLUT BATTERIET OG LØFT OP

①

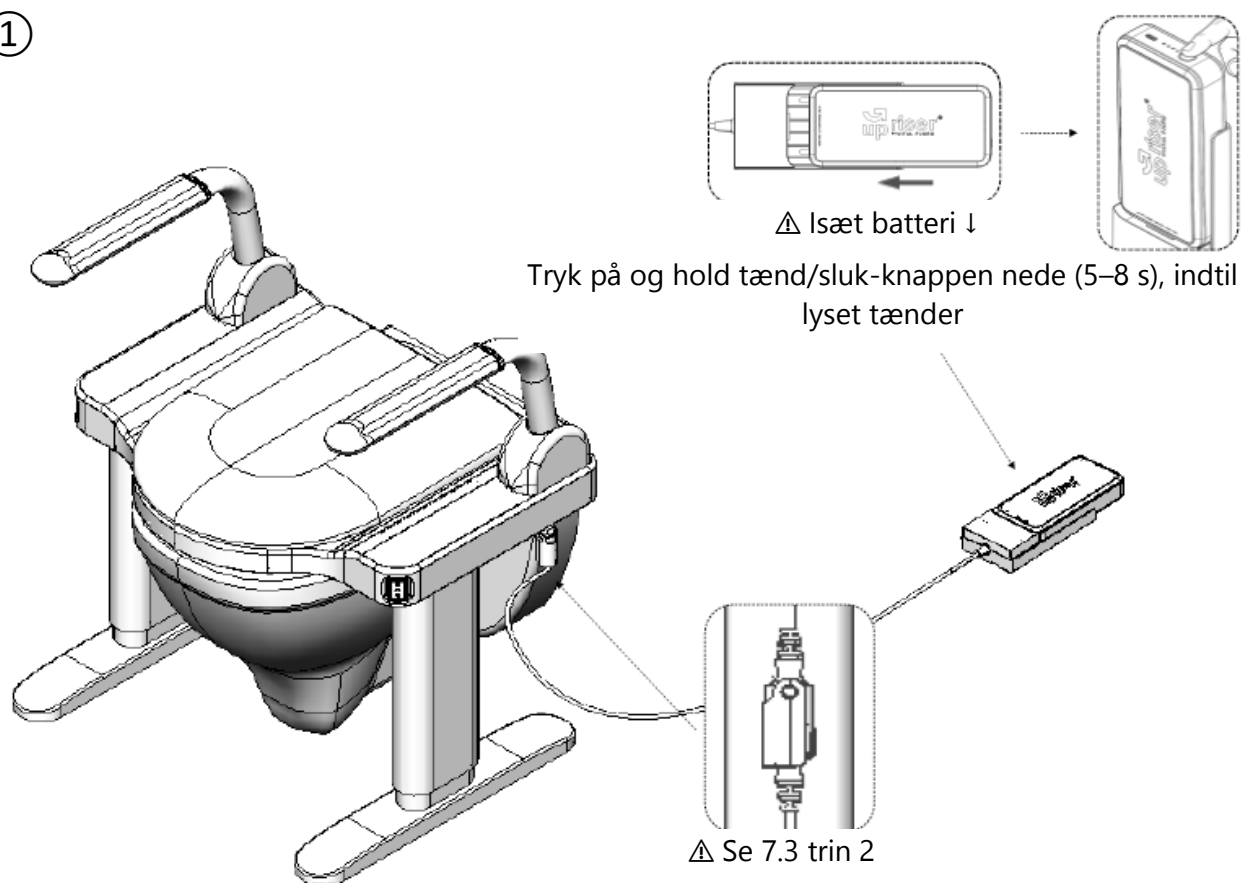


②

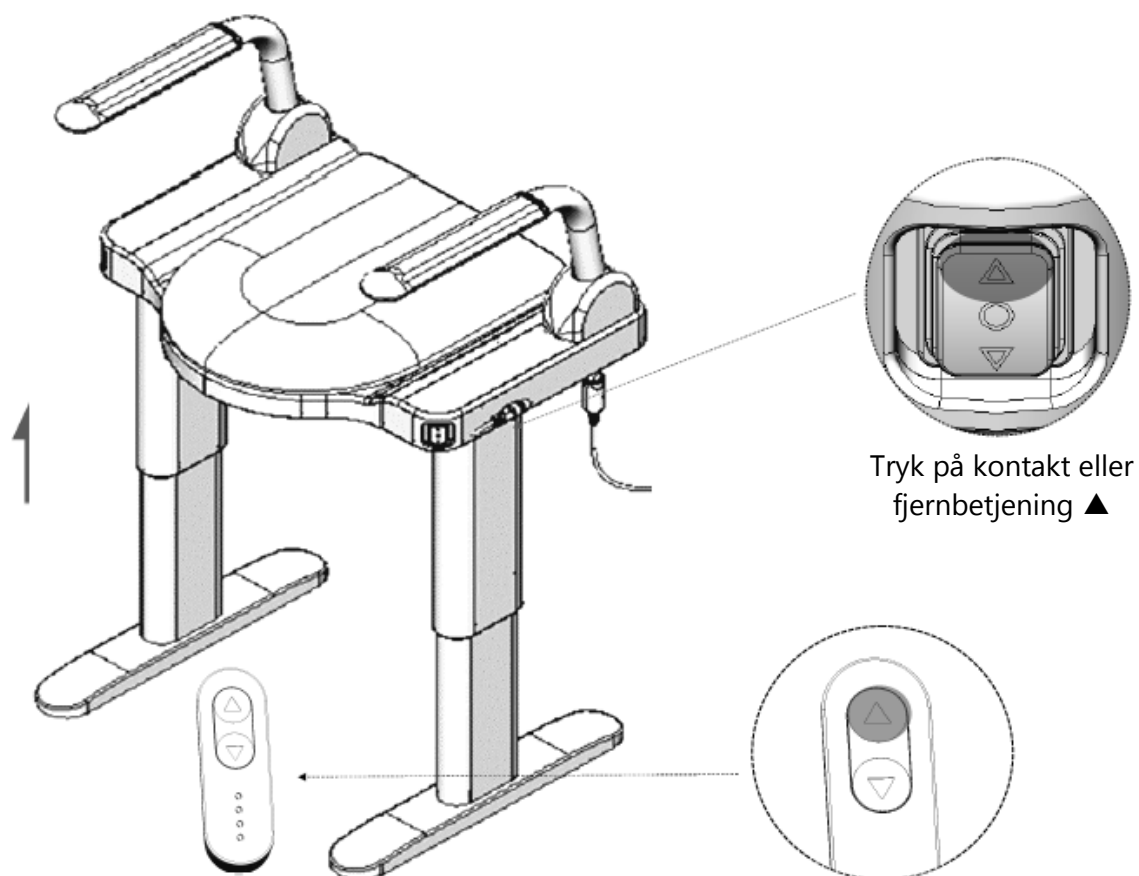


8.8. PLACÉR UPRISER'EN OVER TOILETTET



①

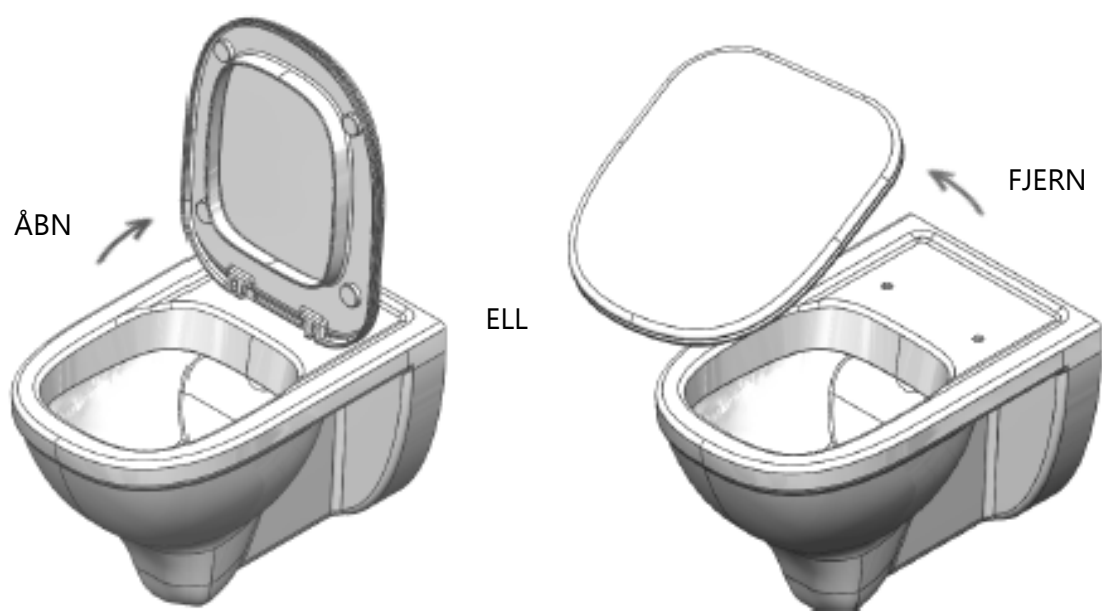


②

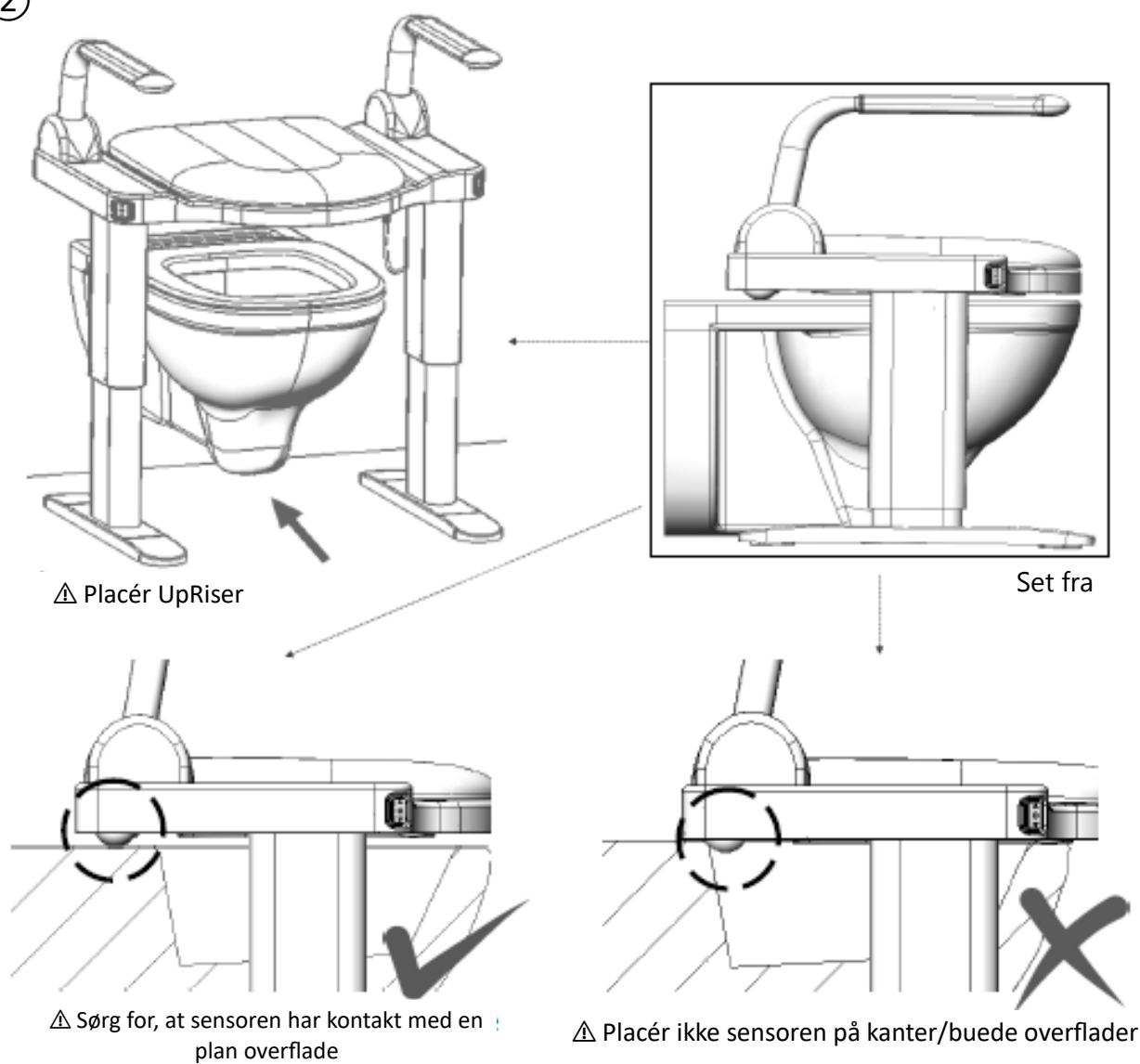

8.9. KONTROL AF SENSORKONTAKT

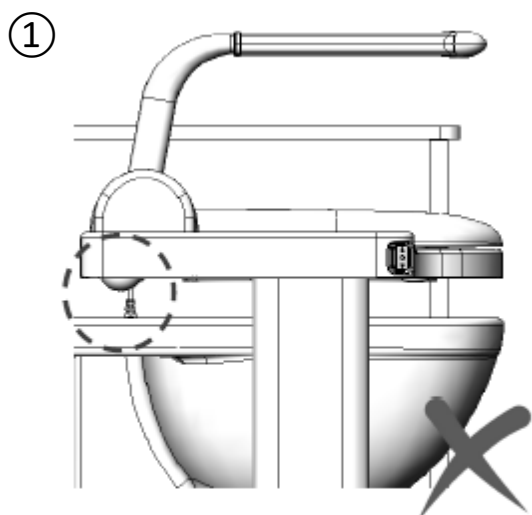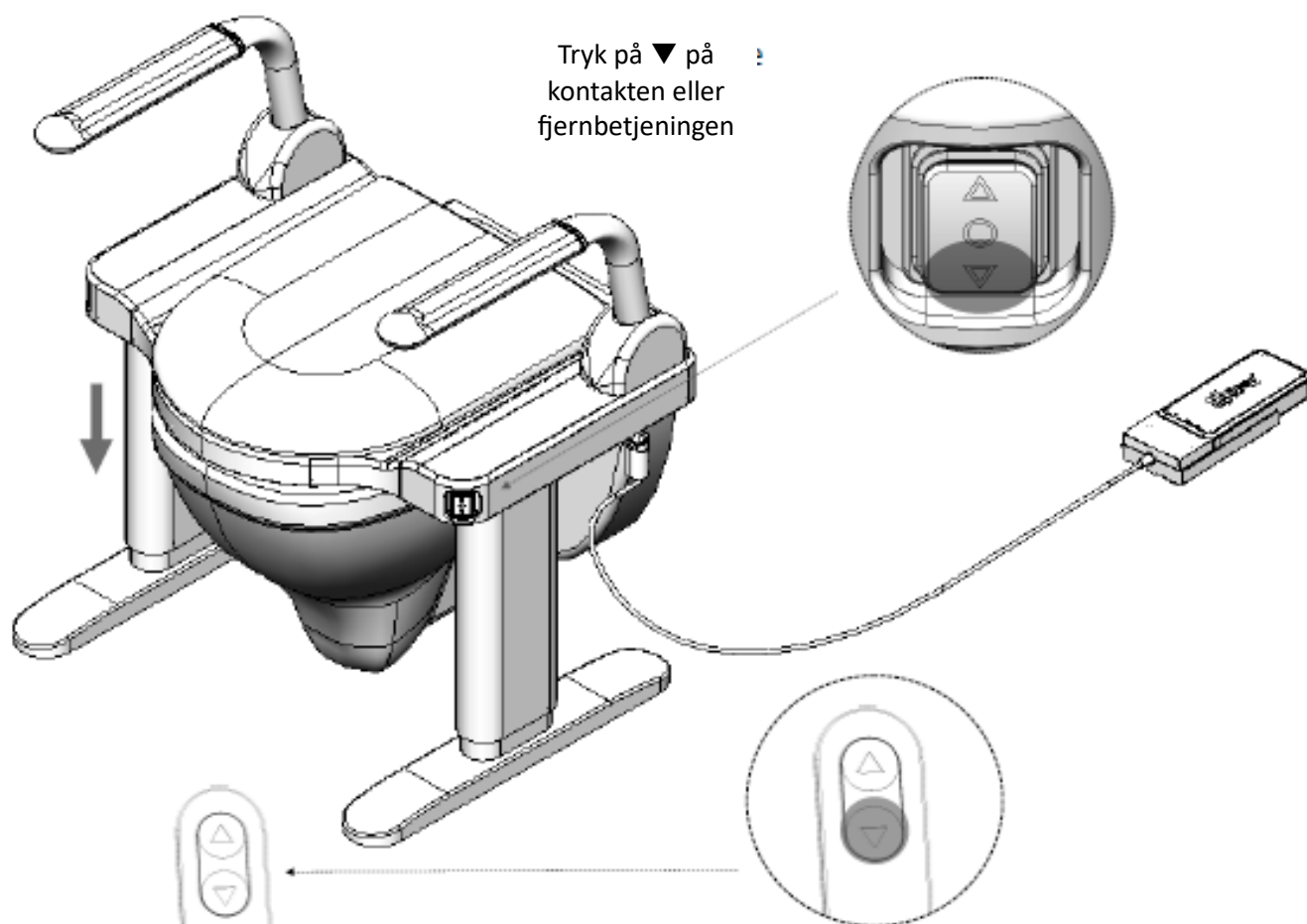


⚠ Ingen bevægelse / hopper tilbage
Kontakt venligst sælger / distributør

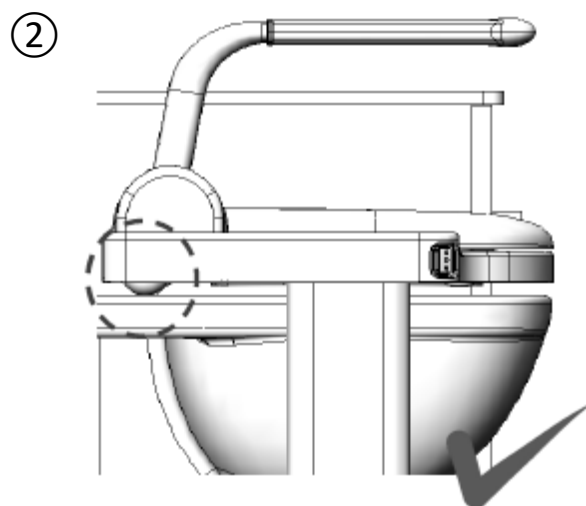


⚠ Stopper automatisk, når
sensorkuglen berører toiletkummen

8.10. LAV EN MARKERING OG FJERN UPRISER


①

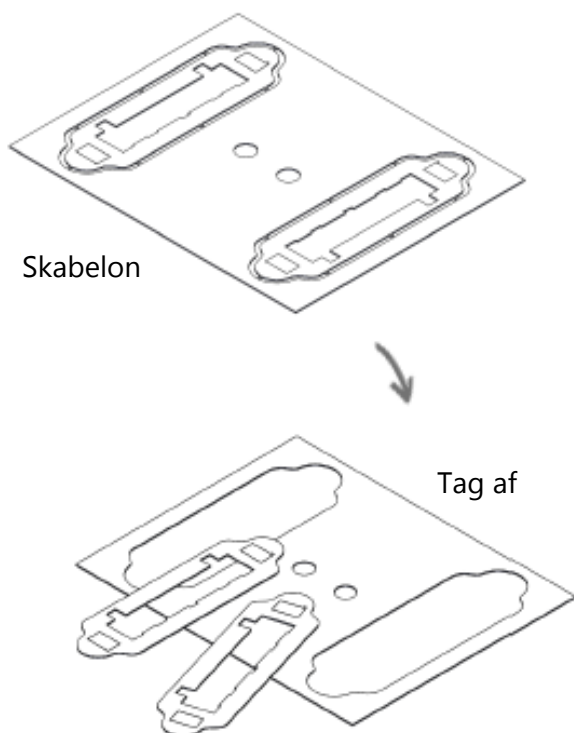


②

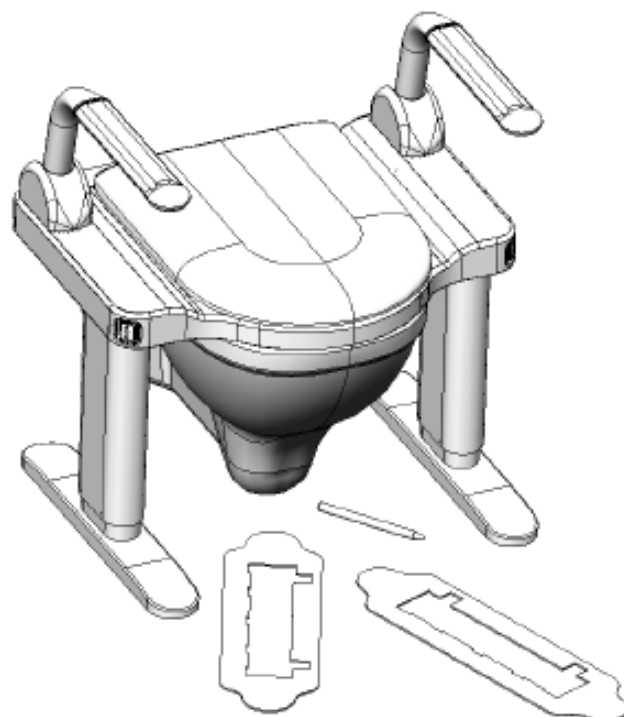

③

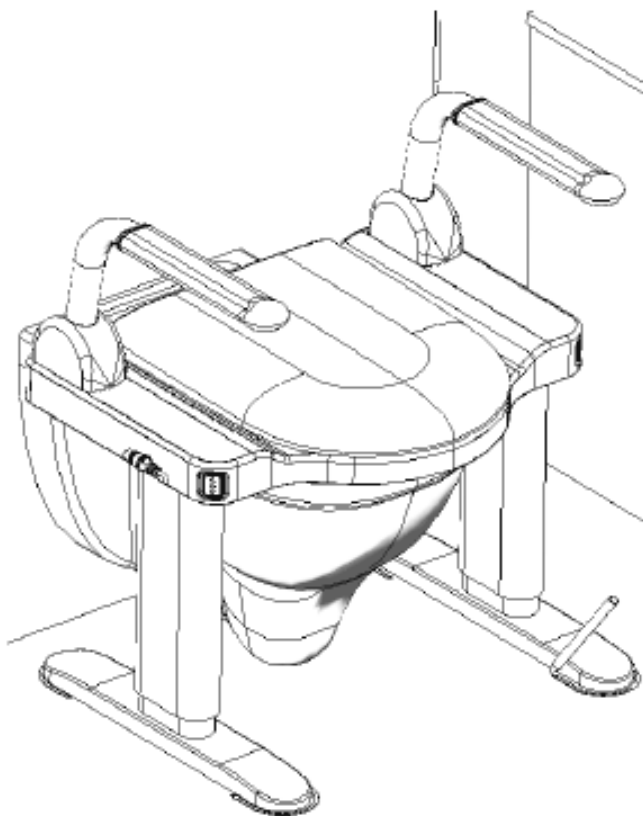


④

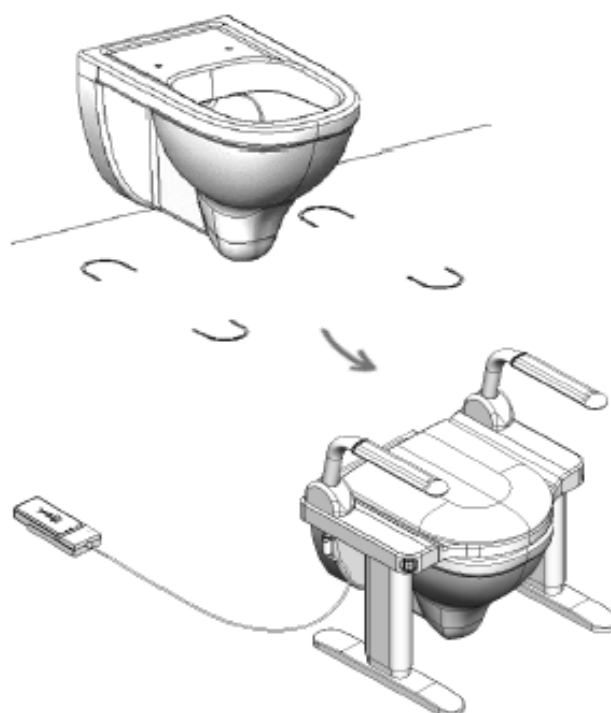

⚠ Flyt UpRiser væk


8.11. OPRET SKABELONEN EFTER MARKERINGERNE

①

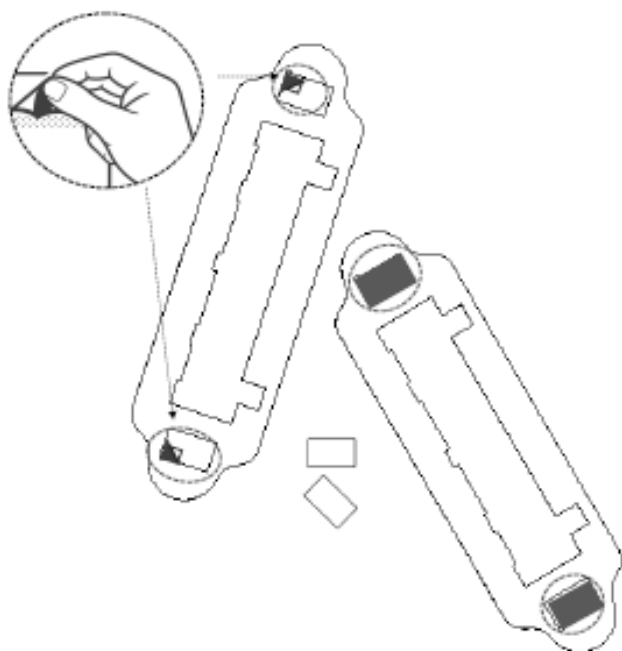


⚠ Træk beskyttelseslaget af, og placér den klæbende side nedad

②

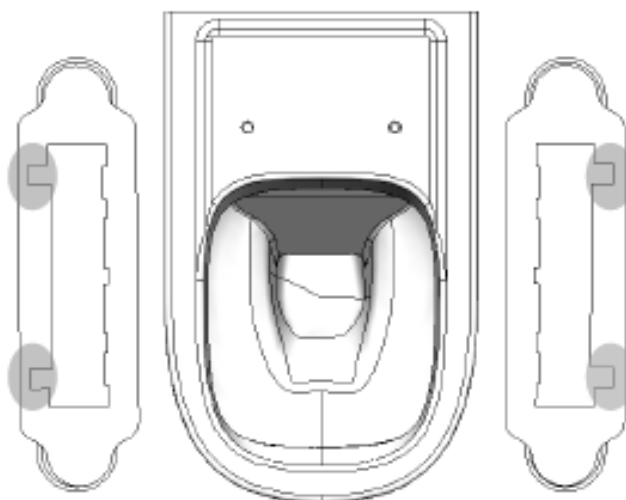


Justér skabelonen efter markeringen
⚠ Sørg for, at udskæringen vender udad

③

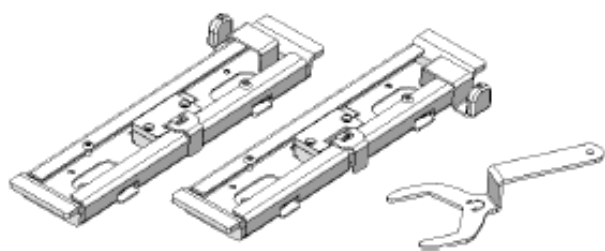

⚠ Del til næste trin


④

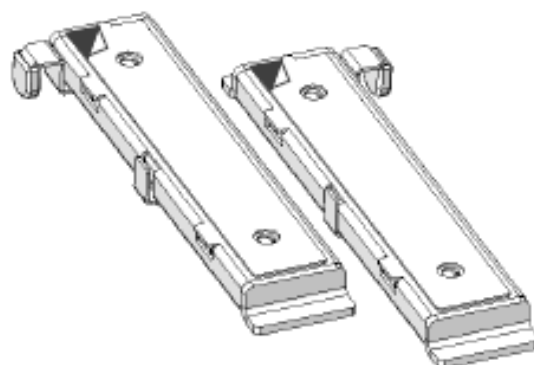

⚠ Fjern beskyttelseslaget før installation
Og placér også den klæbende side nedad

8.12. FASTGØR FODBESLAG OG FJERN SKABELONER

①

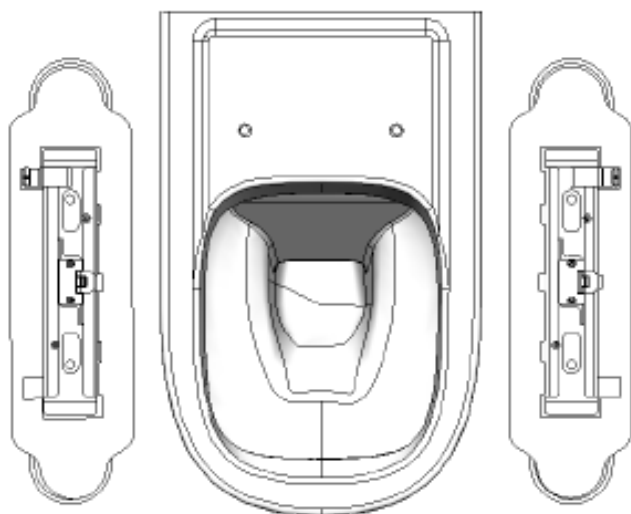


⚠ Sørg for, at begge knopper vender udad.
Tryk fast ned mod gulvet, og hold.

②



⚠ Fjern skabelonerne


③

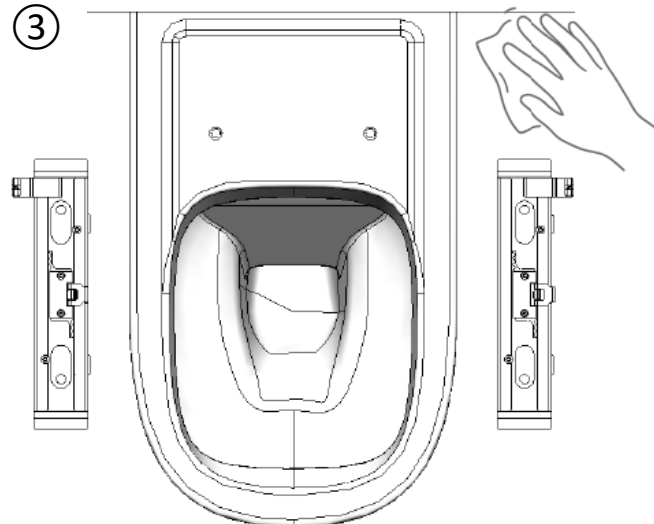

⚠ Tør markeringen af




8.13. PLACÉR UPRISER OG LÅS FODBESLAGENE

①

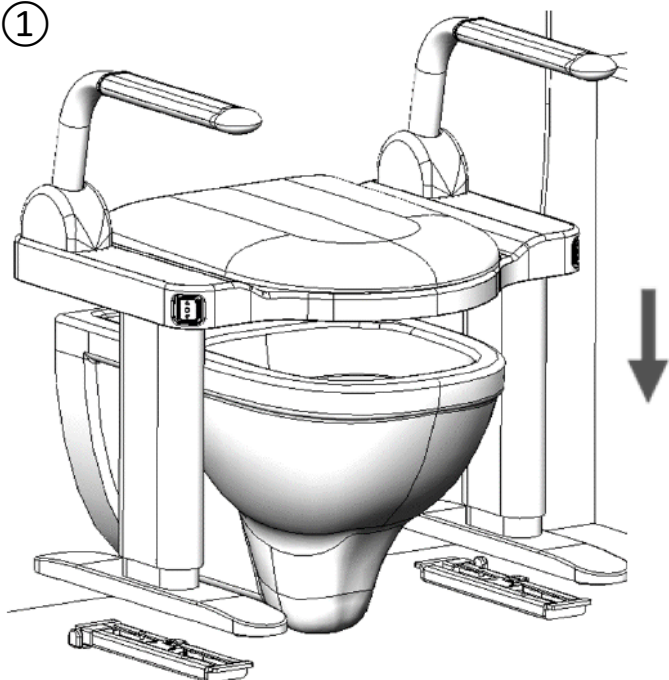

⚠ Placér UpRiser centreret over fodbeslagene

②

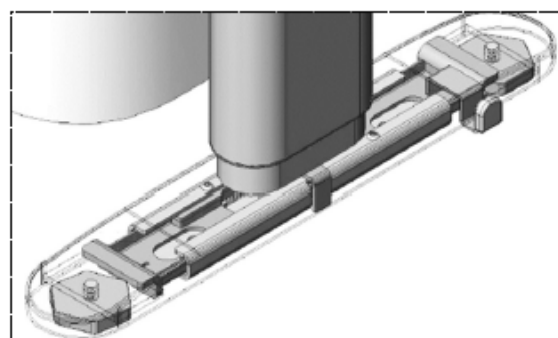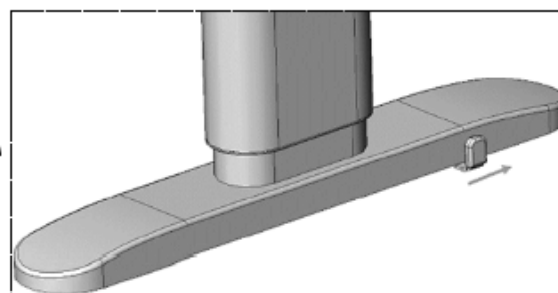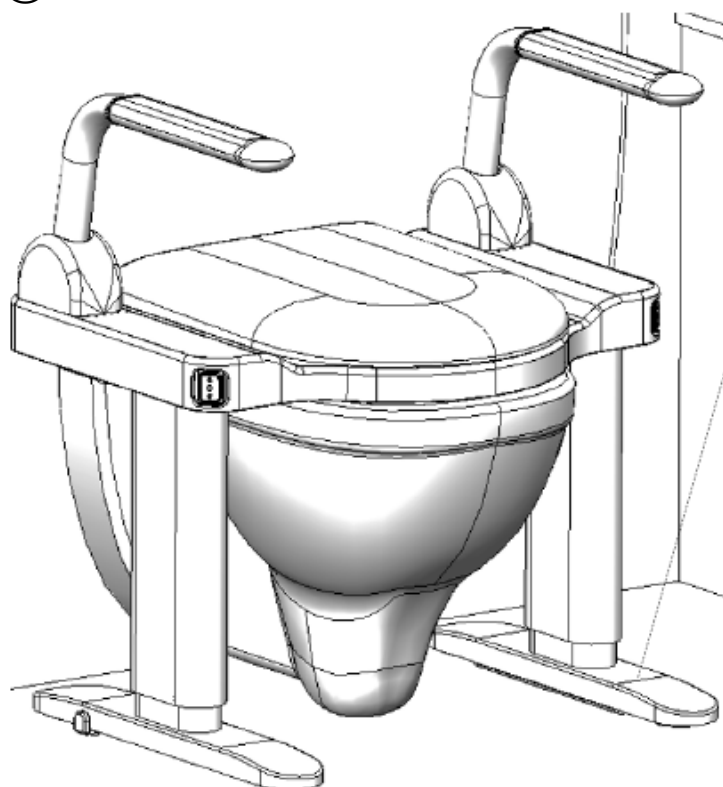


⚠ Sørg for, at fodlåsemekanismen er helt aktiveret

⚠ Fodlåsemekanismen er helt aktiveret, når grebet ikke kan bevæges bagud, og UpRiser ikke kan fjernes.




8.14. KONTROLLÉR STABILITETEN OG JUSTÉR FØDDERNE MED Y-NØGLEN

①

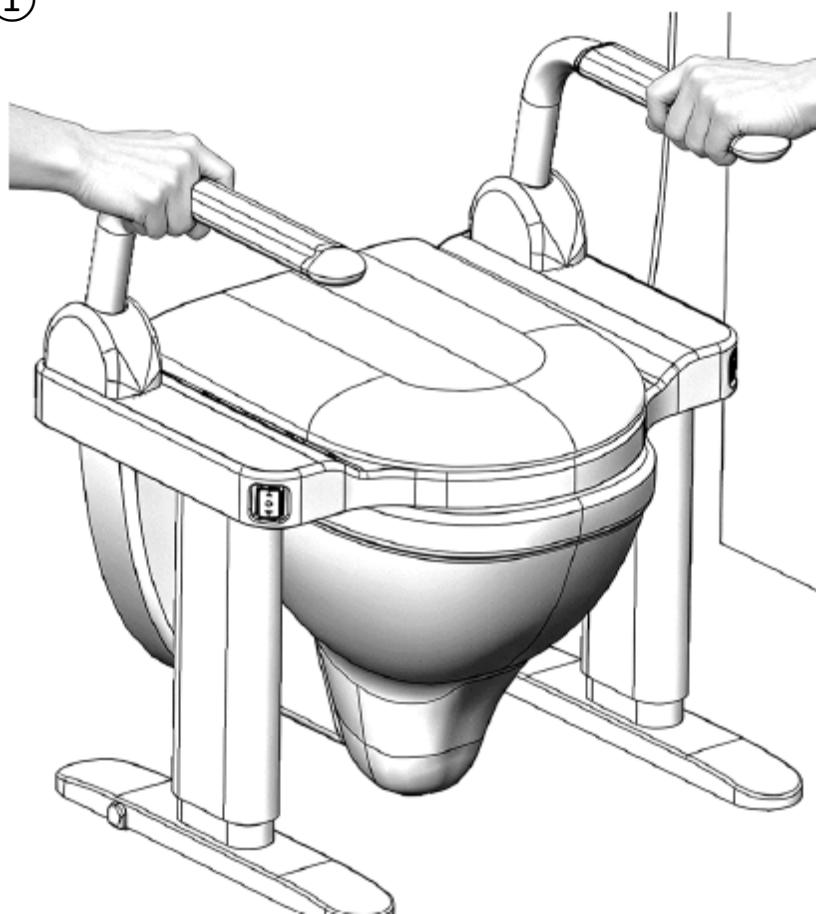

⚠ Ryst forsigtigt UpRiser frem og tilbage for at kontrollere stabiliteten.
⚠ UpRiser skal være fastgjort sikkert til gulvet.


②

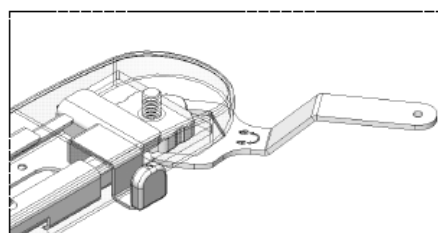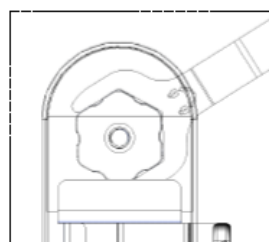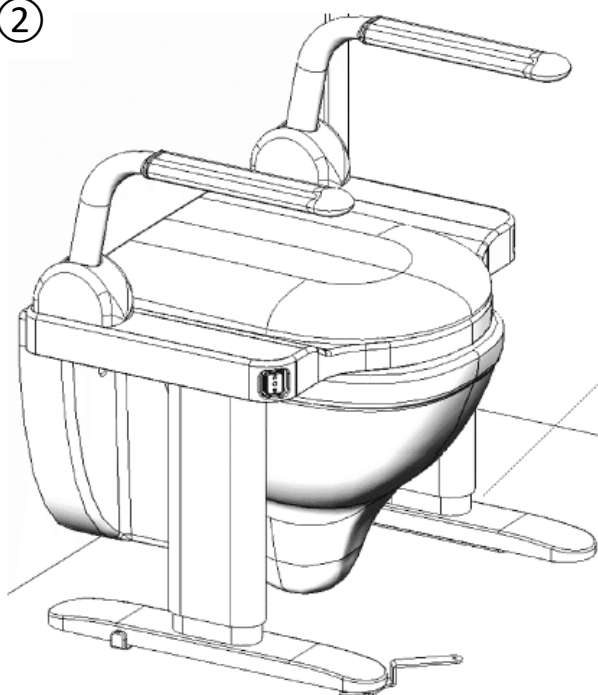


⚠ Justér fødderne for at undgå, at enheden vipper

8.15. MONTÉR BATTERIHOLDEREN

①

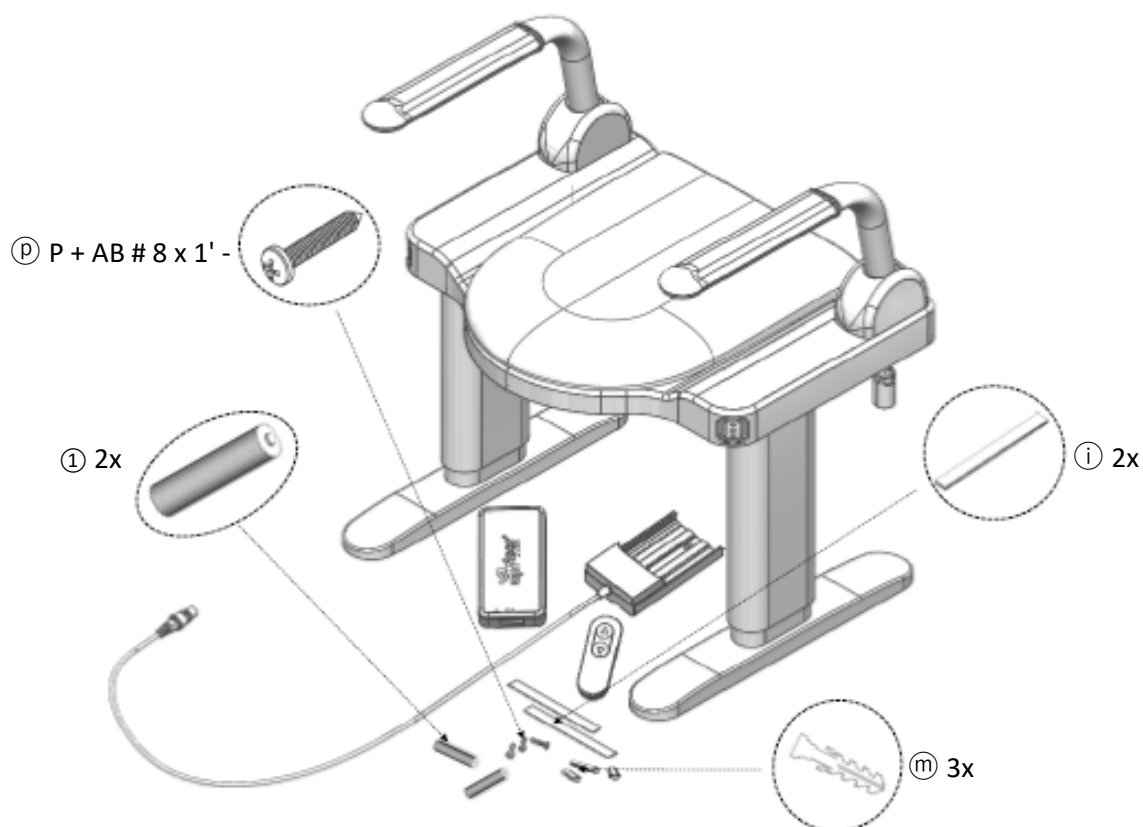


②

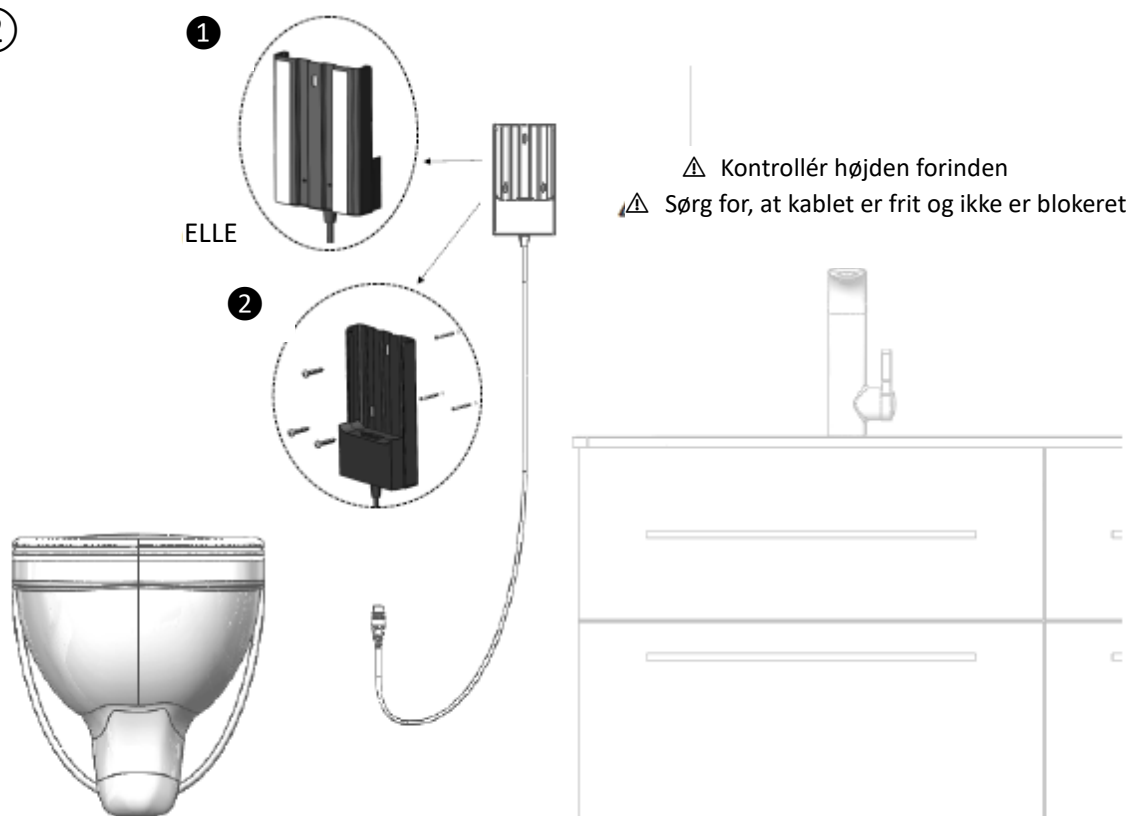


8.16. ENDELIG OPSÆTNING FULDFØRT

①

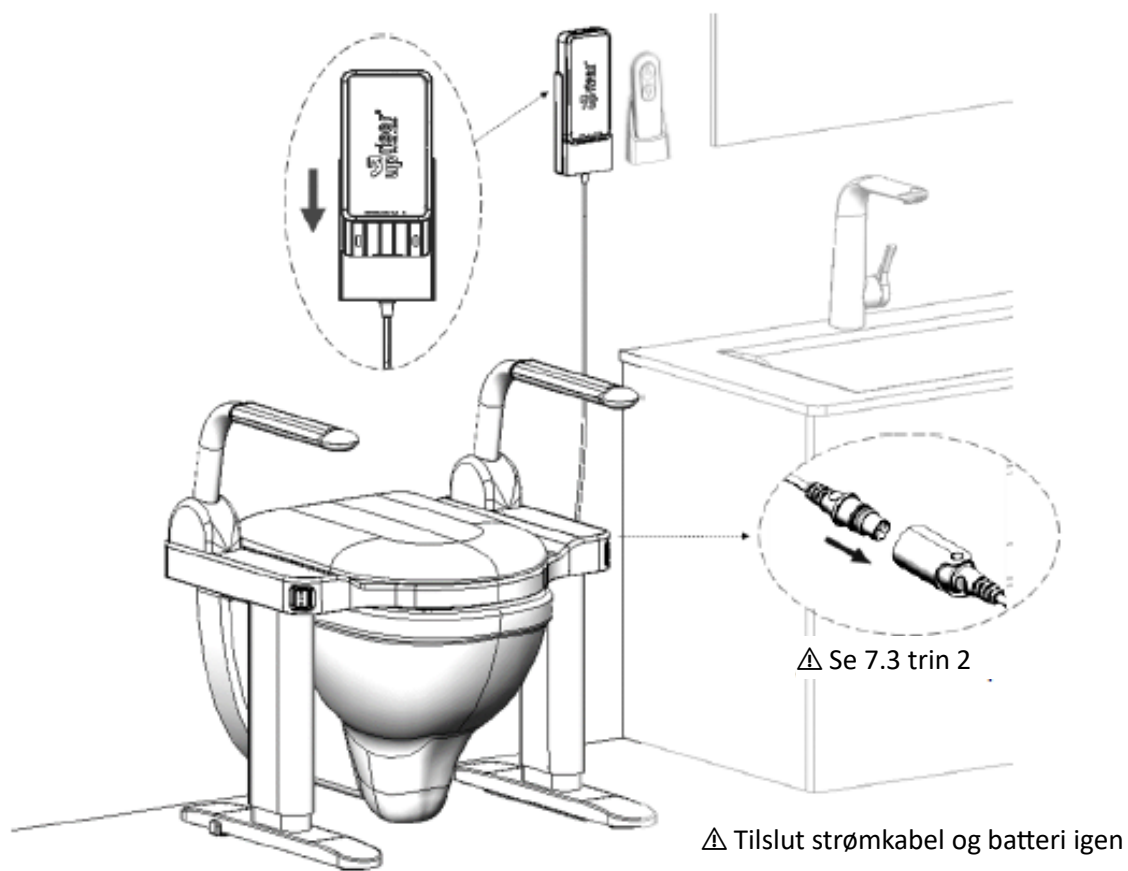

②

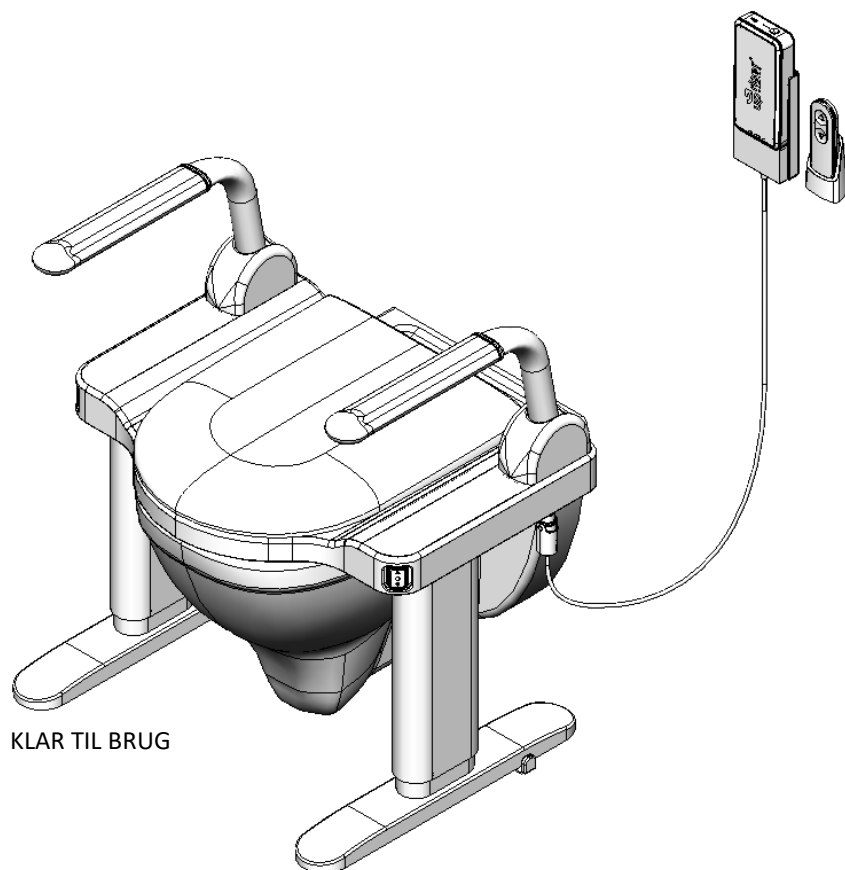

8.17. FØR FØRSTE BRUG



LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR SAMLING, INSTALLATION ELLER BRUG

Hvis UpRiser samles, installeres eller serviceres af en professionel serviceudbyder, installatør eller anden tredjepart, skal denne part sikre, at alle slutbrugere instrueres grundigt i sikker brug af produktet, herunder alle sikkerhedsfunktioner, risici og begrænsninger, før produktet tages i brug.

Manglende overholdelse af alle advarsler og instruktioner kan medføre alvorlig personskade eller fald.

9. BETJENINGSVEJLEDNING

Denne enhed bruger: "Tryk for at bevæge, slip for at stoppe" (dødmandskontakt) af hensyn til din sikkerhed.

① **HÆV:**

Tryk på ▲-knappen, og hold den nede. Sædet stopper automatisk ved 66,5 cm (26,2 in).

② **SÆNK:**

Tryk på ▼-knappen, og hold den nede. Sædet stopper automatisk ved 43,5 cm (17,1 in).


③ **STOP:**

Slip knappen når som helst for straks at standse bevægelsen.

④ **KORREKT GREB:**

Hold altid fast i de integreret armlæn for at bevare balancen under hele hæve- eller sænkeprocessen.

10. FJERN UPRISER

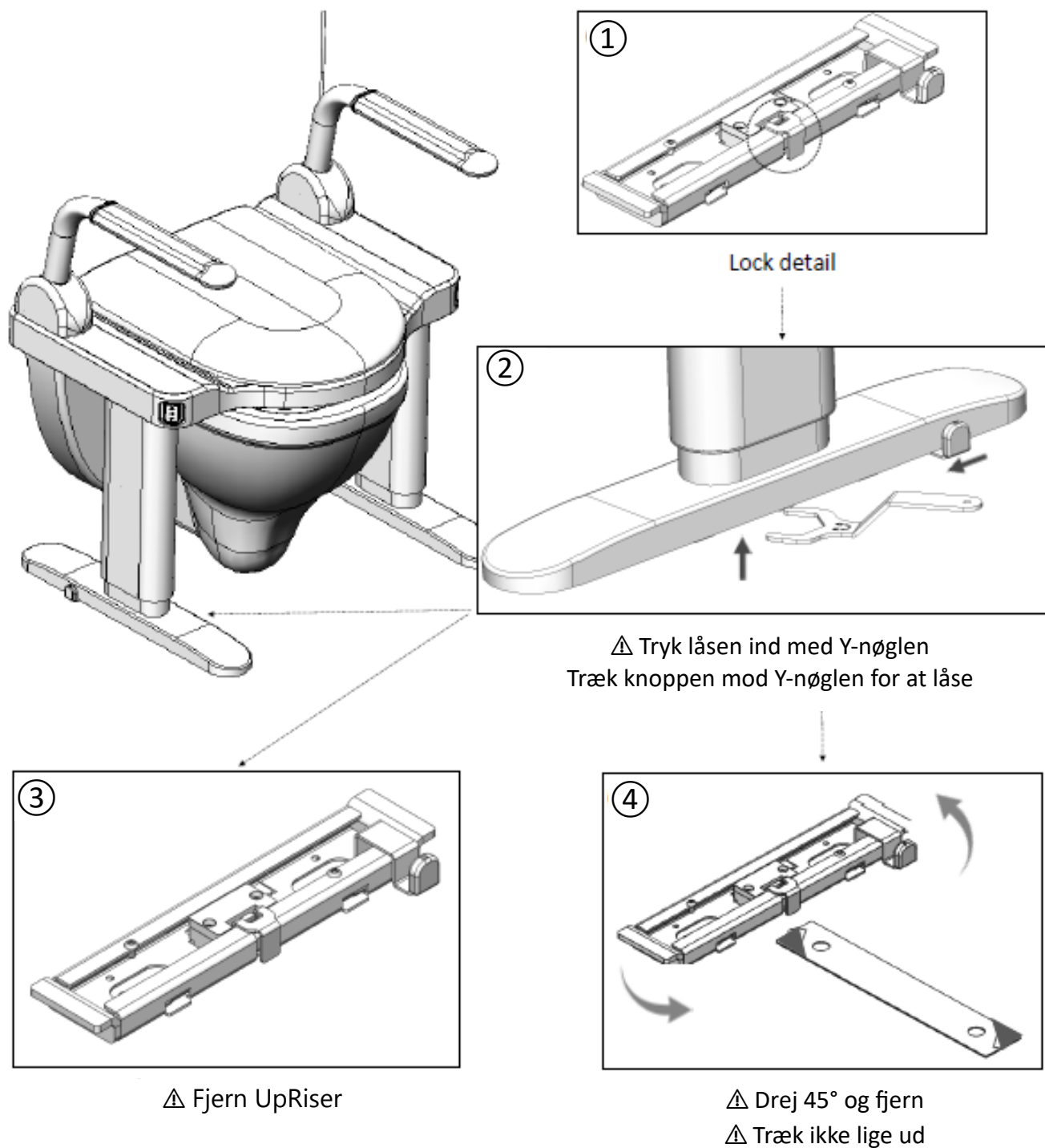

11. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING

- ① **Slå strømmen fra** : Træk netledningen ud før rengøring.
- ② **Tilladt** : Brug en blød, fugtig klud med neutralt rengøringsmiddel.
- ③ **Forbudt** : Brug ikke syreholdige/alkaliske rengøringsmidler eller stive børster, da de vil beskadige den rustbeskyttende belægning og forårsage strukturel korrosion.

VEDLIGEHOLDELSE

- ① Kontrollér jævnligt, om delene sidder løst, især M8-beslagene på armlænene.
- ② Langtidsopbevaring: Træk strømstikket ud, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode (flere uger), for at forhindre batteriforringelse og elektrisk belastning.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke denne enhed sammen med husholdningsaffald.

Litiumbatteriet og elektroniske dele skal genanvendes i henhold til lokale bestemmelser.

BATTERIVEDLIGEHOLDELSE:

Brug kun den medfølgende litiumbatteripakke.

Kontrollér batteriet regelmæssigt for tegn på beskadigelse eller lækage.

Fjern batteriet, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.

Oplad batteriet med jævne mellemrum under langtidsopbevaring.

Batteripakken må ikke adskilles eller modificeres.

12. FEJLFINDING: ÅRSAGER OG LØSNINGER


PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Fjernbetjeningens lys eller batteriindikator lyser ikke	Der er ikke sat batterier i	Isæt de medfølgende AAA-batterier i fjernbetjeningen.
	Fjernbetjeningens batterier er tomme	Udskift AAA-batterierne.
Parring af fjernbetjening mislykkedes	Tidsvindue for parring	Fjernbetjeningen kan parres eller parringen kan ophæves inden for 5 minutter, efter, at batteriet er sat i holderen. For at genstarte parringsvinduet skal du fjerne batteriet, vente 10 sekunder og derefter sætte det tilbage i holderen. Følg proceduren for parring eller ophævelse af parring som beskrevet i instruktionerne.
Armhåndtag rammer væggen, når det er helt åbnet	UpRiser er placeret for tæt på væggen	Flyt UpRiser lidt væk fra væggen, og sørg for, at den stadig slutter korrekt til toiletkummen.
Manglende del under samling	Vægmonteret toilet installation	Følg samlevejledningen fra afsnit 8.5 og frem, og monter den manglende del "J".

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
UpRiser har ingen strøm	Lav batteriopladning	Oplad batteriet, og skift til det andet batteri.
	Problem med ledningsføring	Kontrollér strømkablet for skader. Udskift eventuelle beskadigede kabler (kundeservice).
Bippende lyd under bevægelse	Lav batteriopladning	Oplad batteriet, og skift til det andet batteri, hvis det er tilgængeligt.
	Overskridelse af belastningskapacitet	UpRiser er designet til at løfte maksimalt 150 kg / 330 lbs. Vægtgrænsen må ikke overskrides.
Kort driftstid	Batteriet er ikke fuldt opladet	Oplad batteriet i mindst 3 timer, indtil alle fire indikatorer lyser.
	Opladeren blev frakoblet for tidligt	Oplad batteriet i mindst 3 timer, indtil alle fire indikatorer lyser.
	Batterialdring eller reduceret kapacitet	Udskift batteriet.
Batteriet vil ikke oplade	Opladeren er ikke tilsluttet korrekt	Sørg for, at stikkontakten fungerer, og at opladeren er sat ordentligt i både stikkontakt og USB-C-porten på batteriet.
	Stikkontakten har ingen strøm	Prøv en anden stikkontakt.
	Beskadiget oplader eller kabel	Test opladeren med det andet medfølgende batteri. Kontrollér kablet for skader. Udskift opladeren eller batteriet om nødvendigt.
UpRiser står ikke stabilt / vipper	Glidesko er ikke justeret	Brug den medfølgende nøgle til at spænde justeringsfødderne. Se afsnit 8.13 i samlevejledningen.
	Løse skruer	Kontrollér alle skruer, og spænd dem om nødvendigt.
UpRiser bevæger sig kun opad, men ikke nedad	Systemet skal nulstilles	Tryk på og hold Op-knappen nede, indtil UpRiser når sin højeste position. Et bip bekræfter, at nulstillingen er fuldført.
	Sensorfejl	Tryk sensorkuglen under UpRisers bundplade flere gange ind og ud, og prøv derefter igen. Udskift den defekte sensor om nødvendigt (kundeservice).
Hvidt blinkende lys på fjernbetjeningens Op-knap	Systemet skal nulstilles	Tryk på og hold Op-knappen nede, indtil UpRiser når sin højeste position. Et bip bekræfter, at nulstillingen er fuldført.
Rødt blinkende lys på fjernbetjeningen	UpRisers batteri er lavt	Oplad batteriet, og skift til det andet batteri, hvis det er tilgængeligt.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
UpRiser stopper pludseligt under bevægelse nedad	Sensoren registrerede en forhindring	Kontrollér, om sensoren er i kontakt med en forhindring (f.eks. toiletkummen). Fjern forhindringen, og prøv igen.
	Fejl på Op/Ned-kontakt	Test den alternative Op/Ned-kontakt (venstre og højre) og fjernbetjeningen. Udskift den defekte kontakt om nødvendigt.
Mærkelige lyde under bevægelse	Løse skruer	Sørg for, at alle skruer og bolte er helt spændt. Efterspænd og kontrollér igen.
UpRiser sænker farten under bevægelse	Lav batteriopladning	Oplad batteriet, og skift til det andet batteri, hvis det er tilgængeligt.
	Høj belastning	Ved øget belastning vil UpRiser bevæge sig langsommere som en sikkerhedsforanstaltning. Dette er normal funktion.
Høj lyd fra UpRiser	Høj belastning	Øget belastning kan medføre lavere hastighed og højere motorlyd. Dette er normal funktion.
	Løse skruer	Sørg for, at alle skruer og bolte er helt spændt. Efterspænd om nødvendigt.
	Installation under spænding	Benene kan være under spænding. Sørg for, at UpRiser er samlet i henhold til samlevejledningen. Tving ikke benene på plads.
Fjernbetjeningen reagerer ikke	Fjernbetjeningens batterier er næsten flade	Hvis den røde indikator blinker fire gange, skal AAA-batterierne udskiftes.
	Fjernbetjeningen er ikke parret med UpRiser	Følg proceduren for parring af fjernbetjeningen i betjeningsvejledningen.
	Knapper sidder fast eller er blokeret	Kontrollér, om Op- eller Ned-knappen sidder fast, og frigør den om nødvendigt.
Fjernbetjeningens respons er forsinket eller uregelmæssig	Lille forsinkelse (op til 1 sekund)	Normal funktion.
	Svage batterier i fjernbetjeningen	Hvis den røde indikator blinker fire gange, skal AAA-batterierne udskiftes.
	Signalforstyrrelser	Sørg for, at fjernbetjeningen bruges tæt på UpRiser.
	Knapfunktionen er forkert	Tryk på knappen, og hold den nede i mindst 1-2 sekunder.

13. FJERNBETJENING

DETALJER

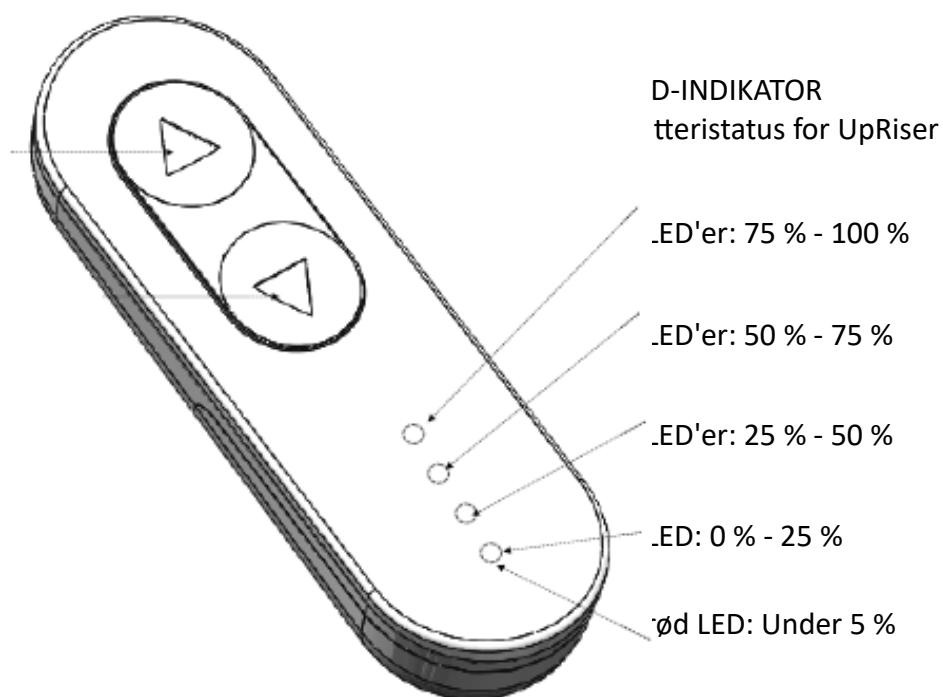

Batteriindikatoren viser UpRisers batteriniveau
Rød LED-lampe = lavt batteriniveau

13.1. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN


①



PARRING:

Inden for 5 minutter efter, at batteriet er sat i holderen:
Tryk på og hold ▲ + ▼ nede i 10 sekunder
Indikatoren blinker Parret


②

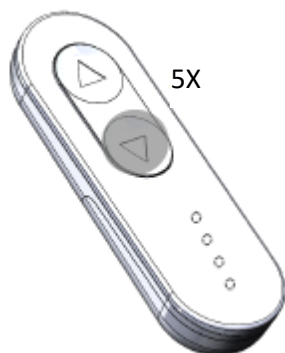


OPHÆV PARRING:

Inden for 5 minutter efter, at batteriet er sat i holderen:
Tryk hurtigt på ▼ 5 gange
Indikatoren blinker Ikke parret



13.2. AKTIVÉR / DEAKTIVÉR

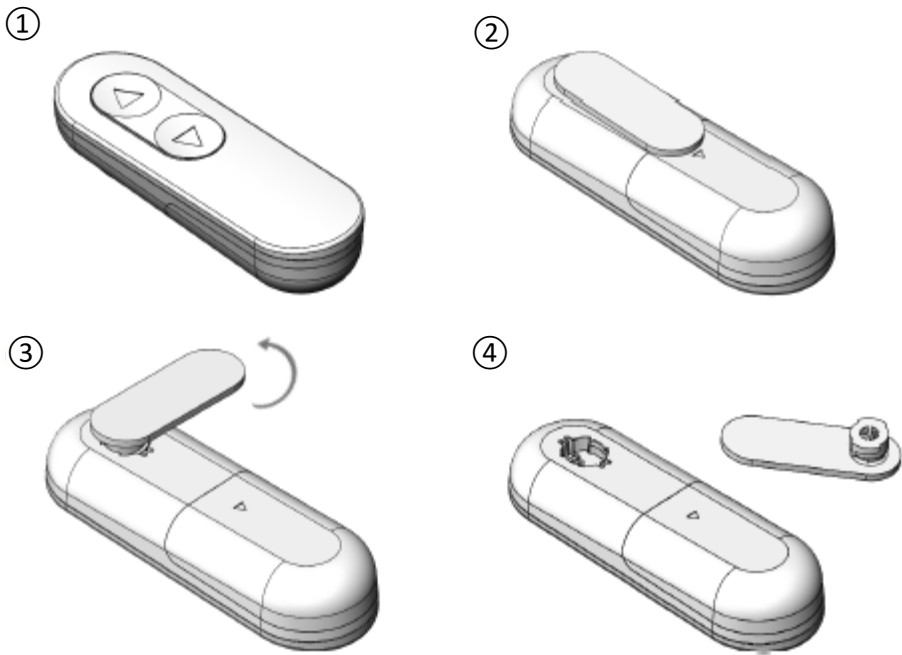


14. UPRISER - MÅL OG SPECIFIKATIONER

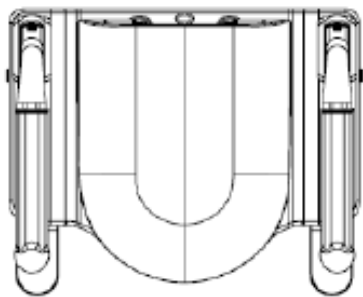

Justeringshastighed: Maks. 25 mm/s [1 in/s]

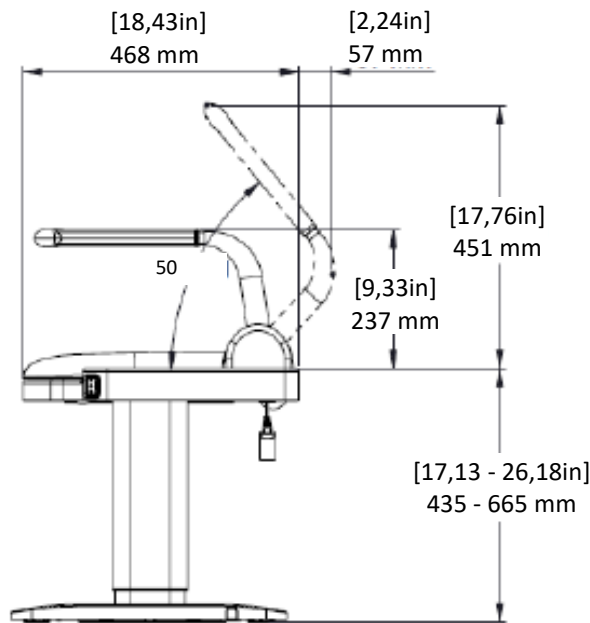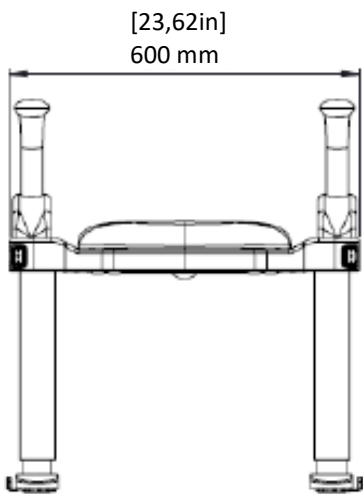

14.1. MÅL OG SPECIFIKATIONER FOR ÅBENT SÆDE

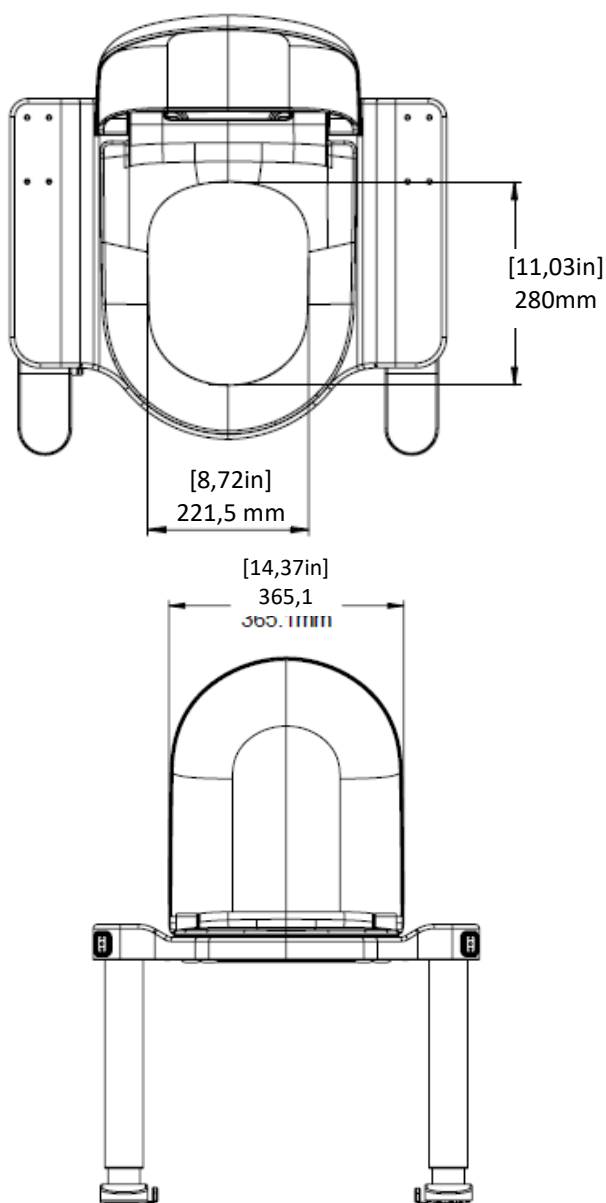

Samlet vægt pr. oprejser: 30,3kg


IP65 gælder kun basen

Produktets støv- og vandtætte egenskaber er kun gyldige, når produktet er fuldt samlet, og alle komponenter er korrekt installeret. Under disse forhold er kapslingen konstrueret til at forhindre indtrængning af støv og vand til alle spændingsførende dele i produktet, herunder, men ikke begrænset til, elektroniske komponenter, printkort (PCB'er), stikforbindelser samt alle metaldele, der er elektrisk forbundet med spændingsførende kredsløb.


Mærkespænding: 24VDC @ 6A, effekt: 144W

Maks. brugervægt : 150KG (330lbs)

Driftscyklus: maks. 10% (2min til / 18min fra)

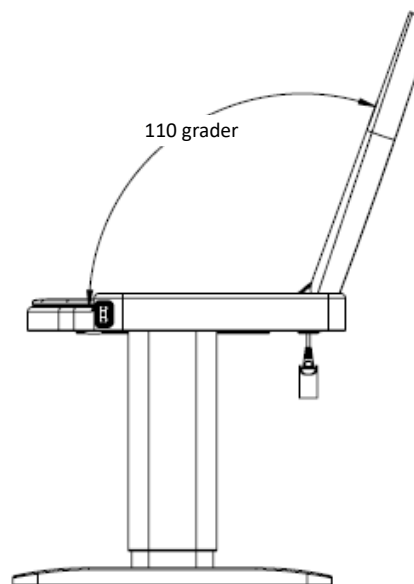


14.2. MÅL PÅ FJERNBETJENING

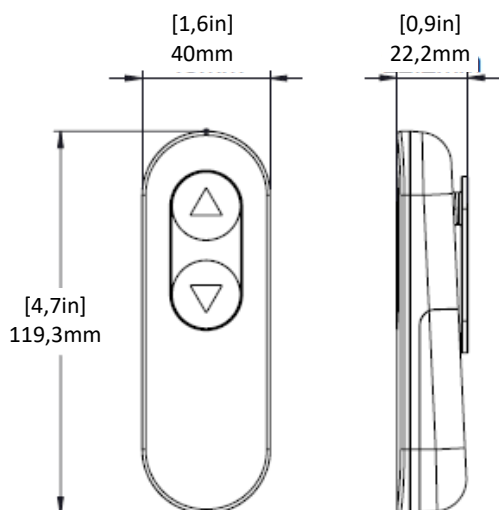


IP22 gælder kun fjernbetjeningen


14.3. MÅL PÅ HOLDER TIL FJERNBETJENING

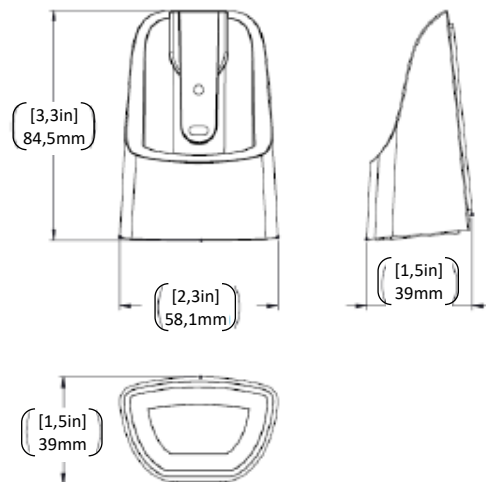


14.4. MÅL PÅ BATTERIHOLDER

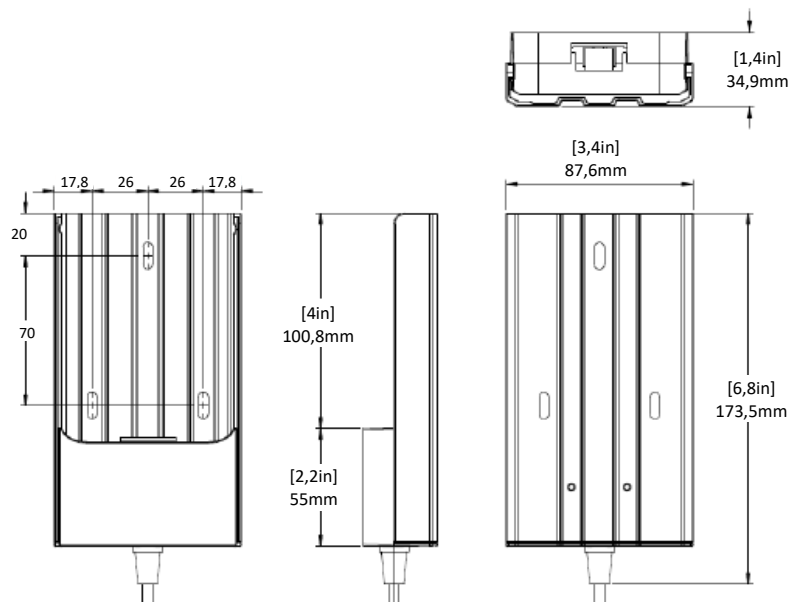

14.5. BATTERIMÅL

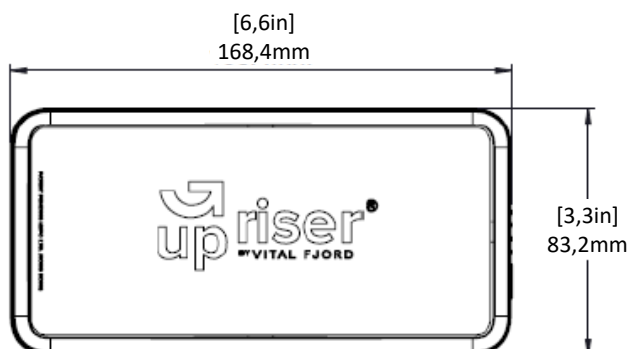

Modelnr. : TBB9-C
 Nominel spænding/kapacitet: 25,2V=: 2500mAh 63
 WhInput : 30V-36V=IA 5A =2A , 9V= 2A:12V=2A(Type-C)
 Nominel afladningsstrøm: 3A
 Driftscyklus: 10%,15A maks. (15A,30s/6A,30s) ; 1min/9

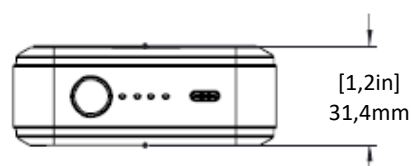

15. ANVENDELSESBETINGELSER

DRIFTSBETINGELSER

- ⇒ Omgivelsestemperatur: +10°C til +40°C
- ⇒ Relativ luftfugtighed: 30% til 75% (ikke-kondenserende)
- ⇒ Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

OPBEVARINGSBETINGELSER

- ⇒ Temperatur: -20°C til +60°C
- ⇒ Relativ luftfugtighed: 10% til 90% (ikke-kondenserende)
- ⇒ Atmosfærisk tryk: 500 hPa til 1060 hPa

TRANSPORTBETINGELSER

- ⇒ Temperatur: -20°C til +60°C
- ⇒ Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
- ⇒ Atmosfærisk tryk: 500 hPa til 1060 hPa

PRODUKTKLASSIFICERING

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

DRIFTSTILSTAND

Ikke-kontinuerlig drift

Driftscyklus 10 % (2 min. til / 18 min. fra)

SYMBOLER ANVENDT PÅ PRODUKTET OG ETIKETTER

⚠ Advarsel / Forsigtig

▲ Hæv / Op

▼ Sænk / Ned

SPECIFIKATION FOR EKSTERN STRØMFORSYNING

Modelnr.: UES24LCP1-120200SPA

Indgang: 100-240V ~ 50/60Hz, 500mA

Udgang: 12,0V - 2,0A, 24,0W

Brug kun den medfølgende strømadapter og batteripakke.

16. BRUGERSUPPORT

Hvis du oplever en funktionsfejl eller har brug for reservedele, bedes du kontakte din sælger eller distributør.