

MODULÆRT BEKKENPOSITIONERINGSBÆLTE

GMN: 872076918P01N7

! Dette produkt er udelukkende beregnet til at positionere eller støtte en person i en kørestol eller arbejdsstol. Det er ikke egnet som sikkerhedssele i køretøjer eller til begrænsning af bevægelse. Ukorrekt brug er uautoriseret og usikker.

Dette produkt skal installeres af en kvalificeret rehabiliteringstekniker. Brug det valgfrie Posigo® monteringsæt til installation på kørestole eller sædesystemer.

Spænd altid positioneringsbæltet sikkert over bækkenet eller låret. Få din rehabiliteringsspecialist til at demonstrere korrekt brug og justering.

Et løst bælte kan føre til glidning og kvælningsfare. Et løsnet bælte kan forårsage fald eller glidning. Hvis brugeren ikke selv kan løsne bæltet, kan dette være farligt, især i nødsituationer.

Ved begrænsede fysiske eller kognitive evner skal en ledsager altid være til stede for at betjene bæltet sikkert. Hvis der opstår en alvorlig hændelse som følge af brugen af dette produkt, skal det rapporteres til producenten (The Hague Care Development BV) og den lokale kompetente myndighed.

FOREBYG SKADER OG HUDSKADER. Dette produkt kan ændre siddeholdningen. Regelmæssig trykaflastning og inspektion af trykpunkter er afgørende, især i kontaktområder såsom sacrum, ben og sædekugler. Hvis rødme eller hudirritation opstår, skal brugen stoppes, og en læge eller kørestolsspecialist skal konsulteres.

PERIODISK INSPEKTION: For at sikre brugerens sikkerhed skal dette produkt regelmæssigt kontrolleres for funktionalitet og slitage. Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis der er synlig slitage på spænder, monteringspunkter, stropper, polstring eller syninger. I sådanne tilfælde skal du kontakte din Posigo®-leverandør for professionel reparation eller udskiftning.

Produktet må aldrig justeres eller repareres af ukvalificeret personale. Brugerens sundhed og sikkerhed afhænger af dette!

Garanti:

Dette produkt leveres med en begrænset livstidsgaranti mod materialefejl og fabriktionsfejl under normal brug. Kontakt din leverandør eller The Hague Care Development BV for garantikrav.

Vedligeholdelse:


Håndvask eller maskinvask ved maksimalt 30°C med et mildt vaskemiddel, hvis nødvendigt. Må ikke stryges, centrifugeres eller tørretumbles.

Affald/Bortskaffelse:

Fremstillet af materialer, der kan bortskaffes sikkert ved slutningen af deres anvendelsestid uden særlige forholdsregler.



Emballeringsindhold:

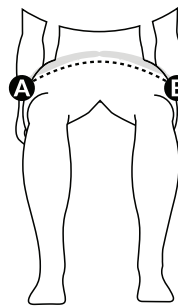

1x modulært bækkenpositioneringsbælte


Bredde A-B:	str:	SKU:	UDI-DI:
33-43 cm	XS	P01XS	8720769180011
35-47 cm	S	P01S	8720769180028
45-65 cm	M	P01M	8720769180035
55-80 cm	L	P01L	8720769180042
66-100 cm	XL	P01XL	8720769180059



2x 4-punkts stropper
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110




2x TriGlide 20/38mm
str: XS 3GL20 8720769180493
S-XL 3GL38 8720769180479

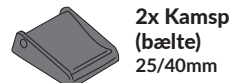

2x Kamspænde (bælte) 25/40mm
str: XS KG25 8720769180134
S-XL KG40 8720769180127



2x Kamspænde (4-punkts stropper) 25/40mm
SKU: KG20 8720769180547
UDI-DI:

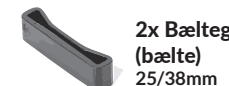

2x Bælteguide (bælte) 25/38mm
str: XS BG25 8720769180523
S-XL BG38 8720769180509




2x Bælteguide (4-punkts stropper) 20mm
SKU: BG20 8720769180516
UDI-DI:


Installation på kørestol/sædesystem:

Bestem den optimale position og vinkel (A, B) baseret på kliniske mål og brugerens positioneringsbehov.

For håndtering af en tendens til bækkenets bagudklipping, er den anbefalede bæltepositionering:

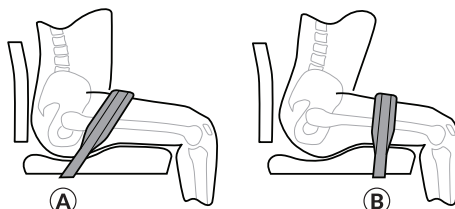


Fastgør kamspænderne på den ønskede position på kørestolen, i henhold til kørestolens producentens instruktioner.

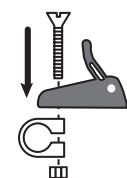

Montering af kamspænde på rundrørsklemme (valgfrit tilgængelig).


Hvis kørestolen ikke er egnet til rørklemmer eller kamspænder, skal de medfølgende TriGlides bruges. Træk stropperne gennem TriGliden i rækkefølge 1,2,3,4 og rundt om stellet, og stram sikkert.

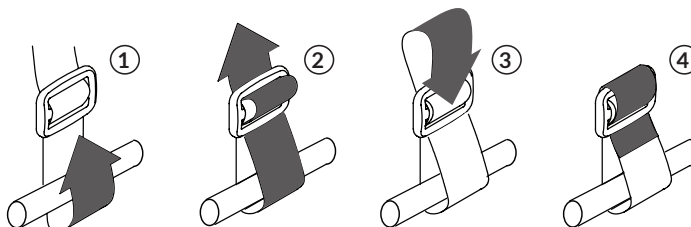


Tjek regelmæssigt stropperne og TriGlides for stramning.

4-punkts konfiguration (valgfrit):

Hægte T-forbindelsen af 4-punkts stroppen i løkken i hulrummet af polstringen på den ønskede position (1, 2) og sørg for, at den er sikkert fastgjort. Bemærk: XS-bæltet har kun 1 hulrum.

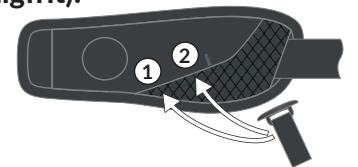


Fastgør enderne af 4-punkts stropperne til kørestolen med de medfølgende 20 mm kamspænder. Placer kamspændet (C, D, E) i samråd med terapeuten.

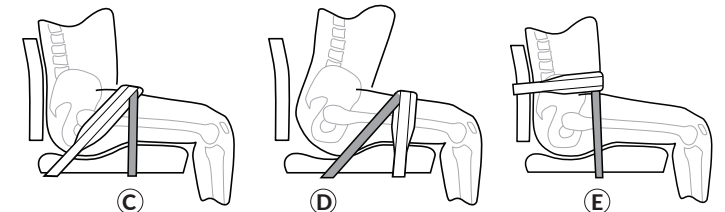


For håndtering af en tendens til bækkenets foroverklipping, anbefales 4-punkts konfigurationen med bæltepositionering E.

Første brug/justering:

Rotér justeringsknapperne helt mod uret, indtil de klikker, og forlæng stropperne til deres maksimale længde.

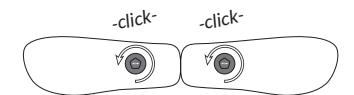


Centrér bæltet på brugeren (hvis til størrelsesmarkeringerne på stropperne).

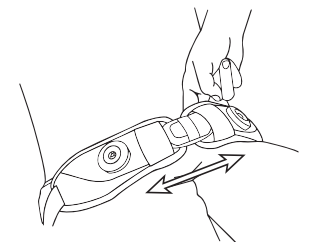

Træk stropperne ender gennem kamspænderne, der er fastgjort til kørestolens stel, indtil bæltet sidder tæt på brugeren. Luk kamspænderne.

Sørg for, at spændingen er passende ved at indsætte en finger mellem polstringen og brugeren.

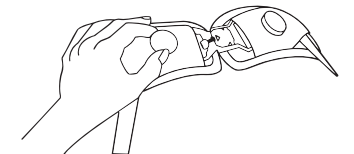


Under brug kan pasformen justeres ved hjælp af justeringsknapperne. Drej med uret for at øge spændingen, mens drejning mod uret giver slack. Før du åbner bæltet, drej knapperne mod uret for at frigive spændingen.

Udskiftning af spænder:

Valgfrit tilgængelige spænder:

Trykspænde XS: CBUT25 S-XL: CBUT40	Pindspænde XS: CPIN25 S-XL: CPIN40	FidLock spænde XS: CFID25 S-XL: CFID40	Sideudløser-spænde XS: CSID25 S-XL: CSID40

Træk polstringen over justeringsknappen, så velcrostroppen bliver synlig. Skil velcroen og fjern spænderne. Fastgør det nye spænde i omvendt rækkefølge. Bemærk: Nylonstroppen er markeret med en skala 1, 2, 3, som bestemmer længden af løkken. Position 3 svarer til tryk- og pindspænde, position 2 til FidLock spænde, og position 1 til sideudløser-spænde. Udskift kun spænderne med originale spænder leveret af Posigo®.

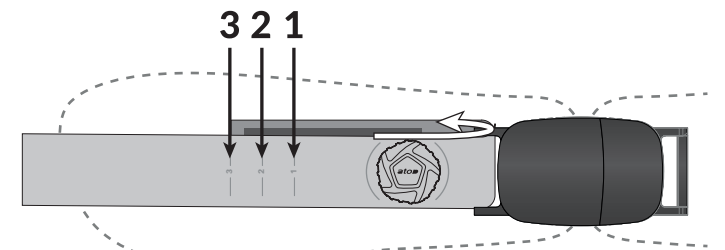

Bagsiden af nylonstroppen er udstyret med velcro.



posigo.nl/manuals



The Hague Care Development BV.
Jachtwagen 29, 3897AM Zeewolde NL
T: +31 (0)36 53 53 580
info@posigo.nl / www.posigo.nl

