


ASK 1

(HMI-nr. 13309)



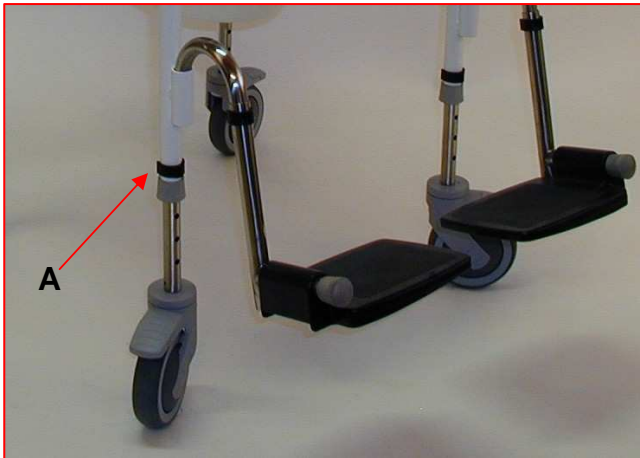

Hvordan indstilles sædehøjden:

1. Træk låseclipsen (A) ud – ét ben ad gangen.
2. Træk/ skub benet ud/ ind i den ønskede længde.
3. Sæt låseclipsen i igen.

Vær omhyggelig med, at den er skubbet ordentligt på plads.



Ved sidelæns forflytning:

1. Slå stolens armlæn (B) for at lette forflytningen.
2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen.
3. Til urolige brugere anbefales en armlænslås, så armlænet ikke utilsigtet slås op igen.



Ved ind- og udstigning:

1. Sørg altid for, at hjulene ikke står "inde under stolen": Bremsepedalerne (C) skal ALTID "pege" udad.
2. Hjulene skal ALTID låses, inden brugeren tager plads på stolen.

(Som standard leveres stolen med fire 125 mm bremsehjul.)

Ved toiletbrug:

- A. Stolen placeres hen over toiletkummen, og hjulene låses.
Afhængigt af den indstillede sædehøjde kan stolen efter skøn forsynes med en stænkskærm.

eller

- B. Hjulene låses, og en spand eller et bækken placeres i bækkengliderne under sædet. (Bækkengliderne er indstillelige i bredden og kan tilpasses stort enhver type bækken eller spand.).

Ved badebrug:

1. Stolen placeres, hvor brusebadningen/ afvaskningen skal finde sted, og hjulene låses.
2. Ryglænsbøjlen (og med denne armlænene) kan evt. tages helt af for at lette afvaskningen:



- a. Fjern de to låseclips (D) bagpå stolen (i sædehøjde), som holder ryglænsbøjlen på plads.
- b. Efter vask genplaceres ryglænsbøjlen, og de to låseclips isættes igen.
- c. Stolen kan forsynes med et polstret oversæde uden toiletåbning, som lægges oven på stolens toiletsæde. Herved sidder brugeren måske mere behageligt og under alle omstændigheder mere oprejst.

SE BRUGSVEJLEDNING FOR FODHVILERE PÅ SIDSTE SIDE.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

HJULENE efterses med jævne mellemrum – **efterspændes** eventuelt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at beholde den maksimale køreevne.


EXTRA TILBEHØR:

ALBUESTOP til montering på armlæn med skålformet PUR-pude
 AMPUTATIONSSTØTTE med polstret pude, h/v
 ARMLÆN med skålformet (hemi-) armpude i PUR, h/v
 ARMLÆN, som øger stolens indvendige bredde med 2.5 cm, h/v
 ARMLÆN, som øger stolens indvendige bredde med 5 cm, h/v
 ARMLÆN, som er sænket (reducerer sæde-armlæn afstanden), h/v
 ARMLÆNSLÅS (mod utilsigtet opklapning af armlæn)
 BORD, nedfældeligt, indstilleligt (incl. armlæn med beslag)
 ELEVERBAR BENHVILER m/ PUR-støtte, højre ben
 ELEVERBAR BENHVILER m/ PUR-støtte, venstre ben
 FODHVILERE, længdeindst. svingbare, aftagelige
 FODPLADE, polstret, udelt
 HÆL-/ LÆGSTØTTE til fodhvilere
 OVERSÆDE, polstret, uden rørclips
 OVERSÆDE, polstret, med fire rørclips
 SIDESTØTTE, polstret pude, indstillelig
 SIDESTØTTE, PUR-pude, indstillelig
 SIKKERHEDSBØJLE, indstillelig i tre positioner
 SPAND
 SPANDELÅG (til model 01111-SP)
 SÆDEPUDE uden toiletåbning
 SÆDEPUDE med toiletåbning

MODEL 01041-AS
 MODEL 13309-AKH/ -AKV
 MODEL 01041-HH/ -HV
 MODEL 01041-XBH/ -XBV
 MODEL 01041-XBH5/ -XBV5
 MODEL 01041-FH/ -FV
 MODEL 01043
 MODEL ERGO-B
 MODEL 01056-H
 MODEL 01056-V
 MODEL 01055
 MODEL 01055-PL
 MODEL 01052
 MODEL 01042
 MODEL 01042-ET2
 MODEL ERGO-SI
 MODEL ERGO-SIP
 MODEL 13309-SB
 MODEL 01111-SP
 MODEL 01111-SPL
 MODEL 12370
 MODEL 01858

ANDET ØNSKET TILBEHØR FREMSTILLES EFTER OPGAVE.

FODHVILERE MODEL 01055

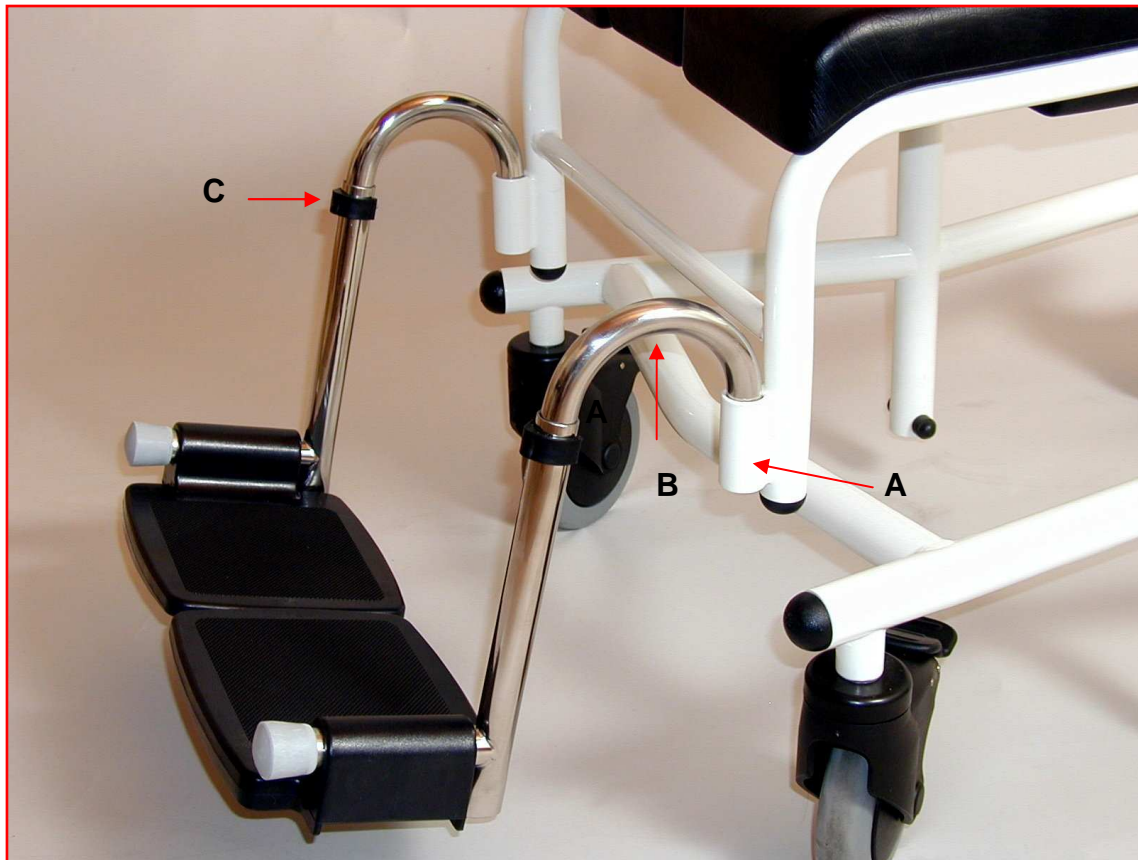

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere til højre henholdsvis venstre fod.

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I beslaget er indsvejet en tværstang, som passer til fodhvilerens slidser og derved låser for sidedrej. *Disse slidser kan i øvrigt have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, FØR de monteres på stolen.*
2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren (*nærmest i krumningen (B)*) cirka én cm lodret: Herved glider de omtalte slidser fri af tværstangen, og fodhvileren kan nu drejes (eller tages helt af).
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip (C), trække (eller skubbe) fodhvilerens inderrør til den ønskede længde og derefter sætte dens låseclip på plads igen.
4. Fodhvilerne kan også forsynes med et indstilleligt lægbånd MODEL **01052**. Det er fremstillet i skai med velcrolukning til at stramme eller slække.

OBS ! Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at ASK 1, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182

Filnavn: ASK 1 brugsanvisning
Bibliotek: C:\Documents and Settings\lars\Skrivebord\BRUGSANVISNINGER
ASK
Skabelon: C:\Documents and Settings\lars\Application
Data\Microsoft\Skabeloner\Normal.dot
Titel: BRUGSANVISNING fodhvilere model 01055
Emne:
Forfatter: lars
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 2-06-2010 08:32:00
Versionsnummer: 6
Senest gemt: 2-06-2010 09:23:00
Senest gemt af: lars
Redigeringstid: 11 minutter
Senest udskrevet: 2-06-2010 09:31:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 5
Ord: 824 (ca.)
Tegn: 5.032 (ca.)