

Eureka-Varitex strømpepåtager

ONEMED

- Brugsanvisning



Påtagning:

- 1) Fold Eureka dobbelt og stik plastikpinden igennem hullerne
- 2) Stop pinden godt ind i lommen nederst på strømpepåtageren - Eureka er nu klar til brug
- 3) Skub Eureka over foden - med den side hvor pinden sidder, under fodsålen - til den sidder fast på vristen (træk ikke for hårdt)
- 4) Træk strømpen på som en støvle
- 5) Sørg for, at hælen sidder rigtigt og fordel strømpen over hele fodens længde
- 6) Træk pinden fra bagsiden af benet ud af Eureka
- 7) Træk i "lappen" på forsiden af Eureka
- 8) Træk Eureka ud af strømpen
- 9) Træk strømpen højere op ad benet
- 10) Glat evt. strømpefoldere ud

Rengøring:

Eureka kan aftørres med en fugtig klud



OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
DK-8200 Aarhus N
CVR/VAT 19846679

Tel. (+45) 86 109 109
Fax (+45) 86 109 209
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk