

Brugervejledning

Gips & Bandagebeskytteren er designet og produceret til mange måneders stabilt og sikkert brug, så vi anbefaler, at du følger anvisningen herunder:

- 1 **Badebeskytteren** skal trækkes lidt tilbage, efter at den er kommet op over gips, bandage, sår eller lignende, så vandet nemt løber ned og væk fra det indbundne.
- 2 **Badebeskytteren** kan vaskes i vaskemaskine ved 30 grader og bør derefter hænges til tørre.
- 3 Når **Badebeskytteren** bruges ud over en protese, tilråder hospitalspersonalet, at man også husker at vaske den beskadigede del inde i protesen .

Badebeskytteren er beregnet til brug under brusebadet, men mange bruger den også når man karbader eller hvis man bader ved strand eller svømmebassin. Udvis lidt forsigtighed ved de sidstnævnte aktiviteter.

Pas på når du bevæger dig på det våde badeværelsesgulv - vinylposen bliver glat når den er våd.

Badebeskytteren indeholder ikke latex.



Smifa Health Care

Tlf.: 56 14 56 50

Email: smifa@smifa.dk

Web: www.smifa.dk

Solrød Strandvej 123A

2680 Solrød Strand

