



COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL 08.2004 COSMOGRAPHIC



TEMPUR® - ET ENESTÅENDE MATERIALE

TEMPUR er et temperaturfølsomt viskoelastisk materiale med en struktur af åbne celler. Til sammen skaber disse egenskaber et unikt, trykafastende materiale med optimal komfort.

Materialets viskoelastiske egenskaber betyder, at TEMPUR efter en bestemt tidsperiode genvinder den oprindelige form, når det har været trykket sammen. Denne tidsperiode afhænger af stuetemperaturen. TEMPUR reagerer på varmepåvirkningen fra kroppen og tilpasser sig derfor kroppen selv under kølige forhold.

TEMPUR har en høj vægtfylde [85 kg/m^3], der sikrer maksimal formbestandighed, komfort og holdbarhed.



TRYKAFLASTENDE

De steder, kroppen har kontakt med TEMPUR Materialet, reagerer det ved at fordele trykket jævnt over hele det berørte område. TEMPURs trykafastende egenskaber nedsætter risikoen for udvikling af tryksår.

ANVENDELSE AF TEMPUR

På grund af TEMPUR Materialets enestående trykafastende egenskaber kan det tage kroppen et stykke tid at vænne sig til TEMPUR Produktet.

Under brug åbnes madrassens celler helt, hvilket medfører, at TEMPUR Materialet reagerer hurtigere. Det kan derfor føles, som om materialet bliver blødere. De trykafastende egenskaber ændres dog ikke, og komforten forbedres.

HYGIEJNE

TEMPUR Materialet fremstilles med en miljøvenlig silikonebaseret komponent, der beskytter mod dannelse af bakterier og svamp.

BRANDSIKKERHED

TEMPUR-MED Produkterne overholder direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr og opfylder de høje sikkerhedsstandarder, der er fastlagt af dette direktiv.

TEMPUR Produkterne overholder kravene til brandsikkerhed i EN 597-1 og EN 597-2.



CE-MÆRKNING

TEMPUR Produkter er CE-mærkede som medicinsk udstyr (klasse 1). Produktets egenskaber overholder kravene i direktiv 93/42/EØF.

BEHANDLING AF TEMPUR MATERIALET

TRANSPORT OG OPBEVARING

Følgende anvisninger gælder ved transport, flytning og opbevaring af TEMPUR Produkter:

- TEMPUR Kombimadrasser skal opbevares fladt.
- På grund af TEMPUR Materialets høje tæthed sammentrykkes madrassen eventuelt i størrelse under transport. Det er normalt, og den vil genvinde sin normale størrelse ved stuetemperatur, når den anbringes på sengebunden.
- TEMPUR Topmadrasser kan opbevares enten sammenrullede eller fladt.
- TEMPUR Puder bør opbevares i deres oprindelige form.

En generel regel i forbindelse med TEMPUR er, at materialet ikke må foldes og ikke tvinges ind i en bestemt form, da der er risiko for, at materialet rives itu.



RENGØRINGSVEJLEDNING

TEMPUR Materialet må ikke vaskes (gennemblødes), da det kan skade materialets egenskaber.

Sterilisering af TEMPUR Materiale ved hjælp af autoklave-
ring anbefales ikke.

ANVENDTE BETRÆK PÅ TEMPUR PRODUKTER

De specialfremstillede betræk, der bruges på TEMPUR Produkterne, forbedrer TEMPUR Materialets komfort og trykafastende egenskaber.

**VANDTÆTTE PU-BETRÆK (INKONTINENSBE-
TRÆK) ANVENDT SAMMEN MED TEMPUR-MED PRODUKT-
SORTIMENTET**

Betræk til standardprodukter i TEMPUR-MED sortimentet fremstilles af elastisk, åndbart PU-belagt polyester, der er vandtæt, hvilket lader TEMPUR Materialet ånde.

Ved daglig rengøring anbefaler vi, at PU-betrækket tørres over med mildt sæbevand.

PU-betrækket kan også rengøres ved hjælp af almindelige desinfektionsmidler, der bruges på hospitaler, såsom: 70% ethanol, 37,5% blegemiddel og denatureret alkohol (90% alkohol + 2% ether).

En række andre rengøringsprodukter, der sælges under følgende navne, kan også anvendes: H.A.C[®], Reocid[®], Dettol[®], Lyorthol[®], Indur Des[®], Presept[®], Hycolin[®] og Clearsol[®].

PU-betrækket kan maskinvaskes ved 95° C og tørretumbles ved lav temperatur. Det skal vaskes med vrangen udad, og lynlåsen skal være åben.

Alle PU-betræk, der bruges til TEMPUR-MED Produkter, overholder kravene om brandsikkerhed, der er beskrevet i BS7175 afs. 3.

VELOURBETRÆK

TEMPUR-MED Produkterne fås også med velourbetræk. Velourbetrækkene er fremstillet af 75% bomuld og 25% polyester. De kan nemt tages af og maskinvaskes i henhold til vaskevejledningen på mærkatet. Vask med vrangen udad, og lynlåsen skal være lukket.

JERSEYBETRÆK

TEMPUR MED Kørestolspuder, kilepuder og sædepuder kan også leveres med slidstærke jerseybetræk.

Følg rengøringsvejledningen på mærkatet, der er syet ind i betrækket. Vask med vrangen udad, og lynlåsen skal være lukket.

GARANTI

Alle TEMPUR-MED Produkter leveres med følgende garanti:

- 3 år på puder
- 3 år på PU-betræk
- 7 år på madrasser (pro rata*)

Garantien omfatter fysiske defekter eller ændringer, der forårsager synlig, permanent deformation (over 2 cm) i TEMPUR Materialet. Garantien omfatter ikke almindelige forandringer i hårdhed og egenskaber, som ikke påvirker produktets trykafastende egenskaber. Garantien dækker kun, hvis TEMPUR Produktet bruges og håndteres som beskrevet i disse anvisninger.

Garantien dækker ikke skader på TEMPUR Materialet forårsaget af lækage i betræk, der er over tre år gamle, eller beskadigede betræk.

***Pro rata**

- 0-3 år: Fuld garanti
- 3-4 år: Garantien reduceres med 10%
- 4-5 år: Garantien reduceres med 30%
- 5-6 år: Garantien reduceres med 60%
- 6-7 år: Garantien reduceres med 80%
- Over 7 år: Ingen garanti