

# DARO

by able 

## Brugervejledning Omega regnslag inkl. pose

Let og åndbart regnslag til elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte. Fås i børne- og voksenstørrelser. Fremstillet i et blødt, vind- og vandtæt kvalitetsmateriale med tapede sømme og mange funktionelle detaljer.



Vandtæt



Vindtæt



Åndbar



Tapede sømme



Vaskbar



Varenr. (voksne): 4-07X

Varenr. (børn): 4-075XX

**Kære kunde,**

**Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.**

**Læs denne brugervejledning, inden du bruger regnslaget.**



### Sikkerhedsregler

- ⚠ Brug kun et regnslag, der passer til brugerens størrelse.
- ⚠ Brug kun regnslaget sammen med en elektrisk kørestol, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte.
- ⚠ Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
- ⚠ Immobile eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når regnslaget er på.
- ⚠ Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
- ⚠ Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af regnslaget, således brugeren ikke glider ned.

### Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

### Regnslagets funktioner

- Vandtæt op til 10.000 mm.
- Åndbarhed på 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Tapede sømme.
- Justerbar hætte med snøre.
- Skyggekant på hætte, der beskytter ansigtet mod regn, slud og sne.
- Vandafvisende lynlås ved halsåbning med et vandtæt underfald. Vendbar skyder, så bruger kan åbne/lukke lynlåsen fra indersiden af regnslaget.
- Strop i lynlåshænger for at brugeren nemmere kan få fat i den.
- Rummelig facon som dækker hele brugerens krop og går ned om stole-ryggens bagside.
- Ærmer med elastik ved håndleddene.
- Indsyet elastik rundt i hele kanten, så regnslaget slutter tæt om kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser foran, bagpå, på ærmer og som piping på hættens skyggekant for bedre synlighed i mørke.
- Pose til opbevaring.

## Sådan bruges regnslaget

**Bemærk:** Dette regnslag er kun beregnet til elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte.

1. Lyn lynlåsen ned og tag regnslaget over hovedet. Det skal dække hele brugerens krop.
2. Træk regnslaget ud over ryggen på kørestolen, samt ned om brugerens fødder. Dette således, at regnslaget placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.
3. Kontroller at regnslaget slutter til og **ikke** går ind i hjulene.

**OBS!** Regnslaget skal være helt tørt, inden det pakkes ned i den medfølgende pose.



Regnslaget skal placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.

## Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning, vaskemiddel med blegestoffer eller vaskemiddel i pulverform.

**TIP!** Den mest skånsomme måde at vaske et DARO-regnslag på er, at skylle synligt snavs af under rindende vand. Dermed bevarer regnslaget sine egenskaber længst muligt. Brug ikke børste eller klud ved synligt sand, da det vil ødelægge den vandtætte belægning. Lad regnslaget lufttørre.

## Vask i maskine

1. Skyl løst mudder og snavs af regnslaget under rindende vand. Lyn lynlåsen op og læg regnslaget i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde flydende vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask regnslaget ved **max. 40°C** og undgå centrifugering.
4. Regnslaget må **IKKE** tørretumbles, men skal dryp-/lufttørre på eks. en bøjle.



Ingen blegemiddel



Skånevask max. 40°C



Ingen tørretumbling



Dryptørring anbefales



Rens er muligt

**OBS!** For hver maskinvask nedbrydes en lille del af den vandtætte belægning, hvilket vil forkorte regnslagets levetid.

## Vedligehold

- Tjek jævnlgt regnslaget for skader.
- Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.
- Sørg for at regnslaget er helt tørt, inden det pakkes ned.

## Materiale

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

## Teknisk info

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Kvadratmetervægt: 135g/m<sup>2</sup>.

# DARO

by **able** 

able nordic a/s  
DARO  
Skavholmvej 8C, 1.  
DK-8520 Lystrup  
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22  
daro@ablenordic.dk  
www.daro.dk

## DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på [www.daro.dk](http://www.daro.dk).

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke. 