

Hearit MT



Brugervejledning

Find nærmeste forhandler på www.phonicear.dk

Indholdsfortegnelse

Hearit	4
Hearit indstillinger	5
Hearit tilbehør	6
Hearit instruktioner	7
Professionel lydindstilling	10
Rengøring af Hearit	11
Fejlsøgning	11-12
Garanti	13
Test og godkendelser	15

I udviklingen af Hearit produkterne der er lagt vægt på høj forstærkning samt et brugervenligt og robust design. Den lyd kvalitet og pålidelighed, som Hearit er kendt for, går igen i alle versioner. De forskellige versioner kan bruges både med eller uden høreapparater. De er dermed ideelle til mennesker, som kun har brug for forstærkning i bestemte situationer, til dem, som ikke kan bære eller bruge standard høreapparater og til dem, som får lægebehandling. Hearit sortimentet er udviklet til brug ved samtaler i støjfulde omgivelser, til lytning til fjernsynet og til information i offentlige rum. I alle disse situationer kan enten mikrofonen eller telespolefunktionen (hvis der er teleslyngesystem i lokalet) bruges til at høre samtaler eller informationer.

Hovedprodukter i sortimentet:

- Hearit M: Mikrofon
- Hearit MT: Mikrofon og telespole
- Hearit T: Telespole
- Hearit SE: Special undervisning

Hearit indstillinger

1. tænd/sluk og volumenkontrol

Tænd og sluk af Hearit samt justering af volumen

2. indikatorlampe

Lyser, når Hearit er tændt. Tryk for at vælge mellem mikrofon og telespole position (kun MT).

3. mikrofon

Opfanger den lyd, du ønsker at høre

4. AUX stik til tilbehør

Til tilslutning af forskelligt tilbehør til Hearit. (Tilbehøret kan købes separat)

5. batterirum

6. knopper til bæresnor


Til fastgørelse af bæresnor

7. hovedtelefonstik

Til tilslutning af hovedtelefoner

8. lydindstillinger (kun for professionelle brugere)

- Basregulering
- Gainregulering
- Kun telespole
- Kun mikrofon

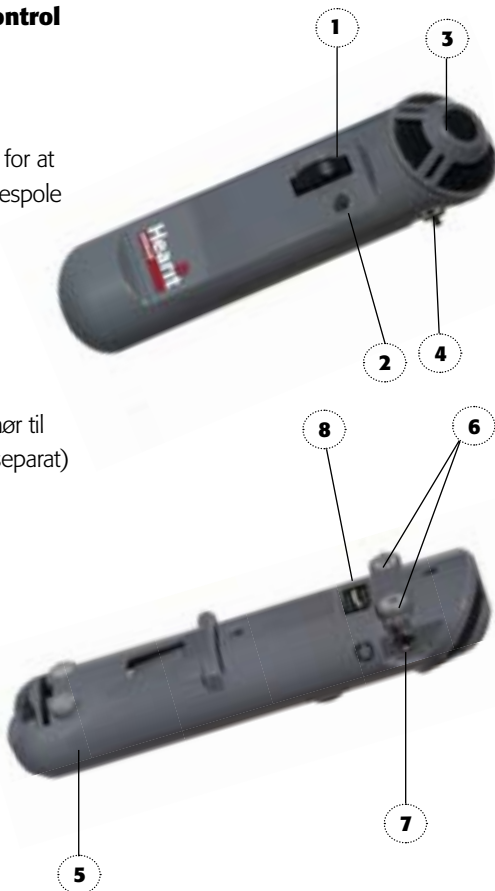

Hearit tilbehør (leveres sammen med systemet)

10. standard hovedtelefoner

(Med forbehold for model-
ændringer)

10



11




11. bæresnor

12. to batterier

(LR6, AA, E91, Alkaline penlight)

12

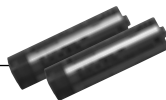

13




13. taske

(Med forbehold for model-
ændringer)


Hearit tilbehør (ikke inkluderet - sælges separat)




890-88-604-00
halsslynge

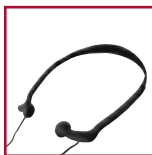

890-88-602-00
vertikal hovedtelefon

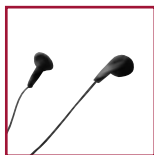

890-88-601-00
øretelefoner

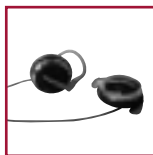

890-88-616-00
øretelefoner på øret



890-15-141-00
konference mikrofon



890-88-610-00 ekstra
puder til hovedtelefoner



392-88-103-00
scart kabel tilslutning
til TV (8 m)



890-88-620-00
TV-box start pakke

Hearit instruktioner

1. isætning af batterier



Åbn batteridækslet, og sæt batterier i.

Sørg for, at batterierne vender rigtigt som vist på diagrammet i batterirummet. Luk dækslet, og kontroller, at indikatorlampen lyser, når der tændes for Hearit.

2. tilslutning af hovedtelefoner



Tilslut hovedtelefonerne i hovedtelefonstikket.

Bemærk: tænd ikke for Hearit før hovedtelefonerne er tilsluttet.

3. placering af hovedtelefoner



Tag hovedtelefonerne på, og justér bøjlen, så puderne placeres over ørene.

For tilslutning til høreapparater se [8](#).

Hearit instruktioner

4. tænd og justér volumen



Tænd for Hearit på hjulet. Indikatorlampen lyser, når Hearit er tændt. Når der slukkes for Hearit, skal knappen drejes helt om til nulstilling, så indikatorlampen går ud.

Justér volumen med volumenkontrollen.

BEMÆRK: Tænd ikke for Hearit før hovedtelefonerne er tilsluttet.



Advarsel



Hvis Hearit anvendes med for høj lydstyrke, kan du beskadige din hørelse. Sørg derfor altid for at indstille lydstyrken i forhold til din hørelse.

5. holdes i hånden eller stilles på et bord



Ret mikrofonen mod personen, du taler med, og justér volumen til et behageligt niveau.

Vælg mellem at holde Hearit i hånden eller at placere den på et bord.

Når flere mennesker taler, hører du bedre, hvis mikrofonen flyttes tættere på den person, du ønsker at lytte til.

Hearit instruktioner


6. brug af bæresnoren



Bæresnoren gør det muligt at hænge Hearit rundt om halsen.


I bilen kan du hænge Hearit rundt om halsen på personen, du ønsker at tale med.

7. lytning til et teleslyngesystem

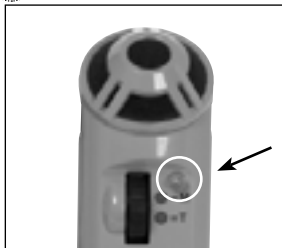

Tænd for Hearit på hjulet. Tryk på indikatorlampen for at aktivere telespolen. Indikatorlampen lyser grønt, når telespolen er aktiveret, og mikrofonen er afbrudt. Prøv at dreje Hearit indtil det bedste signal modtages. Aktivér mikrofonen ved at trykke på indikatorlampen igen og dens farve skifter til rød. Kontrollér at Hearit er indstillet korrekt (pin 3 off og pin 4 on).

8. tilslutning til høreapparat med telespole

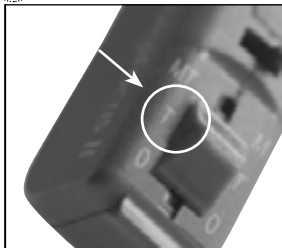

Ved tilslutning af Hearit til et høreapparat med "T"-indstilling anvendes en halsslynge i stedet for hovedtelefoner.

1. Anbring halsslyngen rundt om halsen.
2. Tilslut halsslyngen til Hearit hovedtelefonstikket.
3. Indstil høreapparatet på "T" (telespole).
Tænd for Hearit og justér volumen.

Professionel lydindstilling

9. lydindstilling



Gain - for mere gain, pin 1 sættes til on (skubbes op)

Basforstærkning - for mere bas, pin 2 sættes til on (skubbes op)

Kun telespole - for at bruge telespolen alene, pin 3 sættes til on (skubbes op)

Kun mikrofon - for at bruge telespolen alene, pin 3 og 4 sættes til off (skubbes ned)

Skift mellem mikrofon og telespole - pin 3 sættes til off (skubbes ned) og pin 4 sættes til on (skubbes op) for at skifte mellem mikrofon og telespole

Dip 3	Dip 4	
off	off	Kun mikrofon (M)
on	off/on	Kun telespole (T)
off	on	Valg mellem mikrofon og telespole (M/T)

Dip 1	Dip 2	
off	off	Gain fra Basforstærkning fra
on	off	Gain til Basforstærkning fra
on	on	Gain til Basforstærkning til
off	on	Gain fra Basforstærkning til

Udskiftning af batterier



Når indikatorlampen bliver svag, er det tid til at udskifte batterierne. Sørg for, at Hearit er slukket (volumenkontrollen skal stå på nul). Åbn batteridækslet, og tag de gamle batterier ud, og sæt nye batterier i. Sørg for, at de vender rigtigt som vist på diagrammet i batterirummet. Luk dækslet, og kontrollér, at indikatorlampen lyser, når der tændes for Hearit.

rengøring af Hearit

Hearit skal behandles med forsigtighed. Hearit rengøres med en klud eller svamp fugtet med opvaskemiddel eller et syntetisk rengøringsmiddel. Må ikke nedsænkes i vand. Om nødvendigt kan du fjerne puderne på hovedtelefonerne og vaske dem separat.

fejløgning

Hearit er tavs

- Kontrollér, om hovedtelefonerne er tilsluttet til det rigtige stik. Se ③
- Sørg for, at der er tændt for lyden. Se ④
- Kontrollér, at batterierne er korrekt isat. Se ①
- Måske er batterierne brugt op. Forsøg med nye batterier.

Hearit "hyler"

De fleste høreapparater er følsomme overfor tilbagekobling, hvis mikrofonen holdes for tæt på hovedtelefonerne. Øg afstanden eller sænk lydstyrken.

fejlsøgning

Andre forstyrrelser

Alt elektronisk udstyr og især lydforstærkere som f.eks. radioer, fjernsyn, båndoptagere, høreapparater osv. kan påvirkes af radiobølger og magnetfelter.

Hearit kan forstyrres af f.eks. mobiltelefoner (GSM-type og andre) brugt inden for 2-3 meters afstand fra forstærkeren. Forstyrrelsen optræder som en tone eller en summende lyd. Det er ikke skadeligt, men kan medføre en forringet lyd kvalitet. For at Hearit kan fungere optimalt bør den således ikke anvendes tæt på en digital mobiltelefon.

Hvis du stadig har problemer efter at have prøvet ovenstående, bedes du kontakte din lokale Phonic Ear forhandler/installatør (se information på bagsiden).

garanti

Phonic Ear yder en 5 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 5 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1 Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2 Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 30 dage fra faktureringsdatoen.
- 3 batterier.
- 4 Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5 Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- 6 Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information fås hos de lokale myndigheder.



test og godkendelser

Hearit er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med de relevante direktiver.

Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Denmark



info@phonicear.dk • www.phonicear.dk

Produceret af:  **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Danmark

Tlf: 3917 7101 • Fax: 3927 7900

E-mail: info@phonicear.dk

Din lokale forhandler:

