



SARA® STEDY STÅHJÆLPEMIDDEL

# Sikker og nem forflytning i hverdagen

Øger mobiliteten, støtten og værdigheden

# Sara<sup>®</sup> Stedy

Hjælp til at  
bevæge sig  
i hverdagen

Hos Arjo bestræber vi os på at forbedre hverdagen for de mennesker, der er ramt af nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer.

Et af vores primære mål er at være med til at forbedre de kliniske resultater ved at hjælpe plejemodtagere og borgere, uanset hvor de måtte blive plejet, ved at sørge for, at de kan bevæge sig sikkert og effektivt og således bidrage til øget livskvalitet og muligheder for restitution.

Vi er glade for at kunne tilbyde Sara Stedy Compact, som er en videreudvikling af Sara Stedy: et ståhjælpe middel for mindre plejemodtagere og borgere. Sara Stedy-serien hjælper plejemodtagere og borgere på tværs af demografi og kliniske behov og sikrer således, at en bred vifte af plejemodtagere og borgere nemt kan hjælpes op fra siddende til stående stilling forsvarligt og ergonomisk korrekt.



## Fleksibilitet uanset plejemodtagers og borgerens evner

Sara Stedy og Sara Stedy Compact er specifikt beregnet til plejemodtagere og borgere, som er ude af stand til at bevæge sig rundt uden hjælp, men som godt kan bidrage til bevægelserne eller udføre dele af bevægelserne selv. For denne type plejemodtagere og borgere er det vigtigt at stimulere dem til at bevæge sig for at forbedre deres restitution eller sikre deres funktionsniveau. Kontakt Arjo for yderligere information om Mobility Gallery™.

## Opfordring til at bevæge sig på et tidligt tidspunkt

Sara Stedy kan være med til at understøtte tiltag, der skal få plejemodtageren til at bevæge sig på et tidligt tidspunkt, ved at lægge op til, at de tager stadigt mere aktivt del i deres funktionelle rehabilitering.

## Med Sara Stedy behøves kun én hjælper


Med Sara Stedy behøves kun én person fra plejepersonalet til at udføre forflytning fra siddende til stående position af en lang række plejemodtagere alt efter den enkeltes størrelse og den kliniske vurdering.

## Forenkling af forflytninger i hverdagen

Sara Stedy og Sara Stedy Compact kræver ingen strømforsyning og er altid klar til brug. Udstyret er med til at forenkle forflytninger i dagligdagen og gøre plejemodtagerne mere mobile.



## HURTIG, NEM OG SIKKER FORFLYTNING I HVERDAGEN

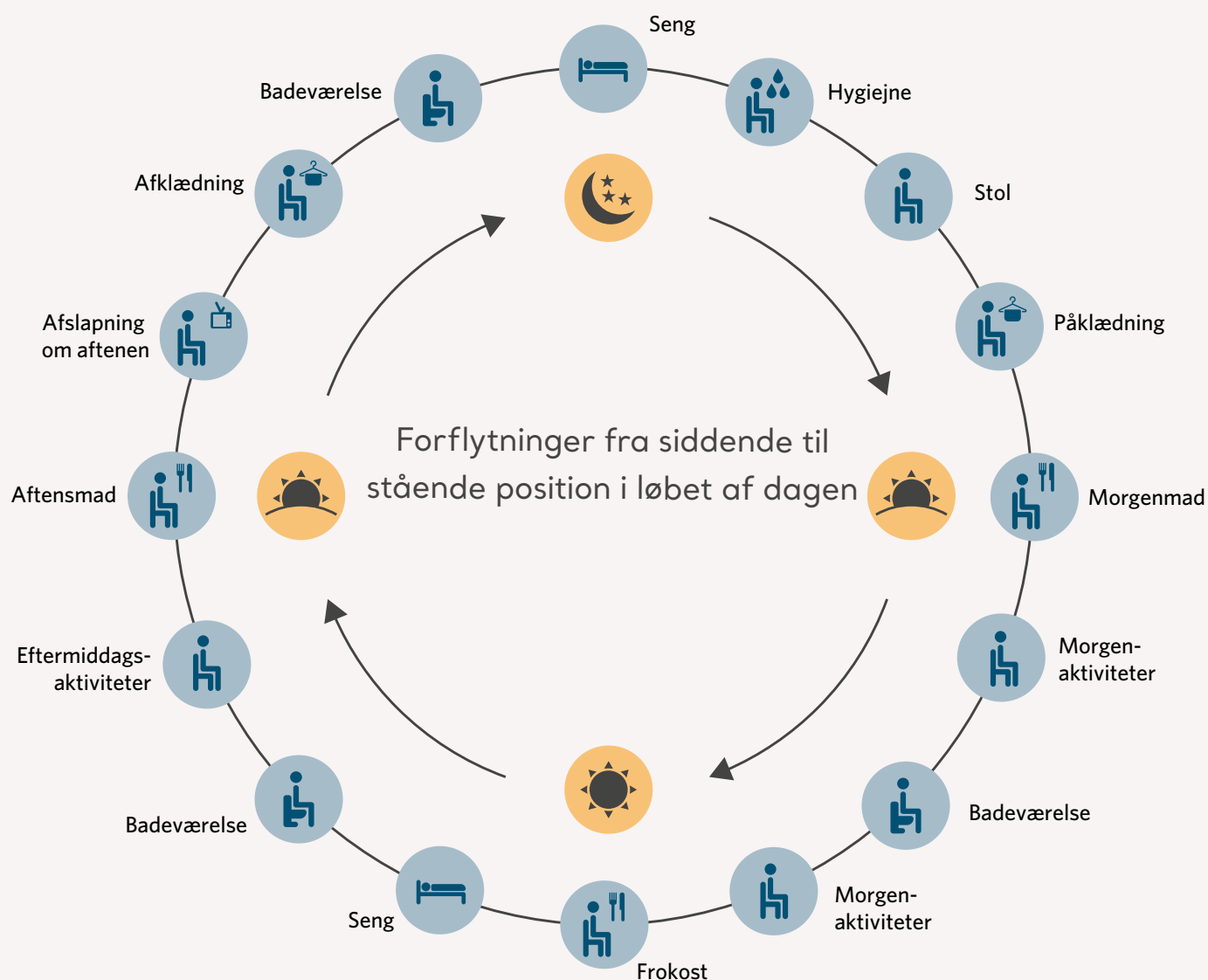

### GRUNDLÆGGENDE OPGAVE

At stå og rejse sig op er en grundlæggende forflytningsopgave, der ofte foretages mange gange om dagen. Evnen til at rejse sig fra siddende stilling er en af de mest grundlæggende bevægelser, man normalt bruger i løbet af dagen. At gå fra siddende til stående stilling er et af de vigtigste trin, når det drejer sig om mobilitet, idet det er den naturlige indledning til at gå. Hvis det udføres uden de rigtige hjælpemidler eller med en usikker manuel teknik, kan det blive en forflytning, hvor både plejemo dtager og plejepersonale kan risikere alvorlige skader.

Sara Stedy-serien sikrer, at forflytning fra siddende til stående position kan foretages sikkert, hurtigt og nemt

Både Sara Stedy og Sara Stedy Compact er nemme at bruge under hele forflytningen fra siddende til stående position og lægger op til, at plejemo dtagerne selv tager aktivt del i hverdagens forflytninger, også når der skal flyttes fra seng til stol, toilet eller vask.

# Tilpasning af forflytninger efter behov

Fås i to størrelser, hvilket giver fleksibilitet alt efter plejemodtagerens og borgerens højde

## SARA STEDY

Sara Stedy er beregnet til plejemodtagere med en højde på 149-193 cm og en vægt på op til 182 kg.

149-193 cm



## SARA STEDY COMPACT

Sara Stedy Compact er beregnet til mindre plejemodtagere med en højde på 138-172 cm og en vægt på op til 182 kg.

138-172 cm



### NYUDVIKLET DREJELIGT SÆDE TIL AT ÅBNE

Nemt at komme til for plejemodtageren, kræver minimal assistance fra plejepersonalet

### HÅNDTAG TIL PLEJEPERSONALE

Intuitivt og nemt at bruge til sikker forflytning af plejemodtageren

### TVÆRSTANG

Kan bruges af plejemodtageren til selv at trække sig op, frem for at skubbe

### FORBEDRET SÆDEUDFORMNING

Indbyggede håndtag gør det nemt for plejepersonalet at dreje hjælpemidlet

### KNÆSTØTTE

Giver ekstra stabilitet, når en plejemodtager ikke har fuld kontrol over sine benbevægelser

### SIKKER ARBEJDSBELASTNING

Solid ramme, der kan holde til op til 182 kg

### PEDALSTYREDE CHASSISBEN

Nem regulering og dermed optimal adgang under forflytning

### HJUL MED BREMSE

Fuld støtte, når hjælpemidlet står stille







Gør det muligt for én enkelt  
hjælper at forflytte pleje-  
modtagere sikkert og nemt



# Produktspecifikationer

## Pladskrav

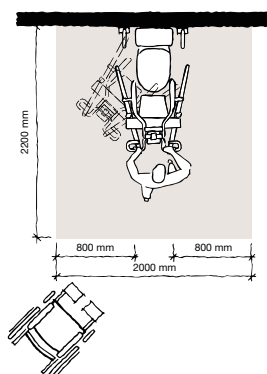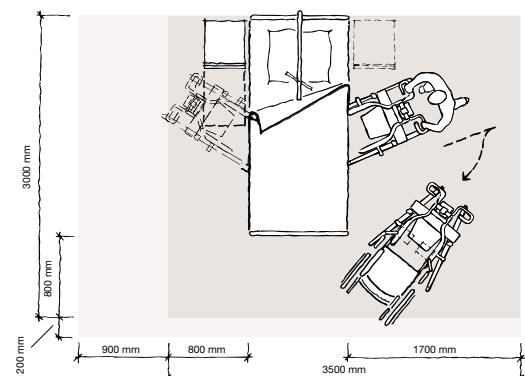

Den grå farve viser det arbejdsområde, der er nødvendigt, for at personalet kan benytte det mekaniske hjælpemiddel ergonomisk korrekt fra én side.

Den grå farve viser det udvidede arbejdsområde, der er nødvendigt for at kunne udføre aktiviteter fra begge sider, og som giver god adgang for både plejemodtageren, det mekaniske hjælpemiddel og plejepersonalet.

## Produktoplysninger: Sara Stedy og Sara Stedy Compact

Produktinformation	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Maks. sikker arbejdsbelastning	182 kg	182 kg
Vægt	29,4 kg	28,3 kg
Samlet længde	92 cm	89 cm
Samlet højde	105 cm	96 cm
Chassishøjde	10 cm	10 cm
Indvendig bredde med lukkede ben	36 cm	36 cm
Indvendig bredde med åbne ben	75 cm	75 cm
Udvendig bredde med åbne ben	88 cm	88 cm

## Godkendelser

Produktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante produktstandarder.

EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

## Tilbehør

Kompatible Arjo sejl og flites (engangssejl).

## Brug af Sara Stedy eller Sara Stedy Compact

Arjo Mobility Gallery giver en generel oversigt over de mobilitetskategorier, der kan have glæde af at bruge Sara Stedy eller Sara Stedy Compact. Valg af støttehjælpemiddel skal altid baseres på individuel klinisk vurdering.

## Mobility Gallery™

Velegnet til Barbara



**B Barbara,** der er gående med støtte og kan klare sig selv i nogen grad.

Du bedes henvende dig til Arjo for yderligere information om Mobility Gallery.

May 2018, Kun originaldele fra Arjo, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af Arjo. Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel. ® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernens selskaber.

© Arjo, 2018

Hos Arjo er vi engagerede i at forbedre hverdagen for de mennesker, der er ramt af nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer. Med produkter og løsninger, der sikrer ergonomisk håndtering af plejemodtagere, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og den effektive forebyggelse af tryksår og venøse tromboemboli, hjælper vi plejepersonale på tværs af plejemiljøer med fortsat at hæve standarden for sikker og værdi pleje. Everything we do, we do with people in mind.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500

Arjo Danmark A/S • Vassingerodvej 52 • DK-3540 LYNGE • Denmark • Tel:+45 4913 8486

www.arjo.com

**arjo**

01.KK.31.1.DA-INT.1.ARJO