

ENURESIS-ALARM VÆKKEREN

Ringeapparat til behandling
af ufrivillig vandladning



Sengebord-alarm med sensorlagen

- Alarm til personer med enuresis nocturna
- Strømforsyning via netadapter - ingen dyre batterier

Alarmen:

- Er nem og sikker at bruge
- Giver en effektiv behandling
- Har nem indstilling af ringelyden
- Kan tilsluttes ekstra alarmklokke, så forældre eller andre kan overvåge behandlingen



**Danish Care
Technology A/S**

www.danishcare.dk

ENURESIS-ALARM

Ringeapparat med sensorlagen

- Speciallagen med indsyede sensortråde registrerer væde.
- Alarmen vækker brugeren, når der tisses i sengen.
- Derved gøres brugeren opmærksom på den ufrivillige vandladning og behandlingen mod vådliggeri er igang.
- Vær tålmodig – behandlingen kan vare i op til 12 uger.
- Er problemet ikke afhjulpnet indenfor denne periode, anbefaler vi, at I kontakter lægen for undersøgelse.
- Alarmen er specielt velegnet til børn.
- Indstillingsmuligheder for fugtfølsomhed.
- Alarmen er et effektivt og sikkert hjælpemiddel til at detektere og alarmere ved ufrivillig vandladning.
- Der kan kobles en ekstra alarmklokke til, eksempelvis en trådløs klokke til anbringelse i forældresoveværelset. Til institutioner kan anvendes en personsøger eller en dialer. Rekvirer yderligere oplysninger om ekstraudstyr.

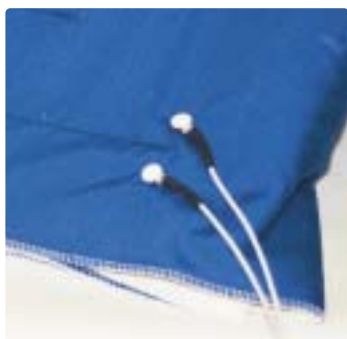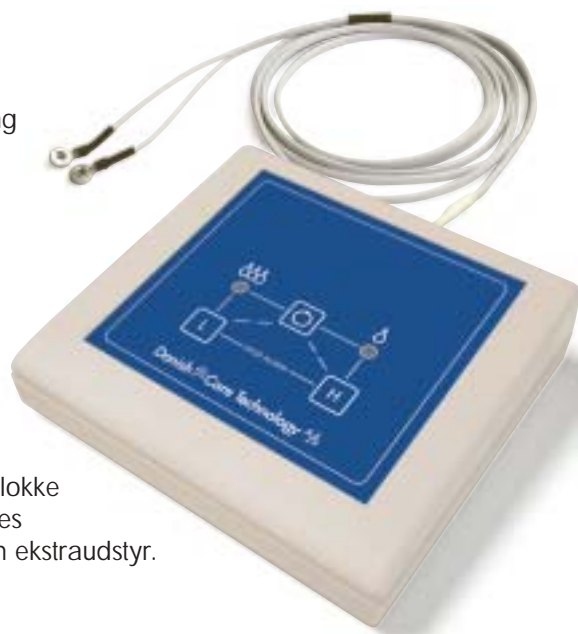

Sensorlagen - typer:

Flonellagen.

Et 100% bomuldslagen der måler 140 x 70 cm, hvoraf følerarealet udgør 55 x 55 cm. Det anbefales at have mindst 2 lagner at skifte mellem.

Batistlagen med tæt underside.

Lagnet er fremstillet af en bomuld/polyester blanding med et gummiindlæg, der forhindrer uringennemtrængning til madrassen. Mål 140 x 70 cm, hvoraf følerarealet udgør 70 x 70 cm. Lagerne kan vaskes i maskine. Flonellagen ved max. 40°C og batistlagen ved max. 60°C. Begge lagentyper må ikke centrifugeres eller tørretumbles.



Tilslutning:

Ledningen fra alarmen er udviklet med 2 trykknapper, som trykkes fast på lagnet.



Alarmen:

Følsomheden kan justeres til, hvor lidt fugt/urin der skal til for at aktivere alarmen. Denne justering sikrer, at sved ikke aktiverer alarmen unødvendigt. Styrken på alarmen justeres trinløst til ønsket lydniveau.

DATA:

Indstillingsmuligheder:

Volumen - lydstyrke, trinløst
Følsomhed - fugtmængde inden alarm udløses

Volumen:

Trinløs, nem lydstyrke-indstilling
Lydstyrke max 70 Db.

Følsomhed:

H = høj følsom
L = lav følsom
Indstilling vises ved lysindikator

Strømforsyning:

Net-adapter medfølger,
12 v max 50 mA

Lysindikator for funktion:

Grønt lys: apparatet driftklar
Rødt lys: apparatet i alarmtilstand

Udgang:

Modularstik for
ekstra alarmgiver

Produktion og salg:

**Danish Care
Technology A/s**

P.O. Box 207 · Industrivej 29
DK-4200 Slagelse · Danmark
Tlf.: +45 5850 0565
E-mail: info@danishcare.dk
Web: www.danishcare.dk