

Samling og regulering af Ergoret Arbejdsstole

Få reservedele og forlæng levetiden på dine Ergoret Arbejdsstole da sæder, hjul og gaspatroner kan udskiftes.



1. Udpakning

Ergoret Arbejdsstol pakkes ud af beskyttelsesposen, og delene kontrolleres for evt. fejl, mangler og skader.

2. Samling af din Ergoret Arbejdsstol

- Sæt sædet på gaspatronen.
- Sæt gaspatron med sæde på stellet med hjulene.



3. Aktiver let gaspatron via håndtag

Sæt dig let på sædet og afprøv gaspatronen, ved at hive det lille sorte håndtag op og ned, imens du sætter og løfter dig fra sædet.



4. Reguler let gaspatron

Hvis gaspatronen ikke følger med op, når håndtaget aktiveres, skal gaspatronen reguleres via lille skrue i toppen af gaspatronen.

- Skil sædet fra gaspatron igen ved at slå let mod sædets bund med en hammer, til sædet løsner sig.
- Tag en skruetrækker og drej den lille skrue i toppen af gaspatronen en 1/2 omgang.
- Saml stolen igen og afprøv om det gav resultat, hvis den ønskede virkning udebliver gentages processen.

NB: vær opmærksom på at en lille ændring af skruen er nok til at få den ønskede effekt. Drej henholdsvis venstre og højre om.



5. Reguler og udskift let hjul

Reguler og udskift let hjulene via tryk-system i stellet.

- Vend stolen og placer en skruetrækker mellem stel og toppen af hjulet.
- Vip og vrid let, så der kommer afstand mellem stel og hjul og tag så hjulet af med håndkraft.
- Tryk det nye hjul på plads med håndkraft.

