

Co-Piloten er udstyret med

- 8 gear nav med rullebremse (Shimano Nexus)
- Bafang hjælpemotor, der sikrer en effektiv naturlig kørsel.
- Føreren på bagerste plads har et godt optimalt udsyn af passageren på forreste plads.

Tekniske specifikationer	Co-Pilot 24		Co-Pilot 26	
	Front	Bag	Front	Bag
Total Længde i cm	247		258	
Bredde i cm	55	63	65	65
Total Vægt i kg	29		31	
Krank længde i cm	15	17	17	
Skridtlængde i cm	44-85	71-94	57-98	77-93
Sædehøjde i cm	64-77	81-99	81-102	90-106
Max belastning i kg	180		180	
Dækstørrelse ETRTO	47-507	47-507	47-559	47-559
Gear (Shimano Nexus)	8-S rulle bremse			



Co-Pilot 2 Tandemcykel

Leder du efter en tandem, hvor passageren får den bedste cykeloplevelse, og chaufføren har mest kontrol? Så skal du prøve Co-Pilot Tandem. Den ideale løsning, hvis du stadig ønsker at cykle, men ikke har muligheden for at gøre det uden hjælp. Co-Pilot giver begge cyklister den frihed og kontrol som de ønsker. Tandemmen kan også tilpasses specifikke præferencer og behov. Med denne tandem kan i cykle sammen uden problemer.

Denne cykel fås i to modeller:


- Barn/Voksen modellen med 24" hjul (Co-Pilot 24)
- Voksen/Voksen modellen med 26" hjul (Co-Pilot 26)

Co-Piloten fås med og uden hjælpemotor.



Ladning:

- Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt.
- Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 timer efter endt ladning.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang om måneden.
- Den bedste temperatur er ca. 20°.
- Laderen slår automatisk fra ved 0°.

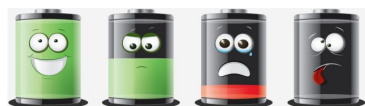

Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes:

- Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:
- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrens til rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller finish.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden.
- Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasiger sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen.
- Tjek altid om der er luft nok i dækket før du kører en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk evne svag og bruge mere strøm end nødvendigt.

Bemærk:

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er godkendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS

Garantien dækker ikke almene sliddele.

Garantien dækker ikke hvis det første service efter 6 mdr. ikke overholdes. Det er dit ansvar at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS, når det er tid til service.

Du har også mulighed for at lave en service aftale med os, også kontakter vi dig når det er ved at være tid..

Prisen for et almindeligt service, uden reparationer, er typisk 1200,- + moms.

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

- 1 Op i hjælpeniveau
- 2 System tænd/sluk / MODE
- 3 Ned i hjælpeniveau
- 4 Batteri kapacitet
- 5 Hastighed km/t
- 6 Dagle kilometers (TRIP) - Total kilometers (ODO) - Højeste hastighed (MAX) - gennemsnitlig hastighed (AVG) - Rækkevidde (RANGE) - Energiforbrug (CAL(kun med momentsensor monteret)) - Rejse tid (TIME) - WATT ydelse (POWER)
- 7 Hjælpe niveau / gå assistance

