



Hjælpemotor med betjeningsstyr

Alber **viamobil eco** giver ikke kun hjælp til at køre stolen fremad, men hjælper også til at bremse stolen ned ad bakke. **viamobil eco** er en hjælpemotor, der er let at betjene, og hvor betjeningsstyret enkelt kan indstilles til en korrekt arbejdsstilling. Med **viamobil eco** monteret klares bakker og forhindringer med lethed og uden besvær for hjælperen. Med **viamobil eco** bliver turene i indkøbscenteret og i byen en fornøjelse. **viamobil eco** kan afmonteres og transporteres hurtig og let, og passer i bagagerummet på enhver personbil.





Let at betjene

viamobil er let at overskue, betjene og styre. **viamobil eco** er forsynet med en kontrolenhed, hvorfra maks. hastighed, aktuel hastighed og kørselsretning bestemmes.

Når først maks. hastigheden er indstillet, kontrolleres **viamobil eco** let med kun en finger, hvad angår aktuel hastighed og kørselsretning.

viamobil eco betjeningsstyr er designet så det kan indstilles til en korrekt arbejdsstilling, så køreture kan klares let og ubesværet for hjælperen.

Køreegenskaber

viamobil eco monteres bag på kørestolen. Drivenheden har et integreret fjedersystem, der sammen med drivhjulets punkterfri dæk giver et sikkert og perfekt vejgreb, og gør enhver køretur til en fornøjelse.

Det, at **viamobil eco** betjeningsstyr reagerer på samme måde som styret på en cykel, gør den let at betjene også for den ældre generation. Kørestolsbrugeren mærker ikke at hjælpemotoren er monteret og køreturene kan nydes afslappet og trygt.

Transportabel og handy

viamobil eco er let at håndtere ved montering og afmontering. Med betjeningsstyret kan **viamobil eco** køres direkte ind eller ud af beslagene og derefter skilles ad i mindre dele for lettere håndtering og transport i

almindelig personbil. Når **viamobil eco** er afmonteret fra kørestolen, kan kørestolen foldes sammen, mens montagebeslagene stadig er monteret på kørestolen.

Egenskaber og tilbehør



viamobil eco klar til transport

Den kompakte og lette hjælpemotor adskilt og klar til transport.



Betjeningsstyr

viamobil eco betjeningsstyr er designet, så det kan indstilles til en korrekt arbejdsstilling for hjælperen.



Kontrolenhed

viamobil eco er forsynet med en kontrolenhed, hvorfra maks. hastighed, aktuel hastigheden og kørselsretning bestemmes.



Typisk anvendelse

viamobil eco anvendes typisk på mellemaktive kørestole og monteringsbeslag kan leveres til de fleste kørestole på det danske marked.

Egenskaber og tilbehør**viamobil eco drivenhed**

Manuel sænke/hæve funktion, affjedret drivhjul og punkterfri dæk.

**Batterilader**

Lader med automatisk frakobling og lysindikator. Oplader et standardbatteri på ca. 7 timer.

**Batteripakke**

Den lukkede og vedligeholdelsesfrie batteripakke kan let og hurtigt monteres eller afmonteres.

**Montering**

viamobil eco monteres og afmonteres hurtigt og let i monteringsbeslagene.

**Antitip**

Anbefales generelt og skal altid anvendes ved kørsel på stigninger > 8%.








**Monteringsbeslag**

Der kan leveres monteringsbeslag til de fleste manuelle kørestole på det danske marked.

**Autolader**

Lader med automatisk frakobling til anvendelse i biler og busser. Input 12-32 Volt.

Tekniske data

							
viamobil eco	max. 5.5 km/t	12 km	24 V / 9 Ah	6 kg	10%	18,5 kg (drivenhed: 10,5 kg)	120 kg

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark
 Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
 denmark@invacare.com
 www.invacare.dk

© 2014 Invacare International Sàrl
 All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Viamobil ECO - DK - 03/2014



Yes, you can.®