

Vibrator, slank:

Rengøring:

Inden De tager hjælpemidlet i brug skal det vaskes i vand og sæbe. Brug altid hygiejne sæbe eller toy cleaner, så De undgår sæberester, der vil kunne irritere slimhinder. Denne rengøring skal også altid finde sted efter brug af hjælpemidlet. Sørg altid for at Deres hjælpemiddel efterlades tørt og med mulighed for at ånde.

Advarsel:

- Brug aldrig hjælpemidler på syg eller irriteret hud eller ved inficerede hudpartier.
- For at undgå sygdomme og infektioner må De aldrig give Deres hjælpemiddel videre til andre.

Batterier:

- Sørg for at batterierne sidder korrekt (+/-)
- Fjern batterierne, når hjælpemidlet ikke er i brug og inden rengøring.
- Brug kun de anbefalede batterier.
- Benyt kun hjælpemidlet, når det er tilsluttet korrekt.
- Bland ikke forskellige typer eller nye/gamle batterier.
- Kontroller, at batterirummet lukker helt tæt.
- Sørg for, at der ikke kommer glidemiddel eller andre væsker ind til batterierne.

Bemærkninger:

- Vær opmærksom når De bruger hjælpemidlet første gang - vibrationerne kan være kraftige.
- Vær forsigtig ved rengøring af hjælpemidlet – pas på, at der ikke kommer vand i de elektriske dele.
- Opbevar hjælpemidlet et tørt sted, og ikke sammen med andre produkter.
- Sørg for, at hjælpemidlet er helt afkølet inden det pakkes væk.
- Ved langvarig brug kan hjælpemidlet blive overophedet. Hvis De oplever, at hjælpemidlet bliver varmt, så sluk det, og vent til det er afkølet helt, inden det tændes igen.

Beskrivelse:

Massage-stav der kan bruges både vaginalt og analt, fordi den er så tynd og glat i overfladen.

Brug altid glidemiddel sammen med vibratoren. Alle former kan anvendes.

Materiale: Hård plast.

Størrelse: længde: 17 cm., diameter: 2,5 cm.

Tåler alle former for glidemiddel.

Batterier: 2 AA batterier (ikke inkluderet)

Farve: Rød.

Brugsvejledning:

- Isæt batterier ved at skrue den nederste del af vibratoren af.
- Indfør vibratoren forsigtigt i vagina eller anus.
- Tænd vibratoren ved at dreje på knappen i bunden.
- Sluk vibratoren igen ved at dreje på knappen, inden den forsigtigt fjernes fra kroppen.

