

Air Express Helmadras

Dynamisk, alternerende eller statisk
helmadrassystem



Version 2010. Der tages forbehold for
ændringer og trykfejl.

Helmadras

- Madrasrammen er af kraftig nylon.
- Helmadrasen er opbygget af 20 udskiftelige luftceller.
- Luftcellerne er af tynd, smidig og stærk nylonfolie.
- Hver enkelt luftcelle kan afmonteres uden værktøj, hvis f.eks. total aflastning af hælene ønskes.
- Luftcellerne er fastgjort på madrasrammen med velcro-bånd, så individuel tilpasning er muligt, f.eks. hos en bruger, der har behov for ekstra støtte i lænden.
- Under luftcellerne er placeret en 3 cm tyk madras af koldskum.

Fodstop (tilbehør)

- Høj luftcelle, der monteres i stedet for en eksisterende luftcelle, for at hindre spidsfod eller brugeren glider ned i fodenden.

Betræk

- På madrassen er monteret et ventilerende, vandskyende, åndbart, oversize betræk med bakteriostatiske egenskaber.
- Det 2 lags quiltede betræk hindrer friktion og shear i forbindelse med forflytninger.
- Betrækkets 'Easy Slide' effekt sikrer let forflytning af brugeren.

Plexus Air Express kontrolenhed/pumpe

- Brugervægt op til 228 kg.

- Logisk og brugervenligt display.
- Trykket i madrassen indstilles manuelt ud fra brugerens vægt, 'håndtest' og individuelle behov.
- Dynamisk eller statisk funktion.
- Alternering med 5 minutters rolig cyklus.
- Madrassen fyldes med luft på 20 minutter.
- Slinger med 'Quick Release' for hurtig tømning ved hjertestop (CPR) og i forbindelse med forflytninger.
- Ved strømudfald kobles luftslangerne og madrassen kan derefter holde luft.
- Indstillinger genoprettes efter strømudfald.
- Alarm ved strømsvigt.

Rengøring

- Topbetrækket maskinvaskes ved 80° C.
- Luftcellerne afmonteres og rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Koldskumsmadrassen afmonteres. Nylonbetrækket maskinvaskes ved 60° C eller rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Luftslangerne i rammen afmonteres og aftørres. Rammen maskinvaskes ved 60° C eller rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.

Tekniske data

El	230 V / 50 Hz, 0,5 A		
Ledningslængde	4,5 m		
Maks. brugervægt	228 kg		

	Vare nr.	HMI nr.	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Garanti
Plexus Air Express helmadras	80-10219	53438	85 cm	203 cm	25 cm	6,8 kg	2 år
Plexus Air Express pumpe	80-10278	48539	31,0	15,0	23,0	2,4	2 år