


SYMMETRISLEEP

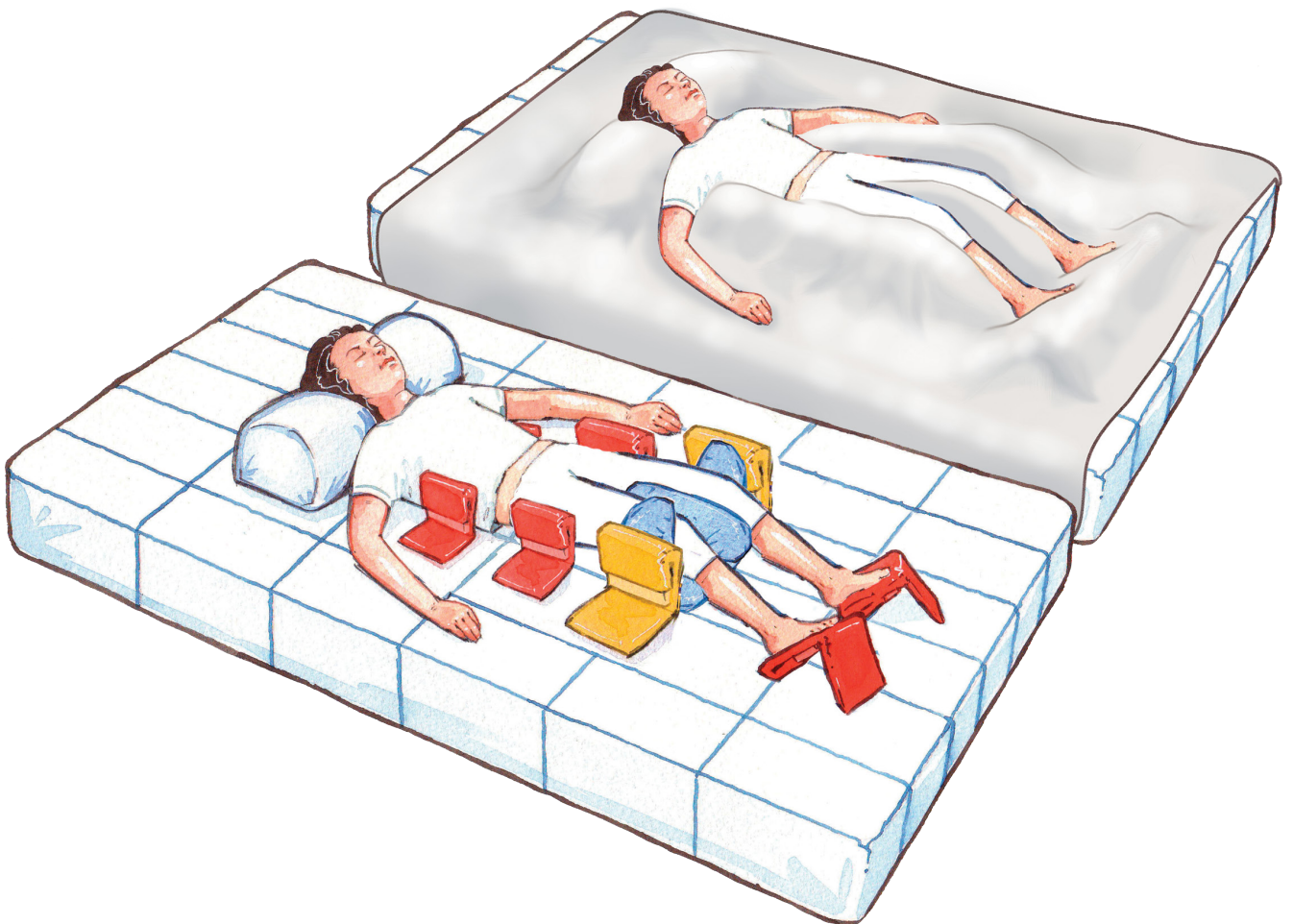



SYMMETRISLEEP

Et led i 24 timers postural omtanke



HVAD TILBYDER SYMMETRISLEEP

Det er meget vigtigt, at en borger har den bedst mulige siddestilling i sin kørestol, men det er lige så vigtigt, at vedkommende også positioneres optimalt alle de timer, vedkommende ikke sidder i sin kørestol. Et 24 timers positionerings program kan gøre en forskel.

Symmetrisleep muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge lige, under forudsætning af at deres krop er fleksibel nok, til at blive rettet ud. Liggesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigerer allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

Symmetrisleep muliggør en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer. Tilbehøret kan gradvist introduceres i takt med at tolerancen øges. Symmetrisleep er designet til at understøtte de biomekaniske rotationskræfter i en positiv retning.



Symmetrisleep virker:

- Mave-, ryg- eller sideliggende.
- Ved at systemet placeres ovenpå en seng.
- På forskellige typer madrasser - også tryksårsforebyggende.

Symmetrisleep er :

- Nemt og enkelt at rengøre.
- Let transportabel.
- Brandhæmmende.

Har en borger eksempelvis skævheder, vil tyngdekraften forstærke diverse positioner, efterhånden som en person bliver ældre. Det gør det sværere at give tilfredsstillende støtte i forbindelse med at sidde, stå, bade og ligge.

Med tiden kan der opstå rotation af bryst og ryg, indre organer presses mod lungerne, hvilket medfører nedsat lungefunktion og øger risikoen for infektion. Medfølgende problemer kan opstå, så som hofte dystrofi og kontrakturer.

Et 24 timers positionerings program kan være med til at forhindre disse situationer i at opstå og dermed give forbedret funktion og en forbedret livskvalitet.

HVORDAN BRUGES SYMMETRISLEEP?


Når velcro lagenet, den tryksårsforebyggende topmadras og det strækbare lagen er på plads, er liggesystemet klart til brug. Det foretrækkes og letter forflytningen at sengens underlag er plant.

Når brugeren er klar til det, monteres støtter og puder for at give den rette positionering.

Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i systemet, tilpasses SymmetriSleep liggesystem fleksibelt til brugeren.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil. Nogle foretrækker at montere dem, mens brugeren sover.

Husk at man kan bruge SymmetriSleep om dagen lige så vel, som om natten. Hvis bare liggesystemet er benyttet 2 timer om dagen, svarer det til 730 timers progressive passive terapi timer per år. Bruges liggesystemet hver nat, svarer det til ca. 3.600 timer, hvor kroppen er afslappet og har de bedste betingelser for restitution.

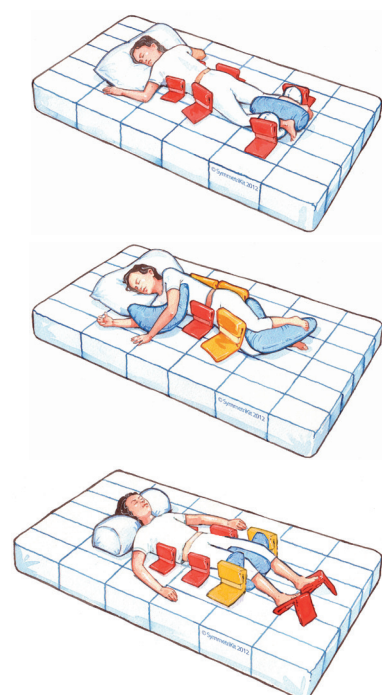

SYMMETRISLEEP - KORT & GODT

- Justerbar, komfortabel støtte til dem, som har svært ved at flytte sig. Familiemedlemmerne og hjælperne bliver på den måde måske forstyrret mindre.
- Forbedret komfort reducerer tonus forstyrrelser i løbet af natten, for fredeligere nætter, og bedre morgener.
- Hjælper til at fastholde kroppens symmetri og beskytter diverse led mod den destruktive effekt af tyngdekraften i yderstillinger i løbet af natten.
- Justerbar til enhver position og form, uanset alder på vedkommende. Nem at justere eller lægge på og tage af sengen. 24 timers positionering kan fortsætte uforstyrret fra spæd til voksen.
- Består af forskellige trykaflastende materialer, som også kan bruges til at opnå termisk komfort.

AIRMANTLE

Top madrassen i SymmetriSleep hedder Airmantle.

I løbet af natten reorganiserer vi vores dyne, for at opretholde en konstant kropstemperatur. Airmantle hjælper dem, som ikke selv kan lave disse tilpasninger. Airmantle er som et lag af luft, som hjælper brugeren med at komme af med eventuel sved og dermed bibeholde en konstant kropstemperatur.




SymmetriSleep virker ved at sprede belastningen over et større overfladeareal og dermed reducere lokalt tryk.

Brugere oplever ofte en reduktion af kontrakturer, som også bidrager til at mindske belastningen på områder som hæle og albuer.

SymmetriSleep Airmantle former sig til og støtter kroppen, så man kan få en god nats søvn. Den tilbyder et temperaturregulerende alternativ til hule fibre vat eller skum, som kan have præcis den modsatte effekt.

I modsætning til skum, kan Airmantle let vaskes og tørres.

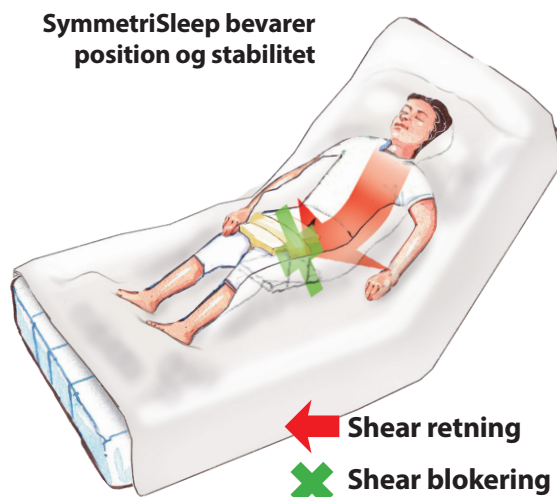

GOD LEJRING ER GODT GIVET UD

Vi sover næsten en tredjedel af livet, og en del personer med problemer i bevægeapparatet tilbringer de fleste af døgnets timer i sengen. Det er derfor vigtigt, at man også i sin seng er bedst muligt positioneret.

Her ses eksempler på knæpuder og fodkile.



Knæpuderne, som er vist ovenfor, sørger for at stabilisere benene i en god stilling, når man ligger på ryggen. Samtidig giver den også mulighed for at man kan dreje/trille om på siden og samtidig bevare den gode stilling. Den er derfor rigtig god for meget urolige personer, som vender sig meget, men som fortsat har behov for støtte.

Her er forskellige puder og støtter.



PRODUKTOVERSIGT

Varenr.

Navn:

Velcro lagen

SA8000C	Barneseng 100X75 cm, HMI Nr. 62587
SA8000T	3/4 str. 160x80 cm, HMI Nr. 79778
SA8000S	Single størrelse 180x105, HMI Nr. 62588
SA9020DK	Symmslyde version - Single størrelse



Knæ holdere/knæblok - Supine

SA5520S	Small supine knæblok
SA5530S	Medium supine knæblok
SA5540S	Large supine knæblok



Knæ holder

SA5552	Medium knæholder
SA5553	Large knæholder
SA5555	Sikkerhedsstrop - single
SA5556	Sikkerhedsstrop - dobbel



Knæblok - rolling

SA5520R	Symmetri sleep, Knæblok Rolling, Small
SA5530R	Symmetri sleep, Knæblok Rolling, Medium
SA5540R	Symmetri sleep, Knæblok Rolling, Large



Indvendigt bånd

SA5521	Symmetri sleep, Indvendigt bånd 10mm, Small
SA5531	Symmetri sleep, Indvendigt bånd 10mm, Medium
SA5541	Symmetri sleep, Indvendigt bånd 10mm, Large

Benstøtte ved sideleje

SA7445	Small, 40x40, HMI Nr. 62593
SA7450	Medium 63x64,5, HMI Nr. 62594
SA7455	Large 78x74,5, HMI Nr. 62595



Positioneringsbeslag

SA7200	Small sæt, 10x13x8, HMI Nr. 62596
SA7220	Medium sæt 16x13x13, HMI Nr. 62597
SA7235	Medium/Large sæt 22x15x22,4, HMI Nr. 62597
SA7225	Large enkelvis 22x15x25, HMI Nr. 62598



Puder til positioneringsbeslag (dobbeltsidet og ventilerbar)

SA7165P	Small - sæt 17x15, HMI Nr. 62600
SA7175P	Medium - sæt 20x25, HMI Nr. 62602
SA7185P	Large - single 25x28, HMI Nr. 62603
SA7195P	X-large - single 25x35 HMI Nr. 62604



Strækbare Bamboo lagen

SA7120C.BAM	Strækbare Bamboo lagen 100x75 cm
SA7120S.BAM	Strækbare Bamboo lagen 180x105 cm
SA7120T.BAM	Strækbare Bamboo lagen 160x80 cm
SA7120C.BAMSPA	Coolover lagen 100x75 cm
SA7120S.BAMSPA	Coolover lagen 180x105 cm
SA7120T.BAMSPA	Coolover lagen 160x80 cm



SA9060DK

Coolover Symmslyde lagen med lynlås

Airmantle topmadras

SA8010	Airmantle topmadras og base, 190x100, HMI Nr. 62601
SA8010C	Betræk til Airmantle
SA7054	3/4 seng 160x80

Skumgranulerede fyldte puder (t-foam)

SA7500	A - firkantet standard 30x30
SA7550	B - Small rektangel standard 13x30
SA7580	C - Medium rektangel standard 30x445
SA7610	D - Large rektangel standard 45x75
SA7700	EL - Halvmåneformet Large 35x80
SA7710	EM - Halvmåneformet Medium 31x65
SA7720	Es - Halvmåneformet Small 25x37
SA7800	F - Small pølle standard 8X30
SA7850	G - Medium pølle standard 13,5x40
SA7860	G+ - Large pølle standard 13,5x60



Coolover betræk - COOLOVER Pudebetræk erstatter Safetysleep

SA7500BAMSPA	A Firkantet coolover
SA7550BAMSPA	B - Small rektangel standard 13x30
SA7580BAMSPA	C Medium REKTANGEL coolover
SA7610BAMSPA	D Large REKTANGEL coolover
SA7700BAMSPA	EL - Halvmåneformet Large 35x80
SA7710BAMSPA	EM - Halvmåneformet Medium 31x65
SA7720BAMSPA	ES - Halvmåneformet Small 25x37
SA7800BAMSPA	F Small pølle coolover
SA7850BAMSPA	G Medium pølle coolover
SA7860BAMSPA	G+ Large pølle coolover



Skumgranulerede fyldte pølle (t-foam)

SA7900	Sideliggende støtte 136x86x7,5
SAED201118	Special fuld længde 2M lang, 3 darts

Diverse

SA7090	Symmetri Sleep Taske
SA6900	Taske med hjul
SA6910	Airsheet taske 105X65X225
SA6920	Pølle taske 85X65X125



Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

