


Datablad for Air-Care Siddepude

Brugsanvisning for Air-Care Siddepude.

1. Air-Care Siddepude tages ud af emballagen.
2. Air-Care Siddepude fyldes med luft indtil det ønskede tryk er opnået. Produktet kan fyldes med luft vha. pumpe, komprimeret luft eller munden.



3. Air-Care Siddepude er nu klar til brug.
4. Efter brug bør Air-Care Siddepude deflateres. Til deflatering kan en saks eller skalpel benyttes. Efter deflatering afskaffes produktet som alm. affald.

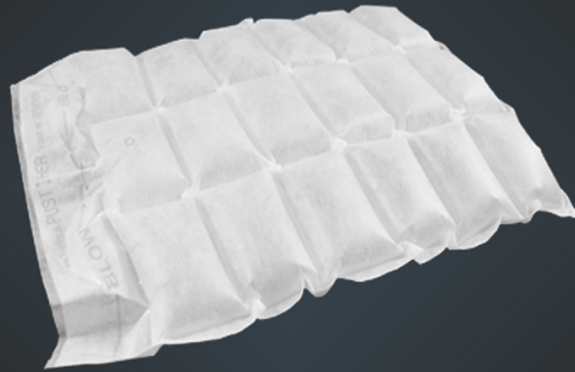

Datablad for Air-Care Siddepude

Specifikationer for Air-Care Siddepude.

Produktnavn

Varenummer

Air-Care Siddepude 1 stk.

SP56109

Air-Care Siddepude kolli m. 24 stk.

SP56110

Priser

Air-Care Siddepude 1 stk.

20,00 Kr

Air-Care Siddepude kolli m. 24 Stk.

480,00 Kr

Bestilling

Bestilling af Air-Care Siddepude kan ske ved at:

1. Kontakte os på telefon nr.:


4913 8755

2. Sende en e-mail til:

info@innoplast.dk

3. Sende en fax til:

4913 8701

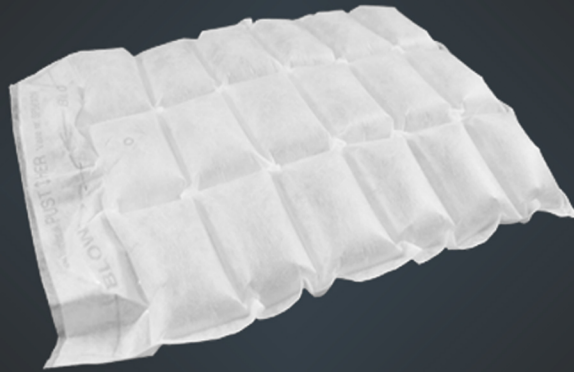

Datablad for Air-Care Siddepude

Air-Care Siddepude er CE mærket, klasse 1 for medicinske indretninger og lever op til den krævede standard efter direktiv 93/42/EEC.

Air-Care Siddepude er en statisk luftpude der er tryksårsforebyggende. Air-Care Siddepude er egnet for hofteopererede.

Air-Care Siddepude er fremstillet polypropylene folie i cellekonstruktion, som aflaster og fordeler brugerens vægt over hele sidde og hvilefladen.

Air-Care Siddepude er enkel at bruge.

Air-Care Siddepude udfyldes med luft og er så klar til brug.

Air-Care Siddepude kan også anvendes som rygpude.

Air-Care Siddepude har et patenteret automatisk lukkesystem, og kan således ikke deflateres uden ødelæggelse. Man kan altid justere Air-Care Siddepude med mere luft.

Air-Care Siddepude pumpes op med håndpumpe eller maskinelt til den ønskede hårdhed.

Alle celler i Air-Care Siddepude skal være luftfyldte.

Trykket i Air-Care Siddepude justeres efter behov. Fyld derfor produktet op med luft af flere gange.

Når du har fundet det lufttryk som er passende, er Air-Care Siddepude klar til anvendelse.

BEMÆRK! Ved for højt tryk i Air-Care Siddepude kan den bryde med et mindre lydtryk.

Air-Care Siddepude må kun fyldes med atmosfærisk luft.

Air-Care Siddepude kan anvendes direkte mod huden, det bløde non-woven materiale vil transportere fugten væk, så huden forbliver tør.

Air-Care Siddepude sikrer optimal lufttilførsel, forhindrer at huden får direkte tryk fra knogler og mindsker friktion mod huden.

Air-Care Siddepude er patientspecifik og til engangsbrug.

Air-Care Siddepude indeholder ikke ftalater, pvc samt andre sundhedsskadelige stoffer.

Air-Care Siddepude er ikke beregnet til direkte kontakt med sår på grund af infektionsrisiko.

Før bortskaffelse bør Air-Care Siddepude deflateres ved punktering.

Air-Care Siddepude Bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Air-Care Siddepude er co2 neutralt, og vil ved forbrænding blive omdannet til ilt og vand.