



UNIVERSAL COMFORT

Polstret helsejæl med ekstra støtte omkring lår og bækken.

ANVENDELSE

- Til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.
- Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, hvilket giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.
- Sejlet har delte benstropper med speciel stropløsning, som gør, at stropperne ikke skal krydses. Benstropperne har en stor polstret overfalde, som letter pres-set på hele lårbenet.
- Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet har en lille sædeåbning.
- Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale:

Fås i polyester og polyester net.

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Universal Comfort,
polyester:

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09843	85895
S	009-09844	85894
M	009-09845	85893
L	009-09846	85892
XL	009-09847	85891
XXL	009-09848	85890

Universal Comfort,
polyester net.

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09853	85884
S	009-09854	85885
M	009-09855	85886
L	009-09856	85887
XL	009-09857	85888
XXL	009-09858	85889



STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakken til bagdel)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

TIP!

Ved at lægge benstropperne over hinanden, kan Comfort-sejlet bruges som amputationssejl:



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE