

Løftesejl



Helsejæl med hovedstøtte

Helsejl med hovedstøtte Type 135.19

Anvendelse:

Særdeles egnet til personer der er ustabile i nakkeområdet.

Sejlet er gulvrækkende og kan anvendes både fra siddende og liggende position.

Sejlet kan føres enten under armhulerne eller støtte kroppen totalt.

Et sikkert løftesejl også til låramputerede idet stropperne kan ophænges krydsede.

Fås også som amputationssejl. (se ill.)

Tekniske data:

Max. Belastning:

165 kg

Materiale:

Polvester/bomuld

Vaskeanvisning:




Størrelser

Brystvidde


	min	max
X-small	40 cm	60 cm
Small	60 cm	80 cm
Medium	80 cm	100 cm
Large	100 cm	120 cm
X-large	120 cm	140 cm
XX-large	140 cm	160 cm

Følgende størrelser lagerføres: S-M-L


Sejl fremstilles også på specielmål (hurtig levering)

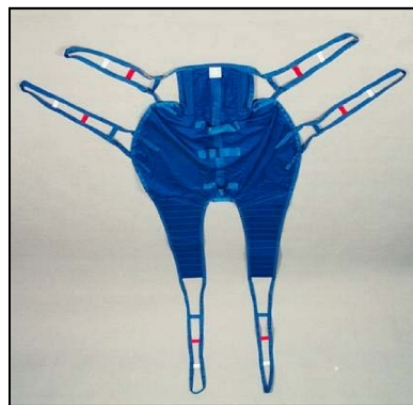

Sejlet som amputationssejl 135.21

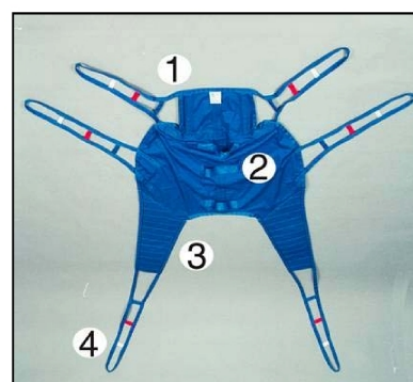

- 1 Tilpasset hovedstøtte
- 2 Styrestrop i ryggen
- 3 Komfortabelt sæde med forstærkning i bendelen
- 4 Farvemærkede ophængstropper for tilpasning til legemsstørrelse og siddeposition

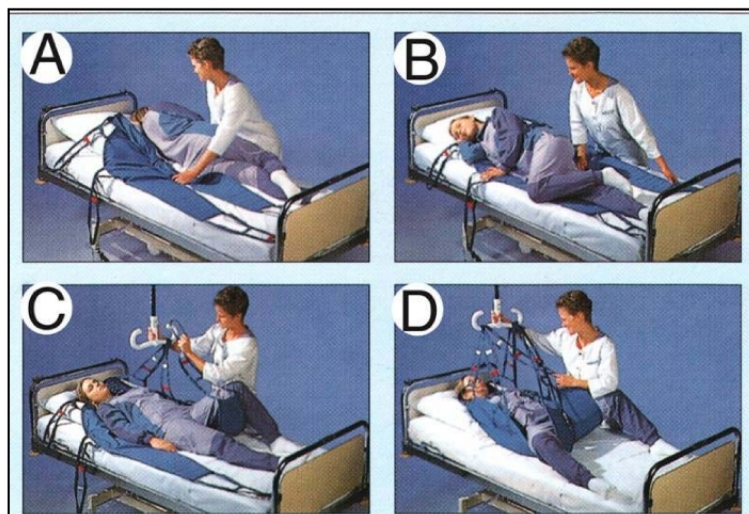

Den korrekte anbringelse ved brug af sejl med hovedstøtte

- A. Rul patienten ud til siden og bred halvdelen af sejlet ud
- B. Rul patienten om på den anden side – over sejlet – bred nu sejlet helt ud
- C. Ophæng stropperne i liftens åg
- D. Når benstropperne er krydsede og sejlet er placeret korrekt kan løftet begynde

