


Pro-care Auto Bariatric

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

Trykaflastende helmadras Pro-care Auto Bariatric består af 20 en-kelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Cellerne er i de-signet Cell-on-Cell. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

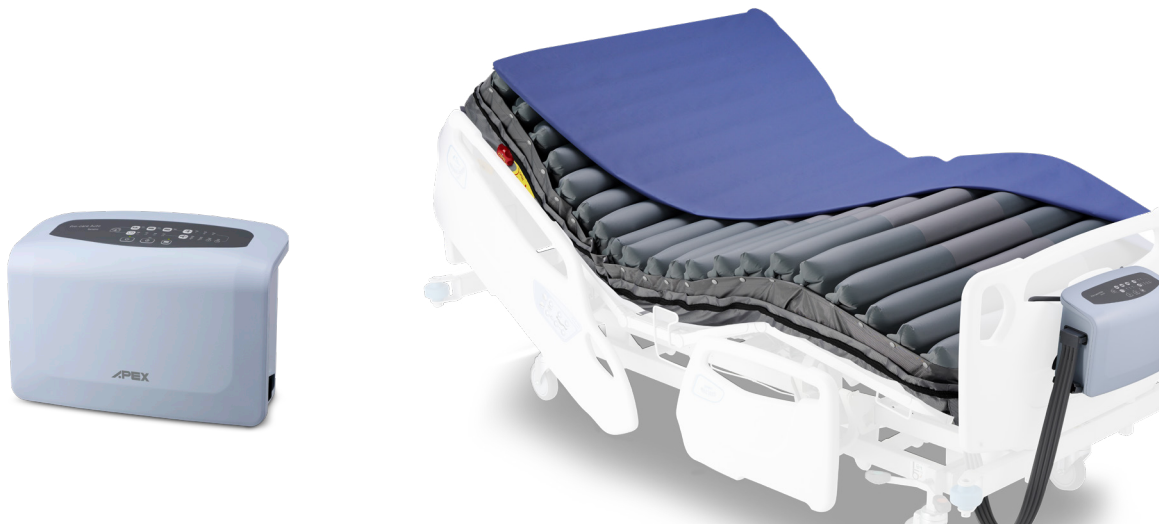

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille sidd-funktion. Maxfirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Glat eller strækbart betræk

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver;

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Betrækket fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet, for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Kontakt vores specialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af vores produkter.

Pro-care Auto Bariatric

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.



Fleksible brug

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne.

Hælaflastning

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene.

Betræk efter behov og anvendelse

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver;

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.



Tekniske data

Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm

Cyklus tid: 10 min.

Elektricitet AC230V

50/60 Hz, 0, 07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

105x200x20 cm

HMI nr.: 100592

Varenr.: MDYF1091

120x200x20 cm

HMI nr.: 118770

Varenr.: MDYF1093

Brugervægt: 30-450 kg

Sammensætning: 20 cell-on-cell luftcelle

Materiale: Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt

Celler: Nylon/PU, gråt

Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt

Funktion: Integreret ledningsholder.

5 celler i hældelen kan afkobles med quickconnection

Vedligeholdelse: Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.