



medemagruppen



Medemagruppen
Fitform 576 Nordic2
- stole med oprejsningsfunktion 2018

Fitform 576 Nordic2

Stolserie med speciel sikker oprejsningsfunktion, og med komfort og tilpasningsmuligheder i særklasse



Ny svingfunktion med letbetjent frigørelseshåndtag der kan justeres i ønsket vinkel. Kan monteres på modsat side.

- Nyudviklede sæde- og rygpuder giver blødere og mere stabil siddekomfort
- Manuelt regulerbar lændestøtte med håndpumpe som også kan højdereguleres
- Transporthjul for enklere flytning af stolen
- Unik og specielt sikker oprejsningsfunktion som skiller sig ud fra andre stole i markedet
- Meget robust og stabil stol med meget højt sikkerhedsniveau
- Alle mulige sidde og liggende positioner, separat justering af den lodrette funktion, sædetilt, rygregulering og benstøtte
- Omfattende tilpasningsmuligheder på alle stole med justerbar sædehøjde, sædedybde, længde og vinkel på benstøtte, vinkling af topdel på ryg, armlæns højde og forskellige løftevinkler inkl lige løft.
- Tiltfunktion helt op til 35 grader med mulighed for benene over hjertehøjde
- Leveres i mange størrelser (sb45,51,57,63,69,75,81,87 cm) og stort omfattende sæde-, ryg- og tilbehørsprogram. Kan tilpasses enhver kropsbygning
- For høje personer er der mulighed for ekstra dyb sædedybde 49-59 cm (evt. med tilbehørsæt), ekstra lang benstøtte med benstøtteforlænger, samt forskellige ryghøjder (72,84,94 eller 104 cm)
- Sæderotation manuelt låsbar med håndtag, alt med automatisk låsing. Kan også leveres elektrisk betjent.
- Mulighed for avanceret og trykforebyggende siddeløsninger ved hjælp af tilbehør bl.a den nye FIT-MOTION (se s 5)
- Mulighed for forskellige blødhed på sæde- og rygpulster

Fitform 576 Nordic2

Sædebredde stand. størrelser	45, 51, 57, 63 cm
Sædebredde specialstørrelser	69, 75, 81, 87 cm
Sædedybde std modeller	43-53 cm (38-59 cm m tilbehør)*
Sædedybde dyb model	49-59 cm (evt. m tilbehør)
Sædehøjde u rotation	40-60 cm (fra 36 cm m tilbehør)
Sædehøjde m rotation	41-61 cm (fra 37 cm m tilbehør)
Ryghøjde	84 cm (72,94,104 cm m tilbehør)
Ryghøjde model Mini	72 cm
Armlæns højde regb u værktøj	15-29 cm (fra 12 cm m tilbehør)
Benstøttelængde (justerbar)	44-55 cm (+8 cm m tilbehør)
Maks højde benstøtte fra gulv	83-103 cm (afhængig af sh)
Højde lige løft oprejst	59-79 cm (afhængig af sh)
Højde skrå løft oprejst	60-80 cm (afhængig af sh)
Maks brugervægt sb 45 og 51	150 kg
Maks brugervægt sb 57	175 kg
Maks brugervægt sb 63-87	250 kg
Tilt	5-35 grader
Rygvinkling	95-135 grader
Rotation	Manuelt låsbar m håndtag, alt med automatisk låsing
Rygoverdel	Regulerbar u værktøj (evt el betjent)
Betræk std	Gråt stof / sort skind
Nakkepude	std (m fiberfyld)

* Kortere sædedybde på forespørgsel



Fitform Nordic

- at sidde på et sundt grundlag

Hvilestilling

Ved at tilte sædet og regulere ryggen yderligere bagover, kommer man i hvilestilling. I denne stilling er belastningen på ryggraden minimal. Kropsvægten bliver optimalt fordelt og man opnår behagelig afslapning af kroppen. Da benene kan komme højere op end hjertet, aflastes blodomløbet. (såkaldt chokleje-position).

Siddestilling

At sidde oprejst stiller de højeste krav til ryggraden. Da lænestolen passer til brugerens kropsbygning, har bækenet den rigtige position, rygsøjlen bliver fuldstændig understøttet, mens benene er løftet, Sådan opnås en afslappet siddestilling.

Oprejsningsstilling

Unik oprejsningsfunktion som adskiller sig fra andre stole på markedet. Under løfteprocessen drejer sædet lidt bagover så man får sat benene godt under sig når man skal rejse sig. Dette gør oprejsning meget sikker og god, hvilket forebygger fare for uheld.

Afslapningsstilling

Ved hjælp af reguleringen af sædetilt, fodstøtte og justering af rygvinkel kommer du i en ideel afslapnings position, som man nemt kan komme op fra igen.

Ryggraden aflastes i høj grad og musklerne, senerne og leddene er afslappede.

Kropsvægten fordeles over et større område og dette reducerer faren for lokalt tryk og eventuelt tryksår. Ved primært at anvende tiltfunktionen blir reguleringen så behagelig som muligt og samtidig er det lettere for brugeren at opretholde den ønskede siddebalance og siddestilling



Fitform 576 Nordic2

-forskellige størrelser og modeller

Vi har en størrelse som passer!

En forudsætning for, at en løfte- hvilestol skal fungere optimalt, er at den skal passe godt til brugeren.

Den bør have både rigtig sædebredde, sædehøjde og armlænsenhøjde for at oprejsning skal kunne gøres bedst muligt og at stolen samtidig skal give god støtte og afslappet sidde- og hvilestilling. I afslapnings- og hvilestilling bør man også have god støtte og aflastning under benene. Det er derfor en stor fordel at kunne justere benstøtten efter brugerens længde.

Et vigtig valg er den rigtige sædebredde og afstand mellem armlænerne. Dette er vigtigt for at brugeren bedst muligt skal kunne udnytte sin armkraft ved oprejsning, og samtidig kunne sidde stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyder derfor stolene i forskellige sædebredder (45,51,57,63,69,75,81 og 87 cm) for at sikre at alle får en stol som passer optimalt, uanset om man er stor eller lille.

Stolene har endvidere omfattende tilpasningsmuligheder så man kan justere den ønskede sædehøjde, sædebredde, armlænsenhøjde, længde og vinkel på benstøtte samt ønsket

løftevinkel.

Vi anbefaler primært at benytte tiltfunktionen ved regulering af siddestillingen, dette giver oftest den mest behagelige siddestilling for brugeren og det som bedst opretholder den ønskede siddebalance og siddestilling.

Brug af tilt er også den bedste måde at sørge for trykaflastning og dermed beskyttelse mod tryksår.

Tiltfunktionen giver også mulighed for at komme i såkaldt chokleje, hvor benene kommer højere op end hjertet. Indstillingen af benstøtte, tilt og ryg er endvidere uafhængige således at man kan finindstille ønsket siddestilling.

Der lagt stor vægt på at alle brug skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre udstyret med en række sikkerhedsdetaljer.

Alle modellerne kan leveres med eller uden rotation, med eller uden tilt og med betræk i stof eller skind

Alternative farver, stof og større størrelser (sb69,75 og 81 cm) samt specialløsninger kan leveres på bestilling. Ved privatkøb af afvigende stole kræves et depositum på 25%.

Post	Stole med tilt og uden rotation	Mål *	Vare nr stol m stof	HMI nr	Vare nr stol m hud	HMI nr
6	Fitform Nordic2 Tilt Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1076		1100-1077	
6	Fitform Nordic2 Tilt Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1078		1100-1079	
6	Fitform Nordic2 Tilt Std	sb51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1082		1100-1083	
6	Fitform Nordic2 Tilt Dyb	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1080		1100-1081	
6	Fitform Nordic2 Tilt Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1084		1100-1085	
7	Fitform Nordic2 Tilt Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1086		1100-1087	
Post	Stole uden tilt, med rotation	Mål *	Vare nr stol m stof	HMI nr	Vare nr stol m hud	HMI nr
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1064		1100-1065	
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1066		1100-1067	
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Std	sb51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1070		1100-1071	
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Dyb	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1068		1100-1069	
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1072		1100-1073	
9	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1074		1100-1075	
Post	Stole med tilt og rotation	Mål*	Vare nr stol m stof	HMI nr	Vare nr stol m hud	HMI nr
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1088		1100-1089	
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1090		1100-1091	
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Std	sb51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1094		1100-1095	
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Dyb	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1092		1100-1093	
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1096		1100-1097	
11	Fitform Nordic2 Swing Tilt Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1098		1100-1099	
	Ekstra brede stole	Mål*	Vare nr stol m stof	HMI nr	Vare nr stol m ski	
	Fitform 570 Tilt 2xbred	sb69 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1002			på forespørgsel
	Fitform 570 Tilt 3xbred	sb75 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1001			på forespørgsel
	Fitform 570 Tilt 4xbred	sb81 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1100			på forespørgsel
	Fitform 570 Tilt 5xbred	sb87 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1100			på forespørgsel

* sædehøjde mulig 37-59 cm, sædehøjde 36-61 cm, benstøttelængde op til hele 63 cm og ryghøjde 72-104 cm med tilbehør

Stolene leveres standard i grå stof eller sort skind inkl. nakkepude, to sidelommer og korsrygstøtte med håndpumpe og manuelt regulerbar i højden.

Alternative farver/større størrelser kan leveres på bestilling.

Ved privatkøb/bestilling af afvigende stole, ser vi os nødsaget til at bede om et depositum på 25% af købesummen. Depositummet må være indbetalt før produktet bestilles/produceres. Disse stole skal være betalt for udlevering. Produktet er Medema-gruppens ejendom indtil fuld betaling kan dokumenteres. Specialbestilte produkter tages ikke retur.



Oprejsningsfunktion

Lige løft

FIT-MOTION NYHED

-Innovativ dynamisk sidde- og antidecubitussystem


FIT-MOTION er et innovativt bevægelsessystem som nu kan leveres til Fitform løfte- og hvilestole. Systemet bliver aktiveret automatisk når man sætter sig i stolen, men kan om man ønsker det, deaktiveres ved hjælp af stolens betjeningsboks.

FIT-MOTION består af to bevægelsesmoduler:

TRYKAFLASTNING: Dette bevægelsesmodul bliver automatisk sat i gang når man sidder med benene på gulvet (benstøtten kørt ned). Hvert minut tiltes stolen 2x2grader bagover, og derefter 2x2grader tilbage igen til udgangspositionen. Dette gentager sig kontinuerlig.



SLOW MOTION GYNGEFUNKTION: Dette bevægelsesmodul bliver automatisk aktiveret når benstøtten er kørt op. Stolen varsler da hvert 15 minut med et vibrationsignal at bevægelsen sættes i gang. Man kan da vælge at bruge stolens oprejsningsfunktion og rejse sig selv. Ellers sætter stolens tiltfunktion i gang en langsom gyng bevægelse, med 30% af vanlig hastighed på motorerne. Stolens rygvinkel forbliver uændret. Slow-motion bevægelsen kan man selv sætte i gang eller deaktivere med betjeningsboksen.

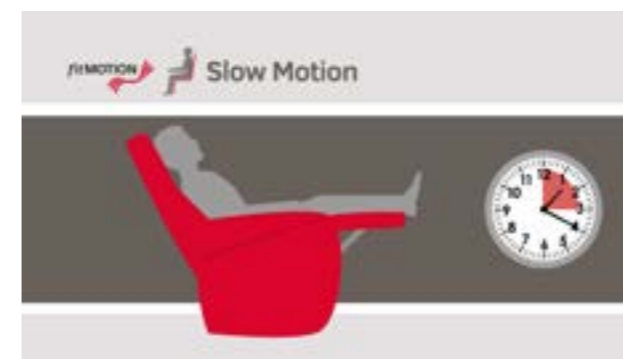

Se video af FIT-MOTION på vor hjemmeside medema.no

Varenr	HMI nr	Varenavn
1105-1028		Sidde/antidecubitussystem dynamisk Fit-Motion Fitform fabrikmonteret

Hvorfor FIT-MOTION

Det er altid sundere for kroppen med bevægelse end at sidde stille og med FIT-MOTION får brugere, som måske ellers sidder mest stille, bevægelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har vist sig at have positiv effekt på blodomløb og iltoptagelse i huden. Slow-motion funktionen bidrager også til at forhindre hævelser i benene. Bevægelserne bidrager også til trykforandring som kan have positiv effekt ved forebyggelse og heling af tryksår. Gyngbevægelserne med FIT-MOTION (og andre tilsvarende stole med gyngbevægelse) har også vist sig at have beroligende effekt på bl.a. demente og personer med smerte. FIT-MOTION's positive effekter er videnskabeligt underbygget. (bl.a. Roessingh Research & Development, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. L.L.J.M. van Deursen)

Fit-Motions teknik

Stole med FIT-MOTION er udstyret med special elektronik og betjeningsboks som afviger fra stolens standardudstyr. Elektronikken er programmeret så den genkender hvilken position brugeren befinder sig, og starter stolens bevægelser baseret på dette. Man kan altid selv sætte i gang/deaktivere bevægelserne med betjeningsboksen.



Vi gør opmærksom på at Fit-Motion ikke kan kombineres med batteridrift, trådløs betjening, elektrisk regulering af lænde støtte og topdel på ryg, sædebredde over 63 cm og sædehøjde over 55 cm, samt coxitsæde.



Tryktaflastning

Slow motion gyngfunktion

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestole

Siddeproblemer	Anbefalede løsninger med Fitform Nordic stol
Balanceproblemer, stort behov for positionering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred) Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt ILPM/ILPM Plus tilpasningsryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel placering af sidestøtter) Elektrisk regulering af rygoverdel samt elektrisk regulerbar lændestøtte (1118-1004) APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpude indbygget)
Balanceproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred) Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt ILPM/ILPM Plus tilpasningsryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel placering af sidestøtter) Nakkepude nr 5 dråbeformet (1113-1026) Elektrisk regulering af rygoverdel (1118-1004)
Balanceproblemer, mindre behov for positionering	<ul style="list-style-type: none"> Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred) Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt ILP ryg (skumbaseret med mulighed for individuel placering af sidestøtter) Multitilpasningsryg med sidestøtte
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> ILPM/ILPM Plus ryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel placering af sidestøtter) Multitilpasningsryg med sidestøtte Nakkepude nr 5 dråbeformet (1113-1026)
Scoliose / fejlstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ILPM/ILPM Plus ryg (med multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel placering af sidestøtter)
Tryksår sæde (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> Trykaflastende sædepude Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex betræk APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpude indbygget) med Uniform eller Sarcotex betræk Fit-Motion dynamisk sæde/antidecubitussystem (1105-1028) Stolen har plansæde som standard, med fastgørelse som muliggør brug af alle typer trykaflastende puder i stolen uden tilpasning.
Risiko for tryksår sæde	<ul style="list-style-type: none"> Trykaflastende sædepude Intelligel (gel) APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpude indbygget) Trykaflastende sædepude med memoryskum Uniform eller Sarcotex betræk Fit-Motion dynamisk sæde/antidecubitussystem (1105-1028) Stolen har plansæde som standard, med fastgørelse som muliggør brug af alle typer trykaflastende puder i stolen uden tilpasning
Risiko for tryksår ryg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> Ryg med lag af memoryskum (tilpasning) (1122-1029) IPPM/multitilpasningsryg med sidestøtte APPR-ryg luftreguleret
Risiko for tryksår på ben/lægge	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtte med ekstra memory skum (tilpasning) (1122-1027)
Risiko for tryksår på underarme	<ul style="list-style-type: none"> Armlæn med ekstra memory skum (tilpasning) (1122-1029)
Ingen håndfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Stolen kan klargøres med specialelektronik for f.eks øjestyling eller andre former for specialstyringer. Bed om mere information
Inkontinens og risiko for tryksår	<ul style="list-style-type: none"> Inkontinensbetræk evt Sarcotex betræk Hele stolen leveres med "Stamskin" betræk Trykaflastende puder i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex betræk
Store personer med høj brugervægt	<ul style="list-style-type: none"> Sædebredde 57cm med max brugervægt 175 kg (std størrelse) Sædebredde 63cm med max brugervægt 250 kg (std størrelse) Specialbestilt stol med sædebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brugervægt)

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestole

Siddeproblemer	Anbefalede løsninger med Fitform Nordic stol
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> Ekstra dyb stol sd49-59 cm (sb51) (stol har tilstrækkelig sædehøjde justering sh40-60cm) Ombygingsæt ekstra sædedybde med sd 49-59 cm (øvrige sædebredder) Alternativ ryg med højere ryghøjde 94 eller 104 cm Benstøtteforlænger (+8cm)
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med ryghøjde 72 cm Ekstra lav sædehøjde 36, 37, 38 ,39 cm (ved brug af ekstra lav sædepude med Intelligel) Armlen Vario (lavere) (1113-1010/1113-1012) Ekstra kort sædedybde fra 38cm (1118-1005) (Ryg med 2 alt 6cm tykkere polstring) - kortere sd på forspørsel Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred)
Smalle/tynde personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med sædebredde 45 (vigtigt med rigtig sædebredde)
Mentalt nedsat (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> Easy version med sammenkoblede elfunktioner og kun 2 knapper på håndkontrollen (1105-1002)
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Nakkepude med meget blød fyld Elektrisk regulering af rygoverdel (1118-1004)
Behov for bredere armlener , problem med at armene falder ned	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlæn (+ 2-4-6 cm indover eller udover) (tilpasning)
Behov for at blive kørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Hjulsæt Safety (automatisk bremsefunktion) (1103-1005)
Behov for at flytte stolen i rummet (uden bruger i)	<ul style="list-style-type: none"> Transporthjul (u/bremse, kræver at stolen balanceres) std på stol Hjulsæt Safety (automatisk bremsefunktion) (1103-1005)
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> Varme i sæde og ryg (1105-1035) evt. som del af vort Memory Kit (1118-1004)
Behov for at arbejde, læse eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Forskellige bordløsninger og lys
Behov for mere/bedre støtte for ben/hæle	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtteforlængere Sammenhængende betræk for sæde og benstøtte Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med memoryskum eller latex)
Dårlig håndfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Håndkontrol Light Touch (1105-1004) Trådløs IR løsning betjent med letbetjent håndkontrol eller tabletløsning Elektrisk betjent svingfunktion (1105-1004). Forskellige specialstyringer (bed om info)
Stiv hofte/problem med at bøje hofte/knæ	<ul style="list-style-type: none"> Coxittsete (1121-1068)
Risiko strømafbrydelse og for at snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> Batteridrift (1123-1003) Batteri back up (1123-1001)
Ønske om blød sædekomfort	<ul style="list-style-type: none"> Sædepude ekstra blød (latex) Ekstra blød ryg alternativt multitilpasningsryg eller ILPM ryg (vor blødeste ryg)
Ønske om korrekt lændestøtte	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar lændestøtte , manuel (std) eller elektrisk betjent (1113-1016)
Ekstra følsom hud på sæde og lår	<ul style="list-style-type: none"> Sædepude ekstra blød (latex)
Ekstra følsom hud på arme/albuer	<ul style="list-style-type: none"> Armlæn betrukket med latex (1122-1025) Betræk med skind (1122-1030)
Ekstra følsom hud på ryg	<ul style="list-style-type: none"> Ryg ekstra blød eller tilpasning med ekstra latexlag på ryg (1122-1029)
Ekstra følsom hud på lægge og knæhalse	<ul style="list-style-type: none"> Sammenhængende betræk på sæde og benstøtte. Ekstra lag med latex på benstøtte
Forflytning til/fra rullestol, sidevejs forflytning	<ul style="list-style-type: none"> Sidevanger opslåelige, manuelt betjent (1113-1030/1113-1031) Alt el-betjent (1113-1028/1113-1029)
Problemer med at betjene svingfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Elektrisk betjent svingfunktion (1105-1004)
Rygproblemer, smerter i lænd	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar lændestøtte, manuel (std) eller elektrisk betjent (1113-1016/1118-1004) RCPM sædesystem (dynamisk sædeenhed)

ILPM og ILP

- Vore avancerede tilpasningsrygge



Det medfølger et sæt med forskellige sidestøtter som enkelt kan placeres hvor man ønsker

ILPM-Den ultimate tilpasningsryg som klarer det meste

Ryggen som gør det muligt at give stabil og komfortabel sædekomfort til de fleste personer med balanceproblemer og behov for positionering i stolen, f.eks ved fejlstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggen har funktionaliteten fra vor multitolpasningsryg med leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombineret med justerbar rem-regulering og rygskum med ekstra blødt skum i center. Med hver ryg følger et tilpasningssæt med forskellige sidestøttepuder med forskellige størrelser, form og blødhed som enkelt kan placeres der hvor man ønsker, uden brug af værktøj.

Med ILPM ryggen følger også manuel luftregulerbar lændepude, som også enkelt kan reguleres i højden. Vælg mellem std betræk i stof eller skind, alternativt specialstofferne Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) med meget stretch

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vort Memorykit, som indeholder elektrisk regulering af topdelen på ryggen, varme, memoryfunktion (x2) og elektrisk reguler lændestøtte (1118-1004). Det giver de bedste muligheder for selv at kunne ændre på siddestilling og altid kunne opnå ønsket støtte. Et nyttig tilbehør ved stort behov for positionering og støtte af overkrop og hoved/nakke.


ILP-ryg

En enklere variant uden multitolpasningsfunktionen. Leveres med manuel justerbar lændestøtte med håndpumpe. Og med med et tilpasningssæt med forskellige sidestøttepuder med forskellige størrelser, form og blødhed som enkelt kan placeres hvor man ønsker, uden brug af værktøj.

Varenr	HMI art nr	Ryg u betræk (inkl regulerbar lændestøtte)
1118-1039		ILPM ryg sb45 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1038		ILPM ryg sb45 rh72 multijusterbar u betræk
1118-1041		ILPM ryg sb51 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1040		ILPM ryg sb51 rh72 multijusterbar u betræk
1118-1042		ILPM ryg sb57 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1043		ILPM ryg sb63 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1059		ILPM ryg sb69 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1035		ILP ryg sb45 rh84 u betræk
1118-1034		ILP ryg sb45 rh72 u betræk
1118-1036		ILP ryg sb51 rh84 u betræk
1118-1037		ILP ryg sb57 rh84 u betræk
1118-1063		ILP ryg sb63 rh84 u betræk
Varenr	HMI art nr	Betræk til ILPM og ILP rygge
1122-1181		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb45 rh84
1122-1182		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb45 rh72
1122-1183		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb51 rh84
1122-1184		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb51 rh72
1122-1185		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb57 rh84
1122-1186		Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb63 rh84
1122-1187		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb45 rh84
1122-1188		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb45 rh72
1122-1189		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb51 rh84
1122-1190		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb51 rh72
1122-1191		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb57 rh84
1122-1192		Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb63 rh84
1122-1193		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb45 rh84
1122-1194		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb45 rh72
1122-1195		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb51 rh84
1122-1196		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb51 rh72
1122-1197		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb57 rh84
1122-1198		Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb63 rh84
1122-1211		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb45 rh84
1122-1212		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb45 rh72
1122-1213		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb51 rh84
1122-1214		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb51 rh72
1122-1215		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb57 rh84
1122-1216		Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb63 rh84



ILPM-ryggen har ekstra blødt skum i center af ryg

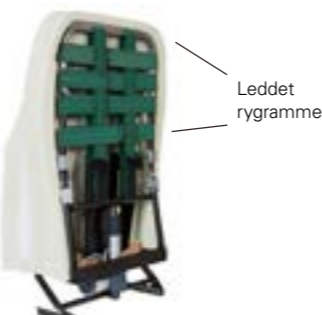

ILPM-ryggen har leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombineret med justerbar rem regulering

ILPM PLUS

– med ekstra stabile sidestøtter - når behov for fastere tilpasning **NYHED**

Ny avanceret tilpasningsryg fra Fitform, med egenskaberne som ILPM ryggen men i tillæg med ekstra afstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan højdereguleres bag på ryggen. Man kan også vælge tykkelse på sidestøttepolstrerne. Vælg mellem specialstofferne Uniform og Sarcotex (inkosikkert) som har meget stretch. Kan ikke leveres med std stof eller skind.



NYHED ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1118-1055		Ryg ILPM PLUS sb45 rh84 u betræk
1118-1056		Ryg ILPM PLUS sb51 rh84 u betræk
1118-1057		Ryg ILPM PLUS sb57 rh84 u betræk
1118-1064		Ryg ILPM PLUS sb63 rh84 u betræk
1122-1217		Betræk ILPM Plus ryg sb45 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1219		Betræk ILPM Plus ryg sb51 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1221		Betræk ILPM Plus ryg sb57 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1222		Betræk ILPM Plus ryg sb63 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1223		Betræk ILPM Plus ryg sb45 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1225		Betræk ILPM Plus ryg sb51 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1227		Betræk ILPM Plus ryg sb57 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1228		Betræk ILPM Plus ryg sb63 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
Varenr	HMI art nr	Tilbehør til rygge
1118-1004		Elektrisk regulerbar topdel ryg, el lændestøtte og 2 x memory
1118-1002		Elektrisk regulerbar topdel på ryg
1113-1016		Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform
1106-1008		Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd45
1106-1004		Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd51
1106-1009		Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd57
1106-1005		Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd63

Ryg APPR luftreguleret

Avanceret løsning for optimal trykaflastning og samtidig mulighed for positionering af ryggen. Dette gøres med et sæt af forskellige luftpuder som bygges ind i ryggen. Bør for optimal effekt bruges i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) specialbetræk med meget stretch og tilpasnings egenskaber og gerne sammen med APPR luftbaseret sædepude. (s.12) Leveres kun færdig fabrikmønteret i valgt ryg.

Bag lynlåsen bag på ryggen finder du 4 forskellige slanger/ventiler med 4 forskellige farver:

- Den gul-grønne ventil er for justering af lændestøtten
- Den blå ventil er for at justere sidestøtten.
- Den brune slange er for at justere den øvre del af ryggen (f.eks støtte ved kyfose)
- Den sorte ventil er for puden i front af ryggen. Trykket i de forskellige puder/kamre ændres ikke hurtigt. Det er imidlertid vigtigt at tjekke hyp-pigt at indstillingene fortsat er rigtige for brugeren.



Varenr	HMS art nr	Varenavn
1118-1084	241110	Ryg APPR sb 45 rh 72 luftreguleret u betræk
1118-1085	241111	Ryg APPR sb 45 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1086	241112	Ryg APPR sb 51 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1087	241113	Ryg APPR sb 57 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1088	241114	Ryg APPR sb 63 rh 84 luftreguleret u betræk

Betræk, se bestillingsdata

Fitform 576 Nordic2

- Ryg multitalpasning / kyfose, med og uden sidetøtte

Specielt egnet ved kyfose, men også for brugere med afvigende kropsform og moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombineret med justerbar rem-regulering og rygskum med ekstra blødt skum i center. (Se fotos s.8) Dette giver mulighed for at forme ryggen efter brugers ryg, og sørger for støtte til hele ryggen. Leveres standard med regulerbar lændestøtte med håndpumpe.

Ryg multitalpasning med sidestøtte

Ryg med rygskum med sidestøtte. For brugere med moderat behov for sidestøtte. Ved behov for mere støtte anbefales vore ILPM eller ILPM Plus rygge.



Leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombineret med justerbar rem regulering



Ryg med sidestøtte

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1118-1011		Ryg sb45 rh84 multitalpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1118-1017		Ryg sb51 rh84 multitalpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1118-1023		Ryg sb57 rh84 multitalpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1121-1112		Betræk sb45 rh84 ryg multitalpasning stof
1121-1113		Betræk sb51 rh84 ryg multitalpasning stof
1122-1047		Betræk sb45 rh84 ryg multitalpasning skind
1122-1062		Betræk sb51 rh84 ryg multitalpasning skind
1121-1115		Betræk sb57 rh84 ryg multitalpasning skind
1121-1114		Betræk sb57 rh84 ryg multitalpasning stof
1118-1010		Ryg sb45 rh84 multitalpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1118-1016		Ryg sb51 rh84 multitalpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1118-1022		Ryg sb57 rh84 multitalpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1121-1109		Betræk sb45 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte stof
1121-1109		Betræk sb51 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte stof
1121-1109		Betræk sb57 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte stof
1122-1045		Betræk sb45 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte skind
1122-1060		Betræk sb51 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte skind
1122-1073		Betræk sb57 rh84 ryg m sidestøtte/multitalpasning m sidestøtte skind
1113-1016		Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform
1118-1004		Elektrisk regb topdel ryg, 2 x memory og el lændestøtte og varme
1118-1002		Elektrisk regulerbar topdel på ryg

Ryg blød (med regulerbar lændestøtte)

Valget for dem som ønsker en blødere sæde-komfort.

Alternative ryghøjder 72, 94 eller 104 cm,

For lange personer kan der leveres alternativ ryghøjde 94 eller 104cm, for små personer 72cm. Standard ryg højde er 84cm. Bestillingsdata, se nedenunder.

Ryg for ekstra kort sædedybde (fra sd37cm)

Gøres ved at lægge et ekstra lag på med skum i ryggen (+2 eller 6cm) Opgiv ønsket sd, samt bredde på stol. Endnu kortere sædedybde ved forespørgsel.

Varenr 1118-1005 HMS 195704 Ryg kortere sædedybde efter mål (fra sd37), inkl tilpasset stofbetræk.

Ryg for ekstra trykafledning

Ved behov for ekstra trykafledning kan vi levere ryggene med et top lag med memoryskum 1122-1029

Alternativt med latexskum ved ønske om ekstra blød komfort 1122-1028 Bestilles som tillæg til valgt ryg.

Varenr	HMI art nr	Ryg ekstra blød
1118-1006		Ryg sb45 rh72 ekstra blød lændestøtte u.betræk
1118-1007		Ryg sb45 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk
1118-1013		Ryg sb51 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk
1118-1020		Ryg sb57 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk
1118-1091		Ryg sb63 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk
Varenr	HMI art nr	Betræk til ryg ekstra blød
1122-1165		Betræk sb45 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1164		Betræk sb45 rh72 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1166		Betræk sb51 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1167		Betræk sb57 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1168		Betræk sb63 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1170		Betræk sb45 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1169		Betræk sb45 rh72 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1171		Betræk sb51 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1280		Betræk sb57 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1172		Betræk sb63 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
Varenr	HMI art nr	Ryg lav og ex høj
1118-1008		Ryg sb45 rh72 lav m lændestøtte u betræk
1118-1014		Ryg sb51 rh72 lav m lændestøtte u betræk
1118-1019		Ryg sb51 rh94 ex høj m lændestøtte u betræk
1118-1025		Ryg sb57 rh94 ex høj m lændestøtte u betræk
Varenr	HMI art nr	Betræk til ryg lav og ex høj
1122-1164		Betræk sb45 rh72 ryg lav m lændestøtte stof grå
1122-1273		Betræk sb51 rh72 ryg lav m lændestøtte stof grå
1122-1277		Betræk sb51 rh94 ryg ex høj m lændestøtte stof
1122-1281		betræk sb57 rh94 ryg ex høj m lændestøtte stof
1122-1269		Betræk sb45 rh72 ryg lav m lændestøtte skind sort
1122-1274		Betræk sb51 rh72 ryg lav m lændestøtte skind sort
1122-1278		Betræk sb51 rh94 ryg ex høj m lændestøtte skind
1122-1282		Betræk sb57 rh94 ryg ex høj m lændestøtte skind
1122-1100		Betræk Sarcotex ryg efter mål
1122-1009		Tillæg for polstring ryg med top lag med memoryskum
1122-1028		Tillæg for polstring ryg med latexskum

* Andre størrelser på forespørgsel

Fitform 576 Nordic2

- Alternative sædeløsninger

Lændestøtte og varmem

Manuelt betjent lændestøtte med håndpumpe og som også kan højdereguleres, er standard på den nye Fitform 576 Nordic2, og indgår også på de fleste af vore specialrygge. Leveres alternativt elektrisk betjent eller som en del af vort Memory Kit.

Varenr	Varenavn
1113-1016	Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform (fabriksmonteret)
1118-1004	Elektrisk regulerbar topdel på ryg, 2 x memory og el lændestøtte(Memory-kit) og varme.
1105-1035	Varme i sæde og ryg (195789)

Elektrisk regulerbar topdel på ryg og Memory-kit

Topdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontrol. Et nyttigt tilbehør ved stort behov for positionering og støtte af overkrop og hoved/hakke.

Kan også leveres som en del i vort Memory-kit sammen med memoryfunktion (x2) og elektrisk regulerbar lændestøtte samt varme.

Med memoryfunktionen kan to forskellige indstillinger gemmes, og betjenes som følger: Indstil først stolen i ønsket position. Tryk MEM til de hører en pipetone og tryk så 1 (eller 2) for at gemme denne position.

Varenr	Varenavn
1118-1002	Elektrisk regulerbar topdel på ryg Fitform
1118-1004	Elektrisk regulerbar topdel på ryg, 2 x memory og el lændestøtte.(Memory-kit) og varme

Ombygningsæt for øget sædedybde 49-59 cm for lange personer

Ved behov for sædedybde udover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombygningsæt som giver mulighed for sædedybde op til 59cm.

Stol med sædebredde 51cm leveres for øvrig færdig i dyb model med sædedybde 49-59cm . Ombygningsættet kan bruges for at opnå sædedybde op til 59cm også på øvrige sædebredder. (sædebredde må opgives ved efterbestilling)

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1106-1008		Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb45
1106-1004		Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb51
1106-1009		Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb57
1106-1005		Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb63

Benstøtteforlænger +8cm for lange personer (op til hele 63 cm)

Giver mulighed for god støtte under hele læg/fod/hæl, også for lange personer. Forlængelsen kører automatisk ind når benstøtten sænkes ned mod gulvet og forhindrer at benstøtten rammer gulvet, noget som kan skade stolen.

Dette indebærer at benstøtten kan forlænges uden konflikt med ønsket sædehøjde

Varenr	Varenavn
1108-1005	Forlænger benstøtte +8cm Fitform sb45 (195665)
1108-1006	Forlænger benstøtte +8cm Fitform sb51 (195666)
1108-1007	Forlænger benstøtte +8cm Fitform sb57 (195667)
1108-1013	Forlænger benstøtte +8cm Fitform sb63 (241088)

Ekstra polstring benstøtte og sammenhængende heldækkende

betræk sæde/benstøtte

Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring, enten med memoryskum, dersom ekstra trykafledning ønskes f.eks ved risiko for tryksår.

Alternativt med latex, hvis ekstra blød komfort ønskes, f.eks ved ekstra følsom hud. Kombineres med alternativt sammenhængende heldækkende betræk sæde-benstøtte, som også ved brug alene giver en blødere komfort end standard løsning.

Varenr	Varenavn
1122-1027	Ekstra polstring med memoryskum på benstøtte (kræver betræk FN620-sb)
1122-1026	Ekstra polstring med latex på benstøtte (kræver betræk FN620-sb)
1121-1116	Betræk sb45 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1117	Betræk sb51 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1118	Betræk sb57 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1119	Betræk sb63 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1120	Betræk sb45 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1121	Betræk sb51 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1122	Betræk sb57 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1123	Betræk sb63 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind

Kan også leveres med betræk i Sarcotex eller Uniform (se bestillingsdata)



Stol med benstøtteforlænger



Betræk benstøtte-sæde sammenhængende

Fitform 576 Nordic2

- Alternative sædeløsninger

Sæde APPR luftbaseret for trykafastning og positionering.


Vor mest avancerede løsning for optimal trykafastning og muligheder for positionering. Højrisikopude som anbefales ved tryksår og risiko for tryksår.

Leveres med indebygget Roho flerkammerpude i ramme af skum, som sørger for at puden fungerer optimalt funktions- og sikkerhedsmæssigt, også når stolens funktioner benyttes. Flerkammerløsningen giver også muligheder for positionering. Bør for optimal effekt bruges i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) specialbetræk med meget stretch og tilpasnings egenskaber.

Varenr	HMI art nr	Pude uden betræk
1121-1043		Pude sæde APPR sb45 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk
1121-1044		Pude sæde APPR sb51 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk
1121-1045		Pude sæde APPR sb57 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk
1121-1070		Pude sæde APPR sb63 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk
Varenr	HMI art nr	Betræk till APPR pude
1121-1100		Betræk special Uniform sb45 for APPR sæde grå
1121-1101		Betræk special Uniform sb51 for APPR sæde grå
1121-1102		Betræk special Uniform sb57 for APPR sæde grå
1121-1103		Betræk special Uniform sb63 for APPR sæde grå
1121-1104		Betræk special Uniform sb45 for APPR sæde sort
1121-1105		Betræk special Uniform sb51 for APPR sæde sort
1121-1106		Betræk special Uniform sb57 for APPR sæde sort
1121-1107		Betræk special Uniform sb63 for APPR sæde sort
1121-1092		Betræk special Sarcotex sb45 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1093		Betræk special Sarcotex sb51 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1094		Betræk special Sarcotex sb57 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1095		Betræk special Sarcotex sb63 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1096		Betræk special Sarcotex sb45 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1097		Betræk special Sarcotex sb51 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1098		Betræk special Sarcotex sb57 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1099		Betræk special Sarcotex sb63 for APPR sæde inkosikker sort



Sædepude APPR luftbaseret

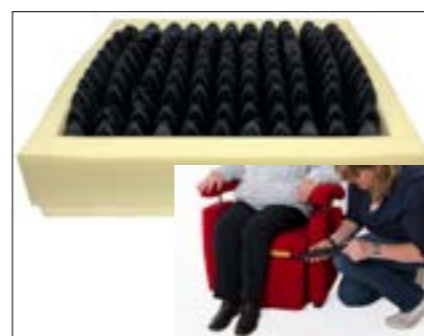

Sædepude Intelligel

Gelbaseret pude med meget gode trykafastende egenskaber. Anbefales brugt i kombination med Uniform eller Sarcotex betræk med meget stretch og bevægende egenskaber (inkosikker). Leveres også i lav udførelse som muliggør sædehøjde fra 36cm.

Varenr	HMI art nr	Pude uden betræk
1121-1026		Sædepude Intelligel sb45 m gel, u. betræk
1121-1027		Sædepude Intelligel sb51 m gel, u. betræk
1121-1028		Sædepude Intelligel sb57 m gel, u. betræk
1121-1029		Sædepude Intelligel sb63 m gel, u. betræk

Trekk, se neste side


Sædepude Intelligel for ekstra lav sædehøjde

Varenr	HMI art nr	Pude uden betræk
1121-1047		Sædepude Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm)
1121-1048		Sædepude Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm)
1121-1049		Sædepude Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)
1121-1050		Sædepude Intelligel ekstra lav sb63 (sh fra 36cm)

Betræk, se næste side



Sædepude Intelligel

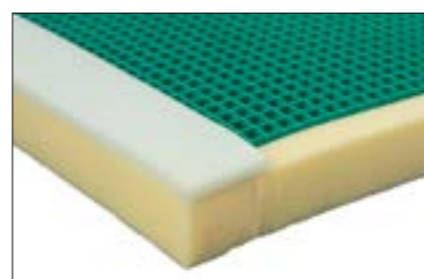

Sædepude Intelligel ekstra lav

Sædepude blød Latex

Sædepude af latex som giver mere blød sædekomfort end standardpuden. Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk som har mere stretch.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1014		Sædepude blød latex sb45 (u betræk)
1121-1018		Sædepude blød latex sb51 (u betræk)
1121-1022		Sædepude blød latex sb57 (u betræk)

Betræk, se længere nede på siden

Sædepude trykafastning skumbaseret

Avancerede lagdelte skumpuder med forskellige fastheder tilpasset ulik brugervægt. Anbefales i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk med gode tilpasnings egenskaber og meget stretch.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1121-1016		Sædepude skumbaseret sb45 trykafastning blød <70kg
1121-1020		Sædepude skumbaseret sb51 trykafastning blød 70-90kg
1121-1024		Sædepude skumbaseret sb57 trykafastning relativt fast >90kg
1121-1025		Sædepude skumbaseret sb63 trykafastning relativt fast >90kg

Sædepude trykafastning skumbaseret med memoryskum, ekstra blød

Avancerede skumbaserede puder med forskellige fastheder tilpasset i 3 forskellige fastheter tilpasset forskellige brugervægt, hvid/gul op til 70kg (til sb45), rød/grøn op til 70-90kg (til sb51), og gul/grøn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinationer skum/størrelser leveres på forespørgsel. (hvid/gul er blødest) Anbefales brugt i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk med meget stretch og gode tilpasnings egenskaber.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1121-1015		Sædepude sb45 trykafastning ex blød m memoryskum <70kg (u.betræk)
1121-1019		Sædepude sb51 trykafastning ex blød m memoryskum 70-90kg (u.betræk)
1121-1023		Sædepude sb57 trykafastning ex blød m memoryskum >90kg (u.betræk)

* Andre kombinationer af skum kan leveres ved forespørgsel

Plansæde

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1121-1007		Plansæde efter mål
1121-1008		Plansæde efter mål m kant

Coxittsete

Her kan højre og venstre sædehalvdel vinkles uafhængig af hinanden.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1121-1068		Coxittsete

Specialbetræk Uniform og Sarcotex for trykafastende puder og blødere komfort

Specialbetræk med speciel god stretch og gode tilpasnings egenskaber. Giver blødere sædekomfort en std betrækkende. Sarcotex er i også inkontinenssikker. Anbefales for optimal effekt ved brug af trykafastende puder. Kan på forespørgsel også leveres til ryg og andre dele på stolen. Vi kan også levere andre typer specialbetræk, f. eks specialbetræk med antibakteriel beskyttelse

Varenr	HMI art nr	Special betræk til trykafastende puder
1121-1100		Betræk Uniform sb45 for sædepude trykafast grå
1121-1101		Betræk Uniform sb51 for sædepude trykafast grå
1121-1102		Betræk Uniform sb57 for sædepude trykafast grå
1121-1103		Betræk Uniform sb63 for sædepude trykafast grå
1121-1104		Betræk Uniform sb45 for sædepude trykafast sort
1121-1105		Betræk Uniform sb51 for sædepude trykafast sort
1121-1106		Betræk Uniform sb57 for sædepude trykafast sort
1121-1107		Betræk Uniform sb63 for sædepude trykafast sort
1121-1087		Betræk Sarcotex sb45 for sædepude trykafast grå inkosikker
1121-1088		Betræk Sarcotex sb51 for sædepude trykafast grå inkosikker
1121-1089		Betræk Sarcotex sb57 for sædepude trykafast grå inkosikker
1121-1090		Betræk Sarcotex sb63 for sædepude trykafast grå inkosikker
1122-1002		Betræk Sarcotex sb45 for sædepude trykafast sort inkosikker
1122-1114		Betræk Sarcotex sb51 for sædepude trykafast sort inkosikker
1122-1106		Betræk Sarcotex sb57 for sædepude trykafast sort inkosikker
1122-1091		Betræk Sarcotex sb63 for sædepude trykafast sort inkosikker
1122-1100		Betræk Sarcotex ryg efter mål

Standardbetræk sæde i stof og skind

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1122-1252		Trekk setepude sb45 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1253		Trekk setepude sb51 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1254		Trekk setepude sb57 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1255		Trekk setepude sb63 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1256		Trekk setepude sb45 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1257		Trekk setepude sb51 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1258		Trekk setepude sb57 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1259		Trekk setepude sb63 Fitform Nordic2 skind sort
1121-1116		Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1117		Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1118		Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1119		Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1120		Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1121		Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1122		Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1123		Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind



Blød Latex



Ekstra blød < 70kg



Ekstra blød 70-90kg



Ekstra blød < 90kg



Plansæde



Coxittsæde



Specialbetræk Sarcotex med blød stretch (inkosikker)

Fitform 576 Nordic2

- Diverse sædeløsninger

Sæderotation, manuel eller elektrisk betjent

Fitform leveres i standardudførelse både med og uden sæderotation. Vor mest brugte løsning låser rotationen automatisk når man begynder at regulere oprejsningsfunktionen. Dette giver maksimal sikkerhed ved at man ikke kan udløse rotationen under oprejsning. Den kan alternativt leveres med manuelt låsbar udløserhåndtag dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/sæderotation kan enkelt eftermonteres på alle stole.

Sæderotationen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontrol.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1102-1011		Sæderotation sb45 manuel med automatisk låsning
1102-1012		Sæderotation sb51 manuel med automatisk låsning
1102-1013		Sæderotation sb57 manuel med automatisk låsning
1102-1014		Sæderotation sb63 manuel med automatisk låsning
1102-1015		Sæderotation sb45 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1016		Sæderotation sb51 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1017		Sæderotation sb57 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1018		Sæderotation sb63 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1004		Sving/sæderotation el Fitform merpris på stol med rotation
1102-1005		Sving/sæderotation el+IR Fitform merpris på stol m rotation



Sæderotation



Sidevange opslåelig, manuelt betjent

Sidevange opslåelig, manuel eller elektrisk betjent

En meget god løsning til sidevejs forflytning ind og ud af stolen, til/fra rullestol. Her er det let at komme til at nå armlænet på modsat side af stolen. Sidevangen svinges enkelt bagover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontrol.

Kan leveres på en eller begge sider af stolen.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1113-1030		Sidevange Fitform opslåelig, man højre
1113-1031		Sidevange Fitform opslåelig, man venstre
1113-1028		Sidevange Fitform opslåelig, el højre
1113-1029		Sidevange Fitform opslåelig, el venstre



Sidevange opslåelig, elektrisk betjent

Alternative armlænsløsninger

Armlænene på Fitform stolen kan reguleres i højden uden brug af værktøj, og låses let med et drej på skruen bag en lynlås på sidevangen. Kan polstres ekstra med memoryskum f.eks ved risiko for tryksår eller med blød latex f.eks ved ømfindelig hud, gerne kombineret med betræk i blød skind. Som tilpasning kan armlænene tilpasses 2, 4 eller 6 cm indover eller udover.

Varenr	HMI nr	Varenavn
1113-1049		Armlæn Vario hø stof (ca 2 cm lavere end std armlæn)
1113-1048		Armlæn Vario ve stof (ca 2 cm lavere end std armlæn)
1113-1009		Armlæn Vario hø skind (ca 2 cm lavere end std armlæn)
1113-1011		Armlæn Vario ve skind (ca 2 cm lavere end std armlæn)
1113-1046		Armlæn Vario bred hø stof (+2 cm innover)
1113-1047		Armlæn Vario bred ve stof (+2 cm innover)
1113-1001		Armlæn Vario bred hø skind (+2 cm innover)
1113-1002		Armlæn Vario bred ve skind (+2 cm innover)
1122-1025		Ekstra polstring med memoryskum, pr armlæn
1122-1024		Ekstra polstring med blød latex, pr armlæn
1122-1030		Betræk armlæn i skind stk



Armlæn bred



Hulsæt Safety

(for transport med bruger i stol)

En meget sikker løsning da hjulene kun aktiveres når man trykker ned på skubbehåndtaget bag på ryggen. Stolen står stabilt når bøjlen ikke trykkes ned. Velegnet for brug med bruger i stolen. Kan ikke kombineres med sæderotation/svingskive/multitilpasningsryg. Passer kun med ny model 576 Nordic2. Efterlevering til ældre stole, brug varenr 1103-1001.

Varenr	HMI art nr	Varenavn
1113-1005		Hulsæt Safety fabriksmonteret
1113-1006		Hulsæt Safety for eftermontering

NB. Ved eftermontering af hjulsæt på eksisterende stol kræves ændring til ryggramme og rygbetræk, som er forberedt for hjulsæt mekanisme (mont. på specialryg, kun efter aftale).



Bord sammenklappelig og svingbart

Regulerbart i højde, dybde og vinkel

1114-1002 Bord sammenklappelig svingbart hdvreg (højre mont)

1114-1003 Bord sammenklappelig svingbart hdvreg (venstre mont)



Bord transparent svingbart

1114-1006 Bord transparent



Bord tre svingbart

1114-1007 Bord tre svingbart



Bord fritstående

1114-1004 Bord fritstående hvreg, indstilleligt til forskellige sædebredder



Batteri Back Up

Passer stole med Linak og Ciar elektronik (1123-1001). Stolen kan også leveres med batteridrift (1123-1003).

Fitform 576 Nordic2

- Diverse sædeløsninger

Nakkepuder



Hovedstøtte med sidestøtte formbar skum
1113-1034 Stof grå
1113-1033 Sarcotex sort
1113-1035 Uniform
1113-1032 Sort skind



Sidestøtte ryg
1121-1060 Sidestøtte ryg, par
(brug alt. IPLM PLUS ryg som giver større mulighed for tilpasning, og er en bedre løsning)



Plansæde
1121-1007 Plansæde Fitform efter mål
1121-1008 Plansæde Fitform m kant efter mål



Inkontinensbetræk
1122-1177 Inkobetræk sæde sb45
1122-1178 Inkobetræk sæde sb51
1122-1179 Inkobetræk sæde sb57
1122-1180 Inkobetræk sæde sb63
1122-1014 Inkobetræk ryg efter mål
Betræk sæde Sarcotex inkosikkert, se side 13.



Inkontinensbetræk
1122-1173 Inkobetr. sæde og benstøtte sb45
1122-1174 Inkobetr. sæde og benstøtte sb51
1122-1175 Inkobetr. sæde og benstøtte sb57
1122-1176 Inkobetr. sæde og benstøtte sb63



IR-styring
1105-1001 Betjningsboks til IR styring Fitform trådløs letbetjent mod Gewa (kræver 1105-1018)
1105-1018 Tillæg CIAR elektronik for IR styring Fitform Nordic (kun fabriksmonteret)
FN-NETTB Tablet til IR styring Fitform (kræver 1105-1018) inkl programmering
Stolen kan også styres med andre styringer f.eks Rolltalk, specialstyringer som f.eks øjestyling etc. Bed om mere info.



Betjeningsboks standard
1105-1005 Betjeningspanel std stol m tilt
1105-1003 Betjeningspanel std stol u tilt




Betjeningsboks letbetjent
Meget letbetjent betjeningspanel
1105-1004 HMS 195659 Betjeningsboks Light Touch Fitform letbetjent (Linak)




Betjeningsboks Easy
1105-1002 Betjeningsboks Easy m 2 knapper og sammenkoblede elfuntioner
For brugere som synes det er forvirrende med mange knapper på betjeningsboksen, kan den leveres i en Easy-udgave med kun 2 knapper. Da bliver oprejsningsfunksjon, sædetilt og benstøtteregulering sammenkopleet. Rygreguleringen bortfalder (gælder kun ved nylevering, kan ikke efterbestilles).

Bestillingsdata

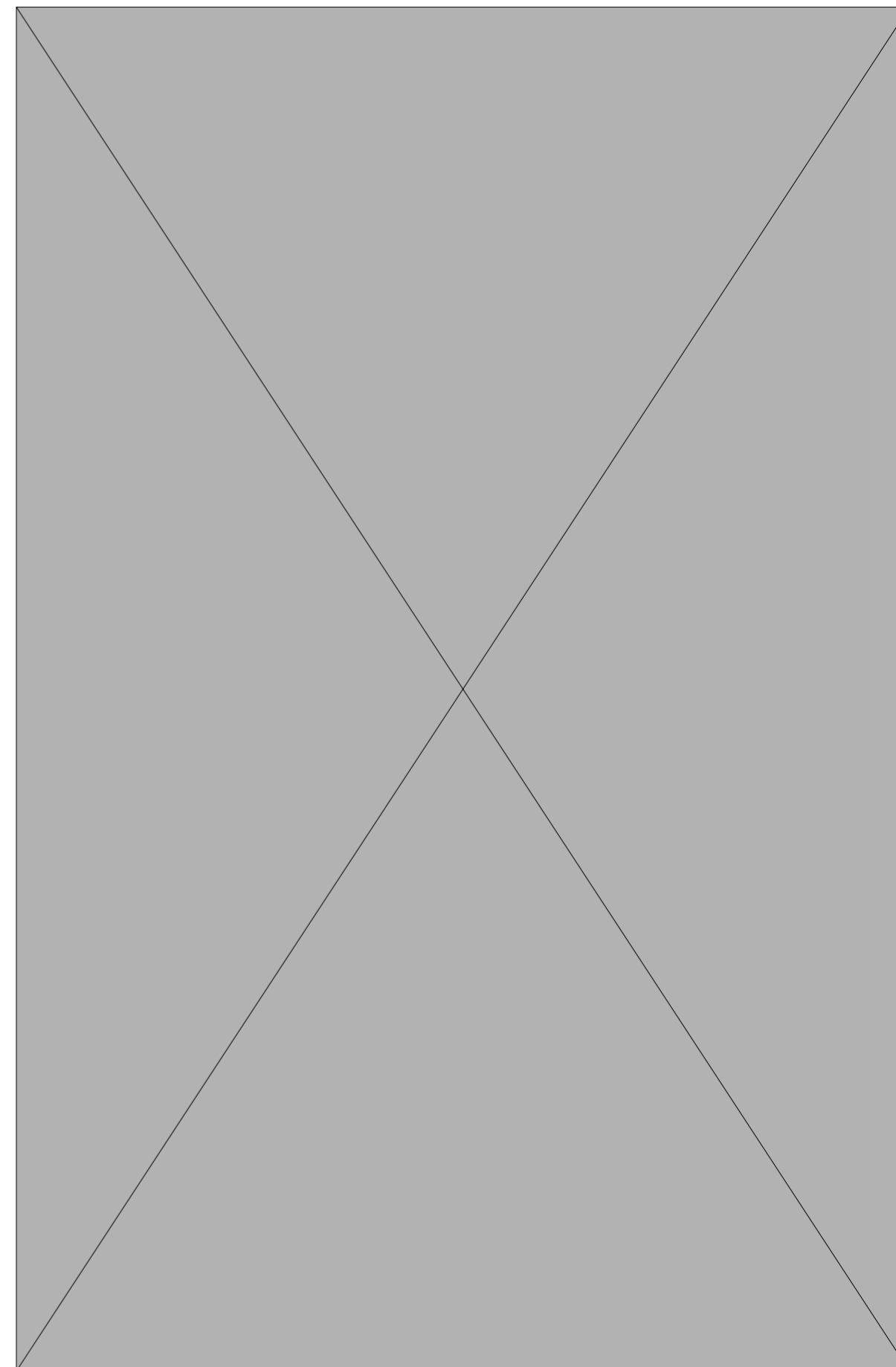


Bestillingsdata

Stole med oprejsningsfunktion
Fitform 576 Nordic2

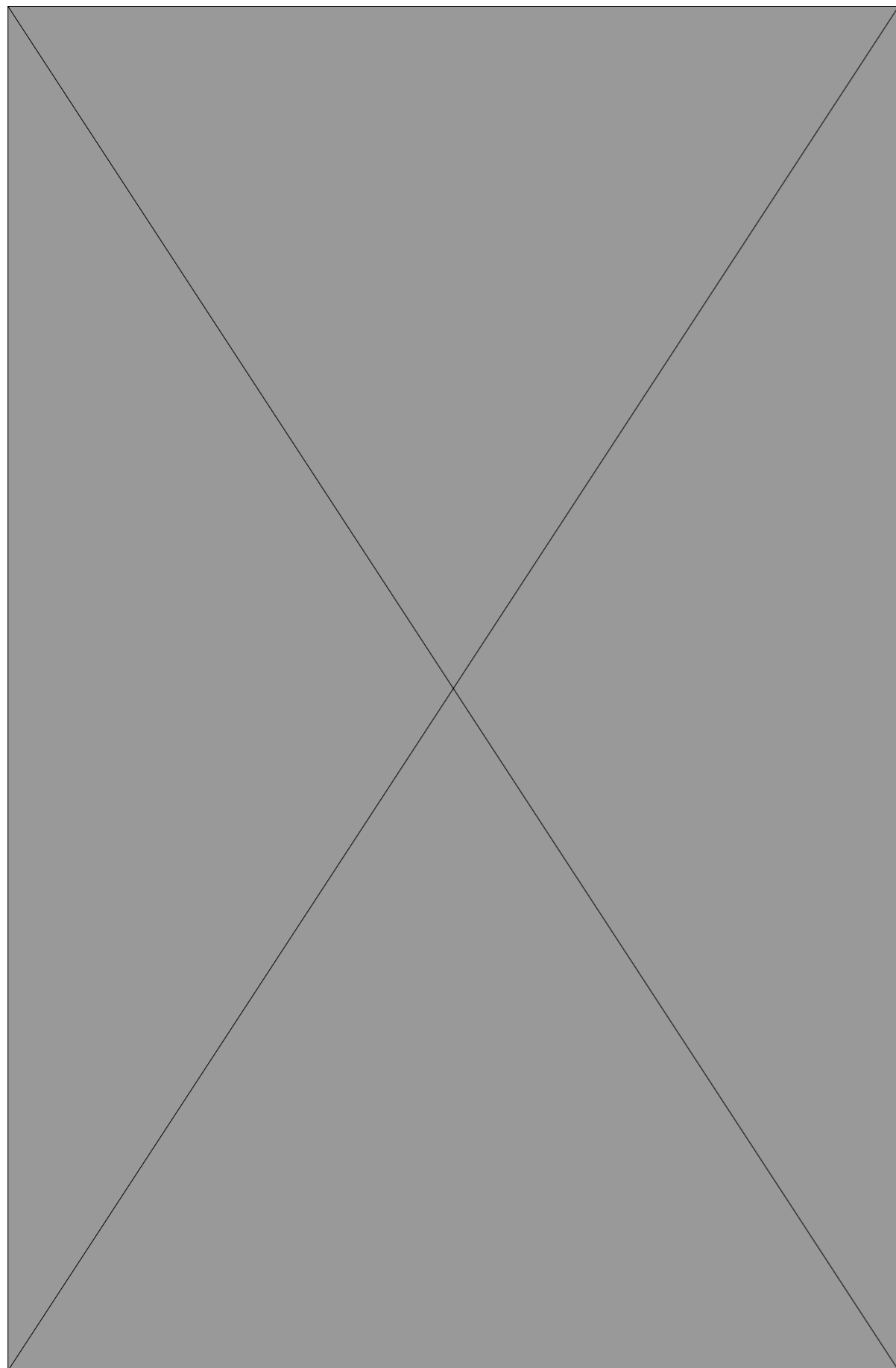


Bestillingsdata

Stole med oprejsningsfunktion
Fitform 576 Nordic2

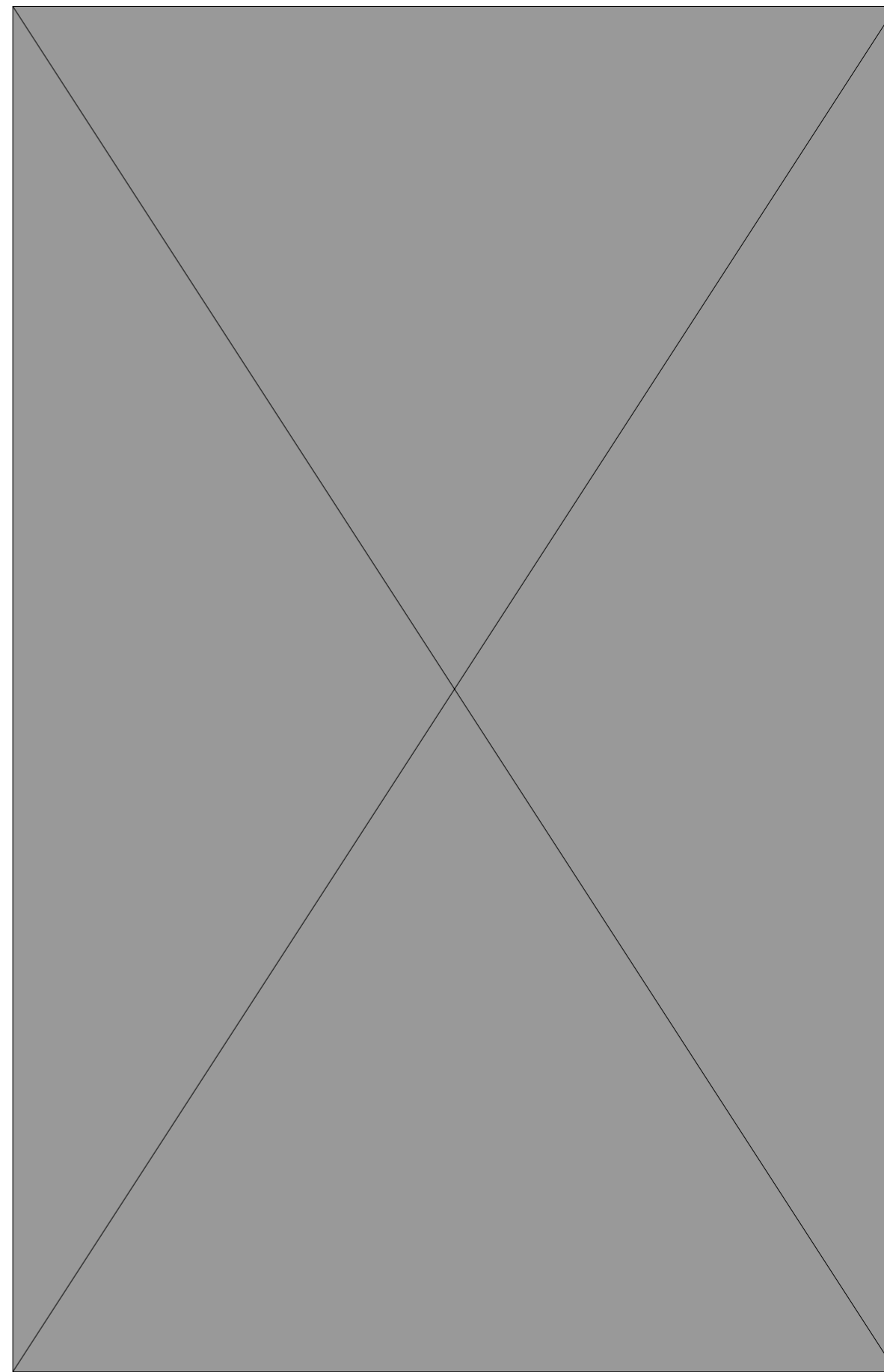

Bestillingsdata


Stole med oprejsningsfunktion
Fitform 576 Nordic2

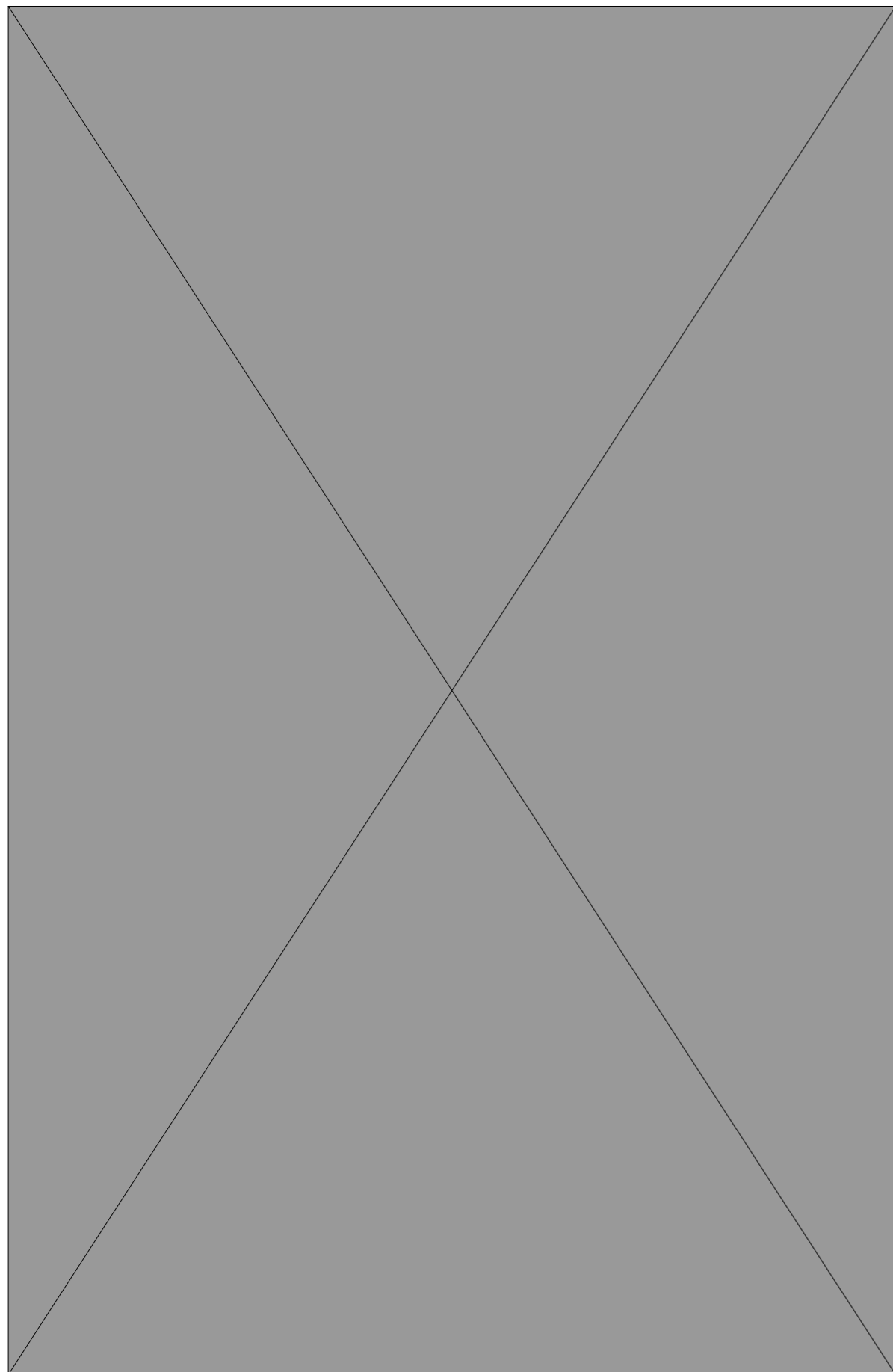

Bestillingsdata



Stole med oprejsningsfunktion
Fitform 576 Nordic2

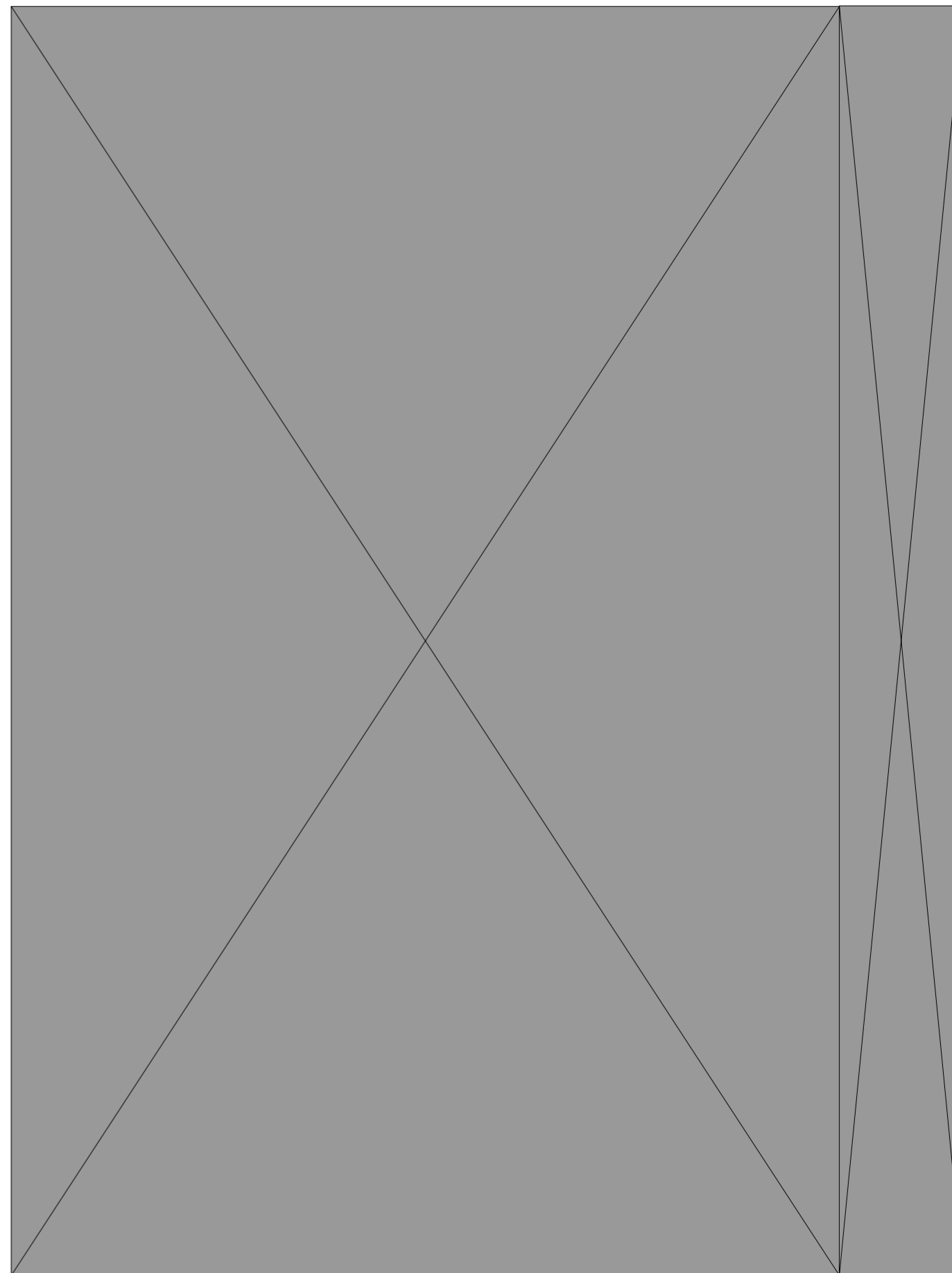

Fitform Saliro

- letbetjent og prisrigtig løfte - hvilestol med synkron-funktion



Ny model fra Fitform til en rigtig god pris. Saliro kendetegnes af høj komfort og er ganske letforståelig og enkelt at betjene. Stolen har synkronfunktion, dvs. at oprejsningsfunktion, benstøtte, tilt og ryg er sammenkoblet sådan at de enkelt kan betjenes med en håndkontrol med bare to knapper. Ønsker man separat regulering af disse funktionerne anbefaler vi modellen Fitform Nordic

Stolen har faste mål, men kan leveres i flere størrelser, i stof eller skind, se bestillingsdata.

Saliro kan leveres med varme i sæde og ryg, behagelig luksus til de lange vinter-aftener! Andet tilbehør/tilvalg er nakkepude, hjulsystem og batteridrift.



Hjulsystem Fitform Saliro



Betjeningspanel med kun to knapper



STANDARDSTOL	Varenr		
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 grå Geiranger stof	FS-49M		
ANDRE UTFØRELSER - BESTILLINGSVARE	Varenr		
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 grå Geiranger stof	FS-49P		
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 grå Geiranger stof	FS-49G		
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 sort skind	FS-49P-HUD		
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 sort skind	FS-49M-HUD		
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 sort skind	FS-49G-HUD		
TILBEHØR	Varenr		
Nakkepude Fitform Saliro stof	FS-NP		
Nakkepude Fitform Saliro skind	FS-NP-HUD		
Hjulsystem Fitform Saliro	FS-WHEEL		
Varme sæde og rygg Fitform Saliro	FS-HEAT		
Batteridrift Fitform Saliro	FS-BATT		

Vi tager forbehold om evt. pris og produktændringer

Notater:



medemagruppen

Stole med oprejsningsfunktion 2018

Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - tlf 70 10 17 55 - www.medema.com