


MANULET

HJÆLP TIL AKTIVT SENDELIGGENDE



Manuel forflytning

- med fokus på faglighed

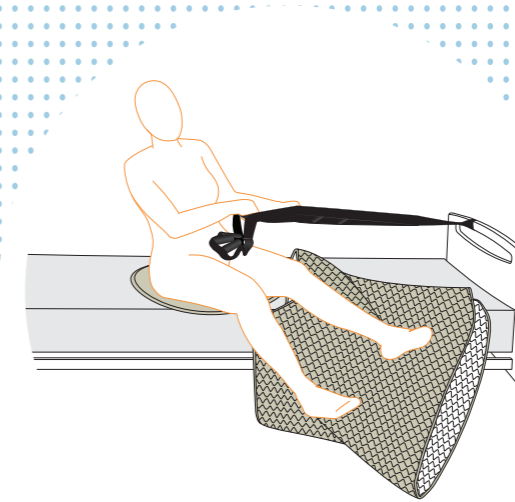

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Når kræfterne bliver mindre, og det bliver vanskeligt at forflytte sig i sengen, er der ofte brug for at få en hjælpende hånd. Det kan blive en stor udfordring at vende sig om på siden, at komme fra liggende til siddende stilling i sengen, at få benene op i sengen og lignende.

Men hvor skal den hjælpende hånd komme fra? Skal det være en pårørende, der rækker hånden frem og fysisk kompenserer for de manglende kræfter? Eller er det plejepersonalet, som hjælper ved at give det "skub", der skal til, for at komme ud af sengen?

Det er et kendt faktum, at plejesektoren byder på en række arbejdsmiljømæssige udfordringer. Udfordringerne er især knyttet til manuelle forflytninger af sengeliggende mennesker. Pårørende og plejepersonale udsætter sig selv for risiko og unødige belastninger, når det er deres muskelkraft, der skal kompensere for den sengeliggendes manglende fysiske ressourcer.

Hos Vendlet mener vi, det drejer sig om at understøtte borgeren, og de ressourcer borgeren fortsat kan anvende. Derfor handler det om at tilbyde hjælp til selvhjælp. Vi skal skabe vilkår og rammer, hvor borgerens egne ressourcer er tilstrækkelige i forhold til de forflytninger, den sengeliggende borger ønsker at gennemføre.

“Det drejer sig om at understøtte borgeren, og de ressourcer borgeren fortsat kan anvende.”

BEVARE VÆRDIGHED

De fleste mennesker foretrækker at kunne klare sig selv. Ikke mindst i mere intime situationer som f.eks. når man ligger i sengen og er mere eller mindre afklædt. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om arbejdsmiljø, men også et spørgsmål om etik og værdighed.

Det handler grundlæggende om at have kontrol med eget liv; at føle sig selvstændig og uafhængig af hjælp fra andre. Mange mennesker oplever det som et stort indgreb i deres liv og selvforståelse, når de pludselig skal til at have hjælp fra plejesektoren. Det er også et stort indgreb i familielivet.

Derfor hjælper vi mennesker til at bevare deres værdighed, når vi giver dem mulighed for at klare sig selv længst muligt.

FILOSOFIEN BAG MANULET

Ifølge fysioterapeut Peter Maindal, der har udviklet MANULET serien, bør vi tilstræbe at undgå manuelle forflytninger. Forflytninger hvor plejepersonalet løfter, trækker eller skubber har en negativ påvirkning af bevægeapparatet og opleves ofte som ubehagelig for den aktive sengeliggende. Vi skal i stedet understøtte den sengeliggendes evne til at klare sig selv længst muligt.

Dette kræver produkter, der er enkle i anvendelse, fleksible i brugsområde og lette at forstå.

MANULET serien består af 5 forskellige produkter, der kan anvendes alene eller i kombination med hinanden; alle med det formål at understøtte den sengeliggendes ressourcer efter devisen hjælp til selvhjælp. Kombinationen af friktionsnedsættende produkter og verbal instruktion i gode teknikker skal kompensere for den sengeliggendes manglende ressourcer.



MANULET Easy Tube

MANULET Easy Tube benyttes til at reducere friktionen under den sengeliggende.

MANULET Easy Tube har en super glat inderside og en hudvenlig blød bomuldsjersey på ydersiden. De 2 lag er quiltet sammen for at opnå formstabilitet og optimal funktion.

MANULET Easy Tube tilbyder stor fleksibilitet i anvendelsen. Den bruges til mange forskellige forflytninger som f.eks. forflytning højere op i sengen, ved vending i sengen og til at få benene op i sengen.

Det behagelige og formstabile design betyder, at det også er muligt at lade den sengeliggende sove på MANULET Easy Tube. Den vil ikke lave store folder eller rynker under borgeren og nedsætter heller ikke madrassens effekt.

MANULET Easy Tube kan også anvendes i kombination med andre produkter som f.eks. VENDLET, MANULET Multi Grip eller MANULET Turn Table.

VARENR.:	5000101
HMI-NR.:	89511
MAX. BELASTNING:	300 kg
STØRRELSE:	L 110 x B 70 cm
PRIS:	Kr. 677 ex. moms


Materialer

STOF:	Bomuld og nylon
FYLD:	Fiberfyld

Vaskeanvisninger



Brug ikke skyllemiddel

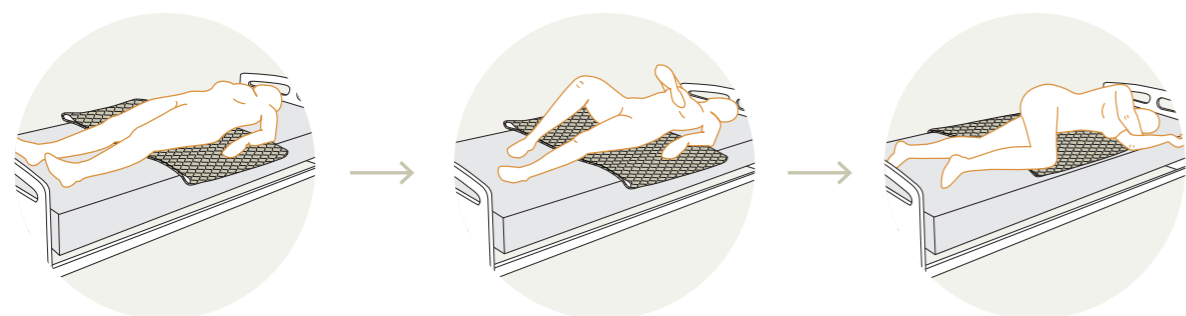

MANULET Turn Table 45 og 60

MANULET Turn Table anvendes til at gøre det lettere at dreje rundt i den siddende stilling.

MANULET Turn Table består af 2 runde skiver med super glat inderside og en hudvenlig behagelig polstret bomuldsjersey på ydersiden. De 2 skiver er fæstet til en metalskive med velcro. Metalskiven er special-designet til at give særdeles lav modstand selv ved høje belastninger. Drejeskiven tåler ikke vask, hvorfor den enkelt og hurtigt kan fjernes.

MANULET Turn Table placeres under borgerens bækken i siddende stilling. Friktionen mellem borger og underlag elimineres, og borgeren kan problemfrit dreje sig. Dette kan have stor betydning f.eks. ved forflytning ind og ud af sengen eller i bilen.

MANULET Turn Table kan også anvendes i kombination med andre produkter som f.eks. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Multi Grip.

MANULET Turn Table fås i 2 størrelser.

VARENR.:	5000104 / 5000105
HMI-NR.:	89514 / 89515
MAX. BELASTNING:	200 kg
STØRRELSE:	Ø 45 / Ø 60 cm
PRIS:	Kr. 315 / Kr. 395 ex. moms


Materialer


STOF:	Bomuld og nylon
FYLD:	Neopren

Vaskeanvisninger



Fjern metalskiven inden vask
Brug ikke skyllemiddel

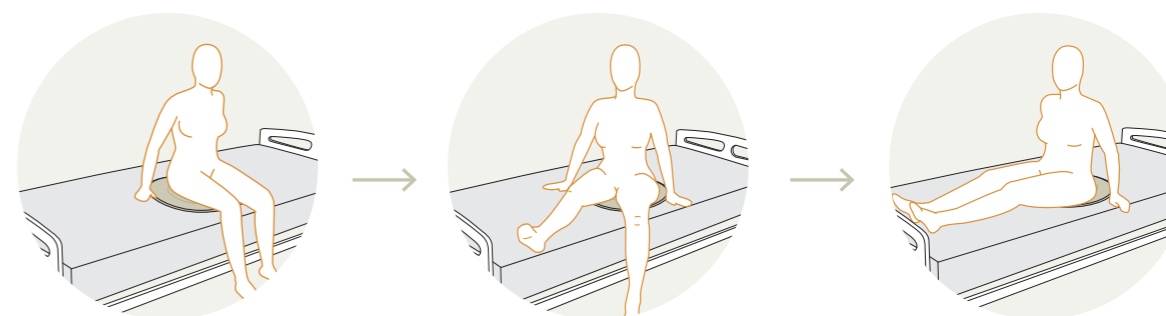

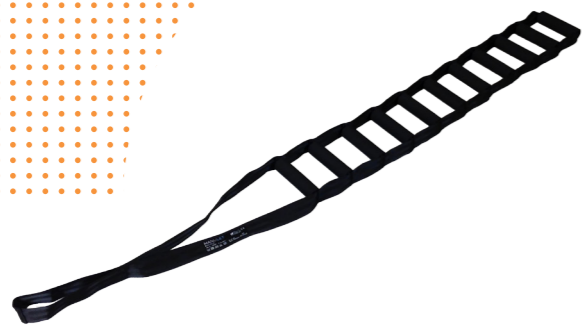

MANULET Multi Grip

MANULET Multi Grip kan benyttes til at komme fra liggende til siddende stilling og omvendt.

MANULET Multi Grip monteres i sengens fodende og lægges på madrassen langs den sengeliggende.

De formfaste bløde skumhåndtag har en diameter på 3 cm, hvilket giver et anatomisk godt greb. Den unikke konstruktion af MANULET Multi Grip giver håndtagene stor stabilitet, når de anvendes. Dette giver høj komfort og er af særlig betydning for mennesker med svage hænder og håndled.

Multi Grip er meget fleksibel, idet den har 11 håndtag og en samlet længde på 170 cm. Det er derfor muligt at finde et godt greb i mange forskellige stillinger, hvilket gør det let at "klatre op eller ned" ad Multi Grip.

MANULET Multi Grip kan også anvendes i kombination med andre produkter som f.eks. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

VARENR.:	5000107
HMI-NR.:	89517
MAX. BELASTNING:	400 kg
STØRRELSE:	L 170 cm
PRIS:	Kr. 789 ex. moms

Materialer

REM:	Polyester
HÅNDTAG:	Polypropylen rør belagt med PE skum

Vaskeanvisninger



Brug ikke skyllemiddel



MANULET Mono Grip

MANULET Mono Grip er til mennesker, som har vanskeligt ved at vende sig i sengen.

MANULET Mono Grip monteres på sengerammen og placeres på madrassen ved siden af den sengeliggende.

Håndtaget er et formfast blødt skumhåndtag, der med en diameter på 3 cm giver et anatomisk godt greb - også for giftplagede fingre og hænder. Dette giver høj komfort og mulighed for et godt stabilt greb.

MANULET Mono Grip kan justeres i længden og nemt tilpasses den sengeliggende og den konkrete situation. Dette betyder, at den sengeliggende altid kan have Mono Grip indenfor rækkevidde og dermed mulighed for at hjælpe sig selv rundt på siden.

MANULET Mono Grip kan også anvendes i kombination med andre produkter som f.eks. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

VARENR.:	5000106
HMI-NR.:	89516
MAX. BELASTNING:	400 kg
STØRRELSE:	L 35 - 95 cm
PRIS:	Kr. 245 ex. moms

Materialer

REM:	Polyester
HÅNDTAG:	Polypropylen rør belagt med PE skum

Vaskeanvisninger



Brug ikke skyllemiddel

