


Hårvaskeunderlag

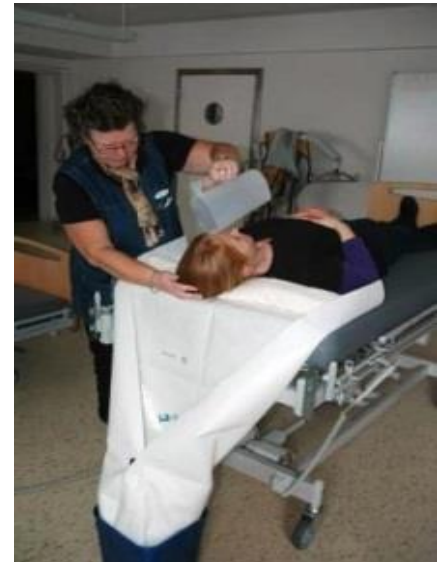

Til hårvask af liggende Patienter

1. Underlaget placeres under patientens skuldre. Plastfolien skal vende opad. Der foldes et håndklæde under nakken af patienter.
2. Velcrobåndene sættes sammen så underlaget former en tragt.
3. I bunden af underlaget sættes en spand, som vandet kan samles i under hårvasken.

Sengen kan eventuelt tippes lidt bagover, således at vandet løber ned mod hovedgærdet.

Underlaget er et non-woven tæppe med folie, der måler 90 x120 cm.



Indkildevej 12 G , 9210 Aalborg SØ , www.therm-aid.com , +45 70202068