

Den lille pudes vandring til mikro-stimulering og lejrning – forebygger tryksår og lindrer smerter✓

Samtidig med en trykfordelende madras bruges lejrning med Soft-Lift puden. Metoden kaldes for "Den lille pudes vandring".

To små puder anvendes punktvis under kroppen til trykfordeling og trykaflastning.

Dermed forebygges tryksår og smerter lindres yderligere effektivt og nænsomt 🍌☐



I rygleje placeres to Soft-Lift puder under henholdsvis skulder og hofter skiftevis på enten højre side eller venstre side.

I sideleje placeres én Soft-Lift pude ind under abdomen/maven på personen og skiftevis ud.

Det handler om små skift i stillingen, som samtidig er diskrete, og giver en bedre sammenhængende hvile og søvn.

Man kan bedre ligge som man gerne vil, og det er lydløst.

Den dyre vekseltrykmadras vil være overflødig med kendskabet til denne metode.

Vi kommer mere tilbage til den menneskelige pleje 🍌❤️

- og ikke maskiner og teknik, der ellers fylder negativt under svær sygdom eller terminalpleje.



SAFE Med Topmadrasser og SAFE Med Helmadrasser former sig efter kroppen, er trykfordelende i.f.t. Anti-decubitus, Smertelindring, Restitution og Rehabilitering.

Topmadrasser til smertelindring inklusiv Soft-Lift puder med Soft-Cell betræk og betræk til topmadras med anti-slip bagside:

Nr. 101B Gul – højde 6 cm

HMI-serie nr. 115516

op til 50 kg, blød til meget tynde

Nr. 101YP Gul/Rosa – højde 6 cm

HMI-serie nr. 101170

50-130 kg, blød-medium til tynd/middel og moderat overvægt

TT SAFE Med ApS, Blytaekkervej 10, 8800 Viborg, Denmark, Tel. +45 8662 1400

mail@tsafemed.dk, www.safemed.dk

SAFE-MED
Trykfordelende Produkter
www.safemed.dk