

Forflytning med Spiler+



Spiler+ er forflytningslagnet som du anvender når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften lave arbejdet.

Herved kan du fortsætte med at bruge spilerdug og have glid i alle retninger, også når forflytningerne bliver for tunge.

Personen ligger fast på Spiler+ og spilerdug placeres under Spiler+.

Spiler+ kan vaskes og tumble tørres. Det er billigt i indkøb og kan, hvis man ønsker det, genanvendes igen og igen.

Brehms Spilerdug ApS

Tlf.:+45 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk

Vending i seng med Spiler+ short, delvis passiv person



Forbered forflytningen.

Placer puden så personen også har hovedstøtte efter vending.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg.



Fold spilerdugen i fede folder.

Yderligere information om at placere spilerdug, se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.



Kør liften lidt op så du skaber plads.
Personen skal blot vippe lidt.
Placer spilerdug halvt ind under kroppen, som du plejer.
Her er anvendt et foldet stykke under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og kør liften lidt op så personen vippe.
Fold spilerdugen ud.
Nu kan du anvende liften til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Placer dine hænder på Spiler+ ud for personens skulder og hofte.
Kør liften op så personen bliver vendt om på siden samtidig med at du styrer personen længere ind i sengen.

Alternativ metode se side 8 og 9.



Udfør nu plejeopgaver og forflytningerne. Anvend loftliften ved behov.



Når forflytningerne er udført, fjernes spilerdugen.

Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kør liften lidt op så personen vip-
pes.

Glid spilerdugen halvt ind under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern spilerdugen fra modsatte side.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se At fjerne spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.



Vending i seng Spiler+ Long, passiv person



Forbered forflytningen.

Placer puden så personen også har hovedstøtte efter vending.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg.



Fold spilerdugen i fede folder.

Yderligere information om at placere spilerdug, se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.



Kør liften lidt op så du skaber plads.
Personen skal blot vippes lidt.

Placer spilerdug halvt ind under
kroppen, som du plejer.

Her er anvendt et foldet stykke un-
der kroppen og et under lægge/
fødder.



Hold eventuelt igen på Spiler+ når du
placrer spilerdug ved fødderne.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og kør liftens lidt op så personen vippes.



Fold spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liftens til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Glid personen til modsatte side inden vending.



Kør liften op så personen bliver vendt om på siden, stabiliser evt. ved hoften.

Alternativ metode se side 4.



Udfør nu plejeopgaver og forflytninger. Anvend loftliften ved behov.

Når plejeopgaverne er udført, fjernes spilerdugen.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kør liften lidt op så personen vipres.

Glid spilerdugen tilbage, halvt ind under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern spilerdugen.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se At fjerne spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.



Information og vejledende anbefalinger



Spiler+ Short

Varenummer/HMI: 101928

145 cm bred cm. X 140 cm lang.

Vejledende størrelse på spilerdug:

175 cm bred x100 cm lang, foldet *eller* 2 stykker 100 cm bred x130 cm lang



Spiler+ Long

Varenummer/HMI: 101927

145 cm. bred X 240 cm lang.

- *kan eventuelt erstatte lagnet* -

Vejledende størrelse på spilerdug:

175cm bred x100 cm lang foldet *eller* 2 stykker 100 cm bred x 100 cm lang under kroppen *og eventuelt*

100 cm x 100 cm foldet *eller* 2 stykker 65-100 cm x100 cm under lægge og hæle.


Fakta

Kan vaskes på 80 grader og tørre tumbles ved lav temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester og 20 % bomuld (lagen), 100% polyester (greb)

Anvendes med spilerdug under. Vi anbefaler at fjerne spilerdugen når personen ikke skal forflyttes mere.

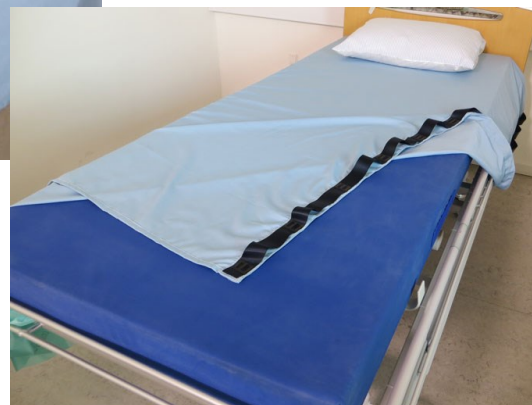

Spiler+ er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

