

## Rollatorstativ med beslag til troja-rollator på Karma el-scooter

Rollatorstativ kan leveres med beslag til troja-rollator. Troja-rollator eller troja-rollatorlignende-rollator klappes sammen forhjul imod forhjul og baghjul imod baghjul.

Man afmonterer krogene på et standard rollatorstativ og påsætter i stedet beslag til troja-rollator på rollatorstativet. Beslag til troja-rollator er et tilkøb. Beslagene til troja-rollatoren justeres ind på den nedre og øvre stang i forhold til den fysiske rollator, således rollatoren sidder godt fast under kørsel med el-scooteren.

### Billeder af beslag-sæt:

Varenr.: 100617  
HMI nr.: 108133

Der er vist den Umbraco-nøgle (nr. 4) på billedet, som kan anvendes til justering af beslag-sættet.



Billeder, der viser eksempler på monterede beslag til troja-rollator



Venligst bemærk: Det er tilfældigt at billederne er taget af et rollatorstativ, der er monteret ind i det firkantede rør under sædet, rollatorstativet kunne lige så godt have været monteret på bagrammen af el-scooteren.